

CROSS[™] Hemi Shoulder

Suunniteltu itsenäiseen käyttöön, optimaaliseen mukavuuteen ja parempaan kuntoutukseen



Innovatiivinen olkaortoosi, joka on suunniteltu antamaan nostetta, tukemaan ja lievittämään kipua.

CROSS™ Hemi Shoulder on mukava ja vakaa tekstiiliortoosi, joka on suunniteltu subluksaation ja olkapääkivun hallintaan (1-5).

Ortoosi on suunniteltu tarjoamaan hallittua korjausta käsivarren ja olkapään asentoon ulkokierrolla ja elevaatiolla, tavoitteena lievittää kipua, parantaa ryhtiä ja edistää toiminnallista liikettä. Näin se tukee käyttäjän aktiivista kuntoutusprosessia.

Käyttöalueet

Subluksaatio, olkapääkivut ja toimintahäiriöt, jotka johtuvat neurologisista tiloista, kuten:

- Aivohalvaus
- Pareettinen olkapää/käsi hemiplegian seurauksena
- Plexus brachialis -vammat

Kontraindikaatiot

Traumaattinen olkapään sijoiltaanmeno. Sydämentahdistimen käyttö. Defibrillaattorin (ICD) käyttö.



Helppo pukea yhdellä kädellä

CROSS™ Hemi Shoulder on suunniteltu helppoon pukemiseen ja riisumiseen yhdellä kädellä. Joustavat tuet avaavat ortoosin sovituksen aikana, jolloin se on helppo pujottaa myös spastisuudesta ja paresista kärsivään yläraajaan. Tämä takaa sujuvan ja yksinkertaisen käytön myös heikentyneillä motorisilla taidoilla.

Helppo pukeminen

Magneettisolkki ja FitGo-kiristysjärjestelmä tekevät ortoosin pukemisesta nopeaa ja intuitiivista. Vain muutama kierto kiristysnupista nostaa ja asettaa käsivarren optimaaliseen asentoon minimaalisella vaivalla.

Käyttäjäystävällinen

Ortoosissa ei ole irrallisia hihnoja tai monimutkaisia solkia. Selkeä numerointi opastaa käyttäjää neljässä yksinkertaisessa vaiheessa oikeaan asentoon.

Parempi käyttömukavuus

Pehmeät, joustavat materiaalit ja paineen jakautumista helpottavat pehmustetut alueet takaavat korkean mukavuuden myös pitkäaikaisessa käytössä.

Liikettä tukeva muotoilu

Ortoosi asettaa yläraajan toiminnalliseen asentoon rajoittamatta liikkuvuutta, mikä varmistaa vakauden samalla, kun luonnolliset liikkeet säilyvät.

FitGo-kiristysjärjestelmän avulla säätöjen tekeminen on nopeaa ja helppoa optimaalisen istuvuuden saavuttamiseksi. FitGo-järjestelmään pääsee käsiksi helposti myös paksumpien vaatteiden, kuten villapaidan, alta.

Konepestävä

Helpon ylläpidon ja optimaalisen hygienian vuoksi, ortoosi on konepestävä 40 °C:ssa, mikä tekee siitä käytännöllisen päivittäiseen käyttöön.

CROSS™ Hemi Shoulder -pukeminen vaiheittain

- 1 Aseta olkaortoosi vaurioituneelle olkapäälle ja kiinnitä magneettisolki rinnan yli.**

Tämä on lähtökohta vakaalle ja turvalliselle asennolle.




- 2 Kiinnitä ortoosin käsivarren osa.**

Kyynärvarren käsivarrenosa toimii yhdessä ortoosin yläosan kanssa kiertäen yläraajaa ulospäin ja nostaen sitä.

- 3 Kiristä rotaatioremmi,**
kiertää käsivarren ulospäin.

- 4 FitGo Twist-lock -järjestelmä.**

nostaa käsivarren oikeaan asentoon optimaalisen toiminnan ja mukavuuden varmistamiseksi.

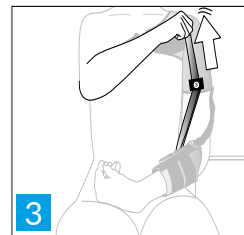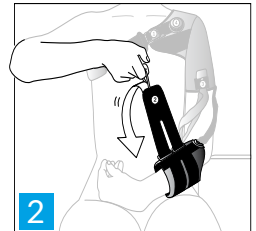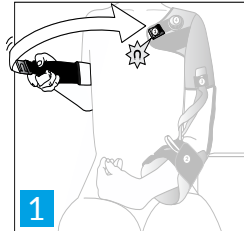

Löydät CROSS Hemi Shoulder
-ohjevideomme täältä!



Asento, joka lievittää kipua ja suojaa

Oikea olkapään asento:

- Korjaa subluksaatiota ja sisäkiertoa rajoittamatta käsivarren liikkuvuutta.
- Lievittää kipua ja parantaa toiminnallisuutta. Auttaa ehkäisemään kapselin, nivelsiteiden, jänteiden ja hermojen liiallista venytystä.
- Vähentää lisävammojen riskiä. Virheellinen yläraajan asento voi johtaa kipuun, lihas- ja nivelvaurioihin sekä toimintahäiriöihin.

CROSS™ Hemi Shoulder on suunniteltu minimoimaan nämä riskit.



CROSS™ Hemi Shoulder


- FitGo-järjestelmä tarjoaa tehokkaan ja yksilöllisesti mukautetun humeruksen noston.
- Magneettisolki helpottaa pukemista ja riisumista.
- Ortoosi on selkeästi merkitty numeroilla, jotka tarjoavat visuaaliset ohjeet ortoosin helppoon pukemiseen ja riisumiseen.
- Valmistettu korkealaatuisista, pehmeistä materiaaleista lisämukavuuden ja käyttäjäystävällisyyden takaamiseksi.
- Avoin muotoilu on räätälöity spastisille ja pareettisille yläraajoille. Joustavat tuet varmistaa helpon pukemisen pitämällä ortoosin avoimena.
- Pehmuste terveessä kainalossa vähentää hermopainetta, kun taas pehmustettu olkapään stabilointiosa estää kipupisteitä. Kyynärvarren tuet varmistavat tasaisen paineen jakautumisen rajoittamatta verenkiertoa.
- Rotaatioremmi kiertää käsivarren ulospäin ennen nostoa.
- CROSS™ Hemi Shoulder Strap (28718) voidaan käyttää, jos tarvitaan lisätukea ja olkapään retraktiota.



Vaihtoehtoiset neurologiset ortoosit – turvalliseen ja vakaaseen tuentaan

Kokonaisvaltainen tuki optimaaliseen toimintaan

Tarjotaksemme potilaille täydellisen tuen voidaan CROSS™ Hemi Shoulder yhdistää muihin valikoimamme ortooseihin. Tarjoamme erilaisia ratkaisuja, mukaan lukien apuvälineitä neurologiseen käteen ja ranteeseen, polven yliojennukseen ja riippunilkkaan. Ortoosit edistävät parempaa toimitakykyä, tasapainoa ja ryhtiä – yksilöllisesti jokaisen potilaan tarpeisiin mukautuen.

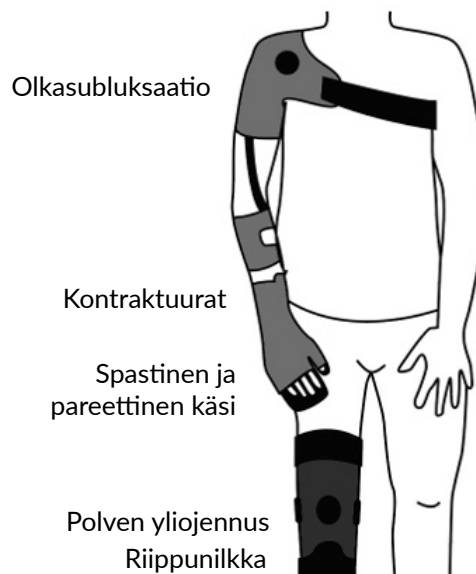

Valikoimassamme



Allard AFO Riippunilkkaortoosit

Potilaille, joilla on eriasteinen riippunilkka.



CROSS™ semi-rigidi polviortoosi

Potilaille, joilla on polven yliojennus.




S.O.T lepo-ortoosi

Potilaille, joilla on spastinen ja pareettinen käsi.



CROSS™ Hemi Shoulder

Tuotenro.	Koko	Vas/Oik	Olkavarren ympärys (1)	Kyynärvarren ympärys (2)
287171010	X-Small	Vasen	24-28 cm	21-24 cm
287171011	Small	Vasen	27-31 cm	23-26 cm
287171012	Medium	Vasen	30-35 cm	25-29 cm
287171013	Large	Vasen	34-39 cm	28-32 cm
287171014	X-Large	Vasen	38-43 cm	31-35 cm
287172010	X-Small	Oikea	24-28 cm	21-24 cm
287172011	Small	Oikea	27-31 cm	23-26 cm
287172012	Medium	Oikea	30-35 cm	25-29 cm
287172013	Large	Oikea	34-39 cm	28-32 cm
287172014	X-Large	Oikea	38-43 cm	31-35 cm
CROSS™ Hemi Shoulder, Strap				
287180000	Yksi koko			

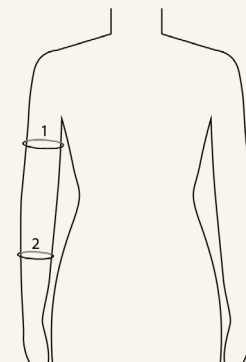

Viitteet:

1. Chatterjee, Hayner et al./ North American Journal of Medical Sciences, 2016
The California Tri-pull Taping Method in the Treatment of Shoulder Subluxation After Stroke: A Randomized Clinical Trial.
2. M Nadler and MMH Pauls, Clinical rehabilitation 2017
Shoulder orthoses for the prevention and reduction of hemiplegic shoulder pain and subluxation: systematic review.
3. Hartwig, M, et al. Clinical Rehabilitation, 2012
Functional orthosis in shoulder joint subluxation after ischemic brain stroke to avoid post-hemiplegic shoulder-hand syndrome: a randomized clinical trial.
4. Willemijn R.G., Verloop, et al. P & O Rehabilitation 2021
A newly designed shoulder orthosis for patients with glenohumeral subluxation: a clinical evaluation study.
5. K.N. Arya, S. Pandian, et al. Topics in Stroke Rehabilitation 2018
Rehabilitation methods for reducing shoulder subluxation in post-stroke hemiparesis: a systematic review.

Support for Better Life

Everyone should be able to live their life to the fullest, regardless of their mobility challenges. With innovative solutions developed in close collaboration with healthcare professionals and patients, we strive to provide Support for Better Life.



Sverige
042-25 27 00
info@camp.se
camp.se

Danmark
43 96 66 99
info@camp.dk
camp.dk

Finland
09-350 76 30
info@camp.fi
camp.fi

Norge
23 23 31 20
info@camp.no
camp.no