


39330/39333 I/39335/39336 Käsine 39340 Hiha Ohjeet mittojen ottamiseen

elements
body

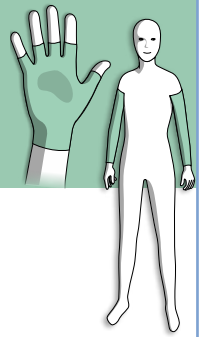


Ohjeet mittojen ottamiseen. Kaikki mitat ovat cm:nä. Pituusmitta (oranssi) - mittanauhan tulee olla ihossa kiinni. Kaikki mitat tulee ottaa ihoa myötäillen ilman, että mittaa vedetään suoraksi. Muutamaa poikkeusta lukuunottamatta kaikki mitat tulee ottaa asiakkaan ollessa makuuasennossa, vartalo rentona ja hengityksen tulee olla normaali. Asiakkaaseen on hyvä merkitä mitanottokohdat.

Käsine

- LR/30 Peukalo:Ympärysmitta MCP-nivelen kohdalta
- LR/31 Peukalo:Ympärysmitta distaalisen nivelen kohdalta tai siitä kohtaa mihin käsineen sormiosa päättyy kun lyhyet sormiosat
- LR/32 Etusormi:Ympärysmitta proksimaalisen nivelen kohdalta tai siitä kohtaa mihin käsineen sormiosa päättyy kun lyhyet sormiosat
- LR/33 Etusormi:Ympärysmitta distaalisen nivelen kohdalta tai siitä kohtaa mihin käsineen sormiosa päättyy kun pitkät sormiosat
- LR/34 Keskisormi:Ympärysmitta proksimaalisen nivelen kohdalta tai siitä kohtaa mihin käsineen sormiosa päättyy kun lyhyet sormiosat
- LR/35 Keskisormi:Ympärysmitta distaalisen nivelen kohdalta tai siitä kohtaa mihin käsineen sormiosa päättyy kun pitkät sormiosat
- LR/36 Nimetön:Ympärysmitta proksimaalisen nivelen kohdalta tai siitä kohtaa mihin käsineen sormiosa päättyy kun lyhyet sormiosat
- LR/37 Nimetön:Ympärysmitta distaalisen nivelen kohdalta tai siitä kohtaa mihin käsineen sormiosa päättyy kun pitkät sormiosat
- LR/38 Pikkusormi:Ympärysmitta proksimaalisen nivelen kohdalta tai siitä kohtaa mihin käsineen sormiosa päättyy kun lyhyet sormiosat
- LR/39 Pikkusormi:Ympärysmitta distaalisen nivelen kohdalta tai siitä kohtaa mihin käsineen sormiosa päättyy kun pitkät sormiosat
- LR/40 Kämmenen ympärysmitta peukalon taivekohdasta, kämmen suorana
- LR/41 Ympärysmitta rystysten kohdalta kun valitaan käsine ilman sormia
- LR/42 Peukalo: Pituusmitta MCP-nivelestä käsineen sormiosan päätyyn
- LR/43 Etusormi: Pituusmitta sormen alareunasta proksimaaliseen niveleen tai siihen asti mihin sormiosan halutaan päättyvän kun valitaan lyhyet sormiosat
- LR/44 Etusormi: Pituusmitta sormen alareunasta siihen asti mihin sormiosan halutaan päättyvän kun valitaan pitkät sormiosat
- LR/45 Keskisormi: Pituusmitta sormen alareunasta proksimaaliseen niveleen tai siihen asti mihin sormiosan halutaan päättyvän kun valitaan lyhyet sormiosat
- LR/46 Keskisormi: Pituusmitta sormen alareunasta siihen asti mihin sormiosan halutaan päättyvän kun valitaan pitkät sormiosat

39330/39333 I/39335/39336 Käsine 39340 Hiha Ohjeet mittojen ottamiseen

elements
body

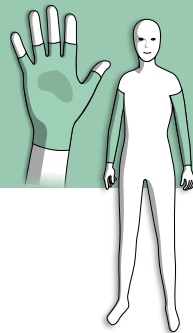

Sormi ja kämmenmitat:

- LR/47 Nimetön: Pituusmitta sormen alareunasta proksimaaliseen niveleen tai siihen asti mihin sormiosan halutaan päättyvän kun valitaan lyhyet sormiosat
- LR/48 Nimetön: Pituusmitta sormen alareunasta siihen asti mihin sormiosan halutaan päättyvän kun valitaan pitkät sormiosat
- LR/49 Pikkusormi: Pituusmitta sormen alareunasta proksimaaliseen niveleen tai siihen asti mihin sormiosan halutaan päättyvän kun valitaan lyhyet sormiosat
- LR/50 Pikkusormi: Pituusmitta sormen alareunasta siihen asti mihin sormiosan halutaan päättyvän kun valitaan pitkät sormiosat
- L/R 51 Käsine sormiosilla: Pituusmitta peukalon tyven tasosta etusormen alareunaan
Käsine ilman sormiosia: Pituusmitta peukalon tyven tasosta siihen asti mihin käsine päättyy
- L/R 52 Käsine sormiosilla: Pituusmitta ranteesta etu- ja keskisormen väliin
Käsine ilman sormiosia: Pituusmitta ranteesta siihen asti mihin käsine päättyy
- L/R 53 Käsine sormiosilla: Pituusmitta ranteesta ulnaripuolelta nimettömän ja pikkusormen väliin
Käsine ilman sormiosia: Pituusmitta ranteesta ulnaripuolelta siihen asti mihin käsine päättyy
- L/R 55 Ranteen ympärysmitta

Käsivarsimitat lyhyt ja pitkä Käsine sekä Hiha:

- L/R54 Pitkä Käsine/Hiha: Pituusmitta ranteesta kyynärtaipeeseen
Lyhyt Käsine: Pituusmitta ranteesta hihan päättymiskohtaan
- L/R55 Pitkä Käsine/Hiha: Ranteen ympärysmitta
Lyhyt Käsine: Ranteen ympärysmitta
- L/R56A Pitkä Käsine/Hiha: Ympärysmitta kyynärvarren paksuimmasta kohdasta
- L/R56B Lyhyt Käsine: Ympärysmitta ranteen ja käsineen (hihan) päättymiskohdan puolivälistä
- L/R57 Pitkä Käsine/Hiha: Kyynärpään ympärysmitta
Lyhyt Käsine: Ympärysmitta hihan päättymiskohdasta
- L/R58 Pitkä Käsine/Hiha: Pituusmitta kyynärtaipeesta hihan päättymiskohtaan
- L/R59 Pitkä Käsine/Hiha: Ympärysmitta kyynärtaipeen ja hihan päättymiskohdan puolivälistä
- L/R60 Pitkä Käsine/Hiha: Ympärysmitta hihan päättymiskohdasta