

39320 HOUSUT

Ohjeet mittojen ottamiseen

elements
body



Oranssi & neliö = pituus

Sininen & ympyrä = ympärysmitta

Ohjeet mittojen ottamiseen. Kaikki mitat ovat cm:nä. Pituusmitta (oranssi) - mittanauhan tulee olla ihossa kiinni. Kaikki mitat tulee ottaa ihoa myötäillen ilman, että mittaa vedetään suoraksi. Muutamaa poikkeusta lukuunottamatta kaikki mitat tulee ottaa asiakkaan ollessa makuuasennossa, vartalo rentona ja hengityksen tulee olla normaali. Asiakkaaseen on hyvä merkitä mitanottokohdat.

C	Rintakehän ympärysmitta kainalotasolta (naisille lisäksi ympärysmitta WC)
U	Keskivartalon ympärysmitta navan tasolta
E	Ympärysmitta vaatteiden päättymiskohdassa.
AS	Ympärysmitta rintojen alapuolelta
UE	Navasta lahkeen päätyyn asti, mitta sivusta
L/R9	Reiden ympärysmitta - ota mitta reiden tyvestä asiakkaan ollessa selinmakuulla lonkka 90° kulmaan taivutettuna
L/R10	Ympärysmitta reiden keskikohdasta (L/R 9 ja L/R 11 mittojen puolivälistä)
L/R11	Ympärysmitta patellan keskikohdasta
L/R12	Ympärysmitta säären yläosasta tuberositas tibian kohdalta (Vain pitkille tai ¾ osa lahkeille)
L/R13	Ympärysmitta pohkeen paksuimmasta kohdasta (Vain pitkille tai ¾ osa lahkeille)
L/R14	Ympärysmitta mediaalisen malleolin yläpuolelta (Vain pitkille tai ¾ osa lahkeille)
L/R15	Pituusmitta reiden sisäpuolelta haaraosasta patellan keskikohtaan (Vain pitkille tai ¾ osa lahkeille)
L/R16	Pituusmitta säären sisäpuolelta patellan keskikohdasta mediaalisen malleolin yläpuolelle (Vain pitkille lahkeille)
L/R Instep	Ympärysmitta jalkaholvin keskikohdasta (Vain pitkille lahkeille)
WW	Haaramitta: Mittaa edestä vyötäröltä taakse vyötärölle navan tasolta. Jos asiakas käyttää vaippaa, mitta otetaan vaipan sivulta

Erityisesti lyhyelle ja ¾ lahkeelle

CER/CEL **Pituus reiden sisäpuolelta haaravälistä lahkeen päätyyn.**