

CAMP®

elements  
*body*




Kevät 2016



**Proprioseptiivista stimulointia  
koko keholle!**

# elements body

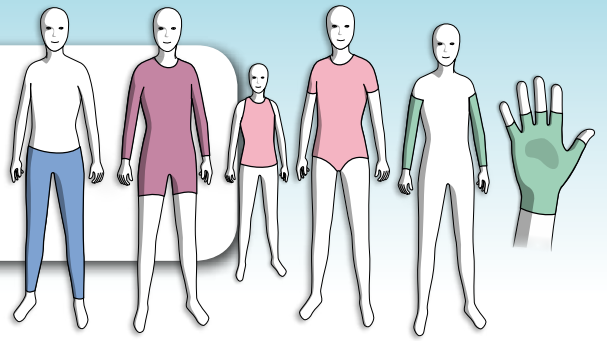

*Elements Body on lycraneuloksesta valmistettu ortoosi, joka on rakennettu useasta kangaskäitaleestä. Ortoosi on valmistettu siten, että se antaa jatkuvaa proprioseptiivista palautetta paineen ja vastuksen muodossa vartalolle ja raajoille.*

Puvun toiminta perustuu siihen, että se istuu napakasti kehoa vasten antaen paineen tunteen vartalolle ja raajoille ja siten lisää ryhtiä ja stabiiliteettia. Lisäämällä asentoaistien herkkyyttä, proprioseptiikkaa - (henkilön kykyä aistia eri raajojen asentoa ja liikettä) voidaan parantaa myös hienomotoriikkaa sekä toiminnallisia suorituksia. Erilaisten materiaalin vahvistuksien avulla voidaan kontrolloida fleksiota, ekstensiota, pronaatiota ja supinaatiota.

## Kuinka Elements Body:a käytetään?

Paras tulos saavutetaan kun ortoosia käytetään vähintään 6 tuntia päivässä. Pukua tulee aluksi käyttää lyhyempiä aikoja ja tasaisesti lisätä käyttöaikaa kunnes 6 tuntia päivässä saavutetaan. Pukua ei tule käyttää yli 8-10 tuntia päivässä.



### Elements Body:n käyttöedut

- Parantaa syvätuntoa (kykyä aistia kehon eri osien asentoa ja liikettä)
- Parantaa kehontuntemusta
- Lisää hienomotoriikkaa
- Parantaa kehon hallintaa, siten että käsien ja jalkojen liikkeet muuttuvat helpommiksi

### Ketkä voivat käyttää Elements Body:a?

Element Body:a voidaan käyttää seuraavien neurologisten tilojen aiheuttaman korkean tonuksen hoidossa ja vähentämisessä:

- Cerebral pares
- Synnynnäinen aivovamma
- Synnynnäinen selkäydinvamma
- Pikkuaivojen rappeuma (ataksia)
- Atetoosi
- Spina Bifida
- Halvaus
- MS

### Muut syyt:

Elements Body:a voidaan myös käyttää nivelinstabiiliteetin ja sensoristen toimintojen menetyksestä aiheutuvien tilojen hoidossa:

- Pysyvästi matala tonus
- Ehlers-Danlosin syndrooma
- Yliliikkuvuus, nivelten laksiteetti

**HUOM!** Elements Body ortoosia ei tule käyttää yöllä.





## Kliiniset tutkimukset

1980-luvulta asti tehdyt tutkimukset osoittavat kuinka lycraphajaisesta materiaalista valmistetut dynaamiset ortoosit kontrolloivat poikkeavaa lihastonusta, stabiloivat kehoa ja lisäävät toiminnallisia kykyjä henkilöillä, joilla on neurologisia häiriöitä. Useimmat tutkimukset ovat tehty lapsilla, joilla on Cerebral Pares - CP. Voit tilata artikkeleita ja kliinisiä tutkimuksia Camp Scandinavian asiakaspalvelusta.

## Mitan otto

Ortoosi tilataan ja valmistetaan yksilöllisten mittojen mukaisesti, jotta puku saadaan napakasti istuvaksi. Ortoosi voidaan tehdä kokovartalo -puvuksi lyhyillä tai pitkillä hihoilla ja lahkeilla ja käsineiksi avoimilla tai suljetuilla sormiosilla. Vahvistukset ja veto- ketjut voidaan ommella tuennan tai toiminnallisuuden tarpeen mukaisesti.

Puvun mallin päättää terveydenhuollon ammattilainen usein yhdessä lääkärin kanssa. Mittojen ottaminen edellyttää koulutuksen saamista.

**Elements Body tuotteet voidaan pestä koneessa 40°C. Niitä ei saa kuivattaa kuivausrummussa. Ilmakuivata yön yli.**



**Elements Body-ortoosi voidaan tilata eri väriyhdistelminä. Perusmateriaalin, vahvistusten ja saumojen väri voidaan määrittellä erikseen käyttäjän toiveiden mukaisesti.**

Camp tarjoaa mahdollisuuden tehdä muutoksia Elements Body-ortooseihin 8 viikon ajan toimituksesta ilman kustannuksia (ainoastaan silloin kun mittoja halutaan pienentää).

**Mittatilauskaavakkeet ja tutkimukset voit tilata Camp Scandinaviasta 09-3507630 tai [info@camp.fi](mailto:info@camp.fi).**

## Tietoa Elements Body:sta

Elements Body:ssa on napakka istuvuus ja se peittää vartalosta koko hoidettavan alueen.

Puku koostuu useasta kaitaleesta, jotka ovat ommeltu yhteen siten, että ne antavat paineen tunteen vartalolle ja raajoille. Vetoketju helpottaa puvun pukemista. Haaraosassa olevat nepparit helpottavat esimerkiksi vaippojen vaihtoa.

Jokainen puku on yksilöllisesti valmistettu käyttäjän tarpeisiin sopivaksi. Puvussa ei ole lastoja/kiskoja, mikä sallii käyttäjän vapaan liikkumisen.

## Elements Body

Tuotenro.	Malli
393000000	Elements Body liivi ilman hihoja
303010011	Elements Body liivi lyhyet hihat
393010013	Elements Body liivi pitkät hihat
393050000	Elements Body ilman hihoja
393060011	Elements Body lyhyet hihat
393060013	Elements Body pitkät hihat
393100011	Elements Body puku ilm. hih/lyh. lahk.
393100013	Elements Body puku ilm. hih/pitk. lahk.
393110011	Elements Body puku hih./lyh. lahk.
393110013	Elements Body puku lyh. hih/pitk. lahk.
393120011	Elements Body liivi pitk. hih/lyh. lahk.
393120013	Elements Body puku pitk. hih/pitk. lahk.
393200011	Elements Body housut lyh. lahk.
393200013	Elements Body housut pitk. lahk.
393300000	Elements Body lyhyt käsine ilm. sormia
393310000	Elements Body lyhyt käsine sormilla
393350000	Elements Body pitkä käsine ilm. sormia
393360000	Elements Body pitkä käsine sormilla
393400000	Elements Body hiha
393500000	Lisävahvistus, pieni
393510000	Lisävahvistus, suuri
393600000	I. muutostyö
393610000	Muutostyö pienempi
393630000	Muutostyö suurempi

