

KÄYTTÖOHJEET

SBi COVER

SBI COVER

SBi päällinen suojaa ja pitää tuotteen puhtaana.

Päällinen on suunniteltu käytettäväksi yhdessä SBI Motuksen, Motus Smartin, SBi Framen ja SBi Wheelen kanssa.

Materiaali on semi-elastista ja tuotteessa on vetoketju takaosassa.

Kumipohja antaa kävellessä lisätukea.

Päällinen on pestävä.



SBi päällinen on säänkestävä ja tehty suojaksi vaikeisiin sääolosuhteisiin, mutta sitä ei kuitenkaan ole tarkoitettu käytettäväksi vedessä/altaassa. Ole erittäin varovainen liikkuessasi liukkailla lattioilla tai märällä alustalla. SBi Walkeria ei ole tarkoitettu käytettäväksi ajoneuvoa ajaessa, ei edes SBi Suojuksen kanssa.

OHJEET

STEP 1

Avaa vetoketju.

STEP 2

Pue walker ensin ja sen jälkeen päällinen.

STEP 3

Kun päällinen on paikallaan, vedä vetoketju koko matkalta kiinni.



Step 1



Step 2



Step 3

MATERIAALI

100% Lycra

PUHDISTUS

Pese päällinen varovasti käsin, käännettynä ylösalaisin. Ilmakuivaa.

TAKUU

Päällisellä on takuu koskien valmistusvirheitä.

Mikäli tuotteessa on ongelmia, ota välittömästi yhteyttä sovittajaan.

HUOMIO

SBi Päällistä ei saa käyttää kylvyssä, suihkussa tai uudessa. Tuotetta tulee käyttää asianmukaisesti tuotteen toiminnallisuuden takaamiseksi. Noudata sovittajaltasi saamiasi ohjeita.



Optima Molliter S.r.l.
Via Breda, 19/21 • 62012 Civitanova Marche (MC)
T +39 0733 801060 • F +39 0733 801048
info@optimamolliter.com
www.optimamolliter.com