

Boston Soft AFO

Avsedd användning

Boston Soft AFO är ett alternativ till att använda en individuellt tillverkad AFO. Den kan användas bilateralt. Den öppna hälen möjliggör läkning av sår och stabiliseringskenan hjälper till att motverka rotation. Boston Soft AFO finns i 6 barnstorlekar och 6 vuxenstorlekar.

Indikationer

- Myelomeningocele
- Muskeldystrofi
- Cerebral Pares
- Trauma
- Hälsår

Innermaterial är av 5mm eller 6mm, mjuk polyetylenfoam och yttermaterialet är 3mm hård polyetylenfoam. Mellan dessa två material ligger en förstärkning av co-polymer.

Färdigställande

Välj en Boston Soft AFO som är i samma storlek som patientens skostorlek. Om patienten är mellan två storlekar välj den större och skär ner till rätt storlek.

- Håll patientens ben med knäet något flekterat. Ankeln skall vara i dorsalflexion. För ortosen på patientens ben så att hälen kommer på plats.
- Börja med att fästa velcrobandet över ankeln. Fäst därefter bandet över tån och tillsist bandet runt vaden.
- Ortosen skall gå ca 1cm utanför patientens tår. Den proximala kanten skall sluta ca 3cm nedanför fibulahuvudet.
- Tag av ortosen och gör justeringarna. Slipa kanterna så att de blir mjuka och fina.
- Ortosen kan rengöras med tvål och vatten. Skölj noga och låt torka väl. Vi rekommenderar att använda en mjuk bomullsstrumpa under ortosen. Helst utan sömmar.

SVERIGE

Tel 042-25 27 01
Fax 042-25 27 25
mail.sweden@camp.se

DANMARK

43 96 66 99
43 43 22 66
mail.denmark@camp.dk

FINLAND

09-350 76 30
09-350 76 338
mail.finland@camp.fi

NORGE

23 23 31 20
23 23 31 21
mail.norway@camp.no