

**CAMP**<sup>®</sup>



# CoverKIT™ 2.0

Uudenlainen fiksu pehmustevaihtoehto Allard AFO:lle  
sopii käytettäväksi ToeOFF®2.0 ja BlueROCKER®2.0 kanssa

# Te kysytte - Me kuuntelimme!

Toiset asiakkaistamme haluavat, että ortoosin pinta on tasaisempi ja toiset jämään tuennan. Osa taas toivoo, että ortoosi on huomaamaton. **CoverKIT™ 2.0 on ratkaisu tähän kaikkeen!**

CoverKIT™ 2.0 on fiksu ratkaisu, joka tekee ortoosista matalaprofiilisen sekä pitää ortoosin ja pehmusteen paikallaan ilman nauhoja!



Vedä koko sukka jalkaan polveen asti.



Ota kiinni päällimmäisestä kerroksesta sinisen sauman kohdalta ja vedä se ylös.




Jos tarpeen aseta tässä vaiheessa neopreeniliuskat ortoosiin kiinni. Aseta ortoosi ja jalka kenkään ja paina sitten ortoosi sukkaa vasten kiinni. Tartu kiinni sinisestä saumasta ja vedä sukan päällimmäinen kerros ortoosin päälle. Tarvittaessa voit myös käyttää sukan lisäksi ortoosiin kuuluvia nauhoja.



- Mukavantuntuinen ja sileäpintainen!
- Helppo pukea ja riisua - vedät vain sukan jalkaasi kuten säärystimen.
- Tekee ortoosista sileäpintaisen koko ortoosin pituudelta, minkä avulla housut liukuvat takertumatta ortoosiin kiinni.
- Sisäpuoli on ilmavaa non-friction-materiaalia, joka yhdessä ulkopuolen kanssa muodostaa ortoosiin erinomaisen kiinnitysmekanismiin.
- Sukan sisäpuoli suojaa ihoa sammalla tavalla kuten SoftKIT™ sekä pitää ortoosin paikallaan.
- CoverKIT™:n mukana toimitetaan kaksi neopreeniliuskaa, jotka voidaan tarvittaessa kiinnittää ortoosin sisäpuolelle suojaamaan säärtä painaumilta.
- Ortoosiin kuuluvia kiinnitysnauhoja voidaan käyttää CoverKIT™:n lisänä.

Tuotenro.	Koko	Pohkeen ympäryys
28765 0010	X-Small	31 - 34 cm
28765 0011	Small	34 - 37 cm
28765 0012	Medium	37 - 41 cm
28765 0013	Large	41 - 46 cm
28765 0014	X-Large	46 - 51 cm

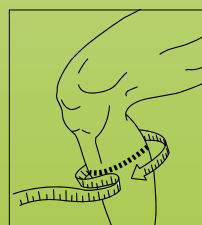

Lisätietoja Allard AFO-tuotteistamme löydät sivulta [allardafo.com](http://allardafo.com)

**Patent Pending**

**CAMP**<sup>®</sup>  
**SCANDINAVIA**  
[www.camp.se](http://www.camp.se)

SVERIGE  
Tel 042-25 27 01  
Fax 042-25 27 25  
[info@camp.se](mailto:info@camp.se)

DANMARK  
43 96 66 99  
43 43 22 66  
[info@camp.dk](mailto:info@camp.dk)

FINLAND  
09-350 76 30  
09-350 76 338  
[info@camp.fi](mailto:info@camp.fi)

NORGE  
23 23 31 20  
23 23 31 21  
[info@camp.no](mailto:info@camp.no)