

51602 - Jura Kämmensuoja

Tuotteen Kuvaus

Suunniteltu mahdollistamaan sormien täyden liikkeen vähentäen samalla sormien kontraktuuria ja ihovaurioita kämmenalueella.

Käyttötiedot (katso kuvat)

1. Irrota koukku- ja pörrötarrahihna ja aseta potilaan peukalo Jura Palm Cover peukalon reiän läpi kuvan osoittamalla tavalla. (Kuva 1).
2. Kiristä tarranauha potilaan käteen sopivaksi ja kiinnitä se tukevasti paikallaan. Lyhennä nauhan pituutta tarvittaessa. (Kuva 2)
3. Ojentaaksesi sormia ja vapauttaaksesi tiukkaa otetta, aseta sylinterimäinen vaahtopala tai liina Jura Palm Cover kämmen- ja sormiosien väliin.
4. Huomautus: Varmista, että koukkutarra ei kosketa ihoa. Jos koskettaa, Jura Palm Cover on asennettu nurinpäin.

Koot ja istuvuus

Koko: Ranteen ympärysmitta
Vasen: Universaali
Oikea: Universaali

Käyttöaiheet

Kämmensuojat voivat helpottaa sormien ja käden kontraktuuria. Kämmensuojan pehmustetyyny ehkäisee sormien käpristymistä, mikä estää sormien kärkien / kynsien painautumista kämmeniin, samalla kun sormet pysyvät tuettuina.

Vasta-aiheet

- Älä käytä avohaavojen päällä.
- Mikä tahansa tunnettu allergia ja/tai yliherkkyys jollekin materiaalille lueteltu tuotteen koostumuksessa.
- Tarkista säännöllisesti iho ja verenkierto.
- Varovaisuutta tulee noudattaa, jos tuotteen käyttäjällä on diabetes, verisuonten vajaatoiminta ja neuropatia.

Varoitukset ja varotoimet

Suosittelemme, että tämän tuotteen ensimmäisen sovituksen suorittaa asianmukaisesti pätevä terveydenhuollon ammattilainen, joka neuvoo käyttäjän.

- Lue kaikki ohjeet ja varoitukset huolellisesti ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia ohjeita varmistaaksesi laitteen oikean toiminnan.
- Älä käytä linimenttejä, voiteita, geelejä tai muita aineita levitettynä vaurioituneelle alueelle.
- Älä käytä tuotetta uudelleen toiselle potilaalle.
- Suorita säännölliset iho- ja verenkiertotarkastukset, erityisesti diabetespotilailla, neurologisilla potilailla ja henkilöillä, joilla on verisuonten vajaatoimintaa.
- Jos haittavaikutuksia ilmenee, lopeta käyttö ja ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen tai tämän tuotteen toimittajaan.
- Tuotteen kestävyys voi vaarantua joidenkin tekijöiden, kuten esineiden, joissa on terävät reunat. Tarrojen pitävyyden heikkenemisen estämiseksi sulje tarrat, kun tuotetta ei käytetä ja aina pestäessä.

Pesu- ja hoito-ohjeet

1. Sulje tarrat.
2. Pese käsin viileässä vedessä miedolla pesuaineella.
3. Huuhtelee ja ilmakeivaa.
4. Älä linkoa tai rumpukuivaa.
5. Älä käytä huuhteluainetta.
6. Tarkista tuotteen kunto pesun jälkeen.
7. Tarkista ajoittain, että koukku/pörrötarrat toimivat kunnolla.

Valmistusmateriaalit

Polyesteri, Nylon.

Varastointi- ja kuljetusolosuhteet

Säilytä viileässä, kuivassa paikassa poissa suorasta auringonvalosta, alkuperäispakkauksessaan.

Kierrätys ja hävittäminen

Pakkaus ja tuote tulee kierrättää tai turvallisesti hävittää paikallisten tai kansallisten lakien mukaisesti.

Vakava tapaus

Ilmoita kaikista vakavista tapahtumista valmistajalle ja sen EU:n jäsenvaltion tai maan toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa asut.

