



TUOTEKUVASTO

2022

camp.fi



Support for Better Life!

SISÄLTÖ


	Elements Body	5 - 8
	Käsi- ja rannetuet	9 - 50
	Käsivarsi - ja hartiaortoosit	51 - 60
	Toiminnallinen sähköstimulaatio	61 - 64
	Jalka - ja nilkkatuet	65 - 138
	Polvituet	139 - 166
	Lonkkaortoosit	167 - 182
	Rintaproteesit	183 - 184
	Kaularangan tuet	185 - 188
	Selkätuet	189 - 224
	Avannetukivyöt	225 - 236
	Ortoosikomponentit	237 - 260
	Muovit ja materiaalit	261 - 294
	Työkalut ja tarvikkeet	295 - 298
	Testaus, harjoitus ja hoito	299 - 306
	Myyntiehdot	307
	Henkilökunta	308



Elements Body

www.camp.fi

elements *body*

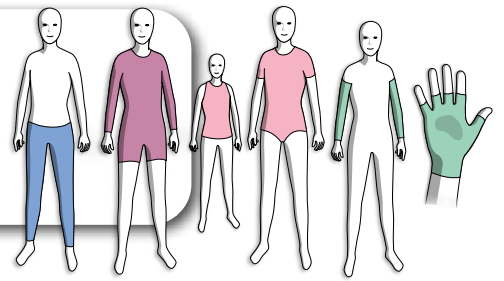

Elements Body

Elements Body on lycraneuloksesta valmistettu ortoosi, joka on rakennettu useasta kangaskaistaleesta. Ortoosi on valmistettu antamaan jatkuvaa proprioseptiivista palautetta paineen ja vastuksen muodossa vartalolle ja raajoille. Puvun toiminta perustuu siihen, että se istuu napakasti kehoa vasten antaen paineen tunteen vartalolle ja raajoille ja siten lisää ryhtiä ja stabiliteettia. Lisäämällä asentoaistien herkkyyttä, proprioseptiikkaa - (henkilön kykyä aistia eri raajojen asentoa ja liikettä) voidaan parantaa myös hienomotoriikkaa sekä toiminnallisia suorituksia. Erilaisten materiaalin vahvistuksien avulla voidaan kontrolloida fleksiota, ekstensiota, pronaa-tiota ja supinaatiota.

Käyttöalueet: Cerebral Pares, synnynnäinen aivovamma, synnynnäinen selkäydinvamma, pikkuaivojen rappeuma (ataksia), Atetoosi, Spina Bifida, halvaus, MS, pysyvästi matala tonus, Ehlers-Danlosin syndrooma, yliliikkuvuus - nivelten laksiteetti.

Muuta: Ortoosi tilataan ja valmistetaan yksilöllisten mittojen mukaisesti. Ortoosi voidaan tehdä kokovartalo-puvuksi lyhyillä tai pitkällä hihoilla ja lahkeilla ja käsineiksi avoimilla tai suljetuilla sormiosilla. Vahvistukset ja vetoketjut voidaan ommella tuennan tai toiminnallisuuden tarpeen mukaisesti. Puvun mallin päättää terveydenhuollon ammattilainen usein yhdessä lääkärin kanssa. Mittojen ottaminen edellyttää koulutuksen saamista. Paras tulos saavutetaan kun ortoosia käytetään vähintään 6 tuntia päivässä. Pukua tulee aluksi käyttää lyhyempia aikoja ja tasaisesti lisätä käyttöaikaa kunnes 6 tuntia päivässä saavutetaan. Pukua ei tule käyttää yli 8-10 tuntia päivässä. HUOM! Elements Body ortoosia ei tule käyttää yöllä. Saadaksesi tilauskaavakkeita, artikkeleita ja klinisiä tutkimustuloksia ota yhteyttä Camp Scandinavian asiakaspalveluun.



Voit myös tilata mittojen mukaan digitaalisesti "Allard Configurator" -sovelluksen kautta verkkosivuiltamme. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme, jos tarvitset lisenssin."

Tuotenro.	Malli
39300	EB liivi ilm. hihoja
39301	EB liivi lyh.hihat
39301	EB liivi pitk. hihat
39305	EB Body ilm. hihoja
39306	EB Body lyh.hihat
39306	EB Body pitk. hihat
39310	EB puku ilm. hih./lyh. lahk.
39310	EB puku ilm. hih./¾ lahk.
39310	EB puku ilm. hih./pitk. lahk.
39311	EB puku lyh. hih/lyh. lahk.
39311	EB puku lyh. hih/¾ lahk.
39311	EB puku lyh. hih/pitk. lahk.
39312	EB puku pitk. hih/lyh. lahk.
39312	EB puku pitk. hih/¾ lahk.
39312	EB puku pitk. hih/pitk. lahk.
39320	EB housut lyh. lahkeet
39320	EB Housut ¾ pitkällä lahkeilla
39320	EB housut pitk. lahkeet
39325	EB Sukka
39330	EB lyhyt käsine ilm. sormia
39331	EB lyhyt käsine sormilla
39335	EB pitkä käsine ilm. sormia
39336	EB pitkä käsine sormilla
39340	EB hiha
39344	EB Sovitushiha

UUTUUS!

UUTUUS!

UUTUUS!

UUTUUS!



HYMO

HYMO-ortoosi on tekstiiliortoosi, joka on tarjolla bodyna lyhyillä tai pitkillä hihoilla sekä housuina lyhyillä tai pitkillä lahkeilla. Ortoosi on tarkoitettu potilaille, joilla on Ehlers-Danlos syndrooma. HYMO-ortoosi istuu hyvin ja voi parantaa asentoa ja lisätä nivelten stabiliteettia ja esimerkiksi lonkan tai olkapään stabiliteetti voi parantua ortoosin antaman tuen ansiosta. Vaate on mittojen mukaan tehty ja sen tarkoitus on lisätä kehon hallintaa ja rajoittaa nivelten liikkuvuutta. Ortoosin käyttöaikaa lisätään asteittain, kunnes toivottu käyttöaika 8-10 h per päivä saavutetaan. HYMO-ortoosin materiaali on huolella valittu ja se on Oeko-Tex 100, luokka II standardin mukainen.

Käyttöalue:

Ehlers-Danlos syndrooma.

Kontraindikaatiot:

Ödeema, sijoiltanmenneet nivelet (ei reponoidut).

Muuta: Vaate valmistetaan mittojen mukaan henkilökohtaiseen käyttöön.

Tilauslomakkeet, ohjeet ja mittalomakkeet löytyvät Campin kotisivulta.

Tuotenumero.	Malli	Tyyppi	Väri
39400	Body lyhyillä hihoilla	Naiset	Musta
39401	Body lyhyillä hihoilla	Miehet	Musta
39402	Body pitkillä hihoilla	Naiset	Musta
39403	Body pitkillä hihoilla	Miehet	Musta
39408	Body 3/4 hihoilla	Naiset	Musta
39409	Body 3/4 hihoilla	Miehet	Musta
39404	Housut lyhyillä lahkeilla	Naiset	Musta
39405	Housut lyhyillä lahkeilla	Miehet	Musta
39406	Housut pitkillä lahkeilla	Naiset	Musta
39407	Housut pitkillä lahkeilla	Miehet	Musta
39410	Housut 3/4 pitkillä lahkeilla	Naiset	Musta
39411	Housut 3/4 pitkillä lahkeilla	Miehet	Musta



Voit myös tilata mittojen mukaan digitaalisesti "Allard Configurator" -sovelluksen kautta verkkosivuiltamme. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme, jos tarvitset lisenssin."



Käsi- ja rannetuet

www.camp.fi



Mitta: Ranteen ympärys

Vission sormilasta

Sormilasta sormien immobilisoimiseksi vamman tai operaation jälkeen sorminivelten ruptuurien ehkäisemiseksi. Lastaa voidaan myös käyttää konservatiivisessa hoidossa, Dupuytrenin kontraktuurassa sekä tiloissa, jotka vaativat sormien tilapäistä immobilisointia.

Käyttöalueet: Sormien immobilisoimiseksi vamman tai operaation jälkeen, konservatiivisessa hoidossa, Dupuytrenin kontraktuurassa sekä tiloissa, jotka vaativat sormien tilapäistä immobilisointia.

Muuta: Ortoosin pituus volaaripuolella on 27 cm.

Tuotenro.	Malli	Koko	Mitta	Vas/Oik
46020	Vission Sormilasta	Small	< 16 cm	Bilat.
46020	Vission Sormilasta	Medium	16 - 19 cm	Bilat.
46020	Vission Sormilasta	Large	> 19 cm	Bilat.



Mitta: Ranteen ympärys.

Vission MULTI sormilasta

Tämä sormilasta on tarkoitettu sormien immobilisoimiseksi vamman tai leikkauksen jälkeen ja ehkäisemään sorminivelten kontraktuuria. Ortoosia voidaan käyttää konservatiivisessa sormien kuntoutushoidossa sekä Dupuytrenin kontraktuuran hoidossa ja tiloissa, jotka vaativat sormien tilapäistä immobilisointia. Ortoosia voidaan myös käyttää III-V kämmenluun ja niihin liittyvien sormen tyviluiden murtumien hoidossa.

Käyttöalueet: Immobilisointi, Dupuytrenin kontraktuuran hoito, murtumat.

Kontraindikaatiot: Ei tunnettuja.

Muuta: Ortoosin pituus volaaripuolella on 30 cm.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
46021	Vission MULTI sormilasta	Musta	Small	< 16 cm	Vas/Oik
46021	Vission MULTI sormilasta	Musta	Medium	16 - 19 cm	Vas/Oik
46021	Vission MULTI sormilasta	Musta	Large	> 19 cm	Vas/Oik

SOF-Stretch lyhyt dynaaminen sormiortoosi

Ortoosi avustaa ekstensiota PIP-nivelessä vähentäen nivelen jäykkyyttä ja kontraktuuria. Anatomisesti muotoillut tyynyt jakavat ja vähentävät painetta. Bilateraalisia jousia voidaan taivuttaa vastuksen säätämiseksi sekä tarvittaessa tehdä tilaa mahdolliselle ödeemalle. Lyhyt ortoosi sallii MCP-niveliä täydellisen liikkuvuuden.

Käyttöalueet: Fleksiokontraktuurat ja PIP-nivelen jäykkyys.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta
51405	Valkoinen	X-Small	3,8 cm
51405	Valkoinen	Small	4,4 cm
51405	Valkoinen	Medium	5,1 cm
51405	Valkoinen	Large	5,7 cm
51405	Valkoinen	X-Large	7 cm



Mitta: Volaaripuolelta MCP- ja DIP-nivelen väliltä

SOF-Stretch dynaaminen sormiortoosi

Ortoosi avustaa ekstensiota PIP-nivelessä vähentäen nivelen jäykkyyttä ja kontraktuuria. Anatomisesti muotoillut tyynyt jakavat ja vähentävät painetta. Bilateraalisia jousia voidaan taivuttaa vastuksen säätämiseksi sekä tarvittaessa tehdä tilaa mahdolliselle ödeemalle.

Käyttöalueet: Fleksiokontraktuurat ja PIP-nivelen jäykkyys.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta
51400	Valkoinen	X-Small	5,1 cm
51400	Valkoinen	Small	6,4 cm
51400	Valkoinen	Medium	7,6 cm
51400	Valkoinen	Large	8,9 cm
51400	Valkoinen	X-Large	10,2 cm
51401	Musta	X-Small	5,1 cm
51401	Musta	Small	6,4 cm
51401	Musta	Medium	7,6 cm
51401	Musta	Large	8,9 cm
51401	Musta	X-Large	10,2 cm



Mitta: Volaaripuolelta dist. kämmenlaitoksen ja DIP-nivelen väliltä



Mitta: Volaaripuolelta dist. kämmenlaitoksen ja DIP-nivelen väliltä



SOF-Stretch dynaaminen spiraaliortoosi

Ekstensiolasta (Capener) avustaa ekstensiota PIP-nivelessä vähentäen nivelen jäykkyyttä ja kontraktuuria. Spiraalijouset asettuvat PIP-nivelen molemmille puolille ja säilyttävät näin venytysvoiman samana kaikissa asennoissa. Jouset voidaan löysätä tai kiristää haluttuun vastukseen. Anatomisesti muotoillut tyynyt jakavat ja vähentävät painetta.

Käyttöalueet: Fleksiokontraktuurat ja PIP-nivelen jäykkyys. Sopii hyvin kun kontraktuura on enintään 45°. Ei luutuneille kontraktuureille.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta
51410	Valkoinen	Small	6,4 cm
51410	Valkoinen	Medium	7 cm
51410	Valkoinen	Large	7,6 cm
51410	Valkoinen	X-Large	8,3 cm

Mallet sormiortoosi

Immobilisoi DIP-nivelen ekstensioon ja sallii samalla PIP-nivelen täyden liikkuvuuden. Käytetään yleensä ilman pehmustetta ja kiinnitetään keskimmaiseen falangiin itsekiinnittyvällä nauhalla (ostettava erikseen).

Tuotenro.	Koko	Väri	Pituus	Halkaisija	Pakkaus
51422	1	Beige	5,28 cm	1,52 cm	10 kpl
51422	2	Beige	5,18 cm	1,67 cm	10 kpl
51422	3	Beige	5,84 cm	1,87 cm	10 kpl
51422	4	Beige	6,28 cm	1,91 cm	10 kpl
51422	5	Beige	5,87 cm	1,91 cm	10 kpl
51422	5,5	Beige	6,09 cm	2,29 cm	10 kpl
51422	6	Beige	6,43 cm	2,29 cm	10 kpl
51422	7	Beige	6,27 cm	2,54 cm	10 kpl

Buddy strap

Kaksoisside, joka pitää kaksi sormea lujasti yhdessä. Tarranauha voidaan leikata halutun mittaiseksi.



Tuotenro.	Koko	Leveys	Pituus	Pakkaus
51430	Yksi koko	1,3 cm	12,7 cm	5 kpl

ELEMENTS peukalotuki

Tämä tuote on tarkoitettu lievien ja tilapäisten vaivojen hoitoon, kuten esim. kiputilat, tulehdukset, kulumisvammat. Tuki rajoittaa peukalon tyvinivelen (MCP) liikkuvuutta ja jossain määrin myös ranteen liikkuvuutta. Tuki lämmittää peukaloa.

Käyttöalueet: Tilapäisten vaivojen hoitoon, kuten esim. kiputilat, tulehdukset, kulumisvammat.

Kontraindikaatiot: Voimakas ödeema, voimakas turvotus.

Muuta: Ortoosin pituus peukalon radiaalipuolella on 12 cm (koko S).

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
34105	Beige/Musta	Small	< 17 cm	Vas/Oik
34105	Beige/Musta	Large	> 17 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympärys

Tee Pee™ peukalotuki

TeePee™ peukalotuessa on kolme muotoiltavaa alumiinilastaa (sentraalinen, dorsaalinen ja palmaarinen). Se antaa stabiilin tuen peukalolle. Tuki on valmistettu perforoidusta ja ilmastavasta mokkajäljitelmästä ja siinä on hengittävä vuori.

Käyttöalueet: Posttraumaattinen käyttö, reumatologiset sairaudet ja instabiliteetti.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28560	Musta	X-Small	<9 cm	Bilat.
28560	Musta	Small	9-10 cm	Bilat.
28560	Musta	Medium	10-11,5 cm	Bilat.
28560	Musta	Large	11,5-13 cm	Bilat.
28560	Musta	X-Large	>13 cm	Bilat.



Mitta: Pituus ranteesta peukalon IP-niveleen

CMC-X Lacer peukalo-ortoosi

CMC-X Lacer™ peukalo-ortoosi helpottaa kipua peukalon CMC-nivelen nivelrikossa ja samalla sallii nivelen liikkeen. Nyörikiinnitys on helppo säätää ja peukalon CMC-nivel tukea toivottuun abduktiokulmaan. Samanaikaisesti tuki sallii peukalon funktionaalisen liikkeen. Säädettävät pehmustetut alumiinilastat yhdessä nauhojen kanssa antavat kevyen paineen ja ovat lisätukena CMC-nivelelle. CMC-X Lacer peukalo-ortoosi on valmistettu hypoallergeenisestä CoolFlex™ materiaalista, joka on mukava ja kompressiota antava. CMC-X ei sisällä latexia tai neopreeniä.

Käyttöalueet: Osteoartriitti peukalon CMC-nivelessä, mediaalinen subluksaatio peukalon CMC-nivelessä.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28562	Musta	X-Small	<14 cm	Bilat.
28562	Musta	Small	14-16 cm	Bilat.
28562	Musta	Medium	16-18 cm	Bilat.
28562	Musta	Large	18-19,5 cm	Bilat.
28562	Musta	X-Large	>19,5 cm	Bilat.



Mitta: Ranteen ympärys





Mitta: Ranteen ympäryys

CMC peukalotuki

CMC peukalotuki on tarkoitettu antamaan tukea CMC-nivelelle instabiliteetissä ja kulumisesta johtuvissa vammoissa. Pehmustettu lasta yhdessä joustavan kiinnitysnauhan kanssa antaa peukalon tyveen tarvittavan kompression ja auttaa stabiloimaan CMC-niveltä.

Käyttöalueet: Posttraumaattinen käyttö, reumatologiset sairaudet ja instabiliteetti.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
2856I	Musta	X-Small	<14 cm	Vas/Oik
2856I	Musta	Small	14-15,5 cm	Vas/Oik
2856I	Musta	Medium	15,5-17,5 cm	Vas/Oik
2856I	Musta	Large	17,5-19,5 cm	Vas/Oik
2856I	Musta	X-Large	>19,5 cm	Vas/Oik



Mitta: MCP-nivelen ympärysmitta.

CMCcare peukalo-ortoosi

Peukalo-ortoosi tukee peukalon CMC-niveltä ja pitää metakarpaalinivelen toiminnallisessa asennossa siten, että puristusote-mahdollisuus säilyy. Ortoosissa on sisäänrakennetut muotoiltavat alumiinilastat sekä säädettävä tarranauhakiinnitys. Anatominen muotoilu sekä viistoon leikatut reunat tekevät ortoosista hyvin istuvan sekä mukavantuntuisen. Ortoosi ei estä ranteen ja käden liikkumista.

Käyttöalueet: Peukalonivelen osteoartriitti, peukalon instabiliteetti, postoperatiivisesti CMC-I-nivelen artroosileikkauksen jälkeen.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28552	Harmaa	Small	16 - 19,5 cm	Vas/Oik
28552	Harmaa	Medium	19,5 - 22,5 cm	Vas/Oik
28552	Harmaa	Large	22,5 - 26 cm	Vas/Oik

Vission NEO peukalotuki lyhyt

Neopreenista valmistettu pehmeä ja elastinen peukalotuki, joka suojaa ja vähentää peukalon rasitusta sekä lämmittää. Tukea on saatavana kahta pituutta. Levossa peukalo pysyy perusasennossa kuormittamatta lihaksia tai jännitteen kiinnitysalueita. Voidaan leikata haluttuun muotoon.

Käyttöalueet: Reumatologiset sairaudet, rasituksen vähentäminen, peukalon ja ranteen yli liikkuu.

Muuta: Ortoosin pituus peukalon radiaalipuolella on 11 cm (koko M).

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
46025	Lyhyt	Musta	Small	13 - 16 cm	Vas/Oik
46025	Lyhyt	Musta	Medium	15 - 18 cm	Vas/Oik
46025	Lyhyt	Musta	Large	17 - 20 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympäryys

Vission NEO peukalotuki pitkä

Neopreenista valmistettu pehmeä ja elastinen peukalotuki, joka suojaa ja vähentää peukalon rasitusta sekä lämmittää. Tukea on saatavana kahta pituutta. Tämä malli tukee rannetta kevyesti. Levossa peukalo pysyy perusasennossa kuormittamatta lihaksia tai jännitteen kiinnitysalueita. Voidaan leikata haluttuun muotoon.

Käyttöalueet: Reumatologiset sairaudet, rasituksen vähentäminen, peukalon ja ranteen yli liikkuu.

Muuta: Ortoosin pituus peukalon radiaalipuolella on 12,5 cm. Ortoosi on valmistettu nylonista ja lateksittomasta neopreenistä.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Vas/Oik
46026	Pitkä	Musta	Yksi koko	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympäryys

Peukalotuki, lyhyt

Neopreenista valmistettu pehmeä ja elastinen peukalotuki, joka suojaa ja vähentää peukalon rasitusta sekä lämmittää. Tukea on saatavana kahta pituutta. Levossa peukalo pysyy perusasennossa kuormittamatta lihaksia tai jännitteen kiinnitysalueita. Voidaan leikata haluttuun muotoon.

Käyttöalueet: Reumatologiset sairaudet, rasituksen vähentäminen, peukalon ja ranteen yli liikkuu.

Muuta: Ortoosin pituus peukalon radiaalipuolella on 11 cm (koko S).

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28548	Lyhyt	Beige	Small	<17 cm	Vas/Oik
28548	Lyhyt	Beige	Large	>17cm	Vas/Oik
28558	Lyhyt	Sininen	Small	<17 cm	Vas/Oik
28558	Lyhyt	Sininen	Large	>17 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympäryys



Mitta: Ranteen ympärys



Mitta 1: Ranteen ympärys

Mitta 2: Korkeusmitta ranteesta I ja II sormien tyveen.

Peukalotuki, pitkä

Neopreenista valmistettu pehmeä ja elastinen peukalotuki, joka suojaa ja vähentää peukalon rasitusta sekä lämmittää. Tukea on saatavana kahta pituutta. Tämä malli tukee rannetta kevyesti. Levossa peukalo pysyy perusasennossa kuormittamatta lihaksia tai janteen kiinnitysalueita. Voidaan leikata haluttuun muotoon.

Käyttöalueet: Reumatologiset sairaudet, rasituksen vähentäminen, peukalon ja ranteen yli liikkuvuus.

Muuta: Ortoosin pituus peukalon radiaalipuolella on 12,5 cm.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Vas/Oik
28559	Pitkä	Sininen	Yksi koko	Vas/Oik

SELECTION® Lasten peukalotuki

Pehmeä ja mukavantuntuinen peukalotuki lapsille. SELECTION® materiaali on ohutta ja joustavaa ja se antaa ihon hengittää. Tuki on tarkoitettu parantamaan peukalon toiminnallista asentoa sekä helpottamaan tulehduksista ja reumasairauksista aiheutuvaa kipua. Sitä voidaan myös käyttää lievittämään spastisuutta käden ja ranteen neurologisissa oireissa. Peukalo-osaa voidaan säätää ja reunoja muotoilla tarvittaessa.

Käyttöalueet: Plexus brachialis vaurioista johtuvat (Erbin pareesi) käden alueen virheasennot, Cerebral Paresista aiheutuva spastisuus, artrogrypoosi, reumasairaudet.

Muuta: Tuotteesta on saatavana käyttöohjevideo Camp Scandinavian YouTube-kanavalla. Videon löydät osoitteesta www.youtube.com/hakusanalla Camp Scandinavia.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta 1	Mitta 2	Vas/Oik
35300	Musta	XX-Small	8,5 - 11,5 cm	5 - 6 cm	Vas/Oik
35300	Musta	X-Small	10 - 12,5 cm	6 - 7 cm	Vas/Oik
35300	Musta	Small	11,5 - 14 cm	7 - 8 cm	Vas/Oik
35300	Musta	Medium	12 - 15,5 cm	8 - 9 cm	Vas/Oik
35300	Musta	Large	14 - 16,5 cm	8 - 9 cm	Vas/Oik

SELECTION® peukalotuki, Soft

Mukavantuntuinen ja joustava peukalotuki, joka vähentää räsytystä peukalonivelissä, sekä antaa keyven tuen. SELECTION® peukalotuki Soft on valmistettu modernista, ihoa myötäilevästä materiaalista, joka antaa ihon hengittää sekä tuntuu mukavalta sitä vasten. Lepoasennossa peukalo pysyy neutraaliasennossa rasittamatta lihaksia ja niveliä. Tuki voidaan leikata haluttuun muotoon.

Käyttöalueet: Reumasairaudet, räsitusvammojen ehkäisy, peukalonivelen yliojennus, CMC-I artroosin lievitys.

Muuta: Tuotteesta on saatavana käyttöohjevideo Camp Scandinavian YouTube-kanavalla. Videon löydät osoitteesta www.youtube.com hakusanalla Camp Scandinavia. Ortoosin pituus peukalon radiaalipuolella on 11 cm (koko M).

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
35200	Soft	Musta	X-Small	< 13 cm	Vas/Oik
35200	Soft	Musta	Small	13-15 cm	Vas/Oik
35200	Soft	Musta	Medium	15-17 cm	Vas/Oik
35200	Soft	Musta	Large	17-20 cm	Vas/Oik
35200	Soft	Musta	X-Large	>20 cm	Vas/Oik
35201	Soft	Beige	X-Small	< 13 cm	Vas/Oik
35201	Soft	Beige	Small	13-15 cm	Vas/Oik
35201	Soft	Beige	Medium	15-17 cm	Vas/Oik
35201	Soft	Beige	Large	17-20 cm	Vas/Oik
35201	Soft	Beige	X-Large	>20 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympärys.

SELECTION® peukalotuki, Rigid

Mukavantuntuinen ja joustava peukalotuki, jossa on lisätukea peukalon ympärillä oleville rakenteille. Tuki vähentää räsytystä peukalonivelissä ja antaa lisää tukea niille. Se myös tukee ja suoja peukalon MCP-niveliä. SELECTION® peukalotuki Rigid on valmistettu modernista, ihoa myötäilevästä materiaalista, joka antaa ihon hengittää, sekä tuntuu mukavalta sitä vasten. Lepoasennossa peukalo pysyy neutraaliasennossa rasittamatta lihaksia ja niveliä. Tuki voidaan leikata haluttuun muotoon.


Käyttöalueet: Reumasairaudet, räsitusvammojen ehkäisy, peukalonivelen yliojennus, CMC-I artroosin lievitys.

Muuta: Tuotteesta on saatavana käyttöohjevideo Camp Scandinavian YouTube-kanavalla. Videon löydät osoitteesta www.youtube.com hakusanalla Camp Scandinavia. Ortoosin pituus peukalon radiaalipuolella on 11 cm (koko M).

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
35202	Rigid	Musta	X-Small	< 13 cm	Vas/Oik
35202	Rigid	Musta	Small	13-15 cm	Vas/Oik
35202	Rigid	Musta	Medium	15-17cm	Vas/Oik
35202	Rigid	Musta	Large	17-20 cm	Vas/Oik
35202	Rigid	Musta	X-Large	>20 cm	Vas/Oik
35203	Rigid	Beige	X-Small	< 13 cm	Vas/Oik
35203	Rigid	Beige	Small	13-15 cm	Vas/Oik
35203	Rigid	Beige	Medium	15-17 cm	Vas/Oik
35203	Rigid	Beige	Large	17-20 cm	Vas/Oik
35203	Rigid	Beige	X-Large	>20 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympärys

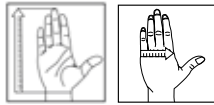

Mitta 1: 2-5 MCP leveys

Mitta 2: Pituus ranteesta
sormenkärkein

SOT Peukalo-ortoosi

SOT Peukalo-ortoosi on anatomisesti muotoiltu lepo-ortoosi peukalolle ja kämmenelle. Ortoosi asettaa peukalon optimaaliseen lepo-asentoon. Se on muotoiltu rajoittamaan peukalon CMC – ja MCP-nivelten liikettä, antamaan tukea kämmenkaarille sekä tukemaan peukalon nivelet ja lihakset mukavaan lepoasentoon.

Ortoosissa on säädettävä alumiiniydin, joka voidaan helposti muotoilla yksilölliseen muotoon. Ortoosia voidaan muotoilla jälkikäteen kontraktuuran muuttuessa. Muotoiltavuutensa ansiosta se on erinomainen vaihtoehto erikoisvalmisteisten lepo-ortoosien sijaan. Lue enemmän tuotteen muotoilusta ”Ohjeita ja Vinkkejä”-esitteestä.

Kun tarvitaan lisäksi tukea ranteen alueelle, voidaan S.O.T peukalo-ortoosia käyttää yhdessä ranneortoosin kanssa. Vission 46029 ja Selection 35207 ovat erinomaisia tukia yhdistää S.O.T peukalo-ortoosin kanssa.

Käyttöalueet: SOT peukalo-ortoosi on tarkoitettu käytettäväksi nivelrikossa, nivelreumassa, peukalon adduktiokontraktuurassa ja yllirasitusvammoissa.

Muuta: SOT peukalo-ortoosi on pestävissä 40 asteessa.

Tuotenro.	Malli	Koko	Mitta 1	Mitta 2	Vas/Oik
28720	SOT Peukalo-ortoosi	Small	≤ 7,5 cm	≤ 18,5 cm	Vas/Oik
28720	SOT Peukalo-ortoosi	Medium	≤ 8,5 cm	≤ 20 cm	Vas/Oik
28720	SOT Peukalo-ortoosi	Large	≤ 9 cm	≤ 21 cm	Vas/Oik
28721	Lisäsuojus	Small	Vas/Oik		
28721	Lisäsuojus	Medium	Vas/Oik		
28721	Lisäsuojus	Large	Vas/Oik		

Vission lyhyt peukalotuki lastalla

Tämä lastallinen peukalotuki tukee peukaloa ja sen ympärillä olevaa aluetta. Tuen sisäpuolella oleva materiaali on rakennettu siten, että se ei paina niveliä tai peukalon lihaksia. Materiaali on tukevaa ja kulutusta kestävä. Tuki on sisältä pehmeän ja mukavantuntuinen. Peukalo-osaa voidaan säätää.

Käyttöalueet: Peukalonivelen instabiliteetti (CMC- tai MCP-nivel), inflamaatiot, kulumat, rasituksesta aiheutuviissa ongelmassa sekä reumaan liittyvissä muutoksissa.

Muuta: Ortoosin pituus peukalon radiaalipuolella on 13 cm (koko M).

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
46028	Lastalla	Musta	XX-Small	11 - 12 cm	Vas/Oik
46028	Lastalla	Musta	X-Small	12 - 13 cm	Vas/Oik
46028	Lastalla	Musta	Small	13 - 14 cm	Vas/Oik
46028	Lastalla	Musta	Medium	14 - 16 cm	Vas/Oik
46028	Lastalla	Musta	Large	16 - 19 cm	Vas/Oik
46028	Lastalla	Musta	X-Large	19 - 22 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympärys

Vission pitkä peukalotuki lastalla

Pitkä peukalotuki, joka on joustava ja helppo pukea. Tuessa on irrotettavat metallilastat, jotka tukevat peukaloa sekä sen rakenteita samalla kun ne tukevat rannetta kevyesti. Tuki on tarkoitettu rajoittamaan CMC- ja MCP I-niveliä liikumista sekä ohjaamaan peukalo toiminnalliseen asentoon. Tuki on valmistettu tukevasta ja kulutusta kestävästä resorimateriaalista, jonka sisäpuoli on pehmeän ja mukavantuntuinen. Peukalo-osa voidaan avata ja säätää. Tarrakiinnitys on kaksiosainen, minkä ansiosta tuki on helppo pukea ja riisua yhdellä kädellä.

Käyttöalueet: Osteoarthroosi ja/tai CMC- ja MCP I-nivelen instabiliteetti, Napsusormi, De Quervainin tauti.

Muuta: Ortoosin pituus peukalon radiaalipuolella on 16 cm (koko M).

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
46023	Pitkä, lastalla	Musta	XX-Small	11 - 12 cm	Vas/Oik
46023	Pitkä, lastalla	Musta	X-Small	12 - 13 cm	Vas/Oik
46023	Pitkä, lastalla	Musta	Small	13 - 14 cm	Vas/Oik
46023	Pitkä, lastalla	Musta	Medium	14 - 16 cm	Vas/Oik
46023	Pitkä, lastalla	Musta	Large	16 - 19 cm	Vas/Oik
46023	Pitkä, lastalla	Musta	X-Large	19 - 22 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympärys



Vission muotoiltava peukalo-ortoosi

Peukalo-ortoosi, joka on tarkoitettu rajoittamaan CMC- ja MCP I-nivelien liikkumista sekä ohjaamaan peukalo toiminnalliseen asentoon yksilöllisesti muotoillun peukalo-osan avulla. Taskuun asetettu muovilasta lämmitetään ja muotoillaan asettamalla koko ortoosi 70-72° vesihauteeseen. Ortoosi muotoillaan asiakkaalle yksilöllisesti parhaan anatomisen istuvuuden saavuttamiseksi.

Käyttöalueet: Lievästä kohtalainen CMC- ja MCP I-nivelien instabiliteetti, ligamenttivammat, De Quervainin tauti, tulehdukset, degeneratiiviset sairaudet ja trauma.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
46024	Muotoiltava peukalo-ortoosi	Musta	X-Small	12 - 13 cm	Vas/Oik
46024	Muotoiltava peukalo-ortoosi	Musta	Small	13 - 14 cm	Vas/Oik
46024	Muotoiltava peukalo-ortoosi	Musta	Medium	14 - 16 cm	Vas/Oik
46024	Muotoiltava peukalo-ortoosi	Musta	Large	16 - 19 cm	Vas/Oik
46024	Muotoiltava peukalo-ortoosi	Musta	X-Large	19 - 22 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympäryys

Basic peukalotuki, lyhyt ja pitkä

Tuki, jonka muovilastat tukevat peukaloa ja ympärillä olevia kudoksia. Materiaali on leikattu viistoon parhaan istuvuuden ja elastisuuden saavuttamiseksi. Peukalon ympäryys on avoin ja säädettävissä. Pitkä malli on 2 cm lyhyttä mallia pidempi ja tukee näin rannetta. Lisätukea haluttaessa voidaan tuen kanssa käyttää erillisiä rannenuhoja 27447 tai 27448.

Käyttöalueet: Käytetään posttraumaattisesti, reumatologisissa sairauksissa, instabiliteetissa ja keventämään kuormitusta.

Muuta: Basic peukalotuki lyhyt - ortoosin pituus radiaalipuolella on 12,5 cm:ä. Basic peukalotuki pitkä - ortoosin pituus radiaalipuolella on 15 cm.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
27443	Lyhyt	Sininen	X-Small	< 12 cm	Vas/Oik
27443	Lyhyt	Sininen	Small	11-14 cm	Vas/Oik
27443	Lyhyt	Sininen	Medium	14-17 cm	Vas/Oik
27443	Lyhyt	Sininen	Large	17-20 cm	Vas/Oik
27443	Lyhyt	Sininen	X-Large	20-23 cm	Vas/Oik
27444	Pitkä	Sininen	X-Small	< 12 cm	Vas/Oik
27444	Pitkä	Sininen	Small	11-14 cm	Vas/Oik
27444	Pitkä	Sininen	Medium	14-17 cm	Vas/Oik
27444	Pitkä	Sininen	Large	17-20 cm	Vas/Oik
27444	Pitkä	Sininen	X-Large	20-23 cm	Vas/Oik

Peukalotuki Rigid Airmed

Peukalotuki, joka on tarkoitettu peukalon MCP-nivelen posttraumaattiseen immobilisointiin. Ortoosi antaa tukea sekä lievittää rasitusta Trapezio-Metacarpaal-nivelessä. Tuki auttaa rajoittamaan liikkeitä, jotka voisivat vahingoittaa tai aiheuttaa kipua peukalossa. Tuessa on sisäännommellut metallilastat, joita voidaan muotoilla tarvittaessa. Ortoosi on pehmeän ja mukavan tuntuinen. Materiaali on rei'itetty ilmankierron lisäämiseksi.

Käyttöalueet: Peukalon MCP-nivelen posttraumaattinen immobilisointi, karpaalikanavasyndrooma sekä jännetupentulehdus.

Muuta: ortoosin pituus peukalon radiaalipuolella on 11 cm (koko S).

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28550	Beige	Small	14 - 18 cm	Bilat.
28550	Beige	Large	18 - 22 cm	Bilat.
28551	Harmaa	Small	14 - 18 cm	Bilat.
28551	Harmaa	Large	18 - 22 cm	Bilat.



Mitta: Ranteen ympäryys

Sporlastic peukalotuki

Muovista valmistettu, stabiili peukalotuki, jonka tehtävänä on immobilisoida peukalo toiminnalliseen asentoon. Ortoosin kiinnitysnauha tarranauha on joustava. Mukana tulee high-tech-kuidusta valmistettu vuorikangas, joka imee kosteuden ja toimii pehmusteena.

Käyttöalueet: Käytetään posttraumaattisesti, postoperatiivisesti ja instabiliteetissa.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28545	Beige	Small	<17 cm	Vas/Oik
28545	Beige	Medium	17-19 cm	Vas/Oik
28545	Beige	Large	>19 cm	Vas/Oik
28547	Sisäkäsine	Small		Bilat.
28547	Sisäkäsine	Medium		Bilat.
28547	Sisäkäsine	Large		Bilat.



Mitta: Ranteen ympäryys

Kevyt rannetuki

Neopreenista valmistettu tuki lämmittää ja tukee rannetta. Tuki pujotetaan peukalon läpi ja kierretään kämmenselän puolelta ranteen ympäri. Voidaan leikata haluttuun muotoon.

Käyttöalueet: Käytetään reumatologisissa sairauksissa ja keventämään kuormitusta.

Tuotenro.	Väri	Koko	Vas/Oik
28230	Sininen	Yksi koko	Bilat.





Mitta: Ranteen ympärys

ELEMENTS rannetuki

Tämä tuote on tarkoitettu lievien ja tilapäisten vaivojen hoitoon, kuten esim, kiputilat, tulehdukset, kulumisvammat. Tuki rajoittaa ranteen liikkuvuutta tuen sisällä olevan alumiinilastan avulla. Tuki myös lämmittää rannetta.

Käyttöalueet: Tilapäisten vaivojen hoitoon, kuten esim, kiputilat, tulehdukset, kulumisvammat.

Kontraindikaatiot: Voimakas ödeema, voimakas turvotus.

Muuta: Ortoosin pituus volaaripuolella on 17 cm.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
34103	Beige/Musta	Small	11 - 14 cm	Vas/Oik
34103	Beige/Musta	Medium	14 - 17 cm	Vas/Oik
34103	Beige/Musta	Large	17 - 20 cm	Vas/Oik
34103	Beige/Musta	X-Large	20 - 23 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympärys.

ELEMENTS Bromsa rannetuki

ELEMENTS Bromsa rannetuen tehtävä on estää rannenivelen dorsaaliflexiota kivun lievittämiseksi esim. tenniskynärpään yhteydessä. Tuessa on pehmeät muovilastat käden selkäpuolella.

Käyttöalueet: Estää rannenivelen dorsaaliflexiota kivun lievittämiseksi esim. tenniskynärpään yhteydessä.

Muuta: Ortoosin pituus volaaripuolella on 15 cm.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
34107	Beige/Musta	Small	11 - 14 cm	Vas/Oik
34107	Beige/Musta	Medium	14 - 17 cm	Vas/Oik
34107	Beige/Musta	Large	17 - 20 cm	Vas/Oik
34107	Beige/Musta	X-Large	20 - 23 cm	Vas/Oik

Bromsa rannetuki

Tuki, jossa on dorsaalipuolella kaksi joustavaa muovilastaa. Lastat ja leveä kiinnitysnauha rajoittavat ranteen dorsaalfleksiota. Stabiliateettia säädetään yksinkertaisesti käyttämällä joko yhtä tai kumpaakin lastaa tai asettamalla kiinnitysnauha enemmän proksimaalisesti tai distaalisesti. Volaaripuolella ei ole lastaa, mikä helpottaa muita käden toimintoja.

Käyttöalueet: Käytetään keventämään ekstensoreiden kuormitusta ja lateraalissa epikondyliitissä.

Muuta: Ortoosin pituus volaaripuolella on 15 cm.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28240	Sininen	Small	11-14 cm	Vas/Oik
28240	Sininen	Medium	14-17 cm	Vas/Oik
28240	Sininen	Large	17-20 cm	Vas/Oik
28240	Sininen	X-Large	20-23 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympärys

SELECTION® Bromsa rannetuki

Selection Bromsa rannetuki on tarkoitettu rajoittamaan liikettä ranteessa ja vähentämään kuormitusta käden ekstensoreissa sekä tukemaan rannetta ja vähentämään kipua esim. tenniskynärpäässä. Ortoosissa on pehmeät muovilastat kämmenselän puolella, säädettävä peukalonauha ja SELECTION nauhat. Tuen voimakkuutta voidaan säätää valitsemalla molemmat lastat tai vain yksi. Nyörikiinnityksen ansiosta ortoosi istuu paremmin kädessä ja antaa paremman tuen.

Käyttöalueet: Lateraali epikondyliitti, ylikuormitus, reumaattiset ongelmat, määrittelemätön kipu.

Muuta: Ortoosin pituus volaaripuolella on 15 cm.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
35208	Selection Bromsa	Musta	X-Small	<11 cm	Vas/Oik
35208	Selection Bromsa	Musta	Small	11-14 cm	Vas/Oik
35208	Selection Bromsa	Musta	Medium	14 - 17 cm	Vas/Oik
35208	Selection Bromsa	Musta	Large	17 - 20 cm	Vas/Oik
35208	Selection Bromsa	Musta	X-Large	20 - 23 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympärys



Mitta: Ranteen ympärys

SELECTION® rannetuki, lyhyt musta

Mukavantuntuinen ja joustava rannetuki ilman lastaa. Tuki on valmistettu modernista, ihoa myötäilevästä materiaalista, joka antaa ihon hengittää ja tuntuu mukavalta sitä vasten. Tämä rannetuki, joka on lyhyempi kuin SELECTION® Soft ja Rigid mallit, tukee rannetta ja antaa kevyen kompression estämättä kuitenkaan sen liikkuvuutta. Nyörillinen kiinnitys tekee tuen avaamisen ja sulkemisen helpoksi yhdellä kädellä. Peukalonauhaa voidaan säätää. Materiaalia voi muotoilla saksilla parhaan istuvuuden saavuttamiseksi. Lisänauha voidaan ostaa erikseen.

Käyttöalueet: Tukee ja vähentää räsitusta ranteessa vamman ja operaation jälkeen, kroonisissa kiputiloissa, nivelkulumissa tai yllirasituksessa. Ganglio leikkauksen jälkeen ja kun ranteeseen tarvitaan kompressiota. Ehlers-Danlos syndroomaan liittyvät yliliikkuvat nivelet. Tukea voidaan myös käyttää ennaltaehkäisevästi kun ranteeseen kohdistuu raskaita ja monotonisia liikkeitä.

Muuta: Tuotteesta on saatavana käyttöohjevideo Camp Scandinavian YouTube-kanavalla. Videon löydät osoitteesta www.youtube.com hakusanalla Camp Scandinavia. Ortoosin pituus volaaripuolella on 13 cm.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
35222	Lyhyt, ilman lastaa	Musta	X-Small	< 11 cm	Vas/Oik
35222	Lyhyt, ilman lastaa	Musta	Small	11 - 14 cm	Vas/Oik
35222	Lyhyt, ilman lastaa	Musta	Medium	14 - 17 cm	Vas/Oik
35222	Lyhyt, ilman lastaa	Musta	Large	17 - 20 cm	Vas/Oik
35222	Lyhyt, ilman lastaa	Musta	X-Large	20 - 23 cm	Vas/Oik

SELECTION® rannetuki, lyhyt beige

Mukavantuntuinen ja joustava rannetuki ilman lastaa. Tuki on valmistettu modernista, ihoa myötäilevästä materiaalista, joka antaa ihon hengittää ja tuntuu mukavalta sitä vasten. Tämä rannetuki, joka on lyhyempi kuin SELECTION® Soft ja Rigid mallit, tukee rannetta ja antaa kevyen kompression estämättä kuitenkaan sen liikkuvuutta. Nyörillinen kiinnitys tekee tuen avaamisen ja sulkemisen helpoksi yhdellä kädellä. Peukalonauhaa voidaan säätää. Materiaalia voi muotoilla saksilla parhaan istuvuuden saavuttamiseksi. Lisänauha voidaan ostaa erikseen.

Käyttöalueet: Tukee ja vähentää räsitusta ranteessa vamman ja operaation jälkeen, kroonisissa kiputiloissa, nivelkulumissa tai yllirasituksessa. Ganglio leikkauksen jälkeen ja kun ranteeseen tarvitaan kompressiota. Ehlers-Danlos syndroomaan liittyvät yliliikkuvat nivelet. Tukea voidaan myös käyttää ennaltaehkäisevästi kun ranteeseen kohdistuu raskaita ja monotonisia liikkeitä.

Muuta: Tuotteesta on saatavana käyttöohjevideo Camp Scandinavian YouTube-kanavalla. Videon löydät osoitteesta www.youtube.com hakusanalla Camp Scandinavia. Ortoosin pituus volaaripuolella on 13 cm.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
35223	Lyhyt, ilman lastaa	Beige	X-Small	< 11 cm	Vas/Oik
35223	Lyhyt, ilman lastaa	Beige	Small	11 - 14 cm	Vas/Oik
35223	Lyhyt, ilman lastaa	Beige	Medium	14 - 17 cm	Vas/Oik
35223	Lyhyt, ilman lastaa	Beige	Large	17 - 20 cm	Vas/Oik
35223	Lyhyt, ilman lastaa	Beige	X-Large	20 - 23 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympäryys



Mitta: Ranteen ympärys

Vission rannetuki, lyhyt

Hieman lyhyempi rannetuki, joka on valmistettu kulutusta kestävästä resorimateriaalista. Tuki on sisältä pehmeä ja mukavantuntuinen. Mallin saa täysin avoimeksi, mikä helpottaa tuen pukemista ja riisumista. Tuki on anatomisesti muotoiltu kämmenen, rystysten ja peukalon muotoihin sopivaksi. Tässä mallissa ei ole volaarilastaa. Peukalo-osaa voidaan säätää.

Käyttöalueet: Tukee ja lievittää rasitusta vamman ja leikkauksen jälkeen, kipsinpoiston jälkeen, yliliikkuvuudessa, reumasairauksissa, kroonisissa kiputiloissa, nivelkulumissa tai yllirasitustiloissa. Voidaan myös käyttää ennaltaehkäisevässä tarkoituksessa kun liikkeet ovat monotonisia tai voimaa vaativia.

Muuta: Ortoosin pituus volaaripuolella on 13 cm.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
46030	Lyhyt ilman lastaa	Musta	XX-Small	11 - 12 cm	Vasen
46030	Lyhyt ilman lastaa	Musta	X-Small	12 - 13 cm	Vasen
46030	Lyhyt ilman lastaa	Musta	Small	13 - 14 cm	Vasen
46030	Lyhyt ilman lastaa	Musta	Medium	14 - 16 cm	Vasen
46030	Lyhyt ilman lastaa	Musta	Large	16 - 19 cm	Vasen
46030	Lyhyt ilman lastaa	Musta	X-Large	19 - 22 cm	Vasen



Mitta: Ranteen ympärys

Gripa rannetuki

Tukee rannetta tehokkaasti raskaassa tai yksipuolisesti rannetta kuormittavassa työssä. Leveä rannenuha tukee rannetta. Kämmentyökaluun luistamattoman materiaalin ansiosta erilaisista työkaluista saa hyvän otteen. Kehitetty yhteistyössä työpajojen asentajien kanssa.

Käyttöalueet: Käytetään keventämään kuormitusta kämmenessä ja ranteessa sekä ennaltaehkäisevästi esim. asennustyössä.

Muuta: Ortoosin pituus volaaripuolella on 18 cm.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28210	Sininen	Small	11-14 cm	Vas/Oik
28210	Sininen	Medium	14-17 cm	Vas/Oik
28210	Sininen	Large	17-20 cm	Vas/Oik
28210	Sininen	X-Large	20-23 cm	Vas/Oik

SELECTION® Lasten rannetuki

Pehmeä ja mukavantuntuinen rannetuki lapsille. Tässä stabiilissa ortoosissa on alumiinilasta volaari puolella sekä kaksi kiinnitysnauhaa helppoon ja asteettomaan kiinnitykseen. Lastan voi poistaa. SELECTION® materiaali on ohutta ja joustavaa ja se antaa ihon hengittää. Peukalo-osaa voidaan säätää ja reunat ovat pehmeän tuntuista. Väritys on suunniteltu lapsille houkuttelevaksi.

Käyttöalueet: Reumaattiset ongelmat. Neurologiset vammat, missä ranne tarvitsee lisätukea ja/tai sen asentoa tarvitsee korjata. Kipsauksen jälkihoitona. Tulehduksissa.

Muuta: Tuotteesta on saatavana käyttöohjevideo Camp Scandinavian YouTube-kanavalla. Videon löydät osoitteesta www.youtube.com/hakusanalla/CampScandinavia.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta 1	Mitta 2	Mitta 3	Vas/Oik
35305	Musta	XX-Small	8,5 - 11 cm	5-6 cm	11 cm	Vas/Oik
35305	Musta	X-Small	10 - 12,5 cm	6-7 cm	13,5 cm	Vas/Oik
35305	Musta	Small	11,5 - 14 cm	7-8 cm	14,5 cm	Vas/Oik
35305	Musta	Medium	12 - 15,5 cm	8-9 cm	17 cm	Vas/Oik
35305	Musta	Large	14 - 16,5 cm	8-9 cm	17,5 cm	Vas/Oik



Mitta 1: Ranteen ympärys

Mitta 2: Mitta ranteesta I ja II sormien tyveen

Mitta 3: Ortoosin pituus volaari puolella

SELECTION® lasten Open Wrist rannetuki

Tukeva ja yksinkertainen rannetuki SELECTION® materiaalista. Volari puolella on muotoiltava alumiinilasta. Peukalon tueksi kiinnitetään kaksi tarranauhaa: toinen joka kiinnitetään peukalon ympäri ja toinen kädenselän puolella. Näin peukalo ei pääse tarpeettomasti liikkumaan. Selection lasten Open Wrist rannetuki on tarkoitettu immobilisoimaan CMC niveltä ja rannetta kivun lievittämiseksi sekä ohjaamaan ranne neutraaliin asentoon. Tarvittaessa sitä voidaan myös käyttää tukemaan rannetta trauman/leikkauksen jälkeen.

Käyttöalueet: Reumaattinen artriitti, CP, trauman/leikkauksen jälkeen.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta 1	Mitta 2	Mitta 3	Vas/Oik
35306	Lapsi	Musta	Small	11,5 - 14 cm	7 - 8 cm	14,5 cm	Vas/Oik
35306	Lapsi	Musta	Medium	12 - 15,5 cm	8 - 9 cm	17 cm	Vas/Oik
35306	Lapsi	Musta	Large	14 - 16,5 cm	8 - 9 cm	17,5 cm	Vas/Oik



Mitta 1: Ranteen ympärys

Mitta 2: Mitta ranteesta I ja II sormien tyveen

Mitta 3: Ortoosin pituus volaari puolella



Mitta: Ranteen ympärys



Mitta: Ympärysmitta MCP 2-5

SELECTION® Open Wrist

Stabiili ja helppokäyttöinen rannetuki miellyttävästä SELECTION® materiaalista. Tuessa on muotoiltu muovilasta volaaripuolella ja suora muovilasta dorsaalipuolella. Ranteen ympäri kierrettävä stabiili kiinnitysnauha on helppo sulkea ja avata yhdellä kädellä. SELECTION Open Wrist on tarkoitettu käytettäväksi kun halutaan lieventää rasitusta ranteessa.

Käyttöalueet: Tulehduksissa, työssä aiheutuissa rasitusvammoissa sekä reumaattisissa tai kulumaan liittyvissä muutoksissa.

Muuta: Tuotteesta on saatavana käyttöohjevideo Camp Scandinavian YouTube-kanavalla. Videon löydät osoitteesta www.youtube.com hakusanalla Camp Scandinavia. Ortoosin pituus volaaripuolella on 18 cm.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
35207	Musta	X-Small	< 11 cm	Vas/Oik
35207	Musta	Small	11 - 14 cm	Vas/Oik
35207	Musta	Medium	14 - 17 cm	Vas/Oik
35207	Musta	Large	17 - 20 cm	Vas/Oik
35207	Musta	X-Large	20 - 23 cm	Vas/Oik

SELECTION® Ulnaarideviaatio-tuki

SELECTION® Ulnaarideviaatio-tuki on tarkoitettu parantamaan sormien asentoa paremman käden hallinnan ja toiminnallisen otteen saavuttamiseksi. Ortoosi antaa tukea rakenteelle ja lievittää kipua. Se antaa tukea MCP ja PIP nivelille samalla kun se parantaa sormien ekstensorien liikesuuntaa. Ortoosi on suunniteltu siten, että kangasmateriaali ulottuu reilusti ulnaarisivun ja 5. MCP-nivelen yli ja antaa siten parhaan mahdollisen tuen ja linjauksen sekä jakaa painetta. Tarra voidaan kiinnittää mihin tahansa kohtaan materiaalissa, joten nauhojen kiinnityskohdalle ei ole rajoituksia optimaalisen asennonkorjauksen saavuttamiseksi.

Ohut ja taipuisa ortoosi voidaan yhdistää ranneortoosiin kun lisätuki on tarpeen. Erityissuunnitellut vahvistukset (pinnoittamattomasta) matalalämpömuovista voidaan kiinnittää suoraan ortoosia vasten.

Käyttöalueet: Artroosipotilaat. Ulnaarideviaatio on tyypillinen henkilöillä, joilla on erilaisia inflammatorisia sairauksia, kuten esim. reuma. Selection Ulnaarideviaatitukea voidaan käyttää myös lisätukena yliikkuville nivelille sekä heikoille lihaksille. Ei saa käyttää kontraktuneisiin niveliin.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
35218	Musta	X-Small	14-17 cm	Vas/Oik
35218	Musta	Small	17-20 cm	Vas/Oik
35218	Musta	Medium	20-23 cm	Vas/Oik
35218	Musta	Large	23-27 cm	Vas/Oik

SELECTION® Radialis Peukalo-osa

Kankainen peukalo-osa voidaan yhdistää SELECTION® ranneortoosimalleihin 35204, 35205 ja 35209. Peukalo-osa voidaan yhdistää myös SELECTION® Radialis Sormiosan kanssa. Sekä SELECTION® Radialis Peukalo-osa että Sormiosa on tarkoitettu käytettäväksi Radialispareesissa (riippukäsi, joka johtuu radialishermon vammasta) mahdollistaen toiminnallisen tarttumisotteen hermon toipuessa rauhassa.

Käyttöalueet: Radialispareesi

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
35216	Radialis Peukalo-osa	Musta	Small	3 - 4 cm	Vas/Oik
35216	Radialis Peukalo-osa	Musta	Large	5 - 6 cm	Vas/Oik



Mitta: Pituus MCP I nivelen keskeltä IPI nivelen keskelle.

SELECTION® Radialis Sormiosa

Kankainen sormiosa voidaan yhdistää SELECTION® ranneortoosimalleihin 35204, 35205 ja 35209. Sormiosa voidaan yhdistää myös SELECTION® Radialis Peukalo-osan kanssa. Sekä SELECTION® Radialis Peukalo-osa että sormiosa on tarkoitettu käytettäväksi Radialispareesissa (riippukäsi, joka johtuu radialishermon vammasta) mahdollistaen toiminnallisen tarttumisotteen hermon toipuessa rauhassa.

Käyttöalueet: Radialispareesi

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
35217	Radialis Sormiosa	Musta	Small	17 - 20 cm	Vas/Oik
35217	Radialis Sormiosa	Musta	Medium	20 - 23 cm	Vas/Oik
35217	Radialis Sormiosa	Musta	Large	23 - 27 cm	Vas/Oik



Mitta: MCP 2-5 ympärys



Mitta 1: Ranteen ympärys

Mitta 2: Kynärvarren keskikohta

SELECTION® rannetuki, Soft

Mukavantuntuinen ja joustava rannetuki, joka on valmistettu modernista, ihoa myötäilevästä materiaalista. Materiaali antaa ihon hengittää, sekä tuntuu mukavalta sitä vasten. SELECTION® Soft rannetuessa on muotoiltu muovinen tukilasta volaaripuolella ja joustavampi suora muovilasta dorsaalipuolella. Tukilastat voidaan irrottaa. Kaksiosainen kiinnitys tekee tuen avaamisen ja sulkemisen helpoksi yhdellä kädellä. Peukalonauhaa voidaan säätää. Materiaalia voi muotoilla saksilla parhaan istuvuuden saavuttamiseksi.

Käyttöalueet: Kun rannetta tarvitsee suojata rasitukselta esimerkiksi tulehduksissa, työssä aiheutuissa rasitusvammoissa sekä reumaattisissa tai kulumaan liittyvissä muutoksissa.

Muuta: Tuotteesta on saatavana käyttöohjevideo Camp Scandinavian YouTube-kanavalla. Videon löydät osoitteesta www.youtube.com hakusanalla Camp Scandinavia. Ortoosin pituus volaaripuolella on 18 cm. Plus-koossa on kynärvarsi hieman leveämpi.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta 1	Mitta 2	Vas/Oik
35204	Soft	Musta	X-Small	< 11 cm		Vas/Oik
35204	Soft	Musta	Small	11 - 14 cm		Vas/Oik
35204	Soft	Musta	Medium	14 - 17 cm		Vas/Oik
35204	Soft	Musta	Large	17 - 20 cm		Vas/Oik
35204	Soft	Musta	X-Large	20 - 23 cm		Vas/Oik
35204	Soft	Musta	XX-Large	23 - 26 cm		Vas/Oik
35204	Soft	Musta	Small Plus	11 - 14 cm	18 - 21 cm	Vas/Oik
35204	Soft	Musta	Medium Plus	14 - 17 cm	21 - 24 cm	Vas/Oik
35204	Soft	Musta	Large Plus	17 - 20 cm	24 - 27 cm	Vas/Oik
35204	Soft	Musta	X-Large Plus	20 - 23 cm	27 - 30 cm	Vas/Oik
35204	Soft	Musta	XX-Large Plus	23 - 26 cm	30 - 33 cm	Vas/Oik
35205	Soft	Beige	X-Small	< 11 cm		Vas/Oik
35205	Soft	Beige	Small	11 - 14 cm		Vas/Oik
35205	Soft	Beige	Medium	14 - 17 cm		Vas/Oik
35205	Soft	Beige	Large	17 - 20 cm		Vas/Oik
35205	Soft	Beige	X-Large	20 - 23 cm		Vas/Oik
35205	Soft	Beige	XX-Large	23 - 26 cm		Vas/Oik
35205	Soft	Beige	Small Plus	11 - 14 cm	18 - 21 cm	Vas/Oik
35205	Soft	Beige	Medium Plus	14 - 17 cm	21 - 24 cm	Vas/Oik
35205	Soft	Beige	Large Plus	17 - 20 cm	24 - 27 cm	Vas/Oik
35205	Soft	Beige	X-Large Plus	20 - 23 cm	27 - 30 cm	Vas/Oik
35205	Soft	Beige	XX-Large Plus	23 - 26 cm	30 - 33 cm	Vas/Oik

SELECTION® Multiopen

SELECTION® Multiopen on keskistabiili ranneortoosi kaksinkertaisella lukituksella. Se voidaan avata koko mitalta ja sulkea tarranauhalla ja kiristää nyörityksen avulla. Käyttäjä voi valita itse, avataanko ortoosi kokonaan joka käyttökerralla puettaessa ja riisuttaessa vai käyttääkö hän vain nyöritystä. Ortoosissa on matala leikkaus, joka seuraa käden luonnollista taitoskohtaa ja peukalon leikkaus antaa tilaa thenarilihaksistolle. Kaksiosainen nyöritys yhdessä tarranauhan kanssa mahdollistaa istuvuuden leveämmälle käsivarrelle. Koska nyöritys tulee ulnaaripuolelta, pienenee riski, että peukalo asettuu väärin. Säädetty peukalonauha on volaarisesti ulospäin. Materiaalin rakenteen ansiosta tuotetta voi muotoilla saksilla leikkaamalla. Valmistettu ilmastusta ja mukavasta SELECTION®-materiaalista kaikkine siihen kuuluvine toimintoineen. Ortoosi on 22 cm pitkä, ts. 4 cm pidempi kuin SELECTION®Soft 35204. Tuessa on irroitettavissa oleva muotoiltava alumiinilasta volaaripuolella.

Käyttöalueet: Parantunut varttinäluun murtuma, pehmytkudosvammat, tulehdukset, kulumavammat, työhön liittyvä yllirasitus sekä reumaattiset tai degeneratiiviset muutokset.

Kontraindikaatiot: Ei saa käyttää akuutissa murtumahoidossa.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
35209	Multiopen	Musta	X-Small	< 11 cm	Vas/Oik
35209	Multiopen	Musta	Small	11 - 14 cm	Vas/Oik
35209	Multiopen	Musta	Medium	14 - 17 cm	Vas/Oik
35209	Multiopen	Musta	Large	17 - 20 cm	Vas/Oik
35209	Multiopen	Musta	X-Large	20 - 23 cm	Vas/Oik
35209	Multiopen	Musta	XX-Large	23 - 26 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympärys



Mitta: Ranteen ympärys

Vission rannetuki lastalla

Standardimittainen rannetuki, joka on valmistettu kulutusta kestävästä resorimateriaalista. Tuki on sisältä pehmeä ja mukavantuntuinen. Mallin saa täysin avoimeksi, mikä helpottaa tuen pukemista ja riisumista. Tuki on anatomisesti muotoiltu kämmenen, rystysten ja peukalon muotoihin sopivaksi. Tuki antaa tasaisen tuen ja siinä on muotoiltava volaarinen muovilasta. Peukalo-osaa voidaan säätää.

Käyttöalueet: Inflammaatiot, työstä aiheutuva yllirasitus sekä reumaan tai rappeumaan liittyvät muutokset.

Muuta: Ortoosin pituus volaaripuolella on 18,5 cm.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
46029	Lastalla	Musta	XX-Small	11 - 12 cm	Vas/Oik
46029	Lastalla	Musta	X-Small	12 - 13 cm	Vas/Oik
46029	Lastalla	Musta	Small	13 - 14 cm	Vas/Oik
46029	Lastalla	Musta	Medium	14 - 16 cm	Vas/Oik
46029	Lastalla	Musta	Large	16 - 19 cm	Vas/Oik
46029	Lastalla	Musta	X-Large	19 - 22 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympärys

Basic rannetuki, lyhyt ja pitkä

Yksinkertainen lyhyenä ja pitkänä mallina saatava tarrakiinnitteinen rannetuki tukee ja istuu hyvin. Tuet saa kokonaan auki, mikä helpottaa pukemista ja riisumista. Volaaripuolella on irrotettava ja muotoiltava alumiinilasta. Perusmallin tarrakiinnityksen ansiosta koon valinta on joustavampaa. Lyhyeen malliin saa lisätukea erillisillä rannenuhoilla 27448. Pitkässä mallissa on jo valmiiksi laitettuna elastinen rannenuha.

Käyttöalueet: Käytetään posttraumaattisesti, reumatologisissa sairauksissa, instabiliteetissa ja keventämään kuormitusta.

Muuta: Basic rannetuki lyhyt - ortoosin pituus volaaripuolella on 18 cm:ä. Basic rannetuki pitkä - ortoosin pituus volaaripuolella on 21 cm.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
27441	Lyhyt	Sininen	X-Small	< 12 cm	Vas/Oik
27441	Lyhyt	Sininen	Small	11-14 cm	Vas/Oik
27441	Lyhyt	Sininen	Medium	14-17 cm	Vas/Oik
27441	Lyhyt	Sininen	Large	17-20 cm	Vas/Oik
27441	Lyhyt	Sininen	X-Large	20-23 cm	Vas/Oik
27445	Pitkä	Sininen	X-Small	< 12 cm	Vas/Oik
27445	Pitkä	Sininen	Small	11-14 cm	Vas/Oik
27445	Pitkä	Sininen	Medium	14-17 cm	Vas/Oik
27445	Pitkä	Sininen	Large	17-20 cm	Vas/Oik
27445	Pitkä	Sininen	X-Large	20-23 cm	Vas/Oik

Basic rannetuki

Rannetuki integroidulla nauhalla antaen hyvää lisätukea ranteelle. Tuen proksimaalisen nauhan kiinnityspinta on leveä, mikä antaa koon valinnalle joustavuutta sekä helpottaa tuen pukemista ja riisumista. Avoin malli myös helpottaa tuen pukemista ja riisumista. Volaaripuolella on irrotettava ja muotoiltava alumiinilasta. Hieman korkeampi pikkusormen puoli tukee ulnaarisesti.

Käyttöalueet: Käytetään posttraumaattisesti, reumatologisissa sairauksissa, instabiliteetissa ja keventämään kuormitusta.

Muuta: Ortoosin pituus volaaripuolella on 18 cm.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
27446	Sininen	X-Small	< 12 cm	Vas/Oik
27446	Sininen	Small	11-14 cm	Vas/Oik
27446	Sininen	Medium	14-17 cm	Vas/Oik
27446	Sininen	Large	17-20 cm	Vas/Oik
27446	Sininen	X-Large	20-23 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympäry

Bisca® rannetuki

Tämä malli sopii erityisesti reumaatikoille. Tuki on vuorattu iholle miellyttävällä puuvillamateriaalilla. Tuen integroitu nauha yhdessä irrotettavien ja muotoiltavien alumiinilastojen kanssa tukevat hyvin.

Käyttöalueet: Käytetään reumatologisissa sairauksissa ja vähentämään rasitusta.

Muuta: Ortoosin pituus volaaripuolella on 19 cm.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28042	Sininen	Small	11-14 cm	Vas/Oik
28042	Sininen	Medium	14-17 cm	Vas/Oik
28042	Sininen	Large	17-20 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympäry

Elcross® Carpus Flexi rannetuki

Yksi suosituimmista tuista reumapotilaille. Vuorattu iholle miellyttävällä puuvillalla. Nyöritys helpottaa tuen kiinnitystä ja säätämistä. Sopii hyvin potilaille, joilla käden toiminnot ovat heikot. Tuen istuvuutta voidaan säätää ja se sopii näin sekä leveille että kapeille kyynärvarsille. Irrotettava ja muotoiltava alumiinilasta.

Käyttöalueet: Käytetään reumatologisissa sairauksissa ja vähentämään rasitusta.

Muuta: Ortoosin pituus volaaripuolella on 18 cm.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28149	Sininen	Small	11-14 cm	Vas/Oik
28149	Sininen	Medium	14-17 cm	Vas/Oik
28149	Sininen	Large	17-20 cm	Vas/Oik
28149	Sininen	X-Large	20-23 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympäry



Mitta: Ranteen ympärys

Wrist Lacer™ II lyhyt malli

Erittäin stabiili rannetuki, jossa on muotoiltavat ja irrotettavat alumiinilastat dorsaali- ja volaaripuolella. Tuen sisäpuolella distaalin nyöriytyksen kohdalla oleva pehmuste suojaa peukalon tyvää. Tuki on valmistettu kulutusta kestävästä mokkamateriaalista, jonka vuoraus on ilmava. Ainutlaatuinen kiinnityssysteemi tukee rannetta tasaisesti kaikkien neljän nauhan avulla. Kompressiota voidaan helposti säätää sopivaksi henkilöille, joiden kyynärvarsi ja ranne ovat epätavallisessa asennossa. Nyöritys on helppo avata ja sulkea yhdellä kädellä. Peukalo-osaa voidaan säätää.

Käyttöalueet: Karpaalikanavasyndrooma, posttraumaattisesti ja postoperatiivisesti.

Muuta: Tuotteesta on saatavana käyttöohjevideo Camp Scandinavian YouTube-kanavalla. Videon löydät osoitteesta www.youtube.com hakusanalla Camp Scandinavia. Ortoosin pituus volaaripuolella on 21 cm.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28578	Wrist Lacer II	Musta	Pediatric	<12 cm	Vas/Oik
28578	Wrist Lacer II	Musta	X-Small	12-14 cm	Vas/Oik
28578	Wrist Lacer II	Musta	Small	14-16 cm	Vas/Oik
28578	Wrist Lacer II	Musta	Medium	16-18 cm	Vas/Oik
28578	Wrist Lacer II	Musta	Large	18-20 cm	Vas/Oik
28578	Wrist Lacer II	Musta	X-Large	20-22 cm	Vas/Oik
28578	Wrist Lacer II	Musta	XX-Large	22-25 cm	Vas/Oik

Wrist Lacer™, lyhyt malli

Erittäin stabiili rannetuki, jossa on muotoiltavat alumiinilastat sekä volaari- että dorsaalipuolella. Tukee jopa ulnaarisesti. Valmistettu kestävästä mokkajäljitelmästä ja vuorattu hengittävällä materiaalilla. Säädettävä peukalonauha. Nyöritys helpottaa tuen kiinnitystä ja säätämistä. Se on helppo avata ja sulkea yhdellä kädellä. Volaaripuolen pehmuste lisää käyttömukavuutta.

Käyttöalueet: Käytetään posttraumaattisesti, postoperatiivisesti, reumatologisissa sairauksissa ja spastisiteetissa.

Muuta: Malli on saatavilla myös mustana; Wrist Lacer, lyhyt malli ; tuotenro. 28571. Tuotteesta on saatavana käyttöohjevideo Camp Scandinavian YouTube-kanavalla. Videon löydät osoitteesta [www.youtube.com hakusanalla Camp Scandinavia](http://www.youtube.com/hakusanalla/Camp%20Scandinavia). Ortoosin pituus volaari- ja dorsaalipuolella on 21 cm.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28570	Lyhyt	Beige	X-Small	12-14 cm	Vas/Oik
28570	Lyhyt	Beige	Small	14-16 cm	Vas/Oik
28570	Lyhyt	Beige	Medium	16-18 cm	Vas/Oik
28570	Lyhyt	Beige	Large	18-20 cm	Vas/Oik
28570	Lyhyt	Beige	X-Large	20-22 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympäryys

Wrist Lacer™ II, pitkä malli

Erittäin stabiili pitkä rannetuki, jossa on muotoiltavat alumiinilastat sekä volaari- että dorsaalipuolella. Lastat voidaan ottaa pois ja muotoilla sopiviksi. Volaaripuolen pehmuste lisää käyttömukavuutta. Valmistettu kestävästä mokkajäljitelmästä ja vuorattu hengittävällä materiaalilla. Nyöritys helpottaa tuen kiinnitystä ja säätämistä. Se on helppo avata ja sulkea yhdellä kädellä. Säädettävä peukalonauha.

Käyttöalueet: Käytetään posttraumaattisesti, postoperatiivisesti, reumatologisissa sairauksissa ja spastisiteetissa.

Muuta: Tuote on saatavana beigenä tuotenumerolla 28572. Tuotteesta on saatavana käyttöohjevideo Camp Scandinavian YouTube-kanavalla. Videon löydät osoitteesta [www.youtube.com hakusanalla Camp Scandinavia](http://www.youtube.com/hakusanalla/Camp%20Scandinavia). Ortoosin pituus volaari- ja dorsaalipuolella on 26 cm.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28579	Wrist Lacer™ II Pitkä	Musta	X-Small	12-14 cm	Va/Oik
28579	Wrist Lacer™ II Pitkä	Musta	Small	14-16 cm	Va/Oik
28579	Wrist Lacer™ II Pitkä	Musta	Medium	16-18 cm	Vas/Oik
28579	Wrist Lacer™ II Pitkä	Musta	Large	18-20 cm	Vas/Oik
28579	Wrist Lacer™ II Pitkä	Musta	X-Large	20-22 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympäryys



Mitta: Ranteen ympärys

Wrist Lacer™, pitkä malli

Erittäin stabiili rannetuki, jossa on muotoiltavat alumiinilastat sekä volaari-että dorsaalipuolella. Tuki tukee jopa ulnaarisesti. Valmistettu kestävästä mokkajäljitelmästä ja vuorattu hengittävällä materiaalilla. Säädettävä peukalonauha. Nyöritys helpottaa tuen kiinnitystä ja säätämistä. Se on helppo avata ja sulkea yhdellä kädellä. Volaaripuolen pehmuste lisää käyttömukavuutta.

Käyttöalueet: Käytetään posttraumaattisesti, postoperatiivisesti, reumatologisissa sairauksissa ja spastisiteetissa.

Muuta: Malli on saatavana myös mustana, Wrist Lacer, pitkä malli; tuotenro. 28573. Tuotteesta on saatavana käyttöohjevideo Camp Scandinavian YouTube-kanavalla. Videon löydät osoitteesta www.youtube.com hakusanalla Camp Scandinavia. Ortoosin pituus volaaripuolella on 26 cm.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28572	Pitkä	Beige	Small	14-16 cm	Vas/Oik
28572	Pitkä	Beige	Medium	16-18 cm	Vas/Oik
28572	Pitkä	Beige	Large	18-20 cm	Vas/Oik
28572	Pitkä	Beige	X-Large	20-22 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympärys

Tripod™ Wrist Lacer lyhyt malli

Erittäin tukeva rannetuki, jossa on sama hyvä istuvuus ja toiminnallisuus kuin Wrist Lacerissa. Tripodissa on kolme muotoiltavaa alumiinista tukilastaa, jotka ovat sijoitettu ulnaarisesti, volaarisesti ja dorsaalisesti. Lastat toimivat vuorovaikutuksellisesti estäen radial-ulnaarisia virheasentoja, sekä rajoittaen ranteen fleksiota. Ulnaarinen lasta yhdessä kaksinkertaisen nyöritysjärjestelmän kanssa estää radial-ulnaarisia virheasentoja. Aivan kuten Wrist Lacerissa peukalon liikkuvuus on vapaa myös Tripodissa. Ortoosin nyöritysjärjestelmä tekee sulkemisen ja säätämisen helpoksi yhdellä kädellä.

Käyttöalueet: Posttraumaattisesti, postoperatiivisesti, radial-ulnaarisissa virheasentoissa, karpalkanavasyndroomassa, reumatologisissa sairauksissa ja spastisiteetissa.

Muuta: Ortoosin pituus volaaripuolella on 20 cm.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28577	Lyhyt	Musta	X-Small	12-14 cm	Vas/Oik
28577	Lyhyt	Musta	Small	14-16 cm	Vas/Oik
28577	Lyhyt	Musta	Medium	16-18 cm	Vas/Oik
28577	Lyhyt	Musta	Large	18-20 cm	Vas/Oik
28577	Lyhyt	Musta	X-Large	20-22 cm	Vas/Oik

V-Strap™ lyhyt malli

V-Strap muistuttaa MedSpec Wrist Laceria, mutta siinä on erilainen kiinnityssysteemi ja se on erimuotoinen kuin Wrist Lacer. Tuki myötäilee käden muotoja ja sopii hyvin myös leveään käteen. Patentoitu V:n muotoinen kiinnitys pitää kiinnitysnauhat paikallaan kiinnitysrenkaissa tukea puettaessa ja riisuttaessa.

Käyttöalueet: Käytetään posttraumaattisesti, postoperatiivisesti, reumatologisissa sairauksissa ja spastisiteetissa.

Muuta: Ortoosin pituus volaaripuolella on 20 cm.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28574	Lyhyt	Musta	XX-Small	< 12 cm	Vas/Oik
28574	Lyhyt	Musta	X-Small	12-14 cm	Vas/Oik
28574	Lyhyt	Musta	Small	14-16 cm	Vas/Oik
28574	Lyhyt	Musta	Medium	16-18 cm	Vas/Oik
28574	Lyhyt	Musta	Large	18-20 cm	Vas/Oik
28574	Lyhyt	Musta	X-Large	20-22 cm	Vas/Oik
28574	Lyhyt	Musta	XX-Large	22-25 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympäry

V-Strap™ pitkä malli

V-Strap muistuttaa Wrist Laceria, mutta siinä on erilainen kiinnityssysteemi ja se on erimuotoinen kuin Wrist Lacer. Tuki myötäilee käden muotoja ja sopii hyvin myös leveään käteen. Patentoitu V:n muotoinen kiinnitys pitää kiinnitysnauhat paikallaan kiinnitysrenkaissa tukea puettaessa ja riisuttaessa.

Käyttöalueet: Käytetään posttraumaattisesti, postoperatiivisesti, reumatologisissa sairauksissa ja spastisiteetissa.

Muuta: Ortoosin pituus volaaripuolella on 26 cm.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28575	Pitkä	Musta	Small	14-16 cm	Vas/Oik
28575	Pitkä	Musta	Medium	16-18 cm	Vas/Oik
28575	Pitkä	Musta	Large	18-20 cm	Vas/Oik
28575	Pitkä	Musta	X-Large	20-22 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympäry



Mitta 1: Kämmenen ympärys

Mitta 2: Kyynärvarren ympärys



Mitta 1: Kämmenen ympärys

Mitta 2: Kyynärvarren ympärys

CTS Vission

Vission CTS on yölasta, joka on tarkoitettu lieventämään/estämään yöllistä karpaalikanavasyyndroomasta aiheutuvaa käsien puutumista.

Käyttöalueet: Karpaalikanavasyyndrooma.

Muuta: Lisänauhat voidaan ostaa erikseen.

Tuotenro.	Malli	Koko	Mitta 1	Mitta 2	Vas/Oik
46050	Vission CTS	Small	<20 cm	<23 cm	Vas/Oik
46050	Vission CTS	Large	>20 cm	>23 cm	Vas/Oik
46051	Lisänauhat				

CTS-lepo-ortoosi

Yölasta, joka on valmistettu ohuesta, perforoidusta Kydex-muovista. Immobilisoi ranteen. Tarkoitettu potilaille, joilla on karpaalikanavasyyndroomasta johtuvaa yöllistä puutumista ja turvotusta käsissä.

Käyttöalueet: Karpaalikanavasyyndrooma.

Muuta: Tukeen voidaan ostaa erilliset kiinnitysnauhat. Nauhat löydät Muovit ja materiaalit osiosta, tuotenro. 25030.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta 1	Mitta 2	Vas/Oik
28542	Vaal.sin.	Small	<20 cm	<23 cm	Vas/Oik
28542	Vaal.sin.	Large	>20 cm	>23 cm	Vas/Oik

SELECTION® peukalorannetuki, Rigid

Mukavantuntuinen ja joustava rannetuki, joka on valmistettu modernista, ihoa myötäilevästä materiaalista. Materiaali antaa ihon hengittää, sekä tuntuu mukavalta sitä vasten. Peukalo-osa antaa tukevan materiaalsi ansiosta hyvän tuen peukalolle, sekä pitää sen neutraalissa asennossa. SELECTION® Rigid peukalorannetuessa on muotoiltu muovinen tukilasta volaaripuolella ja joustavampi suora muovilasta dorsaalipuolella. Tukilastat voidaan irrottaa. Kaksiosainen kiinnitys tekee tuen avaamisen ja sulkemisen helpoksi yhdellä kädellä. Peukalo-osaa voidaan säätää. Materiaalia voi muotoilla saksilla parhaan istuvuuden saavuttamiseksi.

Käyttöalueet: Kun rannetta ja peukaloa tarvitsee suojata rasitukselta esimerkiksi tulehduksissa, työssä aiheutuissa rasitusvammoissa sekä reumaattisissa tai kulumaan liittyvissä muutoksissa.

Muuta: Tuotteesta on saatavana käyttöohjevideo Camp Scandinavian YouTube-kanavalla. Videon löydät osoitteesta www.youtube.com hakusanalla Camp Scandinavia. Ortoosin pituus volaaripuolella on 18 cm.



Mitta 1: Ranteen ympärys

Mitta 2: Kyynärvarren keskikohta

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
35206	Rigid	Musta	X-Small	< 11 cm	Vas/Oik
35206	Rigid	Musta	Small	11 - 14 cm	Vas/Oik
35206	Rigid	Musta	Medium	14 - 17 cm	Vas/Oik
35206	Rigid	Musta	Large	17 - 20 cm	Vas/Oik
35206	Rigid	Musta	X-Large	20 - 23 cm	Vas/Oik
35206	Rigid	Musta	XX-Large	23 - 26 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympärys

Vission peukalorannetuki

Peukalorannetuki, joka on joustava ja helppo pukea. Tuki on valmistettu tukevasta ja kulutusta kestävästä resorimateriaalista, jonka sisäpuoli on pehmeän ja mukavantuntuisen. Tuki on tarkoitettu rajoittamaan CMC- ja MCP I-nivelien liikkumista ja ohjaamaan peukalo toiminnalliseen asentoon sekä estämään ranteen fleksiota. Tuessa on muotoiltu muovilasta volaaripuolella. Peukalo-osassa on lisäksi lisätukea antava nauha.

Käyttöalueet: Lievästä kohtalaiseen CMC- ja MCP I-nivelten instabiliteetti, ligamenttivammat, tulehdukset, kulumat, trauma.

Muuta: Ortoosin pituus volaaripuolella on 18,5 cm.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
4603 I	Peukalorannetuki	Musta	XX-Small	11 - 12 cm	Vas/Oik
4603 I	Peukalorannetuki	Musta	X-Small	12 - 13 cm	Vas/Oik
4603 I	Peukalorannetuki	Musta	Small	13 - 14 cm	Vas/Oik
4603 I	Peukalorannetuki	Musta	Medium	14 - 16 cm	Vas/Oik
4603 I	Peukalorannetuki	Musta	Large	16 - 19 cm	Vas/Oik
4603 I	Peukalorannetuki	Musta	X-Large	19 - 22 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympärys

Basic peukalorannetuki

Yksilöllisesti suunniteltu rannetuki, joka tukee peukaloa olematta kuitenkaan kömpelö. Osittain vapaasti liikkuva peukalo-osa myötäilee thenaralueen lihaksia ja takaa hyvän istuvuuden. Peukalo pysyy levossa perusasennossa. Volaaripuolella on irrotettava ja muotoiltava alumiinilasta. Joustava, koko ortoosin pituinen muovinen peukalolasta, antaa lisätukea. Perusmallin tarrakiinnityksen ansiosta koon valinta on joustavampaa.

Käyttöalueet: Käytetään posttraumaattisesti, reumatologisissa sairauksissa, instabiliteetissa ja keventämään kuormitusta.

Muuta: Ortoosin pituus volaaripuolella on 18 cm.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
27442	Sininen	X-Small	< 12 cm	Vas/Oik
27442	Sininen	Small	11-14 cm	Vas/Oik
27442	Sininen	Medium	14-17 cm	Vas/Oik
27442	Sininen	Large	17-20 cm	Vas/Oik
27442	Sininen	X-Large	20-23 cm	Vas/Oik

Ryno Lacer® II peukalorannetuki

Erittäin stabiili peukalorannetuki, jossa on muotoiltavat alumiinilastat dorsaali-, volaari- ja radiaalipuolella. Radiaalinen peukalolasta kulkee koko tuen pituudelta ja immobilisoi peukalon tehokkaasti. Tuki on valmistettu kestävästä mokkajäljitelmästä ja siinä on hengittävä vuori. Nauhallinen kiinnityssysteemi on helppo avata ja sulkea yhdellä kädellä. Ryno Lacer II on uusi paranneltu versio Ryno Lacerista. Siinä kämmenosan pehmuste on nyt entistä parempi, peukalo-osaan on lisätty pehmustetta ja tuen alapuolella olevaa tarrakiinnitystä uudistettu.

Käyttöalueet: Käytetään posttraumaattisesti, postoperatiivisesti, reumatologisissa sairauksissa ja spastisiteetissa.

Muuta: Ortoosin pituus volaaripuolella on 22 cm.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28576	Musta	X-Small	<14 cm	Vas/Oik
28576	Musta	Small	14-16 cm	Vas/Oik
28576	Musta	Medium	16-18 cm	Vas/Oik
28576	Musta	Large	18-20 cm	Vas/Oik
28576	Musta	X-Large	20-22 cm	Vas/Oik




Mitta: Ranteen ympäryys

Thermoskin artroosikäsine

Käsine, joka lämmittää ja lievittää kipua. Ulkopuolen liukumaton materiaali auttaa saamaan hyvän otteen. Patentoitu Trioxon®-materiaali stimuloi ihoa tuottamaan lämpöä, siirtää kosteuden pois iholta ja antaa sen hengittää. Kliinisten testien mukaan käsine nostaa ihon ja ihonalaista lämpötilaa noin 2 °C:lla. Tämä parantaa lihasten, jänteiden ja nivelsiteiden elastisuutta.

Käyttöalueet: Reumatologiset sairaudet.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Pakkaus
53234	Musta	X-Small	15-17 cm	1 pari
53234	Musta	Small	18-20 cm	1 pari
53234	Musta	Medium	21-23 cm	1 pari
53234	Musta	Large	24-26 cm	1 pari
53234	Musta	X-Large	27-29 cm	1 pari
53234	Musta	XX-Large	>30 cm	1 pari

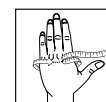

Mitta: MCP-nivelien ympärysmitta



CS-lasta

CS-lasta on sininen volaarinen Polypropyleeni-valmisteinen lasta. Lasta on anatomisesti muotoiltu käden lepoasentoon antropomeettisen datan pohjalta, ja näin se istuu suurimmalle osalle aikuisia. Voidaan muotoilla kuumentamalla lämpöpuhaltimella. Lasta muodostuu ohuemmista ja paksummista osista, joissa voimakkain tuki on ranteessa ohentuen siitä eteenpäin ja päättyen loivasti kaarettuun päähän ilman että se painaa. Lasta antaa dynaamista tukea sekä vahvistaa stabiliteettia.

Suora lasta: Pehmeä valkoinen muovilasta, joka on malliltaan suora. Lastalla on kevyt tukeva toiminto.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Pakkaus	Vas/Oik
35210	Volaarinen lasta	Sininen	Yksi koko	22x168 mm	10	Bilat.
35211	Dorsaalinen lasta	Valkoinen	Yksi koko	11x148 mm	10	Bilat.



Lisänauha rannetuille

Lisätukea antava nauha rannetuille. Sopii eri rannetukimalleille.

Tuotenro.	Malli	Väri
27448	Basic lisänauha rannetuelle	Sininen
35212	Selection lisänauha rannetuelle	Musta
35213	Selection lisänauha rannetuelle	Beige
46032	Vission & Selection lisänauha rannetuelle	Musta



Sormikontraktuura

Pehmeä, polyesteritäyteinen tyyny, joka pitää sormet erillään ja suojaa kämmentä sormikontraktuurissa. Päällystetty froteella, joka imee kosteuden.

Käyttöalueet: Pitkälle edenneet kontraktuurat.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Pakkaus	Vas/Oik
51616	Sininen	Medium	7,6 x 12,7 cm	3 kpl	Bilat.
51616	Sininen	Large	10 x 12,7 cm	3 kpl	Bilat.

Kämmensuoja

Pehmeä suoja, joka suojaa kämmentä sormikontraktuurissa. Kämmentä ja sormien väliin voi laittaa rullan, jos halutaan lisää ekstensiota.

Käyttöalueet: Pitkälle edenneet kontraktuurat.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Vas/Oik
51600	Kämmensuoja 1 st	Valk./Beige	Yksi koko	Vas/Oik
51601	Kämmensuoja 3 kpl	Valk./Beige	Yksi koko	Vas/Oik



Sormellinen kämmentuki

Pehmeä tuki, joka suojaa kämmentä sormikontraktuurissa. Sormien välissä oleva materiaali antaa kevyen abduktion. Tuki on helppo pukea, koska sen saa täysin auki.

Käyttöalueet: Pitkälle edenneet kontraktuurat.

Tuotenro.	Väri	Koko	Vas/Oik
51605	Valk./Beige	Yksi koko	Vas/Oik




Carve-It™ -käsiortoosi

Ortoosi, joka auttaa pitämään käden funktionaalisessa asennossa, kun sormissa on lievä tai kohtalainen spastisiteetti. Ortoosissa on irrotettava pehmuste. Kämmentä puolella on anatomisesti muotoiltu vaahtotyyny, joka suojaa kämmentä kaarta. Ortoosin alapuoli on tasainen, minkä ansiosta tuki lepää hyvin alustan päällä. Voidaan leikata haluttuun muotoon. Käy kumpaankin käteen.


Käyttöalueet: Kontraktuurien hoito ja korjaus sekä tonusmuutokset.

Muuta: Irrotettava pehmuste, jonka voi pestä käsin sekä kuivattaa ilmastavasti.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
51650	Valkoinen	Small/Medium	<7,6 cm	Bilat.
51650	Valkoinen	Large/X-Large	>7,6 cm	Bilat.

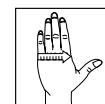

Mitta: 2-5 MCP-niveleen

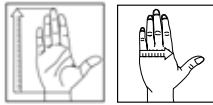

Mitta 1: 2-5 MCP

Mitta 2: Pituus ranteesta
sormenkärkein

SOT Peukalo-ortoosi

SOT Peukalo-ortoosi on anatomisesti muotoiltu lepo-ortoosi peukalolle ja kämmenelle. Ortoosi asettaa peukalon optimaaliseen lepo-asentoon. Se on muotoiltu rajoittamaan peukalon CMC – ja MCP-nivelten liikettä, antamaan tukea kämmenkaarille sekä tukemaan peukalon nivelet ja lihakset mukavaan lepoasentoon.

Ortoosissa on säädettävä alumiiniydin, joka voidaan helposti muotoilla yksilölliseen muotoon. Ortoosia voidaan muotoilla jälkikäteen kontraktuuran muuttuessa. Muotoiltavuutensa ansiosta se on erinomainen vaihtoehto erikoisvalmisteisten lepo-ortoosien sijaan. Lue enemmän tuotteen muotoilusta ”Ohjeita ja Vinkkejä”-esitteestä.

Kun tarvitaan lisäksi tukea ranteen alueelle, voidaan S.O.T peukalo-ortoosia käyttää yhdessä ranneortoosin kanssa. Vission 46029 ja Selection 35207 ovat erinomaisia tukia yhdistää S.O.T peukalo-ortoosin kanssa.

Käyttöalueet: SOT peukalo-ortoosi on tarkoitettu käytettäväksi nivelrikossa, nivelreumassa, peukalon adduktiokontraktuurassa ja yllirasitusvammoissa.

Muuta: SOT peukalo-ortoosi on pestävissä 40 asteessa.

Tuotenro.	Malli	Koko	Mitta 1	Mitta 2	Vas/Oik
28720	SOT Peukalo-ortoosi	Small	≤ 7,5 cm	≤ 18,5 cm	Vas/Oik
28720	SOT Peukalo-ortoosi	Medium	≤ 8,5 cm	≤ 20 cm	Vas/Oik
28720	SOT Peukalo-ortoosi	Large	≤ 9 cm	≤ 21 cm	Vas/Oik
28721	Lisäsuojus	Small	Vas/Oik		
28721	Lisäsuojus	Medium	Vas/Oik		
28721	Lisäsuojus	Large	Vas/Oik		

SOT lepo-ortoosi

SOT lepo-ortoosi on tarkoitettu käden liikkuvuuden ylläpitämiseen tai lisäämiseen tai kun käsi tarvitsee asettaa lepo- tai kuntoutusasentoon. Ortoosin harkitusti suunniteltu nivelten biomekaaninen asento auttaa spastista kättä rentoutumaan sekä kivun lievityksessä. Ortoosia voidaan myös käyttää neutraalissa asennossa. Ortoosin suojakangas jakaa paineen tasaisesti käden ja käsivarren volaari- ja dorsaalipuolelle estäen myös käden turvotusta. Ortoosi toimitetaan lepoasentoon asennettuna. Ortoosi voidaan helposti muotoilla POSI (Position of Safe Immobilization) -asentoon trauman tai leikkauksen jälkeen. SOT on modernin näköinen ja rakenteeltaan linjakas ja kevyt. Runko on valmistettu alumiinista, jonka ansiosta ortoosi voidaan hienosäätää haluttuun asentoon. Alumiinirunko on pehmustettu polyeteenivahtomuovilla ja päällystetty kankaalla. Materiaalin sileyden ja ortoosin matalan profiilin ansiosta se sopii hyvin vaatteiden alle. Ortoosiin on saatavana lisäosia, kuten joustamaton lisänauha, jota voidaan käyttää ranteen lisätukemiseksi esim. spastisiteetissa. Sormien erottelijoita sekä MCP-kiiloja on myös saatavana eri ko'issa.


Käyttöalueet: Halvaus, CP-vamma, reumaattinen artriitti, radiaalinen pareesi, lihasdystrofia. POSI (Position of Safe Immobilization) -asennossa trauman, murtumien, palovamman, ligamenttivamman tai leikkauksen seurauksena.

Muuta: Ortoosiin voidaan lisänauhan lisäksi tilata erikokoisia lisäsuojuksia, sormien erottelijoita sekä MCP-kiiloja.



Mitta 1: MCP:n leveys

Mitta 2: Käden pituus ranteesta sormenpäihin.

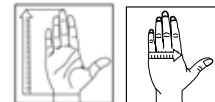

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta 1	Mitta 2	Vas/Oik
28710	SOT lepo-ortoosi	Musta	XXX-Small	5,5 cm	≤ 12 cm	Vas/Oik
28710	SOT lepo-ortoosi	Musta	XX-Small	≤ 6,5 cm	≤ 14 cm	Vas/Oik
28710	SOT lepo-ortoosi	Musta	X-Small	≤ 7,5 cm	≤ 16 cm	Vas/Oik
28710	SOT lepo-ortoosi	Musta	Small	≤ 7,5 cm	≤ 18,5 cm	Vas/Oik
28710	SOT lepo-ortoosi	Musta	Medium	≤ 8,5 cm	≤ 20 cm	Vas/Oik
28710	SOT lepo-ortoosi	Musta	Large	≤ 9 cm	≤ 21 cm	Vas/Oik
28711	MCP kiila	Musta	XX-Small	Leveys 65 mm	Korkeus 10 mm	Bilat.
28711	MCP kiila	Musta	Small	Leveys 75 mm	Korkeus 15 mm	Bilat.
28711	MCP kiila	Musta	Large	Leveys 90 mm	Korkeus 20 mm	Bilat.
28712	Sormien erottelija	Musta	Lasten			Bilat.
28712	Sormien erottelija	Musta	Medium			Bilat.
28712	Sormien erottelija	Musta	Large			Bilat.
28713	SOT lisänauha	Musta	XXX-Small-X-Small			Bilat.
28713	SOT lisänauha	Musta	Small-Large			Bilat.
28714	Lisäsuojus	Musta	XXX-Small			Vas/Oik
28714	Lisäsuojus	Musta	XX-Small			Vas/Oik
28714	Lisäsuojus	Musta	X-Small			Vas/Oik
28714	Lisäsuojus	Musta	Small			Vas/Oik
28714	Lisäsuojus	Musta	Medium			Vas/Oik
28714	Lisäsuojus	Musta	Large			Vas/Oik



Mitta 1: Mittaa ranteesta
keskisormen päähän.

Mitta 2: Mittaa käsivarren
puolivälistä keskisormen päähän.



Comfy lepo-ortoosi

Lepo-ortoosi, joka auttaa ylläpitämään/parantamaan ranteen ja MP, PIP ja DIP-niveliä ekstensiota. Ortoosi ennaltaehkäisee myös muita virheasentoja, korjaa käden liikerataa ja helpottaa hoidettavan raajan hyvän hygienian ylläpitämisessä. Ortoosi voidaan säätää haluttuun ranteen ja sormien ekstensioon/fleksioon. Suojapäälyste on antimikrobinen ja se edistää ilmankiertoa sekä pitää ihon kuivana ehkäisten näin ihovaurioiden syntymistä.

Käyttöalueet: Ohjaa käden oikeaan asentoon sekä tukee ranteen ja MP, PIP tai DIP niveliä, korjaa ulnaarista virheasentoa, tukee riippukättä sekä sopii neurologisista oireista johtuvien käden virheasentojen korjaamiseen.

Kontraindikaatiot: Verenkiertohäiriöt, painaumakohdat tai ihonärsytysoireet.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta 1	Mitta 2	Vas/Oik
51645	Comfy lepo-ortoosi	Sininen	Small	15-18 cm	28 cm	Bilat.
51645	Comfy lepo-ortoosi	Sininen	Medium	18-20 cm	32 cm	Bilat.



Mitta: Ranteen ympärys

Kwik-Form™ progressiivinen lepo-ortoosi

Ortoosi, jossa on tukeva lasta ja irrotettava pehmuste. Ortoosia voidaan säätää ilman työkaluja. Tukee kättä ja rannetta. Mukana tulee kolme erikokoista käsirullaa käden kontraktuuriin progressiivisen hoidon avuksi.

Käyttöalueet: Pitkälle edenneiden kontraktuurien hoito ja korjaus sekä tonusmuutokset.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
51630	Sininen	Small/Medium	<18 cm	Bilat.
51630	Sininen	Medium/Large	>18 cm	Bilat.

Kwik-Form™ lepo-ortoosi

Ortoosi, joka voidaan säätää haluttuun asentoon ilman työkaluja. Tarranauhat kiinnitetään suoraan tuen pehmeään päälliseen. Tukee peukaloa, kättä ja rannetta.

Käyttöalueet: Kontraktuurien hoito ja korjaus sekä tonusmuutokset, lepo-ortoosi.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
51638	Sininen	Small/Medium	<18 cm	Vas/Oik
51638	Sininen	Medium/Large	>18 cm	Vas/Oik




Mitta: Ranteen ympärys

Esimuotoiltu lepolasta

Ortoosi, joka pitää käden ja ranteen lepoasennossa. Ortoosi on valmistettu 3,2 mm:n Polyform™ matalalämpömuovista, jota voidaan hyvin muotoilla uudestaan. Mukana tulee itsekiinnittyvät nauhat, joiden laitto lastaan käy parhaiten kuumailmapuhaltimen avulla.

Käyttöalueet: Kontraktuurien hoito ja korjaus sekä tonusmuutokset, reumatologiset sairaudet, lepolasta.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
53223	Beige	Small	<8,9 cm	Vas/Oik
53223	Beige	Medium	9-10,2 cm	Vas/Oik
53223	Beige	Large	>10,2 cm	Vas/Oik

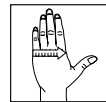

Mitta: 2-5 MCP-niveleen

Käsi- ja rannetuet

Tuotenro.	Tuotekuvaus	Väri	Koko	Vasen/ Oikea	Stabiliteetti*	Dorsaalipuolen lasta
28210	Gripa rannetuki	Tummansin.	S - XL	●	0	
34103	Elements Rannetuki	Beige/Musta	S - XL	●	1	
34107	Elements Bromsa Rannetuki	Beige/Musta	S - XL	●	2	●
28230	Kevyt rannetuki	Tummansin.	Yksi koko		0	
27441	Basic rannetuki, lyhyt	Tummansin.	XS - XL	●	1	
27442	Basic peukalollinen rannetuki	Tummansin.	XS - XL	●	1	
27445	Basic rannetuki, pitkä	Tummansin.	XS - XL	●	1	
27446	Basic rannetuki	Tummansin.	XS - XL	●	1	
28042	Bisca rannetuki	Tummansin.	S - L	●	2	
28149	Elcross Carpus Flexi rannetuki (sin.)	Tummansin.	S - XL	●	2	
28240	Bromsa rannetuki	Tummansin.	S - XL	●	2	●
43030	Vission rannetuki, lyhyt	Musta	XXS - XXL	●	1	
46029	Vission rannetuki lastalla	Musta	XXS - XL	●	2	
46031	Vission peukalorannetuki	Musta	XXS - XL	●	2	
35208	Selection Bromsa rannetuki	Musta	XS - XL	●	2	●
35204	Selection rannetuki	Musta	XS - XXL	●	2	●
35205	Selection rannetuki	Beige	XS - XXL	●	2	●
35206	Selection peukalorannetuki	Musta	XS - XXL	●	2	●
35209	Selection Multiopen	Musta	XS - XXL	●	2	
35207	Selection Open Wrist	Musta	XS - XL	●	2	●
35306	Selection lasten Open Wrist rannetuki	Musta	S - L	●	2	
35222	Selection Rannetuki, lyhyt	Musta	XS - XL	●	1	
35223	Selection Rannetuki, lyhyt	Beige	XS - XL	●	1	
35305	Selection Lasten rannetuki	Musta	XXS - L	●	2	
46050	Vission CTS	Harmaa	S & L	●	3	
28542	CTS-lepo-ortoosi	Vaal.sin.	S & L	●	3	
28578	Wrist Lacer II	Musta	XXS - XXL	●	3	●
28579	Wrist Lacer II, pitkä	Musta	S - XL	●	3	●
28570	Wrist Lacer, lyhyt	Beige	XS - XL	●	3	●
28572	Wrist Lacer, pitkä	Beige	S - XL	●	3	●
28574	V-Strap, lyhyt	Musta	XXS - XXL	●	3	●
28575	V-Strap, pitkä	Musta	S - XL	●	3	●
28576	Ryno Lacer II	Musta	XS - XL	●	3	●
28577	Tripod Wrist Lacer	Musta	XS - XL	●	3	●

Volaari- puolen lasta	Radial/ulnaa- rinen lasta	Peukalol- linen	Säädettävä peukalotuki	Pujotettava nyörikiristyk- sellä	Avattava tarrakiin- nityksellä	Estää dorsifleksiota	Kokonaispituus
					●	-	18 cm
●					●	Vähän	17 cm
					●	Paljon	15 cm
					●	-	-
●			●		●	Vähän	18 cm
●		●	●		●	Vähän	18 cm
●			●		●	Kohtalaisesti	21 cm
●			●		●	Vähän	18 cm
●					●	Kohtalaisesti	19 cm
●			●	●		Vähän	18 cm
					●	Paljon	15 cm
			●		●	Vähän	13,5
●			●		●	Kohtalaisesti	18,5 cm
●		●	●		●	Kohtalaisesti	18,5 cm
					●	Paljon	15 cm
●			●	●		Kohtalaisesti	18 cm
●			●	●		Kohtalaisesti	18 cm
●		●	●	●		Kohtalaisesti	18 cm
●			●	●	●	Paljon	22 cm
●					●	Kohtalaisesti	18 cm
●					●	Kohtalaisesti	16 cm
			●	●	●	Vähän	13 cm
			●	●	●	Vähän	13 cm
●			●	●		Kohtalaisesti	11 - 17,5 cm
●						Erittäin paljon	20 cm
●			●		●	Erittäin paljon	21 cm
●			●	●	●	Paljon	21 cm
●			●	●	●	Paljon	21 cm
●			●	●		Paljon	21 cm
●			●	●		Paljon	26 cm
●			●		●	Paljon	20 cm
●			●		●	Paljon	26 cm
●	●	●	●	●		Paljon	21 cm
●	●		●		●	Paljon	20 cm

Omat muistiinpanot

[illegible]



Käsivarsi- ja hartiaortoosit

www.camp.fi



Mitta: Ympärysmitta kyynärnivelen kohdalta.



Mitta: Mittaa ympärysmitta kyynärpään kohdalta käden ollessa koukussa.



Mitta: Mittaa kyynärvarren ympärysmitta 5 cm kyynärpään alapuolelta.
www.camp.fi

Kyynär- ja kantapääsuoja Heelbo™

Elastinen sukka, jonka geelilevy suojaa kyynärpään ihoa ja ehkäisee hankaumien syntymistä.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Pakkaus
53600	Keltainen	Small	15-20 cm	Pari
53600	Sininen	Medium	20-25 cm	Pari
53600	Valkoinen	Large	25-30 cm	Pari
53600	Vihreä	X-Large	>30 cm	Pari

ELEMENTS kyynärpäätuuki

Tämä tuote on tarkoitettu lievien ja tilapäisten vaivojen hoitoon, kuten esim. kiputilat ja tulehdus. Tuki komprimoi kevyesti ja lämmittää niveltä.

Käyttöalueet: Tilapäisten vaivojen hoitoon, kuten esim. kiputilat ja tulehdus.

Kontraindikaatiot: Voimakas ödeema, voimakas turvotus.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
34101	Beige/Musta	Small	23 - 25 cm	Bilat.
34101	Beige/Musta	Medium	25 - 27 cm	Bilat.
34101	Beige/Musta	Large	27 - 30 cm	Bilat.
34101	Beige/Musta	X-Large	30 - 33 cm	Bilat.

ELEMENTS Epi

Tämä tuote on tarkoitettu lievien ja tilapäisten vaivojen, nk. tennis- tai golfkyynärpään hoitoon. Tukea voi joissakin tapauksissa käyttää rannetuen kanssa. Tuki vähentää janteen kiinnityskohdan kuormitusta painamalla kevyesti käsivartta. Parhaan tuloksen saat käyttämällä mukana tulevia, irrotettavia tyynyjä.

Käyttöalueet: Tilapäisten vaivojen, nk. tennis- tai golfkyynärpään hoitoon.

Kontraindikaatiot: Voimakas ödeema, voimakas turvotus.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
34104	Musta	Small/Medium	20 - 28 cm	Bilat.
34104	Musta	Large/X-Large	28 - 36 cm	Bilat.

EpiGel-epikondyliittituki

Mukava ja matalaprofiilinen epikondyliittituki, jossa on kaksi liikuteltavaa ja tärähtelyä vaimentavaa geelityynyä. Geelityynyt keventävät painetta kompressoimalla ekstensori- ja fleksorilihaksia. Ei purista kyynärvartta. Yksinkertaisen kiinnityksen ansiosta helppo pukea ja riisua.

Käyttöalueet: Lateraalinen ja/tai mediaalinen epikondyliitti (nk. tennis- ja golfkyynärpää).

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28166	Musta	Yksi koko	20-35 cm	Bilat.



Mitta: Ympärysmitta 5 cm kyynärpään alapuolelta

EpiFoam-epikondyliittituki

Epikondyliittituki, jossa on vaahdotyyny, joka asetetaan joko ekstensorilihasten kohdalle lateraalisessa epikondyliitissä tai fleksorilihasten kohdalle mediaalisessa epikondyliitissä. Yksinkertainen kiinnityssysteemi helpottaa tuen pukemista ja riisumista.

Käyttöalueet: Lateraalinen tai mediaalinen epikondyliitti (nk. tennis- tai golfkyynärpää).

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28165	Musta	Yksi koko	20-35 cm	Bilat.



Mitta: Ympärysmitta 5 cm kyynärpään alapuolelta

Elcross epikondyliittituki

Tuen lihasrunkoon kohdistama paine vähentää lihaksiston, jänteiden ja jänteen kiinnitysalueiden räsytystä. Tämä vähentää kipua epikondyliitissä. Sisäpuolella oleva, muovilastalla tuettu pehmeä pelotti lisää painetta kiristyskohdassa.

Käyttöalueet: Käytetään lateraalisessa tai mediaalisessa epikondyliitissä (nk. tennis- tai golfkyynärpää).

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta
28162	Sininen	Small	20-25 cm
28162	Sininen	Medium	25-30 cm
28162	Sininen	Large	30-35 cm
28162	Sininen	X-Large	35-40 cm



Mitta: Ympärysmitta 5 cm kyynärpään alapuolelta



Mitta: Mitta otetaan kainalon alta rintakehän ympäri.

HemiSafe

Pehmeä ja mukava hartiaortoosi on tarkoitettu käytettäväksi aivohalvauspotilaille hemiplegian yhteydessä kivun lievittämiseksi olkanivelessä ja subluksaatoriskin vähentämiseksi. Ortoosissa on täydellinen anatominen muotoilu. Se antaa tuen olkanivellelle ja sallii samanaikaisesti liikkuvuuden päivittäisissä aktiviteeteissa.

HemiSafe on valmistettu hengittävistä materiaalista. Siinä on vartalon ympäri kulkeva säädettävä nauha, joka on leveä ja pehmeä hankauksen estämiseksi. Tuotteen mukana on tyyny, joka laitetaan kainaloon, jos halutaan lisätä abduktiota. Ortoosi voidaan pukea ja riisua yhdellä kädellä.

Käyttöalueet: Kivun lievittäminen olkanivelessä halvauksen jälkeen. Vähentää olkanivelen subluksaatoriskiä.

Muuta: Lateksiton

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta 1	Vas/Oik
28157	Valkoinen	Small	80-100 cm	Vas/Oik
28157	Valkoinen	Medium	100-120 cm	Vas/Oik
28157	Valkoinen	Large	120-140 cm	Vas/Oik



Mitta 1: rinnan ympärys
Mitta 2: olkavarren pituus

Vission kantoside IMMO

Vission kantoside on tarkoitettu olkavarren, kyynärpään ja kyynärvarren immobilisoimiseksi sekä asennon ylläpitämiseksi 90° tai 130° kulmassa. Kantoside sopii erityisesti olkapään ja rintakehän vammojen hoitamiseen. Kantositeen puolisuuden voi vaihtaa, joten se sopii käytettäväksi sekä oikealla että vasemmalla puolella.

Käyttöalueet: Olkapään, käsivarren, kyynärvarren ja hartiasuudun vammat (murtumat, dislokaatiot ja venähdykset). Olkapään- ja hartian suudun kirurgia. Plexus brachialis pareesi.

Kontraindikaatiot: Ei tunnettuja

Tuotenro.	Malli	Koko	Mitta 1	Mitta 2
46022	Vission Kantoside IMMO	X-Small	68 - 78 cm	< 30 cm
46022	Vission Kantoside IMMO	Small	80 - 90 cm	< 38 cm
46022	Vission Kantoside IMMO	Medium	90 - 100 cm	< 38 cm
46022	Vission Kantoside IMMO	Large	100 - 113 cm	< 38 cm
46022	Vission Kantoside IMMO	X-Large	113 - 120 cm	> 38 cm
46022	Vission Kantoside IMMO	XX-Large	120 - 140 cm	> 38 cm

Rulla-mitella

Yksinkertainen vaihtoehto kantositeelle (Collar'n Cuff), mitella, toimitetaan 12m rullassa. Pakkauksessa toimitetaan kaksi rullaa, (joista toinen annostelulaatikossa) sekä 10 kpl Y-tarrakiinnikettä kyynärvarren asennon tukemiseksi. Materiaali on pehmeää ja joustavaa sekä säilyttää muotonsa myös kuormituksessa. Tummansinisen värinsä ansiosta tuki säilyy siistinä pitkään.

Käyttöalueet: Suositellaan käytettäväksi ranteen, kyynärnivelen ja hartian vammojen hoidossa. Voidaan käyttää myös kipsin kanssa.

Tuotenro.	Malli	Väri	Leveys	Pituus	Pakkaus
42212	Rulla-mitella	Musta	5 cm	2 x 12 metriä	Rullaa




UUTUUS!

Kantoside, vaahtomuovi

Kantoside, jossa on fiksaationauha mukana. Sisäpuoli on froteeta. Säädettävä hartianauha, joka voidaan kiinnittää mihin kohtaan tahansa.

Käyttöalueet: Käytetään vähentämään rasitusta hartioissa ja käsivarressa. Posttraumaattinen ja postoperatiivinen käyttö.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
2003 I	Harmaa	Small	28-36 cm	Bilat.
2003 I	Harmaa	Medium	35-42 cm	Bilat.
2003 I	Harmaa	Large	41-49 cm	Bilat.
2003 I	Harmaa	X-Large	48-56 cm	Bilat.

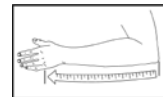


Mitta: Kyynärpäältä MCP:hen.

PUUVILLA-kantoside


Helppokäyttöinen kantoside, jossa on portaaton säätö. Olkaimessa on siirrettävä pehmuste lisämukavuuden saamiseksi. Tupla D-lenkkien avulla kantosidettä voidaan käyttää sekä kipsin/ortoosin kanssa että ilman. Sormisilmukka.

Käyttöalueet: Käytetään vähentämään rasitusta hartioissa ja käsivarressa. Posttraumaattinen ja postoperatiivinen käyttö.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
47101	Harmaa	Small	25-28 cm	Bilat.
47101	Harmaa	Medium	27-30 cm	Bilat.
47101	Harmaa	Large	29-32 cm	Bilat.
47101	Harmaa	X-Large	31-34 cm	Bilat.

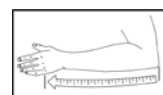

Mitta: Kyynärpäältä MCP-niveeliin

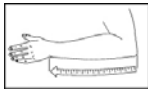

Mitta: Kyynärpäästä ranteeseen



Mitta 1: Kantositeen korkeus ja leveys

Mitta 2: Pidikkeen korkeus ja pituus



Mitta 1: Kantositeen korkeus x leveys

Mitta 2: Pidikkeen korkeus x pituus

VERKKOKANGAS-kantoside

Ilmava kantoside, jossa on portaaton säätö. Olkaimessa on siirrettävä pehmuste lisämukavuuden saamiseksi. Tupla D-lenkkien avulla kantosidettä voidaan käyttää sekä kipsin/ortoosin kanssa että ilman. Sormisilmukka.

Käyttöalueet: Käytetään vähentämään rasitusta hartioissa ja käsivarressa. Posttraumaattinen ja postoperatiivinen käyttö.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
47100	Harmaa	Small/Medium	27-30 cm	Bilat.
47100	Harmaa	Large/X-Large	31-34 cm	Bilat.

WRAP-kantoside

Perinteinen kaksiosainen kantoside, jonka molempia osia voidaan säätää erikseen. Olkaimessa on siirrettävä pehmuste lisämukavuuden saamiseksi. Käsiosassa on muovisolki selkäpuolella, joka pitää molemmat osat kiinni toisissaan ja estää niitä liukumasta hartioiden ylitse. Säädettävät nauhat voi kiinnittää mihin kohtaan tahansa.

Käyttöalueet: Käytetään vähentämään rasitusta hartioissa ja käsivarressa. Posttraumaattinen ja postoperatiivinen käyttö.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta 1	Mitta 2	Vas/Oik
47102	Harmaa	Small/Medium	23 cm, 32 cm	10 cm, 132 cm	Bilat.
47102	Harmaa	Large/X-Large	25 cm, 35 cm	13 cm, 155 cm	Bilat.

Kaksiosainen kantoside, sininen

Pehmeä kantoside, jossa on säätöä varten irrotettava, leveä nauha. Kantositeessä on kantonauhat kummallakin hartialla, mikä jakaa painon tasaisesti. Selän ristisolki pitää nauhat paikallaan. Säädettävät nauhat voi kiinnittää mihin kohtaan tahansa.

Käyttöalueet: Käytetään posttraumaattisesti ja postoperatiivisesti vähentämään rasitusta.


Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta 1	Mitta 2	Vas/Oik
20045	Sininen	Small/Medium	24 cm, 32 cm	10 cm, 100 cm	Bilat.
20045	Sininen	Large/X-Large	25 cm, 35 cm	13 cm, 135 cm	Bilat.

Kantoside "8"

Kevyt ja ilmava kantoside, joka vähentää hartian, käsivarren ja käden rasitusta. Kaksi leveää, säädettävää nauhaa jakavat painon kummallekin hartialle. Selän takana oleva metallirengas yhdistää nauhat. Kantoside voidaan pukea ja riisua yhdellä kädellä. Sopii hyvin käytettäväksi neurologisissa sairauksissa.

Käyttöalueet: Käytetään posttraumaattisesti ja postoperatiivisesti, neurologisissa sairauksissa ja vähentämään rasitusta.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
53200	Beige	Small/Medium	< 34,5 cm	Bilat.
53200	Beige	Large/X-Large	30-38 cm	Bilat.

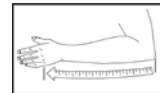

Mitta: Pituus (kyynärpästä MCP-niveeliin).

Kantoside olkalukko

Monikäyttöinen kantoside, jota on helppo käyttää. Tuotteeseen kuuluu vartalon ympäri kulkeva vyötärönauha, johon olkavarsi kiinnitetään ja saadaan näin aikaan olkanivelen tehokas immobilisaatio. Ranneosa kiinnittyy vyötärönauhan etuosaan ja tämä puolestaan pikalukolla olkaremmiin. Myös peukalolle on oma tukensa, jotta käsi saadaan pysymään oikeassa kulmassa välttämällä samalla myös "riippukättä". Säädettävä olkaremmi takaa potilaalle hyvän istuuden. Tuote sopii käytettäväksi sekä oikealla, että vasemmalla puolella. Iso pehmustetyyny keventää olkanivelen ja solisluun kuormitusta tehokkaasti. Tämä kantoside on helppo säätää ja miellyttävä sekä yksinkertainen käyttää. Vyötärönauhan pituus on 120 cm.

Käyttöalueet: Posttraumaattinen ja postoperatiivinen kuormituksen keventäminen.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko
42213	Kantoside olkalukko	Musta	Yksi koko



UUTUUS!



Mitta: Käsivarren yläosan ympäryys proksimaalisesti.

Humerux Humerusortoosi

Humerusortoosin toiminta perustuu tunnetun "Sarmiento-ortoosin" toimintaperiaatteelle, tiukkaan sirkulaariseen pehmytkudoskompressioon. Kolme ympärikulkevaa nauhaa kiristyvät toisistaan riippumatta. Ortoosin ankkurointi olan yli varmistaa hyvän paikallaan pysymisen ja estää alas liukumisen. Vastapuolen käsivarren alta kulkevan nauhan irrotettava pehmuste lisää käyttömukavuutta. Mukava ortoosi on helppo käyttää ja hyväksyä. Ortoosin hengittävä materiaali antaa ihon hengittää ja näin iho-ongelmien riski pienenee. Ortoosissa on kaksi muovilevyä, jotka voi tarvittaessa lämmitellä ja muotoilla sekä leikata saksilla oikean kokoiseksi. Useimmiten muotoilua ei kuitenkaan tarvita. Ortoosi sallii vapaan kyynärnivelen liikkuvuuden. Kangas on testattu Öko-tex standardi 100:n mukaisesti eikä sisällä lateksia.

Käyttöalueet: Diafysiaalinen humerusmurtuma (luun keskiosan murtuma).

Tuotenro.	Väri	Koko	Pituus	Ympärysmitta
62105	Musta	Small	28 cm	18 - 26 cm
62105	Musta	Medium	30 cm	26 - 34 cm
62105	Musta	Large	32 cm	34 - 42 cm
62105	Musta	X-Large	34 cm	42 - 50 cm



ROM kyynärpääortoosi

Postoperatiivinen kyynärpääortoosi, joka on suunniteltu lukitsemaan tai kontrolloimaan kyynärpään liikettä ligamenttivammojen tai stabiileiden murtumien hoidon aikana. Liikerataa voidaan rajoittaa 0° - 90° ekstensioon ja 0° - 120° fleksioon. Liikerataa voidaan helposti säätää 10° välein. Ortoosin pituutta ja ympärysmittaa voidaan säätää 36-45 cm:iin. Ortoosin mukana toimitetaan kantoside.

Käyttöalueet: Murtumissa, postoperatiivisesti, tilat missä vaaditaan fleksion tai ekstension kontrollointia.

Tuotenro.	Koko	Vas/Oik
62150	Yksi koko	Vas/oik
62149	Vaihtopehmuste	Vas/oik

ROM kyynärpääortoosi UniBor

Viimeisimmän teknologian mukainen postoperatiivinen kyynärpääortoosi. Liikerataa säädetään helposti 10°:n välein aina 120°:n täyteen liikerataan asti. Nivel voidaan lukita haluttuun asentoon. Ortoosin pituutta ja ympärysmittaa voidaan säätää. Ortoosiin voidaan tilata teleskooppinen käsituki, jota voidaan säätää sekä asettaa päälle ja pois pronaatio-supinaation kontrolloimiseksi. ROM Kyynärpääortoosi UniBor stabiloi käden liikettä ja tarjoaa mukavan sekä tehokkaan kuntoutushoidon.

Käyttöalueet: Kyynärpään fleksio-ekstensio liikkeiden kontrolloimiseen ja trauman jälkeiseen pronaatio-supinaatio liikkeiden rajoittamiseen.

Muuta: Lääkärin tulee määrittää päivittäinen hoitoaika sekä kokonaishoitoajan pituus.



Tuotenro.	Malli	Vas/Oik
62151	Kyynärpääortoosi UniBor	Bilat.
62152	Erillinen olkanauha	Bilat.
62153	Käsituki	Bilat.
62154	Vaihtopehmuste	Bilat.

Omat muistiinpanot

[illegible]



FES - Toiminnallinen sähköstimulaatio

www.camp.fi

a

ALFESS™

FUNCTIONAL ELECTRICAL STIMULATION SYSTEM



TOIMINNOT & EDUT

- Voidaan kiinnittää yhdellä kädellä
- Kevyt
- Ei näy vaatteiden alta
- Yksinkertainen laite ohjelmoitavaksi joko ohjauspaneelin tai applikaation avulla.
- Integroidut elektrodit (ei tarvitse tilata erikseen)
- Yksi laite - yksi koko - helppo tilata
- Mahdollistaa paljasjaloin kävelyn
- Vedenkestävä (lyhyen aikaa)
- Kaksi aktiviteettiasetusta: Kävely ja Harjoitustila
- Latausyksikkö latausta varten integroidulla akulla.



Asetukset voidaan tehdä joko laitteessa, ohjauspaneelissa tai mobiiliapplikaation avulla.

ALFESS™, Toiminnallinen sähköstimulaatio

ALFESS™ on uusi innovatiivinen ratkaisu riippunilkkan hoidossa. Tämän tyyppistä laitetta voidaan kutsua jopa Digitaaliseksi riippunilkkaortoosiksi, FES:ksi tai Neurostimulaattoriksi. Laite auttaa jalkaterän nostossa ja parantaa näin kävelyä. Algoritmi kerää sensorien antaman informaation tunnistamalla nopeuden ja jalkaterän kulmat ja Alfess lähettää sähköisiä impulsseja hermoon tukien jalkaterän nostoa.



Käyttöalueet: Keskushermoston vammat kuten; Multippeli Skleroosi (MS), Aivohalvaus, CP-vamma, osittaiset selkädinavauriot, traumaattiset aivovammat.

Kontraindikaatiot: Ei käytetä yhdessä elektronisten monitorivarustusten kanssa, defibrillaattorin eikä korkeataajuuksisten lääketieteellisten laitteiden kanssa. FES hoitoa ei käytetä potilaille, joilla on tahdistaja. Älä käytä, mikäli sinulla on Autonominen dysrefleksia. Älä käytä FES:iä äskettäin suoritettuna kirurgisen operaation jälkeen, sillä lihassupistukset voivat häiritä paranemisprosessia. Lisätietoa löytyy tuotteen mukana tulevasta käyttöohjeesta.

Art. nr.	Modell	Storlek
28270	ALFESS™ Komplett	Yksi koko
28271	Jatkonauha	Yksi koko
28272	Verkkoadapteri EU	Yksi koko
28273	Verkkoadapteri UK	Yksi koko
28274	Kaukosäätimen lisäjohto	Yksi koko
28275	ALFESS ylimääräinen latausjohto	Yksi koko
28277	Kaukosäädin	
28279	Ylimääräinen D-rengas magneetilla	Yksi koko
28283	Connect geeli	500 ml

Omat muistiinpanot

[illegible]



Jalka- ja nilkkatuet

www.camp.fi



Mitta: Nilkan ympärysmitta.



Mitta: Nilkan ympärysmitta.



Mitta: Mittaa jalan ympärysmitta jalkapöydän korkeimmalta kohdalta.

Heelbo kyynärpää-/kantapääsuoja™

Elastinen sukka, jonka geelilevy suojaa kantapään ihoa ja ehkäisee hankaumien syntymistä.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Pakkaus
53600	Keltainen	Small	15-20 cm	I pari
53600	Sininen	Medium	20-25 cm	I pari
53600	Valkoinen	Large	25-30 cm	I pari
53600	Vihreä	X-Large	>30 cm	I pari

ELCROSS® nilkkatuki

Puuvillasta ja lycrasta valmistettu pehmeä ja joustava sukkamallinen nilkkatuki, joka tukee nilkkaa kevyesti. Integroitu, elastinen nauha nostaa jalkaa lateraalipuolelta, mikä estää nilkan nyrjähdysten. Helppokäyttöinen.

Käyttöalueet: Lievä nilkan instabiliteetti.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28181	Sininen	Small	20-25 cm	Vas/Oik
28181	Sininen	Large	25-30 cm	Vas/Oik

ELEMENTS nilkkatuki

Tämä tuote on tarkoitettu lievien ja tilapäisten vaivojen hoitoon, kuten esim. kiputilat, nilkan venähdykset tai nyrjähdykset (sisään- tai ulospäin). Tukea voi käyttää nauhojen kanssa tai ilman. Tuki komprimoi kevyesti ja lämmittää nilkkaa. Elastiset nauhat rajoittavat nilkan liikkuvuutta.

Käyttöalueet: Tilapäisten vaivojen hoitoon, kuten esim. kiputilat, nilkan venähdykset tai nyrjähdykset.

Kontraindikaatiot: Voimakas ödeema, voimakas turvotus, neuropatia, diabeteksen aiheuttamat jalan ongelmat, haavaumat.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
34100	Beige/Musta	Small	20 - 23 cm	Bilat.
34100	Beige/Musta	Medium	23 - 26 cm	Bilat.
34100	Beige/Musta	Large	26 - 29 cm	Bilat.

ASO® nilkkatuki

Matalaprofiilinen ja stabiili nilkkatuki. Edessä on tukeva nyöritys. Joustamattomien nailonnauhojen asettelu muistuttaa teippausta ja estää jalan supinaation. Nauhoja säädetään vamman mukaan. Ortoosin sisäpuolella akillesjänteen kohdalla on lisäksi mukavantuntuinen vahvistettu CoolFlex-pehmuste.

Käyttöalueet: Akuutit ja pitkäkestoiset jalan instabiliteetit ja urheilussa ennaltaehkäisevästi.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28188	Ilman lastoja	Musta	XX-Small	22,5-25 cm	Bilat.
28188	Ilman lastoja	Musta	X-Small	25-27,5 cm	Bilat.
28188	Ilman lastoja	Musta	Small	27,5-30 cm	Bilat.
28188	Ilman lastoja	Musta	Medium	30-32,5 cm	Bilat.
28188	Ilman lastoja	Musta	Large	32,5-35 cm	Bilat.
28188	Ilman lastoja	Musta	X-Large	35-37,5 cm	Bilat.
28188	Ilman lastoja	Musta	XX-Large	37,5-40 cm	Bilat.
28188	Ilman lastoja	Musta	XXX-Large	>40 cm	Bilat.




Mitta: Ympärysmitta kantapaan apexista ja malleolien yli

ASO® nilkkatuki lastoilla

Matalaprofiilinen ja stabiili nilkkatuki. Edessä on tukeva nyöritys. Joustamattomien nylonnauhojen asettelu muistuttaa teippausta ja estää jalan supinaation. Nauhoja säädetään vamman mukaan. Tämä malli tukee nilkkaa erityisen hyvin ulko- ja sisäpuolella olevien, irrotettavien muovilastojensa ansiosta. Ortoosin sisäpuolella akillesjänteen kohdalla on lisäksi mukavantuntuinen vahvistettu CoolFlex-pehmuste.

Käyttöalueet: Akuutit ja pitkäkestoiset jalan instabiliteetit ja urheilussa ennaltaehkäisevästi.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28186	Lastoilla	Musta	X-Small	25-27,5 cm	Bilat.
28186	Lastoilla	Musta	Small	27,5-30 cm	Bilat.
28186	Lastoilla	Musta	Medium	30-32,5 cm	Bilat.
28186	Lastoilla	Musta	Large	32,5-35 cm	Bilat.
28186	Lastoilla	Musta	X-Large	35-37,5 cm	Bilat.
28186	Lastoilla	Musta	XX-Large	37,5-40 cm	Bilat.

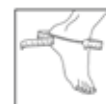

Mitta: Ympärysmitta kantapään apexista malleolien yli



Mitta: Ympärysmitta kantapään apexista malleolien yli

ASO®EVO™

Matalaprofiilinen ja tukeva nilkkatuki, jossa on edessä stabiloiva nyöritys. Nailonnauhojen asettelu muistuttaa teippausta ja ne stabiloivat nilkkaa supinaatiossa/pronaatiossa. ASO EVO:n nauhat tukevat kantaluuta inversiossa/eversiossa paremmin kuin tavallinen ASO. Ortoosin suu on vahvistettu muovimansetilla, minkä ansiosta se tukee myös ylemmää nilkkaniveltä. Ortoosin sisäpuolella akillesjänteen kohdalla on lisäksi mukavantuntuinen vahvistettu CoolFlex-pehmuste.

Käyttöalueet: Akuutti tai pitkäkestoinen nilkan instabiliteetti, ennaltaehkäisevästi urheilussa, nilkan nyrjähdykset, subtalar-nivelen instabiliteetti.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28189	Musta	X-Small	25-27,5 cm	Bilat.
28189	Musta	Small	27,5-30 cm	Bilat.
28189	Musta	Medium	30-32,5 cm	Bilat.
28189	Musta	Large	32,5-35 cm	Bilat.
28189	Musta	X-Large	35-37,5 cm	Bilat.
28189	Musta	XX-Large	37,5-40 cm	Bilat.



Mitta: Ympärysmitta kantapään apexista malleolien yli

ASO®EVO™ Quatro

Stabiili nilkkatuki, joka mahtuu vielä paremmin jalkineeseen kuin ASO EVO. Jalkapöydän ympärillä oleva materiaali on valmistettu siten, että se sallii normaalin dorsaali-plantaarifleksion. Jäykät nailonnauhat jalkaterän ympärillä muistuttavat teippausta ja ne estävät jalan supinaatiota/pronaatiota. EVO Quatrossa nailonnauhat tukevat kantaluuta inversiossa/eversiosuunnassa enemmän kuin tavallinen ASO. Ylempi osa on vahvistettu muovimansetilla antaen lisäsuojaa vaikeille nilkannyrjähdyksille. Mansetti on päällystetty CoolFlex-materiaalilla tehden tuen mukavan tuntuiseksi. Tuessa on myös käytetty nahkajäljitelmää, mikä estää sen liukumista.

Käyttöalueet: Akuutti tai pitkäkestoinen nilkan instabiliteetti, ennaltaehkäisevästi urheilussa, nilkan nyrjähdykset, subtalar-nivelen instabiliteetti.


Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28192	Musta	X-Small	25-27,5 cm	Bilat.
28192	Musta	Small	27,7-30 cm	Bilat.
28192	Musta	Medium	30-32,5 cm	Bilat.
28192	Musta	Large	32,5-35 cm	Bilat.
28192	Musta	X-Large	35-37,5 cm	Bilat.
28192	Musta	XX-Large	37,5-40 cm	Bilat.

ELEMENTS Stretch Up

ELEMENTS Stretch Up on tarkoitettu käytettäväksi illalla/yöllä Plantaarifaskiitin hoitoon. Sukkaa käytetään yöllä tai levossa muuhun aikaan. Tämä tuote on tarkoitettu vain yhden henkilön käyttöön. Koot: Small, Medium ja Large. Sopii sekä vasemmalle että oikealle.

Käyttöalueet: Tarkoitettu käytettäväksi illalla/yöllä Plantaarifaskiitin hoitoon.

Kontraindikaatiot: Verenkierto-ongelmat, jalan avohaavat, diabetes, turvotus, vasaravarvas, iho-ongelmat, raskaus. Sukkaa ei tule käyttää juuri leikattuun jalkaan.

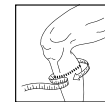

Mitta: Pohkeen ympärysmitta

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
34108	Musta	Small	< 20 cm	Bilat.
34108	Musta	Medium	20 - 40 cm	Bilat.
34108	Musta	Large	> 40 cm	Bilat.

Nilkkaortoosi Gel

Nilkkaortoosi immobilisaatioon, kylmähoitoon sekä kompressioon turvotuksen vähentämiseksi nilkan akuuteissa vammoissa. Anatomisesti muotoilluissa muoviosissa on kaksiosaiset pehmusteet, joista toisessa on ilmaa, toisessa geeliä. Nämä voidaan myös irroittaa ja käyttää kylmähoitoon. Leveys kantapään alla säädetään tarranauhan avulla. Muoviosien pituus on 25 cm. Kaksi säären ympäri kulkevaa tarranauhaa tukee ortoosin paikalleen.

Käyttöalueet: Akuutit nilkkavammat, nyrjähdykset ja pitkäaikainen nilkkanivelen instabiliteetti.



Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28179	Valkoinen	Yksi koko	25 cm	Bilat.

Stabil Soft -nilkkatuki

Stabiili nilkkatuki, jossa on nilkan ympärillä yksinkertaiset kiinnitysnauhat. Polypropeenista valmistetut sivutuet on muotoiltu anatomisesti. Sisämateriaali on T-vahtokumia, joka muotoutuu säären mukaan. Tukea käytetään yhdessä tukevan kengän kanssa.

Käyttöalueet: Akuutit ja pitkäkestoiset nilkan instabiliteetit.

Tuotenro.	Väri	Koko	Vas/Oik
28184	Musta	Yksi koko	Bilat.





PRAFO® Standard

PRAFO®Standard (Pressure Relief Ankle Foot Orthosis) on kehitetty keventämään painetta kantapäässä ja kantapään haavaumissa makuuasennossa ja lyhyillä kävelymatkoilla. Se pitää jalan neutraalissa asennossa ja säilyttää dorsaali- ja plantaarifleksion kävelyn aikana. Säädetty tanko estää sisä- ja ulkorotaation makuuasennossa. Säädettyt jalka-, varvas ja pohjeosat.

Käyttöalueet: Soveltuu esim. diabetes- ja painehaavaumiin.

Muuta: Pehmuste on helppo irrottaa pesua varten ja asettaa takaisin.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Vas/Oik
71100	PRAFO Standard	Musta	Yksi koko	Bilat.
71110	Pehmuste- ja nauhasetti	Musta	Yksi koko	

Boston Soft AFO

Nilkka- ja jalkaortoosi, joka on valmistettu jäykästä muovista ja vuorattu pehmeällä vaahtomuovilla. Ortoosi on tarkoitettu jalan ja nilkan asennon parantamiseen ja spastisiteetin vähentämiseen. Siinä on sisäänrakennettu kantasuoja, joka edesauttaa kantapäähaavojen hoitamista. Boston Soft AFOa voi tilata sekä antirotaatiotuen (stabilizer) kanssa tai ilman. Ortoosi on helppo puhdistaa ja sitä voi muotoilla saksilla.

Käyttöalueet: Selkäydintyrä, lihasdystrofia, CP, trauma ja kantapäähaavat.

Muuta: Lisätukea antava lasta voidaan tilata samankokoisena kuin Boston Soft AFO.



Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik	Kengän koko
71151	Ilman rotaatitukea	Lapsi 1	Bilat.	19-20
71151	Ilman rotaatitukea	Lapsi 2	Bilat.	21-22
71151	Ilman rotaatitukea	Lapsi 3	Bilat.	23-24
71151	Ilman rotaatitukea	Lapsi 4	Bilat.	25-26
71151	Ilman rotaatitukea	Lapsi 5	Bilat.	27-29
71151	Ilman rotaatitukea	Lapsi 6	Bilat.	30-31
71151	Ilman rotaatitukea	Aikuinen A	Bilat.	32-34
71151	Ilman rotaatitukea	Aikuinen B	Bilat.	35-36
71151	Ilman rotaatitukea	Aikuinen C	Bilat.	37-39
71151	Ilman rotaatitukea	Aikuinen D	Bilat.	40-41
71151	Ilman rotaatitukea	Aikuinen E	Bilat.	42-44
71151	Ilman rotaatitukea	Aikuinen F	Bilat.	45-46
71152	Käytetään 71151 kanssa	Antirotaatiotuki		



Bebax jalkaterä-ortoosi

Bebax on innovatiivinen lasten jalkaortoosi, joka on suunniteltu progressiiviseen ja dynaamiseen synnynnäisten jalkaterän virheasentojen korjaamiseen. Ortoosi on terveydenhuollon hyväksymä vaihtoehto kipsaukselle. Bebax eliminoi tavallisia iho-ongelmia, joita ilmenee kipsihoitoon liittyen. Ortoosin pohjassa jalkaterän ja kantapään välissä on nivel, joka mahdollistaa asennon säätämisen joka suuntaan. Tuote on valmistettu ekologisesta keinonahasta, joka on testattu Ökö-Tex Standardi 100:n mukaan, ei sisällä kromia ja lateksia. Se on kevyt ja siinä on pehmeä vuoraus ja se on helppo pukea ja riisua. Koot alkaen 10 1/2 on varustettu nilkkaremmillä, joka pitää kantapään paikallaan. Ortoosi ei ole tarkoitettu kävelyyn, koskee kaikkia kokoja.

Käyttöalueet: Synnynnäiset jalkaterän virheasennot

Muuta: Koko = sisäpohjan pituus.

Tuotenro.	Väri	Koko	Vas/Oik
28637	Valkoinen	7,5 cm	Vas/Oik
28637	Valkoinen	8 cm	Vas/Oik
28637	Valkoinen	8,5 cm	Vas/Oik
28637	Valkoinen	9,0 cm	Vas/Oik
28637	Valkoinen	9,5 cm	Vas/Oik
28637	Valkoinen	10 cm	Vas/Oik
28637	Valkoinen	10,5 cm	Vas/Oik
28637	Valkoinen	11,5 cm	Vas/Oik
28637	Valkoinen	12,5 cm	Vas/Oik
28637	Valkoinen	13,5 cm	Vas/Oik
28637	Valkoinen	14,5 cm	Vas/Oik
28637	Valkoinen	15,5	Vas/Oik
28637	Valkoinen	16,5 cm	Vas/Oik

Surestep™ - ratkaisut varvaskävelyyn

Indy 2 Stage - Niveletön

Indikaatiot:

- Kireät/spastiset plantaarifleksorit
- Nilkan koukistus 90 asteeseen ei onnistu polvien ollessa ojennettuina
- Jalkaterän pronaatio tai hyperekstensio, kun kannat ovat maassa



Indy 2 Stage - Nivelöity, PLS, Dorsaalifleksion avustus

Indikaatiot:

- Kireät/spastiset plantaarifleksorit
- Nilkan koukistus 90 asteeseen onnistuu polvet ojennettuina
- Lapsi saa kannat lattiaan ilman ylimääräistä pronaatiota tai hyperekstensiota



Varvaskävely SMO

Indikaatiot:

- Selkeä varvaskävely
- Nilkan koukistus 90 asteeseen onnistuu polvet ojennettuina
- Yli 50 % ajasta kävellään varpaillaan (kengistä riippumatta)
- Painopiste edessä ja puutteita sivuttaisissa painonsiirroissa
- Sensoriikan puutteita



SMO

Indikaatiot:

- Lyhytaikainen varvaskävely
- Nilkan koukistus 90 asteeseen onnistuu polvet ojennettuina
- Voimakas pronaatio
- Vähemmän kuin 50 % ajasta varpailla (kengät auttavat)
- Painopiste edessä ja puutteita sivuttaisissa painonsiirroissa
- Sensoriikan puutteita



Huomioitavaa

- Ikä
- Liikelaajuus
- Ensisijaiset heikkoudet
- Karkeamotoriikan taso
- % aika varpailla
- Käyttöhistoria
- Asennon hallinta





SureStep SMO

SureStep on lapsille tarkoitettu, dynaaminen jalkaortoosi. Se kontrolloi jalan ja nilkan pronaatiota lapsilla, joilla on matala tonus. SureStepin avulla koordinaatio ja tasapaino paranevat. SureStepia voidaan käyttää tavallisten kenkien kanssa. Ortoosi valmistetaan erittäin kevyestä ja ohuesta muovista yksilöllisesti mittojen mukaan.

Käyttöalueet: Kohtalainen/suuri jalkateräpronaatio (plano-valgus) yhdessä matalan tonuksen, löysien ligamenttien, viivästyneen kävelyn, huonon tasapainon, väsyneiden jalkojen tai liikkumisen välttämisen kanssa.

Kontraindikaatiot: Kontraktuurit - nilkan tulee saavuttaa neutraaliasento (90°) passiivisessa manipulaatiossa, kohonnut tonus, spastisiteetti.

Muuta: SureStep valmistetaan USA:ssa mittojen mukaan. Jos sinulla on kysyttävää mitanotosta, ota yhteyttä apuvälinetekniikkoon tai Campin asiakaspalveluun.

Tuotenro.	Malli	Tyyppi	Pakkaus	Paino
28633	Surestep SMO, Standard	Mittojen mukaan	Pari	36 kg:aan saakka
28634	Surestep SMO, Standard	Mittojen mukaan	Kpl	36 kg:aan saakka
28732	Open Heel Moulded Inner Boot		Kpl	
28733	Toe Walking Extension		Kpl	
28734	Club Foot Trim Lines		Kpl	
28735	Metatarsus Adductus Trim Lines		Kpl	
28635	Mittalaatikko			
93300	Lainattava mittalaatikko			

SureStep BigShot SMO

Kun lapset siirtyvät SureStepistä suurempaan ortoosiin, tarvitsevat monet heistä edelleen maksimaalista tukea ja stabiiliteettia. Heitä varten on olemme ottaneet valikoimaamme BigShotin. Ortoosi on yhtä joustava kuin SureStep ja se on tarkoitettu lapsille, jotka ovat kasvaneet ulos SureStepistä tai joiden paino ylittää 36 kg. Pehmeä, silikonista muistuttava sisus on mukava jalalle ja joustava muovikuori antaa sopivan tuen.

Käyttöalueet: Kohtalainen/suuri jalkaterän pronaatio (plano-valgus) yhdessä matalan tonuksen, löysien ligamenttien, viivästyneen kävelyn, huonon tasapainon, väsyneiden jalkojen tai liikkumista välttämisen kanssa tai kun paino ylittää 36 kg.

Kontraindikaatiot: Kontraktuurat - nilkan tulee saavuttaa neutraaliasento (90°) passiivisesti, kohonnut tonus, spastisiteetti

Muuta: BigShot valmistetaan USA:ssa mittojen mukaan. Jos sinulla on kysyttävää mitanotosta, ota yhteyttä apuvälineteknikkoon tai Campin asiakaspalveluun. Joissain tapauksissa voidaan valmistukseen mittojen lisäksi tarvita kipsivalu. Tässä tapauksessa otamme teihin yhteyttä.



Tuotenro.	Malli	Tyyppi	Pakkaus	Paino
28636	Surestep Big Shot	Mittojen mukaan	Pari	Yli 36 kg:a
28636	Surestep Big Shot	Mittojen mukaan	Kappale	Yli 36 kg:a
28736	Surestep Big Shot Lite	Mittojen mukaan	Pari	22 - 40 kg
28737	Surestep Big Shot Lite	Mittojen mukaan	Kpl	22 - 40 kg
28732	Open Heel Moulded Inner Boot		Kpl	
28733	Toe Walking Extension		Kpl	
28734	Club Foot Trim Lines		Kpl	
28735	Metatarsus Adductus Trim Lines		Kpl	



SureStep Advance

SureStep Advance on SMO, joka nousee jalan takaosassa ylemmäs auttaen lievittämään sagittaalista instabiliteettia, estäen dorsi-/plantaarifleksiota, helpottaen itsenäistä seisomista sekä perinteiseen ortoosiin verrattuna parantaen proprioseptiikkaa. Muilta osin ortoosissa on täysin samat ominaisuudet kuin SureStep:ssä. Tämä ainutlaatuinen muuttumiskykyinen systeemi rohkaisee lasta siirtymään tuetusta seisonnasta itsenäiseen, stabilisoimalla jalkoja ja nilkkoja ilman, että se immobilisoi ne. Kun lapsi alkaa liikkumaan ja liikkuvamman ja matalaprofiilisen ortoosin tarve kasvaa, voidaan SureStep Advance helposti muuttaa SureStep SMO:ksi.

Käyttöalueet: Pronaatio, matala tonus, kolmen tason tuenta instabiliteetissa, kyvyttömyys itsenäiseen seisontaan, lievä varpailla kävely.

Kontraindikaatiot: Kohonnut tonus, spastisiteetti, vaikea-asteinen varvaskävely.

Tuotenro.	Malli	Pakkaus
28639	Mitta & Kipsivalu	Pari
28639	Mitta & Kipsivalu	Kappale

SureStep Indy 2 Stage

Ainutlaatuisesti muotoiltu ortoosi, joka on kehitetty siten, että lapsi voi saavuttaa kykynsä liikkua asteittain. Ortoosia on saatavana kahta erilaista mallia: tasainen, jossa ei ole niveltä sekä niveloity. Tämä ainutlaatuinen 2-kerroksinen ortoosi (ortoosi, jonka sisällä on toinen ortoosi) mahdollistaa SureStepin käytön ilman AFO:a. Tämä mahdollistaa lapsen liikkumisen monella eri tavalla ilman, että normaali lihastoiminta estyy. Kun molempia ortooseja käytetään samanaikaisesti lukkiutuu SMO tukevasti AFO:n sisään ja muuttaa siten dynaamisen SMO:n AFO:ksi. Tämä antaa stabiiliteettia kolmella eri tasolla ilman, että jalan lihasten normaali käyttö rajoittuisi. Indy 2 Stage Solid on ideaalinen ortoosi lapsille, jotka tarvitsevat AFO:n proksimaalista tukea saavuttaakseen itsenäisen seisonnan, mutta joille edelleen on apua SMO:sta ryökimiseen ja ylösnousemiseen oikeanlaisella tavalla. Sillä aikaa kun lapsi kehittyy ja alkaa itsenäisesti ottaa askelia AFO:n kanssa, voidaan SMO:n avulla jatkaa työskentelyä liikeradan ja lihasvoiman parantamisessa ja tällä tavoin sujuvasti siirtyä vähäisempään ortoosien käyttöön. Lapset joiden toimintarajoite johtaa siihen, että he väsyvät päivän aikana, voivat alkaa käyttää SMO:ta aamulla ja näin ylläpitää lihastoimintaa. Myöhemmin päivällä voidaan AFO-osa lisätä mukaan stabiilin ja toiminnallisen liikeradan säilyttämiseksi.

Käyttöalueet: Hypertoninen jalka ja nilkka. Hypotoninen jalka ja nilkka. Lapset, jotka tarvitsevat apua liikkumiseen. Vaikeuksia saavuttaa itsenäinen seisoa. Sagittaalinen ja frontaalinen instabiiliteetti/heikkous. Matala proprioseptinen tietoisuus.

Kontraindikaatiot: Nilkkakontraktuurat, jotka estävät passiivisen dorsaalifleksion > 90°. Vaikea spastisuus.

Tuotenro.	Malli	Koko	Pakkaus
28631	Mitta & Kipsivalu		Pari
28631	Mitta & Kipsivalu		Kappale
28260	Niveloity, Mitta & Kipsivalu	<18 kg	Kappale
28260	Niveloity, Mitta & Kipsivalu	18-40 KG	Kappale



Käy sivullamme
ALLARDAFO.com
ja lue lisää:

- Historiasta ja taustasta ToeOFF® ortoosin synnylle ja kuinka tuotteet ovat kehittyneet vuosien aikana. Jokaisella tuotteella on oma tarinansa.
- **40 SYYTÄ** miksi Allard AFO on markkinajohtaja
- Jokaisella tuotteella on omat erityisominaisuutensa
- Sivu on ruotsiksi ja englanniksi

allard|AFO
Support for Better Life!



ATX Foot Lifter riippunilkkartoosi

ATX Foot Lifter on tekstiilinen riippunilkkartoosi henkilöille, joilla on lievä riippunilikka. Ortoosi on yksinkertainen ratkaisu avustamaan jalan nostamista (sisällä ja ulkona) kävelyn heilahdusvaiheessa. Ortoosissa on tekstiilinen nilkkaosa, joka kiinnitetään malleolien yläpuolelle. Tekstiiliosan takapuolella on geelilevy, joka vähentää akillesjänteeseen kohdistuvaa painetta. Koukullinen levy asetetaan kenkäläpän ja nauhojen väliin. Koukkuun kiinnitettävä kuminauha asetetaan nilkkaosan molemmille puolille kiinni. Jalan vetoa ylöspäin voidaan säätää muuttamalla koukun sekä tarrapintaisten tekstiiliosaan kiinnitettävien levyjen paikkaa. Jos ATX Foot Lifteriä käytetään sisällä ilman kenkiä voidaan siihen ostaa jalkateräosa lisäosana.

Käyttöalueet: Löysän nilkan dorsaalifleksion tukemiseksi ja jalan nostamiseksi kävelyn heilahdusvaiheessa. Tarkoitettu käytettäväksi lievässä riippunilkassa.

Tuotenro.	Malli	Koko	Mitta 1	Mitta 2	Vas/Oik
28168	ATX Foot Lifter	X-Small	13-17 cm	Bilateraalinen	Bilat.
28168	ATX Foot Lifter	Small	17-21 cm	Bilateraalinen	Bilat.
28168	ATX Foot Lifter	Medium	21-25 cm	Bilateraalinen	Bilat.
28168	ATX Foot Lifter	Large	25-29 cm	Bilateraalinen	Bilat.
28169	ATX jalkateräosa	Small		17-21 cm	Vas/Oik
28169	ATX jalkateräosa	Medium		21-25 cm	Vas/Oik
28169	ATX jalkateräosa	Large		25-29 cm	Vas/Oik
28170	ATX koukkulevy	Yksi koko		Bilateraalinen	Bilat.
28171	ATX lisäkuminauha	Small		Bilateraalinen	Bilat.
28171	ATX lisäkuminauha	Medium		Bilateraalinen	Bilat.
28171	ATX lisäkuminauha	Large		Bilateraalinen	Bilat.
28172	Lisäkoukut 2 kpl	Yksi koko		Bilateraalinen	Bilat.



Mitta 1: Nilkan ympärys malleolien yläpuolelta.

Mitta 2: Jalan ympärys jalkaholvin korkeimmasta kohdasta

**Mitta:** Muoviosan pituus

NAVIGAIT™

NAVIGAIT™ ortoosi on tarkoitettu avustamaan dorsaalifleksiota henkilöillä, joilla on lievä riippunilkka. Ortoosin pehmustettu muoviosa istuu tukevasti säären etuosaa vasten. Pehmuste voidaan irrottaa ja pestä. Dorsaalifleksiota ohjataan säätämällä nauhan yläosaa sekä kiinnittämällä koukku kengän nyöriytykseen sopivaan kohtaan. Ortoosi on muotoiltu niin, että se on huomaamaton housunlahkeen alla. NAVIGAIT™:a on saatavilla kolmea eri kokoa. Muoviosan ylä- ja alareunoja voidaan tarvittaessa hieman muotoilla.

NAVIGAIT™ 4-Foot on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä NAVIGAIT™:n kanssa, kun käyttäjällä ei ole kenkiä jalassa. Tuotetta voidaan myös käyttää sandaalien tai muiden nauhattomien jalkineiden kanssa. NAVIGAIT™ 4-Foot vedetään kuin sukka jalkapöydän päälle. Joustavan ja jäykän materiaaliyhdistelmän sekä sisäpuolella olevan silikoniosan ansiosta se pysyy hyvin paikoillaan.

Käyttöalueet: NAVIGAIT™ on tarkoitettu antamaan jalalle lisätukea, kun mahdollisuus aktiiviseen dorsaalifleksioon on heikentynyt neurologisten sairauksien kuten, halvaus, MS ja Post- polio syndrooman seurauksena. Mikäli kenkä ei ole käytössä, käytä NAVIGAIT 4-Foot-mallia yhdessä NAVIGAITin kanssa.

Kontraindikaatiot: Henkilöiden, joilla ilmenee spastisiteettia tai voimakasta ödeemaa ei tule käyttää NAVIGAIT™:a.

Muuta: NAVIGAIT™ ei korjaa jalan virheasentoja tai epämuodostumia. Näitä tulee tarpeen mukaisesti hoitaa niihin soveltuvilla kengillä ja/tai pohjallisilla. Tuotteesta on saatavana käyttöohjevideo Camp Scandinavian You Tube-kanavalla. Videon löydät osoitteesta www.youtube.com hakusanalla Camp Scandinavia.

Tuotenro.	Malli	Koko	Mitta	Vas/Oik
28410	NAVIGAIT	X-Small	23 cm	Bilat.
28410	NAVIGAIT	Small/Medium	26,5 cm	Bilat.
28410	NAVIGAIT	Large/X-Large	30 cm	Bilat.
28415	4-foot	Small	21-23 cm	Bilat.
28415	4-foot	Medium	23-26 cm	Bilat.
28415	4-foot	Large	26-29 cm	Bilat.
28412	Varakuminauha koukulla	X-Small		Bilat.
28412	Varakuminauha koukulla	Small/Medium		Bilat.
28412	Varakuminauha koukulla	Large/X-Large		Bilat.
28413	Jäykkä kuminauha koukulla	X-Small		Bilat.
28413	Jäykkä kuminauha koukulla	Small/Medium		Bilat.
28413	Jäykkä kuminauha koukulla	Large/X-Large		Bilat.
28414	Lisänauhasetti	X-Small		Bilat.
28414	Lisänauhasetti	Small/Medium		Bilat.
28414	Lisänauhasetti	Large/X-Large		Bilat.

ALLARD AFO LIHASTOIMINTO-OPAS

Tämä opas pohjautuu sovittajalta ja asiakkailta tulleeseen palautteeseen.

Lihastoiminto:

Ei lainkaan tai rajoittunut

Kohtuullinen

Normaali toiminto

Kun **DISTAALINEN** heikkous



YPSILON[®]flow^{1/2}



Liikerata	●●●●○
A/P	●●○○○
M/L	●●○○○
Avustettu Dorsaalifleksio	●●○○○
Spastisuuden hallinta	●●○○○



ToeOFF[®]flow^{2 1/2}



Liikerata	●●●○○
A/P	●●●○○
M/L	●●●○○
Avustettu Dorsaalifleksio	●●●○○
Spastisuuden hallinta	●●●○○

Kun **PROKSIMAALINEN** heikkous



ToeOFF[®]2 1/2



Liikerata	●●○○○
A/P	●●○○○
M/L	●●○○○
Avustettu Dorsaalifleksio	●●○○○
Spastisuuden hallinta	●●○○○



BLUEROCKER[®]2 1/2



Liikerata	●○○○○
A/P	●●●●●
M/L	●●●●●
Avustettu Dorsaalifleksio	●●●●●
Spastisuuden hallinta	●●●●●

ALLARD CUSTOM AFO

Jos potilaalle ei löydy tuotetta valmisvalikoimastamme, voimme tehdä yksilöllisen ortoosin joko skannauksen tai mitanoton tai kipsin mukaan valmistettuna. Ota yhteyttä asiakaspalveluun lisätietoja saadaksesi tai käy sivulla camp.fi.



Ypsilon® Flow^{1/2}

Ypsilon® Flow^{1/2} on aktiiviselle henkilölle, joka tarvitsee vähemmän tukea kävelyn tukivaiheessa, suunniteltu riippunilkkortoosi. Pohjalevy on muotoiltu tasaisemmaksi, mikä antaa enemmän tilaa varpaille ja pehmeämmät siirtymät askelluksessa. Ortoosia on kehitetty mahdollistamaan optimaalisesti koko liikeradan käyttö ja dynaaminen varvastyöntö eli "toe off", samalla kun jalan lihakset voivat työskennellä aktiivisemmin. Pohjalevy myötäilee jalan muotoa ja tukivaiheessa lattiasta siirtyvän voiman avulla voi ortoosikävelijä käyttää vähemmän voimaa varvastyönnössä eli "toe-off"-vaiheessa. Y-muotoinen runko jakautuu tibian molemmille puolille, mikä vähentää painaumien syntymisen riskiä ulkoneissa kohdissa sekä sääriluussa. Siksi tämä ortoosi sopii aktiiviselle ihmiselle, joka asettaa korkeat vaatimukset ortoosin toiminnallisuudelle ja liikkuvuudelle. Ypsilon Flow^{1/2}:n kannankorkeus on noin 7 mm kaikissa kokovaihtoehdoissa.

Käyttöalueet: Riippunilikka, jossa nilkka on stabiili (lievä spastisuus tai ei spastisuutta ollenkaan). Henkilöt, jotka tarvitsevat enemmän joustavuutta ja vähemmän tukea.

Kontraindikaatiot: Voimakas ödeema, diabetes, jossa on haavaumia, alentunut tuntoherkkyys ja voimakas spastisiteetti.

Muuta: Lisätietoa sovituksista sekä mallin ja koon valinnasta löytyy Allard AFO Professional käyttöohjeista. Ypsilon® Flow-ortoosin mukana toimitetaan pehmuste- ja nauhasetti.

Tuotenro.	Malli	Koko	Jalkapohjan pituus	Korkeus	Vas/Oik	Kengän koko
28880	Ypsilon® Flow ^{1/2}	Small	23 cm	35,5 cm	Vas/Oik	35-38
28880	Ypsilon® Flow ^{1/2}	Medium	24,5 cm	36,5 cm	Vas/Oik	38-42
28880	Ypsilon® Flow ^{1/2}	Large	27 cm	37,5 cm	Vas/Oik	42-45
28880	Ypsilon® Flow ^{1/2}	X-Large	28,5 cm	38,5 cm	Vas/Oik	>45
28884	Pehmuste	S/M/L			Bilat.	
28884	Pehmuste	X-Large			Bilat.	
28885	Lisänauhat	Yksi koko			Bilat.	

ToeOFF® Flow2½

Olemme yhdistäneet pitkäaikaisen kokemuksemme ja valmistuksen teknisen kehitystyön sekä asiakkailtamme vuosien saatossa tulleet toiveet ja kehittäneet uuden ortoosin Allard-AFO:on, ToeOFF Flow2½. ToeOFF on markkinoille tulostaan 1997 saakka ollut markkinajohtaja ainutlaatuisen toimintansa ja dynaamisten ominaisuuksiesi ansiosta.

ToeOFF Flow2½:lla on uusi ainutlaatuinen resepti, uusin ominaisuuksin ja eduin: matalampi kannan korkeus kaikissa kokovaihtoehdoissa -noin 7 mm, enemmän liikkuvuutta A-P tasossa ja tasaisempi ulkopinta jalkaosassa. Jalkaterän nosto on vähäisempi, mikä antaa enemmän tilaa varpaille ja pehmeämmät siirtymät askelluksessa.



ToeOFF® Flow2½:ssa on kaikki Mikrofix tarraosat paikoilleen kiinnitettynä, jotta pehmuste, SoftKIT™, ComfortKIT™ tai CoverKIT™ saadaan helposti asennettua paikalleen. Nauha on sama kuin ToeOFF 2.0 mallissa. Ortoosi istuu paremmin nykyaikaisiin matalapohjaisiin kenkiin ja potilas saa ortoosin, jossa on matalampi pohjaprofiili ja joka on lisäksi dynaamisempi A/P tasossa.

Käyttöalueet: Riippunilikka yhdistettynä lievistä kohtuulliseen spastisuuteen (tai ei spastisuutta ollenkaan), jossain tapauksissa myös heikentynyt polvikontrolli ja varpaan amputaatio.

Muuta: Lisätietoa sovituksista sekä mallin ja koon valinnasta Allard AFO Professional Instruction-ohjeista. Kaikkien Allard AFO -ortoosien mukana toimitetaan nauhasetti.

Tuotenro.	Malli	Koko	Jalkapohjan pituus	Korkeus	Vas/Oik	Kengän koko
28960	ToeOFF® Flow2½	X-Small	21 cm	36 cm	Vas/Oik	32-35
28960	ToeOFF® Flow2½	Small	23 cm	38 cm	Vas/Oik	35-38
28960	ToeOFF® Flow2½	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vas/Oik	38-42
28960	ToeOFF® Flow2½	Large	27 cm	43 cm	Vas/Oik	42-45
28960	ToeOFF® Flow2½	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vas/Oik	>45
28962	ToeOFF Flow2½ D-lenkillä	X-Small	21 cm	36 cm	Vas/Oik	32-35
28962	ToeOFF Flow2½ D-lenkillä	Small	23 cm	38 cm	Vas/Oik	35-38
28962	ToeOFF Flow2½ D-lenkillä	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vas/Oik	38-42
28962	ToeOFF Flow2½ D-lenkillä	Large	27 cm	43 cm	Vas/Oik	42-45
28962	ToeOFF Flow2½ D-lenkillä	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vas/Oik	>45



ToeOFF® 2½

Riippunilkkortoosissa ToeOFF® 2 ½ on samat dynaamiset toiminnot ja stabiiletti kuin ToeOFF® 2.0:ssa, mutta kannankorkeus on 7 mm, joka sopii paremmin moderniin kenkiin ja matalampaan kannan korkeuteen. Pohjalevy on muotoiltu tasaisemmaksi, mikä antaa enemmän tilaa varvasosaan. Jo vuodesta 1997 Allard AFO on ollut markkinajohtaja ainutlaatuisine toimintoineen ja dynaamisine ominaisuuksineen.

ToeOFF® 2½:ssa on kaikki MikroFIX osat asennettu valmiiksi pehmusteen nopeaa ja yksinkertaista asetusta helpottamaan. Nauhasetti on sama kuin 2.0:ssa, valmistettu kulutusta kestävästä materiaalista ja se voidaan toimittaa joko D-renkaalla tai ilman. Nauhat voidaan asentaa sekä oikealle että vasemmalle avautuviksi. Tärkeää on sovittaa aina kaikki Allard AFO:t kengän kannankorkeuteen käyväksi. Lisätietoa löydät Allard AFO Professional Käyttöohjeista.

Käyttöalueet: Riippunilkkä yhdistettynä lievistä kohtuulliseen spastisuuteen (tai ei spastisuutta ollenkaan), jossain tapauksissa myös heikentynyt polvikontrolli ja varpaan amputaatio.

Kontraindikaatiot: Voimakas ödeema, diabetes, johon liittyy haavaumia, alentunut tuntoherkkyys ja voimakas spastisiteetti.

Muuta: Lisätietoa sovituksista sekä mallin ja koon valinnasta löytyy Allard AFO Professional Käyttöohjeista. Kaikkien Allard AFO:jen mukana toimitetaan nauhasetti. Tuotteen mukana tuleva pussi on valmistettu kierrätetyistä PET-pulloista.

Tuotenro.	Malli	Koko	Jalkapohjan pituus	Korkeus	Vas/Oik	Kengän koko
28980	ToeOFF® 2½	X-Small	21 cm	36 cm	Vas/Oik	32-35
28980	ToeOFF® 2½	Small	23 cm	38 cm	Vas/Oik	35-38
28980	ToeOFF® 2½	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vas/Oik	38-42
28980	ToeOFF® 2½	Large	27 cm	43 cm	Vas/Oik	38-42
28980	ToeOFF® 2½	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vas/Oik	>45
28982	ToeOFF® 2½ D-lenkillä	X-Small	21 cm	36 cm	Vas/Oik	32-35
28982	ToeOFF® 2½ D-lenkillä	Small	23 cm	38 cm	Vas/Oik	35-38
28982	ToeOFF® 2½ D-lenkillä	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vas/Oik	38-42
28982	ToeOFF® 2½ D-lenkillä	Large	27 cm	43 cm	Vas/Oik	42-45
28982	ToeOFF® 2½ D-lenkillä	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vas/Oik	>45

ToeOFF® 2½ Addition

ToeOFF 2 ½ addition on käytännössä sama tuote kuin ToeOFF 2 ½, mutta ulkonäöltään erilainen värjätyn pintamateriaalin ansiosta. Additionia on saatavana kolmena väriaihtoehtona: beigenä, mustana tai maastokuvioituna (Camo). Additionin pinta helpottaa vaatteiden liukumista materiaalia vasten samalla kun tuote on saanut eri värin koko matkalla alhaalta siivekkeiden kärkeen. Addition on saatavissa ainoastaan D-lenkillä. Ortoosin sisäpuolella Mikrofixin osat ovat valmiina nauhan ja pehmusteen kiinnitystä varten (SoftKIT tai ComfortKIT). ToeOFF® 2½ additionissa on kuvioitu pinta beigessä ja maastokuvioitussa mallissa. Jokainen ortoosi on näin yksilöllinen kuvioinniltaan ja ortoosit poikkeavat näin hieman toisistaan.



Käyttöalueet: Riippunilkka yhdistettynä lievistä kohtuulliseen spastisuuteen (tai ei spastisuutta ollenkaan), jossain tapauksissa myös heikentynyt polvikontrolli ja varpaan amputaatio.

Kontraindikaatiot: Voimakas ödeema, diabetes, johon liittyy haavaumia, alentunut tuntoherkkyys ja voimakas spastisiteetti.

Muuta: Lisätietoa sovituksista sekä mallin ja koon valinnasta löytyy Allard AFO Professional Käyttöohjeista.

Tuotenro.	Malli	Koko	Jalkapohjan pituus	Korkeus	Vas/Oik	Kengän koko
28954	Musta D-lenkillä	X-Small	21 cm	36 cm	Vas/Oik	32-35
28954	Musta D-lenkillä	Small	23 cm	38 cm	Vas/Oik	35-38
28954	Musta D-lenkillä	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vas/Oik	38-42
28954	Musta D-lenkillä	Large	27 cm	43 cm	Vas/Oik	42-45
28954	Musta D-lenkillä	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vas/Oik	>45
28955	Camo D-lenkillä	X-Small	21 cm	36 cm	Vas/Oik	32-35
28955	Camo D-lenkillä	Small	23 cm	38 cm	Vas/Oik	35-38
28955	Camo D-lenkillä	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vas/Oik	38-42
28955	Camo D-lenkillä	Large	27 cm	43 cm	Vas/Oik	42-45
28955	Camo D-lenkillä	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vas/Oik	>45
28956	Beige D-lenkillä	X-Small	21 cm	36 cm	Vas/Oik	32-35
28956	Beige D-lenkillä	Small	23 cm	38 cm	Vas/Oik	35-38
28956	Beige D-lenkillä	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vas/Oik	38-42
28956	Beige D-lenkillä	Large	27 cm	43 cm	Vas/Oik	42-45
28956	Beige D-lenkillä	X-Large	28,5 cm	43 cm	Vas/Oik	>45



ToeOFF® 2.0

Yhdistämällä monien vuosien kokemuksemme ja ortoosin valmistustekniikan kehittymisen asiakkailtamme tulleisiin toiveisiin olemme kehittäneet ToeOFF® 2.0:n. ToeOFF® on siitä asti, kun se ensimmäisen kerran esiteltiin vuonna 1997, ollut toiminnallisuudeltaan ja dynaamisilta ominaisuuksiltaan johtava tuote.

ToeOFF® 2.0:ssa on samat ominaisuudet ja toimintaperiaate kuin alkuperäisessä ToeOFF®-ssa sekä. Lisäksi ortoosissa on kehittyneempi muotoilu ja toimivuus.

ToeOFF® 2.0:n muotoa on muutettu tasaisemmaksi, geometriaa parannettu sekä ulkopintaa tehty sileämmäksi. Lisäksi kaikki Mikrofix-tarrat ovat valmiiksi asennettu ortoosiin, mikä nopeuttaa ja helpottaa SoftKITin tai ComfortKITin asentamista.

Kiinnitysnauhoissa on uusi ratkaisu ja ne ovat valmistettu uudenlaisesta kulutusta kestävästä materiaalista. Nauhat voidaan tilata sekä D-lenkien kanssa että ilman.

Nauhat myös voidaan asentaa sekä oikealle että vasemmalle avautuvaksi riippuen asiakkaan toiminnan tarpeista. Lisävuutena ToeOFF® 2.0:ssa on 2 cm:ä korkeampi X-Large koko, mikä auttaa ortoosia istumaan paremmin pidemmässä sääressä.

Dynaamisia toimintoja ei ole muutettu. Asteittainen dynaaminen toiminto ja eri kokojen mukaan lisääntyvä stabiliteetti ovat kuten aikaisemminkin. ToeOFF 2.0:n kannankorkeus on 12-15 mm koosta riippuen.

Käyttöalueet: Riippunilkka yhdistettynä kohtuulliseen spastisuuteen (tai ei spastisuutta ollenkaan), jossain tapauksissa myös heikentynyt polvikontrolli ja varpaan amputaatio.

Kontraindikaatiot: Voimakas ödeema, diabetes, johon liittyy haavaumia, alentunut tuntoherkkyys ja voimakas spastisiteetti.

Muuta: Lisätietoa sovituksista sekä mallin ja koon valinnasta Allard AFO Professional käyttöohjeista. Kaikkien ToeOFF®-ortoosien mukana toimitetaan nauhasetti. Tässä mallissa Mikrofix-tarrat ovat valmiiksi asennettu ortoosin sisäpuolelle.

Tuotenro.	Malli	Koko	Jalkapohjan pituus	Korkeus	Vas/Oik	Kengän koko
28920	ToeOFF 2.0 ilm. D-lenk.	X-Small	21 cm	36 cm	Vas/Oik	32-35
28920	ToeOFF 2.0 ilm. D-lenk.	Small	23 cm	38 cm	Vas/Oik	35-38
28920	ToeOFF 2.0 ilm. D-lenk.	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vas/Oik	38-42
28920	ToeOFF 2.0 ilm. D-lenk.	Large	27 cm	43 cm	Vas/Oik	42-45
28920	ToeOFF 2.0 ilm. D-lenk.	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vas/Oik	>45
28922	ToeOFF 2.0 D-lenkillä	X-Small	21 cm	36 cm	Vas/Oik	32-35
28922	ToeOFF 2.0 D-lenkillä	Small	23 cm	38 cm	Vas/Oik	35-38
28922	ToeOFF 2.0 D-lenkillä	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vas/Oik	38-42
28922	ToeOFF 2.0 D-lenkillä	Large	27 cm	43 cm	Vas/Oik	42-45
28922	ToeOFF 2.0 D-lenkillä	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vas/Oik	>45

ToeOFF® Short

ToeOFF® Lyhyt on erikoismalli, jossa on matalampi sääriosa, leveämpi jalkapohjaosa metatarsaalinivelien kohdalta ja lyhyempi varvas- ja kantaosa kuin perinteisessä ToeOFF®-ssa. Ortoosissa tulee käyttää pehmustetta. ToeOFF Short:ssa on kannankorkeus n. 7 mm kaikissa kokovaihtoehdoissa.

Käyttöalueet: Riippunilkka yhdistettynä kohtuulliseen spastisuuteen (tai ei spastisuutta ollenkaan), jossain tapauksissa myös heikentynyt polvikontrolli.

Kontraindikaatiot: Voimakas ödeema, diabetes, jossa on haavaumia, alentunut tuntoherkkyys ja voimakas spastisiteetti.

Muuta: Enemmän tietoa sovituksista ja mallin ja koon valinnasta löytyy Allard AFO Professional käyttöohjeista. Ortoosin mukana toimitetaan nauhasetti.



Tuotenro.	Malli	Koko	Jalkapohjan pituus	Korkeus	Vas/Oik	Kengän koko
28990	ToeOFF Lyhyt Musta	Small	21,5 cm	29,5 cm	Vas/Oik	32-35
28990	ToeOFF Lyhyt Musta	Medium	23,5 cm	32 cm	Vas/Oik	35-38
28990	ToeOFF Lyhyt Musta	Large	25,5 cm	34 cm	Vas/Oik	38-42



BlueROCKER® 2.0

BlueROCKER® on jäykin ja stabiilein riippunilkkartoosimme. Tästä ortoosista on nyt tehty päivitetty versio BlueROCKER® 2.0. Ortoosin geometrista muotoa on parannettu sekä ulkopintaa tehty sileämmäksi. Lisäksi MikroFix-tarrat ovat valmiiksi asennettu ortoosiin, mikä helpottaa SoftKITin tai ComfortKITin asentamista. Myös kiinnitysnauhoissa on uusi ratkaisu ja niitä voi tilata sekä D-lenkillä että ilman. Nauhat voidaan asentaa molemmille puolille riippuen asiakkaan toiminnallisuuden tarpeesta. Lisämuutoksena 2.0:ssa on 2 cm:ä L kokoa korkeampi X-Large koko, tällöin ortoosin korkeus on 45 cm. BlueROCKER 2.0:ssa on kannankorkeus 12-15 mm koosta riippuen.

Käyttöalueet: Riippunilkkä, johon voi liittyä lievä tai vaikea spastisuus, heikentynyt polven ja lantion kontrolli, heikkous tai toimintapuutos alaraajan lihaksissa, heikentynyt tasapaino, molemminpuolinen riippunilkkaoire ja osajalka-amputaatio.

Kontraindikaatiot: Voimakas ödeema, diabetes, jossa on haavaumia ja alentunut tuntoherkkyys.

Muuta: Enemmän tietoa sovituksista ja mallin ja koon valinnasta löytyy Allard AFO Professional käyttöohjeista. BlueROCKER® 2.0 mukana toimitetaan nauhasetti.

Tuotenro.	Malli	Koko	Jalkapohjan pituus	Korkeus	Vas/Oik	Kengän koko
28940	BlueROCKER 2.0	X-Small	21 cm	36 cm	Vas/Oik	32-35
28940	BlueROCKER 2.0	Small	23 cm	38 cm	Vas/Oik	35-38
28940	BlueROCKER 2.0	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vas/Oik	38-42
28940	BlueROCKER 2.0	Large	27 cm	43 cm	Vas/Oik	42-45
28940	BlueROCKER 2.0	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vas/Oik	>45
28942	BlueROCKER 2.0 D-lenkillä	X-Small	21 cm	36 cm	Vas/Oik	32-35
28942	BlueROCKER 2.0 D-lenkillä	Small	23 cm	38 cm	Vas/Oik	35-38
28942	BlueROCKER 2.0 D-lenkillä	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vas/Oik	38-42
28942	BlueROCKER 2.0 D-lenkillä	Large	27 cm	43 cm	Vas/Oik	42-45
28942	BlueROCKER 2.0 D-lenkillä	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vas/Oik	>45

BlueROCKER® 2½

Riippunilkkortoosi BlueROCKER® 2½:ssa on sama dynaaminen toiminto ja stabiilitteetti kuin BlueROCKER® 2.0:ssa, mutta kannan korkeus on 7 mm, jotta se soveltuu paremmin moderneihin matalakantaisiin kenkiin. Pohjalevy on tasaisempi, mikä antaa enemmän tilaa varvasosaan. Jo vuodesta 1997 Allard AFO on ollut markkinajohtaja ainutlaatuisine toimintoineen ja dynaamisine ominaisuuksineen.



Käyttöalueet: Riippunilikka, johon voi liittyä voimakasta spastisuutta (tai ei lainkaan spastisuutta), heikentynyt polven ja lantion kontrolli, heikkous tai toimintapuutos alaraajan lihaksissa, heikentynyt tasapaino, molemminpuolinen riippunilkkaoire ja osajalka-amputaatio.

Kontraindikaatiot: Voimakas ödeema, diabetes, jossa on haavaumia ja alentunut tuntoherkkyys.

Muuta: Enemmän tietoa sovituksista ja mallin ja koon valinnasta löytyy Allard AFO-Professional-käyttöohjeista. BlueROCKER 2.0:n mukana toimitetaan nauhasetti. Tuotteen mukana tuleva pussi on valmistettu kierrätetyistä PET-pulloista.

Tuotenro.	Malli	Koko	Jalkapohjan pituus	Korkeus	Vas/Oik	Kengän koko
28970	BlueROCKER® 2½	X-Small	21 cm	36 cm	Vas/Oik	32-35
28970	BlueROCKER® 2½	Small	23 cm	38 cm	Vas/Oik	35-38
28970	BlueROCKER® 2½	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vas/Oik	38-42
28970	BlueROCKER® 2½	Large	27 cm	43 cm	Vas/Oik	42-45
28970	BlueROCKER® 2½	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vas/Oik	>45
28972	BlueROCKER® 2½ D-lenkillä	X-Small	21 cm	36 cm	Vas/Oik	32-35
28972	BlueROCKER® 2½ D-lenkillä	Small	23 cm	38 cm	Vas/Oik	35-38
28972	BlueROCKER® 2½ D-lenkillä	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vas/Oik	38-42
28972	BlueROCKER® 2½ D-lenkillä	Large	27 cm	43 cm	Vas/Oik	42-45
28972	BlueROCKER® 2½ D-lenkillä	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vas/Oik	>45



BlueROCKER® Short

SHORT-mallit ovat erikoismalleja, joissa on matalampi sääriosa ja leveämpi jalkapohjaosa metatarsaalinivelen kohdalta. Ortoosissa tulee käyttää pehmustetta potilaan käyttömukavuutta lisäämään.

SHORTin kannankorkeus on 7 mm kaikissa kokovaihtoehdoissa.

Käyttöalueet: Riippunilkka yhdistettynä heikkoihin plantaarifleksoreihin, joissain tapauksessa myös heikentynyt polvikontrolli. Voidaan käyttää bilateraaleissa ongelmissa ja osa-amputoinneissa (proksimaalisin taso on Chopart).

Kontraindikaatiot: Voimakas ödeema, diabetes, johon liittyy haavaumia, alentunut tuntoherkkyys ja voimakas spastisiteetti.

Muuta: Lisätietoa indikaatioista, mallin valinnasta, sovituksista ja kokovaihtoehdoista löytyy Allard AFO Professional ohjeista.

Tuotenro.	Malli	Koko	Jalkapohjan pituus	Korkeus	Vas/Oik	Kengän koko
28995	BlueROCKER® Short	Small	21,5 cm	29,5 cm	Vas/Oik	32-35
28995	BlueROCKER® Short	Medium	23,5 cm	32 cm	Vas/Oik	35-38
28995	BlueROCKER® Short	Large	25,5 cm	34 cm	Vas/Oik	38-42

Custom ToeOFF® Custom BlueROCKER®

Muuta:

Mikäli asiakas tarvitsee muodoltaan tai toiminnaltaan erilaisen ortoosin kuin valikoimamme tuotteissa löytyy voidaan ortoosi tilata yksilöllisenä tuotteena mittojen mukaan ToeOFF®- tai BlueROCKER® Customina. Tilauksen voi tehdä useammalla eri tavalla. Skannattuna, kipsiposiitivinä tai kipsinegatiivinä (muovikipsi tai STS-sukka) tai lähettää mitat. Valmistamme ortoosin saamiemme tietojen mukaisesti, joka mukailee tavallisen ToeOFF®/BlueROCKER®-ortoosin muotoja ja ominaisuuksia. Tilauskaavakkeeseen voit tehdä monia eri valintoja koskien esim. kannan korkeutta, stabiliteettia tai kevennystä. Custom ortoosille on oma tilauskaavake, joka tulee täyttää. Tilauskaavake on ladattavissa nettisivuiltamme tuotesivun alaosasta.

Muuta:

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme, jos haluat lisätietoa ToeOFF®/BlueROCKER® Custom tilauksen kulusta, kipsivalusta, skannauksesta tai tilauskaavakkeesta.

Tuotenro.	Malli
28460	Custom ToeOFF®
28480	Custom BlueROCKER®



Voit myös tilata mittojen mukaan digitaalisesti "Allard Configurator" -sovelluksen kautta verkkosivuiltamme. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme, jos tarvitset lisenssin."

Custom ToeOFF®

Custom BlueROCKER®

Kun tilaat Custom ToeOFF:n tai Custom BlueRocker:n tulee sinun huomioida useita asioita ennen tilaamista. Olemme koonneet yhteen eri valinnat, joita voit valita ortoosiin ja kuinka ne vaikuttavat ortoosiin kokonaishintaan.

Ortooseille on oma tilauskaavake täytettäväksi. Tilauskaavake on ladattavissa nettisivuiltamme kyseisen tuotteen tuotesivulta tai "Lataa" välilehdestä kohdasta Allard AFO kaavakkeet.

Custom ToeOFF® & Custom BlueROCKER®					
Custom ToeOFF® Tuotenro.	Custom BlueROCKER® Tuotenro.	Kuvaus			Lisäku- tannus
28460 1190-1310	28480 1190-1310	Custom ToeOFF® & BlueROCKER®, vasen			Pohjalevy 190,195 - 310 mm
28460 2190-2310	28480 2190-2310	Custom ToeOFF® & BlueROCKER®, oikea			Pohjalevy 190,195 - 310 mm
28463 0001	28483 0001	Pohjalevyn leveys			+ 5 mm
28463 0002	28483 0002	Pohjalevyn leveys			- 5 mm
28464 0005	28484 0005	Kannankorkeus			5 mm
28464 0007	28484 0007	Kannankorkeus			7 mm
28464 0010	28484 0010	Kannankorkeus			10 mm
28464 0012	28484 0012	Kannankorkeus			12,5 mm
28464 0015	28484 0015	Kannankorkeus			15 mm
28464 0020	28484 0020	Kannankorkeus			20 mm
28464 0025	28484 0025	Kannankorkeus			25 mm
28464 0030	28484 0030	Yksilöllinen kannankorkeus			korkeampi kuin 25 mm
28465 0000	28485 0000	Kevennys			Tibian harju
28465 0003	28485 0003	Kevennys 3 mm			Tibian harju
28465 0005	28485 0005	Kevennys 5 mm			Tibian harju
28466 0000	28486 0000	Yksilöllinen kevennys			
28468 0001	28488 0001	Jäykkyyssaste A/P			+ 1 materiaalikerros
28468 0002	28488 0002	Jäykkyyssaste A/P			+ 2 materiaalikerrosta
28468 0003	28488 0003	Std jalkaterä/jäykempi kantapää			+ 1 materiaalikerros
28468 0004	28488 0004	Std kantapää/jäykempi jalkaterä			+ 1 materiaalikerros
28469 0001	28489 0001	Jäykkyyssaste A/P			- 1 materiaalikerros
28469 0002	28489 0002	Jäykkyyssaste A/P			- 2 materiaalikerrosta
28469 0003	28489 0003	Std jalkaterä /joustavampi kantapää			- 1 materiaalikerros
28469 0004	28489 0004	Std kantapää / joustavampi jalkaterä			- 1 materiaalikerros
28470 0001	28490 0001	Sivuttaisstabiliteetti M/L			+ 1 materiaalikerros
28470 0002	28490 0002	Sivuttaisstabiliteetti M/L			+ 2 materiaalikerrosta
28471 0001	28491 0001	Sivuttaisstabiliteetti M/L			- 1 materiaalikerros
28471 0002	28491 0002	Sivuttaisstabiliteetti M/L			- 2 materiaalikerrosta
28473 0000	28493 0000	Jalkapöydän kevennys			Lisätillaa jalalle

Custom ToeOFF®

Custom ToeOFF voidaan tilata potilaille, joille tarvitaan yksilöllistä muotoilua esim. säärilihashen atrofian tai kudosten liikakasvun vuoksi tai joilla on poikkeava säären muoto tai joille tarvitaan erilainen ortoosin jäykkyys jne. Tilaus voidaan tehdä eri tavoilla: Skannaamalla, negatiivi-kipsillä (muovikipsi tai STS-sukka), positiivi-kipsillä tai mittojen mukaan. Tilauksen yhteydessä voidaan tehdä lisävalintoja koskien kannankorkeutta, stabiliteettia, kevennystä jne. Tilausta varten on oma lomakkeensa. Lomakkeen voi ladata tuotetietojen alta.

Muuta: Jos tarvitset lisätietoja tilauskaavakkeesta tai yksilöllisesti valmistetun Custom ToeOFF® AFO:n tilaamisesta, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Tuotenro.	Malli
28460	Custom ToeOFF®



Custom BlueROCKER®

Custom BlueROCKER® voidaan tilata potilaille, joille tarvitaan yksilöllistä muotoilua esim. säärilihashen atrofian tai kudosten liikakasvun vuoksi, tai joilla on poikkeava säären muoto tai joille tarvitaan erilainen ortoosin jäykkyys jne. Tilaus voidaan tehdä eri tavoilla: Skannaamalla, negatiivi-kipsillä (muovikipsi tai STS-sukka), positiivi-kipsillä tai mittojen mukaan. Tilauksen yhteydessä voidaan tehdä lisävalintoja koskien kannankorkeutta, stabiliteettia, kevennystä jne. Tilausta varten on oma lomakkeensa. Lomakkeen voi ladata tuotetietojen alta.

Muuta: Jos tarvitset lisätietoja tilauskaavakkeesta tai yksilöllisesti valmistetun Custom BlueROCKER® AFO:n tilaamisesta, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Tuotenro.	Malli
28480	Custom BlueROCKER®



COMBO



Mukautuva ja ainutlaatuinen ortoosiratkaisu polven hyper-ekstensioon johon liittyy riippunilkka. ToeOFF® on vuosien aikana osoittanut hyödyllisyytensä niin kuntoutusprosessissa kuin päivittäisessä elämässäkin. ToeOFF® on auttanut monia käyttäjiä joilla on riippunilkka kävelemään paremmin ja lisännyt heidän elämänlaatuaan. ToeOFF® on joskus yhdistetty polviortoosiin polvinivelen yliojentumisen estämiseksi. Olemme nyt kehittäneet ortoosiratkaisun, joka yhdistetään ToeOFF®- tai BlueRocker®-ortoosiin

Combo-ortoosi valmistetaan ja sovitetaan potilaalle yksilöllisesti.

- Reisosan koon valinta riippuu siitä, miten korkealle reiteen se asetetaan. Reisosia on kuitenkin asetettava vähintään 10 cm:ä polven nivelraon yläpuolelle.
- Liitäntäosan koko on riippumaton ToeOFF:n tai BR:n koosta.
- Hyperekstensoristikon koon määrittää polven leveys.
- Täydellisen ortoosin kokoamiseen tarvitaan kaikki 5 osaa.
- Combo ei ole tarkoitettu potilaille, joiden paino on yli 150 kg ja pituus yli 2 m.



ToeOFF® Combo

Combo on ortoosiosa, joka on kehitetty erityisesti polven hyperekstension hoitoon, kun siihen liittyy riippunilkka. Combo on jatkokappale, joka asennetaan ToeOFF®- tai BlueROCKER®-ortoosiin. Combo-osa on helppo irrottaa riippunilkkaortoosista innovatiivisen rakenteensa ansiosta.

Käyttöalueet: Polvinivelen instabiliteetti, yliojennus yhdistettynä riippunilikkaan, joka johtuu halvauksesta, post-poliosta, MS-taudista, neuropatiasta tms. Potilaan paino enintään 150 kg. Potilaan pituus enintään 2 m.

Kontraindikaatiot: Polven ligamenttien totaalinen puuttuminen. Nelipäisen reisilihaksen täydellinen toiminnan puutos. Asiakas yli 2 metriä pitkä. Asiakkaan paino yli 150 kg. Kognitiivinen kyky merkittävästi heikentynyt. Huom: Kun sovitusta on tehty, ortoosissa ei saa olla yliojennusta jäljellä enempää kuin 10°.



Mitta 1: Polvimitta M-L patellan keskikohdasta

Mitta 2: Ympärysmitta 20 cm patellan keskikohdan yläpuolelta

Mitta 3: M-L 20 cm patellan keskikohdan yläpuolelta

Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik	Polvimitta 2	Polvimitta 3	Polvimitta 1
28780	Ortoosinivel kiskoilla (pari)	Yksi koko				
28781	Reisiosa	Small	Vas/Oik		30-40 cm	11-15 cm
28781	Reisiosa	Medium	Vas/Oik		38-50 cm	13-17 cm
28781	Reisiosa	Large	Vas/Oik		48-60 cm	15-19 cm
28781	Reisiosa	X-Large	Vas/Oik		58-70 cm	17-21 cm
28782	Polven takaosan kangas solkineen	Small	Bilat.	7-10,5 cm		
28782	Polven takaosan kangas solkineen	Medium	Bilat.	9,5-13 cm		
28782	Polven takaosan kangas solkineen	Large	Bilat.	12,5-16 cm		
28783	SoftKIT (2 kpl)	Small				
28783	SoftKIT (2 kpl)	Medium				
28783	SoftKIT (2 kpl)	Large				
28783	SoftKIT (2 kpl)	X-Large				
28784	Tibian liitäntäosa	Small				
28784	Tibian liitäntäosa	Medium				
28784	Tibian liitäntäosa	L-XL				



Prim riippunilkkaortoosi

Hiukan pehmeämpi riippunilkkaortoosi on valmistettu polypropyleenista.

Ortoosia käytetään lievissä riippunilkkan tai muiden neurologisiin diagnooseihin liittyvien oireiden helpottamisessa. Ortoosissa on avoin kantapää ja jalkaterä sekä ristimuotoilu takana.

Ortoosissa on leveä sääripehmuste, joka suljetaan tarralla. Mukana tulee myös ylimääräinen tarranauha, jolla saa tuettua jalan paikalleen ortoosissa.

Ortoosin jalkalevyä on helppo muotoilla kenkään sopivaksi saksilla leikkaamalla.

Käyttöalueet: Lievä riippunilkka.

Tuotenro.	Väri	Koko	Pituus	Korkeus	Vas/Oik
71296	Valkoinen	Small	23 cm	29 cm	Vas/Oik
71296	Valkoinen	Medium	24,5 cm	31 cm	Vas/Oik
71296	Valkoinen	Large	26 cm	33 cm	Vas/Oik
71296	Valkoinen	X-Large	27,5 cm	35 cm	Vas/Oik



Swedish riippunilkkaortoosi

Polypropyleenista valmistettu tukeva muoviortoosi. Ortoosia käytetään lievissä riippunilkkan tai muiden neurologisiin diagnooseihin liittyvien oireiden helpottamisessa. Ortoosissa on avoin kantapää ja jalkaterä sekä ristimuotoilu takana.

Ortoosissa on leveä sääripehmuste, joka suljetaan tarralla. Mukana tulee myös ylimääräinen tarranauha, jolla saa tuettua jalan paikalleen ortoosissa.

Ortoosin jalkalevyä on helppo muotoilla kenkään sopivaksi saksilla leikkaamalla.

Käyttöalueet: Lievä riippunilkka.

Tuotenro.	Väri	Koko	Pituus	Korkeus	Vas/Oik
71298	Valkoinen	Small	24 cm	26 cm	Vas/Oik
71298	Valkoinen	Medium	27 cm	29 cm	Vas/Oik
71298	Valkoinen	Large	28 cm	34 cm	Vas/Oik
71298	Valkoinen	X-Large	30 cm	38 cm	Vas/Oik

Lisänauha Allard AFO 2.0, 2½ & Addition

Erillinen lisänauha joko D-lenkillä tai ilman Allard AFO malleihin 2.0 ja 2½ ja Addition. Nauha voidaan kohdistaa joko mediaalisesti tai lateraalisesti.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Pakkaus
28760	Lisänauha	Musta	X-Small	1 setti
28760	Lisänauha	Musta	Small	1 setti
28760	Lisänauha	Musta	Medium	1 setti
28760	Lisänauha	Musta	Large	1 setti
28760	Lisänauha	Musta	X-Large	1 setti
28761	Lisänauha D-lenkillä	Musta	X-Small	1 setti
28761	Lisänauha D-renkaalla	Musta	Small	1 setti
2876	Lisänauha D-renkaalla	Musta	Medium	1 setti
28761	Lisänauha D-renkaalla	Musta	Large	1 setti
28761	Lisänauha D-renkaalla	Musta	X-Large	1 setti
28763	Lisänauha D-renkaalla	Beige	X-Small	1 setti
28763	Lisänauha D-renkaalla	Beige	Small	1 setti
28763	Lisänauha D-renkaalla	Beige	Medium	1 setti
28763	Lisänauha D-renkaalla	Beige	Large	1 setti
28763	Lisänauha D-lenkillä	Beige	X-Large	1 setti
28768	Lisänauha, ToeOFF®Short	Musta	Small	1 setti
28768	Lisänauha, ToeOFF®Short	Musta	Medium	1 setti
28768	Lisänauha, ToeOFF®Short	Musta	Large	1 setti



ComfortPAD™ Ypsilon® Flow

ComfortPAD on Ypsilon® Flow-ortoosiin tarkoitettu pehmuste. Sen pääasiallisena tarkoituksena on vähentää kitkaa ortoosin ja säären välillä eri aktiviteettien kuten kävelyn, juoksun ja pyöräilyn aikana. Ortoosin ja säären välille jäävä materiaalikerros luo kitkaliikkeeseen väliä, joka vähentää painetta iholle ja sääreen. Testitulokset ovat osoittaneet, että nämä kaksi liukuvaa tekstiilimateriaalia vähensivät iholle syntyvää kitkaa n. 25%. ComfortPAD:ssa on vain yksi koko. Se voidaan pukea ja riisua yhdellä kädellä. Leveämpi nauha vähentää painaumien syntymisen riskiä jalan taakse. ComfortPAD on mukavuutta lisäävä ratkaisu henkilöille, joiden iho säären alueella on herkkä ja jotka silti haluavat olla aktiivisia.

Käyttöalueet: Sopii käytettäväksi vain Ypsilon® Flow 1/2-ortoosin kanssa.

Tuotenro.	Kuvaus	Koko
28886	Ypsilon® Flow ComfortPAD	Yksi koko





CoverKIT™ 2.0

CoverKIT™ 2.0 on uudenlainen pehmustevaihtoehto Allard AFolle. CoverKIT sopii käytettäväksi ToeOFF®2.0, Flow ja BlueROCKER®2.0 kanssa ja se on helppo pukea ja riisua. Sukka tekee ortoosista sileäpintaisen koko ortoosin pituudelta. Sisäpuoli suojaa ihoa samalla tavalla kuten SoftKIT™ ja jos lisätukea tarvitaan voidaan mukana toimitettavat neopreeniliuskat kiinnittää ortoosiin suojaamaan säärtä painaumilta. Ortoosiin kuuluvia kiinnitysnauhvoja voidaan käyttää CoverKIT™:n lisänä.

Muuta: Tuotteesta on saatavana käyttöohjevideo Camp Scandinavian YouTube-kanavalla. Videon löydät osoitteesta www.youtube.com hakusanalla Camp Scandinavia.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Pohkeen ympärys
28765	coverKIT™ 2.0	Musta	X-Small	31 - 34 cm
28765	coverKIT™ 2.0	Musta	Small	34 - 37 cm
28765	coverKIT™ 2.0	Musta	Medium	37 - 41 cm
28765	coverKIT™ 2.0	Musta	Large	41 - 46 cm
28765	coverKIT™ 2.0	Musta	X-Large	46 - 51 cm

SoftKIT™ 2.0

SoftKIT™ 2.0 on ToeOFF® 2.0, Flow- ja BlueROCKER® 2.0-ortoosiin tarkoitettu mukava ja taipuisa pehmuste. Tibiaharjun kuormitusta voidaan helposti keventää asettamalla neopreeniliuskat ortoosiin ja pehmusteen väliin. Pakkaus sisältää kaksi pehmustetta ja kaksi neopreeniliuskaa.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko
28750	SoftKIT 2.0	Musta	X-Small
28750	SoftKIT 2.0	Musta	Small
28750	SoftKIT 2.0	Musta	Medium
28750	SoftKIT 2.0	Musta	Large
28750	SoftKIT 2.0	Musta	X-Large
28749	SoftKIT 2.0	Beige	X-Small
28749	SoftKIT 2.0	Beige	Small
28749	SoftKIT 2.0	Beige	Medium
28749	SoftKIT 2.0	Beige	Large
28749	SoftKIT 2.0	Beige	X-Large
28752	Mikrofix lisätarrat 2.0	Musta	X-Small
28752	Mikrofix lisätarrat 2.0	Musta	Small
28752	Mikrofix lisätarrat 2.0	Musta	Medium/Large/X-Large
28753	Neopreeniliuskat 2.0	Musta	Small
28753	Neopreeniliuskat 2.0	Musta	Large
28754	Mikrofix lisätarrat siivekkeisiin 2.0	Musta	



SoftKIT™ Short

SoftKIT™ on ToeOFF®-ortoosiin tarkoitettu mukava ja taipuisa pehmuste. Tibiaharjun kuormitusta voidaan helposti keventää asettamalla neopreeniliuskat ortoosiin ja pehmusteen väliin. Pakkaus sisältää kaksi pehmustetta, kaksi neopreeniliuskaa ja itsekiinnittyvät Mikrofix-tarrat.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko
28391	SoftKIT™ Short	Musta	Small
28391	SoftKIT™ Short	Musta	Medium
28391	SoftKIT™ Short	Musta	Large
28356	Mikrofix lisätarrat	Musta	Small
28356	Mikrofix lisätarrat	Musta	Medium
28356	Mikrofix lisätarrat	Musta	Large
28357	Mikrofix lisätarrat siivekkeisiin	Musta	Vas/Oik





ComfortKIT™ 2.0

ComfortKIT™ 2.0 on mukavantuntuinen pehmuste ToeOFF® 2.0, Flow- ja BlueROCKER® 2.0-ortoosiin. Se sopii erityisesti henkilöille joiden iho on herkkä, mutta myös niille, joilla on korkea aktiivisuustaso. ComfortKIT 2.0:n sisäosa on valmistettu "muistivaahdosta", joka muotoutuu käyttäjän säären muotojen mukaisesti. Kun ortoosi riisutaan, pehmusteen alkuperäinen muoto palautuu. Pakkaus sisältää 2 kpl.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko
28751	ComfortKIT 2.0	Musta	X-Small
28751	ComfortKIT 2.0	Musta	Small
28751	ComfortKIT 2.0	Musta	Medium
28751	ComfortKIT 2.0	Musta	Large
28751	ComfortKIT 2.0	Musta	X-Large
28752	Mikrofix tarrat 2.0	Musta	X-Small
28752	Mikrofix tarrat 2.0	Musta	Small
28752	Mikrofix tarrat 2.0	Musta	Medium/Large



T-Strap

T-Strap ohjaa telaluunivelen ja alemman nilkkanivelen lateraalisesti siten, että ne asettuvat uudelleen tibian alapuolelle. T-Strapin distaaliosa kiinnitetään ortoosiin pohjalevyn alapuolelle ja proksimaaliosa nilkan ympäri ortoosiin lateraalipuolta kohden. Nauhan pituutta on helppo säätää ja sisäpuolta, joka on plastazote-materiaalia, voidaan tarvittaessa lämmittää puhaltimella ja muotoilla. Ulkopuolen materiaali on pehmeää ja ilmavaa, mutta samalla tukevaa.

Käyttöalueet: Pes valguksen kontrolloimiseksi.

Kontraindikaatiot: Ödeema, heikentynyt pintaverenkierto, ihon maseraatio tai muut tilat, jotka voivat pahentua kompression seurauksena.

Muuta: T-Strap on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan yhdessä AllardAFO-tuotteen ja yksilöllisesti valmistetun pohjallisen/ortoosiin kanssa, jalan asennon kontrolloimiseksi. Jos T-Strapia käytetään ilman yksilöllisesti valmistettua pohjallista/ortoosia, lisääntyy ortoosiin lateraaliin puoleen kohdistuva rasite ja näin delaminoitumisen riski.

Tuotenro.	Väri	Koko	Vas/Oik
28777	Musta	Yksi koko	Vas/Oik


Jutuus!

kiddieflow™

Olemme lisänneet Allard AFO mallistoomme uuden pediatriksen mallin: KiddieFLOW. Klinikka-asiakkaamme ovat toivoneet tällä hetkellä tarjolla oleville lasten ortoosille uutta vaihtoehtoa, joka on joustavampi jalkaterästä. KiddieFLOW tarjoaa vaihtoehdon, joka sijoittuu pohjallisen/jalkateräortoosin ja Campin AFO ortoosien välille. Se tukee jalkaa dorsaalifleksioon heilahdusvaiheen aikana ja antaa paremman tuen heilahdusvaiheen lopussa parantaen siten stabiilitteettia tukivaiheessa. Samalla pehmeämpi jalan tuki helpottaa painonsiirtoa tukivaiheen lopussa.

KiddieFLOW® voidaan myös yhdistää pohjalliseen tai SMO-ortoosiin kuten muutkin lasten ortoosimme jos kaivataan voimakkaampaa kontrollia A/P ja M/L suunnissa.

Oikean ortoosikombinaation valinnan tulee perustua vakiintuneisiin arviointimenetelmiin, kuten kävelyanalyysiin ja/tai nivelen liikelaajuuden arviointiin, manuaalisesti tehtyyn lihastestiin tai muihin tunnustettuihin mittaustapoihin. Tekemämme diagrammi ja kuvaus alla voivat auttaa sinua valitsemaan potilaalle sopivimman ratkaisun.

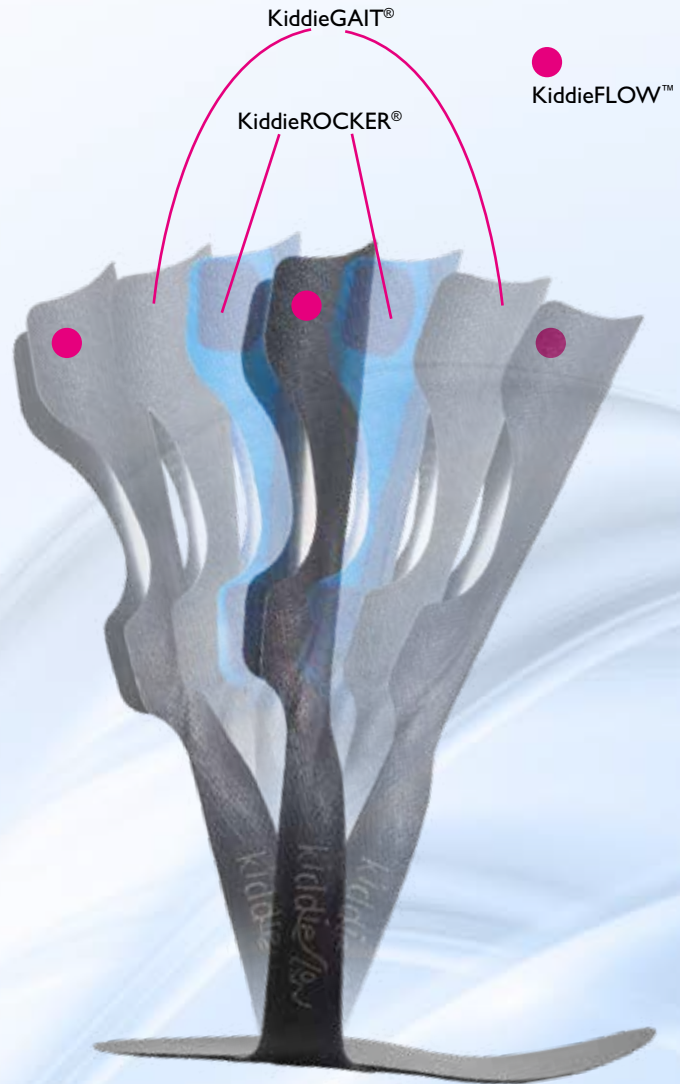

- ✓ Analysoimalla mahdollisia kävelyn rajoitteita, saat parempaa informaatiota sopivan ortoosi-yhdistelmän valintaan. Näin saat myös parhaan kliinisen tuloksen potilaallesi.
- ✓ M/L kontrolli on tarpeen liiallisessa pronaatiossa tai supinaatiossa. Tällöin ratkaisu voi olla pohjallinen tai SMO/DAFO.
- ✓ Kun A/P-kontrollin tarve kasvaa, tarvitaan yleensä asteen jäykempi AFO. Ortoosimme KiddieFLOW®, KiddieGAIT® ja KiddieROCKER® yhdessä yksilöllisen pohjallisen tai SMO/DAFO:n kanssa antavat monille potilaille kompensatiota.
- ✓ Säännöllinen seuranta, joka sisältää kävelyanalyysin, on tarpeen potilaan käyttäessä valittua ortoosiyhdistelmää, jotta voidaan varmistaa toimintojen parantuminen.
- ✓ Mikäli potilaalla on voimakkaampi toimintarajoite, kuten lisääntynyt spastisuus ja kompleksisempia kävelyn ongelmia, tulee harkita jäykempää AFOa.



kiddieflow™ kiddieGAIT® kiddieROCKER®



Lapset, joilla on neurologinen vamma tai lievä kehitysvamma tarvitsevat usein jonkinlaisen alaraajan ortoosin. Näiden lasten lihastonuksessa saattaa olla vaihteluita, minkä takia kävely on suuri haaste. Anna lapsen kokeilla ortoosia, joka auttaa pieniä jalkoja toimimaan luonnollisella tavalla ohjaten biomekaanisesti oikeanlaiseen kävelyn.

- Hiilikuitukomposiittipinta asettuu tibiaa vasten. Dynaaminen pohjalevy jättää kantapään avoimeksi.
- Ortoosin säären etuosaa vasten tuleva tuki auttaa myös muissa proksimaalisissa ongelmissa kuten polven yliojennuksessa tai "koukkukävelyssä".
- Ortoosi on suunniteltu käytettäväksi yhdessä yksilöllisen pohjallisen tai ortoosin kanssa, mikä auttaa kontrolloimaan maan vetovoiman vaikutuksia.

INDIKAATIOT

- riippunilkka • proprioseptiikan häiriöstä aiheutuvat kävelyn muutokset
- varvaskävely, johon ei liity jalkapöydän jäykkyyttä
- matalan tonuksen aiheuttama "kyykäkävely" (lonkan/polven/nilkan fleksio)
- Spina Bifida • Cerebral Pares • lihasdystrofia • MMC


KONTRAINDIKAATIOT

- nilkanivelen rajoittunut liikkuvuus (passiivinen dorsaalifleksio oltava vähintään 5° nilkan keskiasennosta)
- liian jäykät jalan rakenteet • spastinen Quadricepslihas
- polven ja/tai nilkan rakenteelliset virheasennot

RAJOITUKSET

- polven hyperekstensio, joka ei ole korjattavissa

KiddieGAIT®, KiddieROCKER® ja KiddieFLOW™ pitää aina yhdistää yksilölliseen pohjalliseen tai ortoosiin jalan asennon kontrolloimiseksi. On tärkeää, että jalka on kuormitettuna mahdollisimman toiminnallinen. Jalan tavallisimmat virheasennot kuten pronatio, supinaatio, pes varus ja pes valgus korjataan pohjallisella. Pohjallisessa tulisi olla syvä kantakuppi, jotta se stimuloi kantapää-varvaskävelyä.

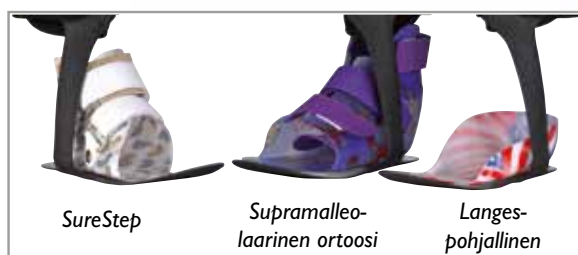

KiddieFLOW™

KiddieFLOW™ ortoosin jalkapohjaosa on sekä kanta- että varvasosastaan joustavampi kuin KiddieGait ortoosi ja siten ortoosi mahdollistaa suuremman liikelajisuuden. KiddieFLOW™ on rakennettu samoilla periaatteilla kuin aikuisten FLOW-mallit säilyttäen saman geometrian kuin KiddieGAIT® ja KiddieROCKER®. Ortoosi tukee jalkaa dorsaalifleksioon heilahdusvaiheen aikana ja kontrolloi paremmin jalan asentoa heilahdusvaiheen lopussa parantaen siten tukivaiheen stabiliteettia. Samalla pehmeämpi jalan tuki helpottaa painonsiirtoa tukivaiheen lopussa. Mikäli KiddieFLOW -ortoosiin halutaan enemmän A/P ja M/L suunnassa kontrollia, voidaan ortoosiin yhdistää yksilöllinen pohjallinen tai SMO kuten muihinkin lasten ortooseihin.

Käyttöalueet: Riippunilikka. KiddieFLOW on tarkoitettu tueksi riippunilkan yhteydessä, proprioseptiikan häiriöstä aiheutuviin kävelyn muutoksiin, instabiiliin kävelyyn tai matalan tonuksen kävelyyn, varvaskävelyyn ilman jalkapöydän jäykkyyttä, spina bifidaan, cerebral paresiin ja lihasdystrofiaan.

Kontraindikaatiot: Rajoittunut dorsaalifleksio (dorsaalifleksion oltava vähintään + 5 astetta nilkan keskiasennosta). Hyvin jäykät jalan rakenteet. Spastinen quadriceps-lihas. Jäykistyneet/ei korjattavissa olevat pes valgus tai pes varus virheasennot. KiddieFLOWta ei tule käyttää lapsilla koukkupolvikävelyn yhteydessä.



Tuotenro.	Malli	Koko	Jalkapohjan pituus	Korkeus	Vas/Oik
28891	KiddieFLOW™	Small	16 cm	22 cm	Vas/Oik
28891	KiddieFLOW™	Medium	18 cm	25,7 cm	Vas/Oik
28891	KiddieFLOW™	Large	20 cm	29,5 cm	Vas/Oik
28891	KiddieFLOW™	X-Large	21 cm	31,5 cm	Vas/Oik
28892	KiddieFLOW™ D-lenkillä	Small	16 cm	22 cm	Vas/Oik
28892	KiddieFLOW™ D-lenkillä	Medium	18 cm	25,7 cm	Vas/Oik
28892	KiddieFLOW™ D-lenkillä	Large	20 cm	29,5 cm	Vas/Oik
28892	KiddieFLOW™ D-lenkillä	X-Large	21 cm	31,5 cm	Vas/Oik

KiddieGAIT® Baby

KiddieGAIT® Baby tarjoaa dynaamisen ortoosihoidon aikaisessa vaiheessa, mikä auttaa lasta saamaan tasaisemman, luonnollisemman ja biomekaanisesti oikeanlaisen kävelyn. Ortoosi auttaa lasta jalan heilautusvaiheessa sekä kontrolloi jalan asentoa usealla eri tasolla. Ortoosin sijainti tibian etupuolella auttaa myös muissa proksimaalisissa ongelmissa, kuten polven hyperekstensiassa tai "kyykkykävelyssä". KiddieGAIT® Baby on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä yksilöllisesti valmistetun pohjallisen tai ortoosin kanssa jalan asennon kontrolloimiseksi. KiddieGAIT® Babyä on saatavana kolmea eri kokoa ja se on tarkoitettu lapsille, jotka ovat vähintään 9 kk ikäisiä.

Käyttöalueet: Riippunilikka. Proprioseptiikan häiriöstä aiheutuvat kävelyn muutokset. Varvaskävely johon ei liity jalkapöydän jäykkyyttä. Matalan tonuksen aiheuttama "kyykkykävely" (lonkan/polven/nilkan fleksio). Spina Bifida. Cerebral Pares. Lihasdystrofia ja MMC.

Kontraindikaatiot: Nilkanivelen rajoittunut liikkuvuus (passiivinen dorsaalifleksio oltava väh. 5° nilkan keskiasennosta). Liian jäykät jalan rakenteet. Spastinen quadricepslihas. Polven ja/tai nilkan rakenteelliset virheasennot.



Tuotenro.	Malli	Koko	Jalkapohjan pituus	Korkeus	Vas/Oik
28372	KiddieGAIT Baby	Baby Small	11 cm	15 cm	Vas/Oik
28372	KiddieGAIT Baby	Baby Medium	12,5 cm	18 cm	Vas/Oik
28372	KiddieGAIT Baby	Baby Large	14 cm	20 cm	Vas/Oik



KiddieGAIT®

KiddieGAIT tarjoaa aikaisen ortoosihoitoa aina 1 vuoden iästä alkaen Baby mallien ansiosta. Nilkka-jalka-ortoosi (AFO) tukee lapsen tasapainoisempaa ja luonnollisempaa kävelyä. Ortoosi auttaa lasta heilahdusvaiheessa ja tukee jalan liikkuvuutta usealla eri tasolla tukivaiheessa. Ortoosin sijainti tibian etupuoella auttaa myös muissa proksimaalisissa ongelmissa, kuten polven hyperekstensiossa tai koukkupolvikävelyssä. KiddieGAIT ortoosin kanssa tulee käyttää yksilöllistä jalan asentoa ohjaavaa pohjallista tai jalkatukea.

Käyttöalueet: Riippunilkka. KiddieGAIT on tarkoitettu tueksi riippunilkassa, proprioseptiikan häiriöstä aiheutuviin kävelyn muutoksiin, instabiiliin kävelyyn tai matalan tonuksen kävelyyn, varvaskävelyyn, johon ei liity jalkapöydän jäykkyyttä, koukkupolvikävelyyn, johon liittyy matala tonus esim. spina bifidan, CP:n ja lihasdystrofian yhteydessä.

Kontraindikaatiot: Rajoittunut dorsaalifleksio (dorsaalifleksion oltava väh. + 5 astetta nilkan keskiasennosta). Hyvin jäykät jalan rakenteet. Spastinen quadricepslihas. Jäykistyneet/ei korjattavissa olevat pes valgus tai pes varus virheasennot.

Tuotenro.	Malli	Koko	Jalkapohjan pituus	Korkeus	Vas/Oik
28900	KiddieGAIT® Musta	Small	160 mm	220 mm	Vas/Oik
28900	KiddieGAIT® Musta	Medium	180 mm	257 mm	Vas/Oik
28900	KiddieGAIT® Musta	Large	200 mm	295 mm	Vas/Oik
28900	KiddieGAIT® Musta	X-Large	210 mm	315 mm	Vas/Oik
28901	KiddieGAIT Musta D-lenkillä	Small	160 mm	220 mm	Vas/Oik
28901	KiddieGAIT Musta D-lenkillä	Medium	180 mm	257 mm	Vas/Oik
28901	KiddieGAIT Musta D-lenkillä	Large	200 mm	295 mm	Vas/Oik
28901	KiddieGAIT Musta D-lenkillä	X-Large	210 mm	315 mm	Vas/Oik
28901	KiddieGAIT Musta D-lenkillä	Small	160 mm	220 mm	
28901	KiddieGAIT Musta D-lenkillä	Medium	180 mm	257 mm	
28901	KiddieGAIT Musta D-lenkillä	Large	200 mm	295 mm	
28901	KiddieGAIT Musta D-lenkillä	X-Large	210 mm	315 mm	

KiddieROCKER®

KiddieROCKER on kehitetty lapsille, jotka tarvitsevat tukea muutoinkin kuin riippunilkan ongelmassa. Lapsella voi olla bilateraalista heikkoutta, jolloin hän tarvitsee enemmän stabiiliteettia tukivaiheessa. Kuten muissakin AFO malleissa, lisääntyy jäykkyys myös KiddieROCKERissa ortoosin koon kasvaessa. Lisäksi malli antaa lisästabiiliteettia M/L- ja A/P-suunnissa.

Käyttöalueet: Riippunilka. KiddieROCKER tukee riippunilkaa kävelyn ongelmassa, jotka liittyvät proprioseptiikan häiriöihin, kävelyn instabiiliteettiin, matalan tonuksen kävelyn, varvaskävelyn ilman jalkapöydän jäykkyyttä ja matalasta tonuksesta johtuvaan koukukupolvikävelyn, joka liittyy spina bifidaan, CP:hen tai lihasdystrofiaan.

Kontraindikaatiot: Rajoittunut dorsaalifleksio (dorsaalifleksion oltava väh. + 5 astetta nilkan keskiasennosta). Liian jäykät jalan rakenteet. Spastinen quadricepslihas. Jäykistyneet/ei korjattavissa olevat pes valgus tai pes varus virheasennot.



Tuotenro.	Malli	Koko	Jalkapohjan pituus	Korkeus	Vas/Oik
28902	KiddieROCKER	Small	16 cm	22 cm	Vas/Oik
28902	KiddieROCKER	Medium	18 cm	25,7 cm	Vas/Oik
28902	KiddieROCKER	Large	20 cm	29,5 cm	Vas/Oik
28902	KiddieROCKER	X-Large	21 cm	31,5 cm	Vas/Oik
28903	KiddieROCKER D-lenkillä	Small	16 mm	22 mm	Vas/Oik
28903	KiddieROCKER D-lenkillä	Medium	18 mm	25,7 cm	Vas/Oik
28903	KiddieROCKER D-lenkillä	Large	20 cm	29,5 cm	Vas/Oik
28903	KiddieROCKER D-lenkillä	X-Large	21 cm	31,5 cm	Vas/Oik

Lisänauha KiddieFLOW™, KiddieGAIT®, KiddieROCKER®

Erillinen kiinnitysnauha D-lenkillä tai ilman KiddieGAIT®, KiddieROCKER®, ja KiddieFLOW™ ortoosihin. Nauhan voi kiinnittää avautuvaksi joko mediaalisesti tai lateraalisesti.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Pakkaus
28373	Nauha KiddieGAIT Baby	Musta	Baby Small	1 setti
28373	Nauha KiddieGAIT Baby	Musta	Baby Medium	1 setti
28373	Nauha KiddieGAIT Baby	Musta	Baby Large	1 setti
28368	Kiinnitysnauha KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Musta	Small	1 setti
28368	Kiinnitysnauha KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Musta	Medium	1 setti
28368	Kiinnitysnauha KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Musta	Large/X-Large	1 setti
28369	Nauha D-lenkillä KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Musta	Small	1 setti
28369	Nauha D-lenkillä KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Musta	Medium	1 setti
28369	Nauha D-lenkillä KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Musta	Large/X-Large	1 setti





KiddieGAIT® softKIT™

KiddieGAIT® SoftKIT™ on mukava ja joustava pehmuste KiddieGAIT®-ortoosiin. Pakkaus sisältää kaksi pehmustetta ja itseliimautuvat MikroFix-tarrat.

Tuotenro.	Malli	Koko
28397	KiddieFLOW, KiddieGAIT®, KiddieROCKER®	Baby Small
28397	KiddieFLOW, KiddieGAIT®, KiddieROCKER®	Baby Medium
28397	KiddieFLOW, KiddieGAIT®, KiddieROCKER®	Baby Large
28378	KiddieFLOW, KiddieGAIT®, KiddieROCKER®	Small
28378	KiddieFLOW, KiddieGAIT®, KiddieROCKER®	Medium
28378	KiddieFLOW, KiddieGAIT®, KiddieROCKER®	Large
28378	KiddieFLOW, KiddieGAIT®, KiddieROCKER®	X-Large
28379	MikroFix SoftKIT:iin	Small
28379	MikroFix SoftKIT:iin	Medium
28379	MikroFix SoftKIT:iin	Large/X-Large



KiddieGAIT® comfortKIT™

Mukavantuntuinen pehmuste KiddieGAIT®- ja KiddieROCKER®-ortoosiin. Pehmuste sopii erityisen hyvin lapsille, joilla on ulkoneva tibia tai herkkä iho sekä myös silloin kun aktiivisuustaso on korkea. ComfortKITin sisäosa on nk. ”muistivaahtoa”, jonka ansiosta se käytössä muotoutuu hyvin säären muotoihin. Kun pehmustetta ei käytetä palautuu se takaisin alkuperäiseen muotoonsa.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko
28418	KiddieGAIT®, KiddieROCKER®	Musta	Small
28418	KiddieGAIT®, KiddieROCKER®	Musta	Medium
28418	KiddieGAIT®, KiddieROCKER®	Musta	Large
28418	KiddieGAIT®, KiddieROCKER®	Musta	X-Large

KiddieGAIT® SoftSHELL™ Baby

SoftSHELL™ Baby on KiddieGAIT® Baby:n tarkoitettu pehmuste. KiddieGAIT® SoftSHELL tulee tilata yhdessä saman kokoisen normaalin SoftKIT™-pehmusteen (28397) kanssa. SoftSHELL:n ulkopuoli on kiiltävää, kuvioitua lycra-materiaalia, joka on mukava piriste ortoosille ja saa materiaalinsa ansiosta vaatteet liukumaan helpommin ortoosia vasten. Tässä mallissa kiinnitysnauhat ovat yhdistetty tuotteeseen.

Muuta: Kuviot voivat ajoittain vaihdella.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko
28388	Eläinkuvio	Sininen	Baby Small
28388	Eläinkuvio	Sininen	Baby Medium
28388	Eläinkuvio	Sininen	Baby Large
28389	Tähtikuvio	Vaaleanpunainen	Baby Small
28389	Tähtikuvio	Vaaleanpunainen	Baby Medium
28389	Tähtikuvio	Vaaleanpunainen	Baby Large



KiddieGAIT® SoftSHELL™

KiddieGAIT® SoftSHELL™ on KiddieGAIT®- ja KiddieROCKER®-ortoosiin tarkoitettu pehmuste, joka on helppo asentaa. Sisäpuoli on valmistettu samasta materiaalista kuin SoftKIT™. Ulkopuoli on kiiltävää, kuvioitua lycraa, joka muuttaa ortoosin ulkoasua ja jonka ansiosta vaatteet liukuvat helpommin ortoosia vasten.

Muuta: Kuviot voivat ajoittain vaihdella.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko
28358	Sydämkuvio	Roosa	Small
28358	Sydämkuvio	Roosa	Medium
28358	Sydämkuvio	Roosa	Large
28358	Sydämkuvio	Roosa	X-Large
28359	Pääkallokuvio	Harmaa	Small
28359	Pääkallokuvio	Harmaa	Medium
28359	Pääkallokuvio	Harmaa	Large
28359	Pääkallokuvio	Harmaa	X-Large



Non Slip -materiaali

Luistamaton materiaali, joka on korkean kitkansa ansiosta ihanteellinen pinnoille, jotka altistuvat kovalle kulutukselle. Materiaali on kehitetty käytettäväksi erityisesti KiddieGAIT®-ortoosin pohjalevyllä, jottei esim. SureStep-ortoosi liukuisi ortoosin paljaalla pinnalla. HUOM! Materiaalia ei tule käyttää suoraan ihoa vasten.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus
28411	Musta	14 cm	1m





Ypsilon® Flow^{1/2}-sovitusortoosi

Ypsilon® Flow-sovitusortoosi on samanlainen kuin tavallinen Ypsilon® Flow, mutta siihen on laminoitu teksti "Not-for-Resale". Suosittelemme, että ensimmäinen sovitus tapahtuu kävelytuen avulla tai nojapuiden välissä. Jos sovitettaessa tuntuu kipua tai ortoosi on epämiellyttävä, on kokeilu lopetettava. Ortoosi on valmiiksi pehmustettu.

Käyttöalueet: Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön kävelyä harjoiteltaessa ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.

Tuotenro.	Malli	Koko	Jalkapohjan pituus	Korkeus	Vas/Oik
2888I	Ypsilon Flow ^{1/2} NFR	Small	23 cm	35,5 cm	Vas/Oik
2888I	Ypsilon Flow ^{1/2} NFR	Medium	24,5 cm	36,5 cm	Vas/Oik
2888I	Ypsilon Flow ^{1/2} NFR	Large	27 cm	37,5 cm	Vas/Oik
2888I	Ypsilon Flow ^{1/2} NFR	X-Large	27 cm	38,5 cm	Vas/Oik

ToeOFF® Flow2½ sovitusortoosi

ToeOFF Flow2½-sovitusortoosi on samanlainen kuin tavallinen ToeOFF Flow, mutta siihen on laminoitu teksti "Not-for-Resale". Suosittelemme ensimmäisen sovituksen tapahtuvan tuen kanssa tai nojapuita käyttäen. Mikäli sovitus on epämiellyttävä tai kivulias, tulee sovitus keskeyttää. Ortoosissa tulee käyttää pehmustetta.

Käyttöalueet: Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön kävelyä harjoiteltaessa ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.



Tuotenro.	Malli	Koko	Jalkapohjan pituus	Korkeus	Vas/Oik	Kengän koko
28961	ToeOFF Flow2½ sov.ort.	X-Small	21 cm	36 cm	Vas/Oik	32-35
28961	ToeOFF Flow2½ sov.ort.	Small	23 cm	38 cm	Vas/Oik	35-38
28961	ToeOFF Flow2½ sov.ort.	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vas/Oik	38-42
28961	ToeOFF Flow2½ sov.ort.	Large	27 cm	43 cm	Vas/Oik	42-45
28961	ToeOFF Flow2½ sov.ort.	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vas/Oik	>45
28963	ToeOFF Flow2½ sov.ort. D-lenkillä	X-Small	21 cm	36 cm	Vas/Oik	32-35
28963	ToeOFF Flow2½ sov.ort. D-lenkillä	Small	23 cm	38 cm	Vas/Oik	35-38
28963	ToeOFF Flow2½ sov.ort. D-lenkillä	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vas/Oik	38-42
28963	ToeOFF Flow2½ sov.ort. D-lenkillä	Large	27 cm	43 cm	Vas/Oik	42-45
28963	ToeOFF Flow2½ sov.ort. D-lenkillä	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vas/Oik	>45



ToeOFF® 2.0 sovitusortoosi

ToeOFF® 2.0-sovitusortoosi on samanlainen kuin tavallinen ToeOFF® 2.0, mutta siihen on laminoitu teksti "Not-for-Resale". Suosittelemme, että ensimmäinen sovitus tapahtuu kävelytuen avulla tai nojapuiden välissä. Jos sovitettaessa tuntuu kipua tai ortoosi on epämiellyttävä, on kokeilu lopetettava. Ortoosi on valmiiksi pehmustettu.

Käyttöalueet: Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön kävelyä harjoiteltaessa ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.

Tuotenro.	Malli	Koko	Jalkapohjan pituus	Korkeus	Kengän koko
28921	ToeOFF 2.0 sov.ort.	X-Small	21 cm	36 cm	32-35
28921	ToeOFF 2.0 sov.ort.	Small	23 cm	38 cm	35-38
28921	ToeOFF 2.0 sov.ort.	Medium	24,5 cm	40,5 cm	38-42
28921	ToeOFF 2.0 sov.ort.	Large	27 cm	43 cm	42-45
28921	ToeOFF 2.0 sov.ort.	X-Large	28,5 cm	45 cm	>45
28923	ToeOFF 2.0 sov.ort. D-lenkillä	X-Small	21 cm	36 cm	32-35
28923	ToeOFF 2.0 sov.ort. D-lenkillä	Small	23 cm	38 cm	35-38
28923	ToeOFF 2.0 sov.ort. D-lenkillä	Medium	24,5 cm	40,5 cm	38-42
28923	ToeOFF 2.0 sov.ort. D-lenkillä	Large	27 cm	43 cm	42-45
28923	ToeOFF 2.0 sov.ort. D-lenkillä	X-Large	28,5 cm	45 cm	>45

ToeOFF® 2½-sovitusortoosi

ToeOFF® 2½-sovitusortoosi on samanlainen kuin tavallinen ToeOFF® 2½, mutta siihen on laminoitu teksti "Not-for-Resale". Suosittelemme, että ensimmäinen sovitus tapahtuu kävelytuen avulla tai nojapuiden välissä. Jos sovittaessa tuntuu kipua tai ortoosi on epämiellyttävä, on kokeilu lopetettava. Ortoosi on valmiiksi pehmustettu.

Käyttöalueet: Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön kävelyä harjoiteltaessa ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.



Tuotenro.	Malli	Koko	Jalkapohjan pituus	Korkeus	Vas/Oik	Kengän koko
2898I	ToeOFF® 2½ sov.ort.	X-Small	21 cm	36 cm	Vas/Oik	32-35
2898I	ToeOFF® 2½ sov.ort.ilm.	Small	23 cm	38 cm	Vas/Oik	35-38
2898I	ToeOFF® 2½ sov.ort.ilm.	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vas/Oik	38-42
2898I	ToeOFF® 2½ sov.ort.ilm.	Large	27 cm	43 cm	Vas/Oik	42-45
28983	ToeOFF 2½ sov.ort. D-lenkillä	X-Small	21 cm	36 cm	Vas/Oik	32-35
28983	ToeOFF 2½ sov.ort. D-lenkillä	Small	23 cm	38 cm	Vas/Oik	35-38
28983	ToeOFF 2½ sov.ort. D-lenkillä	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vas/Oik	38-42
28983	ToeOFF 2½ sov.ort. D-lenkillä	Large	27 cm	43 cm	Vas/Oik	42-45
28983	ToeOFF 2½ sov.ort. D-lenkillä	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vas/Oik	>45

ToeOFF® Short-sovitusortoosi

ToeOFF® Short-sovitusortoosi on samanlainen kuin tavallinen ToeOFF® Short, mutta siihen on laminoitu teksti "Not-for-Resale". Suosittelemme, että ensimmäinen sovitus tapahtuu kävelytuen avulla tai nojapuiden välissä. Jos sovittaessa tuntuu kipua tai ortoosi on epämiellyttävä, on kokeilu lopetettava. Ortoosi on valmiiksi pehmustettu.

Käyttöalueet: Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön kävelyä harjoiteltaessa ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.



Art. nr.	Malli	Koko	Vas/Oik	Jalkapohjan pituus	Korkeus	Kengän koko
2899I	ToeOFF® Short NFR	Small	Vä/Hö	21,5 cm	29,5 cm	32-35
2899I	ToeOFF® Short NFR	Medium	Vä/Hö	23,5 cm	32 cm	35-38
2899I	ToeOFF® Short NFR	Large	Vä/Hö	25,5 cm	34 cm	38-42



BlueROCKER® 2.0 sovitussortoosi

BlueROCKER® 2.0-sovitussortoosi on samanlainen kuin tavallinen BlueROCKER® 2.0, mutta siihen on laminoitu teksti "Not-for-Resale". Suosittelemme, että ensimmäinen sovitus tapahtuu kävelytuen avulla tai nojapuiden välissä. Jos sovitettaessa tuntuu kipua tai ortoosi on epämiellyttävä, on kokeilu lopetettava. Ortoosi on valmiiksi pehmustettu.

Käyttöalueet: Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön kävelyä harjoiteltaessa ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.

Tuotenro.	Malli	Koko	Jalkapohjan pituus	Korkeus	Vas/Oik	Kengän koko
28941	BlueROCKER 2.0 sov.ort.	X-Small	21 cm	36 cm	Vas/Oik	32-35
28941	BlueROCKER 2.0 sov.ort.	Small	23 cm	38 cm	Vas/Oik	35-38
28941	BlueROCKER 2.0 sov.ort.	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vas/Oik	38-42
28941	BlueROCKER 2.0 sov.ort.	Large	27 cm	43 cm	Vas/Oik	42-45
28941	BlueROCKER 2.0 sov.ort.	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vas/Oik	>45
28943	BlueROCKER 2.0 sov.ort. D-lenkillä	X-Small	21 cm	36 cm	Vas/Oik	32-35
28943	BlueROCKER 2.0 sov.ort. D-lenkillä	Small	23 cm	38 cm	Vas/Oik	35-38
28943	BlueROCKER 2.0 sov.ort. D-lenkillä	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vas/Oik	38-42
28943	BlueROCKER 2.0 sov.ort. D-lenkillä	Large	27 cm	43 cm	Vas/Oik	42-45
28943	BlueROCKER 2.0 sov.ort. D-lenkillä	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vas/Oik	>45



BlueROCKER® 2½ -sovitussortoosi

BlueROCKER® 2½-sovitussortoosi on samanlainen kuin tavallinen BlueROCKER® 2½, mutta siihen on laminoitu teksti "Not-for-Resale". Suosittelemme, että ensimmäinen sovitus tapahtuu kävelytuen avulla tai nojapuiden välissä. Jos sovitettaessa tuntuu kipua tai ortoosi on epämiellyttävä, on kokeilu lopetettava. Ortoosi on valmiiksi pehmustettu.

Käyttöalueet: Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön kävelyä harjoiteltaessa ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.

Tuotenro.	Malli	Koko	Jalkapohjan pituus	Korkeus	Vas/Oik	Kengän koko
28971	BlueROCKER® 2½ sov.ort.	X-Small	21 cm	36 cm	Vas/Oik	32-35
28971	BlueROCKER® 2½ sov.ort.	Small	23 cm	38 cm	Vas/Oik	35-38
28971	BlueROCKER® 2½ sov.ort.	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vas/Oik	38-42
28971	BlueROCKER® 2½ sov.ort.	Large	27 cm	43 cm	Vas/Oik	42-45
28971	BlueROCKER® 2½ sov.ort.	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vas/Oik	>45
28973	BlueROCKER® 2½ sov.ort. D-lenkillä	X-Small	21 cm	36 cm	Vas/Oik	32-35
28973	BlueROCKER® 2½ sov.ort. D-lenkillä	Small	23 cm	38 cm	Vas/Oik	35-38
28973	BlueROCKER® 2½ sov.ort. D-lenkillä	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vas/Oik	38-42
28973	BlueROCKER® 2½ sov.ort. D-lenkillä	Large	27 cm	43 cm	Vas/Oik	42-45
28973	BlueROCKER® 2½ sov.ort. D-lenkillä	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vas/Oik	<45

BlueROCKER® Short -sovitussortoosi

BlueROCKER® Short-sovitussortoosi on samanlainen kuin tavallinen BlueROCKER® Short, mutta siihen on laminoitu teksti "Not-for-Resale". Suosittelemme, että ensimmäinen sovitus tapahtuu kävelytuen avulla tai nojapuiden välissä. Jos sovitettaessa tuntuu kipua tai ortoosi on epämiellyttävä, on kokeilu lopetettava. Ortoosi on valmiiksi pehmustettu.

Käyttöalueet: Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön kävelyä harjoiteltaessa ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.

Tuotenro.	Malli	Koko	Jalkapohjan pituus	Korkeus	Vas/Oik	Kengän koko
28997	BlueROCKER® Short NFR	Small	21,5 cm	29,5 cm	Vas/Oik	32-35
28997	BlueROCKER® Short NFR	Medium	23,5 cm	32 cm	Vas/Oik	35-38
28997	BlueROCKER® Short NFR	Large	25,5 cm	34 cm	Vas/Oik	38-42



Ypsilon® Flow½ -sovitussetti

Ypsilon® Flow -sovitussetti sisältää yhteensä kuusi pehmustettua Ypsilon® Flow-sovitussortoosia, joihin on laminoitu teksti "Not-for-Resale". Sovitussetti toimitetaan Camp-laukussa, joka koostuu vasemman ja oikean puoleisista Small, Medium ja Large ko'oista.

Käyttöalueet: Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön kävelyä harjoiteltaessa ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.

Tuotenro.	Malli	Pakkaus
28882	Ypsilon Flow ½	6 kpl



ToeOFF® Flow2½ sovitussetti

ToeOFF® Flow2½-sovitussetti sisältää yhteensä kuusi pehmustettua ToeOFF® Flow-sovitussortoosia, joihin on laminoitu teksti "Not-for-Resale". Sovitussetti toimitetaan Camp-laukussa, joka koostuu vasemman ja oikean puoleisista Small, Medium ja Large ko'oista.

Käyttöalueet: Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön kävelyä harjoiteltaessa ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.

Tuotenro.	Malli	Pakkaus
28964	ToeOFF Flow 2½	6 kpl
28965	ToeOFF Flow 2½ D-lenkillä	6 kpl





ToeOFF® 2.0 sovitussetti

ToeOFF® 2.0-sovitussetti sisältää yhteensä kuusi pehmustettua ToeOFF® 2.0-sovitusortoosia, joihin on laminoitu teksti "Not-for-Resale". Sovitussetti toimitetaan Camp-laukussa, joka koostuu vasemman ja oikean puoleisista Small, Medium ja Large ko'ista.

Käyttöalueet: Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön kävelyä harjoiteltaessa ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.

Tuotenro.	Malli	Pakkaus
28930	ToeOFF 2.0	6 kpl
28931	ToeOFF 2.0 D-lenkillä	6 kpl



ToeOFF® 2½ sovitussetti

ToeOFF® 2½-sovitussetti sisältää yhteensä kuusi pehmustettua ToeOFF® 2½-sovitusortoosia, joihin on laminoitu teksti "Not-for-Resale". Sovitussetti toimitetaan Camp-laukussa, joka koostuu vasemman ja oikean puoleisista Small, Medium ja Large ko'ista.

Käyttöalueet: Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön kävelyä harjoiteltaessa ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.

Tuotenro.	Malli	Pakkaus
28984	ToeOFF 2½	6 kpl
28985	ToeOFF 2½ D-lenkillä	6 kpl



ToeOFF® Short sovitussetti

ToeOFF® Short-sovitussetti sisältää yhteensä kuusi pehmustettua ToeOFF® Short-sovitusortoosia, joihin on laminoitu teksti "Not-for-Resale". Sovitussetti toimitetaan Camp-laukussa, joka koostuu vasemman ja oikean puoleisista Small, Medium ja Large ko'ista.

Käyttöalueet: Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön kävelyä harjoiteltaessa ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.

Tuotenro.	Malli	Pakkaus
28992	ToeOFF Short	6 kpl

BlueROCKER® 2.0 sovitussetti

BlueROCKER® 2.0-sovitussetti sisältää yhteensä kuusi pehmustettua BlueROCKER® 2.0-sovitusortoosia, joihin on laminoitu teksti "Not-for-Resale". Sovitussetti toimitetaan Camp-laukussa, joka koostuu vasemman ja oikean puoleisista Small, Medium ja Large ko'oista.

Käyttöalueet: Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön kävelyä harjoiteltaessa ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.

Tuotenro.	Malli	Pakkaus
28944	BlueROCKER 2.0 ilm. D-lenk	6 kpl
28945	BlueROCKER 2.0 D-lenkillä	6 kpl



BlueROCKER® 2½ sovitussetti

BlueROCKER® 2½-sovitussetti sisältää yhteensä kuusi pehmustettua BlueROCKER® 2½-sovitusortoosia, joihin on laminoitu teksti "Not-for-Resale". Sovitussetti toimitetaan Camp-laukussa, joka koostuu vasemman ja oikean puoleisista Small, Medium ja Large ko'oista.

Käyttöalueet: Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön kävelyä harjoiteltaessa ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.

Tuotenro.	Malli	Pakkaus
28974	BlueROCKER 2½	6 kpl
28975	BlueROCKER 2½ D-lenkillä	6 kpl



BlueROCKER® Short sovitussetti

BlueROCKER® Short-sovitussetti sisältää yhteensä kuusi pehmustettua BlueROCKER® Short-sovitusortoosia, joihin on laminoitu teksti "Not-for-Resale". Sovitussetti toimitetaan Camp-laukussa, joka koostuu vasemman ja oikean puoleisista Small, Medium ja Large ko'oista.

Käyttöalueet: Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön kävelyä harjoiteltaessa ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.

Tuotenro.	Malli	Pakkaus
28998	BlueROCKER® Short	6 kpl





KiddieFLOW™-sovitusortoosi

KiddieGAIT®-sovitusortoosissa on laminoituna teksti "Not-for-resale".

Sovituseroosia tulee käyttää vain apuna sovituksessa ja sopivuuden arvioinnissa ennen oikean ortoosin valintaa. Ortoosi on valmiiksi pehmustettu.

Käyttöalueet: Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.

Tuotenro.	Malli	Koko	Jalkapohjan pituus	Korkeus	Vas/Oik
28894	KiddieFLOW-sovituseroosi	Small	16 cm	22 cm	Vas/Oik
28894	KiddieFLOW-sovituseroosi	Medium	18 cm	25,7 cm	Vas/Oik
28894	KiddieFLOW-sovituseroosi	Large	20 cm	29,5 cm	Vas/Oik
28894	KiddieFLOW-sovituseroosi	X-Large	21 cm	31,5 cm	Vas/Oik
28895	KiddieFLOW D-lenkillä NFR	Small	16 cm	22 cm	Vas/Oik
28895	KiddieFLOW D-lenkillä NFR	Medium	18 cm	25,7 cm	Vas/Oik
28895	KiddieFLOW D-lenkillä NFR	Large	20 cm	29,5 cm	Vas/Oik
28895	KiddieFLOW D-lenkillä NFR	X-Large	21 cm	31,5 cm	Vas/Oik



KiddieGAIT®-sovituseroosi

KiddieGAIT®-sovituseroosissa on laminoituna teksti "Not-for-resale".

Sovituseroosia tulee käyttää vain apuna sovituksessa ja sopivuuden arvioinnissa ennen oikean ortoosin valintaa. Ortoosi on valmiiksi pehmustettu.

Käyttöalueet: Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.

Tuotenro.	Malli	Koko	Jalkapohjan pituus	Korkeus	Vas/Oik
28382	KiddieGAIT® Baby NFR	Baby Small	11 cm	15 cm	Vas/Oik
28382	KiddieGAIT® Baby NFR	Baby Medium	12,5 cm	18 cm	Vas/Oik
28382	KiddieGAIT® Baby NFR	Baby Large	14 cm	20 cm	Vas/Oik
28904	KiddieGAIT® NFR	Small	16 cm	22 cm	Vas/Oik
28904	KiddieGAIT® NFR	Medium	18 cm	25,7 cm	Vas/Oik
28904	KiddieGAIT® NFR	Large	20 cm	29,5 cm	Vas/Oik
28904	KiddieGAIT® NFR	X-Large	21 cm	31,5 cm	Vas/Oik
28906	KiddieGAIT® D-lenkillä NFR	Small	16 cm	22 cm	Vas/Oik
28906	KiddieGAIT® D-lenkillä NFR	Medium	18 cm	25,7 cm	Vas/oik
28906	KiddieGAIT® D-lenkillä NFR	Large	20 cm	29,5 cm	Vas/Oik
28906	KiddieGAIT® D-lenkillä NFR	X-Large	21 cm	31,5 cm	Vas/Oik

KiddieROCKER®-sovituseroos

KiddieROCKER®-sovituseroosissa on laminoituna teksti "Not-for-resale".
Sovituseroosia tulee käyttää vain apuna sovituksessa ennen oikean ortoosin valintaa. Ortoosi on valmiiksi pehmustettu.

Käyttöalueet: Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.



Tuotenro.	Malli	Koko	Jalkapohjan pituus	Korkeus	Vas/Oik
28908	KiddieROCKER® NFR	Small	16 cm	22 cm	Vas/Oik
28908	KiddieROCKER® NFR	Medium	18 cm	25,7 cm	Vas/Oik
28908	KiddieROCKER® NFR	Large	20 cm	29,5 cm	Vas/Oik
28908	KiddieROCKER® NFR	X-Large	21 cm	31,5 cm	Vas/Oik
28910	KiddieROCKER® NFR	Small	16 cm	22 cm	Vas/Oik
28910	KiddieROCKER® NFR	Medium	18 cm	25,7 cm	Vas/Oik
28910	KiddieROCKER® NFR	Large	20 cm	29,5 cm	Vas/Oik
28910	KiddieROCKER® NFR	X-Large	21 cm	31,5 cm	Vas/Oik

KiddieFLOW™-sovituseroos

KiddieFLOW™-sovituseroos sisältää yhteensä kuusi pehmustettua KiddieFLOW-sovituseroosia, joihin on laminoitu teksti "Not-for-Resale". Sovituseroos toimitetaan Camp-laukussa, joka koostuu vasemman ja oikean puoleisista Small, Medium ja Large-ko'ista.

Käyttöalueet: Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.

Tuotenro.	Malli	Koko	Pakkaus
28896	KiddieFLOW™-sovituseroos	Oik+Vas Small,Medium,Large	6 kpl
28897	KiddieFLOW™ D-lenkillä-sovituseroos	Oik+Vas Small,Medium,Large	6 kpl





KiddieGAIT®-sovitussetti

KiddieGAIT®-sovitussetti sisältää yhteensä kuusi pehmustettua KiddieGAIT®-sovitusortoosia, joihin on laminoitu teksti "Not-for-Resale". Sovitussetti toimitetaan Camp-laukussa, joka koostuu vasemman ja oikean puoleisista Small, Medium ja Large-ko'oista.

Käyttöalueet: Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.

Tuotenro.	Malli	Koko	Pakkaus
28381	KiddieGAIT® Baby sovitussetti	Oik+Vas Small,Medium,Large	6 kpl
28907	KiddieGAIT® D-lenkillä sovitussetti	Oik+Vas Small,Medium, Large	6 kpl
28905	KiddieGAIT® sovitussetti	Oik+Vas Small,Medium, Large	6 kpl



KiddieROCKER®-sovitussetti

KiddieROCKER®-sovitussetti sisältää yhteensä kuusi pehmustettua KiddieROCKER®-sovitusortoosia, joihin on laminoitu teksti "Not-for-Resale". Sovitussetti toimitetaan Camp-laukussa, joka koostuu vasemman ja oikean puoleisista Small, Medium ja Large-ko'oista.

Käyttöalueet: Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.

Tuotenro.	Malli	Koko	Pakkaus
28909	KiddieROCKER® sovitussetti	Oik+Vas Small, Medium, Large	6
28911	KiddieROCKER® D-lenkillä sovitussetti	Oik+Vas Small, Medium, Large	6

Esittelemme

TUOTTEEMME

kiddieflow™

Joustavampi malli samoilla
ainutlaatuisilla ominaisuuksilla kuin
KiddieGAIT® & KiddieROCKER®!

Olemme lisänneet Allard AFO mallistoomme uuden pediatriksen mallin: KiddieFLOW. Klinikka-asiakkaamme ovat toivoneet tällä hetkellä tarjolla oleville lasten ortoosille uutta vaihtoehtoa, joka on joustavampi jalkaterästä. KiddieFLOW tarjoaa vaihtoehdon, joka sijoittuu pohjallisen/jalkateräortoosin ja Campin AFO ortoosien välille. Se tukee jalkaa dorsaalifleksioon heilahdusvaiheen aikana ja antaa paremman tuen heilahdusvaiheen lopussa parantaen siten stabiliteettia tukivaiheessa. Samalla pehmeämpi jalan tuki helpottaa painonsiirtoa tukivaiheen lopussa.





UUTUUS!

Walker Protect Fixed, matalavartinen

Immobilisoiva matalavartinen walker, joka on matalaprofiilinen, kestävä ja tukeva muotoilultaan on valmistettu muotoon ruiskutetusta polypropeeinista. Walkerissa on kaksi kiinteää sivutukea, jotka tukevat erinomaisesti jalkaa ja nilkkaa. Edessä ja takana olevat jäykät tuet sekä pehmuste nilkan ympärillä varmistavat immobilisoinnin. Walkerin sisällä on pehmeä, ilmava ja pestävä veluurikangas-pehmuste, joka suojaa iskuilta ja varmistaa mukavuuden. Ei sisällä lateksia. Toimitetaan kahdella ylimääräisellä kondyylytynypehmusteella, jotka vähentävät painetta ja antavat lisämukavuutta. Rullaava pohja on anti-slip materiaalia ja sallii kävelyn koko liikeradalla. Säädettyä tarra-nauha takaa täyden immobilisoinnin. Säädetävissä kiiloilla. Röntgensäteet läpäisevä. Helppo sovittaa.

Käyttöalueet: Stabiilit jalan ja nilkan murtumat, akuutti nilkan alueen venähdys, jännerepeämä, pehmytkudosvauriot ja postoperatiivinen immobilisointi.

Tuotenro.	Malli	Koko	Sisäpohjallisen pituus
47609	Protect Fixed matala	Small	25 cm
47609	Protect Fixed matala	Medium	29 cm
47609	Protect Fixed matala	Large	32 cm
47612	Lisänauhasetti	Yksi koko	
47616	Lisäpehmuste	Small	
47616	Lisäpehmuste	Medium	
47616	Lisäpehmuste	Large	
47617	Kiilasetti	Small	
47617	Kiilasetti	Medium	
47617	Kiilasetti	Large	
47618	Varvassuoja	Yksi koko	

Walker Protect Fixed, korkeavartinen

Immobilisoiva korkeavartinen walker, joka on matalaprofiilinen, kestävä ja tukeva muotoilultaan on valmistettu muotoon ruiskutetusta polypropeiinista. Walkerissa on kaksi kiinteää sivutukea, jotka tukevat erinomaisesti jalkaa ja nilkkaa. Edessä ja takana olevat jäykät tuet sekä pehmuste nilkan ympärillä varmistavat immobilisoinnin. Walkerin sisällä on pehmeä, ilmava ja pestävä veluurikangas-pehmuste, joka suojaa iskuilta ja varmistaa mukavuuden. Ei sisällä lateksia. Toimitetaan kahdella ylimääräisellä kondyylytynypehmusteella, jotka vähentävät painetta ja antavat lisämukavuutta. Rullaava pohja on anti-slip materiaalia ja sallii kävelyn koko liikeradalla. Säädetty tarra-nauha takaa täyden immobilisoinnin. Säädetävissä kiiloilla. Röntgensäteet läpäisevä. Helppo sovittaa.

Käyttöalueet: Stabiilit jalan ja nilkan murtumat, akuutti nilkan alueen venähdys, jännerepeämä, pehmytkudosvauriot ja postoperatiivinen immobilisointi.



UUTUUS!

Tuotenro.	Malli	Koko	Sisäpohjallisen pituus
47608	Protect Fixed korkea	Small	25 cm
47608	Protect fixed korkea	Medium	29 cm
47608	Protect fixed korkea	Large	32 cm
47611	Lisänauhasetti	Yksi koko	
47615	Lisäpehmuste	Small	
47615	Lisäpehmuste	Medium	
47615	Lisäpehmuste	Large	
47617	Kiila setti	Small	
47617	Kiilasetti	Medium	
47617	Kiila setti	Large	
47618	Varvassuoja	Yksi koko	



Static Walker

Niveloimätön Walker jalan alueen immobilisoimiseksi. Walker on asennettu neutraaliin (90°) kulmaan. Siinä on muoviset sivukiskot, peitetty kantaosa sekä rullaava pohja luonnollisemman kävelyn saavuttamiseksi. Levennetty kantaosa lisää stabiliteettia. Walkerissa on myös hengittävä pehmuste, joka siirtää kosteuden pois iholta sekä saumaton pohjallinen antamaan lisämukavuutta. Kaikissa nauhoissa on kääntösoljet. Tibiaosan nauhoja voidaan siirtää optimaalisen istuvuuden saavuttamiseksi.

Käyttöalueet: Stabiilit jalan alueen ja nilkan murtumat, akuutti nilkan nyrjähdys, kantapään alueen ruptuurat, pehmytkudosvauriot ja postoperatiivinen immobilisaatio.

Muuta: Painorajoitus: X-Small; Small - 90 kg. Medium, Large; X-Large - 110 kg.

Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik	Sisäpohjallisen pituus
47601	Walker, musta	Small	Bilat.	25,1 cm
47601	Walker, musta	Medium	Bilat.	27,9 cm
47601	Walker, musta	Large	Bilat.	29,7 cm
47601	Walker, musta	X-Large	Bilat.	31,6 cm
47602	Lisäpehmuste nauhoilla	Small		
47602	Lisäpehmuste nauhoilla	Medium		
47602	Lisäpehmuste nauhoilla	Large		
47602	Lisäpehmuste nauhoilla	X-Large		

ROM Walker

ROM Walker, jonka kulmaa voidaan säätää. Nivel voidaan lukita haluttuun asentoon sekä liikerataa rajoittaa tai asettaa vapaasti liikkuvaksi. Liikerataa voidaan säätää 45° plantaarifleksioon ja 45° dorsaalifleksioon 7,5° välein. Walkerissa on levennetty kantaosa, alumiinikiskot, vaihdettava pehmuste sekä liukumista estävä rullaava pohja varman ja luonnollisen kävelyn saavuttamiseksi. Pehmustetta voidaan käyttää myös varpaiden suojana.

Käyttöalueet: Stabiilit jalan alueen ja nilkan murtumat, akuutti nilkannyrjähdys, kantapään alueen ruptuurat, pehmytkudosvauriot, postoperatiivinen hoito.



Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik	Pohjalevyn pituus
47630	ROM Walker, musta	Small	Bilat.	25,1 cm
47630	ROM Walker, musta	Medium	Bilat.	27,9 cm
47630	ROM Walker, musta	Large	Bilat.	29,7 cm
47630	ROM Walker, musta	X-Large	Bilat.	31,6 cm
47631	Lisäpehmuste nauhoilla	Small		
47631	Lisäpehmuste nauhoilla	Medium		
47631	Lisäpehmuste nauhoilla	Large		
47631	Lisäpehmuste nauhoilla	X-Large		



Walker AIR korkea

Immobilisoiva walker, muotoilultaan matalaprofiilinen, kestävä ja tukeva, on valmistettu muotoon ruiskutetusta polypropeeinista. Integroidulla ilma-järjestelmällä voit asteittain lisätä/vähentää immobilisointia tarpeen mukaan. Ortoosilla on kaksi kiinteää metallitukea, jotka stabiloivat jalan ja nilkan. Pehmeä pehmuste on päällystetty ilmapalla ja pestävällä kankaalla, joka suojaa iskuilta ja varmistaa mukavuuden. Ei sisällä lateksia. Säädettyä Velcro-nauha takaa täydellisen immobilisoinnin. Lisäpehmuste, nauha-setti, varvassuoja ovat tilattavissa erikseen. Säädetävissä kiiloilla. Helppo sovittaa.

Käyttöalueet: Stabiilit jalan ja nilkan murtumat, akuutti nilkan alueen revähdyt, jännerepeämä, pehmytkudosvauriot ja postoperatiivinen immobilisointi.

Tuotenro.	Malli	Koko	Sisäpohjallisen pituus
47607	Walker Air korkea	Small	23 cm
47607	Walker Air korkea	Medium	27 cm
47607	Walker Air korkea	Large	30 cm
47610	Lisänauhasetti	Small	
47610	Lisänauhasetti	Medium/Large	
47614	Lisäpehmuste	Small	
47614	Lisäpehmuste	Medium	
47614	Lisäpehmuste	Large	
47617	Kiila setti	Small	
47617	Kiila setti	Medium	
47617	Kiila setti	Large	
47618	Varvassuoja	Yksi koko	



Walker kantakiila

Kuuden kappaleen kiilasetti, joista kukin on noin 4°. Yhteensä 20°. Setti on saatavana kolmessa eri koossa.

Tuotenro.	Malli	Koko
47617	Kantakiilasetti	Small
47617	Kantakiilasetti	Medium
47617	Kantakiilasetti	Large

Optima Diab

Optima Diab on korkeavartinen hoitojalkine, joka on pääasiallisesti tarkoitettu jalkaterän ja jalkapöydän diabetesjalkahaavan hoitamiseen. Jalkineessa on korkea stabiili kantaosa, jota voidaan uudelleenmuotoilla lämpöilmapuhaltimella sekä ilmava ja pestävä vuoritus. Jalkineessa on rullaava muovinen pohja ja koottava 3x3 kevennyspohjallissarja kohdistettuun plantaarihaavan keventämiseen. Kevennyspohjallissarja on 3-kerroksinen ja siinä on kolme eri jäykkyyttäsoa (jäykkä, medium ja pehmeä). Tarranauha sekä muovinen kiinnitysnauha varmistavat jalkineen pysymisen jalassa. Amputoidun jalan Optima kevennyspohjallinen sopii Optima Diab jalkineeseen ja se on tilattavissa erikseen.

Käyttöalueet: Diabetes jalkahaava, jalkaterän ja jalkapöydän jalkahaava, jalan osittaisen amputaation jälkeinen kuntoutus (paitsi - Chopart amputaatio), jalan leikkauksen jälkeinen kuntoutus, Charcot jalan kuntoutus akuutista krooniseen vaiheeseen siirryttäessä.

Muuta: Englannin kielinen kevennyspohjallisten asennusvideo on katsottavissa Youtubessa nimellä Optima Diab.



Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik	Kengän koko
79000	Optima Diab	Small	Bilat.	34 - 36
79000	Optima Diab	Medium	Bilat.	37 - 39
79000	Optima Diab	Large	Bilat.	40 - 42
79000	Optima Diab	X-Large	Bilat.	43 - 45
79000	Optima Diab	XX-Large	Bilat.	46 - 48
79005	3x3 kevennyspohjallissarja	Small	Bilat.	34 - 36
79005	3x3 kevennyspohjallissarja	Medium	Bilat.	37 - 39
79005	3x3 kevennyspohjallissarja	Large	Bilat.	40 - 42
79005	3x3 kevennyspohjallissarja	X-Large	Bilat.	43 - 45
79005	3x3 kevennyspohjallissarja	XX-Large	Bilat.	46 - 48



Optima Clheel

Optima Clheel on korkeavartinen hoitojalkine, joka on pääasiallisesti tarkoitettu kantapään alueen diabeteshaavaumien hoitamiseen. Jalkineessa on avoin kantapää. Jalkineessa on rullaava muovinen pohja ja koottava 3x3 kevennyspohjallissarja kohdistettuun plantaarihaavan keventämiseen. Kevennyspohjallissarja on 3-kerroksinen ja siinä on kolme eri jäykkyystasoa (jäykkä, medium ja pehmeä). Tarranauha sekä muovinen kiinnitysnauha varmistavat jalkineen pysymisen jalassa.

Käyttöalueet: Kantapään ja jalkapohjan haavaumat tai muut kantapään vammat, nivelsiteiden vammat, painehaavat.

Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik	Kengän koko
79002	Optima Clheel	Small	Bilat.	34 - 36
79002	Optima Clheel	Medium	Bilat.	37 - 39
79002	Optima Clheel	Large	Bilat.	40 - 42
79002	Optima Clheel	X-Large	Bilat.	43 - 45
79002	Optima Clheel	XX-Large	Bilat.	46 - 48
79006	3x3 kevennyspohjallissarja	Small	Bilat.	34 - 36
79006	3x3 kevennyspohjallissarja	Medium	Bilat.	37 - 39
79006	3x3 kevennyspohjallissarja	Large	Bilat.	40 - 42
79006	3x3 kevennyspohjallissarja	X-Large	Bilat.	43 - 45
79006	3x3 kevennyspohjallissarja	XX-Large	Bilat.	46 - 48



Optima Postop

Optima Postop on matala keventävä hoitojalkine, joka on pääasiallisesti tarkoitettu iskeemisen haavan hoitamiseen. Jalkineessa on jäykkä kantaosa, joka voidaan muotoilla lämpöilmahuuhtimella sekä ilmava ja pestävä vuoritus. Jalkineessa on rullaava muovinen pohja, pehmeä kevennyspohjallinen sekä tarranauhakiinnitys. Optima 3x3 kevennyspohjallissarja sekä amputoidun jalan Optima kevennyspohjallinen sopivat Optima Postop jalkineeseen.

Käyttöalueet: Iskeemisen haavan hoitamiseen (revaskularisaatiota ennen ja jälkeen), jalkapöydän murtumat, varpaanpoiston kuntoutus, leikkauksen jälkeinen tuenta, varvasmurtumat.

Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik	Kengän koko
79001	Optima Postop	Small	Bilat.	34 - 36
79001	Optima Postop	Medium	Bilat.	37 - 39
79001	Optima Postop	Large	Bilat.	40 - 42
79001	Optima Postop	X-Large	Bilat.	43 - 45

Optima Europa

Optima Europa on jalan kuntouttamiseen tarkoitettu hoitojalkine. Jalkineessa on jäykkä kantaosa, joka voidaan muotoilla lämpöilmahuuhtelulla sekä ilmava ja pestävä vuoritus. Jalkineessa on rullaava muovinen pohja, pehmeä kevennyspohjallinen sekä tarranauhakiinnitys. Optima 3x3 kevennyspohjallissarja sekä amputoidun jalan Optima kevennyspohjallinen sopivat Optima Europa jalkineeseen.

Käyttöalueet: Varpaiden välisten haavojen hoitamiseen, vaivaisenluunleikkauksen kuntoutus, koukkuvarvasleikkauksen kuntoutus, Mortonin neurooma-leikkauksen jälkeinen kuntoutus, kynnen poiston jälkeinen kuntoutus.

Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik	Kengän koko
79003	Optima Europa	Small	Bilat.	34 - 36
79003	Optima Europa	Medium	Bilat.	37 - 39
79003	Optima Europa	Large	Bilat.	40 - 42
79003	Optima Europa	X-Large	Bilat.	43 - 45
79003	Optima Europa	XX-Large	Bilat.	46 - 48




Optima Free

Optima Free on jalan kuntouttamiseen tarkoitettu hoitojalkine. Jalkineessa on jäykkä kantaosa, joka voidaan muotoilla lämpöilmahuuhtelulla sekä ilmava ja pestävä vuoritus. Jalkineessa on rullaava muovinen pohja, pehmeä kevennyspohjallinen sekä tarranauhakiinnitys. Optima 3x3 kevennyspohjallissarja sopii Optima Free jalkineeseen.

Käyttöalueet: Jalan dorsaalit vammat, vaivaisenluun leikkauksen jälkeinen kuntoutus.

Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik	Kengän koko
79004	Optima Free	Small	Bilat.	34 - 36
79004	Optima Free	Medium	Bilat.	37 - 39
79004	Optima Free	Large	Bilat.	40 - 42
79004	Optima Free	X-Large	Bilat.	43 - 45
79004	Optima Free	XX-Large	Bilat.	46 - 48



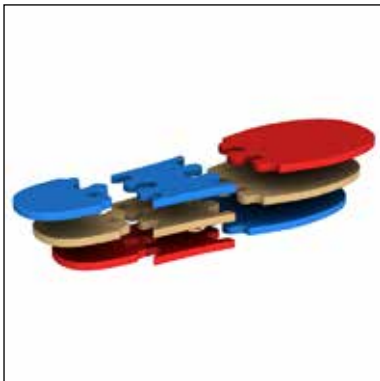

Optima 3x3 kevennyspohjallissarja

Optima 3x3 kevennyspohjallissarja on tarkoitettu kohdistettavan jalkahaavan keventämiseen. Pohjallisessa on kolme kerrosta sekä kolme eri jäykkyyttä (jäykkä=sininen 40 Sh, medium=keltainen 25 Sh ja pehmeä=punainen 20 Sh), jotka voidaan yhdistää ja sovittaa jalkahaavaan sopivaksi. Optima 3x3 kevennyspohjallissarja kuuluu perusvarusteena Optima Diab ja Clheel jalkineeseen, mutta niitä voidaan myös käyttää Optima Postop, Europa ja Free jalkineissa. Tilattava erikseen näihin malleihin.

Muuta: HUOM! Ainoastaan ammattitaitoinen henkilö voi sovittaa Optima 3x3 kevennyspohjallissarjan potilaalle. Älä koskaan käytä pohjallisia tavallisten kenkien tai muiden ortopedisten jalkineiden kanssa. Sarjaa tulee aina käyttää kokonaisuudessaan osat Optima ortoosin sisällä toisiinsa hyvin liitettyinä. Noudata Optima käyttöohjeita toimintatapoja koskien. Voit myös käydä katsomassa englannin kielisen asennusvideon Youtubesta nimellä Optima Diab.

Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik	Kengän koko
79005	Optima 3x3 kevennyspohjallissarja	Small	Bilat.	34 - 36
79005	Optima 3x3 kevennyspohjallissarja	Medium	Bilat.	37-39
79005	Optima 3x3 kevennyspohjallissarja	Large	Bilat.	40-42
79005	Optima 3x3 kevennyspohjallissarja	X-Large	Bilat.	43-45
79005	Optima 3x3 kevennyspohjallissarja	XX-Large	Bilat.	46-48



Amputoidun jalan Optima kevennyspohjallinen

Amputoidun jalan Optima kevennyspohjallinen on EVA-materiaalista valmistettu pohjallinen, joka on tarkoitettu käytettäväksi Optima Diab, Postop ja Europa jalkineissa jalan osittaisen amputaation jälkeen.

Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik	Kengän koko
79007	Amputoidun jalan Optima kevennyspohjallinen	Small	Bilat.	34-36
79007	Amputoidun jalan Optima kevennyspohjallinen	Medium	Bilat.	37-39
79007	Amputoidun jalan Optima kevennyspohjallinen	Large	Bilat.	40-42
79007	Amputoidun jalan Optima kevennyspohjallinen	X-Large	Bilat.	43-45
79007	Amputoidun jalan Optima kevennyspohjallinen	XX-Large	Bilat.	46-48

Body Armor Pro Term

Väliaikainen hoito Chopartin tai Lisfrancin amputaation jälkeen. Vaihtoehtoinen hoitomenetelmä ensimmäisen kuntoutumisjakson aikana. Kiilamainen ulko- ja sisäpohjallinen takaavat painon jakautumisen jalan ojennuksessa oikealla tavalla jalan takaosaan. Jalkineen stabiili rakenne pitää tyngän paikallaan sekä auttaa sitä säilyttämään muotonsa. Integroidulla pumpulla varustettu sisäpehmuste auttaa muodon säilymisessä kevyen kompression avulla. Jalkinetta on saatavana kahta eri kokoa - 16 tai 19 cm - riippuen tyngän pituudesta.

Tuotenro.	Malli	Koko	Mitta	Vas/Oik
79008	Body Armor Pro Term	Medium	16 cm	Bilat.
79008	Body Armor Pro Term	Large	19 cm	Bilat.



Mitta: Tyngän pituus.



SBI Motus Diabetes Walker ortoosi

SBI Motus Diabetes Walker ortoosi on tarkoitettu haavaumien ja diabetesjalan haavojen hoitamiseen jalkaterän ja jalkapöydän alueella. Ortoosissa on stabiili muovikehikko, joka suojaa tibiaa sekä irrotettava sisäosa, jota voidaan muotoilla kuumailmapuhaltimen avulla. Irrotettava täydellisesti rullaava soveltuu hyvin jalkapohjan haavaumien hoitoon. Lisävarusteena on tilattavissa myös stabiili keinupohja, joka helpottaa akuutista krooniseen hoitovaiheeseen siirtymistä. Ortoosin kiinnitysnauhojen kohtaa voidaan siirtää ja ne voidaan varmistaa "irrotuksen estävän" järjestelmän avulla. Säädetävät 3x3 kiinnityspohjalliset ovat tarkoitettu kohdistettuun plantaarihaavaumien keventämiseen. Kiinnityspohjalliset koostuvat kolmesta eri kerroksesta ja kolmesta eri jäykkyydestä (jäykkä, medium ja pehmeä), joita voidaan yhdistellä keskenään ja sovittaa yksittäisiin haavaumiin sopiviksi. SBI 3x3 kevennyspohjalliset toimitetaan SBI Motus Diabetes Walker ortoosin mukana.

Käyttöalueet: Haavaumien ja diabetesjalan haavojenhoitamiseen jalkaterän ja jalkapöydän alueella. Charcot jalan stabilisoimiseksi. Leikkauksen jälkeinen kuntoutus.

Muuta: Saumatonta sukkaa tulee aina käyttää SBI-ortoosin alla. Sukan sisäpuoli on valmistettu pehmeästä froteemateriaalista ja se toimitetaan ortoosin mukana.

Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik	Kengän koko
79015	SBI Motus Diabetes Walker	Small	Bilat.	34 - 36
79015	SBI Motus Diabetes Walker	Medium	Bilat.	37 - 39
79015	SBI Motus Diabetes Walker	Large	Bilat.	40 - 42
79015	SBI Motus Diabetes Walker	X-Large	Bilat.	43 - 45
79015	SBI Motus Diabetes Walker	XX-Large	Bilat.	46 - 48

SBI Frame Post-op Walker

Käyttövalmis, säädettävä Walker-ortoosi traumoihin. Kevyt ja erittäin mukavan tuntuinen toiminnalliseen kuntoutukseen. Stabiili muovikehikko, joka suojaa tibiaa sekä irrotettava sisäosa, jota voidaan muotoilla kuumailmapuhaltimen avulla. Kiinnitysnauhojen kohtaa voidaan siirtää. Irrotettava stabiili keinupohja ja SBI pohjallinen (79026) toimitetaan ortoosin mukana.

Käyttöalueet: Stabiilit jalka- ja/tai nilkkamurtumat. Vaikeat venähdykset. Postoperatiivinen kuntoutus.

Muuta: Saumatonta sukkaa tulee aina käyttää SBI-ortoosin alla. Sukan sisäpuoli on valmistettu pehmeästä froteemateriaalista ja se toimitetaan ortoosin mukana.



Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik	Kengän koko
79016	SBI Frame Post-op Walker	Small	Bilat.	34-36
79016	SBI Frame Post-op Walker	Medium	Bilat.	37-39
79016	SBI Frame Post-op Walker	Large	Bilat.	40-42
79016	SBI Frame Post-op Walker	X-Large	Bilat.	43-45
79016	SBI Frame Post-op Walker	XX-Large	Bilat.	46-48



SBI Wheel Walker ortoosi avoimella kantaosalla

SBI Walker ortoosi, joka on kehitetty toiminnalliseen kantapään alueen kuntoutukseen sekä keventämään kantapään alueen haavaumia avoimen kantaosan avulla. Ortoosi on kevyt ja erittäin mukavan tuntuinen. Avoimen kantaosan ansiosta kantapään haavaumat hengittävät ja niiden kuntoa voidaan myös tarvittaessa tarkastaa. Säädetty stabiili muovikehikko suojaa tibiaa ja sen sisäosaa voidaan muotoilla kuumailemapuhaltimella. Irrotettava täydellisesti rullaava keinupohja plantaaristen haavaumien hoitamiseen ja säädetty 3x3 kevennyspohjalliset toimitetaan ortoosiin mukana. Kiinnitysnauhojen kohtaa voidaan siirtää.

Käyttöalueet: Kantapään alueen vammojen hoito.

Muuta: Saumatonta sukkaa tulee aina käyttää SBI-ortoosin alla. Sukan sisäpuoli on valmistettu pehmeästä froteemateriaalista ja se toimitetaan ortoosiin mukana.

Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik	Kengän koko
79017	SBI Wheel Walker ortoosi avoimella kantaosalla	Small	Bilat.	34-36
79017	SBI Wheel Walker ortoosi avoimella kantaosalla	Medium	Bilat.	37-39
79017	SBI Wheel Walker ortoosi avoimella kantaosalla	Large	Bilat.	40-42
79017	SBI Wheel Walker ortoosi avoimella kantaosalla	X-Large	Bilat.	43-45
79017	SBI Wheel Walker ortoosi avoimella kantaosalla	XX-Large	Bilat.	46-48

SBI Päällinen

SBI Päällinen on vettähylykivä päällinen, joka suojaa ja pitää SBI Walkerin puhtaana. Se on suunniteltu käytettäväksi yhdessä SBI Motuksen, SBI Framen ja SBI Vheelen kanssa. Materiaali on semi-elastista ja tuotteen takaosassa on vetoketju. Kumipohja antaa kävellessä lisätukea. Päällinen on pestävä.

Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik
79029	SBI Päällinen	Small	Bilateraalinen
79029	SBI Päällinen	Medium	Bilateraalinen
79029	SBI Päällinen	Large	Bilateraalinen
79029	SBI Päällinen	X-Large	Bilateraalinen
79029	SBI Päällinen	XX-Large	Bilateraalinen



SBI Walker kehikko suljetulla kantaosalla

Vaihdettava kehikko suljetulla kantaosalla. Sopii SBI Motus Diabetes Walker ortoosiin ja SBI Frame Post-op Walker ortoosiin.

Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik	Kengän koko
79018	SBI Walker kehikko suljetulla kantaosalla	Small	Bilat.	34 - 36
79018	SBI Walker kehikko suljetulla kantaosalla	Medium	Bilat.	37 - 39
79018	SBI Walker kehikko suljetulla kantaosalla	Large	Bilat.	40 - 42
79018	SBI Walker kehikko suljetulla kantaosalla	X-Large	Bilat.	43 - 45
79018	SBI Walker kehikko suljetulla kantaosalla	XX-Large	Bilat.	46 - 48





SBI Walker kehikko avoimella kantaosalla

Vaihdettava kehikko avoimella kantaosalla SBI Wheel Walker ortoosiin.

Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik	Kengän koko
79019	SBI Walker kehikko avoimella kantaosalla	Small	Bilat.	34 - 36
79019	SBI Walker kehikko avoimella kantaosalla	Medium	Bilat.	37 - 39
79019	SBI Walker kehikko avoimella kantaosalla	Large	Bilat.	40 - 42
79019	SBI Walker kehikko avoimella kantaosalla	X-Large	Bilat.	43 - 45
79019	SBI Walker kehikko avoimella kantaosalla	XX-Large	Bilat.	46 - 48



Täydellinen sisäsosasarja SBI Walker ortoosiin

Vaihdettava täydellinen sisäsosasarja SBI Walker ortooseihin tasaisesta muotoiltavasta EVA-materiaalista. Sisäosat ovat muotoiltu jalan muotoihin ja anatomiaan sopivaksi. Tibian suojaosassa on irrotettava vahvike.

Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik
79020	Täydellinen sisäsosasarja SBI Walker ortoosiin	Small	Bilat.
79020	Täydellinen sisäsosasarja SBI Walker ortoosiin	Medium	Bilat.
79020	Täydellinen sisäsosasarja SBI Walker ortoosiin	Large	Bilat.
79020	Täydellinen sisäsosasarja SBI Walker ortoosiin	X-Large	Bilat.
79020	Täydellinen sisäsosasarja SBI Walker ortoosiin	XX-Large	Bilat.

SBI Walkerin soljet ja nauhat

SBI Walker lisäosasarja, jossa 8 solkea ja 4 kiinnitysnauhaa.

Tuotenro.	Malli	Koko	Pakkaus
79021	SBI Walker soljet ja nauhat	Small/Medium	8 solkea, 4 nauhaa
79021	SBI Walker soljet ja nauhat	Large/X-Large/ XX-Large	8 solkea, 4 nauhaa



SBI stabiili keinupohja

SBI ortoosien keinupohjat voidaan nopeasti ja helposti kiinnittää sekä irrottaa ja vaihtaa ortoosiin. Stabiili keinupohja rullaa vähemmän kuin täydellisesti rullaava keinupohja. Sitä käytetään kun siirrytään akuutista krooniseen hoitovaiheeseen. Stabiilia keinupohjaa ei toimiteta ortoosin mukana vaan se on tilattava erikseen.

Muuta: HUOM! Älä käytä SBI ortoosia koskaan ilman keinupohjaa. Lue SBI ortoosin käyttöohjeet koskien keinupohjan vaihtamista.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Vas/Oik
79022	SBI stabiili keinupohja	Harmaa	Small	Bilat.
79022	SBI stabiili keinupohja	Harmaa	Medium	Bilat.
79022	SBI stabiili keinupohja	Harmaa	Large	Bilat.
79022	SBI stabiili keinupohja	Harmaa	X-Large	Bilat.
79022	SBI stabiili keinupohja	Harmaa	XX-Large	Bilat.





SBI täydellisesti rullaava keinupohja

SBI ortoosien keinupohjat voidaan nopeasti ja helposti kiinnittää sekä irrottaa ja vaihtaa ortoosiin. SBI täydellisesti rullaava keinupohja toimitetaan ortoosiin mukana. Se on tarkoitettu käytettäväksi plantaaristen haavaumien akuutin hoitovaiheen aikana. SBI täydellisesti rullaava keinupohja on rullaavampi kuin stabiili keinupohja.

Muuta: HUOM! Älä käytä SBI ortoosia koskaan ilman keinupohjaa. Lue SBI ortoosiin käyttöohjeet koskien keinupohjan vaihtamista.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Vas/Oik
79023	SBI täydellisesti rullaava keinupohja	Musta	Small	Bilat.
79023	SBI täydellisesti rullaava keinupohja	Musta	Medium	Bilat.
79023	SBI täydellisesti rullaava keinupohja	Musta	Large	Bilat.
79023	SBI täydellisesti rullaava keinupohja	Musta	X-Large	Bilat.
79023	SBI täydellisesti rullaava keinupohja	Musta	XX-Large	Bilat.



SBI 3x3 kevennyspohjallissarja

Koottava SBI 3x3 kevennyspohjallissarja on suunniteltu keventämään jalkapohjaan kohdistuvaa painetta sekä hoitamaan jalkaterän, päkiän ja kantapään alueen haavaumia. Sarja koostuu yhdeksästä osasta, jotka voidaan koota yhteen ja muodostaa kolme eri plantaaripohjallista. Pohjallisissa on eri kolme eri jäykkyyttä (punainen=pehmeä 20 Sh, beige=medium 25 Sh ja sininen=jäykkä 40 Sh). Osien eri jäykkyyksiä voidaan yhdistää vaaka- ja pystysuunnittain. Jalkapohjaan kohdistuvaa painetta voidaan helposti keventää yhdistelemällä eri osia. Pohjallissarja on tarkoitettu käytettäväksi SBI Motus (sarja sis. ortoosiin), SBI Wheel (sarja sis. ortoosiin) ja SBI Frame (sarja tilattava erikseen) ortoosien kanssa.

Muuta: HUOM! Ainoastaan ammattitaitoinen henkilö voi sovittaa SBI 3x3 kevennyspohjallissarjan potilaalle. Älä koskaan käytä pohjallisia tavallisten kenkien tai muiden ortopedisten jalkineiden kanssa. Sarjaa tulee aina käyttää kokonaisuudessaan osat SBI ortoosiin sisällä toisiinsa hyvin liitettyinä. Noudata SBI käyttöohjeita toimintatapoja koskien. Voit myös käydä katsomassa englannin kielisen asennusvideon Youtubesta nimellä Optima Diab.

Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik
79024	SBI 3x3 kevennyspohjallissarja	Small	Bilat.
79024	SBI 3x3 kevennyspohjallissarja	Medium	Bilat.
79024	SBI 3x3 kevennyspohjallissarja	Large	Bilat.
79024	SBI 3x3 kevennyspohjallissarja	X-Large	Bilat.
79024	SBI 3x3 kevennyspohjallissarja	XX-Large	Bilat.

SBI pohjallinen amputoidulle jalalle

SBI pohjallinen amputoidulle jalalle on suunniteltu käytettäväksi postoperatiivisesti varpaan/varpaiden amputaation tai transmetatarsaalisen amputaation jälkeen. Pohjallinen on tarkoitettu käytettäväksi SBI Motus, SBI Wheel ja SBI Frame ortoosien kanssa. Pohjallinen tulee tilata erikseen.

Muuta: SBI pohjallisen amputoidulle jalalle saa määrätä käytettäväksi vain terveydenhoidon ammattilainen. Älä koskaan käytä pohjallista tavallisten kenkien tai muiden ortopedisten jalkineiden kanssa. Noudata SBI käyttöohjeita toimintatapoja koskien.

Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik
79025	SBI pohjallinen amputoidulle jalalle	Small	Bilat.
79025	SBI pohjallinen amputoidulle jalalle	Medium	Bilat.
79025	SBI pohjallinen amputoidulle jalalle	Large	Bilat.
79025	SBI pohjallinen amputoidulle jalalle	X-Large	Bilat.
79025	SBI pohjallinen amputoidulle jalalle	XX-Large	Bilat.



SBI pohjallinen

Vahva yksikerroksinen pohjallinen, joka toimitetaan SBI Frame Post-Op Walker ortoosin mukana, mutta se voidaan myös tilata erikseen.

Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik
79026	SBI pohjallinen	Small	Bilat.
79026	SBI pohjallinen	Medium	Bilat.
79026	SBI pohjallinen	Large	Bilat.
79026	SBI pohjallinen	X-Large	Bilat.
79026	SBI pohjallinen	XX-Large	Bilat.




SBI Saumaton sukka

Saumaton sukka, jota käytetään SBI ortoosin alla. Sukan sisäpuoli on valmistettu pehmeästä froteemateriaalista ja se toimitetaan kaikkien SBI-ortoosien mukana.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Vas/Oik
79027	SBI Saumaton sukka	Sininen	Yksi koko	Bilat.



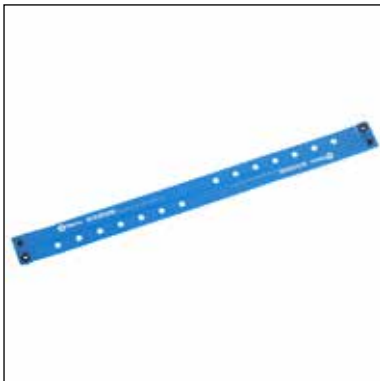

Lukitusnauha SBI Walker ortoosiin

Lukitusnauha, jonka avulla ortoosi varmistetaan "irrotuksen estäväksi" järjestelmäksi.

Tuotenro.	Malli	Koko	Pakkaus
79028	Lukitusnauha SBI Walker ortoosiin	Yksi koko	2



Polvituet

www.camp.fi



Mitta: Polven ympärys mitataan patellan alapuolelta.



Mitta: Mittaa polven ympärysmitta.

Patellavator

Patellavator polviortoosi komprimoi patellajännettä ja siten lievittää polven alueen kipuja patellatendinitis-vaivoissa. Ortoosi on valmistettu CoolFlex-materiaalista, joka hengittää ja antaa ihanteellista mukavuutta käytettäessä tukea päivittäin tai urheillessa. Pehmustettu sisus antaa kohdistetun puristuksenomaisen tuen patellajänteeseen lievittäen siihen kohdistuvaa kipua tai räsitusta. Jos lisätuentaa kaivataan on Patellavatorissa erityinen nyörityssysteemi, jonka avulla nauhaa voidaan kiristää. Lisäksi tuessa on lukitusysteemi, joka on suunniteltu kestäämään aggressiivisempaa käyttöä ilman, että tuki aukeaisi tai vaikuttaisi toisen polven toimintaan esim. juostessa. Patellavator on myös suunniteltu niin, että se pysyy hyvin polven ympärillä tai että se ei ärsytä polvitaivetta.

Käyttöalueet: Polvilumpion jännetulehdukset, Osgood-Schlatterin tauti ja Kondromalasia patella.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28674	Musta	Small	28-33 cm	Bilat.
28674	Musta	Medium	33-39 cm	Bilat.
28674	Musta	Large	39-44 cm	Bilat.
28674	Musta	X-Large	> 44 cm	Bilat.

ELEMENTS polvituki

Tämä tuote on tarkoitettu lievien ja tilapäisten vaivojen hoitoon, kuten esim. kiputilat ja tulehdukset. Tuki komprimoi kevyesti ja lämmittää niveltä.

Käyttöalueet: Tilapäisten vaivojen hoitoon, kuten esim. kiputilat ja tulehdukset.

Kontraindikaatiot: Ödeema, nivelsidevammat, jalan haavaumat, voimakas turvotus.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
34106	Beige/Musta	X-Small	30 - 33 cm	Bilat.
34106	Beige/Musta	Small	33 - 36 cm	Bilat.
34106	Beige/Musta	Medium	36 - 39 cm	Bilat.
34106	Beige/Musta	Large	39 - 42 cm	Bilat.
34106	Beige/Musta	X-Large	42 - 47 cm	Bilat.

PatellaCamp

PatellaCamp on patellan stabiloimiseen tarkoitettu polviortoosi. Ortoosi on kiedottava ja se jättää polvitaiteen avoimeksi. Pelotti asetetaan patellan instabiilille puolelle ja kaksi joustavaa nauhaa kiristetään halutun tuen saavuttamiseksi.

Käyttöalueet: Luksoitunut patella, subluksoitunut patella, patellofemoraalinen kipusyndrooma (PFPS).

Kontraindikaatiot: Voimakas ödeema, silloin kun kompressio voi vaikuttaa verenkiertoon.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28679	Musta	Medium	<40 cm	Bilat.
28679	Musta	Large	>40 cm	Bilat.



Mitta: Polven ympärys patellan keskikohdasta

Dynatrack™ patella PLUS stabilizer

Kiedottava tuki, jossa on tukeva pelotti patellan stabiloimiseksi. Tätä patellatukea voidaan käyttää mediaalisesti tai lateraalisesti. Patellan asentoa säädetään kahden nauhan avulla. Tuessa on integroidut nauhat ja se on avoin polvitaiteesta. Valmistettu hengittävstä materiaalista.

Käyttöalueet: Kondromalasia patella, luksoituneen tai subluksoituneen patellan hoidossa.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28677	Musta	X-Small	25-30 cm	Bilat.
28677	Musta	Small	30-35 cm	Bilat.
28677	Musta	Medium	35-40 cm	Bilat.
28677	Musta	Large	40-45 cm	Bilat.
28677	Musta	X-Large	45-50 cm	Bilat.
28677	Musta	XX-Large	50-55 cm	Bilat.



Mitta: Polven ympärys patellan keskikohdasta



Mitta: Polven ympärys patellan keskikohdasta.

Active X™ Patella

Tämä avettava malli on tarkoitettu patellan stabiloimiseen kun riskinä on patellan lateraalinen luksaatio. Tuessa on sisäänrakennettu erityisvalmistettu pelotti, joka rakenteensa ansiosta asettuu tukevasti patellan sivulle "tarrautuen" siihen ja pitäen patellan paikoillaan. Irrotettava puolikuunmuotoinen muovilasta antaa lisätukea. Tuki on valmistettu innovatiivisesta ilmastavasta ActiveX-materiaalista, joka on joustavaa ja mukavan tuntuista.

Käyttöalueet: Patellofemoraaliset kiputilat (PFPS), luksoituneen patellan ja subluksoituneen patellan asentohoito.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28055	Musta	XX-Small	24-29 cm	Bilat.
28055	Musta	X-Small	28-33 cm	Bilat.
28055	Musta	Small	32-37 cm	Bilat.
28055	Musta	Medium	36-41 cm	Bilat.
28055	Musta	Large	40-45 cm	Bilat.



Mitta 1: Ympärysmitta (15 cm patellan keskikohdan alapuolelta)

Mitta 2: Polven ympärys patellan keskikohdasta

Mitta 3: Ympärysmitta (15 cm patellan keskikohdan yläpuolelta)

SELECTION® Patella-polvituki

SELECTION® Patella-polvituki on tarkoitettu patellaan kohdistuvien ongelmien hoitoon. Hevosenkengän muotoinen pelotti voidaan helposti asettaa sille puolen patellaa mihin tukea tarvitaan. Pelotissa on joustavat vetonauhat, jotka kiinnitetään tuen etuosan velourmateriaaliin. Kaksiosainen kiinnitys reiden ja pohkeen kohdalla helpottaa ortoosin säätämistä sopivaksi. Polvitaipessa oleva materiaali on joustavaa ja mukavantuntuista.

Käyttöalueet: Luksoitunut patella, patellofemoraaliset kiputilat, Osgood-Schlatterin tauti, Jumpers Knee, polven kiputilat.

Muuta: Kehotetaan tarkkailemaan mahdollista voimakasta turvotusta ja/tai verenkiertöhäiriöitä.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta 1	Mitta 2	Mitta 3	Vas/Oik
35704	Musta	X-Small	28-31 cm	30-33 cm	34-39 cm	Bilat.
35704	Musta	Small	31-34 cm	33-36 cm	39-43 cm	Bilat.
35704	Musta	Medium	34-37 cm	36-39 cm	43-47 cm	Bilat.
35704	Musta	Large	37-40 cm	39-42 cm	47-51 cm	Bilat.
35704	Musta	X-Large	40-43 cm	42-46 cm	51-56 cm	Bilat.

SELECTION® Minor-polvituki

SELECTION® Minor-polvituki on tarkoitettu käytettäväksi lievissä polven kiputiloissa. Minor antaa kevyen kompression, sekä lämmittää. Sivuilla olevat stabiloivat jouset antavat mukavantuntuisen ja kevyen tuen. Tuki on pujotettava sukcamalli, joka antaa puristuksenomaisen tuen edistämien proprioseptiikkaa. Ortoosisissa on anatomisesti muotoiltu patella-aukko optimaalisen istuvuuden saavuttamiseksi. Reiden kohdalla oleva kiinnitys on helppo säätää sopivaksi. Polvitaipessa oleva materiaali on joustavaa ja mukavantuntuista.

Käyttöalueet: Rasituksesta johtuva polvikipu, lievät ligamenttivammat, yllirasittunut polvi

Kontraindikaatiot: Vaikeat polvivammat kuten ACL/PCL-repeämät. Kehotetaan tarkkailemaan mahdollista voimakasta turvotusta ja/tai verenkiertöhäiriöitä.

Muuta: Tuotteesta on saatavana käyttöohjevideo Camp Scandinavian YouTube-kanavalla. Videon löydät osoitteesta www.youtube.com hakusanalla Camp Scandinavia.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta 1	Mitta 2	Mitta 3	Vas/Oik
35700	Musta	X-Small	28-31 cm	30-33 cm	34-39 cm	Bilat.
35700	Musta	Small	31-34 cm	33-36 cm	39-43 cm	Bilat.
35700	Musta	Medium	34-37 cm	36-39 cm	43-47 cm	Bilat.
35700	Musta	Large	37-40 cm	39-42 cm	47-51 cm	Bilat.
35700	Musta	X-Large	40-43 cm	42-46 cm	51-56 cm	Bilat.
35700	Musta	XX-Large	43-47 cm	46-50 cm	56-60 cm	Bilat.



Mitta 1: Ympärysmitta (15 cm patellan keskikohdan alapuolelta)

Mitta 2: Polven ympäryys patellan keskikohdasta

Mitta 3: Ympärysmitta (15 cm patellan keskikohdan yläpuolelta)



Mitta 1: Ympärysmitta (15 cm patellan keskikohdan alapuolelta)

Mitta 2: Polven ympäryys patellan keskikohdasta

Mitta 3: Ympärysmitta (15 cm patellan keskikohdan yläpuolelta)

SELECTION® Minor Wrap-polvituki

SELECTION® Minor Wrap-polvituki on tarkoitettu käytettäväksi lievissä polven kiputiloissa. Minor Wrap antaa kevyen kompression, sekä lämmittää. Sivuilla olevat stabiloivat jouset antavat mukavantuntuisen ja kevyen tuen. Avattava malli on helppo pukea ja riisua. Ortoosissa on anatomisesti muotoiltu patella-aukko optimaalisen istuvuuden saavuttamiseksi. Kaksiosainen kiinnitys reiden ja pohkeen kohdalla helpottaa ortoosin säätämistä sopivaksi. Polvitaipessa oleva materiaali on joustavaa ja mukavantuntuista.

Käyttöalueet: Rasituksesta johtuva polvikipu, lievät nivelvammat, yllirasittunut polvi.

Kontraindikaatiot: Vaikeat polvivammat kuten ACL/PCL-repeämät. Kehotetaan tarkkailemaan mahdollista voimakasta turvotusta ja/tai verenkiertöhäiriöitä.

Muuta: Tuote on saatavana kahdella eri reiden leveydellä. Katso tuotetietoa taulukosta. Tuotteesta on saatavana käyttöohjevideo Camp Scandinavian YouTube-kanavalla. Videon löydät osoitteesta www.youtube.com/hakusanalla/CampScandinavia.

Tuoteno.	Väri	Koko	Mitta 1	Mitta 2	Mitta 3	Vas/Oik
35701	Musta	X-Small	25-28 cm	27-30 cm	31-36 cm	Bilat.
35701	Musta	Small	28-31 cm	30-33 cm	36-40 cm	Bilat.
35701	Musta	Small Plus	28-31 cm	30-33 cm	40-44 cm	Bilat.
35701	Musta	Medium	31-34 cm	33-36 cm	40-44 cm	Bilat.
35701	Musta	Medium Plus	31-34 cm	33-36 cm	44-48 cm	Bilat.
35701	Musta	Large	34-37 cm	36-39 cm	44-48 cm	Bilat.
35701	Musta	Large Plus	34-37 cm	36-39 cm	48-53 cm	Bilat.
35701	Musta	X-Large	37-40 cm	39-43 cm	48-53 cm	Bilat.
35701	Musta	X-Large Plus	37-40 cm	39-43 cm	53-60 cm	Bilat.
35701	Musta	XX-Large	40-46 cm	43-50 cm	53-60 cm	Bilat.
35701	Musta	XX-Large Plus	40-46 cm	43-50 cm	60-67 cm	Bilat.

SELECTION® Optima-polvituki

SELECTION® Optima-polvituki on tarkoitettu käytettäväksi polvinivelen erilaisissa kiputiloissa. Ortoosin monitoiminnallisuus helpottaa tuotteen sovittamista. Optima toimitetaan nivelellisillä kiskoilla varustettuna. Takana oleva hyperekstensoristikko voidaan helposti kiinnittää ja irrottaa. Lisänauha edessä ehkäisee tibian siirtymistä eteenpäin ACL-vamman seurauksena. Tuki on pujotettava sukkamalli, joka antaa puristuksenomaisen tuen edistämien proprioseptista vaikutusta. Ortoosissa on anatomisesti muotoiltu patella-aukko optimaalisen istuvuuden saavuttamiseksi. Polvitaipessa oleva materiaali on joustavaa ja mukavantuntuista. Optiman ylä- ja alaosassa olevat kiinnitysnauhat ovat joustamattomat antaen tuelle lisää stabiliteettia.

Käyttöalueet: Lievä hyperekstensio polvinivelessä, lievä/kohtalainen M-L instabiliteetti, alkava artroosi, Patellofemoraaliset kiputilat, Reuma, venähdyksestä aiheutuneet nivelsidevammat, (MCL, LCL) ja ACL-vammat.

Kontraindikaatiot: Kontaktiurheilulajit tai muut aktiviteetit missä polviniveleen kohdistuu voimakasta rasitusta tai missä on suuri riski ACL/PCL vammoille. Kehotetaan tarkkailemaan mahdollista voimakasta turvotusta ja/tai verenkiertohäiriöitä.

Muuta: Liikerata ROM nivelessä. Fleksio: 45, 60, 75, 90 astetta. Ekstensio: 0, 10, 20, 30, 40 astetta. Tuotteesta on saatavana käyttöohjevideo Camp Scandinavian YouTube-kanavalla. Videon löydät osoitteesta www.youtube.com hakusanalla Camp Scandinavia.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta 1	Mitta 2	Mitta 3	Vas/Oik
35702	Musta	X-Small	28-31 cm	30-33 cm	34-39 cm	Bilat.
35702	Musta	Small	31-34 cm	33-36 cm	39-43 cm	Bilat.
35702	Musta	Medium	34-37 cm	36-39 cm	43-47 cm	Bilat.
35702	Musta	Large	37-40 cm	39-42 cm	47-51 cm	Bilat.
35702	Musta	X-Large	40-43 cm	42-46 cm	51-56 cm	Bilat.
35702	Musta	XX-Large	43-47 cm	46-50 cm	56-60 cm	Bilat.



Mitta 1: Ympärysmitta (15 cm patellan keskikohdan alapuolelta)

Mitta 2: Polven ympäryys patellan keskikohdasta

Mitta 3: Ympärysmitta (15 cm patellan keskikohdan yläpuolelta)



Mitta 1: Ympärysmitta (15 cm patellan keskikohdan alapuolelta)

Mitta 2: Polven ympärysmitta patellan keskikohdasta

Mitta 3: Ympärysmitta (15 cm patellan keskikohdan yläpuolelta)

SELECTION® Optima Wrap-polvituki

SELECTION® Optima Wrap-polvituki on tarkoitettu käytettäväksi polvinivelen eri kiputiloissa. Ortoosin monitoiminnallisuus helpottaa tuotteen sovittamista. Optima toimitetaan nivelellisillä kiskoilla varustettuna. Takana oleva hyperekstensoristikko voidaan helposti kiinnittää ja irrottaa. Lisänauha ehkäisee tibian siirtymistä eteenpäin ACL-vamman seurauksena. Ortoosissa on anatomisesti muotoiltu patella-aukko optimaalisen istuvuuden saavuttamiseksi. Kaksiosainen kiinnitys reiden ja pohkeen ympärillä helpottaa ortoosin säätämistä sopivaksi. Polvitaiepeessa oleva materiaali on joustavaa ja mukavantuntuista. Optiman ylä- ja alaosassa olevat kiinnitysnauhat ovat joustamattomat antaen tuelle lisää stabiiliteettia.

Käyttöalueet: Lievä hyperekstensio polvinivelessä, lievä/kohtalainen M-L instabiiliteetti, alkava arthroosi, Patellofemoraaliset kiputilat, Reuma, nyrjähdyksestä aiheutuneet nivelsidevammat, (MCL, LCL) ja ACL-vammat.

Kontraindikaatiot: Kontaktuurheilulajit tai muut aktiviteetit missä polviniveleen kohdistuu voimakasta rasitusta tai missä on suuri riski ACL/PCL vammoille. Kehotetaan tarkkailemaan mahdollista voimakasta turvotusta ja/tai verenkiertohäiriöitä.

Muuta: Liikerata ROM nivelessä. Fleksio: 45, 60, 75, 90 astetta. Ekstensio: 0, 10, 20, 30, 40 astetta. Tuote on saatavana kahdella eri reiden leveydellä. Katso tuotetietoa taulukosta. Tuotteesta on saatavana käyttöohjevideo Camp Scandinavian YouTube-kanavalla. Videon löydät osoitteesta www.youtube.com/hakusanalla/CampScandinavia.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta 1	Mitta 2	Mitta 3	Vas/Oik
35703	Musta	X-Small	25-28 cm	27-30 cm	31-36 cm	Bilat.
35703	Musta	Small	28-31 cm	30-33 cm	36-40 cm	Bilat.
35703	Musta	Small Plus	28-31 cm	33-33 cm	40-44 cm	Bilat.
35703	Musta	Medium	31-34 cm	33-36 cm	40-44 cm	Bilat.
35703	Musta	Medium Plus	31-34 cm	33-36 cm	44-48 cm	Bilat.
35703	Musta	Large	34-37 cm	36-39 cm	44-48 cm	Bilat.
35703	Musta	Large Plus	34-37 cm	36-39 cm	48-53 cm	Bilat.
35703	Musta	X-Large	37-40 cm	39-43 cm	48-53 cm	Bilat.
35703	Musta	X-Large Plus	37-40 cm	39-43 cm	53-60 cm	Bilat.
35703	Musta	XX-Large	40-46 cm	43-50 cm	53-60 cm	Bilat.
35703	Musta	XX-Large Plus	40-46 cm	43-50 cm	60-67 cm	Bilat.

CROSS™ semi-rigidi polviortoosi

CROSS™ on semi-rigidi polviortoosi, joka on tarkoitettu polven yliojennuksen ehkäisyyn. CROSS on kehitetty yhteensopivaksi ALLARD AFO:n kanssa (Nilkka-Jalka-ortoosi/Riippunilikka). Tuotteessa ei ole nauhoja tai solkia, jotka tarttuisivat komposiittimateriaalista oleviin sivukiskoihin. Takana ristikkäin olevat nauhat estävät yliojennusta.

Ainutlaatuinen rakenne mahdollistaa pukemisen ja riisumisen yhdellä kädellä. Ortoosissa on hyvin pehmeä sisäpuoli ilman hankaavia saumoja. Sileä vuori auttaa ortoosia liukumaan helposti ihoa vasten ja tuki on tämän vuoksi helppo vetää jalkaan. Liukumisen estämiseksi on ortoosissa strategisesti asetetut silikoninauhat sisäpuolella. Ainutlaatuinen vahvistus CROSSin yläreunassa pitää ortoosin suun ryhdikkäänä, mikä on edellytys ortoosin pukemiseksi yhdellä kädellä. Veto-koukku auttaa henkilöitä, joilla on tasapainon ja ylettämisen kanssa ongelmia. Sen avulla voi ohjata ortoosin pujottamista jalkaan ja vetää sitä ylös säärtä pitkin.

CROSS™- ortoosin nivelessä on fleksio- ja ekstensorajoitushetimit. ROM-nivelen liikelaajuus on fleksiossa 45, 60, 75 ja 90 astetta ja ekstensiossa 0, 10, 20, 30

Käyttöalueet: CROSS™ on tarkoitettu tukemaan polviniveltä, jossa on lievä tai keskivaikea yliojennusongelma neuromuskulaaristen sairauksien tai muiden vammojen seurauksena. Ortoosia voidaan käyttää yhdessä Allard AFOjen kanssa kun yliojennus polvinivelessä esiintyy yhdessä riippunilkan kanssa.

Muuta: CROSS™ on pestävissä 40°:ssa. Lisätietoja käytöstä sekä CROSS™in pukemisesta ja riisumisesta löytyy YouTubessa olevasta sovitustavistusta. Tuotteen mukana tulee lisäksi selkeä graafinen ohjeistus, kuinka ortoosi yksinkertaisesti puetaan ja riisutaan.



Mitta 1: Ympärysmitta (15 cm patellan keskikohdan alapuolelta)

Mitta 2: Polven ympärysmitta patellan keskikohdasta

Mitta 3: Ympärysmitta (15 cm patellan keskikohdan yläpuolelta)

Tuotenro.	Malli	Koko	Mitta 1	Mitta 2	Mitta 3
28715	CROSS™ polviortoosi	Small	32-37 cm	32-37 cm	39-44 cm
28715	CROSS™ polviortoosi	Medium	36-41 cm	36-41 cm	43-48 cm
28715	CROSS™ polviortoosi	Large	40-45 cm	40-45 cm	47-52 cm
28715	CROSS™ polviortoosi	X-Large	44-49 cm	44-49 cm	51-57 cm
28716	CROSS™ Vetokoukku	Yksi koko			



Active X™ Short

Polviortoosi, joka on tarkoitettu erilaisiin polven kiputiloihin, kuten lievistä kohtalaiseen sivuttaisinstabiliteettiin. Tuessa on fleksioon/ekstensioon säädettävät sivukiskot. Materiaali lämmittää sekä antaa kevyen puristavan tunteen. Tukea on saatavana sekä sukka- että avattavana mallina. Siinä on irrotettavat kaarevat nauhat, joissa on D-lenkit (yksi nauha ylhäällä ja yksi alhaalla). Tuessa on esiasennettuna 10° fleksiosuunnan rajoitinpala yliojennuksen ehkäisemiseksi. Tuen mukana toimitetaan ekstension/fleksion rajoitinsetti.

Käyttöalueet: Lievät/kohtalaiset MCL/LCL-instabiliteetit. Lievät mediaaliset tai lateraaliset nivelkierukan vauriot.

Kontraindikaatiot: MCL/LCL repeämät. ACL/PCL vammat. Kehoitetaan varovaisuuteen jos jaloissa turvotusta tai verenkiertohäiriötä.

Muuta: Ortoosin pituus on 32 cm.

Mitta 1: Ympärysmitta (15 cm patellan keskikohdan alapuolelta)

Mitta 2: Polven ympärysmitta patellan keskikohdasta

Mitta 3: Ympärysmitta (15 cm patellan keskikohdan yläpuolelta)

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta 1	Mitta 2	Mitta 3
28050	Sukkamalli	Musta	X-Small	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
28050	Sukkamalli	Musta	Small	32 - 37 cm	32 - 37 cm	39 - 44 cm
28050	Sukkamalli	Musta	Medium	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
28050	Sukkamalli	Musta	Large	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
28050	Sukkamalli	Musta	X-Large	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
28050	Sukkamalli	Musta	XX-Large	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
28050	Sukkamalli	Musta	XXX-Large	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm
28051	Avattava malli	Musta	X-Small	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
28051	Avattava malli	Musta	Small	32 - 38 cm	32 - 38 cm	39 - 46 cm
28051	Avattava malli	Musta	Medium	36 - 42 cm	36 - 42 cm	43 - 51 cm
28051	Avattava malli	Musta	Large	40 - 46 cm	40 - 46 cm	47 - 55 cm
28051	Avattava malli	Musta	X-Large	44 - 50 cm	44 - 50 cm	51 - 60 cm
28051	Avattava malli	Musta	XX-Large	48 - 55 cm	48 - 55 cm	56 - 65 cm
28051	Avattava malli	Musta	XXX-Large	54 - 61 cm	54 - 61 cm	61 - 71 cm
35710		Fleks/ ekst. stopperi				

Active X™ Long

Pitkä polviortoosi, joka on tarkoitettu erilaisiin polven kiputiloihin, kuten lievää kohtalaiseen sivuttaisinstabiliteettiin. Tuessa on fleksioon/ekstensioon säädettävät sivukiskot. Materiaali lämmittää sekä antaa kevyen puristavan tunteen. Tukea on saatavana sekä sukka- että avattavana mallina. Siinä on irrotettavat kaarevat nauhat, joissa on D-lenkit (kaksi ylhäällä ja kaksi alhaalla). Tuessa on esiasennettuna 10° fleksiosuunnan rajoitinpala yliojennuksen ehkäisemiseksi. Tuen mukana toimitetaan ekstension/fleksion rajoitinsetti.

Käyttöalueet: MCL/LCL-instabiliteetit. Lievät mediaaliset tai lateraaliset nivelkierukan vauriot. Lievä gonartroosi. Bursiitti. Nivelkivut.

Kontraindikaatiot: Vaikeat polvivammat kuten ACL/PCL repeämät. Kehoitetaan varovaisuuteen jos jaloissa turvotusta tai verenkiertohäiriötä.

Muuta: Ortoosin pituus on 40 cm.



Mitta 1: Ympärysmitta (15 cm patellan keskikohdan alapuolelta)

Mitta 2: Polven ympäryys patellan keskikohdasta

Mitta 3: Ympärysmitta (15 cm patellan keskikohdan yläpuolelta)

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta 1	Mitta 2	Mitta 3
28052	Sukkamalli	Musta	X-Small	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
28052	Sukkamalli	Musta	Small	32 - 37 cm	32 - 37 cm	39 - 44 cm
28052	Sukkamalli	Musta	Medium	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
28052	Sukkamalli	Musta	Large	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
28052	Sukkamalli	Musta	X-Large	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
28052	Sukkamalli	Musta	XX-Large	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
28052	Sukkamalli	Musta	XXX-Large	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm
28053	Avattava malli	Musta	Small	32 - 38 cm	32 - 38 cm	39 - 46 cm
28053	Avattava malli	Musta	Medium	36 - 42 cm	36 - 42 cm	43 - 51 cm
28053	Avattava malli	Musta	Large	40 - 46 cm	40 - 46 cm	47 - 55 cm
28053	Avattava malli	Musta	X-Large	44 - 50 cm	44 - 50 cm	51 - 60 cm
28053	Avattava malli	Musta	XX-Large	48 - 55 cm	48 - 55 cm	56 - 65 cm
28053	Avattava malli	Musta	XXX-Large	54 - 61 cm	54 - 61 cm	61 - 71 cm
35710	Fleks/ekst. stopperi					



Mitta 1: Ympärysmitta (15 cm patellan keskikohdan alapuolelta)

Mitta 2: Polven ympäryys patellan keskikohdasta

Mitta 3: Ympärysmitta (15 cm patellan keskikohdan yläpuolelta)

Active X Sleeve

Tämä pujotettava tuki on tarkoitettu käytettäväksi lievemmissä polven kiputiloissa. Tuen materiaali komprimoi ja lämmittää. Patellan aukko-osa on anatomisesti muotoiltu parhaan istuvuuden saavuttamiseksi sekä pehmustettu, mikä lisää patellan stabiiliteettia. Tuessa on tarranauhasäätö reiden etupuolella ja pohkeen kohdalla sekä kaksi spiraalikiskoa molemmilla puolilla.

Käyttöalueet: Rasituksesta johtuva polvikipu, lievemmat nivelvammat, yllirasitus, lievä polvinivelen instabiiliteetti.

Kontraindikaatiot: Vaikeat polvivammat, kuten ACL/PCL-repeämät, vaikeat MCL/LCL vammat. Kehotetaan tarkkailemaan mahdollista voimakasta turvotusta ja/tai verenkiertohäiriöitä.

Muuta: Ortoosin pituus on 32 cm.

Tuotenro.	Malli	Koko	Mitta 1	Mitta 2	Mitta 3
28056	Musta	X-Small	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
28056	Musta	Small	32 - 37 cm	32 - 37 cm	39 - 44 cm
28056	Musta	Medium	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
28056	Musta	Large	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
28056	Musta	X-Large	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
28056	Musta	XX-Large	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
28056	Musta	XXX-Large	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm

Active X Sleeve PLUS

Tämä pujotettava tuki on tarkoitettu käytettäväksi lievemmissä polven kiputiloissa. Tuen materiaali komprimoi ja lämmittää. Patellan aukko-osa on anatomisesti muotoiltu parhaan istuvuuden saavuttamiseksi sekä pehmustettu, mikä lisää patellan stabiiliteettia. Tuessa on tarranauhasäätö reiden etupuoella ja pohkeen kohdalla. Active X Sleeve PLUS:ssa on kaksi spiraalikiskoa molemmilla puolilla sekä kaksi lisätukea antavaa nauhaa. PLUS-malli on hieman stabiloivampi kuin Active X Sleeve. Muutoin tuet ovat samanlaiset malliltaan ja toiminnallisuudeltaan.

Käyttöalueet: Rasituksesta johtuva polvikipu, lievät nivelsidevammat, yllirasitus, lievä polven instabiiliteetti.

Kontraindikaatiot: Vaikeat polvivammat kuten ACL/PCL-repeämät, vaikeat MCL/LCL-vammat. Kehotetaan tarkkailemaan mahdollista voimakasta turvotusta ja/tai verenkiertohäiriöitä.

Muuta: Ortoosin pituus on 32 cm.

Tuoteno.	Malli	Koko	Mitta 1	Mitta 2	Mitta 3
28057	Active X Sleeve Plus	X-Small	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
28057	Active X Sleeve Plus	Small	32 - 37 cm	32 - 37 cm	39 - 44 cm
28057	Active X Sleeve Plus	Medium	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
28057	Active X Sleeve Plus	Large	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
28057	Active X Sleeve Plus	X-Large	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
28057	Active X Sleeve Plus	XX-Large	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
28057	Active X Sleeve Plus	XXX-Large	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm



Mitta 1: Ympärysmitta (15 cm patellan keskikohdan alapuolelta)

Mitta 2: Polven ympäryys patellan keskikohdasta

Mitta 3: Ympärysmitta (15 cm patellan keskikohdan yläpuolelta)



Mitta 1: Ympärysmitta (15 cm patellan keskikohdan alapuolelta)

Mitta 2: Polven ympäryys patellan keskikohdasta

Mitta 3: Ympärysmitta (15 cm patellan keskikohdan yläpuolelta)

Active X™ Double Axis

Polviortoosi, joka on tarkoitettu erilaisiin polven kiputiloihin, kuten lievistä kohtalaiseen sivuttaisinstabiliteettiin. Tuessa on kaksoisnivelelliset kiskot ja se on säädetty 10° fleksioon. Materiaali lämmittää sekä puristaa kevyesti. Siinä on irrotettavat kaarevat nauhat, joissa on D-lenkit (yksi nauha ylhäällä ja yksi alhaalla). Tukea on saatavana sekä sukka- että avattavana mallina. Sukkamallissa on patellan ympärillä pehmuste lisätuen antamiseksi.

Käyttöalueet: Lievät/kohtalaiset MCL/LCL-instabiliteetit. Lievät mediaaliset tai lateraaliset nivelkierukan vauriot.

Kontraindikaatiot: MCL/LCL repeämät. ACL/PCL vammat. Kehoitetaan varovaisuuteen jos jaloissa turvotusta tai verenkiertohäiriötä.

Muuta: Ortoosin pituus on 32 cm.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta 1	Mitta 2	Mitta 3
28058	Sukkamalli	Musta	X-Small	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
28058	Sukkamalli	Musta	Small	32 - 37 cm	32 - 37 cm	39 - 44 cm
28058	Sukkamalli	Musta	Medium	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
28058	Sukkamalli	Musta	Large	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
28058	Sukkamalli	Musta	X-Large	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
28058	Sukkamalli	Musta	XX-Large	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
28058	Sukkamalli	Musta	XXX-Large	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm
28059	Avattava malli	Musta	Small	32 - 38 cm	32 - 38 cm	39 - 46 cm
28059	Avattava malli	Musta	Medium	36 - 42 cm	36 - 42 cm	43 - 51 cm
28059	Avattava malli	Musta	Large	40 - 46 cm	40 - 46 cm	47 - 55 cm
28059	Avattava malli	Musta	X-Large	44 - 50 cm	44 - 50 cm	51 - 60 cm
28059	Avattava malli	Musta	XX-Large	48 - 55 cm	48 - 55 cm	56 - 65 cm
28059	Avattava malli	Musta	XXX-Large	54 - 61 cm	54 - 61 cm	61 - 71 cm

Elcross kietaisumalli

Kietaisumalli, jossa on patella-aukko ja avoin polvitaive. Mallissa on integroidut, tuen ympäri menevät nauhat ja tarrakiinnitys, mikä helpottaa pukemista. Tuessa on yksinkertaiset, nivelelliset kiskot. Elcrossin sisäpuoli on pehmeää puuvillaa ja ulkopuoli polyesteriä.

Käyttöalueet: Lievä polvinivelen instabiliteetti ja polvinivelen kiputilat.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28124	Beige	Small	31-37 cm	Bilat.
28124	Beige	Medium	37-43 cm	Bilat.
28124	Beige	Large	43-49 cm	Bilat.
28124	Beige	X-Large	49-55 cm	Bilat.



Mitta: Polven ympärys patellan keskikohdasta

Gripper™ hinged knee -polvituki

Kietaisumalli, jossa on aukot patellan ja polvitaipteen kohdilla. Mallissa on integroidut tuen ympäri menevät nauhat ja tarrakiinnitys, sekä metallikiskot vahvistetuissa taskuissa. Tuki on helppo pukea ja se on valmistettu hengittävästä materiaalista. Pohkeen yläosassa on liukumista estävää materiaalia, mikä estää tukea valumasta.

Käyttöalueet: Polvinivelen lievä instabiliteetti.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28128	Musta	X-Small	25-30 cm	Bilat.
28128	Musta	Small	30-35 cm	Bilat.
28128	Musta	Medium	35-40 cm	Bilat.
28128	Musta	Large	40-45 cm	Bilat.
28128	Musta	X-Large	45-50 cm	Bilat.
28128	Musta	XX-Large	50-55 cm	Bilat.
28128	Musta	XXX-Large	>55 cm	Bilat.



Mitta: Polven ympärys patellan keskikohdasta

Immobilisaatiotuki

Polyestervelourista valmistettu immobilisaatiotuki, jossa on sisäänrakennetut kiskot polven stabiloimiseksi. Tuki on valmistettu useasta eri osasta, jotta ympärysmittan säätäminen olisi mahdollisimman helppoa. Tarranauhakiinnitys ja D-lenkit. Avoin patellan kohdalta.

Löytyy sekä aikuisten että lasten koossa.

Käyttöalueet: Postoperatiivinen käyttö, lihas- ja ligamenttivammat, kipsauksen jälkeen ja yksinkertainen seisontaharjoittelu.

Tuotenro.	Koko	Mitta 1	Mitta 2	Pituus	Vas/Oik
28655	Lapsi	43-46 cm	28-34 cm	45 cm	Bilat.
28655	Aikuinen	46-51 cm	34-41 cm	50 cm	Bilat.



Mitta 1: Ympärysmitta 15 cm patellan keskikohdan yläpuolelta

Mitta 2: Polven ympärysmitta patellan keskikohdasta.



Mitta 1: Ortoosin pituus

Mitta 2: Reiden ympärys

Mitta 3: Pohkeen ympärys



Polven immobilisaatituki

Immobilisaatituki on tarkoitettu polven tilapäiseen immobilisaatioon. Sitä voidaan myös käyttää kevyenä seisonnan tukena. Tukea on saatavana kahta eri pituutta. Parhaan istuvuuden saavuttamiseksi voidaan ympärysmittaa säätää siirtämällä tuen molempia sivuosia eteen-/taaksepäin. Dorsaaliset tukilastat voidaan varovasti taivuttaa haluttuun fleksioon.

Käyttöalueet: Tilapäiseen polven immobilisaatioon ja lievänä seisonnan tukena. Posttraumaattinen ja Post-operatiivinen käyttö.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta 1	Mitta 2	Mitta 3
47500	Vaalean harmaa	Small/Medium	51 cm	39-60 cm	30-45 cm
47500	Vaalean harmaa	Large/X-Large	60 cm	47-73 cm	34-47 cm

OACTIVE® 2

Unilateraalinen polviortoosi polviartroosin hoitoon. Joustava, yksinkertainen ja kevyt rakenne. Valmistettu alumiinista. Ortoosissa on innovatiivinen solkisysteemi, joka auttaa ortoosin pukemisessa ja riisumisessa. OACTIVE® 2 mallissa on vain yksi koko, joko oikeaan tai vasempaan jalkaan.

Ainutlaatuinen Q-nivel säädetään vasta- tai myötäpäivään keventämisen lisäämiseksi. Aloita neutraaliasennossa, polven ollessa koukistettuna 90°:ssa, ja kierrä 1/8 kierrosta kerrallaan. OACTIVE® 2 voidaan myös asettaa rajoittamaan extension ja fleksion liikelaajuutta toisistaan riippumatta. Ortoosi voidaan säätää myös vapaasti liikkuvaksi. Toimitettaessa ortoosissa on 5° ojennusrajoitus asennettuna. Ortoosi toimitetaan ohjein eri fleksio- ja extensiorajoittimille.

Käyttöalueet: Lievästä vaikeaan toispuoleiseen polviartroosiin. Mediaalinen tai lateraalinen.

Kontraindikaatiot: Katso käyttöohje.

Muuta: OACTIVE® 2:n painoraja on maksimissaan 135 kg.

Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik
55000	OACTIVE 2	Yksi koko	Vas/Oik
55012	Remmisetti (ilman solkea)	Yksi koko	Vas/Oik
55013	Pehmuste setti	Yksi koko	Vas/Oik
55014	Kiinnitysside	61 cm	
55014	Kiinnitysside	81 cm	

Catalyst Propel™ OA

Tämä nelipiste-polviortoosi on tarkoitettu lievistä vaikeaan polviartroosiin, jossa on polven instabiliteettiä tai loukkaantumisen jälkeen vähentämään niveleeseen kohdistuvaa räsytystä. Ortoosissa on ainutlaatuinen Active Thigh Cuff™ (ATC) ratkaisu reiden etupuolella. Tämä on joustava ja vahva reisimansetti, joka mahdollistaa jouston. Tämä antaa suojaa ja mukavuutta myötäilemällä lihasten liikkeitä koko liikkeen ajan. Korkealaatuinen vahva, mutta matala profiili antaa parhaan mahdollisen suojan.

Ortoosin Q-nivel säädetään myötä- tai vastapäivään halutun kevennyksen saamiseksi. Aloita neutraaliasennossa, polven ollessa koukistettuna 90 °:ssa ja kierrä 1/8 kierrosta kerrallaan. Ortoosi toimitetaan ohjein eri fleksio- ja extensiorajoittimille. Catalyst Propel™ OA voidaan asettaa rajoittamaan extension ja fleksion liikelaajuutta toisistaan riippumatta. Ortoosi voidaan säätää myös vapaasti liikkuvaksi. Toimitettaessa ortoosissa on 5° ojennusrajoitus asennettuna. Ortoosi toimitetaan ohjein eri fleksio- ja extensiorajoituksille.

Käyttöalueet: Lievästä vaikeaan toispuoleiseen polviartroosiin, joka yhdistyy polven instabiliteettiin. Loukkaantumisen jälkeen vähentämään niveleeseen kohdistuvaa räsytystä.

Kontraindikaatiot: Katso käyttöohje.

Tuotenro.	Malli	Koko	Mitta 1	Mitta 2	Mitta 3	Vas/Oik
5500I	Catalyst Propel™ OA	Small	29-33 cm	29-33 cm	37-43 cm	Vas/Oik
5500I	Catalyst Propel™ OA	Medium	33- 37 cm	33-38 cm	43-49 cm	Vas/Oik
5500I	Catalyst Propel™ OA	Large	37-42 cm	38-43 cm	49-57 cm	Vas/Oik
5500I	Catalyst Propel™ OA	X-Large	42-47 cm	43-48 cm	57-65 cm	Vas/Oik
5500I	Catalyst Propel™ OA	XX-Large	47-56 cm	48-56 cm	65-76 cm	Vas/Oik
55009	Pehmuste setti	Small				Vas/Oik
55009	Pehmuste setti	Medium				Vas/Oik
55009	Pehmuste setti	Large				Vas/Oik
55009	Pehmuste setti	X-Large				Vas/Oik
55009	Pehmuste setti	XX-Large				Vas/Oik
55010	Remmisetti	Small				
55010	Remmisetti	Medium				
55010	Remmisetti	Large				
55010	Remmisetti	Large				
55010	Remmisetti	XX-Large				
5501I	PCL Strap	35 cm				
5501I	PCL Remmi	43 cm				
5501I	PCL Remmi	50 cm				



Mitta 1: Ympärysmitta (15 cm patellan keskikohdan alapuolelta).

Mitta 2: Polven ympäryys patellan keskikohdasta.

Mitta 3: Ympärysmitta (15 cm patellan keskikohdan yläpuolelta).



Mitta 1: Ympärysmitta (15 cm patellan keskikohdan alapuolelta).

Mitta 2: Polven ympärysmitta patellan keskikohdasta.

Mitta 3: Ympärysmitta (15 cm patellan keskikohdan yläpuolelta).

FreeFlex™ OA

Tekstiilinen OA-ortoosi on tarkoitettu lievästä keskivaikeaan polviartroosiin.

Ortoosi on avoin ympärökiedottava malli, jossa on nivel yhdellä sivulla. Sama ortoosi toimii sekä mediaalisella että lateraalaisella puolella. Mediaalinen oikea muuntuu lateraaliseksi vasemmaksi. Ainutlaatuinen Q-nivel säädetään myötä- tai vastapäivään halutun tuen saamiseksi. Aloita neutraaliasennossa, polven ollessa koukistettuna 90°:ssa ja kierrä 1/8 kierrosta kerrallaan. Ortoosi toimitetaan ohjein eri fleksio- ja extensiorajoituksille.

FreeFlex™ OA voidaan myös asettaa rajoittamaan extension ja fleksion liikelaajuutta toisistaan riippumatta. Ortoosi voidaan säätää myös vapaalle liikkeelle. Toimitettaessa ortoosissa on 5° ojennusrajoitus asennettuna.

Käyttöalueet: Lievästä vaikeaan toispuoleiseen polviartroosiin, joka yhdistyy polven instabiliteettiin. Loukkaantumisen jälkeen vähentämään niveleeseen kohdistuvaa rasitusta.

Kontraindikaatiot: Katso käyttöohje.

Muuta: Ortoosi vasemmalle = Vasen mediaalinen/oikea lateraalinen Ortoosi oikealle = Oikea mediaalinen/vasen lateraalinen

Tuotenro.	Malli	Koko	Mitta 1	Mitta 2	Mitta 3	Vas/Oik
55002	FreeFlex™ OA	XS/S	>29-33 cm	>29-33 cm	>37-43 cm	Vas/Oik
55002	FreeFlex™ OA	M/L	33-42 cm	33-43 cm	43-57 cm	Vas/Oik
55002	FreeFlex™ OA	XL/XXL	42-56 cm	43-56 cm	57-76 cm	Vas/Oik

Catalyst Propel™ ATC

Nelipisteisellä ligamenttiortoosilla on kaikki toivotut toiminnot aktiiviselle käyttäjälle. Patentoidussa Active Thigh Cuff (ATC):ssa on joustava ja vahva tuplareisimansetti, joka myötäilee liikkeitä parhaalla mahdollisella tavalla. Vahva ja mukava tuki, joka mahdollistaa lihasten toiminnan koko liikkeen ajan. Ortoosi on valmistettu korkealaatuisesta matalaprofiilisesta alumiinista. Kiskoja voidaan muokata optimaalisen istuvuuden saavuttamiseksi. Kaareva runko asettuu pohkeen etupuolelle.

Catalyst Propel™ ATC voidaan asettaa rajoittamaan extension ja fleksion liikelaajuutta toisistaan riippumatta. Ortoosi voidaan säätää myös vapaalle liikkeelle. Toimitettaessa ortoosissa on 5° ojennusrajoitus asennettuna.

Käyttöalueet: ACL:n, MCL:n, PCL:n ja LCL:N stabilisointi tai hoito mikäli useamman ligamentin instabiliteettiä. Lisätukena leikkauksen jälkeen. Ligamenttivammojen konservatiiviseen hoitoon. Ennakoivasti kovien aktiviteettien yhteydessä.

Kontraindikaatiot: Katso käyttöohje.

Tuotenro.	Malli	Koko	Mitta 1	Mitta 2	Mitta 3	Vas/Oik
55003	Catalyst Propel™ ATC	Small	29-33 cm	29-33 cm	37-43 cm	Vas/Oik
55003	Catalyst Propel™ ATC	Medium	33-37 cm	33-38 cm	43-49 cm	Vas/Oik
55003	Catalyst Propel™ ATC	Large	37-42 cm	38-43 cm	49-57 cm	Vas/Oik
55003	Catalyst Propel™ ATC	X-Large	42-47 cm	43-48 cm	57-65 cm	Vas/Oik
55003	Catalyst Propel™ ATC	XX-Large	47-56 cm	48-56 cm	65-76 cm	Vas/Oik
55008	Pehmuste setti	Small				Vas/Oik
55008	Pehmuste setti	Medium				Vas/Oik
55008	Pehmuste setti	Large				Vas/Oik
55008	Pehmuste setti	X-Large				Vas/Oik
55008	Pehmuste setti	XX-Large				Vas/Oik
55010	Remmisetti	Small				
55010	Remmisetti	Medium				
55010	Remmisetti	Large				
55010	Remmisetti	X-Large				
55010	Remmisetti	XX-Large				
55011	PCL Remmi	35 cm				
55011	PCL Remmi	43 cm				
55011	PCL Remmi	50 cm				



Mitta: Mitta 1: Ympärysmitta (15 cm patellan keskikohdan alapuolelta).

Mitta 2: Polven ympäryys patellan keskikohdasta.

Mitta 3: Ympärysmitta (15 cm patellan keskikohdan yläpuolelta).



Mitta: Mitta 1: Ympärysmitta (15 cm patellan keskikohdan alapuolelta).

Mitta 2: Polven ympärysmitta patellan keskikohdasta.

Mitta 3: Ympärysmitta (15 cm patellan keskikohdan yläpuolelta).

Catalyst Propel™ Rigid Top

Nelipisteisellä ligamenttiortoosilla on kaikki toivotut toiminnot aktiiviselle käyttäjälle. Ortoosi on valmistettu korkealaatuisesta matalaprofiilisesta alumiinista. Kiskoja voidaan muokata optimaalisen istuvuuden saavuttamiseksi. Catalyst Propel™ Rigid Top:n kaareva runko asettuu reiden ja säären etupinnalle.

Catalyst Propel™ Rigid Top voidaan asettaa rajoittamaan extension ja fleksion liikelaajuutta toisistaan riippumatta. Ortoosi voidaan säätää myös vapaalle liikkeelle. Toimitettaessa ortoosissa on 5° ojennusrajoitus asennettuna.

Käyttöalueet: ACL:n, MCL:n, PCL:n ja LCL:n stabilisointi tai hoito mikäli useamman ligamentin instabiliteettiä. Lisätukena leikkauksen jälkeen.

Ligamenttivammojen konservatiiviseen hoitoon. Ennakoivasti kovien aktiviteettien yhteydessä.

Kontraindikaatiot: Katso käyttöohje.

Tuotenro.	Malli	Koko	Mitta 1	Mitta 2	Mitta 3	Vas/Oik
55004	Catalyst Propel™ Rigid Top	Small	29-33 cm	29-33 cm	37-43 cm	Vas/Oik
55004	Catalyst Propel™ Rigid Top	Medium	33-37 cm	33-38 cm	43-49 cm	Vas/Oik
55004	Catalyst Propel™ Rigid Top	Large	37-42 cm	38-43 cm	49-57 cm	Vas/Oik
55004	Catalyst Propel™ Rigid Top	X-Large	42-47 cm	43-48 cm	57-65 cm	Vas/Oik
55004	Catalyst Propel™ Rigid Top	XX-Large	47-56 cm	48-56 cm	65-76 cm	Vas/Oik
55009	Pehmuste setti	Small				Vas/Oik
55009	Pehmuste setti	Medium				Vas/Oik
55009	Pehmuste setti	Large				Vas/Oik
55009	Pehmuste setti	X-Large				Vas/Oik
55009	Pehmuste setti	XX-Large				Vas/Oik
55010	Remmisetti	Small				
55010	Remmisetti	Medium				
55010	Remmisetti	Large				
55010	Remmisetti	X-Large				
55010	Remmisetti	XX-Large				
55011	PCL Remmi	35 cm				
55011	PCL Remmi	43 cm				
55011	PCL Remmi	50 cm				

Catalyst Elite™ ATC

Nelipisteisellä ligamenttiortoosilla on kaikki toivotut toiminnot aktiiviselle käyttäjälle. Patentoidussa Active Thigh Cuff (ATC):ssa on joustava ja vahva tuplareisimansetti, joka antaa parhaan mahdollisen jouston. Vahva ja mukava tuki, joka mahdollistaa lihasten toiminnan koko liikkeen ajan. Ortoosi on valmistettu korkealaatuisesta matalaprofilisesta alumiinista. Kiskoja voidaan muokata optimaalisen istuvuuden saavuttamiseksi. Catalyst Elite™ ATC:n kaareva runko asettuu pohkeen takapinnalle.

Catalyst Elite™ ATC voidaan asettaa rajoittamaan extension ja fleksion liikelajuuutta toisistaan riippumatta. Ortoosi voidaan säätää myös vapaalle liikkeelle. Toimitettaessa ortoosissa on 5° ojennusrajoitus asennettuna.

Käyttöalueet: ACL:n, MCL:n, PCL:n ja LCL:n stabilisointi tai hoito mikäli lisäksi ligamentti-instabiliteettiä. Lisätukena leikkauksen jälkeen. Ligamenttivammojen konservatiiviseen hoitoon. Ennakoivasti kovien aktiviteettien yhteydessä.

Kontraindikaatiot: Katso käyttöohje.

Tuotenro.	Malli	Koko	Mitta 1	Mitta 2	Mitta 3	Vas/Oik
55005	Catalyst Elite™ ATC	Small	29-33 cm	29-33 cm	37-43 cm	Vas/Oik
55005	Catalyst Elite™ ATC	Medium	33-37 cm	33-38 cm	43-49 cm	Vas/Oik
55005	Catalyst Elite™ ATC	Large	37-42 cm	38-43 cm	49-57 cm	Vas/Oik
55005	Catalyst Elite™ ATC	X-Large	42-47 cm	43-48 cm	57-65 cm	Vas/Oik
55005	Catalyst Elite™ ATC	XX-Large	47-56 cm	48-56 cm	65-76 cm	Vas/Oik
55008	Pehmuste setti	Small				Vas/Oik
55008	Pehmuste setti	Medium				Vas/Oik
55008	Pehmuste setti	Large				Vas/Oik
55008	Pehmuste setti	X-Large				Vas/Oik
55008	Pehmuste setti	XX-Large				Vas/Oik
55010	Remmisetti	Small				
55010	Remmisetti	Medium				
55010	Remmisetti	Large				
55010	Remmisetti	X-Large				
55010	Remmisetti	XX-Large				
55011	PCL Remmi	35 cm				
55011	PCL Remmi	43 cm				
55011	PCL Remmi	50 cm				



Mitta 1: Ympärysmitta (15 cm patellan keskikohdan alapuolelta).

Mitta 2: Polven ympäryys patellan keskikohdasta.

Mitta 3: Ympärysmitta (15 cm patellan keskikohdan yläpuolelta).



Mitta 1: Ympärysmitta (15 cm patellan keskikohdan alapuolelta).

Mitta 2: Polven ympäryys patellan keskikohdasta.

Mitta 3: Ympärysmitta (15 cm patellan keskikohdan yläpuolelta).

Catalyst Elite™ Rigid Top

Nelipisteisellä ligamenttiortoosilla on kaikki toivotut toiminnot aktiiviselle käyttäjälle. Ortoosi on valmistettu korkealaatuisesta matalaprofiilisesta alumiinista. Kiskoja voidaan muokata optimaalisen istuvuuden saavuttamiseksi. Catalyst Elite™ Rigid Topin kaareva runko asettuu reiden etupinnalle ja pohkeen takapinnalle.

Catalyst Elite™ Rigid Top voidaan asettaa rajoittamaan extension ja fleksion liikelaajuutta toisistaan riippumatta. Ortoosi voidaan säätää myös vapaalle liikkeelle. Toimitettaessa ortoosissa on 5° ojennusrajoitus asennettuna.

Käyttöalueet: ACL:n, MCL:n, PCL:n ja LCL:n stabilisointi tai hoito mikäli useamman ligamentin instabiliteettiä. Lisätukena leikkauksen jälkeen. Ligamenttivammojen konservatiiviseen hoitoon. Ennakoivasti kovien aktiviteettien yhteydessä.

Kontraindikaatiot: Katso käyttöohje.

Tuotenro.	Malli	Koko	Mitta 1	Mitta 2	Mitta 3	Vas/Oik
55006	Catalyst Elite™ Rigid Top	Small	29-33 cm	29-33	37-43 cm	Vas/Oik
55006	Catalyst Elite™ Rigid Top	Medium	33-37 cm	33-38 cm	43-49 cm	Vas/Oik
55006	Catalyst Elite™ Rigid Top	Large	37-42 cm	38-43 cm	49-57 cm	Vas/Oik
55006	Catalyst Elite™ Rigid Top	X-Large	42-47 cm	43-48 cm	57-65 cm	Vas/Oik
55006	Catalyst Elite™ Rigid Top	XX-Large	47-56 cm	48-56 cm	65-76 cm	Vas/Oik
55009	Pehmuste setti	Small				Vas/Oik
55009	Pehmuste setti	Medium				Vas/Oik
55009	Pehmuste setti	Large				Vas/Oik
55009	Pehmuste setti	X-Large				Vas/Oik
55009	Pehmuste setti	XX-Large				Vas/Oik
55010	Remmisetti	Small				
55010	Remmisetti	Medium				
55010	Remmisetti	Large				
55010	Remmisetti	X-Large				
55010	Remmisetti	XX-Large				
55011	PCL Remmi	35 cm				
55011	PCL Remmi	43 cm				
55011	PCL Remmi	50 cm				

Catalyst Propel™ R.O.M.ATC

Catalyst Propel R.O.M.ATC on kehitetty toimimaan myös postoperatiivisena ortoosina. Nivelen liikeradan helppokäyttöisen säätämisen lisäksi sillä on samat ominaisuudet ja toiminnot kuin Catalyst Propel ligamenttiortoosilla. R.O.M-ortoosia on saatavilla ainoastaan patentoidulla Active Thigh Cuff (ATC)-ominaisuudella, jossa joustava ja vahva reisimansetti myötäilee liikkeitä. Tukevana ja mukavan tuntuksena se antaa lihaksille tukea koko liikkeen ajan. Ortoosi on valmistettu matalaprofilisestä korkealaatuisesta alumiinista. Raamia voidaan muokata. Catalyst Propel™ R.O.M.ATC:n kaareva runko on säären etupinnalla.

Catalyst Propel™ ROMATC voidaan lukita kiinteään asentoon 0°, 15°, 30°, 60° tai 90° asteissa tai asettaa liikerajoitin asteiden 0°, 15°, 30°, 60° ja 90° väliin.

Käyttöalueet: Soveltuu post.operatiiviseen tuentaan.ACL:n, MCL:n ,PCL:n ja LCL:n stabilisointi tai hoito mikäli useamman ligamentin instabiliteettiä. Ligamenttivammojen konservatiiviseen hoitoon.



Mitta 1: Ympärysmitta (15 cm patellan keskikohdan alapuolelta).

Mitta 2: Polven ympäryys patellan keskikohdasta.

Mitta 3: Ympärysmitta (15 cm patellan keskikohdan yläpuolelta).

Tuotenro.	Malli	Koko	Mitta 1	Mitta 2	Mitta 3	Vas/Oik
55007	Catalyst Propel™ R.O.M.ATC	Small	29-33 cm	29-33 cm	37-43 cm	Vas/Oik
55007	Catalyst Propel™ R.O.M.ATC	Medium	33-37 cm	33-38 cm	43-49 cm	Vas/Oik
55007	Catalyst Propel™ R.O.M.ATC	Large	37-42 cm	38-43 cm	49-57 cm	Vas/Oik
55007	Catalyst Propel™ R.O.M.ATC	X-Large	42-47 cm	43-48 cm	57-65 cm	Vas/Oik
55007	Catalyst Propel™ R.O.M.ATC	XX-Large	47-56 cm	48-56 cm	65-76 cm	Vas/Oik
55008	Lisäpehmuste	Small				Vas/Oik
55008	Lisäpehmuste	Medium				Vas/Oik
55008	Lisäpehmuste	Large				Vas/Oik
55008	Lisäpehmuste	X-Large				Vas/Oik
55008	Lisäpehmuste	XX-Large				Vas/Oik
55010	Lisänauhat	Small				
55010	Lisänauhat	Medium				
55010	Lisänauhat	Large				
55010	Lisänauhat	X-Large				
55010	Lisänauhat	XX-Large				



Mitta: Polven ympärys patellan keskikohdasta



Mitta: Polven leveys M-L patellan keskikohdasta

Swedish Knee-hyperextensionstuki

Alumiinista valmistettu hyperextensionstuki polvinivelen instabiliteettiin. Nauhat ovat puuvillaa. Yksinkertainen rakenne, säädettävä pehmuste ja taivutettavat sivuraudat. Tuessa ei ole mekaanista polviniveltä, joka estää hyperextensionia.

Käyttöalueet: Polvinivelen hyperextension.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28668	Valkoinen	Small/Medium	28 - 38 cm	Bilat.
28668	Valkoinen	Medium/Large	38 - 53 cm	Bilat.
28669	Varaosasetti sis. nauhat ja ruuvit	Small/Medium		Bilat.
28669	Varaosasetti sis. nauhat ja ruuvit	Medium/Large		Bilat.

CHECK™ stainless steel

Mukava polviortoosi, joka on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ehkäisee hyperextensionia ja tukee instabiilia polviniveltä. Pituutensa ansiosta reiteen ja sääreen kohdistuva paine on vähäistä ja ortoosi on mukava päällä. Koska rakenne on matala, tukea voi käyttää vaatteiden alla. Pehmuste on päällystetty tekonahalla. Sisäpuoli on pehmeää velouria. Mukana tulevat, kiinnitystä helpottavat D-lenkit voidaan kiinnittää kummalle puolelle tahansa. Ortoosissa on kondyyliytynyt.

Käyttöalueet: Check Stainless steel on tarkoitettu ehkäisemään polvinivelen hyperextensionia ja instabiliteettia. Ortoosin indikaatiot ovat: Genu recurvatum, ligamentti-instabiliteetti, varus-/valgusinstabiliteetti, neurologiset vammat/sairaudet, jotka aiheuttavat heikkoutta Musculus Quadricepsissa.

Kontraindikaatiot: Ortoosia ei ole tarkoitettu urheilukäyttöön.

Tuotenro.	Väri	Mitta	Pituus	Vas/Oik
28652	Musta	9-13 cm	45 cm	Bilat.
28651	Pehmuste + nauhat			
28653	D-lenkit 4 kpl			

ToeOFF® Combo

Combo on ortoosiosa, joka on kehitetty erityisesti polven hyperekstension ehkäisyyn, kun siihen liittyy riippunilkka. Combo on jatkokappale, joka asennetaan ToeOFF®- tai BlueROCKER®-ortoosiin. Combo-osa on helppo irrottaa riippunilkaortoosista innovatiivisen rakenteensa ansiosta.

Käyttöalueet: Polvinivelen instabiliteetti, yliojennus yhdistettynä riippunilkaan, joka johtuu halvauksesta, post-poliosta, MS-taudista, neuropatiasta tms. Potilaan paino enintään 150 kg. Potilaan pituus enintään 2 m.

Kontraindikaatiot: Polven ligamenttien totaalinen puuttuminen. Nelipäisen reisilihaksen täydellinen toiminnan puutos. Asiakas yli 2 metriä pitkä. Asiakkaan paino yli 150 kg. Kognitiivinen kyky merkittävästi heikentynyt. Huom: Kun sovitusta on tehty, ortoosissa ei saa olla yliojennusta jäljellä enempää kuin 10°.



Mitta: Mitta 1: Polvimitta M-L patellan keskikohdasta
Mitta 2: Ympärysmitta 20 cm patellan keskikohdan yläpuolelta
Mitta 3: M-L 20 cm patellan keskikohdan yläpuolelta

Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik	Polvimitta 2	Polvimitta 3	Polvimitta 1
28780	Ortoosinivel kiskoilla (pari)	Yksi koko				
28781	Reisiosa	Small	Vas/Oik		30-40 cm	11-15 cm
28781	Reisiosa	Medium	Vas/Oik		38-50 cm	13-17 cm
28781	Reisiosa	Large	Vas/Oik		48-60 cm	15-19 cm
28781	Reisiosa	X-Large	Vas/Oik		58-70 cm	17-21 cm
28782	Polven takaosan kangas solkineen	Small	Bilat.	7-10,5 cm		
28782	Polven takaosan kangas solkineen	Medium	Bilat.	9,5-13 cm		
28782	Polven takaosan kangas solkineen	Large	Bilat.	12,5-16 cm		
28783	SoftKIT (2 kpl)	Small				
28783	SoftKIT (2 kpl)	Medium				
28783	SoftKIT (2 kpl)	Large				
28783	SoftKIT (2 kpl)	X-Large				
28784	Tibian liitäntäosa	Small				
28784	Tibian liitäntäosa	Medium				
28784	Tibian liitäntäosa	L-XL				



Ascender® post-op polviortoosi

Ascender® on teleskooppinen postoperatiivinen polviortoosi, jonka ekstension liikeradan säätöväli on -10° (hyperekstensio) ja 70°:en välissä. Fleksion säätöväli voidaan asettaa -10° och 120°:n välille. Asetus säädetään yksinkertaisesti vetämällä ja siirtämällä stopparia nivelessä. Nivel voidaan lukita viiteen eri asentoon: -10° (hyperekstensio), 0° (neutraali), 10°, 20° ja 30° (fleksio). Nivelen säädöt voidaan varmistaa "Anti-tamper lukituksella" stopparin päällä. Tämä poistetaan saksilla leikkaamalla.

Kiskot voidaan säätää yksilöllisesti toivottuun pituuteen. Pituuden säätämiseksi tulee avata hakanen, joka on jokaisessa kiskossa erikseen. Kiskossa on selkeät merkinnät, joilla varmistetaan sekä lateraalisen että mediaalisen kiskon sama pituus.

Pehmeässä ja taipuisassa pehmusteessa on sisäpuolella liukumisen estävää materiaalia. Nauha kiinnitetään lukitusklipsillä sen pysymiseksi paikallaan sovituksessa. Ortoosi suljetaan vahvoilla soljilla. Nauhan pituutta voidaan säätää poistamalla Y-kiinnitys ja leikkaamalla nauha toivottuun pituuteen. Pehmuste ja nauha voidaan pestä käsin haaleassa vedessä miedolla pesuaineella. Malli on bilateraalinen ja sopii siten käytettäväksi sekä vasempaan että oikeaan jalkaan. Yksi koko.

Käyttöalueet: Postoperatiivinen käyttö.

Tuotenro.	Malli	Koko	Pituus	Vas/Oik
47540	Ascender post-op polviortoosi	Yksi koko	44 – 70 cm	Bilat.
47541	Pehmuste- ja nauhasetti	Yksi koko		Bilat.
47542	Lisäpehmustesetti	Yksi koko		Bilat.
47543	Lisänauhasetti	Yksi koko		Bilat.



E-SENSE ROM post-op polviortoosi

Tässä ainutlaatuisessa postoperatiivisessa polviortoosissa on pituussäädettävät sivukiskot, jotka voidaan säätää toivotulle korkeudella 46 ja 69 cm:n väliin. Nivel on asennettavissa toivottuun liikelaajuuteen. Fleksio on 0° - 120° intervallin ollessa 10° ja ekstensio puolestaan 0°-90° myös 10° intervallilla. Nivel voidaan lukita yksinkertaisesti nappia painamalla 0°:aan, 15°:een ja 30°:een asteeseen.

Pehmuste on valmistettu hengittävästä, "non-slip" materiaalista. Materiaalin rakenne mahdollistaa pehmusteen liukumattomuuden jalassa.

Vain yksi koko, joka sopii sekä oikealle että vasemmalle. Asetuksiin ei tarvitse erillistä työkalua. Kiinnitysnauhoissa on tuplalukitus - sekä muovisella koukulla että tarranauhalla.

Käyttöalueet: Postoperatiivinen käyttö.

Tuotenro.	Malli	Koko	Mitta	Vas/Oik
47522	E-SENSE ROM post-op polviortoosi	Yksi koko	46 - 69 cm	Bilat.
47523	Lisäpehmuste	Yksi koko		Bilat.

Postoperatiivinen ROM polviortoosi

Yhdenkoon postoperatiivinen polviortoosi, jossa sopivaan kokoon leikattava pehmuste. Pehmuste ei lähde purkautumaan leikatessa. Ortoosissa on metallikiskot, jotka voidaan muotoilla yksilöllisesti. Miellyttävä ja ilmava ortoosi kiinnitetään ympäri kulkevien tarranauhojen avulla. Kotelon sisällä olevaa kaksiakselista niveltä on helppo säätää nastoilla, jotka on häviämisen minimoimiseksi kiinnitetty kuminauhalla. Nivelen säätöjen jälkeen, nivelkotelon kansi lukitaan ruuvilla, jolloin liikerata saadaan pysymään valitussa asennossa. Nivelrajoitus voidaan asettaa haluttuun kulmaan fleksiossa (10°, 15°, 30°, 50°, 70°, 90°, 110°) ja ekstensiossa (5°, 10°, 15°, 30°, 50°, 70°, 90°, 110°). Tuotteesta on saatavilla lyhyt ja pitkä malli.

Käyttöalueet: Polvinivelen liikkuvuuden (fleksio/ekstensio) rajoittaminen postoperatiivisesti / posttraumaattisesti.



UUTUUS!

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Pituus
28308	Postoperatiivinen polviortoosi, lyhyt	Tummansininen	Yksi koko	40 cm
28309	Postoperatiivinen polviortoosi, pitkä	Tummansininen	Yksi koko	60 cm
28311	Lisänauhat 28308 lyhyt	Tummansininen	Yksi koko	
28312	Lisänauhat 28309 pitkä	Tummansininen	Yksi koko	
28313	Lisäpehmuste 28308 lyhyt	Tummansininen	Yksi koko	
28314	Lisäpehmuste 28309 pitkä	Tummansininen	Yksi koko	

[illegible]



Lonkkaortoosit

www.camp.fi



NewCamp-lonkkaortoosi

Tukeva lonkkaortoosi, jossa on alumiinikisko. Ortoosin lantio- ja reisosat kiinnitetään toisiinsa säädettävällä nivelellä. Mahdollisuus säätää fleksiota ja ekstensiota sekä abduktiota. Ortoosin joustava lantio-osa mahdollistaa käytön sekä naisilla että miehillä. Vaihdeettava pehmuste, joka kiinnitetään tarranauhalla.

Käyttöalueet: Käytetään pre- ja postoperatiivisesti sekä välttämään lonkkanivelen dislokaatiota primäärin tai korjaavan lonkka-artroplastian jälkeen.

Muuta: Muista tilata sekä lantio-osa että reisosia (myydään erikseen).

Tuotenro.	Malli	Koko	Vyötärön ympärys	Vas/Oik	Reiden ympärys
28686	Lantio-osa + nivel	Small	60-90 cm	Bilat.	
28686	Lantio-osa + nivel	Large	80-110 cm	Bilat.	
28684	Reisiosa	Small		Bilat.	40-50 cm
28684	Reisiosa	Large		Bilat.	50-60 cm
28687	Lisäpehmuste lantio-osa	Small		Bilat.	
28687	Lisäpehmuste lantio-osa	Large		Bilat.	
28688	Lisäpehmuste reisiosa	Small		Bilat.	
28688	Lisäpehmuste reisiosa	Large		Bilat.	
28685	Varaosasetti lantio/reisi-osaan	Small		Nauhat ja ruuvit	
28685	Varaosasetti lantio/reisi-osaan	Large		Nauhat ja ruuvit	

Lerman Haro-lonkkaortoosi

Lonkkaortoosi, jossa on monia eri säätömahdollisuuksia. Ortoosin transversaalitason kiertoa, fleksiota ja ekstensiota sekä abduktiota ja adduktiota voidaan säätää. Ortoosi on valmistettu muovista ja siinä on teräksinen/alumiininen nivel. Sopii sekä naisille että miehille.

Käyttöalueet: Käytetään postoperatiivisesti.

Muuta: Lisäpehmuste voidaan ostaa erikseen.

Tuotenro.	Malli	Koko	Vyötärön ympäryys	Vas/Oik
62790	Lerman Haro	Small	70-80 cm	Vas/Oik
62790	Lerman Haro	Medium	85-90 cm	Vas/Oik
62790	Lerman Haro	Large	100-110 cm	Vas/Oik
62790	Lerman Haro	X-Large	115-125 cm	Vas/Oik
62791	Lisäpehmuste, lantio	Small		Vas/Oik
62791	Lisäpehmuste, lantio	Medium		Vas/Oik
62791	Lisäpehmuste, lantio	Large		Vas/Oik
62791	Lisäpehmuste, lantio	X-Large		Vas/Oik
62792	Lisäpehmuste, reisi	Small		Vas/Oik
62792	Lisäpehmuste, reisi	Medium		Vas/Oik
62792	Lisäpehmuste, reisi	Large/X-Large		Vas/Oik
62792	Lisäpehmuste, reisi	X-Large		Vas/Oik





Hip Flexion Assist Device - HFAD

HFAD on tarkoitettu Multipel Skleros (MS) tautia sairastaville henkilöille, joilla alaraajojen toiminta on heikentynyt. HFAD on tarkoitettu avustamaan sitä raajaa, jolla puolella tukea käytetään, parantamaan kävelysuoritusta sekä edistämään päivittäistä aktiiviteettitasoa. Ortoosi koostuu yhdestä mukavantuntuisesta lantionauhasta ja kahdesta joustavasta kenkiin kiinnitettävästä remmistä. Tuki auttaa lonkan, polven ja nilkan koukistusta. Tuennan tasoa voidaan helposti säätää käyttäjän tarpeiden mukaisesti. HFAD:ta voidaan käyttää tavallisten vaatteiden päällä tai löysien vaatteiden alla. HFAD voidaan tilata oikeaan tai vasempaan jalkaan tai kaksiosaisena.

Käyttöalueet: HFAD voi olla eduksi MS-potilaille, joilla on heikkoutta lonkan, polven tai nilkan koukistuksessa, rajoittunut rasituksen sieto ja mahdollisesti kävelystä aiheutuvaa uupumusta sekä vaikeuksia jalan nostamisessa. Kompensaatioliikkeissä, kuten lantion keikautus, alaraajan kiertoliikkeet ja/tai painon siirtämistä toiselle jalalle, kun on käytetty peroneustukea riippunilkan kompensoimiseksi, mutta on edelleen vaikeuksia kävellä johtuen heikkoudesta lonkan- ja polven koukistajissa tai kohonnut tonus, jolloin ortoosin avulla pystyvät rentoutumaan ja siten kävelemään paremmin.

Tuotenro.	Malli	Koko	Vyötärön ympärys	Vas/Oik
62784	Yksiosainen	Small	61-82 cm	Vas/Oik
62784	Yksiosainen	Medium	83-102 cm	Vas/Oik
62784	Yksiosainen	Large	103-122 cm	Vas/Oik
62783	Kaksiosainen	Small	61-82 cm	Bilat.
62783	Kaksiosainen	Medium	83-102 cm	Bilat.
62783	Kaksiosainen	Large	103-122 cm	Bilat.



Rotaationauha kiertoliikkeen kontrolloimiseen

Lantiovyö, jossa on alaraajojen voimakasta kiertoliikettä korjaava ja ehkäisevä nauha. Se auttaa normalisoimaan kävelyn hitaalla venytyksellä nilkasta lantioon. Nauha seuraa säärtä ja kiinnitys alhaalla jalkaterän ympärille.

Käyttöalueet: Neurologiset vammat ja alaraajojen heikkous.


Tuotenro.	Malli	Koko	Leveys	Funktio
53305	B	Lapsi B	5,1 cm	Kiertoliike ulos päin vasen sääri/kiertoliike sisään päin oikea sääri
53305	A	Lapsi A	5,1 cm	Kiertoliike ulos päin oikea sääri/kiertoliike sisään päin vasen sääri
53305	D	Aikuinen D	7,6 cm	Kiertoliike ulos päin vasen sääri/kiertoliike sisään päin oikea sääri
53305	C	Aikuinen C	7,6 cm	Kiertoliike ulos päin oikea sääri/kiertoliike sisään päin vasen sääri

S.W.A.S.H.®


oikea asento istuttaessa,
seisottaessa ja käveltäessä.



Istuma-asennossa, eli lonkkanivelet fleksiassa, ortoosi avaa lonkkaniveliä abduktioon ja varmistaa näin hyvän istumatasapainon ja vartalon pystyasennon. Tämä mahdollistaa paremman ryhdin ja toiminnallisuuden istuessa, jolloin lapsi voi vapaasti käyttää käsiään.

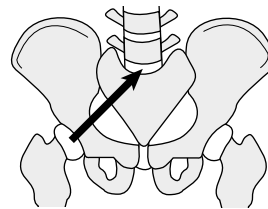

SWASH:in kanssa

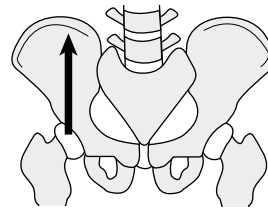

Ilman SWASH:ia

Tärkeimmät tavoitteet SWASH:in kehityksessä olivat:

1. Lisääntynyt lonkan abduktio: tavoitteena varovainen lähentäjähasten venytys ja lonkkanivelen asennon parantuminen.
2. Estää lonkan adduktio istuttaessa, seisottaessa ja käveltäessä.
3. Parantaa ryhtiä istuttaessa ja käveltäessä.
4. Mahdollistaa siirtymisen pystyasennosta istuutumiseen saman ortoosin avulla.

Hoido SWASH-ortoosin avulla on tiimityötä. On tärkeää, että koko tiimi osallistuu ortoosin sovittamiseen sekä asettaa hoidolle kohtuullisia tavoitteita. SWASH-ortoosin ainutlaatuinen rakenne korjaa lonkan asentoa. Se abdusoi riittävästi, jotta seisottaessa ja käveltäessä voidaan ehkäistä alaraajojen saksaminen ja rajata femurin sisärotaatiota.

S.W.A.S.H.®

oikea asento istuttaessa,
seisottaessa ja käveltäessä.




Valitse abduktiokulma

SWASH-ortoosiin on mahdollista valita kaksi eri abduktiokulmaa - toisessa suurempi abduktio, joka antaa leveämmän istuma-asennon ja toisessa pienempi abduktio, joka antaa hieman kapeamman istuma-asennon.



Pienempi abduktio - kiskot 115°

- Jos lapsi käyttää kapeaa pyörätuolia
- Jos adduktorit ovat erittäin kireät

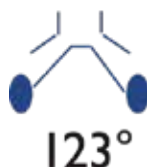

Suurempi abduktio - kiskot 123°

- Venyttää voimakkaammin lonkan lähentäjälihaksia istuttaessa.
- Parantaa pystyasentoa

Käyttöalueet:

- Spastinen hemiplegia
- Spastinen diplegia
- Spastinen quadriplegia
- Lonkkanivelen subluksaatiovaara
- Botox-hoidon yhteydessä
- Postoperatiivinen käyttö

Kontraindikaatiot

- Jos lonkka on mennyt sijoiltaan
- Suuremmat kuin 20° lonkan fleksiokontraktuurat
- Yölasta

Lisätietoa sovituksesta ja säädöistä löytyy SWASH Steady & Go Fitting Manualista.

Lisätietoa saat asiakaspalvelustamme

SWASH® STEADY Vyötäröosa

SWASH STEADY korvaa SWASH Classic ortoosin. Tuotetta on jatkokehitetty niin, että sen rakennetta ja ulkonäköä on parannettu. SWASHin tarkoitus on estää liiallinen lonkan adduktio istuessa, seisoessa ja kävellessä, joka on tyypillinen ongelma Cerebral pareesissa. Ortoosi on hyvä vaihtoehto kun halutaan estää saksavaa kävely. Tuki sallii liikkeen kaikilla kolmella liikkumistasoilla. Istuma-asennossa ortoosi avaa lonkkaniveliä varmistaen hyvän tasapainon sekä venyttäen adduktoreita.

Lantio-osa on polyetyleenä ja ulottuu L2/L3 tasolta häntäluun distaaliseen osaan antaen maksimaalisen tuen vartalolle ja lonkalle. Potilaat, joilla on heikko keskivartalon lihaksisto tai rajoittunut keskivartalon stabiileetti voivat hyötyä mallin tarjoamasta lisääntyneestä posteriorisesta ja lateraalista tuesta. STEADY:ssä on pehmeä ja kulutuskestävä pintamateriaali. Soljet ovat helppo- ja nopeakäyttöiset riisussa ja pukiessa. Koosta 2 kokoon 4 on lantion rakenteessa matala profiili. Reisitangon halkaisija on 6 mm koossa 1 ja 8mm koossa 2-4. Reisitankojen kulmat ovat 115° ja 123°.

Tuote vaatii reisitangon ja reisisosan ollakseen kokonainen.

Käyttöalueet: Cerebral pares ja saksava käynti tai instabiileetti istuessa liiallisen adduktion vuoksi, lonkan subluksaatio. Maksimaalisen hallinnan ollessa tarpeen; esim. potilas joka tarvitsee lihasvoimaa tai lisää keskivartalon hallintaa pystyäkseen istumaan suorassa. Kun potilas on primäärisesti liikkumaton.

Kontraindikaatiot: Dislokoitunut lonkka. Kun lonkan flexiokontraktuura on suurempi kuin 20 astetta (dynaaminen tai jäykistynyt). Kun adduktorien voima estää ortoosin käytön. Kun adduktorit ovat liian lyhyet ja estävät SWASH:n käytön istuessa.

Tuotenro.	Malli	Koko	Ympärysmitta
28852	STEADY Vyötäröosa	1	40-46,5 cm
28852	STEADY Vyötäröosa	2	46-55 cm
28852	STEADY Vyötäröosa	3	54-63 cm
28852	STEADY Vyötäröosa	4	62-72 cm



Mitta: Tutustu SWASH Sovitus manuaaliin saadaksesi lisätietoja mitoista.



SWASH® GO Vyötäröosa

SWASH® GO korvaa SWASH® Low Profile ortoosin. Tuotetta on jatkokehitetty niin, että sen rakennetta ja ulkonäköä on parannettu. SWASHin tarkoitus on estää liiallinen lonkan adduktio istuessa, seisoessa ja kävellessä, mikä on tyypillinen ongelma Cerebral pareesissa. Ortoosi on hyvä vaihtoehto saksaaalle kävelylle. Tuki sallii liikkeen kaikilla kolmella liikkumistasolla. Istuma-asennossa ortoosi avaa lonkkaniveliä varmistaen hyvän tasapainon ja samalla venyttäen adduktoreja.

SWASH® GO:ssa on matalampi lantio-osa taivutettavalla iliacatangolla. Sitä suositellaan potilaille, joilla on parempi vartalon hallinta ja aktiivisemmille käyttäjille, kuten esim. kävelijöille. SWASH® GO:n pintamateriaali on pehmeä ja kulutuskestävä. Solki on helppo ja nopeakäyttöinen riisuessa ja pukiessa. Reisitangon halkaisija on 8 mm kaikissa kuudessa koossa. Reisitankoa saa kulmilla 115° ja 123°. Tuote vaatii reisitangon ja reisisosan ollakseen kokonainen.

Käyttöalueet: Cerebral pares ja saksaa käynti tai instabiliateetti istuessa liiallisen adduktion vuoksi, lonkan subluksaatio. SWASH® GO on tarkoitettu potilaille, joilla on hyvä selän asennon hallinta, ja aktiivisemmille käyttäjille.

Tuotenro.	Malli	Koko	Ympärysmitta
28853	GO Vyötäröosa	1	40-46,5 cm
28853	GO Vyötäröosa	2	46-55 cm
28853	GO Vyötäröosa	3	54-63 cm
28853	GO Vyötäröosa	4	62-72 cm
28853	Go Vyötäröosa	5	71-81 cm
28853	Go Vyötäröosa	6	80-90 cm

SWASH® STEADY ja GO Reisiosa


Kokonaiseen SWASH® STEADY tai GO tuotteeseen tarvitaan vyötäröosa, reisiosa ja reisitanko.

Vyötärö- ja reisosassa on miellyttävän pehmeä ja kulutuskestävä päällysmateriaali sekä pikalukko/kiinnitys, joka on helpompi ja nopeakäyttöinen riisuutuessa ja pukeutuessa.

Koska reisitangolla on sama halkaisija kaikissa kokovaihtoehtoissa (poikkeuksena koko 1) on yksinkertaista yhdistää eri kokoja niin vyötäröosassa kuin reisosassa. Reisitangon halkaisija Steady ortoosin koossa 1 on 6 mm ja muissa 8 mm. Reisitangon kulmavaihtoehdot ovat 115° ja 123°.



Tuotenro.	Malli	Koko	Ympärysmitta
28854	STEADY Reisiosa	1	21-25 cm
28854	GO Reisiosa	1	21-25 cm
28854	STEADY & GO reisiosa	2	25-29 cm
28854	STEADY & GO reisiosa	3	29-33 cm
28854	STEADY & GO reisiosa	4	33-38 cm
28854	STEADY & GO reisiosa	5	38-44 cm
28854	STEADY ja GO Reisiosa	6	44-50 cm

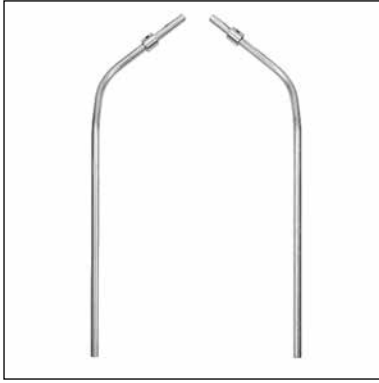

SWASH® STEADY ja GO Reisitanko

Kokonaiseen SWASH® STEADY tai GO tuotteeseen tarvitaan vyötäröosa, reisosia ja reisitanko.

Koska reisitangolla on sama halkaisija kaikissa kokovaihtoehtoissa (poikkeuksena koko 1) on yksinkertaista yhdistää eri kokoja niin vyötäröosassa kuin reisosassa.

Reisitanko on halkaisijaltaan 6 mm koossa 1. Koossa 2, 3 ja 4 on reisitanko halkaisiltaan 8 mm. Reisitangot ovat kulmissa 115° ja 123°

Tuotenro.	Malli	Koko	Pituus	Halkaisija
28855	STEADY Reisitankosetti 115°	1	31 cm	6 mm
28855	GO Reisitankosetti 115°	1	31 cm	8 mm
28855	STEADY & GO reisitankosetti 115°	2	37,5 cm	8 mm
28855	STEADY & GO reisitankosetti 115°	3	44 cm	8 mm
28855	STEADY & GO reisitankosetti 115°	4	48 cm	8 mm
28855	STEADY & GO reisitankosetti 115°	5	54 cm	8 mm
28855	STEADY & GO reisitankosetti 115°	6	60 cm	8 mm
28856	STEADY reisitankosetti 123°	1	31 cm	6 mm
28856	GO reisitankosetti 123°	1	31 cm	8 mm
28856	STEADY & GO reisitankosetti 123°	2	37,5 cm	8 mm
28856	STEADY og GO reisitankosetti 123°	3	44 cm	8 mm
28856	STEADY & GO reisitankosetti 123°	4	48 cm	8 mm
28856	STEADY & GO reisitankosetti 123°	5	54 cm	8 mm
28856	STEADY & GO reisitankosetti 123°	6	60 cm	8 mm


SWASH® STEADY ja GO Varusteet

SWASH® STEADY ja GO ortooseihin kuuluu erilaisia varusteita ja vaihtoehtoja, esim. tekstiilinen vyötäröosa, josta on kummallekin oma versio. Tekstiilinen reisisosa on yhteinen molemmille malleille. Vatsalevy on myös yhteinen komponentti sekä STEADY että GO-mallille. Lisäksi eri varusteita/varaosia voidaan tilata erikseen.



Tuotenro.	Malli	Koko	Pakkaus
28857	STEADY tekstiilinen vyötäröosa	1	1 setti
28857	STEADY tekstiilinen vyötäröosa	2	1 setti
28857	STEADY tekstiilinen vyötäröosa	3	1 setti
28857	STEADY tekstiilinen vyötäröosa	4	1 setti
28858	GO tekstiilinen vyötäröosa	1	1 setti
28858	GO tekstiilinen vyötäröosa	2	1 setti
28858	GO tekstiilinen vyötäröosa	3	1 setti
28858	GO tekstiilinen vyötäröosa	4	1 setti
28858	GO tekstiilinen vyötäröosa	5	1 setti
28858	GO tekstiilinen vyötäröosa	6	1 setti
28859	STEADY & GO tekstiilinen vyötäröosa	1	1 pari
28859	STEADY & GO tekstiilinen vyötäröosa	2	1 pari
28859	STEADY & GO tekstiilinen vyötäröosa	3	1 pari
28859	STEADY & GO tekstiilinen vyötäröosa	4	1 pari
28859	STEADY & GO tekstiilinen vyötäröosa	5	1 pari
28859	STEADY & GO tekstiilinen vyötäröosa	6	1 pari
28860	STEADY & GO vatsalevy	1	1 kpl
28860	STEADY & GO vatsalevy	2	1 kpl
28860	STEADY & GO vatsalevy	3	1 kpl
28860	STEADY & GO vatsalevy	4	1 kpl
28860	STEADY & GO vatsalevy	5	1 kpl
28860	STEADY & GO vatsalevy	6	1 kpl
28861	STEADY ruuviseti 6 mm	1	1 setti
28861	STEADY & GO ruuviseti 8 mm	1-6	1 setti
28862	STEADY lukitusrengas setti 6 mm	1	2 kpl
28862	STEADY & GO lukitusrengasseti 8 mm	1-6	2 kpl
28863	STEADY muovisuoja niveleeseen	1	2 kpl
28864	STEADY kumisuoja reisitankoon 6 mm	1	2 kpl
28864	STEADY kumisuoja reisitankoon 8 mm	1-6	10 kpl
28865	STEADY messinkiset hylsy	1	10 kpl
28866	STEADY lonkkanivelen säätösetti 6 mm	1	2 kpl
28866	STEADY lonkkanivelen säätösetti 8 mm	2-4	2 kpl
28867	GO lonkkanivelen säätösetti 8 mm	1-6	2 kpl
28868	STEADY & GO kuusiokoloavainsetti	1-6	1 setti
28869	STEADY & GO muovisolki 25 mm	1-3	2 kpl
28869	STEADY & GO muovisolki 38 mm	4-6	2 kpl

STEADY & GO OSAT

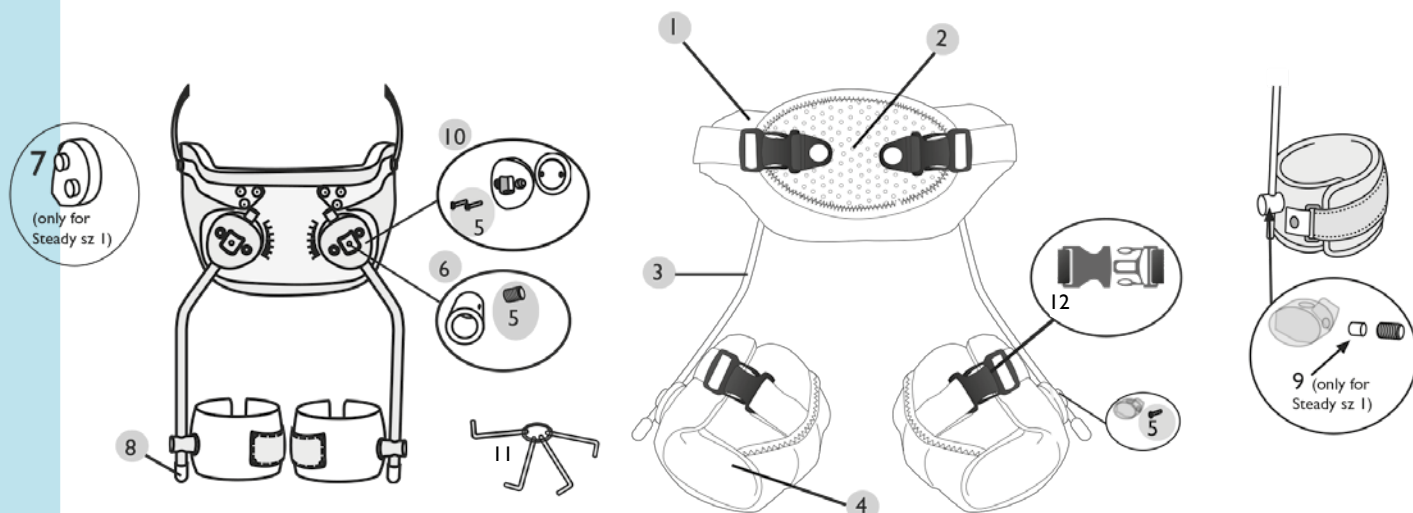

Nr.	Kuvaus	Yksikkö	STEADY	GO
1	Kankainen vyötäröosa sis. vatsalevyn	1 setti	28857	28858
2	Vatsalevy	1 kpl	28860	28860
3	Reisitanko 6 mm 115°, koko 1	Pari	28855-06	
3	Reisitanko 8 mm 115°	Pari	28855-08	28855-08
3	Reisitanko 6 mm 123°, koko 1	Pari	28856-06	
3	Reisitanko 8 mm 123°	Pari	28856-08	28856-08
4	Kankainen reisiosa	Pari	28859	28859
5	Ruuviseti, koko 1	1 setti	28861-06	
5	Ruuviseti, koko 2 - 6	1 setti	28861-08	28861-08
6	Lukitusrengas, koko 1	2 kpl	28862-06	
6	Lukitusrengas, koko 2 - 6	2 kpl	28862-08	28862-08
7	Muovisuoja niveleeseen, koko 1	2 kpl	28863-06	
8	Kumisuoja reisitankoon, koko 1	2 kpl	28864-06	
8	Kumisuoja reisitankoon, koko 2 - 6	10 kpl	28864-08	28864-08
9	Messinkiset hylsy, koko 1	10 kpl	28865	
10	Lonkkanivelen säätöseti, koko 1	2 kpl	28866-06	
10	Lonkkanivelen säätöseti, koko 2 - 6	2 kpl	28866-08	28867-08
11	Kuusiokoloavainseti	1 setti	28868	28868
12	Muovisolki 25 mm, koko 1 - 3	2 kpl	28869-25	28869-25
12	Muovisolki 38 mm, koko 4 - 6	2 kpl	28869-38	28869-38

Lonkan abduktiotuki C29

Muovinen abduktiotuki, jossa on pehmustetut reunat. Asentoa ohjaavat kiskot edessä ja takana ovat ruostumatonta terästä. Selkälevy ja rintakehän yli kulkeva nauha antavat sivuttaistukea. Ilmava ja hygieeninen. Tukea voidaan käyttää vaipan kanssa.

Käyttöalueet: Käytetään synnytyksissä lonkkanivelen luksaatioissa.

Tuotenro.	Koko	Mitta
20290	X-Small	14-17 cm
20290	Small	18-23 cm
20290	Medium	25-30 cm
20290	Large	33-38 cm



Mitta: Etäisyys polvinivelten välillä abduktiossa

Säädettävä abduktiotuki

Tukee lantiota lonkan kehityksen aikana lonkan dysplasiassa ja käytetään myös lonkan dislokaation jälkeen vauvoilla. Reisiluut sijoitetaan siten, että reisiluun pää kiinnittyy Acetabulumiin, jotta estetään ei-toivotut liikkeet ja lonkan (sub) luxaation riski. Ortoosi ohjaa lonkkanivelen 90° koukistus- ja 60° abduktioasentoon.

Käyttöalueet: Lonkan dysplasia, lonkan dislokaatio tai subluksaatio.

Tuotenro.	Koko
20291	Yksi koko



Lonkan abduktio-ortoosi

Lapsille tarkoitettu lonkkaortoosi. Ortoosia käytetään Perthesin taudin sekä muiden lonkkaan liittyvien sairauksien hoidossa. Ekstensiota ja fleksiota voidaan säätää 20° välein. Muovirunko ja teräskiskot tekevät tuesta kevyen. Pehmuste on irrotettava ja sen voi pestä koneessa.

Käyttöalueet: Perthesin tauti ja muut lonkkaan liittyvät sairaudet.

Muuta: Lisäpehmusteen voi tilata erikseen.

Tuotenro.	Malli	Koko	Lantion leveys M-L
28600	Lonkan abduktio-ortoosi	Small	<21 cm
28600	Lonkan abduktio-ortoosi	Large	>21 cm
28601	Lisäpehmuste	Small	
28601	Lisäpehmuste	Large	





Maple Leaf -lonkkaortoosi

Ortoosi säilyttää lihasten pituuden ja estää näin epämuodostumien syntymisen lonkan pehmytkudosleikkauksen jälkeen. Nivelet mahdollistavat lonkkanivelen sijoittamisen anatomisen linjan lähelle. Sekä leveyttä että pituutta voidaan säätää. Tukea voidaan säätää ekstensioon/fleksioon 20° välein, abduktioon/adduktoon 9° välein sekä kiertoa transversaalitasossa. Ortoosi on muovirunkoinen, jossa on teräskiskot ja irrotettava pehmuste. Koko X-Small on valmiiksi asennettu 15°abduktioon ja sitä voidaan halutessa lisätä tai pienentää. X-Small koon kiertoa ei voi säätää transversaalitasossa. Valmistettu muovista, jossa teräskiskot. Irrotettava pehmuste.

Käyttöalueet: Käytetään postoperatiivisesti ja CP-oireyhtymissä.

Muuta: Lisäpehmusteen voi tilata erikseen.

Tuotenro.	Koko	Lantion leveys M-L
62786	X-Small	15 - 19 cm
62786	Small	20 - 24 cm
62786	Medium	25 - 29,5 cm
62786	Large	30 - 34,5 cm

Maple Leaf DE

Maple Leaf on nyt myös saatavana distaalilla jatko-osalla henkilöille, jotka tarvitsevat lisää rajoitusta lantion rotaatioon. Polvinivel voidaan lukita sekä säätää ekstensioon/fleksioon 20° välein ja abduktioon/adduktkioon 9° välein. Muutoin ortoosissa on samat ominaisuudet kuten Maple Leafissa tuotenro:lla 62786. Ortoosi on muovirunkoinen, jossa on teräskiskot ja irrotettava pehmuste. Lantio,- reisi,- ja pohjeisiin voidaan tilata vaihtopehmusteet ja -nauhat.

Käyttöalueet: CP ja postoperatiivisesti. Tarvittaessa antamaan lisää rajoitusta lantion rotaatioon.

Muuta: Lisäpehmusteen voi tilata erikseen.

Tuotenro.	Malli	Koko	Lantion leveys M-L
62787	Maple Leaf DE (sis. kaikki osat)	Small	20 - 24 cm
62787	Maple Leaf DE (sis. kaikki osat)	Large	30 - 34,5 cm
62793	Lisäpehmuste pohjeosaan	Small	
62793	Lisäpehmuste pohjeosaan	Large	
62794	Lisänauha pohjeosaan	Small	
62794	Lisänauha pohjeosaan	Large	
62796	Lisäpehmuste lantio-osaan	Small	
62796	Lisäpehmuste lantio-osaan	Large	
62797	Lisäpehmuste reisosaan	Small	
62797	Lisäpehmuste reisosaan	Large	
62798	Lisänauha lantio-osaan	Small	
62798	Lisänauha lantio-osaan	Large	
62799	Lisänauha reisosaan	Small	
62799	Lisänauha reisosaan	Large	



Omat muistiinpanot

[illegible]



Rintaproteesit

www.camp.fi



Diamond Classic



MassageForm Air



Massage rintaliivi



Embrace rintaliivi

Rintaproteesit

Campin rintaproteesit mukautuvat hyvin 2000-luvun leikkausmenetelmiin ja modernin naisen tarpeisiin sopiviksi. Mallin voit valita tavallisesta silikonista tai kevytsilikonista valmistettuna. Yhteistä molemmilla malleilla on mattapinta ja luonnollinen lämmin värisävy.

Riippumatta siitä valitsetko tavallisen silikonin tai kevytsilikonin, ovat kaikki proteesit korkealuokkaisia, pehmeän ja luonnollisen tuntuisia ja ne muotoutuvat hyvin vartalolle.

Valikoimassamme on mukana mm. Campin ainutlaatuinen Hierova rintaproteesi, joka on saanut suuren suosion. Proteesin sisäpuolella on kanavia, jotka hierovat rintakehää ja antavat ilman kiertää, jolloin iho tuntuu viileältä ja hengittää. Hierova proteesi sopii erityisesti naisille, joilla on lymfödeema. Massageform Attach on hierova proteesi, jonka sisäpuoli on itsekiinnittyvää materiaalia. Kaikki ABC-rintaproteesit toimitetaan kätevässä säilytyslaukussa. Säilytyslaukku suojaa proteesia ja auttaa proteesia säilyttämään muotonsa. Suojataskun proteesille voi tilata erikseen.

Kuvastoa voitte tiedustella asiakaspalvelustamme.



Kaularangan tuet

www.camp.fi



Kaularangantuki, suora

Pehmeäntuntuinen kaularangantuki, joka vähentää kuormitusta kaularangassa sekä antaa niskalle tukea. Tuki voidaan kiinnittää edestä tai takaa. Kangas on pääasiallisesti puuvillaa. Ei sisällä lateksia.

Käyttöalueet: Käytetään tilapäisesti vähentämään kaularangan kuormitusta esim. niskan kiputiloissa ja reumatologisten sairauksien yhteydessä.

Tuoteno.	Väri	Koko	Korkeus	Ympärysmitta
47010	Harmaa	X-Small	6 cm	32 – 48 cm
47010	Harmaa	Small	8 cm	32 – 48 cm
47010	Harmaa	Medium	10 cm	32 – 48 cm
47010	Harmaa	Large	12 cm	32 – 48 cm
47011	Sininen	X-Small	6 cm	32 – 48 cm
47011	Sininen	Small	8 cm	32 – 48 cm
47011	Sininen	Medium	10 cm	32 – 48 cm
47011	Sininen	Large	12 cm	32 – 48 cm



Kaularangantuki, muotoiltu

Pehmeäntuntuinen anatomisesti muotoiltu kaularangantuki, joka vähentää kuormitusta kaularangassa sekä antaa niskalle tukea. Tuki mukailee leuan ja rintakehän muotoja ja tuntuu mukavalta. Kangas on pääasiallisesti puuvillaa. Ei sisällä lateksia.

Käyttöalueet: Käytetään tilapäisesti vähentämään kaularangan kuormitusta esim. niskan kiputiloissa ja reumatologisten sairauksien yhteydessä.

Tuoteno.	Väri	Koko	Korkeus	Ympärysmitta
47012	Harmaa	X-Small	6 cm	32 – 48 cm
47012	Harmaa	Small	8 cm	32 – 48 cm
47012	Harmaa	Medium	10 cm	32 – 48 cm
47012	Harmaa	Large	12 cm	32 – 48 cm
47013	Sininen	X-Small	6 cm	32 – 48 cm
47013	Sininen	Small	8 cm	32 – 48 cm
47013	Sininen	Medium	10 cm	32 – 48 cm
47013	Sininen	Large	12 cm	32 – 48 cm



Vission kaularangantuki

Anatomisesti muotoiltu pehmeä kaularangantuki, joka vähentää kuormitusta kaularangassa sekä antaa niskalle tukea. Muotoiltu leuan ja rintakehän muotoihin sopivaksi. Päälyysosa on lycraa, joka tekee tuesta modernin näköisen samalla kun se on viileän ja mukavantuntuinen ihoa vasten. Materiaali ei sisällä lateksia.

Käyttöalueet: Käytetään tilapäisesti vähentämään kaularangan kuormitusta esim. niskan kiputiloissa ja reumatologisten sairauksien yhteydessä.

Tuoteno.	Väri	Koko	Korkeus	Ympärysmitta
47014	Musta	X-Small	6 cm	32-48 cm
47014	Musta	Small	8 cm	32-48 cm
47014	Musta	Medium	10 cm	32-48 cm
47014	Musta	Large	12 cm	32-48 cm

C-56 kaularangantuki

Kaksiosainen, polyteenistä valmistettu tuki, joka stabiloi kaularankaa. Muotoiltu leuan alta hyvän istuvuuden saavuttamiseksi. Reunat on päällystetty pehmeällä materiaalilla. Korkeus ja leveys ovat säädettävissä tarranauhakiinnityksen avulla. Perforoitu muovi lisää ilmastuutta.

Käyttöalueet: Vähentää kaularangan kuormitusta niskan kiputiloissa esim. reumatologisten sairauksien yhteydessä.

Tuotenro.	Väri	Koko	Korkeus	Ympärysmitta
20560	Valkoinen	X-Small	7,5-9 cm	32-37 cm
20560	Valkoinen	Small	8-9,5 cm	36-41 cm
20560	Valkoinen	Medium	8,5-10 cm	40-45 cm
20560	Valkoinen	Large	9-10,5 cm	44-49 cm
20560	Valkoinen	X-Large	9-10,5 cm	48-53 cm



Eclipse® Kaulatuki

Eclipse kaulatuki on moderni kaulatuki, jonka istuvuus ja toimivuus on erittäin hyvä. Eclipse on helppo säätää ja siinä on puolijäykkä rakenne. Tuen "quick-fit" toiminnot helpottavat sovitusta ja koon säätöä. Eclipse on tarkoitettu rajoittamaan fleksiota, ekstensiota ja rotaatiota potilaan toipumisen edistämiseksi. Avoin raamien rakenne tekee siitä ilmavan ja mukavan ja samalla trachea-aukon koko saadaan riittävän suureksi. Saatavana vain yksi koko, joka riittää lähes kaikille ympärysmittan ja korkeuden puolesta. Pehmuste on vaihdettavissa ja voidaan ostaa erikseen. Korkeus voidaan asettaa 7,5 cm:n ja 18,75 cm:n välille.

Käyttöalueet: Stabiloi selkärankaa fleksion, ekstension ja rotaation ehkäisemiseksi kaularangan vammojen tai ongelmien yhteydessä.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko
20628	Eclipse kaulatuki	Vaaleanharmaa	Yksi koko
20629	Lisäpehmuste	Harmaa	Yksi koko





Trachea kaularangantuki

Plastazotesta valmistettu kaksiosainen, trachea-aukollinen kaularangantuki. Tuki on anatomisesti muotoiltu hyvän istuvuuden saavuttamiseksi. Niskaosa ja leuanalus ovat muovivahvistetut. Tuki kiinnitetään molemminpuolisilla tarranauhoilla.

Käyttöalueet: Käytetään instabiliteetissa, niskan kiputiloissa ja postoperatiivisesti.

Tuotenro.	Väri	Koko	Korkeus	Ympärysmitta
20619	Beige	Small	5,5 cm	25- 3 cm
20619	Beige	Medium	5,5 cm	33-41 cm
20619	Beige	Large	5,5 cm	41-48 cm
20620	Beige	Small	8 cm	25-33 cm
20620	Beige	Medium	8 cm	33-41 cm
20620	Beige	Large	8 cm	41-48 cm
20621	Beige	Small	11 cm	25-33 cm
20621	Beige	Medium	11 cm	33-41 cm
20621	Beige	Large	11 cm	41-48 cm
20622	Beige	Small	13 cm	25-33 cm
20622	Beige	Medium	13 cm	33-41 cm
20622	Beige	Large	13 cm	41-48 cm



Pacific kaularangantuki

Polyeteenistä valmistettu kaksiosainen kaularangantuki, jota voidaan säätää molemminpuolisilla tarranauhoilla. Jäykkä kuori myötäilee leuan muotoa ja nojaa kevyesti rintalastaa vasten. Tuki on matalampi sivuilta, jotta se ei hankaisi hartioita tai korvia. Tuen korkeutta säädetään kahden muoviruuvien avulla. Mukana tulee pehmeä, saumaton ja ilmava pehmuste, joka voidaan pestä tai vaihtaa.

Käyttöalueet: Käytetään instabiliteetissa, niskan kiputiloissa ja postoperatiivisesti.

Tuotenro.	Väri	Koko	Korkeus
20625	Valkoinen	Small/Medium	5,5-9,5 cm
20625	Valkoinen	Medium/Large	8-13 cm
20626	Lisäpehmuste	Small/Medium	
20626	Lisäpehmuste	Medium/Large	



Avannetukivyöt

www.camp.fi


StomaCare™

StomaCare on elastinen avanneliivi, joka antaa tukea ja toimii avannepussin kiinnityksenä sekä tukena heikoille vatsalihaksille. Tuki myös ehkäisee ja lievittää arpeutumista ja vatsan alueen prolapsia.

Tuki sopii sekä suoralle, että muodokkaalle vartalolle. Se on valmistettu leveästä dacronnauhasta, joka on ommeltu elastisella ompeleella parhaan istuvuuden saavuttamiseksi. Vatsan kohdalla olevan aukon ympäryys on kaksinkertaista, joustamatonta materiaalia. Näiden kerrosten välissä on joustava, muovinen vahvikelevy. Aukko on peitettävissä suojanauhalla.

Uutuutena mallistossamme on StomaCare EasyOpener, jossa on integroitu tarrakiinnitys avannepussiaukon alapuolella. Tämä tekee avannepussin vaihdon miellyttäväksi, koska avannetukea ei tarvitse riisua.

StomaCare:ia löytyy kolmea eri korkeutta; 10 cm, 15 cm ja 22,5 cm sekä kahta eri avannepussiaukon halkaisijan kokoa; 60 mm ja 72 mm. Tämä helpottaa erikoisten avannepussien sovittamista liiviin.

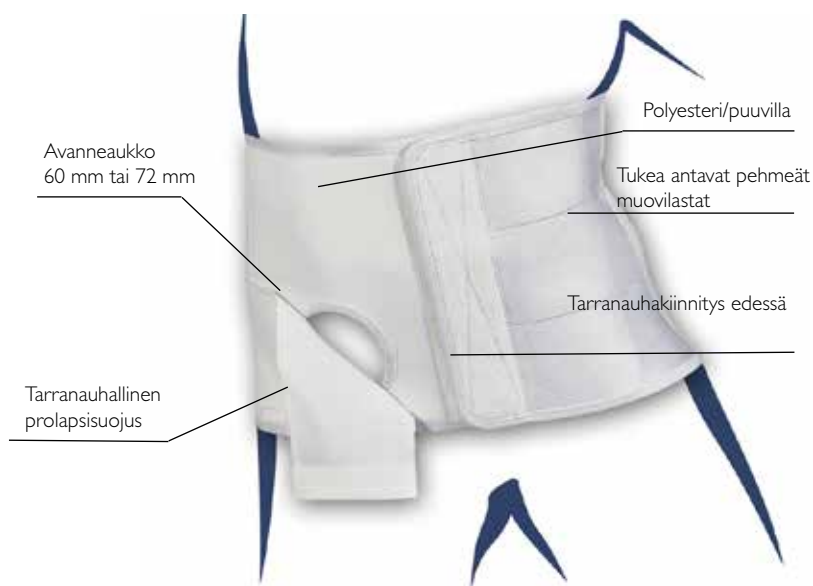

Kokotaulukko

Koko	Vatsan ympäryys	Potilaan tulee olla makuuasennossa mittaa otettaessa 
S	70 - 79 cm	
M	80 - 90 cm	
L	90 - 100 cm	
XL	100 - 110 cm	
XXL	110 - 120 cm	
XXXL	120 - 130 cm	
XXXXL	130 - 140 cm	

Stomacare EasyCut PLUS

EasyCut Plus on valmistettu hengittävistä Coolmax-materiaalista, jonka ansiosta tuote ei kerää kosteutta. Kosteus leviää ja haihtuu neljä kertaa nopeammin kuin puuvillassa. Tämän ansiosta keho pysyy miellyttävän kuivana – jopa fyysisten aktiviteettien aikana. Harmaa väri on lähes näkymätön, myös vaaleiden vaatteiden alla. Malli sopii sekä suoralle että kaarevalle vyötärölinjalle. EasyCut vyöllä on helppo kohdistaa avanne-aukko potilaalle sopivaan kohtaan. Tämä toimii erityisen hyvin potilaille, joita hoidetaan kotona. Avanne-aukon kohtaa, muotoa ja halkaisijaa voidaan saksilla leikaten yksilöidä potilaan tarpeen mukaan. Malli eri muodoista ja kokovaihtoehdoista

toimitetaan vyön mukana. Materiaali ei rispaannu ja tukee optimaalisesti. EasyCut Plus on saatavilla 70-140 cm:n koossa sekä 10cm, 15cm, 19cm ja 23 cm:n

Käyttöalueet: Avannepussin tukena ja kiinnitykseen. Heikkojen vatsalihasten tukemiseen. Ehkäisee ja lievittää arven muodostumista ja vatsan alueen prolapsia ja tyriä.



Mitta: Mitta otetaan navan tasolta potilaan ollessa makuuasennossa.

Tuotenro.	Väri	Koko	Vyötärön ympäryys	Korkeus	Vas/Oik
23322	Vaaleanharmaa	Small	70 - 79 cm	10 cm	Bilateraalinen
23322	Vaaleanharmaa	Medium	80 - 89 cm	10 cm	Bilateraalinen
23322	Vaaleanharmaa	Large	90 - 99 cm	10 cm	Bilateraalinen
23322	Vaaleanharmaa	X-Large	100 - 109 cm	10 cm	Bilateraalinen
23322	Vaaleanharmaa	XX-Large	110 - 120 cm	10 cm	Bilateraalinen
23322	Vaaleanharmaa	XXX-Large	121 - 130 cm	10 cm	Bilateraalinen
23322	Vaaleanharmaa	XXXX-Large	131 - 140 cm	10 cm	Bilateraalinen
23323	Vaaleanharmaa	Small	70 - 79 cm	15 cm	Bilateraalinen
23323	Vaaleanharmaa	Medium	80 - 89 cm	15 cm	Bilateraalinen
23323	Vaaleanharmaa	Large	90 - 99 cm	15 cm	Bilateraalinen
23323	Vaaleanharmaa	X-Large	100 - 109 cm	15 cm	Bilateraalinen
23323	Vaaleanharmaa	XX-Large	110 - 120 cm	15 cm	Bilateraalinen
23323	Vaaleanharmaa	XXX-Large	121 - 130 cm	15 cm	Bilateraalinen
23323	Vaaleanharmaa	XXXX-Large	131 - 140 cm	15 cm	Bilateraalinen
23324	Vaaleanharmaa	Small	70 - 79 cm	19 cm	Bilateraalinen
23324	Vaaleanharmaa	Medium	80 - 89 cm	19 cm	Bilateraalinen
23324	Vaaleanharmaa	Large	90 - 99 cm	19 cm	Bilateraalinen
23324	Vaaleanharmaa	X-Large	100 - 109 cm	19 cm	Bilateraalinen
23324	Vaaleanharmaa	XX-Large	110 - 120 cm	19 cm	Bilateraalinen
23324	Vaaleanharmaa	XXX-Large	121 - 130 cm	19 cm	Bilateraalinen
23324	Vaaleanharmaa	XXXX-Large	131 - 140 cm	19 cm	Bilateraalinen
23325	Vaaleanharmaa	Small	70 - 79 cm	23 cm	Bilateraalinen
23325	Vaaleanharmaa	Medium	80 - 89 cm	23 cm	Bilateraalinen
23325	Vaaleanharmaa	Large	90 - 99 cm	23 cm	Bilateraalinen
23325	Vaaleanharmaa	X-Large	100 - 109 cm	23 cm	Bilateraalinen
23325	Vaaleanharmaa	XX-Large	110 - 120 cm	23 cm	Bilateraalinen
23325	Vaaleanharmaa	XXX-Large	121 - 130 cm	23 cm	Bilateraalinen
23325	Vaaleanharmaa	XXXX-Large	131 - 140 cm	23 cm	Bilateraalinen



StomaCare EasyOpener beige

StomaCare EasyOpenerissa on tarrakiinnitys avannepussiaukon alapuolella, mikä tekee avannepussin vaihdon miellyttäväksi, koska avannetukea ei tarvitse riisua. Malli ei sovi henkilöille, joilla abdominaalinen paine on erityisen korkea, johtuen tuen mahdollisesta liiallisesta rasituksesta avannepussiaukon kiinnityksen kohdalla.

Käyttöalueet: Avannepussin tukena ja kiinnitykseen. Heikkojen vatsalihasten tukemiseen. Ehkäisee ja lievittää arven muodostumista ja vatsan alueen prolapsia ja tyriä.

Muuta: Ota mitta vatsan ympäriltä avanteen kohdalta tai suurimman ympärysmittan kohdalta. Mitta otetaan potilaan ollessa makuuasennossa. Ilmoita tilattaessa, kummalla puolella avanne on. Vyön korkeus edessä ja takana on 15 cm:ä.

Tuotenro.	Väri	Koko	Vyötärön ympäryys	Vatsa-aukon halkaisija	Vas/Oik
23316	Beige	Small	70 - 79 cm	60 mm	Vas/Oik
23316	Beige	Medium	80 - 90 cm	60 mm	Vas/Oik
23316	Beige	Large	90 - 100 cm	60 mm	Vas/Oik
23316	Beige	X-Large	100 - 110 cm	60 mm	Vas/Oik
23316	Beige	XX-Large	110 - 120 cm	60 mm	Vas/Oik
23316	Beige	XXX-Large	120 - 130 cm	60 mm	Vas/Oik
23316	Beige	XXXX-Large	130 - 140 cm	60 mm	Vas/Oik
23318	Beige	Small	70 - 79 cm	72 mm	Vas/Oik
23318	Beige	Medium	80 - 90 cm	72 mm	Vas/Oik
23318	Beige	Large	90 - 100 cm	72 mm	Vas/Oik
23318	Beige	X-Large	100 - 110 cm	72 mm	Vas/Oik
23318	Beige	XX-Large	110 - 120 cm	72 mm	Vas/Oik
23318	Beige	XXX-Large	120 - 130 cm	72 mm	Vas/Oik
23318	Beige	XXXX-Large	130 - 140 cm	72 mm	Vas/Oik


StomaCare matala

Avannetukivyö, joka on valmistettu leveästä dacronnauhasta. Vyö on ommeltu joustavalla ompeleella parhaan istuvuuden saavuttamiseksi. Sopii sekä suoralle että muodokkaalle vartalotyyppille. Avanneaukon ympärys on kaksinkertaista, joustamatonta materiaalia. Kerrosten välissä on joustava, muovinen vahvikelevy. Aukko on peitettävissä suojanauhalla. Tarranauhakiinnitys.

Käyttöalueet: Avannepussin tukena ja kiinnitykseen. Heikkojen vatsalihasten tukemiseen. Ehkäisee ja lievittää arven muodostumista ja vatsan alueen prolapsia ja tyriä.

Muuta: Ota mitta vatsan ympäriltä avanteen kohdalta tai suurimman ympärysmittan kohdalta. Mitta otetaan potilaan ollessa makuuasennossa. Vyön korkeus edessä ja takana on 10 cm:ä.

Tuotenro.	Väri	Koko	Vyötärön ympärys	Vatsa-aukon halkaisija	Vas/Oik
23308	Valkoinen	Small	70 - 79 cm	60 mm	Bilat.
23308	Valkoinen	Medium	80 - 90 cm	60 mm	Bilat.
23308	Valkoinen	Large	90 - 100 cm	60 mm	Bilat.
23308	Valkoinen	X-Large	100 - 110 cm	60 mm	Bilat.
23308	Valkoinen	XX-Large	110 - 120 cm	60 mm	Bilat.
23308	Valkoinen	XXX-Large	120 - 130 cm	60 mm	Bilat.
23308	Valkoinen	XXXX-Large	130 - 140 cm	60 mm	Bilat.
23309	Valkoinen	Medium	80 - 90 cm	72 mm	Bilat.
23309	Valkoinen	Large	90 - 100 cm	72 mm	Bilat.
23309	Valkoinen	X-Large	100 - 110 cm	72 mm	Bilat.
23309	Valkoinen	XX-Large	110 - 120 cm	72 mm	Bilat.
23309	Valkoinen	XXX-Large	120 - 130 cm	72 mm	Bilat.
23309	Valkoinen	XXXX-Large	130 - 140 cm	72 mm	Bilat.

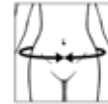



StomaCare keskikorkea musta

Avannetukivyö, joka on valmistettu leveästä dacronnauhasta. Vyö on ommeltu joustavalla ompeleella parhaan istuvuuden saavuttamiseksi. Sopii sekä suoralle että muodokkaalle vartalotyyppille. Avanneaukon ympärys on kaksinkertaista, joustamatonta materiaalia. Kerrosten välissä on joustava, muovinen vahvikelevy. Aukko on peitettävissä suojanauhalla. Tarranauhakiinnitys.

Käyttöalueet: Avannepussin tukena ja kiinnitykseen. Heikkojen vatsalihasten tukemiseen. Ehkäisee ja lievittää arven muodostumista ja vatsan alueen prolapsia ja tyriä.

Muuta: Ota mitta vatsan ympäriltä avanteen kohdalta tai suurimman ympärysmittan kohdalta. Mitta otetaan potilaan ollessa makuuasennossa. Vyön korkeus edessä ja takana on 15 cm:ä.

Tuotenro.	Väri	Koko	Vyötärön ympärys	Vatsa-aukon halkaisija	Vas/Oik
23306	Musta	Small	70 - 79 cm	60 mm	Bilat.
23306	Musta	Medium	80 - 90 cm	60 mm	Bilat.
23306	Musta	Large	90 - 100 cm	60 mm	Bilat.
23306	Musta	X-Large	100 - 110 cm	60 mm	Bilat.
23306	Musta	XX-Large	110 - 120 cm	60 mm	Bilat.
23306	Musta	XXX-Large	120 - 130 cm	60 mm	Bilat.
23306	Musta	XXXX-Large	130 - 140 cm	60 mm	Bilat.
23307	Musta	Small	70 - 79 cm	72 mm	Bilat.
23307	Musta	Medium	80 - 90 cm	72 mm	Bilat.
23307	Musta	Large	90 - 100 cm	72 mm	Bilat.
23307	Musta	X-Large	100 - 110 cm	72 mm	Bilat.
23307	Musta	XX-Large	110 - 120 cm	72 mm	Bilat.
23307	Musta	XXX-Large	120 - 130 cm	72 mm	Bilat.
23307	Musta	XXXX-Large	130 - 140 cm	72 mm	Bilat.


StomaCare keskikorkea valkoinen

Avannetukivyö, joka on valmistettu leveästä dacronnauhasta. Vyö on ommeltu joustavalla ompeleella parhaan istuvuuden saavuttamiseksi. Sopii sekä suoralle että muodokkaalle vartalotyypille. Avanneaukon ympärys on kaksinkertaista, joustamatonta materiaalia. Kerrosten välissä on joustava, muovinen vahvikelevy. Aukko on peitettävissä suojanauhalla. Tarranauhakiinnitys.

Käyttöalueet: Avannepussin tukena ja kiinnitykseen. Heikkojen vatsalihasten tukemiseen. Ehkäisee ja lievittää arven muodostumista ja vatsan alueen prolapsia ja tyrä.

Muuta: Ota mitta vatsan ympäriltä avanteen kohdalta tai suurimman ympärysmittan kohdalta. Mitta otetaan potilaan ollessa makuuasennossa. Vyön korkeus edessä ja takana on 15 cm:ä.

Tuotenro.	Väri	Koko	Vyötärön ympärys	Vatsa-aukon halkaisija	Vas/Oik
23306	Valkoinen	Medium	80 - 90 cm	60 mm	Bilat.
23306	Valkoinen	Large	90 - 100 cm	60 mm	Bilat.
23306	Valkoinen	X-Large	100 - 110 cm	60 mm	Bilat.
23306	Valkoinen	XX-Large	110 - 120 cm	60 mm	Bilat.
23306	Valkoinen	XXX-Large	120 - 130 cm	60 mm	Bilat.
23306	Valkoinen	XXXX-Large	130 - 140 cm	60 mm	Bilat.
23307	Valkoinen	Medium	80 - 90 cm	72 mm	Bilat.
23307	Valkoinen	Large	90 - 100 cm	72 mm	Bilat.
23307	Valkoinen	X-Large	100 - 110 cm	72 mm	Bilat.
23307	Valkoinen	XX-Large	110 - 120 cm	72 mm	Bilat.
23307	Valkoinen	XXX-Large	120 - 130 cm	72 mm	Bilat.
23307	Valkoinen	XXXX-Large	130 - 140 cm	72 mm	Bilat.

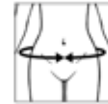



StomaCare keskikorkea beige

Avannetukivyö, joka on valmistettu leveästä dacronnauhasta. Vyö on ommeltu joustavalla ompeleella parhaan istuvuuden saavuttamiseksi. Sopii sekä suoralle että muodokkaalle vartalotyyppille. Avanneaukon ympärys on kaksinkertaista, joustamatonta materiaalia. Kerrosten välissä on joustava, muovinen vahvikelevy. Aukko on peitettävissä suojanauhalla. Tarranauhakiinnitys.

Käyttöalueet: Avannepussin tukena ja kiinnitykseen. Heikkojen vatsalihasten tukemiseen. Ehkäisee ja lievittää arven muodostumista ja vatsan alueen prolapsia ja tyriä.

Muuta: Ota mitta vatsan ympäriltä avanteen kohdalta tai suurimman ympärysmittan kohdalta. Mitta otetaan potilaan ollessa makuuasennossa. Vyön korkeus edessä ja takana on 15 cm:ä.

Tuotenro.	Väri	Koko	Vyötärön ympärys	Vatsa-aukon halkaisija	Vas/Oik
23306	Beige	Small	70 - 79 cm	60 mm	Bilat.
23306	Beige	Medium	80 - 90 cm	60 mm	Bilat.
23306	Beige	Large	90 - 100 cm	60 mm	Bilat.
23306	Beige	X-Large	100 - 110 cm	60 mm	Bilat.
23306	Beige	XX-Large	110 - 120 cm	60 mm	Bilat.
23306	Beige	XXX-Large	120 - 130 cm	60 mm	Bilat.
23306	Beige	XXXX-Large	130 - 140 cm	60 mm	Bilat.
23307	Beige	Small	70 - 79 cm	72 mm	Bilat.
23307	Beige	Medium	80 - 90 cm	72 mm	Bilat.
23307	Beige	Large	90 - 100 cm	72 mm	Bilat.
23307	Beige	X-Large	100 - 110 cm	72 mm	Bilat.
23307	Beige	XX-Large	110 - 120 cm	72 mm	Bilat.
23307	Beige	XXX-Large	120 - 130 cm	72 mm	Bilat.
23307	Beige	XXXX-Large	130 - 140 cm	72 mm	Bilat.


StomaCare korkea

Avannetukivyö, joka on valmistettu leveästä dacronnauhasta. Vyö on ommeltu joustavalla ompeleella parhaan istuvuuden saavuttamiseksi. Sopii sekä suoralle että muodokkaalle vartalotyyppille. Avanneaukon ympäritys on kaksinkertaista, joustamatonta materiaalia. Kerrosten välissä on joustava, muovinen vahvikelevy. Aukko on peitettävissä suojanauhalla. Tarranauhakiinnitys.

Käyttöalueet: Avannepussin tukena ja kiinnitykseen. Heikkojen vatsalihasten tukemiseen. Ehkäisee ja lievittää arven muodostumista ja vatsan alueen prolapsia ja tyrä.

Muuta: Ota mitta vatsan ympäriltä avanteen kohdalta tai suurimman ympärysmittan kohdalta. Mitta otetaan potilaan ollessa makuuasennossa. Ilmoita tilattaessa kummalla puolella avanne on. Vyön korkeus edessä ja takana on 22,5 cm:ä.

Tuotenro.	Väri	Koko	Vyötärön ympäryys	Vatsa-aukon halkaisija	Vas/Oik
23302	Valkoinen	Medium	80 - 90 cm	60 mm	Vas/Oik
23302	Valkoinen	Large	90 - 100 cm	60 mm	Vas/Oik
23302	Valkoinen	X-Large	100 - 110 cm	60 mm	Vas/Oik
23302	Valkoinen	XX-Large	110 - 120 cm	60 mm	Vas/Oik
23302	Valkoinen	XXX-Large	120 - 130 cm	60 mm	Vas/Oik
23302	Valkoinen	XXXX-Large	130 - 140 cm	60 mm	Vas/Oik
23303	Valkoinen	Medium	80 - 90 cm	72 mm	Vas/Oik
23303	Valkoinen	Large	90 - 100 cm	72 mm	Vas/Oik
23303	Valkoinen	X-Large	100 - 110 cm	72 mm	Vas/Oik
23303	Valkoinen	XX-Large	110 - 120 cm	72 mm	Vas/Oik
23303	Valkoinen	XXX-Large	120 - 130 cm	72 mm	Vas/Oik
23303	Valkoinen	XXXX-Large	130 - 140 cm	72 mm	Vas/Oik

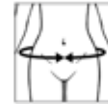



StomaCare puolivalmiste

Joustava avannetukivyö, joka on valmistettu leveästä dacronnauhasta.

Vyö on ommeltu joustavalla ompeleella parhaan istuvuuden saavuttamiseksi. Sopii sekä suoralle että muodokkaalle vartalotyyppille. Avanneaukon ympäryys on kaksinkertaista, joustamatonta materiaalia. Näiden kerrosten välissä on joustava, muovinen vahvikelevy. Mukana toimitetaan joustava reuna- ja suojanauha. Tarranauhakiinnitys.

Käyttöalueet: Avannepussin tukena ja kiinnitykseen. Heikkojen vatsalihasten tukemiseen. Ehkäisee ja lievittää arven muodostumista ja vatsan alueen prolapsia ja tyriä.

Muuta: Ota mitta vatsan ympäriltä avanteen kohdalta tai suurimman ympärysmittan kohdalta. Ilmoita tilattaessa kummalla puolella avanne on.

Mitta otetaan potilaan ollessa makuuasennossa.

Tuotenro.	Väri	Koko	Vyötärön ympäryys	Vas/Oik	Etu- ja takaosan korkeus
23305	Valkoinen	Medium	80 - 89 cm	Bilat.	15 cm
23305	Valkoinen	Large	90 - 99 cm	Bilat.	15 cm
23305	Valkoinen	X-Large	100 - 109 cm	Bilat.	15 cm
23305	Valkoinen	XX-Large	110 - 120 cm	Bilat.	15 cm
23305	Valkoinen	XXX-Large	121 - 130 cm	Bilat.	15 cm
23305	Valkoinen	XXXX-Large	131 - 140 cm	Bilat.	15 cm
23301	Valkoinen	Medium	80 - 89 cm	Vas/Oik	22,5 cm
23301	Valkoinen	Large	90 - 99 cm	Vas/Oik	22,5 cm
23301	Valkoinen	X-Large	100 - 109 cm	Vas/Oik	22,5 cm
23301	Valkoinen	XX-Large	110 - 120 cm	Vas/Oik	22,5 cm
23301	Valkoinen	XXX-Large	121 - 130 cm	Vas/Oik	22,5 cm
23301	Valkoinen	XXXX-Large	131 - 140 cm	Vas/Oik	22,5 cm
23321	Musta	Small	70 - 79 cm	Bilat.	15 cm
23321	Musta	Medium	80 - 89 cm	Bilat.	15 cm
23321	Musta	Large	90 - 99 cm	Bilat.	15 cm
23321	Musta	X-Large	100 - 109 cm	Bilat.	15 cm
23321	Musta	XX-Large	110 - 120 cm	Bilat.	15 cm
23321	Musta	XXX-Large	121 - 130 cm	Bilat.	15 cm
23321	Musta	XXXX-Large	131 - 140 cm	Bilat.	15 cm
23319	Musta	Small	70 - 79 cm	Vas/Oik	22,5 cm
23319	Musta	Medium	80 - 89 cm	Vas/Oik	22,5 cm
23319	Musta	Large	90 - 99 cm	Vas/Oik	22,5 cm
23319	Musta	X-Large	100 - 109 cm	Vas/Oik	22,5 cm
23319	Musta	XX-Large	110 - 120 cm	Vas/Oik	22,5 cm
23319	Musta	XXX-Large	121 - 130 cm	Vas/Oik	22,5 cm
23319	Musta	XXXX-Large	131 - 140 cm	Vas/Oik	22,5 cm

StomaCare Protector

Protector on valmistettu korkealämpömuovista. Käytetään suojaamaan avannetta paineelta ja traumalta ennen kaikkea aktiviteettien aikana. Sopii kaikkiin StomaCaren avanneliiveihin. Kiinnitetään liiviin avanneaukon kohdalle ja tuetaan aukon yli kulkevalla nauhalla.


Tuotenro.	Väri	Koko
23300	Vaaleanharmaa	Yksi koko
23299	Musta	Yksi koko



Stomacare ProtectorMax

ProtectorMax on luja suoja, joka on suunniteltu kestäämään painetta ja ei-toivottuja iskuja päivittäisissä tilanteissa ja toiminnoissa. Riski avannepussin jäämisestä jumiin tai kiinni esim. housuihin tai vyöhön pienenee. Se suojaa koko avannetta useimmissa tilanteissa. Suoja on pehmeää muotoon puristettua kumia muistuttavaa materiaalia. ProtectorMax on anatomisesti muotoiltu ja kulmat pehmeät. Sisäosassa on pehmeä vuoraus,

joka tuntuu hyvälle ihoa vasten. Tuote ei sisällä lateksia eikä muita haitallisia aineita. Elastinen kiinnitysnauha on taipuisa ja muotoutuu kehon liikkeiden mukaan.

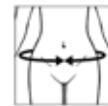

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Vyötärön ympäry
23296	ProtectorMax	Vaalean harmaa	Yksi koko	70 - 140 cm
23297	Lisäkiinnitysnauha	Vaalean harmaa	Yksi koko	

Omat muistiinpanot

[illegible]



Selkätuet

www.camp.fi

Campin Tukiliivivalikoima

Vuodesta 1908 lähtien olemme kuunnelleet potilaita, asiakkaita ja heidän tarpeitaan. Olemme aina panostaneet innovatiivisuuteen, hyvään istuvuuteen, korkeaan laatuun ja suunnitteluun. Voimme oikeutetusti sanoa, että meillä on paljon kokemusta tukiliiveistä, ja olemme ylpeitä, että saamme nyt esitellä laajan valikoimamme.


Tukiliiviä valittaessa on tärkeää ottaa huomioon indikaatio ja anatomia, mutta myös potilaan vartalo-tyyppi, elämäntapa ja mieltymykset. Jotta valinta olisi helpompaa, olemme tuotekuvastossa jakaneet tukiliivimme alla olevan mallin mukaisesti. Jos haluat lisätietoa, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme.

Stabiliteetti

Tukiliivi	Elastinen materiaali
Tukiliivi	Kangas, vahvistettu lastoilla
Jäykkä	Muovi tai metalli

Korkeus

SIO	Sakroiliaalinen
LSO	Lumbosakraalinen
TO	Rintarangan
TLSO	Torakolumbosakraalinen
ABDO	Abdominaalinen

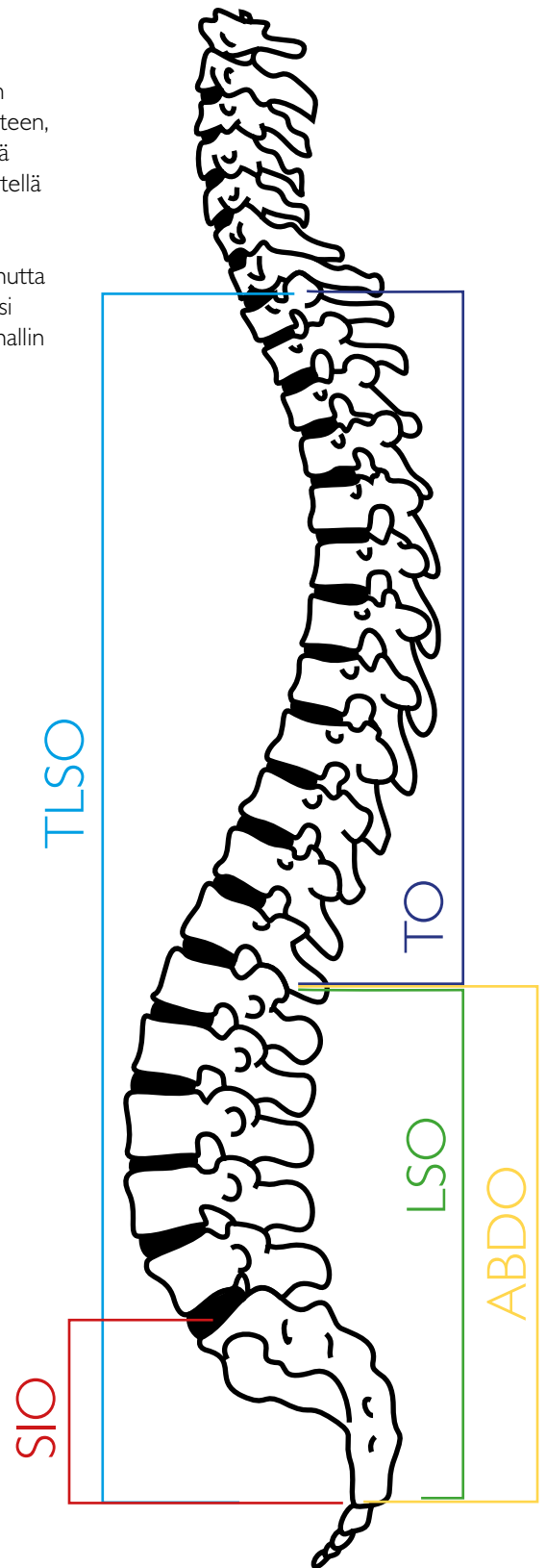

SI-vyö Tro-Camp

SIO - Tukeva vyö sacro-iliaca-nivelelle. Sopii sekä suoralle että muodokkaalle vartalotyyppille. Hakaskiinnitys kahdessa rivissä mahdollistaa vyön käytön raskauden edetessä. Takana olevaa nyöritystä kiristämällä kevennetään SI-nivelen kuormitusta. Mukana tulee irrotettavat nivusnauhat.

Käyttöalueet: SI-nivelen tai häpyliitoksen vaivat.

Muuta: Koko = Lantion ympärys

Tuotenro.	Väri	Koko	Takaosan korkeus	Etuosan korkeus
21021	Beige	75 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	80 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	85 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	90 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	95 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	100 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	105 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	110 cm	8 cm	10 cm



SI-vyö

SIO - vyö sacro-iliaca-nivelelle. Vyön sisäpuoli on elastinen. Päällimmäinen tukivyö on joustamaton ja antaa hyvän tuen nivelelle ja keventää kuormitusta. Sopii sekä suoralle että muodokkaalle vartalotyyppille. Vyön sisäpuolella on liukuesteet luistamattomasta materiaalista. Sacrumin kohdalla on irrotettava pelotti.

Käyttöalueet: SI-nivelen tai häpyliitoksen vaivat.

Tuotenro.	Väri	Koko	Lantion ympärys	Takaosan korkeus	Etuosan korkeus
21030	Musta	Small	67-80 cm	7,5 cm	7,5 cm
21030	Musta	Medium	80-98 cm	7,5 cm	7,5 cm
21030	Musta	Large	98-116 cm	7,5 cm	7,5 cm
21030	Musta	X-Large	116-133 cm	7,5 cm	7,5 cm
21030	Musta	XX-Large	133-150 cm	7,5 cm	7,5 cm





MAMMY raskausajan tukivyö

Anatominen raskausajan tukivyö, joka voidaan säätää sopivaksi mahan kasvaessa. Tukivyö nostaa vatsaa vähentäen rasitusta lantionseudulla. Tukikiskot selässä tukevat selkää ryhdikkäämpään asentoon vähentäen selkäkipua. Sivuilla olevat lisänauhat antavat lisätukea selälle. Vyö on valmistettu modernista ja pehmeästä materiaalista tehden siitä mukavantuntuisen ja kevyen.

Käyttöalueet: Raskausaikaan liittyvät selkäkiput ja/tai lantion seudun kiputilat.

Tuotenro.	Väri	Koko	Lantion ympärys	Takaosan korkeus	Etuosan korkeus
22149	Harmaa	Yksi koko	90-130cm	13 cm	7 cm

Elcross® LUX matala

SIO - Tämä matala malli on tarkoitettu käytettäväksi sakroiliakaalisena tukena, mutta sitä voi myös käyttää lumbosakraalisesti. ELCROSS®LUX on keskitukeva elastinen tukiliivi ja se on valmistettu innovatiivisesta "Resistex® Carbon"-materiaalista, joka tuntuu keholla viileältä ja mukavalta. Materiaali on antistaattinen, siinä on lämmönsäätelyyn vaikuttavia ominaisuuksia, kuljettaa kosteutta iholta ja on Öko-Tex 100 sertifioitu. Lisänauhat voidaan asettaa toivotusti. Nauhojen reunoilla on lisäosat, joista saa otteen tukea riisuttaessa. Sopii sekä suoralle että kurvikkaalle vartalolle. Tukiluut takana ja sivuilla tuovat stabiliteettia yhdessä lisävöiden kanssa. Edessä on tarrakiinnitys. Selässä on avoimet kanavat, joihin voi tarvittaessa pujottaa muotoiltavat lisätuet, jotka ovat mukana pakkauksessa. ELCROSS®LUX materiaali ei sisällä lateksia.

Käyttöalueet: Selkäkipu ja selän toimintahäiriö.

Tuotenro.	Väri	Koko	Lantion ympärys	Takaosan korkeus	Etuosan korkeus
22171	Beige	Small	85 - 95 cm	19 cm	15 cm
22171	Beige	Medium	95 - 105 cm	19 cm	15 cm
22171	Beige	Large	105 - 115 cm	19 cm	15 cm
22171	Beige	X-Large	115 - 125 cm	19 cm	15 cm
22171	Beige	XX-Large	125 - 135 cm	19 cm	15 cm

ELEMENTS selkätuki

Tämä tuote on tarkoitettu lievien ja tilapäisten vaivojen hoitoon, kuten esim. kiputilat, selän heikkous tai vastaava. Tuki stabiloi lannerankaa kompression avulla. Tuki lämmittää selkää.

Käyttöalueet: Tilapäisten vaivojen hoitoon, kuten esim. kiputilat, selän heikkous tai vastaava.

Kontraindikaatiot: Neurologista alkuperää olevat selän ongelmat.

Tuotenro.	Väri	Koko	Lantion ympärys
34102	Beige/Musta	Small	82 - 95 cm
34102	Beige/Musta	Medium	92 - 105 cm
34102	Beige/Musta	Large	102 - 115 cm
34102	Beige/Musta	X-Large	112 - 125 cm
34102	Beige/Musta	XX-Large	122 - 135 cm



SELECTION® selkätuki, matala

SIO - Joustava helppokäyttöinen selkätuki, joka on valmistettu mukavantuntuisesta SELECTION®-materiaalista, jonka tuntomerkkeinä ovat hengittävyys, keveys ja optimaalinen istuvuus. Malli sopii sekä muodokkaalle että suoralle vartalotyypille ja siinä on lisätukea antavat kiristysnauhat, jotka kulkevat ristiin selkäpuolella. Kiristysnauhat liukuvat erittäin helposti niille suunnitelluissa D-lenkeissä. Selkäpuolen kiskojen tai spiraalitukien sijaan tuessa on uudenlainen tukiratkaisu, joka jakaa tuennan laajemmalle alueelle jättäen kuitenkin selkärangan vapaaksi. Etuosassa on vetolenkki sekä vetotasku, jotka helpottavat tuen pukemista. Etuosan materiaali on rakenteeltaan uudenlaista, joka tekee kiinnittämisen helpoksi ilman jäykkyyttä tarranauhoja. Selection selkätuen materiaali on korkealaatuista ja sen toiminnallisuus on ollut painopisteenä tukea kehitettäessä.

Käyttöalueet: Selkäkiput ja selän toimintahäiriöt.

Muuta: Tuotteesta on saatavana käyttöohjevideo Camp Scandinavian YouTube-kanavalla. Videon löydät osoitteesta www.youtube.com hakusanalla Camp Scandinavia.



Tuotenro.	Väri	Koko	Lantion ympärys	Takaosan korkeus	Etuosan korkeus
35400	Musta	X-Small	75-85 cm	19 cm	12 cm
35400	Musta	Small	85-95 cm	19 cm	12 cm
35400	Musta	Medium	95-105 cm	19 cm	12 cm
35400	Musta	Large	105-115 cm	19 cm	12 cm
35400	Musta	X-Large	115-125 cm	19 cm	12 cm
35400	Musta	XX-Large	125-140 cm	19 cm	12 cm



SELECTION® selkätuki, keskikorkea

LSO - Joustava ja helppokäyttöinen selkätuki, joka on valmistettu mukavantuntuisesta SELECTION®-materiaalista, jonka tuntomerkkeinä ovat hengittävyys, keveys ja optimaalinen istuvuus. Malli sopii sekä muodokkaalle että suoralle vartalotyypille ja siinä on lisätukea antavat kiristysnauhat, jotka kulkevat ristiin selkäpuolella. Kiristysnauhat liukuvat erittäin helposti niille suunnitelluissa D-lenkeissä. Selkäpuolen kiskojen tai spiraalitukien sijaan tuessa on uudenlainen tukiratkaisu, joka jakaa tuennan laajemmalle alueelle jättäen kuitenkin selkärangan vapaaksi. Etuosassa on vetolenkki sekä vetotasku, jotka helpottavat tuen pukemista. Etuosan materiaali on rakenteeltaan uudenlaista, joka tekee kiinnittämisen helpoksi ilman jäykkä tarranauhoja. Selection selkätuen materiaali on korkealaatuaista ja sen toiminnallisuus on ollut painopisteenä tukea kehitettäessä.

Käyttöalueet: Selkäkivut ja selän toimintahäiriöt.

Muuta: Tuotteesta on saatavana käyttöohjevideo Camp Scandinavian YouTube-kanavalla. Videon löydät osoitteesta www.youtube.com hakusanalla Camp Scandinavia.

Tuotenro.	Väri	Koko	Lantion ympäryys	Takaosan korkeus	Etuosan korkeus
35401	Musta	X-Small	75-85 cm	23 cm	16 cm
35401	Musta	Small	85-95 cm	23 cm	16 cm
35401	Musta	Medium	95-105 cm	23 cm	16 cm
35401	Musta	Large	105-115 cm	23 cm	16 cm
35401	Musta	X-Large	115-125 cm	23 cm	16 cm
35401	Musta	XX-Large	125-140 cm	23 cm	16 cm
35401	Musta	XXX-Large	140 - 160 cm	23 cm	16 cm

SELECTION® selkätuki, vatsamalli

ABDO - Joustava ja helppokäyttöinen selkätuki, joka on valmistettu mukavantuntuisesta SELECTION® -materiaalista, jonka tunto-merkkeinä ovat hengittävyys, keveys ja optimaalinen istuvuus. Malli sopii erityisesti henkilöille, joiden vatsa on suuri ja jotka tarvitsevat mahan alueelle lisätukea. Edessä oleva kiinnitys on kaksiosainen, mikä helpottaa kiinnitystä ja etuosan korkeuden säätöä. Lisätukea antavat kiristysnauhat kulkevat ristiin selkäpuolella. Selkäpuolen kiskojen tai spiraalitukien sijaan liivissä on uudenlainen tukiratkaisu, joka jakaa tukipisteet laajemmalle alueelle jättäen kuitenkin selkärangan vapaaksi. Etuosassa on vetolenkki sekä vetotasku, jotka helpottavat tuen pukemista. Etuosan materiaali on rakenteeltaan uudenlaista, joka tekee kiinnittämisen helpoksi ilman jäykkä tarranauhoja. Selection selkätuen materiaali on korkealaatuista ja sen toiminnallisuus on ollut painopisteenä tukea kehitettäessä.

Käyttöalueet: Selkäkiput ja selän toimintahäiriöt vatsakailla henkilöillä.



Tuotenro.	Väri	Koko	Lantion ympäryys	Takaosan korkeus	Etuosan korkeus
35402	Musta	Small	85-95 cm	31,5 cm	25 cm
35402	Musta	Medium	95-105 cm	31,5 cm	25 cm
35402	Musta	Large	105-115 cm	31,5 cm	25 cm
35402	Musta	X-Large	115-125 cm	31,5 cm	25 cm
35402	Musta	XX-Large	125-140 cm	31,5 cm	25 cm
35402	Musta	XXX-Large	140-160 cm	31,5 cm	25 cm

NAVY X™



Navy-X selkätukia on nyt saatavana kolmea eri korkeutta - matala, keskikorkea ja korkea. Keskikorkeaa mallia on lisäksi saatavana kolmea eri väriä - tumman sininen, beige ja harmaa.

Yhteistä kaikilla näillä tuotteilla on:

- kulutustakestävä ilmava materiaali
- tukea antavat lisänauhat
- eri vartalotyypeille muotoutuva malli



Korkeassa mallissa on kaksiosainen kiinnitys edessä ja selkäpuolella erilliset tukilastakujat vahvempia tukilastoja varten.

Kaikki mallit ovat saatavana ko'oissa XSmall-XXLarge, lantionympärysmitoissa 75-135 cm.



Korkeus cm:nä:

	Etuosa	Takaosa
23549 Sininen	12	18,5
23554 Harmaa	12	18,5
23550 Sininen	16	22
23555 Harmaa	16	22
23560 Beige	16	22
23552 Sininen	25	31



Navy X™ matala

SIO - Elastisesta ja erittäin kulutusta kestävästä ja tukevasta materiaalista valmistettu ilmava liivi, joka sopii sekä suoralle että muodokkaalle vartalotyyppille. Leveät vetonauhat ja muovikiskot takana ja sivuilla tukevat hyvin. Tarranauhakiinnitys. Liivi sopii fyysiseen työhön. Liivi on suunniteltu tukemaan sakroilialaisesti, mutta lyhyillä ihmisillä se toimii myös lumbosakraalisesti.

Käyttöalueet: Selkäkiput ja selän toimintahäiriöt.

Tuotenro.	Väri	Koko	Lantion ympäryys	Takaosan korkeus	Etuosan korkeus
23549	Sininen	X-Small	75-85 cm	18,5 cm	12 cm
23549	Sininen	Small	85-95 cm	18,5 cm	12 cm
23549	Sininen	Medium	95-105 cm	18,5 cm	12 cm
23549	Sininen	Large	105-115 cm	18,5 cm	12 cm
23549	Sininen	X-Large	115-125 cm	18,5 cm	12 cm
23549	Sininen	XX-Large	125-135 cm	18,5 cm	12 cm
23554	Harmaa	X-Small	75-85 cm	18,5 cm	12 cm
23554	Harmaa	Small	85-95 cm	18,5 cm	12 cm
23554	Harmaa	Medium	95-105 cm	18,5 cm	12 cm
23554	Harmaa	Large	105-115 cm	18,5 cm	12 cm
23554	Harmaa	X-Large	115-125 cm	18,5 cm	12 cm
23554	Harmaa	XX-Large	125-135 cm	18,5 cm	12 cm





Navy X™ keskikorkea

LSO - Elastisesta ja erittäin kulutusta kestävästä ja tukevasta materiaalista valmistettu ilmava liivi, joka sopii sekä suoralle että muodokkaalle vartalotyypille. Leveät vetonauhat ja muovilastat takana ja sivuilla tukevat hyvin. Tarranauhakiinnitys. Liivi sopii fyysiseen työhön.

Käyttöalueet: Selkäkivut ja selän toimintahäiriöt.


Tuotenro.	Väri	Koko	Lantion ympäryys	Takaosan korkeus	Etuosan korkeus
23550	Sininen	X-Small	75-85 cm	22 cm	16 cm
23550	Sininen	Small	85-95 cm	22 cm	16 cm
23550	Sininen	Medium	95-105 cm	22 cm	16 cm
23550	Sininen	Large	105-115 cm	22 cm	16 cm
23550	Sininen	X-Large	115-125 cm	22 cm	16 cm
23550	Sininen	XX-Large	125-135 cm	22 cm	16 cm
23560	Beige	Small	85-95 cm	22 cm	16 cm
23560	Beige	Medium	95-105 cm	22 cm	16 cm
23560	Beige	Large	105-115 cm	22 cm	16 cm
23560	Beige	X-Large	115-125 cm	22 cm	16 cm
23560	Beige	XX-Large	125-135 cm	22 cm	16 cm
23555	Harmaa	X-Small	75-85 cm	22 cm	16 cm
23555	Harmaa	Small	85-95 cm	22 cm	16 cm
23555	Harmaa	Medium	95-105 cm	22 cm	16 cm
23555	Harmaa	Large	105-115 cm	22 cm	16 cm
23555	Harmaa	X-Large	115-125 cm	22 cm	16 cm
23555	Harmaa	XX-Large	125-135 cm	22 cm	16 cm

Navy X™ korkea

LSO - Elastisesta ja erittäin kulutusta kestävästä ja tukevasta materiaalista valmistettu ilmava liivi. Malli on korkea ja siinä on kaksiosainen kiinnitys edessä sekä lisänauhat lisäämään stabiliteettia. Liivissä on avoimet tukilastakujat, joihin voi halutessa laittaa stabiilimmat tukilastat.

Käyttöalueet: Selkäkiput ja selän toimintahäiriöt.

Tuotenro.	Väri	Koko	Lantion ympäryys	Takaosan korkeus	Etuosan korkeus
23552	Tummansininen	X-Small	75-85 cm	31 cm	25 cm
23552	Tummansininen	Small	85-95 cm	31 cm	25 cm
23552	Tummansininen	Medium	95-105 cm	31 cm	25 cm
23552	Tummansininen	Large	105-115 cm	31 cm	25 cm
23552	Tummansininen	X-Large	115-125 cm	31 cm	25 cm
23552	Tummansininen	XX-Large	125-135 cm	31 cm	25 cm
23553	Lisätukilastat, alumiini 2 kpl	2 cm x 26 cm			

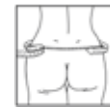



Elcross® LUX Keskikorkea

LSO – Keskikorkea tukiliivi tukee lumbosakraalisesti. ELCROSS®LUX sarjan tuet ovat keskitukevia elastisia tukiliivejä, jotka on valmistettu innovatiivisesta ”Resistex® Carbon”-materiaalista, joka tuntuu keholla viileältä ja mukavalta. Materiaali on antistaattinen, siinä on lämmönsäätelyyn vaikuttavia ominaisuuksia, kuljettaa kosteutta iholta ja on Öko-Tex 100 sertifioitu. Lisänauhat voidaan asettaa toivotusti. Nauhojen reunoilla on lisäosat, joista saa otteen tukea riisuttaessa. Sopii sekä suoralle että kurvikkaalle vartalolle. Tukiluut takana ja sivuilla tuovat stabiliteettia yhdessä lisävöiden kanssa. Edessä on tarrakiinnitys. Selässä on avoimet kanavat, joihin voi tarvittaessa pujottaa muotoiltavat lisätuet, jotka ovat mukana pakkauksessa. ELCROSS®LUX materiaali ei sisällä lateksia. Saatavana beige tai harmaa.

Käyttöalueet: Selkäkipu ja selän toimintahäiriö.

Tuotenro.	Väri	Koko	Lantion ympärys	Takaosan korkeus	Etuosan korkeus
22172	Beige	Small	85 - 95 cm	28 cm	19 cm
22172	Beige	Medium	95 - 105 cm	28 cm	19 cm
22172	Beige	Large	105 - 115 cm	28 cm	19 cm
22172	Beige	X-Large	115 - 125 cm	28 cm	19 cm
22172	Beige	XX-Large	125 - 135 cm	28 cm	19 cm
22176	Harmaa	Small	85 - 95 cm	28 cm	19 cm
22176	Harmaa	Medium	95 - 105 cm	28 cm	19 cm
22176	Harmaa	Large	105 - 115 cm	28 cm	19 cm
22176	Harmaa	X-Large	115 - 125 cm	28 cm	19 cm
22176	Harmaa	XX-Large	125 - 135 cm	28 cm	19 cm

Elcross® Light keskikorkea

LSO - Selkätuki, joka on valmistettu erittäin joustavasta materiaalista, mutta joka tukee 50% enemmän kuin tavalliset tukiliivit. Tuen kaksi lycrasta valmistettua kerrosta ovat ohuempia ja ilmavampia kuin tavallisessa Elcross-materiaalissa. Tuki sopii sekä suoralle että muodokkaalle vartalotyyppille. Takana ja sivulla olevat tukilastat sekä lisätukea antavat kiristysnauhat antavat hyvän tuen selälle.

Käyttöalueet: Selkäkiput ja selän toimintahäiriöt.

Muuta: Valitse kahdesta koosta suurempi, mikäli mitta on ylemmässä intervallissa.



Tuotenro.	Väri	Koko	Lantion ympäryys	Takaosan korkeus	Etuosan korkeus
22159	Musta	Small	85-95 cm	28 cm	20 cm
22159	Musta	Medium	95-105 cm	28 cm	20 cm
22159	Musta	Large	105-115 cm	28 cm	20 cm
22159	Musta	X-Large	115-125 cm	28 cm	20 cm
22159	Musta	XX-Large	125-135 cm	28 cm	20 cm



Elcross® LUX korkea

LSO - Tämä hieman korkeampi tukiliivi soveltuu hyvin pitkille henkilöille sekä silloin kun tukea halutaan myös rintarangan alaosille. ELCROSS®LUX sarjan tuet ovat keskitukevia elastisia tukiliivejä, jotka on valmistettu innovatiivisesta "Resistex® Carbon"-materiaalista, joka tuntuu keholla viileältä ja mukavalta.

Materiaali on antistaattinen, siinä on lämmönsäätelyyn vaikuttavia ominaisuuksia, kuljettaa kosteutta iholta ja on Öko-Tex 100 sertifioitu. Lisänauhat voidaan asettaa toivotusti. Nauhojen reunoilla on lisäosat, joista saa otteen tukea riisuttaessa. Sopii sekä suoralle että kurvikkaalle vartalolle. Tukiluut takana ja sivuilla tuovat stabiliteettia yhdessä lisävöiden kanssa. Edessä on tarrakiinnitys. Selässä on avoimet kanavat, joihin voi tarvittaessa pujottaa muotoiltavat lisätuet, jotka ovat mukana pakkauksessa. ELCROSS®LUX materiaali ei sisällä lateksia. Saatavana beige tai harmaa.

Käyttöalueet: Selkäkipu ja selän toimintahäiriö.

Tuotenro.	Väri	Koko	Lantion ympärys	Takaosan korkeus	Etuosan korkeus
22173	Beige	Small	85 - 95 cm	33 cm	23 cm
22173	Beige	Medium	95 - 105 cm	33 cm	23 cm
22173	Beige	Large	105 - 115 cm	33 cm	23 cm
22173	Beige	X-Large	115 - 125 cm	33 cm	23 cm
22173	Beige	XX-Large	125 - 135 cm	33 cm	23 cm
22177	Harmaa	Small	85 - 95 cm	33 cm	23 cm
22177	Harmaa	Medium	95 - 105 cm	33 cm	23 cm
22177	Harmaa	Large	105 - 115 cm	33 cm	23 cm
22177	Harmaa	X-Large	115 - 125 cm	33 cm	23 cm
22177	Harmaa	XX-Large	125 - 135 cm	33 cm	23 cm


Elcross® Light korkea

LSO - Selkätuki, joka on valmistettu erittäin joustavasta materiaalista, mutta joka tukee 50% enemmän kuin tavalliset tukiliivit. Tuen kaksi lycraa valmistettua kerrosta ovat ohuempia ja ilmavampia kuin tavallisessa Elcross- materiaalissa. Tuki sopii sekä suoralle että muodokkaalle vartalotyyppille. Takana ja sivulla olevat tukilastat sekä lisätukea antavat kiristysnauhat antavat hyvän tuen selälle.

Käyttöalueet: Selkäkiput ja selän toimintahäiriöt.

Muuta: Valitse kahdesta koosta suurempi, mikäli mitta on ylemmässä intervallissa.

Tuotenro.	Väri	Koko	Lantion ympäryys	Takaosan korkeus	Etuosan korkeus
22160	Musta	Small	85-95 cm	33 cm	23 cm
22160	Musta	Medium	95-105 cm	33 cm	23 cm
22160	Musta	Large	105-115 cm	33 cm	23 cm
22160	Musta	X-Large	115-125 cm	33 cm	23 cm
22160	Musta	XX-Large	125-135 cm	33 cm	23 cm

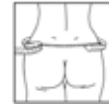

Camp MAX tukiliivi, keskikorkea

LSO – Joustava tukiliivi, joka muotoutuu hyvin vartaloa vasten. Tuki on puolijäykkä ja se antaa lumbosakraalisen tuen. Tuki on valmistettu pehmeästä ja ilmavasta materiaalista. Patentoidut lisätukea antavat kiristysnauhat muotoutuvat hyvin vartaloa vasten ja tukevat tasaisesti. Selässä on avoimet tukilastakujat ja kevyesti muotoillut tukilastat sekä etuosassa pehmeä tarranauhakiinnitys. Camp Max tukiliivi on kevyt ja erittäin mukavantuntuinen pitää yllä.

Käyttöalueet: Selkäkiput ja selän toimintahäiriöt.

Muuta: Valitse kahdesta koosta suurempi, mikäli mitta on ylemmässä intervallissa.

Tuotenro.	Väri	Koko	Lantion ympäryys	Takaosan korkeus	Etuosan korkeus
22140	Harmaa	Small	80-95 cm	28 cm	20 cm
22140	Harmaa	Medium	90-105 cm	28 cm	20 cm
22140	Harmaa	Large	100-115 cm	28 cm	20 cm
22140	Harmaa	X-Large	110-125 cm	28 cm	20 cm
22140	Harmaa	XX-Large	120-135 cm	28 cm	20 cm





Camp MAX tukiliivi, korkea

LSO – Joustava tukiliivi, joka muotoutuu hyvin vartaloa vasten. Tuki on puolijäykkä ja se antaa lumbosakraalisen tuen. Tuki on valmistettu pehmeästä ja ilmastavasta materiaalista. Patentoidut lisätukea antavat kiristysnauhat muotoutuvat hyvin vartaloa vasten ja tukevat tasaisesti. Selässä on avoimet tukilastakujat ja kevyesti muotoillut tukilastat sekä etuosassa pehmeä tarranauhakiinnitys. Camp Max tukiliivi on kevyt ja erittäin mukavantuntuinen pitää yllä.

Käyttöalueet: Selkäkiput ja selän toimintahäiriöt.

Muuta: Valitse kahdesta koosta suurempi, mikäli mitta on ylemmässä intervallissa.

Tuotenro.	Väri	Koko	Lantion ympärys	Takaosan korkeus	Etuosan korkeus
22141	Harmaa	Small	80-95 cm	33 cm	20 cm
22141	Harmaa	Medium	90-105 cm	33 cm	20 cm
22141	Harmaa	Large	100-115 cm	33 cm	20 cm
22141	Harmaa	X-Large	110-125 cm	33 cm	20 cm
22141	Harmaa	XX-Large	120-135 cm	33 cm	20 cm



Camp MAX tukiliivi, extra korkea

LSO – Joustava tukiliivi, joka muotoutuu hyvin vartaloa vasten. Tuki on puolijäykkä ja se antaa lumbosakraalisen tuen. Tuki on valmistettu pehmeästä ja ilmastavasta materiaalista. Patentoidut lisätukea antavat kiristysnauhat muotoutuvat hyvin vartaloa vasten ja tukevat tasaisesti. Selässä on avoimet tukilastakujat ja kevyesti muotoillut tukilastat sekä etuosassa pehmeä tarranauhakiinnitys. Camp Max tukiliivi on kevyt ja erittäin mukavantuntuinen pitää yllä.

Käyttöalueet: Selkäkiput ja selän toimintahäiriöt.

Muuta: Valitse kahdesta koosta suurempi, mikäli mitta on ylemmässä intervallissa.


Tuotenro.	Väri	Koko	Lantion ympärys	Takaosan korkeus	Etuosan korkeus
22142	Harmaa	Small	80-95 cm	35 cm	23 cm
22142	Harmaa	Medium	90-105 cm	35 cm	23 cm
22142	Harmaa	Large	100-115 cm	35 cm	23 cm
22142	Harmaa	X-Large	110-125 cm	35 cm	23 cm
22142	Harmaa	XX-Large	120-135 cm	35 cm	23 cm

SpinAir Selkäortoosi

SpinAir on tarkoitettu osteoporoosi- ja kyfoosipotilaille. Ortoosi tarjoaa tehokkaan ja mukavan hoidon. Ortoosi tukee ja helpottaa hartioiden taakse vientiä ilman kylkiluiden tukea ja lisää mukavuutta. Lumbaalivahvistukset antavat lisä-stabiliteettia ja parantavat alaselän istuvuutta. SpinAir on kevyt ja helppo sovittaa potilaalle eikä näy häiritsevästi. Joustava olkapään hihna myötäilee hartiasseudun anatomiaa. Pehmuste antaa lisämukavuutta potilaalle. Olkapään hihnaa voidaan säätää tarpeen mukaan ja asteittain parempaan asentoon. Se voidaan myös leikata sovittuun pituuteen.

Käyttöalueet: Osteoporoosi, kyfoosi, selkärangan artroosi.

Tuotenro.	Malli	Koko	Lantion ympäryys	Takaosan korkeus
22146	SpinAir	Small I	78-93 cm	51-59 cm
22146	SpinAir	Medium I	90-105 cm	51-59 cm
22146	SpinAir	Medium2	90-105 cm	59-68 cm
22146	SpinAir	Large2	103-120 cm	59-68 cm
22146	SpinAir	Large3	103-120 cm	68-75 cm
22147	SpinAir Pidennysnauha	Yksi koko		

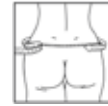

Mitta: Mitta "Selän korkeus" mitataan Th2:sta SI:een.

Elcross® LUX hartia

TO – Elastinen pehmeä ryhtituki innovatiivisesta "Resistex® Carbon"-materiaalista, joka tuntuu keholla viileältä ja mukavalta. Materiaali on antistaattinen, siinä on lämmönsäätelyyn vaikuttavia ominaisuuksia, kuljettaa kosteutta iholta ja on Öko-Tex 100 sertifioitu. Potilaille, jotka tarvitsevat rintarangan tukea tai esimerkiksi ryhtihoitoa. Pehmustetut nauhat eivät hierrä kainaloa. Tarrakiinnitys edessä. ELCROSS®LUX materiaali ei sisällä lateksia.

Käyttöalueet: Selän toimintahäiriöt, kyfoosi ja ryhtiongelmat.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta
22175	Beige	Small	70 - 80 cm
22175	Beige	Medium	80 - 90 cm
22175	Beige	Large	90 - 100 cm
22175	Beige	X-Large	100 - 110 cm
22175	Beige	XX-Large	110 - 120 cm



Mitta: Ympärysmitta rintojen alapuolelta.



Elcross® LUX Vatsamalli

ABDO - Tämä malli on tarkoitettu erityisesti silloin kun vatsa on suuri. Tuki stabiloi selkää ja samalla tukee ja nostaa vatsaa. Etukappaleen sivulla on kiinnitystä varten leveä tarraosa, joka mahdollistaa monipuolisesti leveyden ja muodon säätämisen. Voidaan käyttää myös raskausajan tukiliivinä. Lisävyö voidaan asettaa joko vatsan päälle tai alle. ELCROSS®LUX sarjan tuet ovat keskitukevia elastisia tukiliivejä, jotka on valmistettu innovatiivisesta "Resistex® Carbon"-materiaalista, joka tuntuu keholla viileältä ja mukavalta. Materiaali on antistaattinen, siinä on lämmönsäätelyyn vaikuttavia ominaisuuksia, kuljettaa kosteutta iholta ja on Öko-Tex 100 sertifioitu. Lisänauhat voidaan asettaa toivotusti. Nauhojen reunoilla on lisäosat, joista saa otteen tukea riisuttaessa. Sopii sekä suoralle että kurvikkaalle vartalolle. Tukiliut takana ja sivuilla tuovat stabiliteettia yhdessä lisävöiden kanssa. Edessä on tarrakiinnitys. Selässä on avoimet kanavat, joihin voi tarvittaessa pujottaa muotoiltavat lisätuet, jotka ovat mukana pakkauksessa. ELCROSS®LUX materiaali ei sisällä lateksia.

Käyttöalueet: Selkäkipu ja selän toimintahäiriö. Löysät vatsalihakset, lievä tyrä.

Tuotenro.	Väri	Koko	Lantion ympärys	Takaosan korkeus	Etuosan korkeus
22174	Beige	Medium	95 - 105 cm	28 cm	26 cm
22174	Beige	Large	105 - 115 cm	28 cm	26 cm
22174	Beige	X-Large	115 - 125 cm	28 cm	26 cm
22174	Beige	XX-Large	125 - 135 cm	28 cm	26 cm



Selkälevy


Campolitesta valmistettu, sydämenmuotoinen selkälevy, joka on päällystetty froteella. Levy kiinnitetään liiviin tarralla. Uurrettu selkärangan kohdalta estämään painaumia.

Tuotenro.	Koko	Leveys	Paksuus	Korkeus
22135	Yksi koko	18 cm	1 cm	16 cm

Camp® ONE matala

LSO - Camp® ONE on sarja tukevia kangaskorsetteja eri korkeuksissa. Materiaali on tukevaa kangasta, jonka perusta on puuvilla (60% puuvilla, lisäksi polyamidi, elastaani ja polyesteri). Materiaalit yhdessä tarjoavat stabiilitettä ja kestävyyttä. Matala malli tukee selän alaosa ja sacrumia. Helppo pukea ja riisua sekä säätää haluttu tuki ja kompressio. Edessä tarrakiinnitys. Tuen sivuilla on lenkit, joiden kautta vetonauhat kulkevat sujuvasti. Tuplanauhoitus tuo stabiilitettä ja istuvuutta. Korsetin sisään on ommeltu muoviset tukiluut ja lisäksi liivissä on avoimet kanavat 2 muotoiltavalle lisätukiluulle, jotka toimitetaan pakkauksessa mukana. Materiaali muotoutuu hyvin ja istuu siksi sekä suoralle että muodokkaalle vartalotyypille. Camp®ONE materiaali ei sisällä lateksia.

Käyttöalueet: Selkäkipu ja selän toimintahäiriö.

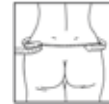

Tuotenro.	Väri	Koko	Lantion ympärys	Takaosan korkeus	Etuosan korkeus
22178	Harmaa	Small	80 - 90 cm	28 cm	18 cm
22178	Harmaa	Medium	90 - 100 cm	28 cm	18 cm
22178	Harmaa	Large	100 - 110 cm	28 cm	18 cm
22178	Harmaa	XX-Large	120 - 130 cm	28 cm	18 cm

Camp® ONE keskikorkea

LSO - Camp® ONE on sarja tukevia kangaskorsetteja eri korkeuksissa. Materiaali on tukevaa kangasta, jonka perusta on puuvilla (60% puuvilla, lisäksi polyamidi, elastaani ja polyesteri). Materiaalit yhdessä tarjoavat stabiilitettä ja kestävyyttä. Keskikorkea malli tukee lannerankaa. Helppo pukea ja riisua sekä säätää haluttu tuki ja kompressio. Edessä tarrakiinnitys. Tuen sivuilla on lenkit, joiden kautta vetonauhat kulkevat sujuvasti. Tuplanauhoitus tuo stabiilitettä ja istuvuutta. Korsetin sisään on ommeltu muoviset tukiluut ja lisäksi liivissä on avoimet kanavat 2 muotoiltavalle lisätukiluulle, jotka toimitetaan pakkauksessa mukana. Materiaali muotoutuu hyvin ja istuu siksi sekä suoralle että muodokkaalle vartalotyypille. Camp®ONE materiaali ei sisällä lateksia.

Käyttöalueet: Selkäkipu ja selän toimintahäiriö



Tuotenro.	Väri	Koko	Lantion ympärys	Takaosan korkeus	Etuosan korkeus
22179	Harmaa	X-Small	70 - 80 cm	33 cm	20 cm
22179	Harmaa	Small	80 - 90 cm	33 cm	20 cm
22179	Harmaa	Medium	90 - 100 cm	33 cm	20 cm
22179	Harmaa	Large	100 - 110 cm	33 cm	20 cm
22179	Harmaa	X-Large	110 - 120 cm	33 cm	20 cm
22179	Harmaa	XX-Large	120 - 130 cm	33 cm	20 cm



Camp® ONE korkea

LSO - Camp® ONE on sarja tukevia kangaskorsetteja eri korkeuksissa. Materiaali on tukevaa kangasta, jonka perusta on puuvilla (60% puuvilla, lisäksi polyamidi, elastaani ja polyesteri). Materiaalit yhdessä tarjoavat stabiiliteettia ja kestävyyttä. Tämä hieman korkeampi malli tukee lannerankaa ja rintarangan alaosa. Soveltuu hyvin myös henkilöille, joilla on pitkä selkä. Helppo pukea ja riisua sekä säätää haluttu tuki ja kompressio. Edessä tarrakiinnitys. Tuen sivuilla on lenkit, joiden kautta vetonauhat kulkevat sujuvasti. Tuplanauhoitus tuo stabiiliteettia ja istuvuutta. Korsetin sisään on ommeltu muoviset tukiluut ja lisäksi liivissä on avoimet kanavat 2 muotoiltavalle lisätukiluulle, jotka toimitetaan pakkauksessa mukana. Materiaali muotoutuu hyvin ja istuu siksi sekä suoralle että muodokkaalle vartalotyypille. Camp®ONE materiaali ei sisällä lateksia.

Käyttöalueet: Selkäkipu ja selän toimintahäiriö

Tuotenro.	Väri	Koko	Lantion ympärys	Takaosan korkeus	Etuosan korkeus
22180	Harmaa	XX-Small	60 - 70 cm	38 cm	23 cm
22180	Harmaa	X-Small	70 - 80 cm	38 cm	23 cm
22180	Harmaa	Small	80 - 90 cm	38 cm	23 cm
22180	Harmaa	Medium	90 - 100 cm	38 cm	23 cm
22180	Harmaa	Large	100 - 110 cm	38 cm	23 cm
22180	Harmaa	X-Large	110 - 120 cm	38 cm	23 cm
22180	Harmaa	XX-Large	120 - 130 cm	38 cm	23 cm



Camp® ONE lisävarusteet

Lisävarusteena erillinen lastatasku, kun toivotaan lisästabiiliteettia. Lastataskua löytyy kahtena leveytenä niihin kuuluvine kanttinahoiheen.

Tuotenro.	Malli	Leveys	Pituus
22183	Harmaa kanttinauha		125 m
22184	Materiaali lastataskuun harmaa	25 mm	30 m
22184	Materiaali lastataskuun harmaa	34 mm	30 m


Camp® XXI keskikorkea

LSO - Kangastukiliivi puuvillasta, johon on ommeltu polymeerilankaa, mikä tekee siitä hieman joustavan. Sopii näin sekä suoralle että muodokkaalle vartalotyypille. Kummallakin sivulla on kaksinkertainen Camp-nyöritys tarrakiinnityksellä. Sopii henkilöille, joilla käden toiminnot ovat heikot, sillä liiviä on helppo säätää nyörien ja tarranauhojen avulla. Selässä on avonaiset tukilastakujat sekä kaksi tukilastaa. Tarranauhakiinnitys edessä.

Käyttöalueet: Selkäkiput ja selän toimintahäiriöt.

Muuta: Valitse kahdesta koosta suurempi, mikäli mitta on ylemmässä intervallissa.

Tuotenro.	Väri	Koko	Lantion ympäryys	Takaosan korkeus	Etuosan korkeus
29432	Beige	Small	80-95 cm	27 cm	20 cm
29432	Beige	Medium	90-105 cm	27 cm	20 cm
29432	Beige	Large	100-115 cm	27 cm	20 cm
29432	Beige	X-Large	110-125 cm	27 cm	20 cm
29432	Beige	XX-Large	120-135 cm	27 cm	20 cm

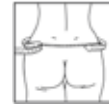

Camp® XXI korkea

LSO - Kangastukiliivi puuvillasta, johon on ommeltu polymeerilankaa, mikä tekee siitä hieman joustavan. Sopii näin sekä suoralle että muodokkaalle vartalotyypille. Kummallakin sivulla on kaksinkertainen Camp-nyöritys tarrakiinnityksellä. Sopii henkilöille, joilla käden toiminnot ovat heikot, sillä liiviä on helppo säätää nyörien ja tarranauhojen avulla. Selässä on avonaiset tukilastakujat sekä kaksi tukilastaa. Tarranauhakiinnitys edessä.

Käyttöalueet: Selkäkiput ja selän toimintahäiriöt.

Muuta: Valitse kahdesta koosta suurempi, mikäli mitta on ylemmässä intervallissa.

Tuotenro.	Väri	Koko	Lantion ympäryys	Takaosan korkeus	Etuosan korkeus
29433	Beige	Small	80-95 cm	32 cm	25 cm
29433	Beige	Medium	90-105 cm	32 cm	25 cm
29433	Beige	Large	100-115 cm	32 cm	25 cm
29433	Beige	X-Large	110-125 cm	32 cm	25 cm
29433	Beige	XX-Large	120-135 cm	32 cm	25 cm





Camp® XXITLSO

TLSO - Puuvillainen torakolumbosakraalinen liivi, johon on ommeltu polymeerilankaa, mikä tekee siitä hieman elastisen. Sopii sekä suoralle että muodokkaalle vartalo-tyypille. Kummallakin sivulla on kaksinkertainen Camp-nyöritys tarranauhakiinnityksellä. Liivi sopii hyvin henkilöille, joilla käden toiminnot ovat heikot, sillä liiviä on helppo säätää nyörien ja tarranauhojen avulla. Pehmustettujen hartianauhojen ansiosta liivi ei hankaa. Hartianauhat vedetään ristiin selän takaa ja kiinnitetään etupuolelle. Tarranauhakiinnitys edessä.

Käyttöalueet: Osteoporoosi ja kyfoosi.

Muuta: Valitse kahdesta koosta suurempi, mikäli mitta on ylemmässä intervallissa.

Tuotenro.	Väri	Koko	Lantion ympärys	Takaosan korkeus	Etuosan korkeus
29437	Beige	Small	85-95 cm	51 cm	21 cm
29437	Beige	Medium	95-105 cm	51 cm	21 cm
29437	Beige	Large	105-115 cm	51 cm	21 cm
29437	Beige	X-Large	115-125 cm	51 cm	21 cm
29437	Beige	XX-Large	125-135 cm	51 cm	21 cm



Camp® XXI vatsamalli

ABDO - Puuvillasta valmistettu lumbosakraalinen kangasliivi, johon on ommeltu polymeerilankaa, joka tekee siitä hieman elastisen. Malli sopii erityisesti vatsakkaille henkilöille. Kummallakin sivulla on kaksinkertainen Camp-nyöritys tarranauhakiinnityksellä. Tuki sopii hyvin henkilöille, joilla käden toiminnot ovat heikot, sillä liiviä on helppo säätää nyörien ja tarranauhojen avulla. Kaksiosainen tarranauhakiinnitys helpottaa tuen säätämistä ja pukemista ylle.

Käyttöalueet: Selkäkiput ja selän toimintahäiriöt vatsakkailla henkilöillä.

Tuotenro.	Väri	Koko	Lantion ympärys	Takaosan korkeus	Etuosan korkeus
29434	Beige	Small	80-95 cm	32 cm	31 cm
29434	Beige	Medium	90-105 cm	32 cm	31 cm
29434	Beige	Large	100-115 cm	32 cm	31 cm
29434	Beige	X-Large	110-125 cm	32 cm	31 cm
29434	Beige	XX-Large	120-135 cm	32 cm	31 cm


Lumbo 267

LSO - Puuvillainen kangasliivi, joka sopii normaalille, suoralle vartalotyypille. Liivissä on kolminkertainen Camp-nyöritys ja sivuilla sekä ylä- että alareunassa resorit. Selässä on avonaiset tukilastakujat. Vetoketjukiinnitys.

Käyttöalueet: Selkäkiput ja selän toimintahäiriöt.

Muuta: Tuotteessa on 4 avointa tukilastakujaa selässä lisälastoja varten. Lastat eivät kuulu pakkaukseen.

Tuotenro.	Koko	Lantion ympäryys	Takaosan korkeus	Etuosan korkeus
22672	74	74 cm	39 cm	26 cm
22672	78	78 cm	39 cm	26 cm
22672	82	82 cm	39 cm	26 cm
22672	86	86 cm	39 cm	26 cm
22672	90	90 cm	39 cm	26 cm
22672	94	94 cm	39 cm	26 cm
22672	98	98 cm	39 cm	26 cm
22672	102	102 cm	39 cm	26 cm
22672	106	106 cm	39 cm	26 cm
22672	110	110 cm	39 cm	26 cm

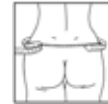

Lumbo 439

LSO - Puuvillainen tukiliivi, joka sopii sekä suoralle että muodokkaalle vartalotyypille. Liivissä on resorit kummallakin sivulla ja selässä avoimet tukilastakujat. Sivujen neljä avointa saumaa ja selän avoin sauma antavat paljon vaihtelumahdollisuuksia. Henkilöt, joilla käden toiminnot ovat heikot voivat hyvin käyttää liiviä, sillä siinä on joko vasemmalta tai oikealta puolelta kääntösoljen avulla kiinnitettävä tarranauha.

Käyttöalueet: Selkäkiput ja selän toimintahäiriöt.

Muuta: Puolivalmisteessa on on 4 avointa tukilastakujaa selässä lisälastoja varten. Lastat eivät kuulu pakkaukseen.

Tuotenro.	Koko	Vyötärön ympäryys	Takaosan korkeus	Etuosan korkeus
26439	76	76 cm	68 cm	55 cm
26439	84	84 cm	68 cm	55 cm
26439	92	92 cm	68 cm	55 cm
26439	100	100 cm	68 cm	55 cm





Lumbo 591

LSO - Kangasliivi, joka sopii suoralle vartalotyyppille. Liivissä on resorit kummallakin sivulla ja selässä avoimet tukilastakujat. Sivujen neljä avointa saumaa ja selän avoin sauma antavat paljon vaihtelumahdollisuuksia. Kiinnitetään soljilla ja säädetään nauhoilla vuorotellen vasemmalta ja oikealta.

Käyttöalueet: Selkäkiput ja selän toimintahäiriöt.

Muuta: Puolivalmisteesta on 4 avointa tukilastakujaa selässä lisälastoja varten.

Lastat eivät kuulu pakkaukseen

Tuotenro.	Koko	Lantion ympäryys	Takaosan korkeus	Etuosan korkeus
27591	82	82 cm	42 cm	30 cm
27591	86	86 cm	42 cm	30 cm
27591	90	90 cm	42 cm	30 cm
27591	94	94 cm	42 cm	30 cm
27591	98	98 cm	42 cm	30 cm
27591	102	102 cm	42 cm	30 cm
27591	106	106 cm	42 cm	30 cm



Lumbo 073

LSO Kangasliivi, joka sopii muodokkaalle vartalotyyppille. Kummallakin puolella on kaksinkertainen Camp-nyöritys. Sivuilla on sekä ylä- että alareunassa resorit ja selässä avonaiset tukilastakujat. Hakaskiinnitys.

Käyttöalueet: Selkäkiput ja selän toimintahäiriöt.

Muuta: Tuotteesta on 2 avointa tukilastakujaa selässä lisälastoja varten. Lastat eivät kuulu pakkaukseen. Koko = Lantion ympäryys

Tuotenro.	Väri	Koko	Takaosan korkeus	Etuosan korkeus
29073	Beige	85 cm	30 cm	20,5 cm
29073	Beige	90 cm	30 cm	20,5 cm
29073	Beige	95 cm	30 cm	20,5 cm
29073	Beige	100 cm	30 cm	20,5 cm
29073	Beige	105 cm	30 cm	20,5 cm
29073	Beige	110 cm	30 cm	20,5 cm



Joustava kanttinauha

Joustava kanttinauha kangastukiliiveille.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Pakkaus
25010	Valkoinen	20 mm	175 m	Rulla
25010	Beige	20 mm	175 m	Rulla

Kiristysnauha

Nailonista valmistettu, tukeva kiristysnauha. Nauha liukuu hyvin kääntösolkien sisällä. Leikatun reunan voi polttaa.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus
29715	Valkoinen	25 mm	50 m
29715	Beige	25 mm	50 m



Kolminkertainen kanttinauha

Puuvillasta valmistettu kolminkertainen kanttinauha liivien viimeistelyyn. Käytetään tukilastataskuna.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pakkaus
25006	Beige	21 mm	50 mm





Navy™ Xtra

Navy™ Xtra on selkätuki, jota voidaan käyttää eri hoitotarkoituksissa. Ortoosia voidaan käyttää sekä leikkauksen jälkeisessä stabilisoinnissa että kevyenä tukena kuntoutuksessa. Yksilöllisesti muotoiltu selkätuki ja korsetin vahvistetut etuosat stabiloivat selkää ja tukevat kivunlievityksessä. Selkälevy on valmistettu 3D-LITE™ materiaalista. Matalalämpömuovi hengittää, on kevyt ja yksinkertainen työstää jopa vaativimmille potilaille. Vahvistukset ortoosin etupuolella voidaan ottaa irti. Musta tekstiili on samaa vahvaa ja hengittävää materiaalia, jota käytetään muissa NavyX™-sarjan selkäortooseissa.

Käyttöalueet: Murtumat, leikkauksen jälkeinen stabilisointi, POST-OP diskuskirurgia, selkärangan kulumat, discus-repeämä, välilevyn pullistuma, spondylolisteesi, spondyloosi, Fasetti-syndrooma, selkäydinkanavan ahtauma.

Kontraindikaatiot: Selkärangan instabiliteetti.

Muuta: Tuotteen saa sovittaa vain terveydenhuollon koulutuksen saanut henkilö. 3D-LITE selkäosa voidaan lämmittää uunissa tai lämpöpuhaltimella noin 80°C:ssa.

Tuotenro.	Koko	Lantion ympärys	Takaosan korkeus	Etuosan korkeus
23563	X-Small	75 - 85 cm	28 cm	16 cm
23563	Small	85 - 95 cm	28 cm	16 cm
	Medium	95 - 105 cm	31 cm	16 cm
23563	Large	105 - 115 cm	31 cm	16 cm
23563	X-Large	115 - 125 cm	31 cm	16 cm
23563	XX-Large	125 - 135 cm	31 cm	16 cm

Hyperekstensiotuki C35+

Säädettävä, alumiinista ja tekonahasta valmistettu kolmipistetuki postoperatiiviseen hoitoon. Rajoittaa selän fleksiota ja sivuttaisliikettä. Tuen korkeus on säädettävissä sekä leveys rinnan kohdalta. Rintalevy on asteittain liikkuva, minkä vuoksi kulmaa on helppo säätää. Alapanta voidaan säätää vapaasti liikkuvaksi tai lukita tiettyyn asentoon. Säädettävä selkälevy.

Käyttöalueet: Immobilisaatiohoito: trauman aiheuttamat lumbaaliset ja torakolumbaaliset stabiilit murtumat, osteoporoosin aiheuttamat lumbaaliset ja torakolumbaaliset stabiilit kompressiomurtumat, lumbaaliset ja torakolumbaaliset luksaatiot, lumbaalinen ja torakolumbaalinen osteoartriitti.

Tuoteno.	Malli	Koko	Korkeus	Lantion ympärys
20355	C35+	Small	39-48 cm	74-86 cm
20355	C35+	Medium	42-51 cm	84-98 cm
20355	C35+	Large	44-52 cm	96-110 cm
20355	C35+	X-Large	48-57 cm	106-120 cm
20351	Lisä rintalevy	Yksi koko		
20352	Lisä selkälevy	Small/Medium		
20352	Lisä selkälevy	Large/X-Large		
20354	Lisänauha lukkokiinnityksellä	Small/Medium		
20354	Lisänauha lukkokiinnityksellä	Large/X-Large		
20356	Yläpinnan vaihtopehmuste			





Hyperekstensiotuki C37

Säädettävä, alumiinista ja tekonahasta valmistettu kolmipistetuki postoperatiiviseen hoitoon, joka rajoittaa selän fleksiota ja sivuttaisiikettä. Tuen korkeutta ja leveyttä ja selkäosaa voidaan säätää sekä lantiolevyn asentoa muuttaa. Alemman pannan kulmaa voidaan myös säätää.

Käyttöalueet: Immobilisaatiohoito: trauman aiheuttamat lumbaaliset ja torakolumbaaliset stabiilit murtumat, osteoporoosin aiheuttamat lumbaaliset ja torakolumbaaliset stabiilit kompressiomurtumat, lumbaaliset ja torakolumbaaliset luksaatiot, lumbaalii ja torakolumbaali osteoartriitti.

Tuotenro.	Malli	Koko	Korkeus	Lantion ympäryys
20370	C37	Small	43-50 cm	76-94 cm
20370	C37	Large	48-59 cm	94-114 cm
20351	Lisä rintalevy			
20352	Lisä selkälevy	Small/Medium		
20352	Lisä selkälevy	Large/X-Large		
20354	Lisänauha lukkiinnityksellä	Small/Medium		
20354	Lisänauha lukkiinnityksellä	Large/X-Large		
20356	Yläpannan lisäpehmuste			



Mitta: korkeus rintakehästä häpyluun yläpuolelle.

C35 Hydro

Tämä hyperekstensiotuki on valmistettu vedenkestävästä materiaalista ja sopii hyvin käytettäväksi allasterapiassa. Tuen korkeutta ja leveyttä voidaan säätää sekä rintalevyn asentoa muuttaa. Lantiokaari voidaan lukita haluttuun asentoon. Tuki kiinnitetään pikalukitussoikien avulla. Pehmuste voidaan vaihtaa.

Käyttöalueet: Immobilisaatiohoito: trauman aiheuttamat lumbaaliset ja torakolumbaaliset stabiilit murtumat, osteoporoosin, luksaation ja osteoartriitin aiheuttamat stabiilit kompressiomurtumat. Voidaan käyttää väliaikaisesti allasterapioissa.

Tuotenro.	Malli	Koko	Korkeus	Lantion ympäryys
20358	Hydro	Small	39 - 50 cm	60 - 75 cm
20358	Hydro	Medium	42 - 52 cm	75 - 90 cm
20358	Hydro	Large	45 - 59 cm	90 - 105 cm
20358	Hydro	X-Large	49 - 61 cm	105 - 115 cm
20359	Vaihtopehmuste	Small		
20359	Vaihtopehmuste	Medium		
20359	Vaihtopehmuste	Large		
20359	Vaihtopehmuste	X-Large		
20360	Lisänauhat lukkiinnityksellä	Yksi koko		

Cut-4-Custom LSO

Cut-4-Custom -korsetti on hengittävää 3D-LITE™ materiaalia. Malli koostuu etu- ja takaosasta (muotoon leikattuna) valmiiksi asennetuilla nauhoilla. Muotoilemalla nämä potilaan päällä saadaan yksilöllinen ja tukeva korsetti. Potilaiden erilaisten anatomisten rakenteiden ja erikoistarpeiden tueksi mallistossa on LSO- ja TLSO-korsettimallit. Löydät oikean koon mittaamalla potilaan ja vertaamalla mittoja kokotaulukkaan. Valitse etuosa ja takaosa.

Käyttöalueet: Postoperatiivisesti, kompressiomurtumissa ja selkärangan immobilisoimiseen.

Tuotenro.	Malli	Koko	Paksuus	Korkeus	Ympärysmitta
64919	Etuosa	XS / S	5 mm	19,5 cm	60 - 75 cm
64919	Etuosa	S / M	5 mm	19,5 cm	70 - 90 cm
64919	Etuosa	M / L	7 mm	21,5 cm	85 - 105 cm
64919	Etuosa	L / XL	7 mm	24,5 cm	95 - 120 cm
64919	Etuosa	XL / XXL	7 mm	27 cm	115 - 140 cm
64921	Takaosa	XS / S	5 mm	30 cm	60 - 75 cm
64921	Takaosa	S / M	5 mm	31,5 cm	70 - 90 cm
64921	Takaosa	M / L	7 mm	33,5 cm	85 - 105 cm
64921	Takaosa	L / XL	7 mm	35 cm	95 - 120 cm
64921	Takaosa	XL / XXL	7 mm	36,5 cm	115 - 140 cm



Mitta: Koko määritellään vyötärönympäryksen mukaan. Mitta saa olla jokseenkin tiukka. Mittaa myös etu- ja takaosan korkeus ohjeiden mukaan. Valitse sopiva koko taulukosta.

Cut-4-Custom TLSO

Cut-4-Custom -korsetti on hengittävää 3D-LITE™ materiaalia. Malli koostuu etu- ja takaosasta (muotoon leikattuna) valmiiksi asennetuilla nauhoilla. Muotoilemalla nämä potilaan päällä saadaan yksilöllinen ja tukeva korsetti. Potilaiden erilaisten anatomisten rakenteiden ja erikoistarpeiden tueksi mallistossa on LSO- ja TLSO-korsettimallit. Löydät oikean koon mittaamalla potilaan ja vertaamalla mittoja kokotaulukkaan. Valitse etuosa ja takaosa.

Käyttöalueet: Postoperatiivisesti, kompressiomurtumissa ja selkärangan immobilisoimiseen.


Tuotenro.	Malli	Koko	Paksuus	Korkeus	Ympärysmitta
64922	Etuosa	S / M	5 mm	42 cm	70 - 90 cm
64922	Etuosa	M / L	5 mm	48 cm	85 - 110 cm
64922	Etuosa	L / XL	7 mm	48 cm	105 - 135 cm
64922	Etuosa	XL / XXL	7 mm	54 cm	105 - 135 cm
64923	Takaosa	S / M	5 mm	42 cm	70 - 90 cm
64923	Takaosa	M / L	5 mm	48 cm	85 - 110 cm
64923	Takaosa	L / XL	7 mm	48 cm	105 - 135 cm
64923	Takaosa	XL / XXL	7 mm	54 cm	105 - 135 cm



Mitta: Koko määritellään vyötärönympäryksen mukaan. Mitta saa olla jokseenkin tiukka. Mittaa myös etu- ja takaosan korkeus ohjeiden mukaan. Valitse sopiva koko taulukosta.

MITANOTTO-OHJEET

3D-LITE™ Cut-4-Custom LSO & TLSO

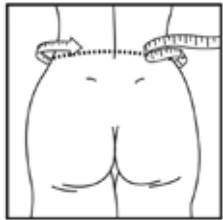

Koko

Koko määritellään vyötärön ympäryksen mukaan. Mitta saa olla jokseenkin tiukka. Mittaa myös korkeus kokoon nähden. Valitse sopiva koko taulukosta.

	Tuotekuvaus	Ympärysmitta cm:ssä		Etuosan korkeus cm:ssä	Takaosan korkeus cm:ssä
		min	max		
LSO	LSO, XS/S	60	75	19,5	30
	LSO, S/M	70	90	19,5	31,5
	LSO, M/L	85	105	21,5	33,5
	LSO, L/XL	95	120	24,5	35
	LSO, XL/XXL	115	140	27	36,5
TLSO	TLSO, S/M	70	90	42	42
	TLSO, M/L	85	110	48	48
	TLSO, L/XL	105	135	48	48
	TLSO, XL/XXL	105	135	54	54



LSO etuosa



LSO selkäosa





TLSO etuosa



LSO selkäosa

Kuvat antavat viittellisen arvion LSO:n ja TLSO:n erimallien korkeuksista.

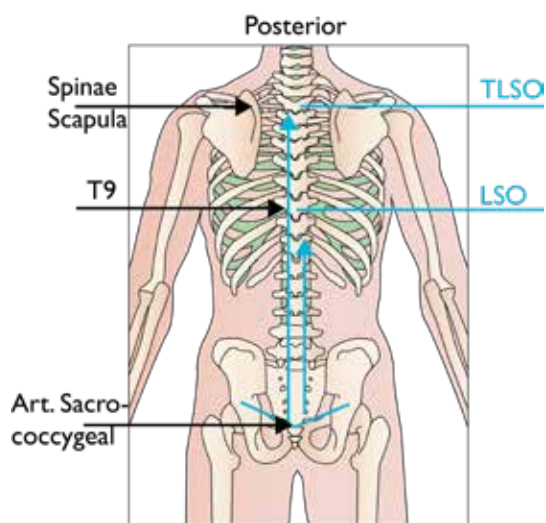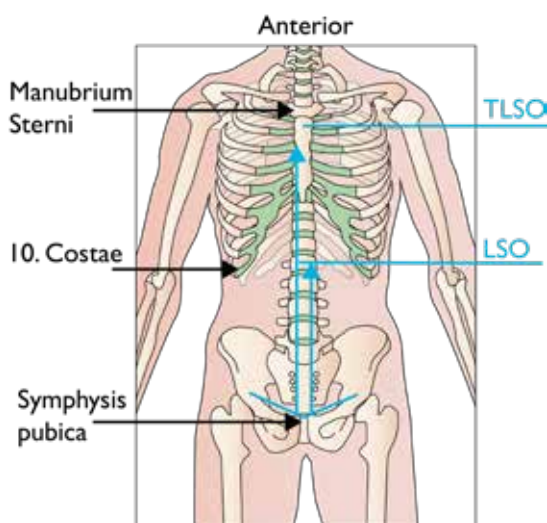

BOSTON Overlap Brace

Esivalmistettu korsetti, joka on tarkoitettu erityisesti kroonisten tai tilapäisten lanneselän kiputilojen hoitoon. Korsettia on saatavana 20 peruskokoa sekä useita paksuuksia ja eri lordoosikulmia, pehmustettuna tai pehmustamattomana. Se voidaan tilata myös mittojen tai kipsivalun mukaan. Moduuli on valmistettu polyeteenistä. Korsetin alla tulee käyttää aluspaitaa. Nauha ja D-lenkki kuuluvat toimitukseen.

Käyttöalueet: Pre- ja postoperatiivisesti, lanneselän kiputiloissa, spondylolisteesissa, osteoporoosissa, spinaalisten oosissa ja murtumissa.

Muuta: Korsetti on saatavana vain valkoisena polyeteenimoduulina. Käytä kokotaulukkoa standardikokoihin. Mittatilatusta korsetissa täytyy mitata tilauskaavakkeeseen. Valmistusohjeet ja tutkimuksia voit tilata asiakaspalvelustamme.

Tuotenro.	Malli	Paksuus
29690	Standardimoduuli 15°	1,5 mm
29694	Standardimoduuli 30°	3 mm
29695	Standardimoduuli 15°	3 mm
29697	Mittatilaus, pehmustettu	3 mm
29698	Standardimoduuli, pehmustettu 15°	3 mm
29696	Selän tukilastat 20 cm	-
29696-1	Selän tukilastat 25,5 cm	-
29696-2	Selän tukilastat 30,5 cm	-
29696-3	Selän tukilastat 35,5 cm	-





BOSTON LITE™

Boston LITE™ on jatkokehitetty versio tavallisesta Soft Brace:sta, joka on ollut markkinoilla useiden vuosien ajan. Uuden tekniikan ansiosta korsetti on ohuempi ja samalla ilmavampi, mutta silti yhtä stabiili kuin ennen. Boston LITE on saanut uusia toimintoja "leipomalla" vahvistusmateriaali muovin sisään ja siten reiät ovat mahdollisia tehdä näiden eri vahvistussegmenttien lävitse. Korsetti toimitetaan erillisen sisäpehmusteen kanssa, joka valmistetaan "3D-Spacer"-verkkokankaasta. Kangas pitää pois kosteuden ja kuumuuden pitäen ihon viileän ja kuivan tuntuksena. Samalla se toimii pehmusteena ja jakaa paineen tasaisesti keholle. Pehmustetta käytetään tavallisen aluspaidan sijaan. Solkia on kehitetty kosmeettisempaan suuntaan niin että ne ovat matalaprofiiliset ja tyylikkäämmän näköiset.

Käyttöalueet: Neuromuskulaariset skolioosit, ryhdin kontrollointi ja postoperatiivinen tuki.

Muuta: Korsetti on tilattavana samoissa väreissä kuin Boston Soft Body Jacket. Ota yhteyttä asiakaspalveluun värinäytteitä varten. Boston LITE:n kiinnitys on saatavana ainoastaan taakse. Koot Boston LITE pehmusteeseen kattavat 2 kokoa moduulista (J1/J2 = koko 1, J3/J4 = koko 2). Mittatilausena valmistettu Boston LITE (29726 ja 29728) voidaan saada ainoastaan standardikokoina J1-Y4F, 15° lordoosikulmalla ja takaa avattavana mallina. Jokaiseen korsettiin kuuluu 1 pehmuste. Lisäpehmusteita voidaan tilata erikseen. Tälle mallille yksilöity nauha ja solki kuuluvat toimitukseen.

Tuotenro.	Malli	Kuvaus	Koko	Lordoosikulma
29725	Boston LITE Korsetti	Moduuli, ei viimeistely	J1 - Y4F	15°
29726	Boston LITE Korsetti	Moduuli, ei viimeistely	Mittatilaus	15°
29728	Boston LITE Korsetti	Viimeistely	Mittatilaus	15°
29729	Boston LITE Korsetti	Viimeistely	J1 - Y4F	15°
29730	Lisäpehmuste	Pehmuste	1 - 6	
29731	Lisänauhat	Setti (3 nauhaa/solkea)	Yksi koko	
29732	Muovisolki	Solki		

BOSTON Soft Body Jacket

Esivalmistettu korsetti, joka on tarkoitettu potilaille, joilla lihasvoima on alentunut, vartalon kontrolli on heikko tai jotka eivät muusta syystä voi käyttää jäykkää ortoosia. Moduulin ulkopuoli on valmistettu hieman kovemmasta polyeteenistä kuin sisäpuoli. Valkoisessa perusmoduulissa, jota on saatavana 30 kokoa, on 15° lordoosikulma, aukko takana sekä avokanavat. Sitä voi tilata myös muun värisenä, eri lordoosikulmilla ja avo- tai umpikanavilla. Korsetin alla tulee käyttää aluspaitaa. Nauha ja D-lenkki tulevat korsetin mukana. Ylimääräisen nauhan tuotenro on 29719.

Käyttöalueet: Neuromuskulaariset skolioosit, ryhdin kontrollointi ja postoperatiivinen tuki.

Muuta: Boston Soft Body Jacketia voi tilata monen värisenä. Voit tilata värimalleja asiakaspalvelustamme. Korsetti voidaan myös tilata kehikkorakenteella, joka on täysin kuvioitu kuviokaavakkeen mukaisilla kuvioilla. Jos BSBj tilataan erillisellä kehikolla on perusmoduuli aina valkoinen. Kehikko voidaan myös tilata siirtokuvilla, jotka ovat esillä "Boston Transfer"- kaavakkeessa. Lisätietoa kuvioista saat asiakaspalvelustamme. Käytä kokotaulukkoa standardikokoihin. Mittatilatussa korsetissa täytä mitat tilauskaavakkeeseen. Valmistusohjeet ja tutkimuksia voit tilata asiakaspalvelustamme.

Tuotenro.	Malli	Tyyppi	Lordoosikulma
29707	Standardimoduuli	Avokanavat	15°
29708	Mittatilaus	Avokanavat	
29709	Standardimoduuli	Umpikanavat	15°
29710	Mittatilaus	Umpikanavat	
29700	Kehikolla		
29719	Lisänauha soljella	5 cm x 30,5 cm	



BOSTON Body Jacket

Body Jacket on valmistettu LDPE:stä (Low Density Polyethylene) ja se on tarkoitettu selkärangan immobilisoimiseen. Se voidaan tilata mittojen tai kipsivalun mukaan. Korsetin alla tulee käyttää aluspaitaa. Nauhat eivät kuulu toimitukseen.

Käyttöalueet: Postoperatiivisesti, kompressiomurtumissa ja selkärangan immobilisoimiseen.

Muuta: Korsetti on saatavana vain valkoisena polyeteeni moduulina. Se voidaan tilata täysin kuvioituna kuviokaavakkeen mukaisilla kuvioilla sekä myös siirtokuvilla, jotka ovat esillä "Boston Transfer"- kaavakkeessa. Lisätietoa kuvioista saat asiakaspalvelustamme. Käytä kokotaulukkoa standardikokoihin. Mittatilatussa korsetissa täytä mitat tilauskaavakkeeseen.

Tuotenro.	Malli
29701	Mittatilaus
29699	Valmiiksi asennettu korsetti





BOSTON skolioosikorsetti

Esivalmistettu korsetti skolioosin hoitoon. Saatavana 30 peruskokoa 0° tai 15° lordoosikulmilla, mutta korsetti voidaan tilata myös mittojen tai kipsivalun mukaan. Moduuli on valmistettu polypropeenista ja pehmustettu polyeteenivaahdotuovilla. Korsetin alla tulee käyttää aluspaitaa. Nauhat eivät kuulu toimitukseen.

Käyttöalueet: Idiopaattiset skolioosit.

Muuta: Korsetti on saatavana vain valkoisena polyeteenimoduulina. Se voidaan tilata siirtokuvilla, jotka ovat esillä "Boston Transfer"-kaavakkeessa. Lisätietoa kuvioista saat asiakaspalvelustamme. Boston LITE:n kiinnitys on saatavana ainoastaan taakse. Käytä kokotaulukkoa standardikokoihin. Mittatilatusta korsetissa täytyy mitat tilauskaavakkeeseen. Valmistusohjeet ja tutkimuksia voit tilata asiakaspalvelustamme.

Tuotenro.	Malli	Paksuus	Lordoosikulma
29705	Standardimoduuli	4,5 mm	15°
29706	Standardimoduuli	4,5 mm	0°
29704	Mittatilaus	4 mm	



BOSTON Skoliosis Night Brace

Yökäyttöön tarkoitettu skolioosikorsetti. Korsettia tulee käyttää vähintään 7 tuntia yössä. Moduuli on valmistettu 3 mm paksuisesta polypropyleenistä ja saatavana on kaksi vaihtoehtoa: Pysyvästi kiinnitetyn pehmusteen kanssa tai irrotettavalla pehmusteella. Korsetin alla tulee käyttää aluspaitaa. Nauha ja solki kuuluvat toimitukseen.

Käyttöalueet: Tuote on tarkoitettu idiopaattisten skolioosien hoitoon seuraavan ohjeistukseen mukaan; Pienempi mutka: noin 25° - 45° Cobb-kulma, kehittymätön selkäranka (Riser 0-3); Apex enintään Th9 tasolla; Kaksoismutkien hoito vaatii korkeamman osaamistason. Kaksoismutkissa on hoidon oleellisena osana kyky tunnistaa primäärit ja sekundäärit käyryydet. Kaksoismutkan hoidossa primäärin tulee olla Thorakaalinen. Mikäli primäärinenä on Lumbaalinen mutka, ota yhteyttä meihin lisätietoja varten.

Muuta: Korsetti on saatavana vain valkoisena copolymeeri moduulina. Se voidaan tilata täysin kuvioituna kuviokaavakkeen mukaisilla kuvioilla. Jos korsetti tilataan kuvioituna on sisäosa aina valkoinen. Kehikko voidaan myös tilata siirtokuvilla, jotka ovat esillä "Boston Transfer"-kaavakkeessa. Lisätietoa kuvioista saat asiakaspalvelustamme. Käytä kokotaulukkoa standardikokoihin. Mittatilatusta korsetissa täytyy mitat tilauskaavakkeeseen.

Tuotenro.	Malli	Tyyppi
29720	Viimeistely - irrotettavalla pehmusteella	Mittatilaus
29721	Viimeisteleminen - irrotettavalla pehmusteella	Mittatilaus
29722	Viimeistely - kiinnitetyllä pehmusteella	Mittatilaus
29723	Viimeisteleminen - kiinnitetyllä pehmusteella	Mittatilaus

Tarvikkeita BOSTON korsettiin

Täältä löydät erilaisia tarvikkeita Boston korsetin viimeistelyyn. Näitä ovat anteriorinen ja posteriorinen vahvistussetti, muovinen juotoslanka ja pehmusteet.

Tuotenro.	Malli	Koko	Leveys	Pituus	Vas/Oik
29711	Vahvistussetti Anteriorinen	Yksi koko			
29711	Vahvistussetti Posteriorinen	Yksi koko			
29713	Muovinen juotoslanka		3 mm	1,2 m	
29713	Muovinen juotoslanka		5 mm	1,2 m	
29715	Vetonauha, valkoinen		25 mm	50 m	
29715	Vetonauha, beige		25 mm	50 m	
29750	Joustava materiaali, valkoinen		20 cm	1 m	
29753	Lumbaalipehmuste	Small			Vas/Oik
29573	Lumbaalipehmuste	Large			Vas/Oik
29573	Lumbaalipehmuste	Small			
29573	Lumbaalipehmuste	Large			
29757	Abdominaalipehmuste	Medium			
29757	Abdominaalipehmuste	Large			



Boston Brace kuviot ja siirtokuvat

Boston korsetti malleille on kuvioita ja siirtokuvia valittavana. Nämä ovat tarjolla vain mittatilauksena toimitettaviin korsetteihin. Ei varastoitaville standardimalleille. Tämä koskee Boston Soft Body Jacket, Boston Body Jacket, Boston Skolioosikorsettiä ja Boston Night Brace malleja.

Tuotenro.	Malli
29716	Irrallinen kuvio korsettiin
29717	Valmiiksi asennettu kuvio
29718	Kuvioitu korsetti



BOSTON korsetin aluspaita, valkoinen

Kaksinkertaisessa Boston korsetin aluspaidassa on pyöreä kaula-aukko. Paita on saumaton, joka tekee siitä täydellisen käytettäväksi jäykän selkäortoosin alla. Elastisuuden ansiosta korsetin alle ei muodostu ryppejä, ja se istuu hyvin. Paita on valmistettu CoolMAXista ja elastaanista ja se on siten viileä kesällä ja lämpöinen talvella. Mallissa on molemmin puoli kainalosuoja. Materiaalissa ei ole hopeaa eikä lateksia ja se on antistaattinen. Valmistus on tehty Öko-Tex standardi 100:n mukaan, luokka II.

Tuotenro.	Koko	Pituus	Ympärysmitta	Leveys	Kainalotuki
29764	Small	46 cm	40-61 cm	14 cm	Kaksi puolta
29764	Medium	52 cm	61-81 cm	20 cm	Kaksi puolta
29764	Large	65 cm	81-102 cm	25 cm	Kaksi puolta
29764	X-Large	65 cm	102-122 cm	30,5 cm	Kaksi puolta



UUTUUS!



Bostonkorsettien kokotaulukko

Kokotaulukko valmiit skolioosikorsetit ja Soft Body Jacket

Kokotaulukko B.O.B

Koko	Lantio, cm	Vyörärö, cm	Rinta, cm
I	71	51	66
ID	71	45	58,5
2	76	45	58,5
2D	76	51	63,5
3	81	71	76
3D	81	66	74
4	86,5	76	84
4D	86,5	58,5	69
5	91,5	81	89
5D	91,5	66	76
6	96,5	86,5	94
6D	96,5	74	84
7	101,5	91,5	99
7D	101,5	81	91,5
8	109	96,5	109
8D	109	84	91,5
9	114	100	114
9D	114	87	94
10	117	104	117
10D	117	96	101

Kokotaulukko Flexaform

Koko	Lantio, cm	Vyörärö, cm	Rinta, cm
LS1	79	60	71
LS2	82	65	76
LS3	85	63	75
LS4	87	69	82
LS5	90	68	80
LS6	92	75	88
LS7	95	74	85
LS8	97	83	94
LS9	100	80	90
LS10	102	87	99
LS11	105	87	95
LS12	107	93	104

Koko	Lantio, cm	Vyörärö, cm	Rinta, cm
J1	54	40	49
J2	58	42	51
J3	62	45	54
J4	64	47	56
Y1A	66	51	55
Y1	67	46	56
Y2	71	47	60
Y2A	72	55	62
Y3	75	48	63
Y3A	78	57	69
Y4	79	51	64
Y4F	80	57	66
Y5	82	52	68
Y5F	82	58	68
Y6	84	56	73
Y6A	84	63	78
Y7	86	54	69
Y7F	86	60	69
Y7A	86	69	73
Y8	88	58	75
Y8F	88	64	75
Y8A	90	72	83
Y9	92	60	72
Y9A	92	63	69
Y9F	92	68	78
A1	94	62	76
A2	94	70	84
A2A	96	66	75
A3	97	68	80
A4	97	76	88

Kokotaulukko LITE

Koko	Lantio, cm	Vyörärö, cm	Rinta, cm
I5J1	54	40	49
I5J2	58	42	51
I5J3	62	45	54
I5J4	64	47	56
I5Y1	67	46	56
I5Y1A	66	51	55
I5Y2	71	47	60
I5Y2A	72	55	62
I5Y3	75	48	63
I5Y3A	78	57	69
I5Y4	79	51	64
I5Y4F	80	57	66



Ortoosikomponentit

www.camp.fi



ShearBan®

ShearBan® on valmistettu itsekiinnittyvästä teflon-materiaalista kontrolloimaan kitkaa ortoosissa ja proteesissa. ShearBanin avulla kitkaa voidaan vähentää huomattavasti alueilla, joilla ihoärsytyksen ja haavan muodostuksen riski on suuri. ShearBan materiaalia voidaan muotoilla ja sitä voidaan käyttää kengissä, pohjallisissa, ortoosissa ja proteeseissa. ShearBan on tarkoitettu kiinnitettäväksi suoraan tuotteeseen, ei iholle. ShearBan suojalappuja voidaan käyttää esim. ruuvien, niittien, liitos- ynnä muiden kohtien suojaamiseen sekä epätasaisuuksien siloittamiseen. Suoialappuja on saatavana kahta eri kokoa beigen tai mustan värisenä. Levyjä on saatavana vain sinisenä. Tuote on testattu jokaisella käyttöalueella.

Käyttöalueet: ShearBan-materiaalia voidaan muotoilla ja käyttää kengissä, pohjallisissa, ortoosissa ja proteeseissa.

Tuotenro.	Väri	Koko	Pakkaus
38498	Beige	24 mm	84 kpl
38499	Musta	24 mm	84 kpl
38502	Beige	19 mm	138 kpl
38503	Musta	19 mm	138 kpl
38500	Sininen	225 mm x 300 mm	5 arkkia
38501	Sininen	225 mm x 300 mm	1 kpl



Kid-Dee-Lite™

Kid-Dee-Lite™ on markkinoiden pienin, säädettävä nilkkanivel lapsille. Tämä alumiinista valmistettu nivel painaa 20 grammaa. Se mahdollistaa aikaisen mobilisaation lapsilla, joilla on neuromuskulaarisia ongelmia. Liikelaajuutta voidaan säätää 20° plantaarifleksion ja 20° dorsaalifleksion välillä. Voidaan käyttää suorien tai taivutettujen kiskojen kanssa. Mukana tulee ohjain ja muut tarvikkeet, joita tarvitaan valmistukseen ja asennukseen. Nivel on tarkoitettu alle 5-vuotiaille lapsille. Painorajoitus 25 kg ja pituusrajoitus 120 cm. Maksimikuormitus on 15 Nm.

Käyttöalueet: Dynaamisissa hoidoissa, missä rajoitettua liikerataa tarvitaan kontraktuurien estämiseksi.

Kontraindikaatiot: Täydellinen tunnonpuutos.

Muuta: Valmistusohje on pakkauksen mukana.

Tuotenro.	Materiaali	Koko	Pakkaus
62200	Kiillotettu alumiini	Yksi koko	1 pari

Binky universaali nivel

Universaalinivel ilman fleksio- tai ekstensorajoitinta, suunniteltu pareittain käytettäväksi muovimateriaalista valmistettuihin ortooseihin tai yksittäin vapaasti liikkuvana parina muille nivelille. Binky-nivelet soveltuvat sekä aikuisten että lasten ranteen, kyynärpään ja nilkan ortooseihin. Binky-niveltä on saatavissa kahta eri kokoa. Small kokoa käytetään pienten nivelten tai raajojen ortooseihin ja Large kokoa käytetään isojen nivelten tai kokojen ortooseihin. Hoitava lääkäri määrää ortoositarpeesta ja laatii hoitosuunnitelman.

Käyttöalueet: Paralyyttinen syndrooma

Muuta: Binky-niveltä on kahta kokoa. Koon Small painorajoitus 35 kg.



Tuotenro.	Leveys	Pituus	Paksuus	Pakkaus
69688	12 mm	62 mm	2,5 mm	1 pari
69688	18 mm	76 mm	2,5 mm	1 pari

Nilkkanivel polyuretaanista

Polyuretaaninivel on tarkoitettu lämpömuoviortooseihin. Tätä nilkkaniveltä on saatavana kahta mallia. Dorsalfleksiomallia on saatavana eri kokoja ja jäykkyyksiä. Jäykempi malli antaa voimakkaamman dorsalfleksion.

Tuotenro.	Malli	Kovuus	Koko	Pakkaus
62775	Joustava nilkkanivel		Lapsi	1 pari
62775	Joustava nilkkanivel		Aikuinen	1 pari
62776	Dorsiflex nilkkanivel	0,5 kg	Lapsi Hopea	1 pari
62776	Dorsiflex nilkkanivel	1 kg	Lapsi Kirkas	1 pari
62776	Dorsiflex nilkkanivel	1,5 kg	Lapsi Kulta	1 pari
62776	Dorsiflex nilkkanivel	0,5 kg	Aikuinen Hopea	1 pari
62776	Dorsiflex nilkkanivel	1 kg	Aikuinen Kirkas	1 pari
62776	Dorsiflex nilkkanivel	1,5 kg	Aikuinen Kulta	1 pari





Tamarack

Taipuisa nivel, jota on saatavana kahta mallia: Flexure (suora) ja Flexure Dorsiflexion Assist (taivutettu). Nivel on valmistettu polyuretaanista. Ydin on vahvistettu, mikä vähentää materiaalin venymistä. Tamarack Flexure Dorsiflexion Assist -niveliä on saatavana kolmea eri jäykkyyttä, 75, 85 ja 95, joista 95 nostaa eniten.

Käyttöalueet: Ortoosinivelenä kyynärpäässä, ranteessa, lasten polviortoosissa sekä nilkka-jalkaortoosissa.

Muuta: Valmistusohje löytyy pakkauksen sisältä.

Tuotenro.	Malli	Kovuus	Koko	Pakkaus
62730	Flexure suora, musta		Lapsi	1 pari
62730	Flexure suora, musta		Medium	1 pari
62730	Flexure suora, musta		Large	1 pari
62732	Flexure Dorsiflexion Assist, musta	75	Lapsi	1 pari
62732	Flexure Dorsiflexion Assist, musta	75	Medium	1 pari
62732	Flexure Dorsiflexion Assist, musta	75	Large	1 pari
62732	Flexure Dorsiflexion Assist, musta	85	Lapsi	1 pari
62732	Flexure Dorsiflexion Assist, musta	85	Medium	1 pari
62732	Flexure Dorsiflexion Assist, musta	85	Large	1 pari
62732	Flexure Dorsiflexion Assist, musta	95	Lapsi	1 pari
62732	Flexure Dorsiflexion Assist, musta	95	Medium	1 pari
62732	Flexure Dorsiflexion Assist, musta	95	Large	1 pari
62740	Flexure suora, kirkas		Lapsi	1 pari
62740	Flexure suora, kirkas		Medium	1 pari
62740	Flexure suora, kirkas		Large	1 pari
62742	Flexure Dorsiflexion Assist, kirkas	75	Lapsi	1 pari
62742	Flexure Dorsiflexion Assist, kirkas	75	Medium	1 pari
62742	Flexure Dorsiflexion Assist, kirkas	75	Large	1 pari
62742	Flexure Dorsiflexion Assist, kirkas	85	Lapsi	1 pari
62742	Flexure Dorsiflexion Assist, kirkas	85	Medium	1 pari
62742	Flexure Dorsiflexion Assist, kirkas	85	Large	1 pari
62742	Flexure Dorsiflexion Assist, kirkas	95	Lapsi	1 pari
62742	Flexure Dorsiflexion Assist, kirkas	95	Medium	1 pari
62742	Flexure Dorsiflexion Assist, kirkas	95	Large	1 pari
62741	Dummy		Lapsi	1 pari
62741	Dummy		Medium	1 pari
62741	Dummy		Large	1 pari
62748	Pidike ulkoiseen asennukseen		Lapsi	1 pari
62748	Pidike ulkoiseen asennukseen		Medium	1 pari
62748	Pidike ulkoiseen asennukseen		Large	1 pari

Tamarack työkalut

Tamarack Hand Punch: Tällä työkalulla tehdään reikä muoviin.

Tamarack Spanner Wrench: Samankaltainen työkalu kuin edellinen. Työkalu nivelen linjaukseen ortoosissa

Muuta: Valmistusohje löytyy pakkauksen sisältä.

Tuotenro.	Malli	Koko
62744	Hand Punch	Lapsi
62744	Hand Punch	Medium
62744	Hand Punch	Large
62745	Spanner Wrench	Lapsi
62745	Spanner Wrench	Medium/Large



Camber Axis

Erittäin kestävä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu nivel vaativiin sovelluksiin.

Liikelaajuus asetetaan plantaari- tai dorsaalifleksioon mukana tulevien säätölevyjen avulla. Säätölevyt ovat erivärisiä riippuen niiden liikelaajuudesta.

Hopea = 0° lukittu

Punainen = 5° lukittu plantaari- tai dorsaalifleksioon

Sininen = 10° lukittu plantaari- tai dorsaalifleksioon

Violetti = 15° lukittu plantaari- tai dorsaalifleksioon

Vihreä = 0°- 30° rajoitettu liikelaajuus plantaari- tai dorsaalifleksiossa

Musta = 5°- 10° rajoitettu liikelaajuus plantaari- tai dorsaalifleksiossa

Keltainen = 7,5°- 10° rajoitettu liikelaajuus plantaari- tai dorsaalifleksiossa



Muuta: Valmistusohjeet löytyvät pakkauksen sisältä. Yllämainitut säätölevyt sisältyvät pakkaukseen.

Tuotenro.	Koko	Pakkaus	Paino
62750	Small	1 pari	36-45 kg
62750	Medium	1 pari	72 kg asti
62750	Large	1 pari	99 kg asti



Oklahoma

Nylonista tai polypropeenista valmistettu nilkkanivel liikkeen kontrolloimiseen. Nylonista valmistettu nivel sopii aktiivisille potilaille.

Muuta: Valmistusohje löytyy pakkauksen sisältä.

Tuotenro.	Malli	Koko	Pakkaus
62760	Polypropeeni	Lapsi	I
62760	Polypropeeni	Small	I
62760	Polypropeeni	Medium	I
62760	Polypropeeni	Large	I
62760	Polypropeeni	X-Large	I



Nilkkanivel Double Axis, kompakti

Nilkkanivel, jonka etummaisessa kanavassa on tappi sekä takimmaisessa jousi.

Tarkoitus on sallia normaali käynti ja kantaisku sekä tukea polvea ja lantiota maksimaalisesti. Nilkkanivel kaksitoiminen, kompakti on tarkoitettu sekä aikuisille että lapsille. Lisätapit ja jouset tulevat pakkauksen mukana.

Muuta: Maksimipaino 72 kg. 62726/27 sopii kiskoille 5x13 mm.

Tuotenro.	Malli	Materiaali	Koko
62724	Nilkkanivel proksimaalisella kiskolla	Ruostumaton teräs	Yksi koko
62725	Nilkkanivel proksimaalisella kiskolla	Alumiini	Yksi koko
62726	Nilkkanivel ilman proksimaalista kiskoa	Ruostumaton teräs	Yksi koko
62727	Nilkkanivel ilman proksimaalista kiskoa	Alumiini	Yksi koko



Slim Line Double Action nilkkanivel

Nilkkanivel, joka on helppo asentaa haluttuun plantaari-dorsaali fleksioon.

Nivelessä on suora kiinnitysosa kiskolle. Sitä käytetään yhdessä "asteittain lukittavan" ja "lukittavan kaarilukollisen" polvinivelen kanssa, jotka kuuluvat pitkän alaraajaortoosin moduulijärjestelmään sekä SafetyStride:iin ja FullStride:iin. Nivelä on saatavana sekä alumiinisena että ruostumattomasta teräksestä.

Tuotenro.	Malli	Materiaali	Koko	Sopii kiskoille
62778	Double Action nilkkanivel AL	Alumiini	Yksi koko	19 mm
62777	Double Action nilkkanivel RT	Ruostumaton teräs	Yksi koko	19 mm
62778	Double Action nilkkanivel AL	Alumiini	Yksi koko	16 mm
62777	Double Action nilkkanivel RT	Ruostumaton teräs	Yksi koko	16 mm

Slim Line byygeli

Jalustin jalkaosaan. Käytetään yhdessä Slim Line Double Action -nilkkanivelen kanssa kontrolloimaan jalan plantaari-dorsaalifleksiota.

Muuta: Sopii niveleen/aukon sisämitta

Tuotenro.	Materiaali	Koko	Mitta
62772	Ruostumaton teräs	Aikuinen	3,2 mm
62773	Ruostumaton teräs	Lapsi	2,4 mm



TRIPLE ACTION®

Linjaus, R.O.M (liikelaajuus) ja plantaarinen ja/tai dorsaalinen vastus voidaan säätää täysin riippumatta toisistaan. Tämä antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tehdä hienosäätöjä liikeradan eri vaiheissa. Vahvat jouset ja monipuoliset säädöt varmistavat potilaan tarpeet huomioivan ortoosin säädettävyyden koko kuntoutusvaiheen ajan. Nivelissä on jouset, jotka kestävät suurenkin vääntömomentin ja kolme yksinkertaista asetusvaihtoehtoa varmistavat toivotun toiminnon. Triple Action-nivelet avustavat tehokkaasti erilaisten neurologisista vammoista johtuvien biomekaanisten toimintarajoitteiden yhteydessä.



Aikuisten Nilkkanivel 2.0
(19 mm järjestelmä)



**Nilkkanivel Medium
Pieni aikuinen**
(16 mm järjestelmä)



Lasten nilkkanivel
(13 mm järjestelmä)

Triple Action® valintaopas

Potilaan paino	Kg	15	45	55	80	90	100
Niveltyyppi	Nivel (Boosterit)						
Lapsi 13 mm	1 (0)						
	2 (0)						
Medium 16 mm	1 (0)						
	1 (1-2)						
	2 (0)						
	2 (1-4)						
Aikuinen 19 mm	1 (0)						
	1 (1)						
	2 (0)						
	2 (1-2)						

Triple Action® nilkkanivel lapsille

Lapsille kehitetty nilkkanivel. Nivelen ainutlaatuinen jousitusjärjestelmä tekee siitä erityisen kestävän myös aktiivisimmille lapsille. Se on helppo sovittaa ja säätää suoraan potilaalle. Voit säätää nivelen toimimaan halutussa liikeradan vaiheessa. Voit valita eri jousivaihtoehtoja. Erittäin korkealuokkaisesti valmistetut ja erinomaisen suorituskyvyn omaavat komponentit ovat toiminnallisia liikeradan kaikissa eri vaiheissa. Lasten Triple Action sopii 13 mm:n kiskoihin.

Käyttöalueet: Tarkoitettu käytettäväksi erilaisten neurologisten vammojen aiheuttamien liikerajoitusten korjaamiseen. Koukkupolvikävelyyn, Plantaarifleksio-kontraktuuriin, Quadricepsin heikkouteen, spastisiteettiin ja Botox®-hoitojen tueksi, postoperatiivisesti akillesjänteen pidennysleikkauksissa tai spastisen jalan mobilisoimiseksi. Unilateral MAX 40 kg, Bilateral MAX 50 kg.

Kontraindikaatiot: Älä valitse lasten Triple Actionia monolateraalisen rakenteen yhteydessä (nivel vain lateraalipuolella). Mikäli monolateraalirakenne on tarpeen, valitse Triple Action Nilkkanivelen keskikoko.



Tuotenro.	Malli	Vas/Oik
62707	Nilkkanivel ilman boosteria	Bilateraalinen
62670	Nilkkanivel boosterilla	Plantaari boosteri = Vas med/Oik lat tai Dorsaali boosteri = Vas lat/Oik med
62671	Nilkkanivel boosterilla	Dorsaali boosteri = Vas med/Oik lat tai Plantaari boosteri = Vas lat/Oik med
62672	Nilkkanivel dorsifleksio ja plantaarifleksio boosterilla	Bilateraalinen
62673	Distaalinen lateraalikisko	Bilateraalinen
62674	Distaalinen mediaalikisko	Vas/Oik
62675	Distaalinen Y-kisko, pitkä	Bilateraalinen
62676	Distaalinen suora kisko	Bilateraalinen
62709	Työkalusetti nivelen asennukseen	
62722	Yhdistelmäavain Triple Action, Lapset	



Triple Action® nilkkanivel medium

Triple Action "Small Adult" on tarkoitettu 16 mm:n kiskoille ja suunniteltu antamaan paras mahdollinen kontrolli liikeradan kaikissa vaiheissa. Vahvat jouset ja yksinkertainen säätö mahdollistavat asiakkaan tarpeiden mukaiset säädöt koko kuntoutuksen ajan. Nivelen jouset, joihin voidaan kohdistaa voimakas vääntömomentti, sekä kolme helppoa säätöä varmistavat toivotun toiminnan. Triple Action-nivel helpottaa tehokasta kuntoutusta erilaisissa neurologisten vammojen seurauksena syntyneissä biomekaanisissa toimintarajoitteissa. Tuote on valmistettu kestävästä ja varmasta ruostumattomasta teräksestä.

Käyttöalueet: Tarkoitettu käytettäväksi erilaisten biomekaanisten toimintarajoitteiden sekä neurologisten vammojen aiheuttamien liikerajoitusten korjaamiseen. Unilateral MAX 90 kg, Bilateral MAX 100 kg.

Tuotenro.	Malli	Vas/Oik
62711	Nilkkanivel ilman boosteria	Bilateraalinen
62713	Nilkkanivel boosterilla	Plantaari boosteri = Vas med/Oik lat tai Dorsaali boosteri = Vas lat/Oik med
62714	Nilkkanivel boosterilla	Dorsaali boosteri = Vas med/Oik lat tai Plantaari boosteri = Vas lat/Oik med
62715	Nilkkanivel Dorsifleksio ja plantaarifleksio boosterilla	Bilateraalinen
62677	Distaalinen lateraalikisko	Vas/Oik
62678	Distaalinen mediaalikisko	Vas/Oik
62679	Distaalinen Y-kisko	Bilateraalinen
62680	Distaalinen suora kisko	Bilateraalinen
62699	Camber Axis sarananivel	Bilateraalinen
62719	Työkaluseti asennukseen	
62721	Yhdistelmäavain Medium	

Triple Action 2.0 aikuisille

Nivel, joka antaa ihanteellisen säätökulman sekä palvelee biomekaanisissa vaatimuksissa. Tibian asento nilkan suhteen sekä dorsaali- ja plantaarfleksion vastus pystytään säätämään toisistaan riippumatta. Näin saavutetaan ainutlaatuinen mahdollisuus palvella hienosäätöön liittyviä vaatimuksia liikeradan eri vaiheissa. Vahvat jouset ja yksinkertainen säätö mahdollistavat asiakkaan tarpeiden mukaiset säädöt koko kuntouksen ajan. Nivelen jouset, joihin voidaan kohdistaa voimakas vääntömomentti, sekä kolme helppoa säätöä varmistavat toivotun toiminnan. Triple Action-nivel helpottaa tehokasta kuntoutusta erilaisissa neurologisten vammojen seurauksena syntyneissä biomekaanisissa toimintarajoitteissa. Tuote on valmistettu kestävästä ja varmasta ruostumattomasta teräksestä.

Triple Action 2.0 (aikuisen malli) sopii 19 mm:n kiskoihin.

Käyttöalueet: Tarkoitettu käytettäväksi erilaisten biomekaanisten toimintarajoitteiden sekä neurologisten vammojen aiheuttamien liikerajoitusten korjaamiseen. Unilateraalinen Max. 100 kg, Bilateraalinen max. 110 kg.

Tuotenro.	Malli	Vas/Oik
62690	Nilkkanivel ilman boosteria	Vasen lateraalinen/oikea mediaalinen
62691	Nilkkanivel ilman boosteria	Oikea lateraalinen/vasen mediaalinen
62692	Nilkkanivel plantaarfleksio boosterilla	Vasen lateraalinen/oikea mediaalinen
62693	Nilkkanivel plantaarfleksio boosterilla	Oikea lateraalinen/vasen mediaalinen
62695	Distaalinen lateraalikisko	Vas/Oik
62696	Distaalinen mediaalikisko	Vas/Oik
62697	Distaalinen Y-kisko	Vas/Oik
62698	Distaalinen suora kisko	Bilateraalinen
62699	Camber Axis Sarananivel	Bilateraalinen
62694	Työkalusetti asennukseen	
62720	Yhdistelmäavain aikuiset	



Liikerajoitin 655

Ruostumattomasta teräksestä ja nailonista valmistettu liikerajoitin nilkkanivelen plantaari-/dorsaalifleksion rajoittamiseen.

Muuta: Valmistusohje löytyy pakkauksen sisältä.

Tuotenro.	Koko	Pakkaus
62655	Small	1 setti
62655	Large	1 setti
62655	X-Large	1 setti





Liikerajoitin 755

Polyuretaanista valmistettu plantaarifleksiorajoin. Yksinkertainen säätää.

Muuta: Valmistusohje löytyy pakkauksen sisältä.

Tuotenro.	Koko	Pakkaus
62755	Yksi koko	1 setti



Liikerajoitin 795

Ruostumattomasta teräksestä ja polyuretaanista valmistettu liikerajoitin, joka voidaan lukita haluttuun plantaarifleksioon.

Muuta: Valmistusohje löytyy pakkauksen sisältä.

Tuotenro.	Koko	Pakkaus
62795	Yksi koko	1 setti



SureStep HEKO -polvinivel

SureStep HEKO on funktionaalisen yliojennusortoosin valmistukseen tarkoitettu nivel pienemmille lapsille. HEKO-nivel ehkäisee polven hyperekstensiota rajoittamalla polven liikettä vaikuttamatta kuitenkaan polven normaaliin toimintaan. Hyperekstensiota on perinteisesti kontrolloitu rajoittamalla nilkan plantaariflexiota. Tämä rajoittaa normaalia kävelyä ja vähentää näin lapsen aktiivisuustasoa. HEKO:n avulla lapsi voi kävellä, juosta, kyykistyä ja hyppiä. Ortoosissa on täysi ROM 0° - 135°:een. Neliakselinen HEKO-nivel sallii täyden liikeradan, sillä se matkii polven anatomista liikettä. Valmis ortoosi on kevyt, matalaprofiilinen ja sitä voi hyvin käyttää vaatteiden alla. Se on helppo pukea ja riisua.

Käyttöalueet: Hyperekstension paikallinen kontrollointi, polven varus ja valgus.

Muuta: Toimitetaan yhdessä mediaalisen ja lateraalisen nivelen kanssa. Molemmissa 8 mm:n offset. Max paino Small koossa - 22 kg. Max paino Large koossa - 45 kg.

Tuotenro.	Materiaali	Koko	Mitta 1	Mitta 2	Mitta 3
62650	Ruostumaton teräs	Small	10 x 2 mm	135 mm	35 mm
62650	Ruostumaton teräs	Large	12 x 3 mm	185 mm	45 mm

Mitta 1: Kiskon leveys x paksuus

Mitta 2: Kiskon pituus nivelpesän keskustasta

Mitta 3: Nivelpesän pituus

Asteittain lukittava polvinivel

Asteittain lukittava polvinivel, joka auttaa käyttäjää saavuttamaan täyden polven ojennuksen ja stabiliteetin asteittaisen polvifleksion avulla. Becker Orthopedicin komponentit kuuluvat alaraajaortoosien rakentamiseen tarkoitettuun moduulisysteemiin. Mukana tulevien kiskojen yläreunat ovat pyöristetty ja alareunat ovat suorat. Pitkä vinottainen lukitusvipu on helppo muokata käyttäjän tarpeiden mukaisesti lyhentämällä ja muotoilemalla se yksilöllisesti.

Tuotenro.	Malli	Materiaali	Koko
62852	Asteittain lukittava polvinivel	Alumiini	19 mm
62853	Asteittain lukittava polvinivel	Ruostumaton teräs	19 mm



Mitta: Sopii 19 mm kiskoille.

Lukittava polvinivel kaarilukolla

Lukittava polvinivel, joka aktivoituu automaattisesti kun nivel saavuttaa täyden ojennuksen. Becker Orthopedicin komponentit kuuluvat alaraajaortoosien rakentamiseen tarkoitettuun moduulisysteemiin. Muotoilu lisää valmistusmahdollisuuksia ja helpottaa ortoosin hoitoa. Pitkä vinottainen lukituskaari on helppo muokata käyttäjän tarpeiden mukaisesti lyhentämällä ja muotoilemalla se yksilöllisesti. Näitä polviniveliä on saatavana kahta eri kokoa ja materiaalivaihtoehtoina ovat alumiini ja ruostumaton teräs. Mukana tulevat kiskot ovat pyöristettyjä yläreunoista ja tasaisia alareunoista. Myös vaijerit sisältyvät mukaan. Lukittava polvinivel on saatavana jopa etuosaan sijoitettavalla kaapelilla, jonka avulla käyttäjä voi itse lukita nivelen vetämällä kaapelista.



Muuta: Koot sopivat 16 mm ja 19 mm kiskoille. Vaihtoehtoina alumiini tai ruostumaton teräs.

Tuotenro.	Malli	Materiaali	Koko
62850	Lukittava polvinivel AL	Alumiini	19 mm
62851	Lukittava polvinivel RT	Ruostumaton teräs	19 mm
62850	Lukittava polvinivel AL	Alumiini	16 mm
62851	Lukittava polvinivel RT	Ruostumaton teräs	16 mm



SPL2-Swing Phase Lock -polvinivel

SPL-ortoosit on kehitetty auttamaan potilaita, joilla polven ekstensoreiden toimintakyky on alentunut osittain tai kokonaan. Ortooseja ei saa käyttää muissa tapauksissa. Nivelen toiminta perustuu heilurimekanismiin, joka lukitsee ja avaa ortoosin polvinivelen riippuen nivelen kulmasta sagittaalitasossa. Kävelyn aikana nivel lukkiutuu ennen kantaaskua, jotta seisontavaiheessa olisi enemmän tukea. Nivel avautuu jälleen, kun kantapää irtaantuu alustasta. Tarkoitus on jäljitellä polven ekstensoreiden normaalia fysiologista toimintaa ja tuottaa tavanomaisempi kävely ilman cirkumduktiota tai kompensatiota lonkkanivelestä. SPL2-polvinivel lukkiutuu täydessä polven ekstensiossa ja siinä on myös varmuuslukitus, joka toimii 15 ° fleksiossa, silloin kun täyttä ekstensiota ei saavuteta. Tämä tarkoittaa, että ortoosi lukkiutuu vaikka polvi ei ole täydessä ekstensiossa. Koska SPL2-nivelet eivät ole riippuvaisia nilkan asennosta ja/tai maakosketuksesta, niitä voidaan käyttää erilaisissa ortooseissa:

- pitkissä alaraajaortooseissa ilman nilkaniveltä tai sen kanssa
- pitkissä alaraajaortooseissa mahdollisesti lonkkanivelen kanssa
- polviortooseissa

Käyttöalueet: M.Quadriceps lihasheikkous, joka johtuu MS-taudista tai vastaavanlaisista sairauksista, halvauksesta, poliosta, perifeerisistä hermovaurioista, muista neuromuskulaarisista sairauksista.

Kontraindikaatiot: Polven fleksiokontraktuurat > 10°, kohtuullinen tai vaikea spastisiteetti.

Muuta: Kumpaankin tuotteeseen sisältyy kauko-ohjain, dummy valua varten sekä muut asennukseen tarvittavat työkalut. SPL2-nivelet on tarkoitettu 20 mm kiskoille. Kiskot eivät sisälly hintaan. Tuote 62800 sisältää SPL- sekä SPC-nivelet. Tuote 62803 sisältää SPL-nivelen. Potilaan paino enintään 100 kg. Nivelen mukana toimitetaan seikkaperäinen valmistus- ja sovitussuositus. Ohjeessa on myös varaosaluettelo. Fysioterapeuteille on oma käyttöohje. Ohjevihkosia voi tilata asiakaspalvelustamme.

Tuotenro.	Malli	Vas/Oik
62800	SPL2	Vas/Oik
62803	SPL2 Monolateral	Vas/Oik
62801	Työkalu nivelen linjaukseen	
62802	Dummy	
62805	Korjaussarja	
93101	Sovitusortoosi lainattavaksi	Bilat.

Load Response -polvinivel

Load Response vaimentaa iskuja ja sallii 18°:n polven fleksion seisontavaiheessa. Kuormitettu spiraalijousi säilyttää polvinivelen stabiliteetin vastustamalla polven fleksiota. Load Responsea on saatavana alumiinisin, titaanisin tai ruostumattomasta teräksestä valmistetuin kiskoin.

Käyttöalueet: Täydellinen M. Quadriceps lihaskato, johon liittyy lonkan lihasheikkous. Minimipaino 50 kg, maksimipaino 86 kg.

Muuta: Load Response-polvinivel on tarkoitettu 19 mm kiskoille.

Tuotenro.	Malli	Materiaali	Vas/Oik
62820	Load Response-polvinivel	Alumiini	Vas/Oik
62820	Load Response-polvinivel	Alumiini	
62821	Load Response-polvinivel	Ruostumaton teräs	Vas/Oik
62821	Load Response-polvinivel	Ruostumaton teräs	
62822	Load Response-polvinivel	Titaani	Vas/Oik
62822	Load Response-polvinivel	Titaani	
62823	Uretaaninauha		
62828	Rinnakkaistyökalu LR-polvinivelelle		
62829	Lukitussetti LR-polvinivelelle	Vas/Oik	
62829	Lukitussetti LR-polvinivelelle		
93220	Demo-ortoosi lainattavaksi		





GX-Knee-polvinivel

GX-Knee on polvinivel, jonka tehtävänä on avustaa polven ekstensiota heilautusvaiheessa. Kaasujousen avulla polvi ojentuu täysin kantauskassa. Kaasujousia on kahta vastusastetta, 125 N (normaali) ja 175 N aktiivisille potilaille.

Käyttöalueet: Quadriceps heikkous, quadriceps heikkous, johon yhdistyy jalan ja nilkan ongelmia, quadricepsin heikkous yhdessä polvinivelen sivuttaisinstabiliteetin kanssa. Potilaan paino enintään 100 kg.

Kontraindikaatiot: Heikko lantion lihaksisto.

Muuta: GX-Knee-polvinivel on tarkoitettu 19 mm kiskoille. Mukana tulee mediaaliset ja lateraaliset kiskot.

Tuotenro.	Malli	Kovuus	Materiaali	Vas/Oik
62830	GX-Knee, nuori	125N	Alumiini	Vas/Oik
62830	GX-Knee, nuori	175N	Alumiini	Vas/Oik
62831	GX-Knee, nuori	125N	Ruostumaton teräs	Vas/Oik
62831	GX-Knee, nuori	175N	Ruostumaton teräs	Vas/Oik
62832	GX-Knee, aikuinen	125N	Alumiini	Vas/Oik
62832	GX-Knee, aikuinen	175N	Alumiini	Vas/Oik
62833	GX-Knee, aikuinen	125N	Ruostumaton teräs	Vas/Oik
62833	GX-Knee, aikuinen	175N	Ruostumaton teräs	Vas/Oik

FullStride™-polvinivel

FullStride™-polvinivel kontrolloi polvea mekaanisesti kaapelijärjestelmän avulla. Nivel lukittuu täydessä ekstensiossa ja avautuu automaattisesti tukivaiheen lopussa. FullStride antaa maksimaalisen kontrollin varus-/valgusinstabiliateetissa ja polvinivelen hyperekstensiossa. Nivel on vaihdettavissa SafetyStride-polviniveleen. Yhteensopiva useimpien nilkkaniveliä kanssa. Jos polven liikerata halutaan lukita, se onnistuu vaihtamalla nivelet toisin päin eli mediaalipuolen nivel lateraalipuolelle ja lateraalinen nivel mediaalipuolelle.

Käyttöalueet: M. Quadriceps heikkous, MS, halvaus, femoraalihermon vamma ja/ tai lievä selkäydinvamma, inkluusiokappalemyosiitti.

Kontraindikaatiot: Potilaan paino >100 kg, lonkan, polven tai nilkan lihaksiston spastisiteetti, merkittävä jalkojen pituusero, jossa vahingoittunut jalka on lyhyempi, polvinivelen ekstensiokontraktuurat.

Muuta: FullStride-nivel on tarkoitettu 19 mm kiskoille. Mukana toimitetaan sekä lateraaliset että mediaaliset kiskot. Kuvassa niveleen on asennettu Slim Line Double Action-nilkkanivel ja Slim Line jalustin. PreSTRIDE-sovitustortoosia voidaan käyttää arvioimaan FullStride:n sopivuutta asiakkaalle. Demo-ortoosi on tarkoitettu vain näyttöä, ei sovitusta varten.

Tuotenro.	Malli	Materiaali	Vas/Oik
62837	FullStride AL	Alumiini	Bilat.
62838	FullStride RT	Ruostumaton teräs	Bilat.
93240	FullStride demo-ortoosi lainattavaksi	-	Bilat.
93250	PreSTRIDE sovitustortoosi lainattavaksi	Ortoosia voi säätää/muokata.	Vasen
93251	PreSTRIDE sovitustortoosi lainattavaksi	Ortoosia voi säätää/muokata.	Oikea





SafetyStride™-polvinivel

SafetyStride™-polvinivel kontrolloi mekaanisesti polven fleksiota kaapelijärjestelmän avulla. Ortoosi ei tarvitse täydellistä polviektensiota lukittautuakseen tukivaiheen aikana, vaan lukittuu missä kulmassa tahansa. Polvinivelen sisässä oleva lukitustappi aktivoituu heilahdusvaiheen aikana, mikä varmistaa polvinivelen stabiliteetin ennen kantakosketusta. Vaihdeavissa FullStride-polviniveleen. Yhteensopiva useimpien nilkkaniveliä kanssa.

Käyttöalueet: M. Quadriceps heikkous, MS, halvaus, femoraalihermon vamma ja/ tai lievä selkäydinvamma, inkluusiokappalemyosiitti.

Kontraindikaatiot: Potilaan paino >100 kg, lonkan, polven tai nilkan lihaksiston spastisiteetti, merkittävä jalkojen pituusero, jossa vahingoittunut jalka on lyhyempi.

Muuta: SafetyStride-nivel on tarkoitettu 19 mm kiskoille. Mukana tulee sekä mediaaliset että lateraaliset kiskot. Kuvassa niveleen on asennettu Camber Axis -nilkkanivel. PreSTRIDE-sovitussorttoosia voidaan käyttää arvioimaan SafetyStriden sopivuutta asiakkaalle.

Tuotenro.	Malli
62835	SafetyStride, Alumiini
62836	SafetyStride, Ruostumaton teräs
93230	SafetyStride, demo-ortoosi lainattavaksi
93231	SafetyStride, demo-ortoosi lainattavaksi
93250	PreStride sovitussorttoosi lainattavaksi. Ortoosia voi säätää/muokata.
93251	PreStride sovitussorttoosi lainattavaksi. Ortoosia voi säätää/muokata.

MultiMotion korjaava nivel

MultiMotion on dynaamisesti liikerataa korjaava ortoosijärjestelmä, jota voidaan käyttää kun raajan liikkuvuus on rajoittunut johtuen esim. kontraktuurasta tai spastisiteetista tai leikkauksen jälkeen tai palovammojen seurauksena. Järjestelmää voidaan käyttää apuna useille eri nivelleille sekä ekstensiossa että fleksiossa. Nivelten dynaaminen toiminta antaa varman ja pysyvän hoitomenetelmän täysin potilaan yksilöllisten edellytysten mukaisesti. Yksilöllisen ortoosin valmistaa apuvälineteknikko. Järjestelmä on toiminnaltaan yksinkertainen ja asetuksia on helppo muuttaa liikeradan muuttuessa. Käyttämällä seuranta-kaavaketta voit helposti seurata kehitystä ja näin varmistaa mitä asetuksia ja muutoksia tulisi tehdä. Nivel voidaan tilata yksittäin tai settinä, jossa on sekä ylä- että alakiskot. Nilkkaan on myös saatavana nivel, johon on asennettu T-kisko joko 12 mm:n offsetilla.



Käyttöalueet: Esimerkkejä diagnooseista: aivohalvaus, nivelsiderepeämät, palovammat, Cerebral Pares, murtumat, spastinen jäykkyys, MS, Spina Bifida, säären amputaatio ja kallo- ja aivovammat.

Kontraindikaatiot: Ankyloosi, lihasten ja jalan epämuodostumat, fibroosi, luutumien.

Muuta: Seuranta-kaavakkeen voi tilata asiakaspalvelustamme tai hakea nettisivuiltamme www.camp.fi "Lataa"- sarakkeen alta.

Tuotenro.	Malli	Koko	Mitta
69100	Korjaava nivel	Regular	Kiskon leveys 16 mm
69110	Korjaava nivel (69100) + suora ylä- ja alakisko (69702)	Regular	200 x 16 x 4 mm
69111	Korjaava nivel (69100) + muotoiltu ylä- ja alakisko (69706)	Regular	450 x 16 x 4 mm
69112	Korjaava nivel (69100) + T-muotoinen ja suora kisko (69710)	Regular	150 x 16 x 3,2 mm
69113	Korjaava nivel johon asennettu T-kisko 12 mm offsetilla	Regular	Kiskon leveys 16 mm
69121	Korjaava nivel johon asennettu kiskot	Regular	Kiskon leveys 16 mm
69122	Korjaava nivel johon asennettu kiskot	Small	Kiskon leveys 12 mm
69123	Korjaava nivel johon asennettu kiskot, T-kisko 12 mm offset	Regular	Kiskon leveys 16 mm
69125	Korjaava nivel johon asennettu kiskot, T-kisko 12 mm offset	Small	Kiskon leveys 12 mm
69200	Korjaava nivel	Small	Kiskon leveys 12 mm
69210	Korjaava nivel (69200) + suora ylä- ja alakisko (69701)	Small	200 x 12 x 3,2 mm
69211	Korjaava nivel (69200) + muotoiltu ylä- ja alakisko (69705)	Small	350 x 12 x 3,2 mm
69212	Korjaava nivel (69200) + T-muotoinen ja suora kisko (69709)	Small	150 x 12 x 3,2 mm
69213	Korjaava nivel johon asennettu T-kisko 12 mm offsetilla	Small	Kiskon leveys 12 mm
69951	Dummy MultiMotion nivelelle	Regular	
69952	Dummy MultiMotion nivelelle	Small	



MultiMotion kaksisuuntainen perusnivel

MultiMotion kaksisuuntainen perusnivel asennetaan korjaavan nivelen vastakkaiselle puolelle. Näin varmistetaan ortoosin vääntöjäykkyys. Nivel voidaan tilata yksittäin tai settinä, jossa on sekä ylä- että alakiskot. Nilkkaan on myös saatavana nivel, johon on asennettu T-kisko joko 12 mm:n tai 22 mm:n offsetilla.

Käyttöalueet: Katso MultiMotion korjaava nivel.

Muuta: Vapaa liikkuvuus (+135° - -135°).

Tuotenro.	Malli	Koko	Mitta
69505	Kaksisuuntainen perusnivel	Small	Kiskon leveys 12 mm
69128	Kaksisuuntainen perusnivel, johon asennettu kiskot	Small	Kiskon leveys 12 mm
69500	Kaksisuuntainen perusnivel	Regular	Kiskon leveys 16 mm
69127	Kaksisuuntainen perusnivel, johon asennettu kiskot	Regular	Kiskon leveys 16 mm
69518	Kaksisuuntainen perusnivel johon asennettu T-kisko 12 mm offsetilla	Small	Kiskon leveys 12 mm
69131	Kaksisuuntainen perusnivel johon asennettu kiskot, T-kisko 12 mm offset	Small	Kiskon leveys 12 mm
69513	Kaksisuuntainen perusnivel johon asennettu T-kisko 22 mm offsetilla	Regular	Kiskon leveys 16 mm
69129	Kaksisuuntainen perusnivel johon asennettu kiskot, T-kisko 12 mm offset	Regular	Kiskon leveys 16 mm
69515	Kaksisuunt. perusnivel (69505) + suora ylä- ja alakisko (69701)	Small	200 x 12 x 3,2 mm
69516	Kaksisuunt. perusnivel (69505) + muotoiltu ylä- ja alakisko (69705)	Small	350 x 12 x 3,2 mm
69517	Kaksisuunt. perusnivel (69505) + T-muotoinen ja suora kisko (69709)	Small	150 x 12 x 3,2 mm
69510	Kaksisuunt. perusnivel (69500) + suora ylä- ja alakisko (69702)	Regular	200 x 16 x 4 mm
69511	Kaksisuunt. perusnivel (69500) + muotoiltu ylä- ja alakisko (69706)	Regular	450 x 16 x 4 mm
69512	Kaksisuunt. perusnivel (69500) + T-muotoinen ja suora kiskot (69710)	Regular	150 x 16 x 3,2 mm
69953	Dummy MultiMotion sarananivelelle	Regular	
69954	Dummy MultiMotion sarananivelelle	Small	

MultiMotion ROM-nivel

MultiMotion R.O.M. nivel asennetaan korjaavan nivelen vastakkaiselle puolelle. Näin varmistetaan ortoosin vääntöjäykkyys.

Käyttöalueet: Katso MultiMotion korjaava nivel.

Muuta: Fleksio/ekstensiostopperi voidaan säätää 14° välein, Regular koko 12° välein.


Tuotenro.	Malli	Koko	Mitta
69555	ROM-nivel kiskon kiin.osalla	Small	Kiskon leveys 12 mm
69550	ROM-nivel kiskon kiin.osalla	Regular	Kiskon leveys 16 mm



MultiMotion kiskot

MultiMotion järjestelmään on saatavana monia erilaisia kiskoja. Kiskoja on saatavana 12 mm ja 16 mm levyisinä. Kaikki kiskot toimitetaan valmiilla asennusrei'illä, jotka nopeuttavat MultiMotionin kiinnittämistä niveleen.

Tuotenro.	Malli	Koko	Mitta
69701	Kiskot, suora	Small	200 x 12 x 3 mm
69705	Kiskot, muotoiltu	Small	350 x 12 x 3,2 mm
69709	Kiskot, T-muotoinen	Small	R/200 x 12 x 3,2 mm, T/150 x 12 x 3,2 mm
69702	Kiskot, suora	Regular	200 x 16 x 4 mm
69706	Kiskot, muotoiltu	Regular	450 x 16 x 4,0 mm
69710	Kiskot, T-muotoinen	Regular	R/200 x 16 x 4 mm, T/150 x 16 x 3,2 mm
69722	Alumiinikiskot 1 pari	Small	150 x 12 x 3.2 mm
69723	Alumiinikiskot 1 pari	Regular	150 x 16 x 4.0 mm

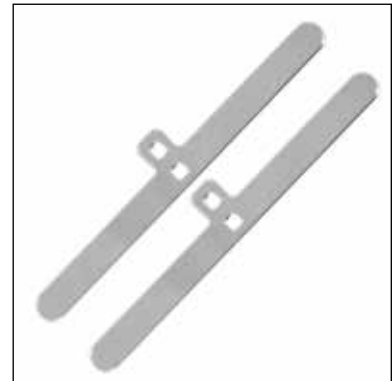



MultiMotion muut tuotteet

Tuotenro.	Malli	Koko	Mitta	Pakkauskoko
69950	MultiMotion kohdennustyökalu			
69900	MultiMotion ruuvimeisseli			
69101	MultiMotion nivelpesän ruuvi	Regular		
69102	MultiMotion etäisyysäädin	Regular		
69103	MultiMotion nivelpesä	Regular		
69104	MultiMotion vääntövoiman säätölevy	Regular		
69105	MultiMotion jousen voimayksikkö	Regular	10,2 Nm	
69106	MultiMotion fleksio/ekstensiostopperi	Regular		2
69107	MultiMotion ruuvit kiskoille	Regular		4
69108	MultiMotion kiskojen kierreholkit	Regular		4
69201	MultiMotion nivelpesän ruuvi	Small		
69202	MultiMotion etäisyysäädin	Small		
69203	MultiMotion nivelpesä	Small		
69204	MultiMotion vääntövoiman säätölevy	Small		
69205	MultiMotion jousen voimayksikkö	Small	3,4 Nm	
69206	MultiMotion fleksio/ekstensiostopperi	Small		2
69207	MultiMotion ruuvit kiskoille	Small		4
69208	MultiMotion kiskojen kierreholkit	Small		4
69501	MultiMotion nivelsuoja			
69502	MultiMotion akselin säätösetti			
69503	MultiMotion ruuvit kiskoille			4
69504	MultiMotion kiskojen kierreholkit			4



Mitta 1: Maksimaalinen vääntömomentti

Mitta 2: Nivelpesän halkaisija

Mitta 3: Nivelen paino

MultiMotion lonkan abduktiojärjestelmä

Niveljärjestelmä on tarkoitettu lasten korjattavissa olevien lonkan kontraktuuriin hoitoon. Järjestelmä koostuu kahdesta komponentista – korjaavasta nivelestä ja abduktiokiskoista. Komponentit asennetaan yksilöllisesti valmistettuun ortoosiin. Ortoosin käyttö ohjaa raajan oikeaan asentoon ja stabiloi lonkkaniveltä. Lähentäjälihakset venyvät näin hitaasti asteittain. Nivelet voidaan lukita haluttuun asentoon. Ortoosissa on säädettävät fleksio- ja ekstensiostopperit: Small 14° välein ja Regular 12° välein.

Käyttöalueet: Spastinen diplegia, spastinen tetraplegia, spastinen triplegia, lonkkanivelen synnynnäinen subluksaatio.

Muuta: Lonkan abduktiojärjestelmää saa käyttää ainoastaan alaraajoihin tarkoitetuissa ortoosissa. Niitä ei tule käyttää liikkumista avustaviin ortoosihin.

Tuotenro.	Malli	Koko	Mitta 1	Mitta 2	Mitta 3	Ikä
69721	Abduktiokiskot	Small	< 105 cm			
69720	Abduktiokiskot	Regular	> 105 cm			
69200	Korjaava nivel	Small	3,4 Nm	35 mm	100g	< 4 vuotta
69100	Korjaava nivel	Regular	10,2 Nm	53 mm	245g	> 4 vuotta

MultiStatic korjaava nivel

MultiStatic-nivel on tarkoitettu käytettäväksi korjattavien kontraktuurien hoitamisessa lapsilla ja aikuisilla. Nivel mahdollistaa nopean, tehokkaan ja riittävästi staattisen kontraktuurien hoidon. Nivel toimii HLBS-periaatteen (High Load Brief Stretch) mukaisesti. Nivelen kulma määritetään eksentrisellä akselilla. MultiStatic-nivel on tarkoitettu käytettäväksi ortoosissa joihin ei varata painoa. Suosittelemme käyttämään MultiStatic-nivelen vastakkaisella puolella jotakin kaksisuuntaista perusniveltä varmistamaan ortoosin vääntöjäykkyys ja rotaatio. Nivelä voidaan käyttää fleksiassa ja ekstensiassa. Siinä on asteeton $+120^{\circ}$ - -120° säätöväli. Voidaan käyttää sekä oikealla että vasemmalla puolella. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä.



Käyttöalueet: Korjattavissa olevien kontraktuurien hoito lapsille ja aikuisille.

Tuotenro.	Koko	Leveys	Pituus	Korkeus	Halkaisija	Paino
69690	Small	12 mm	400 mm	8,5 mm	19 mm	83 g
69691	Medium	16 mm	400 mm	9,5 mm	25 mm	121 g
69692	Large	19 mm	400 mm	10,5 mm	30 mm	151 g

MultiStatic kaksisuuntainen perusnivel

Tätä vapaasti liikkuvaa kaksisuuntaista perusniveltä käytetään yhdessä MultiStaticin korjaavan nivelen kanssa varmistamaan ortoosin vääntöjäykkyys ja paras mahdollinen toiminnallisuus. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä.



Tuotenro.	Malli	Leveys	Pituus	Korkeus	Halkaisija	Paino
69695	Kaksisuuntainen perusnivel	12 mm	400 mm	8 mm	19 mm	78 gram
69696	Kaksisuuntainen perusnivel	16 mm	400 mm	8 mm	24 mm	114 gram

Monodos

Monodos-nivel on tarkoitettu dynaamisten kontraktuurien hoitoon. Se on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Nivel sallii vapaan liikkeen yhteen suuntaan ja estää liikkeen vastakkaiseen suuntaan. Tarkoitettu ylä- ja alaraajoille fleksiassa ja ekstensiassa. Nivelessä on yksinkertainen avausmekanismi.

Käyttöalueet: Dynaamisten kontraktuurien hoito.

Muuta: Nivelä ei saa käyttää painoa kannattelevissa ortoosissa. Large-kokoon sisältyy Free Motion -nivel ja kiskot.

Tuotenro.	Koko	Pakkaus	Vas/Oik
62780	Small	1 kpl	Bilat.
62780	Medium	1 kpl	Bilat.
62780	Large	1 pari	Bilat.



Omat muistiinpanot

[illegible]



Muovit ja materiaalit

www.camp.fi

X-LITE® 3D-LITE™

Valmistamme Belgiassa sijaitsevassa tehtaassamme muovikipsimateriaaleja, jotka kaikki ovat ihanteellisia kipsien tai erilaisten ortoosien valmistukseen. Materiaalit ovat myrkyttömiä ja siksi vaarattomia potilaille sekä henkilökunnalle. Lisäksi haluamme pitää tämän täysin biologisesti hajoavan tuotteen avulla huolta luonnostamme - X-LITE® EcoCast.

Miksi valita X-LITE® tai 3D-LITE™

- Materiaalit ovat täysin vaarattomia, eivät sisällä isosyanaatteja tai lasikuitua
- Ympäristöystävällisiä
- Ei tarvita vakuumlaitteita
- Ei tarvita suojahanskoja tai hengityssuojaa
- Ei tahmaa eikä pölyä
- Erittäin kevyt, mikä on eduksi potilaalle
- Ilmava, hyvä iholle ja haavaumiin
- Sietää kastelua
- Päästää läpi röntgensäteitä
- Vähemmän hukkaloja, sillä ylijääneet ja jo lämmitetyt palat voidaan käyttää uudelleen.



X-LITE®

X-LITE®-materiaali koostuu 100% puuvillaneuloksesta, joka on kyllästetty myrkyttömällä hartsista valmistetulla matalalämpömuovilla. Tämä tekee materiaalista hyvin vahvan, stabiilin ja kestävä, joka on samanaikaisesti hengittävää ja kevyttä suurten reikien ansiosta. X-LITE® lämmitetään lämminviesialtaassa 70°C:ssa, jonka jälkeen sitä voidaan helposti muotoilla. X-LITE®:a voidaan uudelleen käyttää ja lämmittää useita kertoja ja jäännöspalat voidaan käyttää vahvike-materiaalina tai pienempiin ortooseihin. Pienemmät muutokset voidaan tehdä heti riisumatta ortoosia potilaan yltä tavallisen hiustenkuivaajan avulla. Stabiliteettia saadaan lisäämällä kerroksia. X-LITE®-materiaalia on saatavana kolmea eri vaihtoehtoa; CLASSIC, PREMIUM ja PLUS. Materiaali valitaan kliinisten indikaatioiden sekä omien mieltymysten mukaan.

3D-LITE™

3D-LITE™ on kuten X-LITE®, matalalämpömuovi, joka on valmistettu kolmiulotteisesta hart-silla kyllästetystä polyesterikuteesta. Materiaali sopii monien eri ortoosien ja lastojen valmistukseen. Materiaali on vahvaa, stabiilia, kevyttä ja ilmavaa ja sitä on helppo muotoilla. 3D-LITE™:a on saatavana kolmea eri paksuutta; 3, 5 ja 7 mm. Materiaali muotoutuu hyvin eri vartalonosien muotoihin eikä siihen jää sormenjälkiä. 3D-LITE™-materiaali lämmitetään uunissa 80°C:ssa tai lämmiinilmapuhaltimella. Sitä on helppo muotoilla uudelleen.

Kipsaus

X-LITE®:a on saatavana rullina rullattaviin kipsauksiin sekä arkkeina ja annostelijassa lastojen valmistukseen. Koska materiaalit ovat täysin myrkyttömiä ei valmistuksessa tarvitse käyttää suojahanskoja tai muuta suojavarustusta. Rullattavat kipsaukset poistetaan helposti kipsisahalla ilman materiaalin pölyämistä. Kipsin päälle voi varata painoa jo 30 minuutin jälkeen. Materiaali läpäisee röntgensäteitä 3 kerrokseen asti.

Ortoosit ja lastat

X-LITE® ja 3D-LITE™ sopivat ortoosien ja lastojen valmistukseen. Materiaalin valinta riippuu käytössä olevasta laitteistosta, kipsattavasta vartalonosasta sekä halutusta stabiliteetista ja muotoutuvuudesta.



X-LITE® Classic rulla

X-LITE® Classic on mitä vahvin materiaali. Avoin rakenne tekee tuotteesta ilmavan ja sallii ihon hengittää. X-LITE® Classic on myrkytön ympäristöystävällinen muovi ja kuten useimmat materiaaleistamme, se ei sisällä isosyanaatteja tai lasikuitua. X-LITE® Classic rullassa on kerroksien välissä suojakalvo, joka irrotetaan kipsauksen aikana.

Valitse kolmesta väristä – valkoinen, antrasiitti tai sininen

Käyttöalueet: Rullattaviin kipsauksiin.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Pakkaus
64103	Valkoinen	50 mm	1,8 m	20 rullaa
64133	Valkoinen	75 mm	1,8 m	20 rullaa
64136	Antrasiitti	75 mm	1,8 m	5 rullaa
64137	Royal Blå	75 mm	1,8 m	5 rullaa
64143	Valkoinen	100 mm	1,8 m	10 rullaa
64146	Antrasiitti	100 mm	1,8 m	5 rullaa
64147	Royal Blå	100 mm	1,8 m	5 rullaa
64153	Valkoinen	125 mm	1,8 m	10 rullaa
64162	Valkoinen	150 mm	1,8 m	5 rullaa
64163	Valkoinen	150 mm	1,8 m	10 rullaa
64168	Antrasiitti	150 mm	1,8 m	2 rullaa
64169	Royal Blue	150 mm	1,8 m	2 rullaa





X-LITE® Classic arkki ja annostelija

X-LITE® Classic on mitä vahvin materiaali. Avoin rakenne tekee tuotteesta ilmavan ja sallii ihon hengittää. X-LITE® Classic on myrkytön ympäristöystävällinen muovi ja kuten useimmat materiaaleistamme, se ei sisällä isosyanaatteja tai lasikuitua. X-LITE® Classic on saatavilla arkkina tai kätevässä 10 metrin annostelijassa, josta voi leikata tarvittavan kokoisen palan muovia kerrallaan. Näin säästyy myös varastotilaa. Valittavana on kolme väriä: valkoinen, antrasiitti, Royal Blue -sininen.

Käyttöalueet: Kipsilastat, ortoosit ja irrotettavat lastat.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Pakkauskoko	Arkki/annostelija
64250	Valkoinen	75 mm	10 m	1	Annostelija
64251	Valkoinen	100 mm	10 m	1	Annostelija
64252	Valkoinen	150 mm	10 m	1	Annostelija
64253	Valkoinen	200 mm	10 m	1	Annostelija
64254	Valkoinen	125 mm	10 m	1	Annostelija
64255	Antracitti	150 mm	10 m	1	Annostelija
64256	Royal Blue	150 mm	10 m	1	Annostelija
64278	Valkoinen	25 mm	500 mm	50	Arkki
64290	Valkoinen	200 mm	375 mm	15	Arkki
64291	Valkoinen	200 mm	1,2 m	15	Arkki
64292	Valkoinen	200 mm	900 mm	15	Arkki
64293	Valkoinen	75 mm	375 mm	15	Arkki
64294	Valkoinen	100 mm	375 mm	15	Arkki
64295	Valkoinen	125 mm	375 mm	15	Arkki
64296	Valkoinen	150 mm	375 mm	15	Arkki
64297	Valkoinen	150 mm	900 mm	15	Arkki
64298	Valkoinen	450 mm	500 mm	10	Arkki
64299	Valkoinen	500 mm	500 mm	10	Arkki
64302	Antrasiitti	200 mm	375 mm	8	Arkki
64303	Antrasiitti	450 mm	500 mm	4	Arkki
64304	Royal Blue	200 mm	375 mm	8	Arkki
64305	Royal Blue	450 mm	500 mm	4	Arkki

X-LITE® PLUS rulla

X-LITE® PLUS rullien ulkopinta on pehmeä ja miellyttävä potilaalle. X-LITE® Plus on myrkytön ympäristöystävällinen muovi ja kuten useimmat materiaaleistamme, se ei sisällä isosyanaatteja tai lasikuitua. X-LITE® PLUS rullissa ei ole suojakalvoa kerrosten välissä, joten materiaali saadaan nopeasti ja helposti rullattua kipsattavalle alueelle.

Valittavana on 5 väriä: valkoinen, punainen, sininen, musta ja hot pink.

Käyttöalueet: Rullattaviin kipsauksiin.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Pkt/rulla
64701	Valkoinen	25 mm	1,8 m	5
64702	Valkoinen	50 mm	1,8 m	20
64703	Valkoinen	75 mm	1,8 m	20
64704	Valkoinen	100 mm	1,8 m	10
64706	Valkoinen	125 mm	1,8 m	10
64707	Valkoinen	150 mm	1,8 m	10
64708	Valkoinen	150 mm	1,8 m	2
64711	Punainen	25 mm	1,8 m	5
64712	Punainen	50 mm	1,8 m	20
64713	Punainen	75 mm	1,8 m	20
64714	Punainen	100 mm	1,8 m	10
64716	Punainen	125 mm	1,8 m	10
64717	Punainen	150 mm	1,8 m	10
64718	Punainen	150 mm	1,8 m	2
64721	Sininen	25 mm	1,8 m	5
64722	Sininen	50 mm	1,8 m	20
64723	Sininen	75 mm	1,8 m	20
64724	Sininen	100 mm	1,8 m	10
64726	Sininen	125 mm	1,8 m	10
64727	Sininen	150 mm	1,8 m	10
64728	Sininen	150 mm	1,8 m	2
64731	Musta	25 mm	1,8 m	5
64732	Musta	50 mm	1,8 m	20
64733	Musta	75 mm	1,8 m	20
64734	Musta	100 mm	1,8 m	10
64736	Musta	125 mm	1,8 m	10
64737	Musta	150 mm	1,8 m	10
64738	Musta	150 mm	1,8 m	2
64741	Hot Pink	25 mm	1,8 m	5
64742	Hot Pink	50 mm	1,8 m	20
64743	Hot Pink	75 mm	1,8 m	20
64744	Hot Pink	100 mm	1,8 m	10
64746	Hot Pink	125 mm	1,8 m	10
64747	Hot Pink	150 mm	1,8 m	10
64748	Hot Pink	150 mm	1,8 m	2





X-LITE® PLUS arkki ja annostelijaja

X-LITE® PLUS:n ulkopinnassa on pehmeää kangasta, joka lisää potilasmukavuutta ja mahdollistaa värillisen kipsin teon. X-LITE® Classic on myrkytön ympäristöystävällinen muovi ja kuten useimmat materiaaleistamme, se ei sisällä isosyanaatteja tai lasikuitua. X-LITE® PLUS on saatavana arkkina tai käytännöllisessä 10 metrin annostelijassa, josta voidaan leikata halutun kokoinen pala. Valitse viidestä väristä; valkoinen, punainen, sininen, musta ja hot pink.

Käyttöalueet: Kaikki lastat ja ortoosit.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Pakkauskoko
64790	Punainen	150 mm	10 m	1 Annostelija
64791	Sininen	150 mm	10 m	1 Annostelija
64792	Musta	150 mm	10 m	1 Annostelija
64793	Hot Pink	150 mm	10 m	1 Annostelija
64753	Sininen	200 mm	375 mm	8 arkkia
64754	Musta	200 mm	375 mm	8 arkkia



X-LITE® Premium rulla

X-LITE® Premium on joustavin materiaaleista. Ohut rakenne ei ole puolestaan yhtä vahva kuin muissa X-LITE tuotteissa. Toisaalta se on helpompi muotoilla täydellisesti pienempienkin yksityiskohtien mukaan ja sopii hyvin sidoksiin yläraajoissa ja lapsille. X-LITE® Premium on myrkytön ympäristöystävällinen muovi ja kuten useimmat materiaaleistamme, se ei sisällä isosyanaatteja tai lasikuitua. X-LITE® Premium rullissa on suojakalvo, joka irrotetaan kipsauksen aikana.

Käyttöalueet: Rullattaviin kipsauksiin. Lisävahvuutta ortoosiin saadaan laittamalla useampi kerros materiaalia päällekkäin.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Pakkaus
64205	Valkoinen	50 mm	1,8 m	5 rullaa
64207	Valkoinen	75 mm	1,8 m	5 rullaa
64209	Valkoinen	100 mm	1,8 m	5 rullaa
64210	Valkoinen	125 mm	1,8 m	5 rullaa
64211	Valkoinen	150 mm	1,8 m	5 rullaa

X-LITE® Premium arkki ja annostelija

X-LITE® Premium on joustavin materiaaleista. Ohut rakenne ei ole puolestaan yhtä vahva kuin muissa X-LITE tuotteissa. Toisaalta se on helpompi muotoilla täydellisesti pienempienkin yksityiskohtien mukaan ja sopii hyvin sidoksiin yläraajoissa ja lapsille. X-LITE® Premium on myrkytön ympäristöystävällinen muovi ja kuten useimmat materiaaleistamme, se ei sisällä isosyanaatteja tai lasikuitua. Tuote on saatavissa arkkina tai käytännöllisessä 10 metrin annostelijapakkauksessa, josta se voidaan leikata toivottuun mittaan.

Käyttöalueet: Kipsilastat, ortoosit ja irrotettavat lastat. Kun ortoosista halutaan stabiilimpi, voidaan useampi kerros laittaa päällekkäin.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Pakkauskoko	Arkki/annostelija
64215	Beige	75 mm	375 mm	10	Arkki
64217	Beige	100 mm	375 mm	10	Arkki
64219	Beige	150 mm	375 mm	10	Arkki
64220	Beige	200 mm	375 mm	10	Arkki
64225	Beige	75 mm	10 m	1	Annostelija
64226	Beige	100 mm	10 m	1	Annostelija
64227	Beige	150 mm	10 m	1	Annostelija
64228	Beige	200 mm	10 m	1	Annostelija



X-LITE® PLUS Kanttinauha

Kanttinauhassa on pehmeän ja mukavan tuntuinen reuna. Nauhan takaosa on Premium-materiaalista, joka antaa lisävahvistusta. Toimii hyvin yhdessä kaikkien materiaaliemme kanssa mukaanlukien 3D-LITE. Lämmitetään 70°:ssa vedessä.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Pakkaus
64235	Valkoinen	25 mm	4 m	Annostelija
64236	Punainen	25 mm	4 m	Annostelija
64237	Sininen	25 mm	4 m	Annostelija
64238	Musta	25 mm	4 m	Annostelija
64239	Hot pink	25 mm	4 m	Annostelija



X-LITE® termoplastinen kanttinauha

X-LITE termoplastinen kanttinauha on valmistettu samasta materiaalista kuin X-LITE. Nauha lämmitetään vesialtaassa ja kiinnitetään suoraan lämmitettyä X-LITE tai muita matalalämpömuoveja vasten. Ortoosin reunoista tulee sileät ja viimeistellyt.

Muuta: 50 kpl tilaus toimitetaan muovisessa pakkauksessa.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Pakkauskoko	Arkki/annostelija
64185	Valkoinen	18 mm	7,5 m	1	Annostelija
64180	Valkoinen	25 mm	7,5 m	1	Annostelija
64190	Valkoinen	50 mm	7,5 m	1	Annostelija
64183	Valkoinen	18 mm	500 mm	50	Arkki
64187	Valkoinen	25 mm	500 mm	50	Arkki





X-LITE® termoplastinen tarranauha

X-LITE tarranauhan kääntöpuoli on X-LITEa, joka kiinnittyy lämmitettäessä X-LITE, 3D-LITE tai muita matalalämpömuoveja vasten. Nauha lämmitetään vesialtaassa tai kuumailmapuhaltimella. Pehmennettyä tarranauhaa käytetään lämmityksen jälkeen totuttuun tapaan.

Muuta: Arkkit toimitetaan 5 kpl:n pakkauksessa.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Pakkausko	Arkki/annostelija
64195	Valkoinen	50 mm	50 cm	5	Arkki
64196	Valkoinen	50 mm	5 m	1	Annostelija
64197	Musta	50 mm	50 cm	5	Arkki
64198	Musta	50 mm	5 m	1	Annostelija



X-LITE® Stockinette

Saumaton ortoosi- ja kipsisukka 100 % valkaisematonta polypropyleeniä. Mukava ja pehmeä materiaali kuljettaa hyvin kosteuden iholta. Stockinette on joustinneuletta ja istuu näin hyvin jalkaan tekemättä vekkettä ihoa vasten.

Tuotenro.	Väri	Materiaali	Leveys	Pituus	Pakkaus
64400	Beige	Puuvilla	21 mm	23 m	1 rulla
64401	Valkoinen	Polypropeeni	30 mm	10 m	1 rulla
64411	Valkoinen	Polypropeeni	50 mm	10 m	1 rulla
64421	Valkoinen	Polypropeeni	70 mm	10 m	1 rulla
64431	Valkoinen	Polypropeeni	100 mm	10 m	1 rulla
64441	Valkoinen	Polypropeeni	150 mm	10 m	1 rulla
64442	Valkoinen	Polypropeeni	200 mm	10 m	1 rulla



Stockinette dispenser

Stockinette dispenser on valmistettu pyörökatusta polyesterista. Materiaali on pehmeää ja joustavaa. Stockinette on ribbineulosta, minkä ansiosta se istuu hyvin päällä ilman ihoa hankaavia rypyjä. Rulla toimitetaan kätevässä annostelijalaatikossa.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Pakkaus
64394	Valkoinen	30 mm	25 m	1 annostelija
64395	Valkoinen	50 mm	25 m	1 annostelija
64396	Valkoinen	70 mm	25 m	1 annostelija
64397	Valkoinen	100 mm	25 m	1 annostelija
64398	Valkoinen	150 mm	25 m	1 annostelija

Vahtoside

Vahtoside on vahtokumipehmuste, joka hengittää ja hylkii vettä. Pehmuste vaimentaa hyvin iskuja, eikä se ruttaannu yhtä helposti kuten tavalliset kipsipehmusteet.

Käyttöalueet: X-Litesta valmistetun kipsin pehmusteena.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Pakkaus
64480	Valkoinen	75 mm	2,75 m	20 rullaa
64485	Valkoinen	100 mm	2,75 m	16 rullaa
64490	Valkoinen	125 mm	2,75 m	10 rullaa



Color elastinen sidos

Täydennyksenä X-lite kipsilastoihin tarjoamme korkealaatuisia ja kauniin värisiä elastisia sidoksia. Sidoksen mukavuus ja korkealaatuisuus antavat näin erinomaisen tuen potilaille myös pidempiaikaisessa kipsin käytössä. Color elastinen sidos hengittää ja antaa yhdessä X-Lite kipsin kanssa ilmavan tuen. Color elastinen sidos ja sen pehmeä ulkopinta ja kudotut reunat tuntuvat mukavalta ihoa vasten. Sidos muotoutuu hyvin elastisuutensa vuoksi ja sitä voidaan käyttää niin pienemmissä kuin suuremmissa käyttötarkoituksissa. Elastinen sidos voidaan pestä 60°C asteessa ja sterilisoida.



Tuotenro.	Malli	Väri	Leveys	Pituus	Pakkaus
64106	Color elastinen sidos	Musta	6 cm	5 m	10
64107	Color elastinen sidos	Punainen	6 cm	5 m	10
64108	Color elastinen sidos	Royal Blue	6 cm	5 m	10
64109	Color elastinen sidos	Vihreä	6 cm	5 m	10
64110	Color elastinen sidos	Keltainen	6 cm	5 m	10
64112	Color elastinen sidos	Musta	10 cm	5 m	10
64113	Color elastinen sidos	Royal Blue	10 cm	5 m	10



Strava Kuumavesiallas

Strava vesiallas on markkinoiden ensimmäinen tuote, joka käyttää UV sterilointia ja korkean lämpötilan puhdistusohjelmaa. Tämä kaksois-puhdistusjärjestelmä varmistaa, että vesi on 99,99% mikrobivapaa. Perinteisen metallialtaan sijaan Strava vesiallas on valmistettu lämpökovetetusta komposiittimateriaalista, joka tunnetaan kestävä, eristävänä, suojaavana sekä hyvän näköisenä materiaalina. Allas on helppo ja nopea tyhjentää muutamassa minuutissa sisäänrakennetun pumppusysteemin ansiosta. Vesikierto altaassa varmistaa asetetun lämpötilan ja kuumentaa veden nopeasti säästämällä aikaa. Värillinen kosketusnäyttö mahdollistaa nopean materiaali-kohtaisen ohjelmoinnin tai käyttäjän itse asettaa toivomansa asetukset. Laitteen voi säätää menemään päälle ja päältä automaattisesti.

Tuotenro.	Malli	Leveys	Pituus	Korkeus
64507	Vesihauide	Ulkomitta: 51,6 cm Allas: 31,6 cm	Ulkomitta: 59 cm Allas: 48,6 cm	Ulkomitta: 22,6 cm Allas: 14,7 cm
64508	Tyhjennysletku			
64509	Lämpöelementti			
64510	EU sähköjohto			
64511	DK adapteri			
64512	UV lamppu			



X-LITE® levy silikonipinnoitteella

Käytetään työskentelyalustana X-LITE'lla kipsatessa. Silikonipinta ehkäisee X-Liten tarttumisen alustaan. Levyn perforoitu pinta edesauttaa, että X-LITE rullista lähtevä vesi vuotaa levyn alle imeytyen sen alla olevaan pyyhkeeseen.

Tuotenro.	Leveys	Pituus
64811	325 mm	530 mm

Post-operatiivinen kenkä

Hoitokenkä, joka on valmistettu kulutusta kestävästä, laminoidusta nailonista. Päällinen on limittäin muotoon ommeltu, minkä vuoksi sitä voi käyttää sekä normaalisti että kipsin kanssa. Kantaosan pehmuste lisää käyttömukavuutta ja ehkäisee hankaumien syntymistä. Kengän takaosa on vahvistettu, jotta jalka pysyisi paikallaan. Ulkopohja on jäykkä, suora ja pyöristämätön. Yksinkertaisissa jalkapöydän leikkauksissa kenkää voidaan käyttää heti kipsin tilalla.

Käyttöalueet: Hoitokenkä jalkapöydän leikkauksissa, varpaan murtumissa, hallux valgus -leikkauksissa tai kipsikenkänä.

Tuotenro.	Malli	Koko	Sisäpohjallisen pituus
43205	Miesten malli	Small	26 cm
43205	Miesten malli	Medium	27,5 cm
43205	Miesten malli	Large	30 cm
43205	Miesten malli	X-Large	31 cm
43206	Naisten malli	Small	23,5 cm
43206	Naisten malli	Medium	24,5 cm
43206	Naisten malli	Large	26 cm



3D-LITE™

3D-LITE on matalalämpömuovi, joka on valmistettu lämpömuovilla kyllästetystä, kolmiulotteisesta polyesterikuteesta. Materiaali on stabiili, kevyt ja ilmava ja sitä on helppo muotoilla. Materiaalin pinta on sileä, eikä siihen jää sormenjalkia työskentelyn aikana. Materiaali venyy yhteen suuntaan. Lämmitetään vesialtaassa 70°C:ssa tai uunissa 80°C:ssa.

Käyttöalueet: Ortoosien valmistus. 3 mm suositellaan pieniin ortooseihin ja pieniin vartalon osiin. 5 mm suositellaan keskikokoisiin ortooseihin murtumaortooseiksi. 7 mm suositellaan isoihin ortooseihin, kuten esim. korsetteihin.

Tuotenro.	Malli	Leveys	Pituus	Paksuus	Pakkaus
64896	3D-LITE Beige	600 mm	600 mm	3 mm	1 arkki
64897	3D-LITE Beige	600 mm	900 mm	3 mm	1 arkki
64898	3D-LITE Beige	600 mm	600 mm	5 mm	1 arkki
64899	3D-LITE Beige	600 mm	900 mm	5 mm	1 arkki
64900	3D-LITE Beige	600 mm	600 mm	7 mm	1 arkki
64901	3D-LITE Beige	600 mm	900 mm	7 mm	1 arkki
64905	3D-LITE Beige	650 mm	1200 mm	5 mm	1 arkki





3D-Safe

3D-Safe on polyeteenivahtomuovista valmistettu reunanauha. Nauha on itsekiinnittyvä ja hieman elastinen ja sitä on helppo ja nopea käyttää. Jos kaivataan lisää joustavuutta tai pitoa, tulee nauha lämmittää kuumailmapuhaltimella ennen käyttöä.

Käyttöalueet: Kanttinauhana tai pehmusteena ortooseissa.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Paksuus	Pakkaus
64200	Valkoinen	40 mm	10 m	3 mm	1 rulla

Matalalämpömuovit

Erilaiset matalalämpömuovista valmistetut ortoosit asettavat materiaalille erilaisia vaatimuksia. Siksi Camp tarjoaakin laajan matalalämpömuovivalikoiman, mikä mahdollistaa oikean materiaalin löytymisen potilaalle.

Useimmat matalalämpömuovimme tulevat Rolyanilta, jolla on yli 30 vuoden kokemus alalta. He työskentelevät taukoamatta säilyttääkseen korkean laatunsa ja parantaakseen sitä. Samalla he tutkivat ja kehittelevät uusia tuotteita. Mikään muovimateriaali ei sisällä haitallisia aineita ja ne ovat vaarattomia työstää.

Muovien ja valmiiden ortoosien ominaisuudet riippuvat useista tekijöistä.

- Muisti - Materiaalin kyky palautua alkuperäiseen muotoonsa.
- Myötäilevyys - Tapa, jolla lämmitetty materiaali mukautuu alustansa
- Joustavuus - Miten lämmitetty materiaali joustaa/taipuu venytyksessä ja paineessa.
- Tarttumiskyky - Materiaalin kyky kiinnittyä lämmitettynä itseään vasten.
- Lämmitys- ja työstöaika.



Eri perforoinnit vaikuttavat painoon ja hengittävyyteen

- Perforoitu 1 % - Erittäin harva rei'itys, isot reiät (2,5 cm reikien välillä).
- Perforoitu 2,5 % - Harva rei'itys, isot reiät (1 cm reikien välillä).
- Optiperforoitu 19 % - Tiheä rei'itys, pienet reiät.
- Ultraperforoitu 13 % - Tiheä rei'itys, erittäin pienet reiät.
- Superperforoitu 42 % - Erittäin tiheä rei'itys, pienet reiät.

Prosenttiluku ilmoittaa kuinka paljon materiaalia on poistettu. Esimerkiksi Superperforoitu 42% ilmoittaa, että 42% materiaalista on poistettu.

SÄILYTYKSEEN SUOSITTELEMME PIMEÄÄ JA KUIVAA PAIKKAA.



Minimaalinen venyvyyden vastus

- Erinomainen muotoutuvuus
- Helppo venyttää
- Helppo käsitellä

Kohtuullinen venyvyyden vastus

- Muotoutuu helposti
- Vahva kontrolli

Maksimaalinen venyvyyden vastus

- Vahvaa materiaalia
- Hyvin kestävä
- Jäykkä lopputuote



Aquaplast™

Aquaplast™-valikoimaan kuuluu useita materiaaleja, joilla on monia yhteisiä, mutta myös ainutlaatuisia ominaisuuksia erilaisiin tarpeisiin. Aquaplastia on helppo muotoilla. Valikoimassa on seuraavat materiaalit:

Aquaplast™ Original - tarttuu itseensä.

Aquaplast-T™ - "Non-sticky"-pinta (ei tartu itseensä).

Aquaplast™ Prodrap-T™ - "Non-sticky"-pinta, erittäin hyvä muotoiltavuus.

Aquaplast-T™ Antimicrobial - "Non-sticky"-pinta, vähentää hajuhaittoja.

Aquatube™ - kiinnittyy pysyvästi muita Rolyanin muoveja vasten.

Aquaplast™ Watercolors™ - "Non-sticky"-pinta, saatavana monta väriä.



Aquaplast™ Original

Aquaplast™ Originalia on saatavana montaa eri paksuutta ja perforointia ja se sopii monenlaisiin ortooseihin. Materiaalin pintaa ei ole käsitelty ja se tarttuu heti ja pysyvästi itseään vasten. Sitä on helppo muotoilla ja siinä on sulkeutuvat reunat. Materiaalissa on 100 % muisti ja se muuttuu lämmitettäessä läpinäkyväksi. Pintaan ei koskettaessa jää pysyviä sormenjälkiä. Voidaan lämmittää myös uunissa. Huomio: Käytä pohjaverkkoa lämminviesialtaassa. Valmiin ortoosin ominaisuudet: tukeva ortoosi, jossa on tasainen ja pehmeä pinta.

Käyttöalueet: Pohja dynaamisille ja staattisille peukalo-, sormi-, käsi- ja ranneortooseille, 3,2 mm myös käsivarsi- ja jalkaortooseihin.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Paksuus	Pakkaus	Tasainen/ perforoitu
50121	Beige	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 arkki	Tasainen
50122	Beige	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 arkki	Tasainen
50123	Beige	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 arkki	Optiperf. 19%
50124	Beige	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 arkki	Optiperf. 19%
50125	Beige	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 arkki	Optiperf. 19%

Aquaplast-T™

Aquaplast-T™:tä on saatavana monta paksuutta ja perforointia ja se sopii monenlaisiin ortooseihin. Sitä on helppo muotoilla ja siinä on sulkeutuvat reunat. Materiaalissa on 100 % muisti ja se muuttuu lämmitettäessä läpinäkyväksi. Pinta on käsitelty, eikä siihen jää sormenjälkiä. Voidaan lämmittää myös uunissa. Valmiin ortoosin ominaisuudet: Tukeva ortoosi, jossa on tasainen ja pehmeä pinta. Sopii taloudellisena toistuvaan uudelleentyöstöön. Valkoinen Aquaplast muuttuu kirkkaaksi lämmityksessä, joka helpottaa kohoumien näkyvyydessä sekä työskentelyssä alueiden kohdilla, jotka tarvitsevat lisävahvuutta. Tarranauhat kiinnittyvät helpommin ortoosiin kiinni jos pintaa hieman rikotaan ensin.

Käyttöalueet: Pohja dynaamisille ja staattisille peukalo-, sormi-, käsi- ja ranneortooseille, 3,2 mm myös käsivarsi- ja jalkaortooseihin.

Tuotenro.	Väri	Tyyppi	Leveys	Pituus	Paksuus	Pakkaus
50126	Valkoinen	Tasainen	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 arkki
50127	Valkoinen	Tasainen	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 arkki
50128	Valkoinen	Tasainen	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 arkki
50129	Valkoinen	Tasainen	460 mm	610 mm	3,2 mm	4 arkkia
50133	Valkoinen	Superperforoitu 42%	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 arkki
50134	Valkoinen	Superperforoitu 42%	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 arkki
50135	Valkoinen	Superperforoitu 42%	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 arkki
50136	Valkoinen	Optiperforoitu 19%	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 arkki
50137	Valkoinen	Optiperforoitu 19%	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 arkki
50138	Valkoinen	Optiperforoitu 19%	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 arkki
50331	Valkoinen	Ultraperforoitu 13%	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 arkki



Aquaplast™ Prodrap™-T

Aquaplast™ Prodrap™-T on kaikista Aquaplasteista parhaiten muotoiltava ja myötäilevä. Se myötäilee erinomaisesti muotoja. Reunat ovat itsesulkeutuvat. Muovissa on 100 % muisti ja se muuttuu lämmitettäessä läpinäkyväksi. Pinta on käsitelty "Non-sticky"-pinnoitteella. Koskettaessa muoviin ei jää pysyviä sormenjälkiä. Voidaan lämmittää myös uunissa. Valmiin ortoosin ominaisuudet: Saadaan tukeva ortoosi, joka myötäilee muotoja tarkasti. Ihanteellinen henkilöille, joilla on aristavat nivelet. Sopii taloudellisena toistuvaan uudelleentyöstöön. Valkoinen Aquaplast muuttuu läpinäkyväksi lämmityksessä, mikä helpottaa kohoumien näkemistä ja työskentelyä mahdollisten lisävahvuutta tarvitsevien alueiden kohdilla. Tarranauhat kiinnittyvät helpommin jos pintaa ensin hieman rikotaan.

Käyttöalueet: Akuutti trauma, kiputilat ja nivelen ärsytys, peukalo-, sormi-, käsi- ja ranneortoosit.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Paksuus	Pakkaus	Tasainen/perforoitu
50165	Valkoinen	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 arkki	Tasainen
50166	Valkoinen	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 arkki	Tasainen





Aquaplast™ Watercolors™

Aquaplast™ Watercolorsissa™ on samat ominaisuudet kuin Aquaplast-T:ssä.

Sitä on saatavana monta paksuutta, väriä ja perforointia ja se sopii monenlaisiin ortooseihin. Tämä antaa potilaalle ja terapeutille paljon valinnanvapautta.

Watercolors muotoutuu hyvin, siinä on itsesulkeutuvat reunat ja 100 % muisti.

Vaaleat värit muuttuvat hieman läpinäkyviksi lämmitettäessä. Pinta on käsitelty, eikä siihen jää sormenjälkiä. Voidaan lämmittää myös uunissa. Valmiin ortoosin ominaisuudet: Tukeva ortoosi, jossa on tasainen ja pehmeä pinta. Sopii taloudellisenä uudelleentyytöön.

Käyttöalueet: Lasten ortoosit, pohja dynaamisille ja staattisille peukalo-, sormi-, käsi- ja ranneortooseille, 3,2 mm myös käsivarsi- ja jalkaortooseihin.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Paksuus	Pakkaus	Tasainen/perforoitu
50144	Musta	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 arkki	Tasainen
50145	Musta	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 arkki	Perforoitu 19%
50146	Musta	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 arkki	Tasainen
50147	Musta	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 arkki	Perforoitu 19%
50334	Musta	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 arkki	Ultraperforoitu 13%
50140	Kirkkaansininen	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 arkki	Tasainen
50143	Sininen	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 arkki	Perforoitu 19%
50141	Kirkkaansininen	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 arkki	Perforoitu 19%
50142	Kirkkaansininen	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 arkki	Tasainen
50321	Sininen	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 arkki	Perforoitu 19%
50333	Kirkkaansininen	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 arkki	Ultraperforoitu 13%
50308	Mariinin sininen	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 arkki	Perforoitu 19%
50309	Laventeli	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 arkki	Perforoitu 19%
50322	Laventeli	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 arkki	Perforoitu 19%
50343	Laventeli	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 arkki	Ultraperforoitu 13%
50154	Violetti	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 arkki	Tasainen
50155	Violetti	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 arkki	Perforoitu 19%
50313	Violetti	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 arkki	Tasainen
50336	Violetti	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 arkki	Ultraperforoitu 13%
50152	Violetti	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 arkki	Tasainen
50153	Violetti	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 arkki	Perforoitu 19%
50164	Limenvihreä	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 arkki	Tasainen
50307	Limenvihreä	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 arkki	Perforoitu 19%
50317	Limenvihreä	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 arkki	Tasainen
50340	Limenvihreä	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 arkki	Ultraperforoitu 13%
50304	Hot Pink	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 arkki	Perforoitu 19%
50300	Hot Pink	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 arkki	Tasainen
50314	Hot Pink	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 arkki	Tasainen
50337	Hot Pink	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 arkki	Ultraperforoitu 13%
50149	Punainen	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 arkki	Perforoitu 19%
50150	Punainen	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 arkki	Tasainen
50151	Punainen	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 arkki	Perforoitu 19%
50139	Punainen	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 arkki	Tasainen
50335	Punainen	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 arkki	Ultraperforoitu 13%
50156	Beige	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 arkki	Tasainen
50157	Beige	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 arkki	Perforoitu 19%
50158	Beige	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 arkki	Tasainen
50159	Beige	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 arkki	Perforoitu 19%

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Paksuus	Pakkaus	Tasainen/perforoitu
50160	Beige	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 arkki	Tasainen
50161	Beige	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 arkki	Perforoitu 19%
50341	Beige	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 arkki	Ultraperforoitu 13%
50323	Sinimetalli	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 arkki	Tasainen
50344	Sinimetalli	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 arkki	Perforoitu 19%
50359	Sinimetalli	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 arkki	Ultraperforoitu 13%
50348	Sinimetalli	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 arkki	Ultraperforoitu 13%
50325	Hopea	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 arkki	Tasainen
50346	Hopea	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 arkki	Perforoitu 19%
50349	Hopea	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 arkki	Ultraperforoitu 13%
50312	Hopea	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 arkki	Ultraperforoitu 13%
50329	Kirkkaansininen	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 arkki	Perforoitu 19%



Polyform™ ja Polyform™ light

Polyform™ on erittäin venyvä materiaali, minkä vuoksi se sopii monimutkaisiin ortooseihin. Pinta on kevyesti käsitelty ja siinä on itsesulkeutuvat reunat. Ei muistia. Ole huolellinen, sillä materiaaliin saattaa jäädä pysyviä sormenjälkiä koskettaessa. Valmiin ortoosin ominaisuudet: tukeva ja jäykkä ortoosi.

Käyttöalueet: Akuutti trauma, kiputilat ja nivelen ärsytys, peukalo-, sormi-, käsi- ja ranneortoosit.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Paksuus	Pakkaus	Tasainen/ perforoitu
50100	Valkoinen	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 arkki	Tasainen
50101	Valkoinen	460 mm	610 mm	3,2 mm	4 arkkia	Tasainen
50102	Valkoinen	610 mm	910 mm	3,2 mm	1 arkki	Tasainen
50103	Valkoinen	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 arkki	Perforoitu 1%
50107	Valkoinen	310 mm	460 mm	1,6 mm (light)	4 arkkia	Tasainen



Polyflex II™

Polyflex II:ssa on hyvät jousto-ominaisuudet, mutta käsiteltävyys säilyy kuitenkin ortoosin valmistuksen aikana. Materiaalissa on osittainen muisti, mikä helpottaa pieniä säätöjä. Materiaalin pinta on kevyesti käsitelty. Reunat pitää tasoittaa. Materiaaliin saattaa jäädä sormenjälkiä koskettaessa, joten sitä tulee käsitellä huolella. Valmiin ortoosin ominaisuudet: tukeva ja jäykkä ortoosi, jonka joustavuus helpottaa pukemista ja riisumista. Ortoosin joustavuutta voivat hyödyntää esim. henkilöt, joilla käden toiminnot ovat heikot tai joiden tonus on kohonnut.

Käyttöalueet: Akuutti trauma, kiputilat ja nivelen ärsytys, peukalo-, sormi-, käsi- ja ranneortoosit, pohja dynaamisille ortooseille, henkilöille, joilla on neurologisia sairauksia.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Paksuus	Pakkaus	Tasainen/ perforoitu
50109	Valkoinen	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 arkki	Tasainen
50113	Valkoinen	610 mm	910 mm	3,2 mm	1 arkki	Perforoitu 1%
50114	Valkoinen	460 mm	610 mm	3,2 mm	4 arkkia	Perforoitu 1%

TailorSplint™

Tailorsplint™ on monipuolinen muovi. Se sopii moneen tarkoitukseen ja sitä voidaan käyttää monenlaisissa ortooseissa. Keskinertainen joustovastus sallii muovin muokkauksen hieman kovempaan, samalla kuin hyvä muotoiltavuus säilyy. Pinta on käsitelty. Reunat voi yksinkertaisesti rullata ja ne ovat itsesulkeutuvat. Materiaaliin ei jää sormenjälkiä. Valmiin ortoosin ominaisuudet: puuterimainen pinta, mikä antaa sille hyvän viimeistelyn.

Käyttöalueet: Peukalo-, sormi- ja ranneortoosit, 3,2 mm myös käsivarsi- ja jalkaortoosit, dynaamisten ortoosien pohja, ortoosit henkilöille, joilla on neurologisia sairauksia.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Paksuus	Pakkaus	Tasainen/perforoitu
50116	Beige	310 mm	460 mm	1,6 mm	4 arkkia	Tasainen
50117	Beige	460 mm	610 mm	2,4 mm	4 arkkia	Tasainen
50118	Beige	460 mm	610 mm	3,2 mm	4 arkkia	Tasainen



Ezeform™ ja Ezeform™ light

Ezeform™ on kehitetty erityisesti antamaan maksimaalista vastusta venytyksessä samalla kun se muotoutuu hyvin käsiteltävälle alueelle ja kestää myös kovempaa käsittelyä. Materiaali pitää muotonsa ja sopii suuriin ortooseihin. Hieman tahmea pinta auttaa ortoosia liukumasta muotoilun aikana. Materiaalissa on itsesulkeutuvat reunat ja se tarttuu pysyvästi itseensä. Materiaaliin ei jää koskettaessa sormenjälkiä. Valmiin ortoosin ominaisuudet: erittäin jäykkä hyvin viimeistelty ortoosi.

Käyttöalueet: Ortoosit henkilöille, joilla on neurologisia sairauksia, lepo-ortoosit ja funktionaaliset ortoosit sekä ylä- että alaraajoille, suurempien dynaamisten ortoosien pohjaksi, Ezeform light lasten ortooseihin.



Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Paksuus	Pakkaus	Tasainen/perforoitu
50170	Valkoinen	460 mm	610 mm	3,2 mm	4 arkkia	Tasainen
50171	Valkoinen	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 arkki	Tasainen
50173	Beige	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 arkki	Tasainen
50174	Beige	610 mm	910 mm	3,2 mm	1 arkki	Tasainen
50175	Sininen	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 arkki	Tasainen
50176	Sininen	610 mm	910 mm	3,2 mm	1 arkki	Tasainen
50178	Valkoinen	610 mm	910 mm	3,2 mm	1 arkki	Perforoitu 1%
50179	Beige	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 arkki	Perforoitu 1%
50180	Beige	610 mm	910 mm	3,2 mm	1 arkki	Perforoitu 1%
50181	Sininen	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 arkki	Perforoitu 1%
50182	Sininen	610 mm	910 mm	3,2 mm	1 arkki	Perforoitu 1%
50183	Valkoinen	310 mm	460 mm	1,6 mm (light)	4 arkkia	Tasainen
50184	Beige	310 mm	460 mm	1,6 mm (light)	4 arkkia	Tasainen



Ezeform™ Antimicrobial

Ezeform™ Antimicrobialissa on käsittely, joka ehkäisee bakteerikasvua ja hajun muodostumista. Käsittelyä ei voi "pestä" pois. Tämä materiaali sopii hyvin, jos ortoosin tai lastan käyttö on pitkäaikaista tai jos lastaa käytetään bakteerikasvulle altistavassa ympäristössä. Materiaalissa on samat ominaisuudet kuin Ezeformissa.

Käyttöalueet: Ortoosit henkilöille, joilla on neurologisia sairauksia, lepo-ortoosit ja funktionaaliset ylä- ja alaraajaortoosit, suurempien dynaamisten ortoosien pohjaksi.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Paksuus	Pakkaus	Tasainen/ perforoitu
50187	Valkoinen	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 arkki	Tasainen



San-Splint™ ja San-Splint™ light

San-splint™ antaa maksimaalisen vastuksen venytettäessä, minkä vuoksi se sopii hyvin suuriin ortooseihin, kun tarvitaan kontrollia valmistuksen aikana. San-splint on isopreeni-kumipohjainen muovi, joka kestää kovempaakin käsittelyä ja säilyttää muotonsa. Materiaali tarttuu pysyvästi itseensä, jos reunat puristetaan yhteen. Materiaaliin ei jää koskettaessa pysyviä sormenjälkiä. Voidaan lämmittää uunissa. Valmiin ortoosin ominaisuudet: erittäin jäykkä ilman vahvistuksia.

Käyttöalueet: Murtumaortoosit, body jackets ja korsetit.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Paksuus	Pakkaus	Tasainen/ perforoitu
50200	Beige	610 mm	910 mm	3 mm	1 arkki	Tasainen
50204	Beige	610 mm	910 mm	3 mm	1 arkki	Perforoitu 2,5%
50205	Beige	460 mm	610 mm	3 mm	4 arkkiä	Perforoitu 2,5%



Plastazote™

Polyeteenivahto suurien ja pienien ortoosien valmistukseen. Sopii ortooseihin, joissa käyttömukavuus on tärkeää. Ei kutistu. Lämmitetään uunissa 140 °C:ssa. Pieniä muutoksia voidaan tehdä kuumailmapuhaltimella.

Käyttöalueet: Pohjalliset, kaularangantuet, reumaatikkojen ja diabetespotilaiden ortoosit, ortoosien pehmusteena.


Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Paksuus	Pakkaus	Tasainen/ perforoitu
50521	Beige	760 mm	1000 mm	12 mm	1 arkki	Perforoitu

Aliplast

Kopolymeerivahtomuovi, joka kiinnittyy itseään vasten. Materiaalissa on sileä pinta, joka on helppo pitää puhtaana. Sopii ortooseihin, jotka ovat suoraan ihoa vasten. Tyhjiömuotoiltava. Lämmitetään uunissa 70-120 °C. Muuttuu tahmeaksi niin toivottaessa korkeassa lämpötilassa tai pitkään uunissa lämmitettäessä. Saatavana kolmea kovuutta.

Käyttöalueet: Ortoosien pehmustamiseen ja esim. pelottien valmistukseen.


Tuotenro.	Väri	Kovuus	Leveys	Pituus	Paksuus	Pakkaus
30400	Valkoinen	Pehmeä 4E	750 mm	900 mm	3 mm	1 arkki
30401	Valkoinen	Pehmeä 4E	750 mm	900 mm	6 mm	1 arkki
30405	Valkoinen	Pehmeä 4E	750 mm	35 m	3 mm	1 rulla
30406	Valkoinen	Pehmeä 4E	750 mm	24 m	6 mm	1 rulla
30410	Valkoinen	Medium 6A	750 mm	600 mm	3 mm	1 arkki
30411	Valkoinen	Medium 6A	750 mm	600 mm	6 mm	1 arkki
30415	Valkoinen	Kova 10	750 mm	600 mm	3 mm	1 arkki
30416	Valkoinen	Kova 10	750 mm	12 m	3 mm	1 rulla

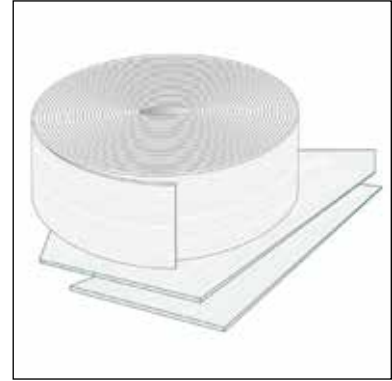

Thermofoam LD

Polyeteenista valmistettu melko tiheärakenteinen pehmustemateriaali, jossa on suljetut solut. Materiaalia voi leikata ja rei'ittää. Lämmitetään uunissa 155 °C:ssa. Helppo muotoilla jälkikäteen.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Paksuus	Pakkaus
30451	Valkoinen	750 mm	900 mm	12,5 mm	1 arkki

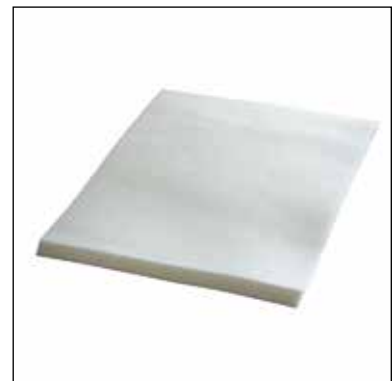

Durofoam HD

Polyeteenistä valmistettu, hyvin tiheä pehmustemateriaali, joka säilyttää paksuutensa pitkänkin aikaa. Materiaalissa on avoimet solut ja sitä voidaan leikata ja rei'ittää. Lämmitetään uunissa 150-170 °C:ssa. Helppo muotoilla jälkikäteen.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Paksuus	Pakkaus
30450	Valkoinen	610 mm	610 mm	12,5 mm	1 arkki





Polypropeeni

Stabiili ja jäykkä kopolymeerimuovi. Lämmitetään uunissa 200-210 °C:ssa tai tyhjiömuotoillaan. Materiaali tarttuu itseensä. Pieniä muutoksia voidaan tehdä kuumailmapuhaltimella.

Käyttöalueet: Ortoosien valmistus.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Paksuus	Pakkaus
38039	Valkoinen	600 mm	1200 mm	2 mm	1 arkki
38040	Valkoinen	675 mm	1050 mm	3 mm	1 arkki
38041	Valkoinen	675 mm	1050 mm	4 mm	1 arkki
38042	Valkoinen	675 mm	1050 mm	5 mm	1 arkki



Non Slip -materiaali

Luistamaton materiaali, joka on korkean kitkansa ansiosta ihanteellinen pinnoille, jotka altistuvat kovalle kulutukselle. Materiaali on kehitetty käytettäväksi erityisesti KiddieGAIT®-ortoosin pohjalevyllä, jottei esim. SureStep-ortoosi liukuisi ortoosin paljaalla pinnalla. HUOM! Materiaalia ei tule käyttää suoraan ihoa vasten.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus
28411	Musta	14 cm	1m



Ortoosisukka Komfort

Erittäin paksusta ja pehmeästä materiaalista valmistettu ortoosisukka. Kaikki reunat ovat kaksinkertaisia tai ommeltu overlock-saumalla kestävyuden varmistamiseksi. Voidaan käyttää pehmusteen sijasta. Konepestävä.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Pakkaus
51107	Ranne	Luonnon valk.	Yksi koko	10 kpl
51108	Ranne/peukalo pitkä	Luonnon valk.	Yksi koko	10 kpl



ComfortKIT™ materiaali

ComfortKIT on valmistettu materiaalista, jonka ydin on tehty niin kutsutusta "muistivaahdosta". Tämän ansiosta tuote muotoutuu luonnollisella tavalla vartalolle. Kun tuotetta ei käytetä palautuu se takaisin alkuperäiseen muotoonsa.


Käyttöalueet: ToeOFF®- ja BlueROCKER®-ortoosien ComfortKIT™-pehmuste on valmistettu tästä materiaalista. Materiaalia voidaan käyttää pehmusteena myös muiden ortoosien kanssa.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Paksuus	Pakkaus
30422	Musta	300 mm	400 mm	10 mm	1 arkki

T-Stick

Painetta keventävä ja hengittävä polyuretaanimateriaali, joka muotoutuu kehon mukaan ja palautuu muistinsa ansiosta alkuperäiseen muotoonsa. Materiaalia käytetään painekohtien keventämiseen ja pehmusteena ortoosissa ja proteeseissa. Tuotteissa 51100 ja 51102 on itsekiinnittyvä takapinta. Saatavana kahta kovuutta.

Tuotenro.	Väri	Jäykkyysaste	Leveys	Pituus	Paksuus	Pakkaus
51100	Sininen	Medium	410 mm	610 mm	9,5 mm	2 arkkia
51101	Sininen	Medium	410 mm	610 mm	25 mm	1 arkki
51102	Roosa	Pehmeä	410 mm	610 mm	9,5 mm	2 arkkia

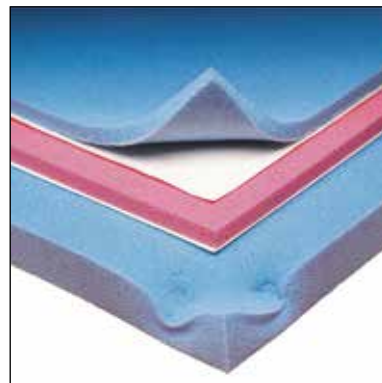

Polycushion-pehmuste

Vaahtopehmuste, jolla on kevyesti painetta keventävä vaikutus. Käytetään ortoosien pehmusteena. Pehmusteessa on suljetut solut, se on helppo puhdistaa. Voidaan kiinnittää ortoosiin ennen lämmitystä vesialtaassa. Materiaali on itsekiinnittyvää. Tuotteessa 51115 on heikompi tarttumiskyky, mikä helpottaa pehmusteen vaihtoa. Helppo leikata haluttuun muotoon.

Tuotenro.	Malli	Väri	Leveys	Pituus	Paksuus	Pakkaus
51120	Tarttuvuus = Korkea	Beige	450 mm	610 mm	3,2 mm	4 arkkia
51115	Tarttuvuus = Matala	Beige	450 mm	610 mm	3,2 mm	4 arkkia



Fleecy Web

Puuvillasta valmistettu, erittäin pehmeä ja itsekiinnittyvä materiaali, jossa on nukkapinta. Käytetään ortoosien pehmusteena. Materiaali on erittäin venyvä, mikä helpottaa sen laittoa valmiiseen ortoosiin.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Paksuus	Pakkaus
51110	Roosa	225 mm	400 mm	2 mm	4 arkkia
51104	Roosa	50 mm	3 m	2 mm	1 rulla





Fleecy Foam

Pehmeä, itsekiinnittyvä materiaali, jossa on pehmeä ydin ja jolla on kevyt painetta keventävä vaikutus. Sopii käytettäväksi ulkonevien vartalonosien tai koko ortoosiin pehmusteena.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Paksuus	Pakkaus
51105	Beige	230 mm	460 mm	4,8 mm	4 arkkiä




Mollskinn rulla

Pehmeä materiaali, jossa on itsekiinnittyvä takapinta. Käytetään ortoosien pehmusteena ja reunapehmusteena.

Muuta: Sisältää lateksia.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Paksuus	Pakkaus
51125	Beige	300 mm	4,6 m	0,8 mm	1 rulla

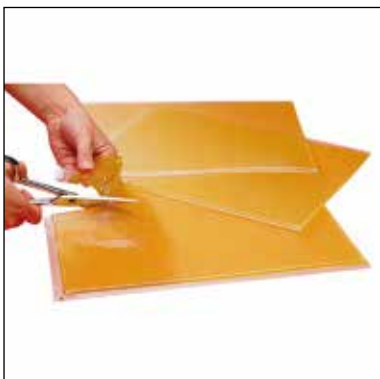

Geelipehmuste

Painetta keventävä geeli, joka ei ime vettä itseensä. Tarkoitettu ortoosille, käsineisiin ja kenkiin. Jakaa paineen ja vähentää kitkaa iholla. Materiaali voidaan leikata halutun kokoiseksi. Reunat tulee sulkea esim. kirurgisella teipillä leikkaamisen jälkeen. Väriä saattaa ilmetä pieniä vaihteluita.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Paksuus	Pakkaus
51140	Keltainen	250 mm	340 mm	3,2 mm	1 arkki
51141	Keltainen	250 mm	340 mm	4,8 mm	1 arkki
51142	Keltainen	250 mm	340 mm	6,4 mm	1 arkki

Neoprene™

Lateksiton neopreeni, jonka toinen puoli on nailonia ja toinen pehmeää velouria, jota vasten koukkutarra kiinnittyy helposti. Käytetään pehmeiden ortoosien valmistukseen tai ortoosinauhana. Materiaali on hieman elastinen, mikä parantaa istuvuutta. Neopreeni säilyttää lämpöä ja vaikuttaa verenkiertoon. Sopii erityisen hyvin reumapotilaille.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Paksuus	Pakkaus
51179		460 mm	610 mm	2,0 mm	1 arkki
51180	Beige	460 mm	610 mm	2,0 mm	1 arkki
51181	Beige	150 mm	970 mm	3,2 mm	1 arkki
51183	Beige	25 mm	3,2 m	3,2 mm	1 rulla
51184		460 mm	610 mm	3,0 mm	1 arkki
51189		460 mm	610 mm	1,0 mm	1 arkki



Nukkatarranauha, standard

Tarranauhan nukkapuoli on valmistettu kudotusta nauhasta, jossa on ommellut reunat. Hyvä kestävyys kumpaankin vetosuuntaan sekä avaussuuntaan. Voidaan käyttää astevälillä -30 °C ja 140 °C.

Muuta: EKO-TEX luokka 2.

Tuotenro.	Malli	Leveys	Pituus	Pakkaus
25020	Nukkatarranauha, valkoinen	25 mm	25 m	1 rulla
25020	Nukkatarranauha, valkoinen	50 mm	25 m	1 rulla
25021	Nukkatarranauha, beige	25 mm	25 m	1 rulla
25021	Nukkatarranauha, beige	50 mm	25 m	1 rulla
25027	Nukkatarranauha, musta	25 mm	25 m	1 rulla
25027	Nukkatarranauha, musta	50 mm	25 m	1 rulla



Koukkutarranauha, standard

Ommeltava koukkutarranauha, jossa on sileä kiinnityspinta toisella puolella. Valmistettu kudotusta nauhasta, jossa on ommellut reunat. Hyvä kestävyys kumpaankin vetosuuntaan sekä avaussuuntaan. Voidaan käyttää astevälillä -30 °C ja 140 °C.

Muuta: EKO-TEX luokka 2.

Tuotenro.	Malli	Leveys	Pituus	Pakkaus
25020	Koukkutarranauha, valkoinen	25 mm	25 m	1 rulla
25020	Koukkutarranauha, valkoinen	50 mm	25 m	1 rulla
25021	Koukkutarranauha, beige	25 mm	25 m	1 rulla
25021	Koukkutarranauha, beige	50 mm	25 m	1 rulla
25027	Koukkutarranauha, musta	25 mm	25 m	1 rulla
25027	Koukkutarranauha, musta	50 mm	25 m	1 rulla





Elastinen nukkatarranauha

Elastinen nukkatarranauha, jossa on hyvä kestävyys kumpaankin vetosuuntaan sekä avaussuuntaan. Voidaan käyttää astevälillä -30 °C ja 140 °C.

Muuta: EKO-TEX luokka 2.

Tuotenro.	Malli	Leveys	Pituus	Pakkaus
25022	Nukkatarranauha, valkoinen	30 mm	10 m	1 rulla
25022	Nukkatarranauha, valkoinen	50 mm	10 m	1 rulla
25023	Nukkatarranauha, beige	30 mm	10 m	1 rulla
25023	Nukkatarranauha, beige	50 mm	10 m	1 rulla



Itsekiinnittyvä nukkatarranauha

Itsekiinnittyvä nukkatarranauha, jossa on hyvä kestävyys kumpaankin vetosuuntaan sekä avaussuuntaan. Voidaan työstää lämpötiloissa välillä -10°C ja +80°C. Tarttuvuus korkeissa ja matalissa lämpötiloissa riippuu kosteudesta ja pinnasta.

Muuta: EKO-TEX luokka 2.

Tuotenro.	Malli	Leveys	Pituus	Pakkaus
25024	Nukkatarranauha, valkoinen	20 mm	25 m	1 rulla
25024	Nukkatarranauha, valkoinen	25 mm	25 m	1 rulla
25024	Nukkatarranauha, valkoinen	50 mm	25 m	1 rulla
25025	Nukkatarranauha, beige	25 mm	25 m	1 rulla
25028	Nukkatarranauha, musta	25 mm	25 m	1 rulla
25028	Nukkatarranauha, musta	50 mm	25 m	1 rulla



Itsekiinnittyvä koukkutarranauha

Itsekiinnittyvä koukkutarranauha, jossa on hyvä kestävyys kumpaankin vetosuuntaan sekä avaussuuntaan. Voidaan työstää lämpötiloissa välillä -10°C ja +80 °C. Tarttuvuus korkeissa ja matalissa lämpötiloissa riippuu kosteudesta ja pinnasta.

Muuta: EKO-TEX luokka 2.

Tuotenro.	Malli	Leveys	Pituus	Pakkaus
25024	Koukkutarranauha, valkoinen	20 mm	25 m	1 rulla
25024	Koukkutarranauha, valkoinen	25 mm	25 m	1 rulla
25024	Koukkutarranauha, valkoinen	50 mm	25 m	1 rulla
25025	Koukkutarranauha, beige	25 mm	25 m	1 rulla
25028	Koukkutarranauha, musta	25 mm	25 m	1 rulla
25028	Koukkutarranauha, musta	50 mm	25 m	1 rulla

Elastinen komfort-nukkatarranauha

Pehmeä osa elastista tarranauhaa. Hyvä kestävyys sekä vetosuuntaan että avaussuuntaan. Voidaan käyttää astevälillä -30° ja +140°C.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Pakkaus
25030	Valkoinen	19 mm	4,5 m	1 rulla
25030	Valkoinen	25 mm	4,5 m	1 rulla
25030	Valkoinen	50 mm	4,5 m	1 rulla



Itsekiinnittyvä Mikrofix-koukkutarranauha

Itsekiinnittyvä Mikrofix-koukkutarranauha kiinnittyy Mikrofixin ja muiden tarranauhojen nukkatarraan. Tarra on erittäin ohut. Itsekiinnittyvä takaosa kiinnittyy useisiin materiaaleihin.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Pakkaus
25040	Kirkas	50 mm	25 m	1 rulla
25041	Musta	50 mm	25 m	1 rulla



Itsekiinnittyvä Mikrofix-nukkatarranauha

Itsekiinnittyvän tarranauhan nukkapuoli, joka kiinnittyy Mikrofixin koukkupuoleen tai muita koukkutarranauhoja vasten. Erittäin ohut.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Pakkaus
25042	Valkoinen	50 mm	25 m	1 rulla
25043	Musta	50 mm	25 m	1 rulla



AFO-nukkatarranauha

Kaksinkertainen, hieman elastinen nukkatarranauha. Sopii hyvin erilaisiin ortoosisovelluksiin. Kiinnittyy koukkutarraan. Voidaan leikata toivottuun leveyteen.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Pakkaus
25060	Musta	40 mm	10 m	1 rulla
25061	Musta	50 mm	10 m	1 rulla





D-lenkki, muovi

Muovinen D-lenkki. Saatavana kiinnitysosan kanssa tai ilman.

Tuotenro.	Malli	Väri	Leveys	Pakkaus
25070	Ilman kiinnitysosaa	Valkoinen	25 mm	25 kpl
25070	Ilman kiinnitysosaa	Valkoinen	50 mm	25 kpl
25071	Kiinnitysosalla	Valkoinen	25 mm	25 kpl
25071	Kiinnitysosalla	Valkoinen	50 mm	25 kpl



Kiinnitysnauha

Pehmeä veluurinauha, jossa on suljetut reunat. Voidaan leikata halutun mittaiseksi. Nauhan kumpikin puoli kiinnittyy koukkutarraan.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Pakkaus
51160	Beige	25 mm	9 m	1 annostelija
51161	Beige	50 mm	9 m	1 annostelija



Erittäin ohut nauha

Erittäin ohut nauha pieniin ortooseihin. Nauhan toinen puoli kiinnittyy koukkutarraan.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Pakkaus
51155	Valkoinen	13 mm	9 m	1 annostelija

Vahva kiinnitysnauha

Erittäin hyvin kulutusta kestävä, joustamaton nukkatarranauha, jossa on keskellä ohut vaahtoydin. Nauha voidaan avata ja sulkea jopa 1000 kertaa.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Pakkaus
51165	Sininen/valkoinen	25 mm	9 m	1 rulla
51165	Sininen/valkoinen	38 mm	9 m	1 rulla
51166	Sininen/valkoinen	50 mm	9 m	1 rulla
51167	Valkoinen	25 mm	9 m	1 rulla
51168	Valkoinen	50 mm	9 m	1 rulla
51169	Beige	25 mm	9 m	1 rulla
51170	Beige	50 mm	9 m	1 rulla



Vaahtonauha

Erittäin pehmeä nauha, jossa on 0,6 cm vaahtoydin ja suljetut reunat. Voidaan leikata halutun mittaiseksi. Kiinnityspinta kummallakin puolella.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Pakkaus
51176	Sininen	50 mm	4,6 m	1 rulla
51177	Valkoinen	50 mm	4,6 m	1 rulla



D-lenkkitarranauha

Itsekiinnittyvä nukkatarranauha, jossa on nyloninen D-lenkki. Nauhan päässä on koukkutarra.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Pakkaus
51185	Valkoinen	25 mm	300 mm	10 kpl
51186	Valkoinen	25 mm	460 mm	10 kpl
51187	Valkoinen	50 mm	300 mm	10 kpl
51188	Valkoinen	50 mm	460 mm	10 kpl





NuStim Wrap by Fabrifoam

NuStim Wrap by Fabrifoam, jossa on keskinkertainen joustavuus. Venyy kaikkiin suuntiin. Mukautuu hyvin vartalon muotoihin. Fabrifoamia voidaan käyttää monella alalla. Siitä voi valmistaa ortooseja, ortoosinauhoja, stabiloivia sidoksia ja kompressiositeitä. Vaihtoehtoinen materiaali neopreenille. Fabrifoamia on saatavana kahta joustavuusastetta. Materiaali on hengittävää, iholle miellyttävää ja se poistaa kosteutta iholta. Kevyen materiaalin toinen puoli on luistamatonta, hyvin ihoa vasten pysyvää materiaalia ja toinen puoli kangasta, jota vasten koukkutarranauha kiinnittyy helposti. Ei sisällä kumia.

Tuotenro.	Väri	Koko	Pakkaus
50505	Sininen	100 mm x 0,91 m	3 rullaa
50506	Sininen	100 mm x 1,22 m	3 rullaa
50508	Sininen	150 mm x 1,22 m	3 rullaa



ProWrap by Fabrifoam

ProWrap by Fabrifoam, joka on hieman elastinen. Venyy yhteen suuntaan. Fabrifoamia voidaan käyttää monella alalla. Siitä voi valmistaa ortooseja, ortoosinauhoja, stabiloivia sidoksia ja kompressiositeitä. Vaihtoehtoinen materiaali neopreenille. Fabrifoamia on saatavana kahta joustavuusastetta. Materiaali on hengittävää, iholle miellyttävää ja se poistaa kosteutta iholta. Kevyen materiaalin toinen puoli on luistamatonta, hyvin ihoa vasten pysyvää materiaalia ja toinen puoli kangasta, jota vasten koukkutarranauha kiinnittyy helposti. Ei sisällä kumia.

Tuotenro.	Väri	Koko	Pakkaus
50500	Beige	50 mm x 3,6 m	2 rullaa
50502	Beige	150 mm x 4,5 m	1 rulla



Sormilenkki

Pehmeitä ja ilmavia sormilenkkejä, joita voidaan muotoilla sopivan levyisiksi ja muotoisiksi. Metallivahvistetut reiät helpottavat lankojen ja nauhojen pujotusta

Käyttöalueet: Dynaamiset ortoosit.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Pakkaus
51232	Ruskea	22 mm	76 mm	10 kpl
51233	Ruskea	22 mm	102 mm	10 kpl

[illegible]

Katsaus matalalämpömuoveista

	Sansplint	Polyform	Polyflex	Aquaplast Original	Aquaplast T	Aquaplast T Antimikrobiaal
Värimuutos	Ei	Ei	Ei	Muuttuu läpinäkyväksi	Muuttuu läpinäkyväksi	Muuttuu läpinäkyväksi
Tarttuvuus ihoon	Hieman Käytä sukkaa	Ei	Ei	Kyllä	Ei	Ei
Muovin itseensä tarttuminen	Hieman työstämisen aikana. Pysyvästi yhteenpaineuttaessa.	Hieman, ei pysyvästi *)	Hieman, ei pysyvästi *)	Pysyvästi	Hieman työstämisen aikana. Ei pysyvästi *)	Ei
Venyvyys	Vastustuskykyinen	Erittäin venyvä	Jonkin verran venyvä	Venyy hieman	Venyy hieman	Venyy hieman
Kyky vastustaa venytystä	Maksimi	Minimi	Medium	Medium	Medium	Medium
Muotoutuvuus	Ei kovin hyvä	Erinomainen	Erittäin hyvä	Hyvä	Hyvä	Hyvä
Muisti (uudelleenmuotoiltava)	Hieman (jälkikäteän muotoilu varten)	Hieman (jälkikäteän muotoilu varten)	Hieman (jälkikäteän muotoilu varten)	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Sormenjäljet	Ei	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	Ei
Reunat	Ohuet. Voidaan viimeistellä helposti	Voidaan viimeistellä helposti	Voidaan viimeistellä helposti	Ohuet	Ohuet	Ohuet
Perforoitu/Tasainen	Tasainen Perf. 2,5 %	Tasainen Perf. 1 %	Tasainen Perf. 1 %	Tasainen Perf. 13 % Perf. 19 %	Tasainen Perf. 1 % Perf. 13 % Perf. 19 % Perf. 42 %	Tasainen Perf. 19 %
Värit	Beige	Valkoinen Beige	Valkoinen	Valkoinen Beige	Valkoinen	Valkoinen
Lämpötila Lämmitys aika	70-80°C 30 s - 1 min	65-70°C 30 s - 1 min	65-70°C 1 min	70-75°C 35 s - 1 min	70-75°C 35 s - 1 min	70-75°C 35 s - 1 min
Työstö aika 1,6 mm 2,4 mm 3,2 mm	1-3 min (2 mm) 4-5 min (3 mm)	1 min 3-5 min	2-3 min 4-6 min	1-2 min 2-3 min 4-6 min	1-2 min 2-3 min 4-6 min	2-3 min 4-6 min
	Sansplint	Polyform	Polyflex	Aquaplast Original	Aquaplast T	Aquaplast T Antimikrobiaal

*) Kiinnittyä itseään vasten pysyvästi, jos pintaa hioo tai raaputtaa terävällä esineellä.

Aquaplast T Prodrappe	Aquaplast Water-colors	Ezeform	Ezeform Antimikrobiaal	X-Lite Classic	X-Lite Premium	3D-Lite	
Muuttuu läpinäkyväksi	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Värimuutos
Ei	Ei	Hieman, tarttuu iohkarvoinhin	Ei	Ei	Ei	Ei	Tarttuvuus ihoon
Hieman työstämisen aikana. Ei pysyvästi *)	Ei pysyvästi *)	Hieman työstämisen aikana. Pysyvästi yhteenpainettaessa.	Ei	Kyllä. Voidaan irrottaa toisistaan lämmittämällä.	Kyllä. Voidaan irrottaa toisistaan lämmittämällä.	Ei	Muovin itseensä tarttuminen
Erittäin venyvä	Venyy hieman	Vastustuskykyinen	Vastustuskykyinen	Venyy vain yhteen suuntaan	Venyy vain yhteen suuntaan	Venyy vain yhteen suuntaan	Venyyvyys
Minimi	Medium	Maksimi	Maksimi	Maksimi	Maksimi	Maksimi	Kyky vastustaa venytystä
Erinomainen	Hyvä	Ei kovin hyvä	Ei kovin hyvä	Hyvä	Hyvä	Ei kovin hyvä	Muotoutuvuus
Kyllä	Kyllä	Hieman (jälkikäteen muotoilua varten)	Hieman (jälkikäteen muotoilua varten)	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Muisti (uudelleenmuotoiltava)
Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Sormenjäljet
Oluet	Oluet	Oluet	Täytyy viimeistellä	Täytyy viimeistellä	Täytyy viimeistellä	Täytyy viimeistellä	Reunat
Tasainen	Tasainen Perf. 13 % Perf. 19 %	Tasainen	Tasainen Perf. 1 %	Verkkomainen rakenne	Verkkomainen rakenne	Kolmiulotteinen, verkkomainen rakenne	Perforoitu/Tasainen
Valkoinen	Useita. Katso värit kuvastosta.	Valkoinen Beige Sininen	Valkoinen	Valkoinen Vaaleansininen Vaaleanvihreä	Annostelija/arkki: Beige Rulla:Valkoinen	Beige	Värit
70-75°C 1 min	70-75°C 35 s – 1 min	70-75°C 35 s – 1 min	70-75°C 35 s – 1 min	70°C Arkki: 1 min Rulla: 2 min	70°C Arkki: 1 min Rulla: 2 min	70°C 3 mm: 2 min 5 mm: 2 min 7 mm: 2 min	Lämpötila Lämmitysaika
2-3 min 4-6 min	1-2 min 2-3 min 4-6 min	1-2 min 4-6 min	4-6 min	Arkki: 45 s - 1 min Rulla: 2 - 3 min	Arkki: 30 - 45 s Rulla: 60 - 90 s		Työstöaika 1,6 mm 2,4 mm 3,2 mm
Aquaplast T Prodrappe	Aquaplast Water-colors	Ezeform	Ezeform Antimikrobiaal	X-Lite Classic	X-Lite Premium	3D-Lite	

Monia taulukossa olevia muoveja valmistetaan myös muissa väreissä, paksuuksissa ja perforoinneissa. Ota yhteyttä tuotteen myyjään tai Camp Scandinaviaan.

Omat muistiinpanot

[illegible]



Työkalut ja tarvikkeet

www.camp.fi



Kipsisakset muovisilla sormiosilla

Käytännölliset, erilaisten muovimateriaalien leikkaamiseen tarkoitettut saksat. Saksat ovat ruostumatonta terästä AISI 420 ja ne voidaan puhdistaa autoklaavissa. Hinta-laatusuhteeltaan hyvä vaihtoehto.

Tuotenro.	Väri	Materiaali	Pituus
51211	Musta	AISI 420	18 cm
51212	Vihreä	AISI 420	18 cm
51213	Keltainen	AISI 420	18 cm



Supersakset

Erittäin terävät saksat, joissa on suuri kädensija. Sopivat hyvin muovin leikkaamiseen myös silloin, kun muovi on alkanut kovettua. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä AISI 420. Voidaan puhdistaa autoklaavissa.

Tuotenro.	Materiaali	Pituus
51217	AISI 420	20 cm



Taivutetut MAYO-sakset

Taivutetut saksat, joissa on pieni kädensija. Sopivat ortoosin reunojen viimeistelyyn, kun muovi on alkanut kovettua. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä AISI 420. Voidaan pestä autoklaavissa. Saksat sopivat sekä oikea- että vasenkätisille.

Tuotenro.	Materiaali	Pituus
51214	AISI 420	14 cm



Smith-sakset

Erittäin terävät saksat, joissa on suuri kädensija. Helppo käsitellä ja leikata pehmeää muovimateriaalia. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä AISI 420. Voidaan pestä autoklaavissa.

Tuotenro.	Materiaali	Pituus
51216	AISI 420	18 cm

Kipsisakset, ruostumaton teräs

Laadukkaat sakset, jotka leikkaavat kaikenlaista materiaalia. Alemmassa teräosassa on sahalaite ja ylemmässä suora viistoterä. Sakset ovat ruostumatonta terästä ja ne voidaan puhdistaa autoklaavissa.

Tuotenro.	Malli	Pituus
51208	Kipsisakset, ruostumaton teräs	14 cm
51207	Kipsisakset, ruostumaton teräs	18 cm




Kipsisaksi sahalaite

Korkealaatuiset sakset, jotka leikkaavat sekä kylmää, että kuumaa lastamateriaalia ja kipsausmateriaalia. Ihanteellinen hienosäätöön ja kulmien muotoiluun. Alemmassa teräosassa on sahalaite. Sakset ovat ruostumatonta terästä ja ne voidaan puhdistaa autoklaavissa.

Tuotenro.	Malli	Pituus
51209	Kipsisaksi sahalaite	12 cm



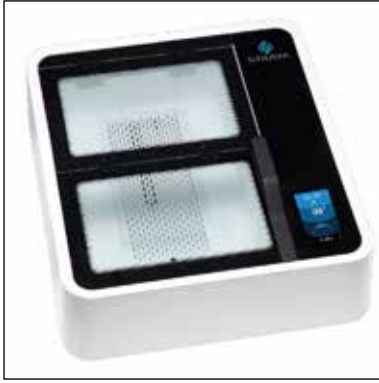

Strava Kuumavesiallas

Strava vesiallas on markkinoiden ensimmäinen tuote, joka käyttää UV sterilointia ja korkean lämpötilan puhdistusohjelmaa. Tämä kaksois-puhdistusjärjestelmä varmistaa, että vesi on 99,99% mikrobivapaa. Perinteisen metallialtaan sijaan Strava vesiallas on valmistettu lämpökovetetusta komposiittimateriaalista, joka tunnetaan kestävä, eristävä, suojaavana sekä hyvän näköisenä materiaalina. Allas on helppo ja nopea tyhjentää muutamassa minuutissa sisäänrakennetun pumppusysteemin ansiosta. Vesikierto altaassa varmistaa asetetun lämpötilan ja kuumentaa veden nopeasti säästämällä aikaa. Värillinen kosketusnäyttö mahdollistaa nopean materiaali-kohtaisen ohjelmoinnin tai käyttäjä itse asettaa toivomansa asetukset. Laitteen voi säätää menemään päälle ja sammumaan automaattisesti.

Tuoteno.	Malli	Leveys	Pituus	Korkeus
64507	Vesihaude	Ulkomitta: 51,6 cm Allas: 31,6 cm	Ulkomitta: 59 cm Allas: 48,6 cm	Ulkomitta: 22,6 cm Allas: 14,7 cm
64508	Tyhjennysletku			
64509	Lämpöelementti			
64510	EU sähköjohto			
64511	DK adapteri			
64512	UV lamppu			



X-LITE® levy silikonipinnoitteella

Käytetään työskentelyalustana X-LITE'illa kipsatessa. Silikonipinta ehkäisee X-Liten tarttumisen alustaan. Levyn perforoitu pinta edesauttaa, että X-LITE rullista lähtevä vesi vuotaa levyn alle imeytyen sen alla olevaan pyyhkeeseen.

Tuoteno.	Leveys	Pituus
64811	325 mm	530 mm



Testaus, harjoitus ja hoito

www.camp.fi



ProWrap by Fabrifoam

ProWrap by Fabrifoam on hieman elastinen nauha, joka venyy yhteen suuntaan.. Fabrifoamia voidaan käyttää monella tavalla. Siitä voi valmistaa ortooseja, ortoosinauhoja, stabiloivia sidoksia ja kompressiositeitä. Vaihtoehtoinen materiaali neopreenille. Fabrifoamia on saatavana kahta joustavuusastetta. Materiaali on hengittävää, iholle miellyttävää ja se poistaa kosteutta iholta. Kevyen nauhan toinen puoli on luistamatonta, hyvin ihoa vasten pysyvää materiaalia ja toinen puoli kangasta, jota vasten koukkutarranauha kiinnittyy helposti. Ei sisällä kumia.

Tuotenro.	Väri	Koko	Pakkaus
50500	Beige	50 mm x 3,6 m	2 rullaa
50502	Beige	150 mm x 4,5 m	1 rulla



NuStim Wrap by Fabrifoam

NuStim Wrap by Fabrifoam, jossa on keskinkertainen joustavuus. Nauha venyy kaikkiin suuntiin ja mukautuu hyvin kehon muotoihin. Mukautuu hyvin vartalon muotoihin. Fabrifoamia voidaan käyttää monella tavalla. Siitä voi valmistaa ortooseja, ortoosinauhoja, stabiloivia sidoksia ja kompressiositeitä. Vaihtoehtoinen materiaali neopreenille. Fabrifoamia on saatavana kahta joustavuusastetta. Materiaali on hengittävää, iholle miellyttävää ja se poistaa kosteutta iholta. Kevyen nauhan toinen puoli on luistamatonta, hyvin ihoa vasten pysyvää materiaalia ja toinen puoli kangasta, jota vasten koukkutarranauha kiinnittyy helposti. Ei sisällä kumia.

Tuotenro.	Väri	Koko	Pakkaus
50505	Sininen	100 mm x 0,91 m	3 rullaa
50506	Sininen	100 mm x 1,22 m	3 rullaa
50508	Sininen	150 mm x 1,22 m	3 rullaa



Cica Care -silikonigeeli

Cica Carea käytetään arvenmuodostuksen vähentämiseen. Sitä saa käyttää vain parantuneisiin haavoihin. Cica Care lisää arpialueen liikkuvuutta ja toimintaa sekä vähentää hypotrofian ja keloidien syntymistä. Tarttumiskykynsä ansiosta teippiä tai muita siteitä ei tarvita. Cica Caren irrottaminen on kivutonta ja sitä voidaan käyttää uudelleen. Cica Carea voidaan käyttää myös silloin, kun haavakohta ei kestä painetta. Materiaali voidaan pestä.

Tuotenro.	Leveys	Pituus	Pakkaus
54600	120 mm	150 mm	1 arkki
54601	120 mm	150 mm	10 arkkiä

R-lite vaahtomuovikuutio

T-Foamista valmistettu harjoituskuutio käden harjoittamiseen. Materiaali palautuu muotoonsa hitaasti, mikä ei rasita potilasta liikaa. Saatavana neljää kovuutta. Pestään lämpimässä vedessä miedolla saippualliuoksella.

Tuotenro.	Väri	Kovuus	Mitta	Pakkaus
54130	Keltainen	Erittäin pehmeä	4,4x4,4x7,6 cm	32 kpl
54130	Roosa	Pehmeä	4,4x4,4x7,6 cm	32 kpl
54130	Sininen	Medium	4,4x4,4x7,6 cm	32 kpl
54130	Vihreä	Kova	4,4x4,4x7,6 cm	32 kpl
54131	3 kpl jokaista väriä		4,4x4,4x7,6 cm	12 kpl



Jamar® puristusvoimamittari

Yksinkertainen ja varma työkalu puristusvoiman mittaamiseen. Asteikko 0-90 kg välillä. Laitteen kalibrointia suositellaan kerran vuodessa. Toimitetaan käytännöllisessä laukussa, joka toimii myös säilytyslaukkuna.

Muuta: Takuu 1 vuosi. Takuu ei kata kalibrointia.

Tuotenro.	Malli
52100	Jamar Puristusvoimamittari
52101	Kalibrointi



Jamar® nipistysvoimamittari

Erittäin tarkka sormien puristusvoimamittari. Punainen indikaationeula näyttää tuloksen niin kauan kunnes mittari nollataan. Asteikko 0-20 kg välillä. Toimitetaan käytännöllisessä laukussa, joka toimii myös säilytyslaukkuna.

Muuta: Takuu 1 vuosi. Käyttöohjeet saatavana vain englanniksi.

Tuotenro.	Malli
52110	Jamar Nipistysvoimamittari





Mitta 1: Pituus

Mitta 2: Pituus

Goniometri

Läpinäkyvä muovigoniometri yksinkertaiseen ja tehokkaaseen mittaamiseen isojen nivelien liikekulmille. Mitan liikeraja on 180° 2°:een intervallilla.

Tuotenro.	Malli	Väri	Mitta 1	Mitta 2
52200	Isommat nivelet	Läpinäkyvä	15 cm	15 cm



9-reiän Pegtesti

Yksinkertainen ja kätevän kokoinen käden motoriikan testi. Kaikki osat voi desinfioida. Mukana toimitetaan sekuntikello.

Tuotenro.	Malli	Pakkaus
52315	Pegtesti	
52316	Lisätaipit Pegtestiin	9 kpl



Purdue Pegboard -testi

Mittaa kahta toimintoa: 1) sormien, käden ja käsivarren suuria liikkeitä ja 2) sormenpäiden tuntoa. Pakkaus sisältää käyttöohjeen, normaaliarvot ja 25 protokollaa. Sekuntikello ei sisälly pakkaukseen.

Tuotenro.	Malli
52320	Purdue Pegboard -testi
52321	Lisäosat Purdue Pegboard -testiin

Grooved Pegboard -testi

Stimuloiva testi, jolla testataan sormivalmiutta ja visuaalista kykyä. Testi vaatii parempaa motoriikkaa ja koordinaatiota kuin muut Pegboard-testit. Sisältää 25 reikää. Erimuotoiset reiät on aseteltu sattumanvaraisesti. Palikoiden sisään laitto vaatii näin kiertoliikkeen.

Tuotenro.	Malli	Pakkaus
52325	Grooved Pegboard	
52326	Lisätaipit Grooved Pegboard -testiin	30 kpl



Ödeemakäsine

Joustava ja mukavantuntuinen käsine, joka kompressoii kevyesti lievittäen ödeemaa. Käsine on valmistettu lykrasta ja spandeksista. Käsinetä on saatavana kahta eri mallia: sormellisena sekä avoimilla sormiosilla käden toimintojen ja turvotuksen kontrolloimiseksi.

Muuta: Kompressioluokka I.

Tuotenro.	Malli	Koko	Mitta	Pakkaus	Vas/Oik
53535	Sormellinen	X-Small	17,8 cm	1 kpl	Vas/Oik
53535	Sormellinen	Small	20,3 cm	1 kpl	Vas/Oik
53535	Sormellinen	Medium	22,9 cm	1 kpl	Vas/Oik
53535	Sormellinen	Large	25,4 cm	1 kpl	Vas/Oik
53536	Avoimet sormet	X-Small	17,8 cm	1 kpl	Vas/Oik
53536	Avoimet sormet	Small	20,3 cm	1 kpl	Vas/Oik
53536	Avoimet sormet	Medium	22,9 cm	1 kpl	Vas/Oik
53536	Avoimet sormet	Large	25,4 cm	1 kpl	Vas/Oik



Mitta: Käden ympärysmitta peukalopaimun kohdalta.



Tyhjiötyyny

Valkoiset tyhjiötyyny on täytetty pienillä rakeilla, jotka muotoutuvat kun ilma poistetaan. Tyynyä voidaan muotoilla uudelleen avaamalla venttiili. Tyyny on stabiili ja kevyt ja siihen voi tilata erillisiä, sinisiä päällisiä.

Käyttöalueet: Leikkauksissa ja tukena istuttaessa. Myös hammaslääkärin käyttöön.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko
22393	Tyhjiötyyny	Valkoinen	55x30 cm
22394	Tyhjiötyyny	Valkoinen	55x65 cm
22395	Tyhjiötyyny	Valkoinen	55x85 cm
22396	Tyhjiötyyny	Valkoinen	40x50 cm
22275	Käsipumppu		
26334	Venttiili tyhjiötyynyyn		




Uria ilmalasta

Uria ilmalasta antaa tasaisen paineen käsivarrelle, säärelle, kädelle ja jalalle. Lasta on valmistettu kaksinkertaisesta PVC-muovista. Se suljetaan vetoketjun avulla. Läpinäkyvän materiaalin ansiosta lastoitettavan raajan asento on helppo määrittää. HUOM. Paine ei saa ylittää 40 mmHg.

Käyttöalueet: Ödeemahoito ja proprioseptiivinen stimulointi neurologisessa kuntoutuksessa.

Tuotenro.	Malli	Pituus
53510	Pitkä hiha, 80 cm	80 cm
53511	Lyhyt hiha, 70 cm	70 cm
53512	Puolihiha, 53 cm	53 cm
53513	Kyynänpää, 40 cm	40 cm
53516	Jalka, 32 cm	32 cm
53517	Sääri iso, 66 cm	66 cm
53519	Käsi, 20 cm	20 cm
53518	Sääri pieni, 56 cm	56 cm
53515	Suukappale	100 kpl
53514	Suodatin suukappaleeseen	5 kpl

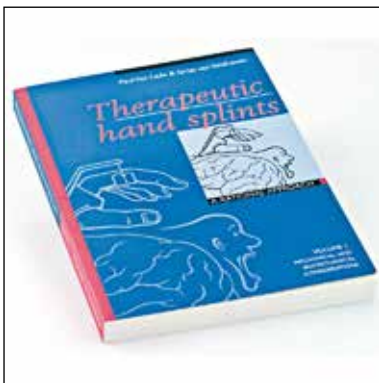

Kirja: Therapeutic hand splints

Tämä kaksiosainen Paul Van Leden ja Griet van Veldhovenin kirjoittama kirja sisältää kaiken, mitä pitää tietää kädestä, sen anatomiasta, biomekaniikasta ja patologiasta. Toinen osa antaa hyviä esimerkkejä ortoosien valmistuksesta ja käytöstä. Kirjat ovat englanninkielisiä.

Tuotenro.	Kuvaus	Tilavuus
99200	Mechanical and biomechanical considerations	I
99201	Practical applications	II

Omat muistiinpanot

[illegible]

Omat muistiinpanot

[illegible]

Myyntiehdot

TOIMITUSEHDOT

Pidämme velvollisuutenamme, että pystymme toimittamaan mahdollisimman nopeasti kuvastossamme olevia tuotteita. Tietyt koot ja tarvikkeet ovat tilaustavaroita, joiden toimitusaika on hieman pidempi. Sama koskee mittatilaustuotteita. Yli 200 euron kertatilaukset toimitamme suoraan vastaanottajalle ilman toimitusmaksua. Muutoin perimme 15 euron toimitusmaksun. Erikoiskokoisista lähetyksistä, 1 m x 1 m ja sitä suuremmista levytilauksista perimme 30 euron toimitusmaksun.

PALAUTUS JA VAIHTO

Ennen mahdollista palautusta tai vaihtoa tulee asiakaspalveluumme olla yhteydessä palautuksen/vaihdon myöntämiseksi ja palautusnumeron saamiseksi. Tuote tulee lähettää asiakaspalveluumme alkuperäisessä pakkauksessa 2 kuukauden sisällä tilauksen tekemisestä. Erityistilauksilla ei ole vaihto -tai palautusoikeutta.

MAKSUEHDOT

30 päivää netto. Viivästyskorko on diskonttauskorko +8 %.

Erillinen hinnastomme on voimassa 31.12.2022 asti. Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin hinta-/valuuttamuutoksiin perustuen hinnaston voimassaoloaikana.

TUOTENUMEROT

Campin tuotenumero koostuu yhdeksästä numerosta. Viisi ensimmäistä numeroa kuvaavat tuotetta. Muut numerot kertovat koon sekä onko tuote oikea vai vasen jne.

Esimerkiksi: ToeOFF® 2.0 vasen medium 289201012	28920:ToeOFF® 2.0	I0: Vasen	I2: Medium
---	-------------------	-----------	------------

I0: Vasen	09: XX-Small
20: Oikea	I0: X-Small
	I1: Small
	I2: Medium
	I3: Large
	I4: X-Large
	I5: XX-Large

TUOTTEIDEN MATERIAALIT JA NIIDEN HOITAMINEN

Lisätiedot tuotteesta on kuvastossa merkitty kohtaan "Muuta" ja tämä tieto on hyvä lukea ennen ostopäätöstä. Campin tekstiilit tulee pestä käsin ja kuivattaa tasaisella alustalla, jos käyttöohjeissa tai tuotteen etiketissä ei lue muulla tavoin. Jäykät ortoosit tulee kuivata pyyhkeellä.

HUOLEHDIMME YMPÄRISTÖSTÄMME

Camp välttää tuotteita, jotka sisältävät ympäristölle ja terveydelle haitallisia materiaaleja. Camp Scandinavialle on ensiarvoisen tärkeää, että toimintamme rasittaa ympäristöä mahdollisimman vähän samalla, kun se noudattaa järkeviä liiketoimintaperiaatteita. Camp noudattaa WEEE-direktiiviä sekä paristoista, akuista ja pakkausmateriaaleista säädettyjä asetuksia kaikissa maissa, joissa meillä on toimintaa. Huolehdimme myös kierrätettävistä materiaaleista.



Myyntiorganisaatio ja asiakaspalvelu



Anne-Mari Ilkka

AVAINASIAKASPÄÄLLIKKÖ /
FYSIOTERAPEUTTI
0400-100 460

anne-mari.ilkka@camp.fi

Vastuualueet: ortoosit, ortoosi- ja
proteesikomponentit, materiaalit,
rintaproteesit ja jalkineet



Päivi Yliranta

AVAINASIAKASPÄÄLLIKKÖ /
FYSIOTERAPEUTTI
0400-684 638

paivi.yliranta@camp.fi

Vastuualueet: ortoosit, materiaalit,
ortoosi- ja proteesikomponentit,
jalkineet.



Milja Alanko

ASIAKASPALVELU

09 350 76 307

milja.alanko@camp.fi



Piia Parikka

LIIKETOIMINTAJOHTAJA

0400 138 756

piia.parikka@camp.fi

Tilaukset/asiakaspalvelu:

Puh: 09-350 76 30

S-posti: info@camp.fi

Camp Scandinavia Oy

Valimotie 17-19, 1 krs.

00380 Helsinki

Y-tunnus 0282300-0