



Jalka- ja nilkkatuet

Allard AFO Lihastoiminto-opas

Tämä opas pohjautuu sovittajalta ja asiakkailta tulleeseen palautteeseen.

Lihastoiminto: Ei lainkaan tai rajoittunut ● Kohtuullinen ● Normaali toiminto ●


Kun DISTAL heikkous



Ypsilon Flow 1/2




Liikerata
A/P
M/L
Avustettu Dorsaalifleksio
Spastisuuden hallinta

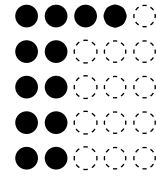

ToeOFF Flow 2 1/2



Liikerata
A/P
M/L
Avustettu Dorsaalifleksio
Spastisuuden hallinta

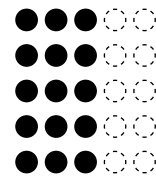


Kun PROXIMAL heikkous



ToeOFF® 2 1/2




Liikerata
A/P
M/L
Avustettu Dorsaalifleksio
Spastisuuden hallinta

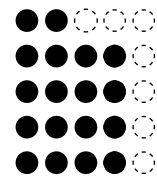

BlueROCKER® 2 1/2



Liikerata
A/P
M/L
Avustettu Dorsaalifleksio
Spastisuuden hallinta

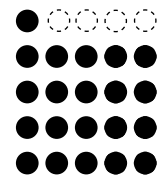

Ypsilon® Flow½

Ypsilon® Flow½ on aktiiviselle henkilölle, joka tarvitsee vähemmän tukea kävelyn tukivaiheessa, suunniteltu riippunilkkortoosi. Pohjalevy on muotoiltu tasaisemmaksi, mikä antaa enemmän tilaa varpaille ja pehmeämmät siirtymät askelluksessa. Ortoosi on kehitetty mahdollistamaan optimaalisesti koko liikeradan käyttö ja dynaaminen varvastyöntö eli "toe off", samalla kun jalan lihakset voivat työskennellä aktiivisemmin. Pohjalevy myötäilee jalan muotoa ja tukivaiheessa lattiasta siirtyvän voiman avulla voi ortoosikävelijä käyttää vähemmän voimaa varvastyönnössä eli "toe-off"-vaiheessa. Y-muotoinen runko jakautuu tibian molemmille puolille, mikä vähentää painaumien syntymisen riskiä ulkonevissa kohdissa sekä sääريلuussa. Siksi tämä ortoosi sopii aktiiviselle ihmiselle, joka asettaa korkeat vaatimukset ortoosin toiminnallisuudelle ja liikkuvuudelle. Ypsilon Flow ½:n kannankorkeus on noin 7 mm kaikissa kokovaihtoehdoissa.



Käyttöalueet: Riippunilkkä, jossa nilkka on stabiili (lievä spastisuus tai ei spastisuutta ollenkaan). Henkilöt, jotka tarvitsevat enemmän joustavuutta ja vähemmän tukea.

Kontraindikaatiot: Voimakas ödeema, diabetes, jossa on haavaumia, alentunut tuntoherkkyys ja voimakas spastisiteetti.

Muuta: Lisätietoa sovituksista sekä mallin ja koon valinnasta löytyy Allard AFO Professional käyttöohjeista. Ypsilon® Flow-ortoosin mukana toimitetaan pehmuste- ja nauhasetti.

Tuotenro.	Malli	Koko	Jalkapohjan pituus	Korkeus	Vas/Oik	Kengän koko
28880	Ypsilon® Flow½	Small	23 cm	35,5 cm	Vas/Oik	35-38
28880	Ypsilon® Flow½	Medium	24,5 cm	36,5 cm	Vas/Oik	38-42
28880	Ypsilon® Flow½	Large	27 cm	37,5 cm	Vas/Oik	42-45
28880	Ypsilon® Flow½	X-Large	28,5 cm	38,5 cm	Vas/Oik	>45
28884	Pehmuste	S/M/L			Bilat.	
28884	Pehmuste	X-Large			Bilat.	
28885	Lisänauhat	Yksi koko			Bilat.	
99809	Microfix Ypsilon Flow					



ToeOFF® Flow2½

Olemme yhdistäneet pitkäaikaisen kokemuksemme ja valmistuksen teknisen kehitystyön sekä asiakkailtamme vuosien saatossa tulleet toiveet ja kehittäneet uuden ortoosin Allard-AFO:on, ToeOFF Flow2½. ToeOFF on markkinoille tulostaan 1997 saakka ollut markkinajohtaja ainutlaatuisen toimintansa ja dynaamisten ominaisuuksiesä ansiosta.

ToeOFF Flow2½:lla on uusi ainutlaatuinen resepti, uusin ominaisuuksin ja eduin: matalampi kannan korkeus kaikissa kokovaihtoehdoissa -noin 7 mm, enemmän liikkuvuutta A-P tasossa ja tasaisempi jalkapohjaa vasten tuleva pinta. Jalkaterän nosto on vähäisempi, mikä antaa enemmän tilaa varpaille ja pehmeämmät siirtymät askelluksessa.

ToeOFF® Flow2½:ssa on kaikki Mikrofiks tarraosat paikoilleen kiinnitettynä, jotta pehmuste, SoftKIT™, ComfortKIT™ tai CoverKIT™ saadaan helposti asennettua paikalleen. Nauha on sama kuin ToeOFF 2.0 mallissa.

Käyttöalueet: Riippunilkka yhdistettynä lievistä kohtuulliseen spastisuuteen (tai ei spastisuutta ollenkaan), jossain tapauksissa myös heikentynyt polvikontrolli ja varpaan amputaatio.

Muuta: Lisätietoa sovituksesta sekä mallin ja koon valinnasta Allard AFO Professional Instruction-ohjeista. Kaikkien Allard AFO -ortoosien mukana toimitetaan nauhasetti.

Tuotenro.	Malli	Koko	Jalkapohjan pituus	Korkeus	Vas/Oik	Kengän koko
28960	ToeOFF® Flow2½	X-Small	21 cm	36 cm	Vas/Oik	32-35
28960	ToeOFF® Flow2½	Small	23 cm	38 cm	Vas/Oik	35-38
28960	ToeOFF® Flow2½	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vas/Oik	38-42
28960	ToeOFF® Flow2½	Large	27 cm	43 cm	Vas/Oik	42-45
28960	ToeOFF® Flow2½	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vas/Oik	>45
28960	ToeOFF® Flow2½	X-Small	21 cm	36 cm		32-35
28960	ToeOFF® Flow2½	Small	23 cm	38 cm		35-38
28960	ToeOFF® Flow2½	Medium	24,5 cm	40,5 cm		38-42
28960	ToeOFF® Flow2½	Large	27 cm	43 cm		42-45
28960	ToeOFF® Flow2½	X-Large	28,5 cm	45 cm	L/R	>45
28962	ToeOFF Flow2½ D-lenkillä	X-Small	21 cm	36 cm	Vas/Oik	32-35
28962	ToeOFF Flow2½ D-lenkillä	Small	23 cm	38 cm	Vas/Oik	35-38
28962	ToeOFF Flow2½ D-lenkillä	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vas/Oik	38-42
28962	ToeOFF Flow2½ D-lenkillä	Large	27 cm	43 cm	Vas/Oik	42-45
28962	ToeOFF Flow2½ D-lenkillä	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vas/Oik	>45
28962	ToeOFF Flow2½ D-lenkillä	X-Small	21 cm	36 cm		32-35
28962	ToeOFF Flow2½ D-lenkillä	Small	23 cm	38 cm		35-38
28962	ToeOFF Flow2½ D-lenkillä	Medium	24,5 cm	40,4 cm		38-42
28962	ToeOFF Flow2½ D-lenkillä	Large	27 cm	43 cm		42-45
28962	ToeOFF Flow2½ D-lenkillä	X-Large	28,5 cm	45 cm		>45

ToeOFF® 2½

Riippunilkkartoosissa ToeOFF® 2 ½ on samat dynaamiset toiminnot ja stabiliteetti kuin ToeOFF® 2.0:ssa, mutta kannankorkeus on 7 mm, joka sopii paremmin moderniin kenkiin ja matalampaan kannan korkeuteen. Pohjalevy on muotoiltu tasaisemmaksi, mikä antaa enemmän tilaa varvasosaan. Jo vuodesta 1997 Allard AFO on ollut johtava markkinoilla ainutlaatuisine toimintoineen ja dynaamisine ominaisuuksineen.

ToeOFF® 2½:ssa on kaikki MikroFIX osat asennettu valmiiksi pehmusteen nopeaa ja yksinkertaista asetusta helpottamaan. Nauhasetti on sama kuin 2.0:ssa, valmistettu kulutusta kestävästä materiaalista ja se voidaan toimittaa joko D-renkaalla tai ilman. Nauhat voidaan asentaa sekä oikealle että vasemmalle avautuviksi. Tärkeää on sovittaa aina kaikki Allard AFO:t kengän kannankorkeuteen käyväksi. Lisätietoa löydät Allard AFO Professional Käyttöohjeista.



Käyttöalueet: Riippunilkkä yhdistettynä lievistä kohtuulliseen spastisuuteen (tai ei spastisuutta ollenkaan), jossain tapauksissa myös heikentynyt polvikontrolli ja varpaan amputaatio.

Kontraindikaatiot: Voimakas ödeema, diabetes, johon liittyy haavaumia, alentunut tuntoherkkyys ja voimakas spastisiteetti.

Muuta: Lisätietoa sovituksista sekä mallin ja koon valinnasta löytyy Allard AFO Professional Käyttöohjeista. Kaikkien Allard AFO:jen mukana toimitetaan nauhasetti. Tuotteen mukana tuleva pussi on valmistettu kierrätetyistä PET-pulloista.

Tuotenro.	Malli	Koko	Jalkapohjan pituus	Korkeus	Vas/Oik	Kengän koko
28980	ToeOFF® 2½	X-Small	21 cm	36 cm	Vas/Oik	32-35
28980	ToeOFF® 2½	Small	23 cm	38 cm	Vas/Oik	35-38
28980	ToeOFF® 2½	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vas/Oik	38-42
28980	ToeOFF® 2½	Large	27 cm	43 cm	Vas/Oik	38-42
28980	ToeOFF® 2½	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vas/Oik	>45
28982	ToeOFF® 2½ D-lenkillä	X-Small	21 cm	36 cm	Vas/Oik	32-35
28982	ToeOFF® 2½ D-lenkillä	Small	23 cm	38 cm	Vas/Oik	35-38
28982	ToeOFF® 2½ D-lenkillä	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vas/Oik	38-42
28982	ToeOFF® 2½ D-lenkillä	Large	27 cm	43 cm	Vas/Oik	42-45
28982	ToeOFF® 2½ D-lenkillä	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vas/Oik	>45



ToeOFF® 2½ Addition

ToeOFF 2 ½ addition on käytännössä sama tuote kuin ToeOFF 2 ½, mutta ulkonäöltään erilainen värjätyn pintamateriaalin ansiosta. Additionia on saatavana kolmena väri vaihtoehtona: beigenä, mustana tai maastokuvioituna (Camo). Additionin pinta helpottaa vaatteiden liukumista materiaalia vasten samalla kun tuote on saanut eri värin koko matkalla alhaalta siivekkeiden kärkeen. Addition on saatavissa ainoastaan D-lenkillä. Ortoosin sisäpuolella Mikrofixin osat ovat valmiina nauhan ja pehmusteen kiinnitystä varten (SoftKIT tai ComfortKIT). ToeOFF® 2½ additionissa on kuvioitu pinta beigessä ja maastokuvioitussa mallissa. Jokainen ortoosi on näin yksilöllinen kuvioinniltaan ja ortoosit poikkeavat näin hieman toisistaan.

Käyttöalueet: Riippunilikka yhdistettynä lievästä kohtuulliseen spastisuuteen (tai ei spastisuutta ollenkaan), jossain tapauksissa myös heikentynyt polvikontrolli ja varpaan amputaatio.

Kontraindikaatiot: Voimakas ödeema, diabetes, johon liittyy haavaumia, alentunut tuntoherkkyys ja voimakas spastisiteetti.

Muuta: Lisätietoa sovituksista sekä mallin ja koon valinnasta löytyy Allard AFO Professional Käyttöohjeista.

Tuotenro.	Malli	Koko	Jalkapohjan pituus	Korkeus	Vas/Oik	Kengän koko
28954	Musta D-lenkillä	X-Small	21 cm	36 cm	Vas/Oik	32-35
28954	Musta D-lenkillä	Small	23 cm	38 cm	Vas/Oik	35-38
28954	Musta D-lenkillä	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vas/Oik	38-42
28954	Musta D-lenkillä	Large	27 cm	43 cm	Vas/Oik	42-45
28954	Musta D-lenkillä	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vas/Oik	>45
28955	Camo D-lenkillä	X-Small	21 cm	36 cm	Vas/Oik	32-35
28955	Camo D-lenkillä	Small	23 cm	38 cm	Vas/Oik	35-38
28955	Camo D-lenkillä	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vas/Oik	38-42
28955	Camo D-lenkillä	Large	27 cm	43 cm	Vas/Oik	42-45
28955	Camo D-lenkillä	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vas/Oik	>45
28956	Beige D-lenkillä	X-Small	21 cm	36 cm	Vas/Oik	32-35
28956	Beige D-lenkillä	Small	23 cm	38 cm	Vas/Oik	35-38
28956	Beige D-lenkillä	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vas/Oik	38-42
28956	Beige D-lenkillä	Large	27 cm	43 cm	Vas/Oik	42-45
28956	Beige D-lenkillä	X-Large	28,5 cm	43 cm	Vas/Oik	>45

ToeOFF® 2.0

Yhdistämällä monien vuosien kokemuksemme ja ortoosin valmistustekniikan kehittymisen asiakkailtamme tulleeisiin toiveisiin olemme kehittäneet ToeOFF® 2.0:n. ToeOFF® on siitä asti, kun se ensimmäisen kerran esiteltiin vuonna 1997, ollut toiminnallisuudeltaan ja dynaamisilta ominaisuuksiltaan johtava tuote. ToeOFF® 2.0:ssa on samat ominaisuudet ja toimintaperiaate kuin alkuperäisessä ToeOFF®:ssa. Lisäksi ortoosissa on kehittyneempi muotoilu ja toimivuus. ToeOFF® 2.0:n muotoa on muutettu tasaisemmaksi, geometriaa parannettu sekä ulkopintaa tehty sileämmäksi. Lisäksi kaikki Mikrofix-tarrat ovat valmiiksi asennettu ortoosiin, mikä nopeuttaa ja helpottaa SoftKITin tai ComfortKITin asentamista. Kiinnitysnauhissa on uusi ratkaisu ja ne ovat valmistettu uudenlaisesta kulutusta kestävästä materiaalista. Nauhat voidaan tilata sekä D-lenkkien kanssa että ilman. Nauhat myös voidaan asentaa sekä oikealle että vasemmalle avautuvaksi riippuen asiakkaan toiminnan tarpeista. Dynaamisia toimintoja ei ole muutettu. Asteittainen dynaaminen toiminto ja eri kokojen mukaan lisääntyvä stabiliteetti ovat kuten aikaisemminkin. ToeOFF 2.0:n kannankorkeus on 12-15 mm koosta riippuen.



Käyttöalueet: Riippunilkka yhdistettynä kohtuulliseen spastisuuteen (tai ei spastisuutta ollenkaan), jossain tapauksissa myös heikentynyt polvikontrolli ja varpaan amputaatio.

Kontraindikaatiot: Voimakas ödeema, diabetes, johon liittyy haavaumia, alentunut tuntoherkkyys ja voimakas spastisiteetti.

Muuta: Lisätietoa sovituksista sekä mallin ja koon valinnasta Allard AFO Professional käyttöohjeista. Tässä mallissa Mikrofix-tarrat ovat valmiiksi asennettu ortoosin sisäpuolelle.

Tuotenro.	Malli	Koko	Jalkapohjan pituus	Korkeus	Vas/Oik	Kengän koko
28920	ToeOFF 2.0 ilm. D-lenk.	X-Small	21 cm	36 cm	Vas/Oik	32-35
28920	ToeOFF 2.0 ilm. D-lenk.	Small	23 cm	38 cm	Vas/Oik	35-38
28920	ToeOFF 2.0 ilm. D-lenk.	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vas/Oik	38-42
28920	ToeOFF 2.0 ilm. D-lenk.	Large	27 cm	43 cm	Vas/Oik	42-45
28920	ToeOFF 2.0 ilm. D-lenk.	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vas/Oik	>45
28922	ToeOFF 2.0 D-lenkillä	X-Small	21 cm	36 cm	Vas/Oik	32-35
28922	ToeOFF 2.0 D-lenkillä	Small	23 cm	38 cm	Vas/Oik	35-38
28922	ToeOFF 2.0 D-lenkillä	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vas/Oik	38-42
28922	ToeOFF 2.0 D-lenkillä	Large	27 cm	43 cm	Vas/Oik	42-45
28922	ToeOFF 2.0 D-lenkillä	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vas/Oik	>45



ToeOFF® Short

ToeOFF® Lyhyt on erikoismalli, jossa on matalampi sääriosa, leveämpi jalkapohjaosa metatarsaalinivelen kohdalta ja lyhyempi varvas- ja kantaosa kuin perinteisessä ToeOFF®:ssa. Ortoosissa tulee käyttää pehmustetta. ToeOFF Short:ssa on kannankorkeus n. 7 mm kaikissa kokovaihtoehdoissa.

Käyttöalueet: Riippunilkka yhdistettynä kohtuulliseen spastisuuteen (tai ei spastisuutta ollenkaan), jossain tapauksissa myös heikentynyt polvikontrolli.

Kontraindikaatiot: Voimakas ödeema, diabetes, jossa on haavaumia, alentunut tuntoherkkyys ja voimakas spastisiteetti.

Muuta: Enemmän tietoa sovituksista ja mallin ja koon valinnasta löytyy Allard AFO Professional käyttöohjeista. Ortoosin mukana toimitetaan nauhasetti.

Tuotenro.	Malli	Koko	Jalkapohjan pituus	Korkeus	Vas/Oik	Kengän koko
28990	ToeOFF Lyhyt Musta	Small	21,5 cm	29,5 cm	Vas/Oik	32-35
28990	ToeOFF Lyhyt Musta	Medium	23,5 cm	32 cm	Vas/Oik	35-38
28990	ToeOFF Lyhyt Musta	Large	25,5 cm	34 cm	Vas/Oik	38-42



BlueROCKER® 2.0

BlueROCKER® on jäykin ja stabiilein riippunilkkartoosimme. Tästä ortoosista on nyt tehty päivitetty versio BlueROCKER® 2.0. Ortoosin geometrista muotoa on parannettu sekä ulkopintaa tehty sileämmäksi. Ortoosin kiinnitysnauhat ovat saatavana D-lenkillä ja ilman.

Lisäksi MikroFix-tarrat ovat valmiiksi asennettu ortoosiin, mikä helpottaa SoftKITin tai ComfortKITin asentamista. Myös kiinnitysnauhoissa on uusi ratkaisu ja niitä voi tilata sekä D-lenkillä että ilman. Nauhat voidaan asentaa molemmille puolille riippuen asiakkaan toiminnallisuuden tarpeesta. BlueROCKER 2.0:ssa on kannankorkeus 12-15 mm koosta riippuen.



Käyttöalueet: Riippunilikka, johon voi liittyä lievä tai vaikea spastisuus, heikentynyt polven ja lantion kontrolli, heikkous tai toimintapuutos alaraajan lihaksissa, heikentynyt tasapaino, molemminpuolinen riippunilkkaoire ja osajalka-amputaatio.

Kontraindikaatiot: Voimakas ödeema, diabetes, jossa on haavaumia ja alentunut tuntoherkkyys.

Muuta: Enemmän tietoa sovituksista ja mallin ja koon valinnasta löytyy Allard AFO Professional käyttöohjeista. BlueROCKER® 2.0 mukana toimitetaan nauhasetti.

Tuotenro.	Malli	Koko	Jalkapohjan pituus	Korkeus	Vas/Oik	Kengän koko
28940	BlueROCKER 2.0	X-Small	21 cm	36 cm	Vas/Oik	32-35
28940	BlueROCKER 2.0	Small	23 cm	38 cm	Vas/Oik	35-38
28940	BlueROCKER 2.0	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vas/Oik	38-42
28940	BlueROCKER 2.0	Large	27 cm	43 cm	Vas/Oik	42-45
28940	BlueROCKER 2.0	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vas/Oik	>45
28942	BlueROCKER 2.0 D-lenkillä	X-Small	21 cm	36 cm	Vas/Oik	32-35
28942	BlueROCKER 2.0 D-lenkillä	Small	23 cm	38 cm	Vas/Oik	35-38
28942	BlueROCKER 2.0 D-lenkillä	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vas/Oik	38-42
28942	BlueROCKER 2.0 D-lenkillä	Large	27 cm	43 cm	Vas/Oik	42-45
28942	BlueROCKER 2.0 D-lenkillä	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vas/Oik	>45



BlueROCKER® 2½

Riippunilkkartoosi BlueROCKER® 2 ½:ssa on sama dynaaminen toiminto ja stabiliteetti kuin BlueROCKER® 2.0:ssa, mutta kannan korkeus on 7 mm, jotta se soveltuu paremmin moderneihin matalakantaisiin kenkiin. Pohjalevy on tasaisempi, mikä antaa enemmän tilaa varvasosaan. Jo vuodesta 1997 Allard AFO on ollut markkinajohtaja ainutlaatuisine toimintoineen ja dynaamisine ominaisuuksineen.

Käyttöalueet: Riippunilkka, johon voi liittyä voimakasta spastisuutta (tai ei lainkaan spastisuutta), heikentynyt polven ja lantion kontrolli, heikkous tai toimintapuutos alaraajan lihaksissa, heikentynyt tasapaino, molemminpuolinen riippunilkkaoire ja osajalka-amputaatio.

Kontraindikaatiot: Voimakas ödeema, diabetes, jossa on haavaumia ja alentunut tuntoherkkyys.

Muuta: Enemmän tietoa sovituksista ja mallin ja koon valinnasta löytyy Allard AFO-Professional-käyttöohjeista. BlueROCKER 2.0:n mukana toimitetaan nauhasetti. Tuotteen mukana tuleva pussi on valmistettu kierrätetyistä PET-pulloista.

Tuotenro.	Malli	Koko	Jalkapohjan pituus	Korkeus	Vas/Oik	Kengän koko
28970	BlueROCKER® 2½	X-Small	21 cm	36 cm	Vas/Oik	32-35
28970	BlueROCKER® 2½	Small	23 cm	38 cm	Vas/Oik	35-38
28970	BlueROCKER® 2½	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vas/Oik	38-42
28970	BlueROCKER® 2½	Large	27 cm	43 cm	Vas/Oik	42-45
28970	BlueROCKER® 2½	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vas/Oik	>45
28972	BlueROCKER® 2½ D-lenkillä	X-Small	21 cm	36 cm	Vas/Oik	32-35
28972	BlueROCKER® 2½ D-lenkillä	Small	23 cm	38 cm	Vas/Oik	35-38
28972	BlueROCKER® 2½ D-lenkillä	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vas/Oik	38-42
28972	BlueROCKER® 2½ D-lenkillä	Large	27 cm	43 cm	Vas/Oik	42-45
28972	BlueROCKER® 2½ D-lenkillä	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vas/Oik	>45

BlueROCKER® Short

SHORT-mallit ovat erikoismalleja, joissa on matalampi sääriosa ja leveämpi jalkapohjaosa metatarsaalinivelen kohdalta. Ortoosissa tulee käyttää pehmustetta potilaan käyttömukavuutta lisäämään.

SHORTin kannankorkeus on 7 mm kaikissa kokovaihtoehdoissa.

Käyttöalueet: Riippunilkka yhdistettynä heikkoihin plantaarifleksoreihin, joissain tapauksessa myös heikentynyt polvikontrolli. Voidaan käyttää bilateraaleissa ongelmissa ja osa-amputoinneissa (proksimaalisin taso on Chopart).

Kontraindikaatiot: Voimakas ödeema, diabetes, johon liittyy haavaumia, alentunut tuntoherkkyys ja voimakas spastisiteetti.

Muuta: Lisätietoa indikaatioista, mallin valinnasta, sovituksista ja kokovaihtoehdoista löytyy Allard AFO Professional ohjeista.



Tuotenro.	Malli	Koko	Jalkapohjan pituus	Korkeus	Vas/Oik	Kengän koko
28995	BlueROCKER® Short	Small	21,5 cm	29,5 cm	Vas/Oik	32-35
28995	BlueROCKER® Short	Medium	23,5 cm	32 cm	Vas/Oik	35-38
28995	BlueROCKER® Short	Large	25,5 cm	34 cm	Vas/Oik	38-42

Custom ToeOFF®

Custom BlueROCKER®

Mikäli asiakas tarvitsee muodoltaan tai toiminnaltaan erilaisen ortoosin kuin valikoimamme tuotteissa löytyy voidaan ortoosi tilata yksilöllisenä tuotteena mittojen mukaan ToeOFF®- tai BlueROCKER® Customina. Tilauksen voi tehdä useammalla eri tavalla. Skannattuna, kipsiposiitivinä tai kipsinegatiivinä (muovikipsi tai STS-sukka) tai lähettää mitat. Valmistamme ortoosin saamiemme tietojen mukaisesti, ja se mukailee tavallisen ToeOFF®/BlueROCKER®-ortoosin muotoja ja ominaisuuksia. Tilauskaavakkeeseen voit tehdä monia eri valintoja koskien esim. kannan korkeutta, stabiliteettia tai kevennystä. Custom ortoosille on oma tilauskaavake, joka tulee täyttää. Tilauskaavake on ladattavissa nettisivuiltamme tuotesivun alaosasta.

Muuta:

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme, jos haluat lisätietoa ToeOFF®/BlueROCKER® Custom tilauksen kulusta, kipsivalusta, skannauksesta tai tilauskaavakkeesta.

Tuotenro.	Malli
28460	Custom ToeOFF®
28480	Custom BlueROCKER®



Custom ToeOFF®

Custom BlueROCKER®

Kun tilaat Custom ToeOFF:n tai Custom BlueRocker:n tulee sinun huomioida useita asioita ennen tilaamista. Olemme koonneet yhteen eri valinnat, joita voit valita ortoosiin ja kuinka ne vaikuttavat ortoosin kokonaishintaan.

Ortooseille on oma tilauskaavake täytettäväksi. Tilauskaavake on ladattavissa nettisivuiltamme kyseisen tuotteen tuotesivulta tai "Lataa" välilehdestä kohdasta Allard AFO kaavakkeet.

Custom ToeOFF® & Custom BlueROCKER®

Custom ToeOFF® Tuotenro.	Custom BlueROCKER® Tuotenro.	Kuvaus		Lisäkus- tannus
28460 1190-1310	28480 1190-1310	Custom ToeOFF® & BlueROCKER®, vasen	Pohjalevy 190,195 - 310 mm	Perushinta
28460 2190-2310	28480 2190-2310	Custom ToeOFF® & BlueROCKER®, oikea	Pohjalevy 190,195 - 310 mm	Perushinta
28463 0001	28483 0001	Pohjalevyn leveys	+ 5 mm	Ei
28463 0002	28483 0002	Pohjalevyn leveys	- 5 mm	Ei
28464 0005	28484 0005	Kannankorkeus	5 mm	Ei
28464 0007	28484 0007	Kannankorkeus	7 mm	Ei
28464 0010	28484 0010	Kannankorkeus	10 mm	Ei
28464 0012	28484 0012	Kannankorkeus	12,5 mm	Ei
28464 0015	28484 0015	Kannankorkeus	15 mm	Ei
28464 0020	28484 0020	Kannankorkeus	20 mm	Ei
28464 0025	28484 0025	Kannankorkeus	25 mm	Ei
28464 0030	28484 0030	Yksilöllinen kannankorkeus	korkeampi kuin 25 mm	Kyllä
28465 0000	28485 0000	Kevennys	Tibian harju	Ei
28465 0003	28485 0003	Kevennys 3 mm	Tibian harju	Ei
28465 0005	28485 0005	Kevennys 5 mm	Tibian harju	Ei
28466 0000	28486 0000	Yksilöllinen kevennys		Kyllä
28468 0001	28488 0001	Jäykkyyssaste A/P	+1 materiaalikerros	Kyllä
28468 0002	28488 0002	Jäykkyyssaste A/P	+ 2 materiaalikerrosta	Kyllä
28468 0003	28488 0003	Std jalkaterä/jäykempi kantapää	+ 1 materiaalikerros	Kyllä
28468 0004	28488 0004	Std kantapää/jäykempi jalkaterä	+ 1 materiaalikerros	Kyllä
28469 0001	28489 0001	Jäykkyyssaste A/P	- 1 materiaalikerros	Kyllä
28469 0002	28489 0002	Jäykkyyssaste A/P	- 2 materiaalikerrosta	Kyllä
28469 0003	28489 0003	Std kärki/jäykkä kantapää	- 1 materiaalikerros	Kyllä
28469 0004	28489 0004	Std kantapää/jäykkä kärki	- 1 materiaalikerros	Kyllä
28470 0001	28490 0001	Sivuttaisstabiliteetti M/L	+ 1 materiaalikerros	Kyllä
28470 0002	28490 0002	Sivuttaisstabiliteetti M/L	+ 2 materiaalikerrosta	Kyllä
28471 0001	28491 0001	Sivuttaisstabiliteetti M/L	- 1 materiaalikerros	Kyllä
28471 0002	28491 0002	Sivuttaisstabiliteetti M/L	- 2 materiaalikerrosta	Kyllä
28473 0000	28493 0000	Jalkapöydän kevennys	Lisätilaa jalalle	Ei



Custom ToeOFF®

Custom ToeOFF voidaan tilata potilaille, joille tarvitaan yksilöllistä muotoilua esim. säärilihashen atrofian tai kudosten liikakasvun vuoksi tai joilla on poikkeava säären muoto tai joille tarvitaan erilainen ortoosin jäykkyys jne. Tilaus voidaan tehdä eri tavoilla: Skannaamalla, negatiivi-kipsillä (muovikipsi tai STS-sukka), positiivi-kipsillä tai mittojen mukaan. Tilauksen yhteydessä voidaan tehdä lisävalintoja koskien kannankorkeutta, stabiliteettia, kevennystä jne. Tilausta varten on oma lomakkeensa. Lomakkeen voi ladata tuotetietojen alta.

Muuta: Jos tarvitset lisätietoja tilauskaavakkeesta tai yksilöllisesti valmistetun Custom ToeOFF® AFO:n tilaamisesta, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Tuotenro.	Malli
28460	Custom ToeOFF®
28458	Custom Softkit
28459	Custom Comfortkit



Custom BlueROCKER®

Custom BlueROCKER® voidaan tilata potilaille, joille tarvitaan yksilöllistä muotoilua esim. säärilihashen atrofian tai kudosten liikakasvun vuoksi, tai joilla on poikkeava säären muoto tai joille tarvitaan erilainen ortoosin jäykkyys jne. Tilaus voidaan tehdä eri tavoilla: Skannaamalla, negatiivi-kipsillä (muovikipsi tai STS-sukka), positiivi-kipsillä tai mittojen mukaan. Tilauksen yhteydessä voidaan tehdä lisävalintoja koskien kannankorkeutta, stabiliteettia, kevennystä jne. Tilausta varten on oma lomakkeensa. Lomakkeen voi ladata tuotetietojen alta.

Muuta: Jos tarvitset lisätietoja tilauskaavakkeesta tai yksilöllisesti valmistetun Custom BlueROCKER® AFO:n tilaamisesta, ota yhteyttä asiakaspalveluumme

Tuotenro.	Malli
28480	Custom BlueROCKER®
28458	Custom Softkit
28459	Custom Comfortkit

COMBO

Mukautuva ja ainutlaatuinen ortoosiratkaisu polven hyperekstensioon johon liittyy riippunilkka. ToeOFF® on vuosien aikana osoittanut hyödyllisyytensä niin kuntoutusprosessissa kuin päivittäisessä elämässäkin. ToeOFF® on auttanut monia käyttäjiä joilla on riippunilkka kävelemään paremmin ja lisännyt heidän elämänlaatuaan. ToeOFF® on joskus yhdistetty polviortoosiin polvinivelen yliojentumisen estämiseksi. Olemme nyt kehittäneet ortoosiratkaisun, joka yhdistetään ToeOFF®- tai BlueRocker®-ortoosiin

Combo-ortoosi valmistetaan ja sovitetaan potilaalle yksilöllisesti.

- Reisosan koon valinta riippuu siitä, miten korkealle reiteen se asetetaan. Reisiosa on kuitenkin asetettava vähintään 10 cm:ä polven nivelraon yläpuolelle.
- Liitäntäosan koko on riippumaton ToeOFF:n tai BR:n koosta.
- Hyperekstensoristikon koon määrittää polven leveys.
- Täydellisen ortoosin kokoamiseen tarvitaan kaikki 5 osaa.
- Combo ei ole tarkoitettu potilaille, joiden paino on yli 150 kg ja pituus yli 2 m.





ToeOFF® Combo

Combo on ortoosiosa, joka on kehitetty erityisesti polven hyperekstension ehkäisyyn, kun siihen liittyy riippunilkka. Combo on jatkokappale, joka asennetaan ToeOFF®- tai BlueROCKER®-ortoosiin. Combo-osa on helppo irrottaa riippunilkkaortoosista innovatiivisen rakenteensa ansiosta.

Käyttöalueet: Polvinivelen instabiliteetti, ylijännitys yhdistettynä riippunilkkaan, joka johtuu halvauksesta, post-poliosta, MS-taudista, neuropatiasta tms. Potilaan paino enintään 150 kg. Potilaan pituus enintään 2 m. Combo ei sovellu käytettäväksi Ypsilon®FLOW tai ToeOFF®FLOW ortoosien kanssa.

Mitta 1: Polvimitta M-L patellan keskikohdasta

Mitta 2: Ympärysmitta 20 cm patellan keskikohdan yläpuolelta

Mitta 3: M-L 20 cm patellan keskikohdan yläpuolelta

Kontraindikaatiot: Polven ligamenttien totaalinen puuttuminen. Nelipäisen reisilihaksen täydellinen toiminnan puutos. Asiakas yli 2 metriä pitkä.

Asiakkaan paino yli 150 kg. Kognitiivinen kyky merkittävästi heikentynyt.

Huom: Kun sovitus on tehty, ortoosissa ei saa olla ylijännystä jäljellä enempää kuin 10°.

Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik	Mitta 1	Mitta 2	Mitta 3
28780	Ortoosinivel kiskoilla (pari)	Yksi koko				
28781	Reisiosa	Small	Vas/Oik	11-15 cm		30-40 cm
28781	Reisiosa	Medium	Vas/Oik	13-17 cm		38-50 cm
28781	Reisiosa	Large	Vas/Oik	15-19 cm		48-60 cm
28781	Reisiosa	X-Large	Vas/Oik	17-21 cm		58-70 cm
28782	Polven takaosan kangas solkineen	Small	Bilat.		7-10,5 cm	
28782	Polven takaosan kangas solkineen	Medium	Bilat.		9,5-13 cm	
28782	Polven takaosan kangas solkineen	Large	Bilat.		12,5-16 cm	
28796	Pohjenauha	Yksi koko				
28783	SoftKIT (2 kpl)	Small				
28783	SoftKIT (2 kpl)	Medium				
28783	SoftKIT (2 kpl)	Large				
28783	SoftKIT (2 kpl)	X-Large				
28784	Tibian liitäntäosa	Small				
28784	Tibian liitäntäosa	Medium				
28784	Tibian liitäntäosa	L-XL				

NAVIGAIT™

NAVIGAIT™ ortoosi on tarkoitettu avustamaan dorsaalifleksiota henkilöillä, joilla on lievä riippunilkka. Ortoosin pehmustettu muoviosa istuu tukevasti säären etuosaa vasten. Pehmuste voidaan irrottaa ja pestä. Dorsaalifleksiota ohjataan säätämällä nauhan yläosaa sekä kiinnittämällä koukku kengän nyöriytykseen sopivaan kohtaan. Ortoosi on muotoiltu niin, että se on huomaamaton housunlahkeen alla. NAVIGAIT™:a on saatavilla kolmea eri kokoa. Muoviosan ylä- ja alareunoja voidaan tarvittaessa hieman muotoilla. NAVIGAIT™ 4-Foot on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä NAVIGAIT™:n kanssa, kun käyttäjällä ei ole kenkiä jalassa. Tuotetta voidaan myös käyttää sandaalien tai muiden nauhattomien jalkineiden kanssa. NAVIGAIT™ 4-Foot vedetään kuin sukka jalkapöydän päälle. Joustavan ja jäykän materiaaliyhdistelmän sekä sisäpuolella olevan silikoniosan ansiosta se pysyy hyvin paikoillaan.

Käyttöalueet: NAVIGAIT™ on tarkoitettu antamaan jalalle lisätukea, kun mahdollisuus aktiiviseen dorsaalifleksioon on heikentynyt neurologisten sairauksien kuten, halvaus, MS ja Post- polio syndrooman seurauksena. Mikäli kenkä ei ole käytössä, käytä NAVIGAIT 4-Foot-mallia yhdessä NAVIGAITin kanssa.

Kontraindikaatiot: Henkilöiden, joilla ilmenee spastisiteettia tai voimakasta ödeemaa ei tule käyttää NAVIGAIT™:a.

Muuta: NAVIGAIT™ ei korjaa jalan virheasentoja tai epämuodostumia. Näitä tulee tarpeen mukaisesti hoitaa niihin soveltuvilla kengillä ja/tai pohjallisilla.

Tuotenro.	Malli	Koko	Mitta	Vas/Oik
28410	NAVIGAIT	X-Small	23 cm	Bilat.
28410	NAVIGAIT	Small/Medium	26,5 cm	Bilat.
28410	NAVIGAIT	Large/X-Large	30 cm	Bilat.
28415	4-foot	Small	21-23 cm	Bilat.
28415	4-foot	Medium	23-26 cm	Bilat.
28415	4-foot	Large	26-29 cm	Bilat.
28412	Varakuminauha koukulla	X-Small		Bilat.
28412	Varakuminauha koukulla	Small/Medium		Bilat.
28412	Varakuminauha koukulla	Large/X-Large		Bilat.
28413	Jäykkä kuminauha koukulla	X-Small		Bilat.
28413	Jäykkä kuminauha koukulla	Small/Medium		Bilat.
28413	Jäykkä kuminauha koukulla	Large/X-Large		Bilat.
28414	Lisänauhasetti	X-Small		Bilat.
28414	Lisänauhasetti	Small/Medium		Bilat.
28414	Lisänauhasetti	Large/X-Large		Bilat.



Mitta: Muoviosan pituus



Prim riippunilkkaortoosi

Hiukan pehmeämpi riippunilkkaortoosi on valmistettu polypropyleenista. Ortoosia käytetään lievissä riippunilkkan tai muiden neurologisiin diagnooseihin liittyvien oireiden helpottamisessa. Ortoosissa on avoin kantapää ja jalkaterä sekä ristimuotoilu takana. Ortoosissa on leveä sääripehmuste, joka suljetaan tarralla. Mukana tulee myös ylimääräinen tarranauha, jolla saa tuettua jalan paikalleen ortoosissa. Ortoosin jalkalevyä on helppo muotoilla kenkään sopivaksi saksilla leikkaamalla.

Käyttöalueet: Lievä riippunilkka.

Tuotenro.	Väri	Koko	Pituus	Korkeus	Vas/Oik
71296	Valkoinen	Small	23 cm	29 cm	Vas/Oik
71296	Valkoinen	Medium	24,5 cm	31 cm	Vas/Oik
71296	Valkoinen	Large	26 cm	33 cm	Vas/Oik
71296	Valkoinen	X-Large	27,5 cm	35 cm	Vas/Oik



ATX Foot Lifter riippunilkkaortoosi

ATX Foot Lifter on tekstiilinen riippunilkkaortoosi henkilöille, joilla on lievä riippunilkka. Ortoosi on yksinkertainen ratkaisu avustamaan jalan nostamista (sisällä ja ulkona) kävelyn heilahdusvaiheessa. Ortoosissa on tekstiilinen nilkkaosa, joka kiinnitetään malleolien yläpuolelle. Tekstiiliosan takapuolella on geelilevy, joka vähentää akillesjänteeseen kohdistuvaa painetta. Koukullinen levy asetetaan kenkäläpän ja nauhojen väliin. Koukkuun kiinnitettävä kuminauha asetetaan nilkkaosan molemmille puolille kiinni. Jalan vetoa ylöspäin voidaan säätää muuttamalla koukun sekä tarrapintaisten tekstiiliosaan kiinnitettävien levyjen paikkaa. Jos ATX Foot Lifteriä käytetään sisällä ilman kenkiä voidaan siihen ostaa jalkateräosa lisäosana.

Käyttöalueet: Löysän nilkan dorsaalifleksion tukemiseksi ja jalan nostamiseksi kävelyn heilahdusvaiheessa. Tarkoitettu käytettäväksi lievässä riippunilkassa.

Tuotenro.	Malli	Koko	Mitta 1	Mitta 2	Vas/Oik
28168	ATX Foot Lifter	X-Small	13-17 cm	Bilateraalinen	Bilat.
28168	ATX Foot Lifter	Small	17-21 cm	Bilateraalinen	Bilat.
28168	ATX Foot Lifter	Medium	21-25 cm	Bilateraalinen	Bilat.
28168	ATX Foot Lifter	Large	25-29 cm	Bilateraalinen	Bilat.
28169	ATX jalkateräosa	Small		17-21 cm	Vas/Oik
28169	ATX jalkateräosa	Medium		21-25 cm	Vas/Oik
28169	ATX jalkateräosa	Large		25-29 cm	Vas/Oik
28170	ATX koukkulevy	Yksi koko		Bilateraalinen	Bilat.
28171	ATX lisäkuminauha	X-Small/Small		Bilateraalinen	Bilat.
28171	ATX lisäkuminauha	Medium		Bilateraalinen	Bilat.
28171	ATX lisäkuminauha	Large		Bilateraalinen	Bilat.
28172	Lisäkoukut 2 kpl	Yksi koko		Bilateraalinen	Bilat.

Mitta 1: Nilkan ympärys malleolien yläpuolelta.

Mitta 2: Jalan ympärys jalkaholvin korkeimmasta kohdasta

ToeUP™ Tekstiilinen nilkka-ortoosi

ToeUP on tekstiilinen nilkkaortoosi, joka on suunniteltu henkilöille, joilla on lievä riippunilkka. Tässä ortoosissa on matalaprofiilinen tekstiilinen nilkkaosa, joka kiinnittyy malleolien yläpuolelle. Nilkkaosa kiinnitetään joustavalla kuminauhalla, jossa on tarrapintaistiset levyt. Kuminauha kiinnitetään nauhan alle tai kengän nauhoitusreikiin. Ortoosi avustaa jalan nostetta (sisällä ja ulkona) kävelyn heilahdusvaiheessa. Jalan nostetta voidaan säätää muuttamalla koukun sekä tarrapintaisten tekstiiliosaan kiinnitettävien levyjen paikkaa. D-rengas pitää joustavat kuminauhat yhdessä. ToeUP tarjoaa myös lisävarusteena saatavan jalkaterän osan ortoosin sisäkäyttöä varten. On tärkeää käyttää ToeUPia yhdessä sukan kanssa.



Käyttöalueet: Potilaille, joilla on lieviä riippunilkka, jotka johtuvat neuro- ja/ tai lihasheikkoudesta dorsifleksiossa.

Tuotenro	Malli	Koko	Väri
28500	ToeUp - pakkaus sisältää 28502 - 28506	XS-L	Bilateraali
28501	Jalkaterämansetti (sisätiloihin sopiva)	S-L	Vas/Oik
28502	Lisäkuminauhat	XS-S, M-L	-
28503	Lisäkoukut	Yksi koko, pari	-
28504	ToeUP D-rengas	Yksi koko	
28505	Lisäkoukkulevy	Yksi koko	-
28506	Erillinen nilkkamansetti	XS-L	Bilateraali

Swedish riippunilkkaortoosi

Polypropyleenista valmistettu tukeva muovioortoosi. Ortoosia käytetään lievissä riippunilkan tai muiden neurologisiin diagnooseihin liittyvien oireiden helpottamisessa. Ortoosissa on avoin kantapää ja jalkaterä sekä ristimuotoilu takana. Ortoosissa on leveä sääripehmuste, joka suljetaan tarralla. Mukana tulee myös ylimääräinen tarranauha, jolla saa tuettua jalan paikalleen ortoosissa. Ortoosin jalkalevyä on helppo muotoilla kenkään sopivaksi saksilla leikkaamalla.

Käyttöalueet: Lievä riippunilkka.



Tuotenro.	Väri	Koko	Pituus	Korkeus	Vas/Oik
71298	Valkoinen	Small	24 cm	26 cm	Vas/Oik
71298	Valkoinen	Medium	27 cm	29 cm	Vas/Oik
71298	Valkoinen	Large	28 cm	34 cm	Vas/Oik
71298	Valkoinen	X-Large	30 cm	38 cm	Vas/Oik



ComfortKIT™ 2.0

ComfortKIT™ 2.0 on mukavantuntuinen pehmuste ToeOFF® 2.0, Flow- ja BlueROCKER® 2.0-ortoosiin. Se sopii erityisesti henkilöille joiden iho on herkkä, mutta myös niille, joilla on korkea aktiivisuustaso. ComfortKIT 2.0:n sisäosa on valmistettu "muistivaahdosta", joka muotoutuu käyttäjän säären muotojen mukaisesti. Kun ortoosi riisutaan, pehmusteen alkuperäinen muoto palautuu. Pakkaus sisältää 2 kpl.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko
28751	ComfortKIT 2.0	Musta	X-Small
28751	ComfortKIT 2.0	Musta	Small
28751	ComfortKIT 2.0	Musta	Medium
28751	ComfortKIT 2.0	Musta	Large
28751	ComfortKIT 2.0	Musta	X-Large
28752	Mikrofix tarrat 2.0	Musta	X-Small
28752	Mikrofix tarrat 2.0	Musta	Small
28752	Mikrofix tarrat 2.0	Musta	Medium/Large



ComfortPAD™ Ypsilon® Flow

ComfortPAD on Ypsilon® Flow-ortoosiin tarkoitettu pehmuste. Sen pääasiallisena tarkoituksena on vähentää kitkaa ortoosin ja säären välillä eri aktiviteettien kuten kävelyn, juoksun ja pyöräilyn aikana. Ortoosin ja säären välille jäävä materiaalikerros luo kitkaliikkeeseen välitilan, joka vähentää painetta iholle ja sääreen. Testitulokset ovat osoittaneet, että nämä kaksi liukuvaa tekstiilimateriaalia vähensivät iholle syntyvää kitkaa n. 25%. ComfortPAD:ssa on vain yksi koko. Se voidaan pukea ja riisua yhdellä kädellä. Leveämpi nauha vähentää painaumien syntymisen riskiä jalan taakse. ComfortPAD on mukavuutta lisäävä ratkaisu henkilöille, joiden iho säären alueella on herkkä ja jotka silti haluavat olla aktiivisia.

Käyttöalueet: Sopii käytettäväksi vain Ypsilon® Flow ½-ortoosin kanssa.

Tuotenro.	Kuvaus	Koko
28886	Ypsilon® Flow ComfortPAD	Yksi koko

CoverKIT™ 2.0

CoverKIT™2.0 on uudenlainen pehmustevaihtoehto Allard AFolle. CoverKIT sopii käytettäväksi ToeOFF®2.0, Flow ja BlueROCKER®2.0 kanssa ja se on helppo pukea ja riisua. Sukka tekee ortoosista sileäpintaisen koko ortoosin pituudelta. Sisäpuoli suojaa ihoa samalla tavalla kuten SoftKIT™ ja jos lisätukea tarvitaan voidaan mukana toimitettavat neopreeniliuskat kiinnittää ortoosiin suojaamaan säärtä painaumilta. Ortoosiin kuuluvia kiinnitysnauhvoja voidaan käyttää CoverKIT™:n lisänä.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Pohkeen ympärys
28765	coverKIT™ 2.0	Musta	X-Small	31 - 34 cm
28765	coverKIT™ 2.0	Musta	Small	34 - 37 cm
28765	coverKIT™ 2.0	Musta	Medium	37 - 41 cm
28765	coverKIT™ 2.0	Musta	Large	41 - 46 cm
28765	coverKIT™ 2.0	Musta	X-Large	46 - 51 cm





Lisänauha Allard AFO 2.0, 2½ & Addition

Erillinen lisänauha joko D-lenkillä tai ilman Allard AFO malleihin 2.0 ja 2½ ja Addition. Nauha voidaan kohdistaa joko mediaalisesti tai lateraalisesti.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Pakkaus
28760	Lisänauha	Musta	X-Small	1 setti
28760	Lisänauha	Musta	Small	1 setti
28760	Lisänauha	Musta	Medium	1 setti
28760	Lisänauha	Musta	Large	1 setti
28760	Lisänauha	Musta	X-Large	1 setti
28761	Lisänauha D-lenkillä	Musta	X-Small	1 setti
28761	Lisänauha D-lenkillä	Musta	Small	1 setti
28761	Lisänauha D-lenkillä	Musta	Medium	1 setti
28761	Lisänauha D-lenkillä	Musta	Large	1 setti
28761	Lisänauha D-lenkillä	Musta	X-Large	1 setti
28763	Lisänauha D-lenkillä	Beige	X-Small	1 setti
28763	Lisänauha D-lenkillä	Beige	Small	1 setti
28763	Lisänauha D-lenkillä	Beige	Medium	1 setti
28763	Lisänauha D-lenkillä	Beige	Large	1 setti
28763	Lisänauha D-lenkillä	Beige	X-Large	1 setti
28768	Lisänauha, ToeOFF®Short	Musta	Small	1 setti
28768	Lisänauha, ToeOFF®Short	Musta	Medium	1 setti
28768	Lisänauha, ToeOFF®Short	Musta	Large	1 setti

SoftKIT™ 2.0

SoftKIT™ 2.0 on ToeOFF® 2.0, Flow- ja BlueROCKER® 2.0-ortoosiin tarkoitettu mukava ja taipuisa pehmuste. Tibiaharjun kuormitusta voidaan helposti keventää asettamalla neopreeniliuskat ortoosiin ja pehmusteen väliin. Pakkaus sisältää kaksi pehmustetta ja kaksi neopreeniliuskaa.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko
28750	SoftKIT 2.0	Musta	X-Small
28750	SoftKIT 2.0	Musta	Small
28750	SoftKIT 2.0	Musta	Medium
28750	SoftKIT 2.0	Musta	Large
28750	SoftKIT 2.0	Musta	X-Large
28749	SoftKIT 2.0	Beige	X-Small
28749	SoftKIT 2.0	Beige	Small
28749	SoftKIT 2.0	Beige	Medium
28749	SoftKIT 2.0	Beige	Large
28749	SoftKIT 2.0	Beige	X-Large
28752	Mikrofix lisätarrat 2.0	Musta	X-Small
28752	Mikrofix lisätarrat 2.0	Musta	Small
28752	Mikrofix lisätarrat 2.0	Musta	Medium/Large/X-Large
28753	Neopreeniliuskat 2.0	Musta	Small
28753	Neopreeniliuskat 2.0	Musta	Large
28754	Mikrofix lisätarrat siivekkeisiin 2.0	Musta	Yksi koko



SoftKIT™ Short

SoftKIT™ on ToeOFF®-ortoosiin tarkoitettu mukava ja taipuisa pehmuste. Tibiaharjun kuormitusta voidaan helposti keventää asettamalla neopreeniliuskat ortoosiin ja pehmusteen väliin. Pakkaus sisältää kaksi pehmustetta, kaksi neopreeniliuskaa ja itsekiinnittyvät Mikrofix-tarrat.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko
28391	SoftKIT™ Short	Musta	Small
28391	SoftKIT™ Short	Musta	Medium
28391	SoftKIT™ Short	Musta	Large
28356	Mikrofix lisätarrat	Musta	Small
28356	Mikrofix lisätarrat	Musta	Medium
28356	Mikrofix lisätarrat	Musta	Large
28357	Mikrofix lisätarrat siivekkeisiin		Yksi koko





T-Strap

T-Strap ohjaa telaluunivelen ja alemman nilkkanivelen lateraalisesti siten, että ne asettuvat uudelleen tibian alapuolelle. T-Strapin distaaliosa kiinnitetään ortoosin pohjalevyn alapuolelle ja proksimaaliosa nilkan ympäri ortoosin lateraalipuolta kohden. Nauhan pituutta on helppo säätää ja sisäpuolta, joka on plastazote-materiaalia, voidaan tarvittaessa lämmittää puhaltimella ja muotoilla. Ulkopuolen materiaali on pehmeää ja hengittävää, mutta samalla tukevaa.

Käyttöalueet: Pes valguksen kontrolloimiseksi.

Kontraindikaatiot: Ödeema, heikentynyt pintaverenkierto, ihon maseraatio tai muut tilat, jotka voivat pahentua kompression seurauksena.

Muuta: T-Strap on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan yhdessä AllardAFO-tuotteen ja yksilöllisesti valmistetun pohjallisen/ortoosin kanssa, jalan asennon kontrolloimiseksi. Jos T-Strapia käytetään ilman yksilöllisesti valmistettua pohjallista/ortoosia lisääntyy ortoosin, lateraaliin puoleen kohdistuva rasite ja näin delaminoitumisen riski.

Tuotenro.	Väri	Koko	Vas/Oik
28777	Musta	Yksi koko	Vas/Oik



AFO-nukkatarranauha

Kaksinkertainen, hieman elastinen nukkatarranauha. Sopii hyvin erilaisiin ortoosisovelluksiin. Kiinnittyy koukkutarraan. Voidaan leikata toivottuun leveyteen.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Pakkaus
25060	Musta	40 mm	10 m	1 rulla
25061	Musta	50 mm	10 m	1 rulla





KiddieFLOW™

KiddieFLOW™ ortoosin jalkapohjaosa on sekä kanta- että varvasosastaan joustavampi kuin KiddieGait ortoosi ja siten ortoosi mahdollistaa suuremman liikelaajuuden. KiddieFLOW™ on rakennettu samoilla periaatteilla kuin aikuisten FLOW-mallit säilyttäen saman geometrian kuin KiddieGAIT® ja KiddieROCKER®. Ortoosi tukee jalkaa dorsaalifleksioon heilahdusvaiheen aikana ja kontrolloi paremmin jalan asentoa heilahdusvaiheen lopussa parantaen siten tukivaiheen stabiliteettia. Samalla pehmeämpi jalan tuki helpottaa painonsiirtoa tukivaiheen lopussa. Kasvaneeseen A/P ja M/L kontrollin tarpeeseen KiddieFLOW voidaan yhdistää yksilölliseen pohjalliseen tai SMO ortoosiin, kuten muutkin lasten ortoosimme.

Käyttöalueet: Riippunilkka. KiddieFLOW on tarkoitettu tueksi riippunilkan yhteydessä, proprioseptiikan häiriöstä aiheutuviin kävelyn muutoksiin, instabiiliin kävelyyn tai matalan tonuksen kävelyyn, varvaskävelyyn ilman jalkapöydän jäykkyyttä, spina bifidaan, cerebral paresiin ja lihasdystrofiaan.

Kontraindikaatiot: Rajoittunut dorsaalifleksio (dorsaalifleksion oltava vähintään + 5 astetta nilkan keskiasennosta). Hyvin jäykät jalan rakenteet. Spastinen quadriceps-lihas. Jäykistyneet/ei korjattavissa olevat pes valgus tai pes varus virheasennot. KiddieFLOWta ei tule käyttää lapsilla koukkupolvikävelyn yhteydessä.

Tuotenro.	Malli	Koko	Jalkapohjan pituus	Korkeus	Vas/Oik
28891	KiddieFLOW™	Small	16 cm	22 cm	Vas/Oik
28891	KiddieFLOW™	Medium	18 cm	25,7 cm	Vas/Oik
28891	KiddieFLOW™	Large	20 cm	29,5 cm	Vas/Oik
28891	KiddieFLOW™	X-Large	21 cm	31,5 cm	Vas/Oik
28892	KiddieFLOW™ D-lenkillä	Small	16 cm	22 cm	Vas/Oik
28892	KiddieFLOW™ D-lenkillä	Medium	18 cm	25,7 cm	Vas/Oik
28892	KiddieFLOW™ D-lenkillä	Large	20 cm	29,5 cm	Vas/Oik
28892	KiddieFLOW™ D-lenkillä	X-Large	21 cm	31,5 cm	Vas/Oik

KiddieGAIT® Baby

KiddieGAIT® Baby tarjoaa dynaamisen ortoosihoidon aikaisessa vaiheessa, mikä auttaa lasta saamaan tasaisemman, luonnollisemman ja biomekaanisesti oikeanlaisen kävelyn. Ortoosi auttaa lasta jalan heilautusvaiheessa sekä kontrolloi jalan asentoa usealla eri tasolla. Ortoosin sijainti tibian etupuolella auttaa myös muissa proksimaalisissa ongelmissa, kuten polven hyperekstensiossa tai "kyykävyssä". KiddieGAIT® Baby on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä yksilöllisesti valmistetun pohjallisen tai ortoosin kanssa jalan asennon kontrolloimiseksi. KiddieGAIT® Baby:ä on saatavana kolmea eri kokoa ja se on tarkoitettu lapsille, jotka ovat vähintään 9 kk ikäisiä.



Käyttöalueet: Riippunilikka. Proprioseptiikan häiriöstä aiheutuvat kävelyn muutokset. Varvaskävely johon ei liity jalkapöydän jäykkyyttä. Matalan tonuksen aiheuttama "kyykävy" (lonkan/polven/nilkan fleksio). Spina Bifida. Cerebral Pares. Lihasdystrofia ja MMC.

Kontraindikaatiot: NRajoittunut dorsaalifleksio (dorsaalifleksion oltava vähintään + 5 astetta nilkan keskiasennosta). Hyvin jäykät jalan rakenteet. Spastinen quadriceps-lihas. Jäykistyneet/ei korjattavissa olevat pes valgus tai pes varus virheasennot. KiddieFLOWta ei tule käyttää lapsilla koukkupolvikävelyn yhteydessä.

Tuotenro.	Malli	Koko	Jalkapohjan pituus	Korkeus	Vas/Oik
28372	KiddieGAIT Baby	Baby Small	11 cm	15 cm	Vas/Oik
28372	KiddieGAIT Baby	Baby Medium	12,5 cm	18 cm	Vas/Oik
28372	KiddieGAIT Baby	Baby Large	14 cm	20 cm	Vas/Oik



KiddieGAIT®

KiddieGAIT tarjoaa aikaisen ortoosihoidon aina 1 vuoden iästä alkaen Baby mallien ansiosta. Nilkka-jalka-ortoosi (AFO) tukee lapsen tasapainoisempaa ja luonnollisempaa kävelyä. Ortoosi auttaa lasta heilahdusvaiheessa ja tukee jalan liikkuvuutta usealla eri tasolla tukivaiheessa. Ortoosin sijainti tibian etupuoolella auttaa myös muissa proksimaalisissa ongelmissa, kuten polven hyperekstensiossa tai koukkupolvikävelyssä. KiddieGAIT ortoosin kanssa tulee käyttää yksilöllistä jalan asentoa ohjaavaa pohjallista tai jalkatukea.

Käyttöalueet: Riippunilkka. KiddieGAIT on tarkoitettu tueksi riippunilkassa, proprioseptiikan häiriöstä aiheutuviin kävelyn muutoksiin, instabiiliin kävelyyn tai matalan tonuksen kävelyyn, varvaskävelyyn, johon ei liity jalkapöydän jäykkyyttä, koukkupolvikävelyyn, johon liittyy matala tonus esim. spina bifidan, CP:n ja lihasdystrofian yhteydessä.

Kontraindikaatiot: Rajoittunut dorsaalifleksio (dorsaalifleksion oltava vähintään + 5 astetta nilkan keskiasennosta). Hyvin jäykät jalan rakenteet. Spastinen quadriceps-lihas. Jäykistyneet/ei korjattavissa olevat pes valgus tai pes varus virheasennot. KiddieFLOWta ei tule käyttää lapsilla koukkupolvikävelyn yhteydessä.

Tuotenro.	Malli	Koko	Jalkapohjan pituus	Korkeus	Vas/Oik
28900	KiddieGAIT® Musta	Small	16 cm	22 cm	Vas/Oik
28900	KiddieGAIT® Musta	Medium	18 cm	25 cm	Vas/Oik
28900	KiddieGAIT® Musta	Large	20 cm	29,5 cm	Vas/Oik
28900	KiddieGAIT® Musta	X-Large	21 cm	31,5 cm	Vas/Oik
28901	KiddieGAIT Musta D-lenkillä	Small	16 cm	22 cm	Vas/Oik
28901	KiddieGAIT Musta D-lenkillä	Medium	18 cm	25,7 cm	Vas/Oik
28901	KiddieGAIT Musta D-lenkillä	Large	20 cm	29,5 cm	Vas/Oik
28901	KiddieGAIT Musta D-lenkillä	X-Large	21 cm	31,5 cm	Vas/Oik

KiddieROCKER®

KiddieROCKER on kehitetty lapsille, jotka tarvitsevat tukea muutoinkin kuin riippunilkkan ongelmassa. Lapsella voi olla bilateriaalista heikkoutta, jolloin hän tarvitsee enemmän stabiiliteettia tukivaiheessa. Kuten muissakin AFO malleissa, lisääntyy jäykkyys myös KiddieROCKERissa ortoosin koon kasvaessa. Lisäksi malli antaa lisästabiiliteettia M/L- ja A/P-suunnissa.

Käyttöalueet: Riippunilkka. KiddieROCKER tukee riippunilkkaa kävelyn ongelmassa, jotka liittyvät proprioseptiikan häiriöihin, kävelyn instabiiliteettiin, matalan tonuksen kävelyyn, varvaskävelyyn ilman jalkapöydän jäykkyyttä ja matalasta tonuksesta johtuvaan koukkupolvikävelyyn, joka liittyy spina bifidaan, CP:hen tai lihasdystrofiaan.

Kontraindikaatiot: Rajoittunut dorsaalifleksio (dorsaalifleksion oltava vähintään + 5 astetta nilkan keskiasennosta). Hyvin jäykät jalan rakenteet. Spastinen quadriceps-lihas. Jäykistyneet/ei korjattavissa olevat pes valgus tai pes varus virheasennot. KiddieFLOWta ei tule käyttää lapsilla koukkupolvikävelyn yhteydessä.



Tuotenro.	Malli	Koko	Jalkapohjan pituus	Korkeus	Vas/Oik
28902	KiddieROCKER	Small	16 cm	22 cm	Vas/Oik
28902	KiddieROCKER	Medium	18 cm	25,7 cm	Vas/Oik
28902	KiddieROCKER	Large	20 cm	29,5 cm	Vas/Oik
28902	KiddieROCKER	X-Large	21 cm	31,5 cm	Vas/Oik
28903	KiddieROCKER D-lenkillä	Small	16 cm	22 cm	Vas/Oik
28903	KiddieROCKER D-lenkillä	Medium	18 cm	25,7 cm	Vas/Oik
28903	KiddieROCKER D-lenkillä	Large	20 cm	29,5 cm	Vas/Oik
28903	KiddieROCKER D-lenkillä	X-Large	21 cm	31,5 cm	Vas/Oik

KiddieGAIT® SoftKIT™

KiddieFLOW™, KiddieGAIT®, KiddieROCKER® SoftKIT™ on mukava ja joustava pehmuste KiddieGAIT®-ortoosiin. Pakkaus sisältää kaksi pehmustetta ja itseliimautuvat MikroFix-tarrat.

Tuotenro.	Malli	Koko
28397	KiddieGAIT®	Baby Small
28397	KiddieGAIT®	Baby Medium
28397	KiddieGAIT®	Baby Large
28378	KiddieFLOW™, KiddieGAIT®, KiddieROCKER®	Small
28378	KiddieFLOW™, KiddieGAIT®, KiddieROCKER®	Medium
28378	KiddieFLOW™, KiddieGAIT®, KiddieROCKER®	Large
28378	KiddieFLOW™, KiddieGAIT®, KiddieROCKER®	X-Large
28379	MikroFix SoftKIT:iin	Small
28379	MikroFix SoftKIT:iin	Medium
28379	MikroFix SoftKIT:iin	Large/X-Large





KiddieGAIT® ComfortKIT™

Mukavantuntuinen pehmuste KiddieGAIT®-KiddieFLOW™- ja KiddieROCKER®-ortoosiin. Pehmuste sopii erityisen hyvin lapsille, joilla on ulkoneva tibia tai herkkä iho sekä myös silloin kun aktiivisuustaso on korkea. ComfortKITin sisäosa on nk. "muistivaahtoa", jonka ansiosta se käytössä muotoutuu hyvin säären muotoihin. Kun pehmustetta ei käytetä palautuu se takaisin alkuperäiseen muotoonsa.

Tuotenro.	Malli	Väri	woko
28418	KiddieFLOW, KiddieGAIT®, KiddieROCKER®	Musta	Small
28418	KiddieFLOW, KiddieGAIT®, KiddieROCKER®	Musta	Medium
28418	KiddieFLOW, KiddieGAIT®, KiddieROCKER®	Musta	Large
28418	KiddieFLOW, KiddieGAIT®, KiddieROCKER®	Musta	X-Large



KiddieGAIT® SoftSHELL™ Baby

SoftSHELL™ Baby on KiddieGAIT® Baby:n tarkoitettu pehmuste. KiddieGAIT® SoftSHELL tulee tilata yhdessä saman kokoisen normaalin SoftKIT™-pehmusteen (28397) kanssa. SoftSHELL:n ulkopuoli on kiiltävää, kuvioitua lycra-materiaalia, joka on mukava piriste ortoosille ja saa materiaalinsa ansiosta vaatteet liukumaan helpommin ortoosia vasten. Tässä mallissa kiinnitysnauhat ovat yhdistetty tuotteeseen.

Muuta: Kuviot voivat ajoittain vaihdella.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko
28388	Eläinkuvio	Sininen	Baby Small
28388	Eläinkuvio	Sininen	Baby Medium
28388	Eläinkuvio	Sininen	Baby Large
28389	Tähtikuvio	Vaaleanpunainen	Baby Small
28389	Tähtikuvio	Vaaleanpunainen	Baby Medium
28389	Tähtikuvio	Vaaleanpunainen	Baby Large

KiddieGAIT® SoftSHELL™

KiddieGAIT® SoftSHELL™ on KiddieGAIT®- ja KiddieROCKER®-ortoosiin tarkoitettu pehmuste, joka on helppo asentaa. Sisäpuoli on valmistettu samasta materiaalista kuin SoftKIT™. Ulkopuoli on kiiltävää, kuvioitua lycraa, joka muuttaa ortoosin ulkoasua ja jonka ansiosta vaatteet liukuvat helpommin ortoosia vasten.

Muuta: Kuviot voivat ajoittain vaihdella.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko
28358	Sydänkuvio	Roosa	Small
28358	Sydänkuvio	Roosa	Medium
28358	Sydänkuvio	Roosa	Large
28358	Sydänkuvio	Roosa	X-Large
28359	Pääkallokuvio	Harmaa	Small
28359	Pääkallokuvio	Harmaa	Medium
28359	Pääkallokuvio	Harmaa	Large
28359	Pääkallokuvio	Harmaa	X-Large



Lisänauha KiddieFLOW, KiddieGAIT ja KiddieROCKER

Erillinen kiinnitysnauha D-lenkillä tai ilman KiddieGait, KiddieRocker ja KiddieFlow ortoosieihin. Nauhan voi kiinnittää avautuvaksi joko mediaalisesti tai lateraalisesti.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Pakkaus
28373	Nauha KiddieGAIT Baby	Musta	Baby Small	1 setti
28373	Nauha KiddieGAIT Baby	Musta	Baby Medium	1 setti
28373	Lisänauha KiddieGAIT Baby	Musta	Baby Large	1 setti
28368	Kiinnitysnauha KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Musta	Small	1 setti
28368	Kiinnitysnauha KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Musta	Medium	1 setti
28368	Kiinnitysnauha KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Musta	Large	1 setti
28369	Nauha D-lenkillä KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Musta	Small	1 setti
28369	Nauha D-lenkillä KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Musta	Medium	1 setti
28369	Nauha D-lenkillä KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Musta	Large	1 setti





Non Slip -materiaali

Luistamaton materiaali, joka on korkean kitkansa ansiosta ihanteellinen pinnoille, jotka altistuvat kovalle kulutukselle. Materiaali on kehitetty käytettäväksi erityisesti KiddieGAIT®-ortoosin pohjalevyllä, jottei esim. SureStep-ortoosi liukuisi ortoosin paljaalla pinnalla. HUOM! Materiaalia ei tule käyttää suoraan ihoa vasten.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus
28411	Musta	14 cm	1m



Ypsilon® Flow^{1/2}-sovitusortoosi

Ypsilon® Flow-sovitusortoosi on samanlainen kuin tavallinen Ypsilon® Flow, mutta siihen on laminoitu teksti "Not-for-Resale". Suosittelemme, että ensimmäinen sovitus tapahtuu kävelytuen avulla tai nojapuiden välissä. Jos sovitettaessa tuntuu kipua tai ortoosi on epämiellyttävä, on kokeilu lopetettava. Ortoosi on valmiiksi pehmustettu.

Käyttöalueet: Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön kävelyä harjoiteltaessa ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.

Tuotenro.	Malli	Koko	Jalkapohjan pituus	Korkeus	Vas/Oik
28881	Ypsilon Flow ^{1/2} NFR	Small	23 cm	35,5 cm	Vas/Oik
28881	Ypsilon Flow ^{1/2} NFR	Medium	24,5 cm	36,5 cm	Vas/Oik
28881	Ypsilon Flow ^{1/2} NFR	Large	27 cm	37,5 cm	Vas/Oik
28881	Ypsilon Flow ^{1/2} NFR	X-Large	27 cm	38,5 cm	Vas/Oik

ToeOFF® Flow2½ sovitusortoosi

ToeOFF Flow2½-sovitusortoosi on samanlainen kuin tavallinen ToeOFF Flow, mutta siihen on laminoitu teksti "Not-for-Resale". Suosittelemme ensimmäisen sovituksen tapahtuvan tuen kanssa tai nojapuita käyttäen. Mikäli sovitus on epämiellyttävä tai kivulias, tulee sovitus keskeyttää. Ortoosissa tulee käyttää pehmustetta.

Käyttöalueet: Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön kävelyä harjoiteltaessa ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.



Tuotenro.	Malli	Koko	Jalkapohjan pituus	Korkeus	Vas/Oik	Kengän koko
28961	ToeOFF Flow2½ sov.ort.	X-Small	21 cm	36 cm	Vas/Oik	32-35
28961	ToeOFF Flow2½ sov.ort.	Small	23 cm	38 cm	Vas/Oik	35-38
28961	ToeOFF Flow2½ sov.ort.	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vas/Oik	38-42
28961	ToeOFF Flow2½ sov.ort.	Large	27 cm	43 cm	Vas/Oik	42-45
28961	ToeOFF Flow2½ sov.ort.	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vas/Oik	>45
28963	ToeOFF Flow2½ sov.ort. D-lenkillä	X-Small	21 cm	36 cm	Vas/Oik	32-35
28963	ToeOFF Flow2½ sov.ort. D-lenkillä	Small	23 cm	38 cm	Vas/Oik	35-38
28963	ToeOFF Flow2½ sov.ort. D-lenkillä	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vas/Oik	38-42
28963	ToeOFF Flow2½ sov.ort. D-lenkillä	Large	27 cm	43 cm	Vas/Oik	42-45
28963	ToeOFF Flow2½ sov.ort. D-lenkillä	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vas/Oik	>45





ToeOFF® 2.0 sovitusortoosi

ToeOFF® 2.0-sovitusortoosi on samanlainen kuin tavallinen ToeOFF® 2.0, mutta siihen on laminoitu teksti "Not-for-Resale". Suosittelemme, että ensimmäinen sovitus tapahtuu kävelytuen avulla tai nojapuiden välissä. Jos sovitettaessa tuntuu kipua tai ortoosi on epämiellyttävä, on kokeilu lopetettava. Ortoosi on valmiiksi pehmustettu.

Käyttöalueet: Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön kävelyä harjoiteltaessa ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.

Tuotenro.	Malli	Koko	Jalkapohjan pituus	Korkeus	Kengän koko
28921	ToeOFF 2.0 sov.ort.	X-Small	21 cm	36 cm	32-35
28921	ToeOFF 2.0 sov.ort.	Small	23 cm	38 cm	35-38
28921	ToeOFF 2.0 sov.ort.	Medium	24,5 cm	40,5 cm	38-42
28921	ToeOFF 2.0 sov.ort.	Large	27 cm	43 cm	42-45
28921	ToeOFF 2.0 sov.ort. ilm.	X-Large	28,5 cm	45 cm	>45
28923	ToeOFF 2.0 sov.ort. D-lenkillä	X-Small	21 cm	36 cm	32-35
28923	ToeOFF 2.0 sov.ort. D-lenkillä	Small	23 cm	38 cm	35-38
28923	ToeOFF 2.0 sov.ort. D-lenkillä	Medium	24,5 cm	40,5 cm	38-42
28923	ToeOFF 2.0 sov.ort. D-lenkillä	Large	27 cm	43 cm	42-45
28923	ToeOFF 2.0 sov.ort. D-lenkillä	X-Large	28,5 cm	45 cm	>45

ToeOFF® 2½-sovitusortoosi

ToeOFF® 2½-sovitusortoosi on samanlainen kuin tavallinen ToeOFF® 2½, mutta siihen on laminoitu teksti "Not-for-Resale". Suosittelemme, että ensimmäinen sovitus tapahtuu kävelytuen avulla tai nojapuiden välissä. Jos sovitettaessa tuntuu kipua tai ortoosi on epämiellyttävä, on kokeilu lopetettava. Ortoosi on valmiiksi pehmustettu.

Käyttöalueet: Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön kävelyä harjoiteltaessa ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.

Tuotenro.	Malli	Koko	Jalkapohjan pituus	Korkeus	Vas/Oik	Kengän koko
28981	ToeOFF® 2½ sov.ort. ilm.	X-Small	21 cm	36 cm	Vas/Oik	32-35
28981	ToeOFF® 2½ sov.ort.	Small	23 cm	38 cm	Vas/Oik	35-38
28981	ToeOFF® 2½ sov.ort. ilm.	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vas/Oik	38-42
28981	ToeOFF® 2½ sov.ort. ilm.	Large	27 cm	43 cm	Vas/Oik	42-45
28981	ToeOFF® 2½ sov.ort. ilm.	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vas/Oik	>45
28983	ToeOFF 2½ sov.ort. D-lenkillä	X-Small	21 cm	36 cm	Vas/Oik	32-35
28983	ToeOFF 2½ sov.ort. D-lenkillä	Small	23 cm	38 cm	Vas/Oik	35-38
28983	ToeOFF 2½ sov.ort. D-lenkillä	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vas/Oik	38-42
28983	ToeOFF 2½ sov.ort. D-lenkillä	Large	27 cm	43 cm	Vas/Oik	42-45
28983	ToeOFF 2½ sov.ort. D-lenkillä	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vas/Oik	>45
28983	ToeOFF 2½ sov.ort. D-lenkillä	X-Large	28,5 cm	45 cm		>45





BlueROCKER® 2.0 sovitusortoosi

BlueROCKER® 2.0-sovitusortoosi on samanlainen kuin tavallinen BlueROCKER® 2.0, mutta siihen on laminoitu teksti "Not-for-Resale". Suosittelemme, että ensimmäinen sovitus tapahtuu kävelytuen avulla tai nojapuiden välissä. Jos sovitettaessa tuntuu kipua tai ortoosi on epämiellyttävä, on kokeilu lopetettava. Ortoosi on valmiiksi pehmustettu.

Käyttöalueet: Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön kävelyä harjoiteltaessa ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.

Tuotenro.	Malli	Koko	Jalkapohjan pituus	Korkeus	Vas/Oik	Kengän koko
28941	BlueROCKER 2.0 sov.ort.	X-Small	21 cm	36 cm	Vas/Oik	32-35
28941	BlueROCKER 2.0 sov.ort.	Small	23 cm	38 cm	Vas/Oik	35-38
28941	BlueROCKER 2.0 sov.ort.	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vas/Oik	38-42
28941	BlueROCKER 2.0 sov.ort.	Large	27 cm	43 cm	Vas/Oik	42-45
28941	BlueROCKER 2.0 sov.ort.	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vas/Oik	>45
28943	BlueROCKER 2.0 sov.ort. D-lenkillä	X-Small	21 cm	36 cm	Vas/Oik	32-35
28943	BlueROCKER 2.0 sov.ort. D-lenkillä	Small	23 cm	38 cm	Vas/Oik	35-38
28943	BlueROCKER 2.0 sov.ort. D-lenkillä	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vas/Oik	38-42
28943	BlueROCKER 2.0 sov.ort. D-lenkillä	Large	27 cm	43 cm	Vas/Oik	42-45
28943	BlueROCKER 2.0 sov.ort. D-lenkillä	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vas/Oik	>45



BlueROCKER® 2½ -sovitusortoosi

BlueROCKER® 2½-sovitusortoosi on samanlainen kuin tavallinen BlueROCKER® 2½, mutta siihen on laminoitu teksti "Not-for-Resale". Suosittelemme, että ensimmäinen sovitus tapahtuu kävelytuen avulla tai nojapuiden välissä. Jos sovitettaessa tuntuu kipua tai ortoosi on epämiellyttävä, on kokeilu lopetettava. Ortoosi on valmiiksi pehmustettu.

Käyttöalueet: Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön kävelyä harjoiteltaessa ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.

Tuotenro.	Malli	Koko	Jalkapohjan pituus	Korkeus	Vas/Oik	Kengän koko
28971	BlueROCKER® 2½ sov.ort.	X-Small	21 cm	36 cm	Vas/Oik	32-35
28971	BlueROCKER® 2½ sov.ort.	Small	23 cm	38 cm	Vas/Oik	35-38
28971	BlueROCKER® 2½ sov.ort.	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vas/Oik	38-42
28971	BlueROCKER® 2½ sov.ort.	Large	27 cm	43 cm	Vas/Oik	42-45
28971	BlueROCKER® 2½ sov.ort.	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vas/Oik	>45
28971	BlueROCKER® 2½ sov.ort.	Large	27 cm	43 cm		42-45
28973	BlueROCKER® 2½ sov.ort.ilm.D-lenkillä	X-Small	21 cm	36 cm	Vas/Oik	32-35
28973	BlueROCKER® 2½ sov.ort.ilm.D-lenkillä	Small	23 cm	38 cm	Vas/Oik	35-38
28973	BlueROCKER® 2½ sov.ort.ilm.D-lenkillä	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vas/Oik	38-42
28973	BlueROCKER® 2½ sov.ort.ilm.D-lenkillä	Large	27 cm	43 cm	Vas/Oik	42-45
28973	BlueROCKER® 2½ sov.ort.ilm.D-lenkillä	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vas/Oik	<45

ToeOFF® Short-sovitusortoosi

ToeOFF® Short-sovitusortoosi on samanlainen kuin tavallinen ToeOFF® Short, mutta siihen on laminoitu teksti "Not-for-Resale". Suosittelemme, että ensimmäinen sovitus tapahtuu kävelytuen avulla tai nojapuiden välissä. Jos sovitettaessa tuntuu kipua tai ortoosi on epämiellyttävä, on kokeilu lopetettava. Ortoosi on valmiiksi pehmustettu.

Käyttöalueet: Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön kävelyä harjoiteltaessa ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.

Tuotenro.	Malli	Koko	Jalkapohjan pituus	Korkeus	Vas/Oik	Kengän koko
28991	ToeOFF® Short NFR	Small	21,5 cm	29,5 cm	Vas/Oik	32-35
28991	ToeOFF® Short NFR	Medium	23,5 cm	32 cm	Vas/Oik	35-38
28991	ToeOFF® Short NFR	Large	25,5 cm	34 cm	Vas/Oik	38-42



BlueROCKER® Short-sovitusortoosi

BlueROCKER® Short-sovitusortoosi on samanlainen kuin tavallinen BlueROCKER® Short, mutta siihen on laminoitu teksti "Not-for-Resale". Suosittelemme, että ensimmäinen sovitus tapahtuu kävelytuen avulla tai nojapuiden välissä. Jos sovitettaessa tuntuu kipua tai ortoosi on epämiellyttävä, on kokeilu lopetettava. Ortoosi on valmiiksi pehmustettu.

Käyttöalueet: Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön kävelyä harjoiteltaessa ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.

Tuotenro.	Malli	Koko	Jalkapohjan pituus	Korkeus	Vas/Oik	Kengän koko
28997	BlueROCKER® Short NFR	Small	21,5 cm	29,5 cm	Vas/Oik	32-35
28997	BlueROCKER® Short NFR	Medium	23,5 cm	32 cm	Vas/Oik	35-38
28997	BlueROCKER® Short NFR	Large	25,5 cm	34 cm	Vas/Oik	38-42



Ypsilon® Flow½-sovitussetti

Ypsilon® Flow -sovitussetti sisältää yhteensä kuusi pehmustettua Ypsilon® Flow-sovitusortoosia, joihin on laminoitu teksti "Not-for-Resale". Sovitussetti toimitetaan Camp-laukussa, joka koostuu vasemman ja oikean puoleisista Small, Medium ja Large ko'ista.

Käyttöalueet: Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön kävelyä harjoiteltaessa ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.

Tuotenro.	Malli	Pakkaus
28882	Ypsilon Flow ½	6 kpl





ToeOFF® Flow2½ sovitussetti

ToeOFF® Flow2½-sovitussetti sisältää yhteensä kuusi pehmustettua ToeOFF® Flow-sovitusortoosia, joihin on laminoitu teksti "Not-for-Resale". Sovitussetti toimitetaan Camp-laukussa, joka koostuu vasemman ja oikean puoleisista Small, Medium ja Large ko'ista.

Käyttöalueet: Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön kävelyä harjoiteltaessa ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.

Tuotenro.	Malli	Pakkaus
28964	ToeOFF Flow 2½	6 kpl
28965	ToeOFF Flow 2½ D-lenkillä	6 kpl



ToeOFF® 2.0 sovitussetti

ToeOFF® 2.0-sovitussetti sisältää yhteensä kuusi pehmustettua ToeOFF® 2.0-sovitusortoosia, joihin on laminoitu teksti "Not-for-Resale". Sovitussetti toimitetaan Camp-laukussa, joka koostuu vasemman ja oikean puoleisista Small, Medium ja Large ko'ista.

Käyttöalueet: Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön kävelyä harjoiteltaessa ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.

Tuotenro.	Malli	Pakkaus
28930	ToeOFF 2.0	6 kpl
28931	ToeOFF 2.0 D-lenkillä	6 kpl



ToeOFF® 2½ sovitussetti

ToeOFF® 2½-sovitussetti sisältää yhteensä kuusi pehmustettua ToeOFF® 2½-sovitusortoosia, joihin on laminoitu teksti "Not-for-Resale". Sovitussetti toimitetaan Camp-laukussa, joka koostuu vasemman ja oikean puoleisista Small, Medium ja Large ko'ista.

Käyttöalueet: Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön kävelyä harjoiteltaessa ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.

Tuotenro.	Malli	Pakkaus
28984	ToeOFF 2½	6 kpl
28985	ToeOFF 2½ D-lenkillä	6 kpl

BlueROCKER® 2.0 sovitussetti

BlueROCKER® 2.0-sovitussetti sisältää yhteensä kuusi pehmustettua BlueROCKER® 2.0-sovitusortoosia, joihin on laminoitu teksti "Not-for-Resale". Sovitussetti toimitetaan Camp-laukussa, joka koostuu vasemman ja oikean puoleisista Small, Medium ja Large ko'ista.

Käyttöalueet: Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön kävelyä harjoiteltaessa ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.

Tuotenro.	Malli	Pakkaus
28944	BlueROCKER 2.0	6 kpl
28945	BlueROCKER 2.0 D-lenkillä	6 kpl



BlueROCKER® 2½ sovitussetti

BlueROCKER® 2½-sovitussetti sisältää yhteensä kuusi pehmustettua BlueROCKER® 2½-sovitusortoosia, joihin on laminoitu teksti "Not-for-Resale". Sovitussetti toimitetaan Camp-laukussa, joka koostuu vasemman ja oikean puoleisista Small, Medium ja Large ko'ista.

Käyttöalueet: Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön kävelyä harjoiteltaessa ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.

Tuotenro.	Malli	Pakkaus
28974	BlueROCKER 2½	6 kpl
28975	BlueROCKER 2½ D-lenkillä	6 kpl



ToeOFF® Short sovitussetti

ToeOFF® Short-sovitussetti sisältää yhteensä kuusi pehmustettua ToeOFF® Short-sovitusortoosia, joihin on laminoitu teksti "Not-for-Resale". Sovitussetti toimitetaan Camp-laukussa, joka koostuu vasemman ja oikean puoleisista Small, Medium ja Large ko'ista.

Käyttöalueet: Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön kävelyä harjoiteltaessa ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.

Tuotenro.	Malli	Pakkaus
28992	ToeOFF® Short	6 kpl





BlueROCKER® Short sovitussetti

BlueROCKER® Short-sovitussetti sisältää yhteensä kuusi pehmustettua BlueROCKER® Short-sovitusortoosia, joihin on laminoitu teksti "Not-for-Resale". Sovitussetti toimitetaan Camp-laukussa, joka koostuu vasemman ja oikean puoleisista Small, Medium ja Large ko'ista.

Käyttöalueet: Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön kävelyä harjoiteltaessa ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.

Tuotenro.	Malli	Pakkaus
28998	BlueROCKER® Short	6 kpl



KiddieFLOW™-sovitusortoosi

KiddieGAIT®-sovitusortoosissa on laminoituna teksti "Not-for-resale". Sovitusortoosia tulee käyttää vain apuna sovituksessa ja sopivuuden arvioinnissa ennen oikean ortoosin valintaa. Ortoosi on valmiiksi pehmustettu.

Käyttöalueet: Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.

Tuotenro.	Malli	Koko	Jalkapohjan pituus	Korkeus	Vas/Oik
28894	KiddieFLOW-sovitusortoosi	Small	16 cm	22 cm	Vas/Oik
28894	KiddieFLOW-sovitusortoosi	Medium	18 cm	25,7 cm	Vas/Oik
28894	KiddieFLOW-sovitusortoosi	Large	20 cm	29,5 cm	Vas/Oik
28894	KiddieFLOW-sovitusortoosi	X-Large	21 cm	31,5 cm	Vas/Oik
28895	KiddieFLOW D-lenkillä NFR	Small	16 cm	22 cm	Vas/Oik
28895	KiddieFLOW D-lenkillä NFR	Medium	18 cm	25,7 cm	Vas/Oik
28895	KiddieFLOW D-lenkillä NFR	Large	20 cm	29,5 cm	Vas/Oik
28895	KiddieFLOW D-lenkillä NFR	X-Large	21 cm	31,5 cm	Vas/Oik

KiddieGAIT®-sovitusortoosi

KiddieGAIT®-sovitusortoosissa on laminoituna teksti "Not-for-resale".
Sovitusortoosia tulee käyttää vain apuna sovituksessa ja sopivuuden arvioinnissa ennen oikean ortoosin valintaa. Ortoosi on valmiiksi pehmustettu.

Käyttöalueet: Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.

Tuotenro.	Malli	Koko	Jalkapohjan pituus	Korkeus	Vas/Oik
28382	KiddieGAIT® Baby NFR	Baby Small	11 cm	15 cm	Vas/Oik
28382	KiddieGAIT® Baby NFR	Baby Medium	12,5 cm	18 cm	Vas/Oik
28382	KiddieGAIT® Baby NFR	Baby Large	14 cm	20 cm	Vas/Oik
28904	KiddieGAIT® NFR	Small	16 cm	22 cm	Vas/Oik
28904	KiddieGAIT® NFR	Medium	18 cm	25,7 cm	Vas/Oik
28904	KiddieGAIT® NFR	Large	20 cm	29,5 cm	Vas/Oik
28904	KiddieGAIT® NFR	X-Large	21 cm	31,5 cm	Vas/Oik
28906	KiddieGAIT® NFR	Small	16 cm	22 cm	Vas/Oik
28906	KiddieGAIT® NFR	Medium	18 cm	25,7 cm	Vas/oik
28906	KiddieGAIT® NFR	Large	20 cm	29,5 cm	Vas/Oik
28906	KiddieGAIT® NFR	X-Large	21 cm	31,5 cm	Vas/Oik



KiddieROCKER®-sovitusortoosi

KiddieROCKER®-sovitusortoosissa on laminoituna teksti "Not-for-resale".
Sovitusortoosia tulee käyttää vain apuna sovituksessa ennen oikean ortoosin valintaa. Ortoosi on valmiiksi pehmustettu.

Käyttöalueet: Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.

Tuotenro.	Malli	Koko	Jalkapohjan pituus	Korkeus	Vas/Oik
28908	KiddieROCKER® NFR	Small	16 cm	22 cm	Vas/Oik
28908	KiddieROCKER® NFR	Medium	18 cm	25,7 cm	Vas/Oik
28908	KiddieROCKER® NFR	Large	20 cm	29,5 cm	Vas/Oik
28908	KiddieROCKER® NFR	X-Large	21 cm	31,5 cm	Vas/Oik
28910	KiddieROCKER® D-lenkillä NFR	Small	16 cm	22 cm	
28910	KiddieROCKER® D-lenkillä NFR	Medium	18 cm	25,7 cm	Ve/Hø
28910	KiddieROCKER® D-lenkillä NFR	Large	20 cm	29,5 cm	Vas/Oik
28910	KiddieROCKER® D-lenkillä NFR	X-Large	21 cm	31,5 cm	Vas/Oik





KiddieFLOW™-sovituksetti

KiddieFLOW™-sovituksetti sisältää yhteensä kuusi pehmustettua KiddieFLOW-sovitusortoosia, joihin on laminoitu teksti "Not-for-Resale". Sovitussetti toimitetaan Camp-laukussa, joka koostuu vasemman ja oikean puoleisista Small, Medium ja Large-ko'ista.

Käyttöalueet: Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.

Tuotenro.	Malli	Koko	Pakkaus
28896	KiddieFLOW™-sovituksetti	Oik+Vas Small,Medium,Large	6 kpl
28897	KiddieFLOW™ D-lenkillä-sovituksetti	Oik+Vas Small,Medium,Large	6 kpl



KiddieGAIT®-sovituksetti

KiddieGAIT®-sovituksetti sisältää yhteensä kuusi pehmustettua KiddieGAIT®-sovitusortoosia, joihin on laminoitu teksti "Not-for-Resale". Sovitussetti toimitetaan Camp-laukussa, joka koostuu vasemman ja oikean puoleisista Small, Medium ja Large-ko'ista.

Käyttöalueet: Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.

Tuotenro.	Malli	Koko	Pakkaus
28381	KiddieGAIT Baby sovituksetti	Oik+Vas Small,Medium,Large	6 kpl
28907	KiddieGAIT D-lenkillä sovituksetti	Oik+Vas Small,Medium, Large	6 kpl
28905	KiddieGAIT sovituksetti	Oik+Vas Small,Medium, Large	6 kpl



KiddieROCKER®-sovituksetti

KiddieROCKER®-sovituksetti sisältää yhteensä kuusi pehmustettua KiddieROCKER®-sovitusortoosia, joihin on laminoitu teksti "Not-for-Resale". Sovitussetti toimitetaan Camp-laukussa, joka koostuu vasemman ja oikean puoleisista Small, Medium ja Large-ko'ista.

Käyttöalueet: Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.

Tuotenro.	Malli	Koko	Pakkaus
28911	KiddieROCKER D-lenkillä sovituksetti	Oik+Vas Small, Medium, Large	6
28909	KiddieROCKER sovituksetti	Oik+Vas Small, Medium, Large	6

PRAFO® Standard

PRAFO®Standard (Pressure Relief Ankle Foot Orthosis) on kehitetty keventämään painetta kantapäässä ja kantapään haavaumissa makuuasennossa ja lyhyillä kävelymatkoilla. Se pitää jalan neutraalissa asennossa ja säilyttää dorsaali- ja plantaarfleksion kävelyn aikana. Säädetty tanko estää sisä- ja ulkorotaation makuuasennossa. Säädettyt jalka-, varvas ja pohjeosat.

Käyttöalueet: Soveltuu esim. diabetes- ja painehaavaumiin.

Muuta: Pehmuste on helppo irrottaa pesua varten ja asettaa takaisin.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Vas/Oik
71100	PRAFO Standard	Musta	Yksi koko	Bilat.
71110	Pehmuste- ja nauhasetti	Musta	Yksi koko	



Boston Soft AFO

Nilkka- ja jalkaortoosi, joka on valmistettu jäykästä muovista ja vuorattu pehmeällä vaahtomuovilla. Ortoosi on tarkoitettu jalan ja nilkan asennon parantamiseen ja spastisiteetin vähentämiseen. Siinä on sisäänrakennettu kantasuoja, joka edesauttaa kantapäähaavojen hoitamista. Boston Soft AFOa voi tilata sekä antirotaatiotuen (stabilizer) kanssa tai ilman. Ortoosi on helppo puhdistaa ja sitä voi muotoilla saksilla.

Käyttöalueet: Selkäydintyry, lihasdystrofia, CP, trauma, kireä akillesjänne ja kantapään haavaumien esto

Muuta: Lisätukea antava lasta voidaan tilata samankokoisena kuin Boston Soft AFO.

Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik	Kengän koko
71151	Ilman rotaatitukea	Lapsi 1	Bilat.	19-20
71151	Ilman rotaatitukea	Lapsi 2	Bilat.	21-22
71151	Ilman rotaatitukea	Lapsi 3	Bilat.	23-24
71151	Ilman rotaatitukea	Lapsi 4	Bilat.	25-26
71151	Ilman rotaatitukea	Lapsi 5	Bilat.	27-29
71151	Ilman rotaatitukea	Lapsi 6	Bilat.	30-31
71151	Ilman rotaatitukea	Aikuinen A	Bilat.	32-34
71151	Ilman rotaatitukea	Aikuinen B	Bilat.	35-36
71151	Ilman rotaatitukea	Aikuinen C	Bilat.	37-39
71151	Ilman rotaatitukea	Aikuinen D	Bilat.	40-41
71151	Ilman rotaatitukea	Aikuinen E	Bilat.	42-44
71151	Ilman rotaatitukea	Aikuinen F	Bilat.	45-46
71152	Antirotaatiotuki	Antirotaatiotuki		





Bebax jalkaterä-ortoosi

Bebax on innovatiivinen lasten jalkaortoosi, joka on suunniteltu progressiiviseen ja dynaamiseen synnynnäisten jalkaterän virheasentojen korjaamiseen. Ortoosi on terveydenhuollon hyväksymä vaihtoehto kipsaukselle. Bebax eliminoi tavallisia iho-ongelmia, joita ilmenee kipsihoitoon liittyen. Ortoosin pohjassa jalkaterän ja kantapään välissä on nivel, joka mahdollistaa asennon säätämisen joka suuntaan. Tuote on valmistettu ekologisesta keinonahasta, joka on testattu Ökö-Tex Standardi 100:n mukaan, ei sisällä kromia ja lateksia. Se on kevyt ja siinä on pehmeä vuoraus ja se on helppo pukea ja riisua. Koot alkaen 10 1/2 on varustettu nilkkaremmillä, joka pitää kantapään paikallaan. Ortoosi ei ole tarkoitettu kävelyyn, koskee kaikkia kokoja.

Käyttöalueet: Synnynnäiset jalkaterän virheasennot

Muuta: Koko = sisäpohjan pituus

Tuotenro.	Väri	Koko	Vas/Oik
28637	valkoinen	7,5 cm	Vas/Oik
28637	valkoinen	8 cm	Vas/Oik
28637	valkoinen	8,5 cm	Vas/Oik
28637	valkoinen	9,0 cm	Vas/Oik
28637	valkoinen	9,5 cm	Vas/Oik
28637	valkoinen	10 cm	Vas/Oik
28637	valkoinen	10,5 cm	Vasen/Oikea
28637	valkoinen	11,5 cm	Vas/Oik
28637	valkoinen	12,5 cm	Vas/Oik
28637	valkoinen	13,5 cm	Vas/Oik
28637	valkoinen	14,5 cm	Vas/Oik
28637	valkoinen	15,5 cm	Vas/Oik
28637	valkoinen	16,5 cm	Vas/Oik

SureStep GO SMO

SureStep GO SMO on valmistuote, joka on suunniteltu hallitsemaan hypotoniaan liittyvää lievää tai vaikeaa pronatiota. Tässä SMO:ssa käytetään tuen ympärysmittan tuottamaa kompressiota jalkaterän ja nilkan vakauttamiseksi. Avoin kantapää parantaa tuntoa mikä auttaa parantamaan myös ryhtiä. Parhaimman toimivuuden ja tuennan varmistamiseksi SureStep GO:ta on aina käytettävä sopivien jalkineiden kanssa.

SureStep SMO:ta suositellaan käytettäväksi yhdessä Allard AFO:n KiddieFLOW™-, KiddieGAIT®- tai KiddieROCKER®-ortoosien kanssa kävelyn edistämiseksi erityisesti potilailla, joilla on matala tonus ja pronatio.

Käyttöalueet

Lievästä vaikeaan pronatioon, hypotoniaan, triplanar hallinta ja painonsiirron vaikeudet, kyvyttömyyteen seistä itsenäisesti, lievään varvaskävelyn.

Kontraindikaatiot

Vaikeuksia kävellä itsenäisesti, spastisuus, vaikea varvaskävely.

Art.nr.	Malli	Kengän koko	Pakkauskoko
28740	SureStep GO SMO	EU 19	1 par
28740	SureStep GO SMO	EU 20	1 par
28740	SureStep GO SMO	EU 21	1 par
28740	SureStep GO SMO	EU 22	1 par
28740	SureStep GO SMO	EU 23	1 par
28740	SureStep GO SMO	EU 24	1 par
28740	SureStep GO SMO	EU 26	1 par
28741	SureStep GO SMO	EU 27	1 par
28741	SureStep GO SMO	EU 28	1 par
28741	SureStep GO SMO	EU 29	1 par
28738	Liukueste pohja		
28739	Houdini kiinnitys		



Surestep™ - ratkaisut varvaskävelyyn

Indy 2 Stage - Niveletön

Indikaatiot:

- Kireät/spastiset plantaarifleksorit
- Nilkan koukistus 90 asteeseen ei onnistu polvien ollessa ojennettuina
- Jalkaterän pronaatio tai hyperekstensio, kun kannat ovat maassa



Indy 2 Stage - Nivelöity, PLS, Dorsaalifleksion avustu

Indikaatiot:

- Kireät/spastiset plantaarifleksorit
- Nilkan koukistus 90 asteeseen onnistuu polvet ojennettuina
- Lapsi saa kannat lattiaan ilman ylimääräistä pronaatiota tai hyperekstensiota



Varvaskävely SMO

Indikaatiot:

- Selkeä varvaskävely
- Nilkan koukistus 90 asteeseen onnistuu polvet ojennettuina
- Yli 50 % ajasta kävellään varpaillaan (kengistä riippumatta)
- Painopiste edessä ja puutteita sivuttaisissa painonsiirroissa
- Sensoriikan puutteita



SMO

Indikaatiot:

- Lyhytaikainen varvaskävely
- Nilkan koukistus 90 asteeseen onnistuu polvet ojennettuina
- Voimakas pronaatio
- Vähemmän kuin 50 % ajasta varpailla (kengät auttavat)
- Painopiste edessä ja puutteita sivuttaisissa painonsiirroissa



Huomioitavaa

- Ikä
- Liikelaajuus
- Ensisijaiset heikkoudet
- Karkeamotoriikan taso
- % aika varpailla
- Käyttöhistoria
- Asennon hallinta

SureStep SMO

SureStep on lapsille tarkoitettu, dynaaminen jalkaortoosi. Se kontrolloi jalan ja nilkan pronaatiota lapsilla, joilla on matala tonus. SureStepin avulla koordinaatio ja tasapaino paranevat. SureStepia voidaan käyttää tavallisten kenkien kanssa. Ortoosi valmistetaan erittäin kevyestä ja ohuesta muovista yksilöllisesti mittojen mukaan.

Käyttöalueet: Kohtalainen/suuri jalkateräpronaatio (plano-valgus) yhdessä matalan tonuksen, löysien ligamenttien, viivästyneen kävelyn, huonon tasapainon, väsyneiden jalkojen tai liikkumisen välttämisen kanssa.

Kontraindikaatiot: Kontraktuurat - nilkan tulee saavuttaa neutraaliasento (90°) passiivisessa manipulaatiossa, kohonnut tonus, spastisiteetti.

Muuta: SureStep valmistetaan USA:ssa mittojen mukaan. Jos sinulla on kysyttävää mitanotosta, ota yhteyttä apuvälinetekniikkaan tai Campin asiakaspalveluun.



Tuotenro.	Malli	Tyyppi	Pakkaus	Paino
28633	Surestep SMO, Standard	Mittojen mukaan	Pari	36 kg:aan saakka
28634	Surestep SMO, Standard	Mittojen mukaan	Kpl	36 kg:aan saakka
28732	Open Heel Moulded Inner Boot		Kpl	
28733	Toe Walking Extension		Kpl	
28734	Club Foot Trim Lines		Kpl	
28735	Metatarsus Adductus Trim Lines		Kpl	
28635	Mittalaatikko			
93300	Lainattava mittalaatikko			





SureStep BigShot SMO

Kun lapset siirtyvät SureStepistä suurempaan ortoosiin, tarvitsevat monet heistä edelleen maksimaalista tukea ja stabiiliteettia. Heitä varten on olemme ottaneet valikoimaamme BigShotin. Ortoosi on yhtä joustava kuin SureStep ja se on tarkoitettu lapsille, jotka ovat kasvaneet ulos SureStepistä tai joiden paino ylittää 36 kg. Pehmeä, silikonista muistuttava sisus on mukava jalalle ja joustava muovikuori antaa sopivan tuen.

Käyttöalueet: Kohtalainen/suuri jalkaterän pronaatio (plano-valgus) yhdessä matalan tonuksen, löysien ligamenttien, viivästyneen kävelyn, huonon tasapainon, väsyneiden jalkojen tai liikkumista välttämisen kanssa tai kun paino ylittää 36 kg.

Kontraindikaatiot: Kontraktuurit - nilkan tulee saavuttaa neutraaliasento (90°) passiivisesti, kohonnut tonus, spastisiteetti

Muuta: BigShot valmistetaan USA:ssa mittojen mukaan. Jos sinulla on kysyttävää mitanotosta, ota yhteyttä apuvälineteknikkoon tai Campin asiakaspalveluun. Joissain tapauksissa voidaan valmistukseen mittojen lisäksi tarvita kipsivalu. Tässä tapauksessa otamme teihin yhteyttä.

Tuotenro.	Malli	Tyyppi	Pakkaus	Paino
28636	Surestep Big Shot	Mittojen mukaan	Pari	Yli 36 kg:a
28636	Surestep Big Shot	Mittojen mukaan	Kappale	Yli 36 kg:a
28736	Surestep Big Shot Lite	Mittojen mukaan	Pari	22 - 40 kg
28737	Surestep Big Shot Lite	Mittojen mukaan	Kpl	22 - 40 kg
28732	Open Heel Moulded Inner Boot		Kpl	
28733	Toe Walking Extension		Kpl	
28734	Club Foot Trim Lines		Kpl	
28735	Metatarsus Adductus Trim Lines		Kpl	

SureStep Advance

SureStep Advance on SMO, joka nousee jalan takaosassa ylemmäs auttaen lievittämään sagittaalista instabiliateettia, estäen dorsi-/plantaarifleksiota, helpottaen itsenäistä seisomista sekä perinteiseen ortoosiin verrattuna parantaen proprioseptiikkaa. Muilta osin ortoosissa on täysin samat ominaisuudet kuin SureStep:ssä. Tämä ainutlaatuinen muuttumiskykyinen systeemi rohkaisee lasta siirtymään tuetusta seisonnasta itsenäiseen, stabilisoimalla jalkoja ja nilkkoja ilman, että se immobilisoisi ne. Kun lapsi alkaa liikkumaan ja liikkuvamman ja matalaprofilisen ortoosin tarve kasvaa, voidaan SureStep Advance helposti muuttaa SureStep SMO:ksi.



Käyttöalueet: Pronaatio, matala tonus, kolmen tason tuenta instabiliateetissa, kyvyttömyys itsenäiseen seisontaan, lievä varpailla kävely.

Kontraindikaatiot: Kohonnut tonus, spastisiteetti, vaikea-asteinen varvaskävely.

Tuotenro.	Malli	Pakkaus
28639	Mitta & Kipsivalu	Pari
28639	Mitta & Kipsivalu	Kappale





SureStep Indy 2 Stage

Ainutlaatuisesti muotoiltu ortoosi, joka on kehitetty siten, että lapsi voi saavuttaa kykynsä liikkua asteittain. Ortoosia on saatavana kahta erilaista mallia: tasainen, jossa ei ole niveltä sekä nivelöity. Tämä ainutlaatuinen 2-kerroksinen ortoosi (ortoosi, jonka sisällä on toinen ortoosi) mahdollistaa SureStepin käytön ilman AFO:a. Tämä mahdollistaa lapsen liikkumisen monella eri tavalla ilman, että normaali lihastoiminta estyy. Kun molempia ortooseja käytetään samanaikaisesti lukkiutuu SMO tukevasti AFO:n sisään ja muuttaa siten dynaamisen SMO:n AFO:ksi. Tämä antaa stabiiliteettia kolmella eri tasolla ilman, että jalan lihasten normaali käyttö rajoittuisi. Indy 2 Stage Solid on ideaalinen ortoosi lapsille, jotka tarvitsevat AFO:n proksimaalista tukea saavuttaakseen itsenäisen seisonnan, mutta joille edelleen on apua SMO:sta ryökimiseen ja ylösnousemiseen oikeanlaisella tavalla. Sillä aikaa kun lapsi kehittyy ja alkaa itsenäisesti ottaa askelia AFO:n kanssa, voidaan SMO:n avulla jatkaa työskentelyä liikeradan ja lihasvoiman parantamisessa ja tällä tavoin sujuvasti siirtyä vähäisempään ortoosien käyttöön. Lapset joiden toimintarajoite johtaa siihen, että he väsyvät päivän aikana, voivat alkaa käyttää SMO:ta aamulla ja näin ylläpitää lihastoimintaa. Myöhemmin päivällä voidaan AFO-osa lisätä mukaan stabiiliin ja toiminnallisen liikeradan säilyttämiseksi.

Käyttöalueet: Hypertoninen jalka ja nilkka. Hypotoninen jalka ja nilkka. Lapset, jotka tarvitsevat apua liikkumiseen. Vaikeuksia saavuttaa itsenäinen seisonta. Sagittaalinen ja frontaalinen instabiiliteetti/heikkous. Matala proprioseptinen tietoisuus.

Kontraindikaatiot: Nilkkakontraktuurat, jotka estävät passiivisen dorsaalifleksion > 90°. Vaikea spastisuus.

Tuotenro.	Malli	Koko	Pakkaus
28631	Mitta & Kipsivalu		Pari
28631	Mitta & Kipsivalu		Kappale
28260	Nivelöity, Mitta & Kipsivalu	<18 kg	Kappale
28260	Nivelöity, Mitta & Kipsivalu	18-40 kg	Kappale

Heelbo kyynärpää-/kantapääsuoja™

Elastinen sukka, jonka geelilevy suojaa kantapään ihoa ja ehkäisee hankaumien syntymistä.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Pakkaus
53600	Keltainen	Small	15-20 cm	1 pari
53600	Sininen	Medium	20-25 cm	1 pari
53600	Valkoinen	Large	25-30 cm	1 pari
53600	Vihreä	X-Large	>30 cm	1 pari



Mitta: Nilkan ympärysmitta.

ASO® nilkkatuki

Matalaprofiilinen ja stabiili nilkkatuki. Edessä on tukeva nyöritys. Joustamattomien nailonnauhojen asettelu muistuttaa teippausta ja estää jalan supinaation. Nauhoja säädetään vamman mukaan. Ortoosin sisäpuolella akillesjänteen kohdalla on lisäksi mukavantuntuinen vahvistettu CoolFlex-pehmuste.

Käyttöalueet: Akuutit ja pitkäkestoiset jalan instabiliteetit ja urheilussa ennaltaehkäisevästi.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28188	Ilman lastoja	Musta	XX-Small	22,5-25 cm	Bilat.
28188	Ilman lastoja	Musta	X-Small	25-27,5 cm	Bilat.
28188	Ilman lastoja	Musta	Small	27,5-30 cm	Bilat.
28188	Ilman lastoja	Musta	Medium	30-32,5 cm	Bilat.
28188	Ilman lastoja	Musta	Large	32,5-35 cm	Bilat.
28188	Ilman lastoja	Musta	X-Large	35-37,5 cm	Bilat.
28188	Ilman lastoja	Musta	XX-Large	37,5-40 cm	Bilat.
28188	Ilman lastoja	Musta	XXX-Large	>40 cm	Bilat.



Mitta: Ympärysmitta kantapaan apexista ja malleolien yli



Mitta: Ympärysmitta kantapaan apexista ja malleolien yli

ASO® nilkkatuki lastoilla

Matalaprofiilinen ja stabiili nilkkatuki. Edessä on tukeva nyöritys. Joustamattomien nylonnauhojen asettelu muistuttaa teippausta ja estää jalan supinaation. Nauhoja säädetään vamman mukaan. Tämä malli tukee nilkkaa erityisen hyvin ulko- ja sisäpuolella olevien, irrotettavien muovilastojensa ansiosta. Ortoosin sisäpuolella akillesjänteen kohdalla on lisäksi mukavantuntuinen vahvistettu CoolFlex-pehmuste.

Käyttöalueet: Akuutit ja pitkäkestoiset jalan instabiliteetit ja urheilussa ennaltaehkäisevästi.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28186	Lastoilla	Musta	X-Small	25-27,5 cm	Bilat.
28186	Lastoilla	Musta	Small	27,5-30 cm	Bilat.
28186	Lastoilla	Musta	Medium	30-32,5 cm	Bilat.
28186	Lastoilla	Musta	Large	32,5-35 cm	Bilat.
28186	Lastoilla	Musta	X-Large	35-37,5 cm	Bilat.
28186	Lastoilla	Musta	XX-Large	37,5-40 cm	Bilat.



Mitta: Ympärysmitta kantapaan apexista ja malleolien yli

ASO® EVO™

Matalaprofiilinen ja tukeva nilkkatuki, jossa on edessä stabiloiva nyöritys. Nailonnauhojen asettelu muistuttaa teippausta ja ne stabiloivat nilkkaa supinaatiossa/pronaatiossa. ASO EVO:n nauhat tukevat kantaluuta inversiossa/eversiossa paremmin kuin tavallinen ASO. Ortoosin suu on vahvistettu muovimansetilla, minkä ansiosta se tukee myös ylempää nilkkaniveltä. Ortoosin sisäpuolella akillesjänteen kohdalla on lisäksi mukavantuntuinen vahvistettu CoolFlex-pehmuste.

Käyttöalueet: Akuutti tai pitkäkestoinen nilkan instabiliteetti, ennaltaehkäisevästi urheilussa, nilkan nyrjähdykset, subtalar-nivelen instabiliteetti.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28189	Musta	X-Small	25-27,5 cm	Bilat.
28189	Musta	Small	27,5-30 cm	Bilat.
28189	Musta	Medium	30-32,5 cm	Bilat.
28189	Musta	Large	32,5-35 cm	Bilat.
28189	Musta	X-Large	35-37,5 cm	Bilat.
28189	Musta	XX-Large	37,5-40 cm	Bilat.

ASO®EVO™ Quatro

Stabiili nilkkatuki, joka mahtuu vielä paremmin jalkineeseen kuin ASO EVO. Jalkapöydän ympärillä oleva materiaali on valmistettu siten, että se sallii normaalin dorsaali-plantaarifleksion. Jäykät nailonnauhat jalkaterän ympärillä muistuttavat teippausta ja ne estävät jalan supinaatiota/pronaatiota. EVO Quatrossa nailonnauhat tukevat kantaluuta inversiossa/eversiosuunnassa enemmän kuin tavallinen ASO. Ylempi osa on vahvistettu muovimansetilla antaen lisäsuojaa vaikeille nilkannyrjähdyksille. Mansetti on päällystetty CoolFlex-materiaalilla tehden tuen mukavan tuntuiseksi. Tuessa on myös käytetty nahkajäljitelmaa, mikä estää sen liukumista.

Käyttöalueet: Akuutti tai pitkäkestoinen nilkan instabiliteetti, ennaltaehkäisevästi urheilussa, nilkan nyrjähdykset, subtalar-nivelen instabiliteetti.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28192	Musta	X-Small	25-27,5 cm	Bilat.
28192	Musta	Small	27,7-30 cm	Bilat.
28192	Musta	Medium	30-32,5 cm	Bilat.
28192	Musta	Large	32,5-35 cm	Bilat.
28192	Musta	X-Large	35-37,5 cm	Bilat.
28192	Musta	XX-Large	37,5-40 cm	Bilat.



Mitta: Ympärysmitta kantapaan apexista ja malleolien yli

ELEMENTS Stretch Up

ELEMENTS Stretch Up on tarkoitettu käytettäväksi illalla/yöllä Plantaarifaskiitin hoitoon. Sukkaa käytetään yöllä tai levossa muuhun aikaan. Tämä tuote on tarkoitettu vain yhden henkilön käyttöön. Koot: Small, Medium ja Large. Sopii sekä vasemmalle että oikealle.

Käyttöalueet: Tarkoitettu käytettäväksi illalla/yöllä Plantaarifaskiitin hoitoon.

Kontraindikaatiot: Verenkierto-ongelmat, jalan avohaavat, diabetes, turvotus, vasaravarvas, iho-ongelmat, raskaus. Sukkaa ei tule käyttää juuri leikattuun jalkaan.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
34108	Musta	Small	< 20 cm	Bilat.
34108	Musta	Medium	20 - 40 cm	Bilat.
34108	Musta	Large	> 40 cm	Bilat.



Mitta: Pohkeen ympärysmitta



Carbon Footplate

Hiilikuitupohjallisen tarkoituksena on suojata metatarsophalangeaaliniivelet MTP-nivelet ja jalkaterän etuosaa rajoittamalla liikelaajuutta (ROM). Hiilikuitupohjallinen auttaa jakamaan jalkaterän etuosaan kohdistuvaa painetta ja helpottaa ylipronaatiota. Hiilikuitupohjallista voidaan käyttää myös immobilisaatiohoidon jälkeen POST-OP-kengässä tai diabetesjalkineessa liikkumisen asteittaiseksi lisäämiseksi ja tasapainon parantamiseksi varpaiden IV ja/tai V amputoinnin jälkeen. Hiilikuitupohjallinen on peitettävä kengän omalla tai yksilöllisesti valmistetulla pohjallisella.

Käyttöalueet: Hallux rigidus, hallux limitus, rasisusmurtumat, etujalkaterän vammat, varpaiden nyrjähdykset ja muut etujalkaterän/keskijalkaterän vammat.

Tuotenro.	Koko	Leveys	Pituus	Vas/Oik	Paksuus
28035	Small	77mm	235mm	Vas/Oik	1,8 mm
28035	Medium	80 mm	255 mm	Vas/Oik	1,8 mm
28035	Large	90mm	275mm	Vas/Oik	1,8 mm
28035	X-Large	99mm	305mm	Vas/Oik	1,8 mm



Carbon Footplate Rigid

Hiilikuitupohjainen jalkalevy rajoittaa metatarsophalangeaaliniiveltä (MTP-nivelet) liikelaajuutta, jakaa paineen etujalkaterään ja helpottaa ylipronaatiota.

Käyttöalueet: Hiilikuitupohjallisen tarkoituksena on suojata metatarsophalangeaaliniivelet MTP-nivelet ja jalkaterän etuosaa rajoittamalla liikelaajuutta (ROM). Hiilikuitupohjallinen auttaa jakamaan jalkaterän etuosaan kohdistuvaa painetta ja helpottaa ylipronaatiota. Hiilikuitupohjallista voidaan käyttää myös immobilisaatiohoidon jälkeen POST-OP-kengässä tai diabetesjalkineessa liikkumisen asteittaiseksi lisäämiseksi ja tasapainon parantamiseksi varpaiden IV ja/tai V amputoinnin jälkeen. Hiilikuitupohjallinen on peitettävä kengän omalla tai yksilöllisesti valmistetulla pohjallisella.

Tuotenro.	Koko	Leveys	Pituus	Vas/Oik	Paksuus
28036	Small	77mm	235mm	Vas/Oik	2 mm
28036	Medium	80mm	255mm	Vas/Oik	2 mm
28036	Large	90mm	275mm	Vas/Oik	2 mm
28036	X-Large	99mm	305mm	Vas/Oik	2 mm



Nilkkaortoosi Gel

Nilkkaortoosi immobilisaatioon, kylmähoitoon sekä kompressioon turvotuksen vähentämiseksi nilkan akuuteissa vammoissa. Anatomisesti muotoilluissa muoviosissa on kaksiosaiset pehmusteet, joista toisessa on ilmaa, toisessa geeliä. Nämä voidaan myös irroittaa ja käyttää kylmähoitoon. Leveys kantapään alla säädetään tarranauhan avulla. Muoviosien pituus on 25 cm. Kaksi säären ympäri kulkevaa tarranauhaa tukee ortoosin paikalleen.

Käyttöalueet: Akuutit nilkkavammat, nyrjähdykset ja pitkäaikainen nilkkanivelen instabiliteetti.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28179	Valkoinen	Yksi koko	25 cm	Bilat.

Stabil Soft-nilkkatuki

Stabiili nilkkatuki, jossa on nilkan ympärillä yksinkertaiset kiinnitysnauhat. Polypropeenista valmistetut sivutuet on muotoiltu anatomisesti. Sisämateriaali on T-vahtokumia, joka muotoutuu säären mukaan. Tukea käytetään yhdessä tukevan kengän kanssa.

Käyttöalueet: Akuutit ja pitkäkestoiset nilkan instabiliteetit.

Tuotenro.	Väri	Koko	Vas/Oik
28184	Musta	Yksi koko	Bilat.



Airtex nilkkatuki

Airtex-nilkkatuki soveltuu parhaiten akuuttien vammojen jälkeiseen tuentaan. Tuki tuottaa myös miellyttävän kompression tunteen. Nilkan jänteet ja lihakset pysyvät toimintakykyisenä, joka tukee toiminnallista hoitoa. Ristikkäiskiinnitysremmit takaavat mediolateraalisen nilkan tuennan. 2 osainen kiinnitys mahdollistaa ksilöllisen tuennan ja kompression immobilisoimatta nilkan toimintakykyä. Tuen kantapää on avoin.

Airtex-mallisto on suunniteltu uudella ihoystävällisellä valmistustavalla. Nilkkatuki ei sisällä saumoja, joka mahdollistaa entistä mukavamman käyttäjäkokemuksen. Samalla edistäen ekologisuutta, koska kangasmateriaalia ei tarvita. Airtex-tuotteet ovat kevyitä ja ne ovat valmistettu hengittävästä kangasmateriaalista. Tämä varmistaa nilkkatuen erinomaisen hengittävyyden ja raikkaan tunteen ihon pinnalla.



Käyttöalueet Nyrjähdys, ruhjeet ja lihaskipu. Nivelten epävakaous ja jäykkyys. Tukee toimii muun muassa urheilun aikana.

Tuotenro.	Koko	Mitta	Väri
28194	Yksi koko	18-30 cm	Musta



Solid back walker, korkea

Korkea immobilisoiva Walker-ortoosi. Ortoosi on kevyt ja stabiili ja sen takaosa on koko matkalta kantapäästä pohkeen yläosaan asti suljettu tarjoten erinomaisen immobilisaation. Ortoosissa säären etupinnalle sijoittuva kovike voidaan irrottaa tarvittaessa. Nilkan alueella on lisäpehmusteet istuvuuden parantamiseksi. Mukana kaksi kondylityynyä paineen vähentämiseksi. Ortoosin pehmuste on pehmeää ja hengittävää materiaalia. Pestävä pehmuste suojaa myös varpaita ja tuntuu mukavalta. Liukuesteellä varustettu keinupohja sallii täydellisen kävelyn. Säädetävät tarranauhat varmistavat immobilisoinnin. Ortoosi on yhteensopiva Walker kantakiilojen kanssa. Röntgensäteilyn läpäisevä. Ortoosi ei sisällä lateksia.

Käyttöalueet: 2/3 asteen nilkan nyrjähdys. Stabiili fibulan distaalimurtuma, distaalinen sääriluu, talus, calcaneus ja metatarsaaliluut. Jalkavamman jälkeiseen hoitoon, Post-operatiiviseen käyttöön.

Muita tietoja: Korkeus koossa Medium on 42 cm.

Tuotenro.	Malli	Koko	Sisäpohjallisen pituus
47620	Solid Back Walker - Long	S	25 cm
47620	Solid Back Walker - Long	M	28 cm
47620	Solid Back Walker - Long	L	30 cm
47620	Solid Back Walker - Long	XL	32 cm
47621	Liner	S	n/a
47621	Liner	M	n/a
47621	Liner	L	n/a
47621	Liner	XL	n/a

Walker Protect Fixed, matalavartinen

Immobilisoiva matalavartinen walker, joka on matalaprofiilinen, kestävä ja tukeva muotoilultaan on valmistettu muotoon ruiskutetusta polypropeeniinista. Walkerissa on kaksi kiinteää sivutukea, jotka tukevat erinomaisesti jalkaa ja nilkkaa. Edessä ja takana olevat jäykät tuet sekä pehmuste nilkan ympärillä varmistavat immobilisoinnin. Walkerin sisällä on pehmeä, ilmava ja pestävä veluurikangas-pehmuste, joka suojaa iskuilta ja varmistaa mukavuuden. Ei sisällä lateksia. Toimitetaan kahdella ylimääräisellä kondyylyitynpehmusteella, jotka vähentävät painetta ja antavat lisämukavuutta. Rullaava pohja on anti-slip materiaalia ja sallii kävelyn koko liikeradalla. Säädettävä tarra-nauha takaa täyden immobilisoinnin. Säädettävissä kiiloilla. Röntgensäteet läpäisevä. Helppo sovittaa.



Käyttöalueet: Stabiilit jalan ja nilkan murtumat, akuutti nilkan alueen revähdyt, jännerepeämä, pehmytkudosvauriot ja postoperatiivinen immobilisointi.

Tuotenro.	Malli	Koko	Sisäpohjallisen pituus
47609	Protect Fixed matala	Small	25 cm
47609	Protect Fixed matala	Medium	29 cm
47609	Protect Fixed matala	Large	32 cm
47612	Lisänauhasetti	Yksi koko	
47616	Lisäpehmuste	Small	
47616	Lisäpehmuste	Medium	
47616	Lisäpehmuste	Large	
47617	Kiilasetti	Small	
47617	Kiilasetti	Medium	
47617	Kiilasetti	Large	
47618	Varvassuoja	Yksi koko	



Walker Protect Fixed, korkeavartinen

Immobilisoiva korkeavartinen walker, joka on matalaprofiilinen, kestävä ja tukeva muotoilultaan on valmistettu muotoon ruiskutetusta polypropeeinista. Walkerissa on kaksi kiinteää sivutukea, jotka tukevat erinomaisesti jalkaa ja nilkkaa. Edessä ja takana olevat jäykät tuet sekä pehmuste nilkan ympärillä varmistavat immobilisoinnin. Walkerin sisällä on pehmeä, ilmava ja pestävä veluurikangas-pehmuste, joka suojaa iskuilta ja varmistaa mukavuuden. Ei sisällä lateksia. Toimitetaan kahdella ylimääräisellä kondyylyitynypehmusteella, jotka vähentävät painetta ja antavat lisämukavuutta. Rullaava pohja on anti-slip materiaalia ja sallii kävelyn koko liikeradalla. Säädettyä tarra-nauha takaa täyden immobilisoinnin. Säädettyissä kiiloilla. Röntgensäteet läpäisevä. Helppo sovittaa.

Käyttöalueet: Stabiilit jalan ja nilkan murtumat, akuutti nilkan alueen venähdys, jännerepeämä, pehmytkudosvauriot ja postoperatiivinen immobilisointi.

Tuotenro.	Malli	Koko	Sisäpohjallisen pituus
47608	Protect Fixed korkea	Small	25 cm
47608	Protect fixed korkea	Medium	29 cm
47608	Protect fixed korkea	Large	32 cm
47611	Lisänauhasetti	Yksi koko	
47615	Lisäpehmuste	Small	
47615	Lisäpehmuste	Medium	
47615	Lisäpehmuste	Large	
47617	Kiila setti	Small	
47617	Kiilasetti	Medium	
47617	Kiila setti	Large	
47618	Varvassuoja	Yksi koko	

Walker AIR korkea

Immobilisoiva walker, muotoilultaan matalaprofiilinen, kestävä ja tukeva, on valmistettu muotoon ruiskutetusta polypropeiinista. Integroidulla ilma-järjestelmällä voit asteittain lisätä/vähentää immobilisointia tarpeen mukaan. Ortoosissa on kaksi kiinteää metallitukea, jotka stabiloivat jalan ja nilkan. Pehmeä pehmuste on päällystetty ilmavalla ja pestävällä kankaalla, joka suojaa iskuilta ja varmistaa mukavuuden. Ei sisällä lateksia. Säädettyä Velcro-nauha takaa täydellisen immobilisoinnin. Lisäpehmuste, nauha-setti, varvassuoja ovat tilattavissa erikseen. Säädettyissä kiiloilla. Helppo sovittaa.

Käyttöalueet: Stabiilit jalan ja nilkan murtumat, akuutti nilkan alueen revähdyt, jännerepeämä, pehmytkudosvauriot ja postoperatiivinen immobilisointi.

Tuotenro.	Malli	Koko	Kengän koko
47607	Walker Air korkea	Small	34-38
47607	Walker Air korkea	Medium	39-42
47607	Walker Air korkea	Large	43-45
47607	Walker Air korkea	X-Large	45-48
47610	Lisänauhasetti	Small	
47610	Lisänauhasetti	Medium/Large	
47614	Lisäpehmuste	Small	
47614	Lisäpehmuste	Medium	
47614	Lisäpehmuste	Large	
47617	Kiila setti	Small	
47617	Kiila setti	Medium	
47617	Kiila setti	Large	
47618	Varvassuoja	Yksi koko	



Walker kantakiila

Kuuden kappaleen kiilasetti, joista kukin on noin 4°. Yhteensä 20°. Setti on saatavana kolmessa eri koossa.

Tuotenro.	Malli	Koko
47617	Kantakiilasetti	Small
47617	Kantakiilasetti	Medium
47617	Kantakiilasetti	Large





Walker ROM Long

Ylemmän nilkkanivelen immobilisoiva ortoosi on valmistettu ruiskuvaletusta polypropeenista ja siinä on kevyt, kestävä ja vakaa muotoilu. ROM-säätö mahdollistaa asteittaisen mobilisaation 45°:n plantaariflexiosta 30°:n dorsaaliflexioon 7,5°:n välein. Liikerajoitusmahdollisuus 0°, 10° ja 20° plantaariflexioon. Metalliset sivukiskot säärellä. Integroidun ilmantäyttöjärjestelmän avulla voit asteittain lisätä/vähentää immobilisaatiota tarpeidesi mukaan.

Sen sisäpehmustettu tekstiili on vuorattu pehmeällä, hengittävällä ja pestävällä kankaalla, joka suojaa iskuilta ja takaa optimaalisen mukavuuden. Lateksiton. Liukumaton keinupohja mahdollistaa täyden rullauksen. Säädetävät tarranauhat takaavat täydellisen immobilisaation. Yksinkertainen ja helppo pukea. Mahdollista lisätä kantakiila.

Käyttöalueet: Akuutti nilkan nyrjähdys. Pohkeen pehmytkudosvauriot. Sääriluun ja pohjeluun distaaliset rasitusmurtumat. Jalan ja nilkan hyväasentoiset murtumat. Akillesjänteen leikkaus. Nilkan ja varpaan nivelten immobilisointi. Nilkkanivelen kuntoutus. Post-ORIF (open reduction and internal fixation) post-operatiivinen käyttö.

Muuta: Korkeus S 35 cm. Korkeus M ja L 42 cm.

Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik	Kengän koko
47606	Walker ROM long	Small	Bilat.	34-38
47606	Walker ROM long	Medium	Bilat.	39-42
47606	Walker ROM long	Large	Bilat.	43-45
47606	Walker ROM long	X-Large	Bilat.	45-48
47610	Lisänauhasetti	Small		
47610	Lisänauhasetti	Medium/Large		
47613	Lisäpehmuste	Small		
47613	Lisäpehmuste	Medium		
47613	Lisäpehmuste	Large		

Walker Fixed, korkeavartinen

Immobilisoiva korkeavartinen walker, joka on matalaprofiilinen, kestävä ja tukeva muotoilultaan on valmistettu muotoon ruiskutetusta polypropeeniinista. Walkerissa on kaksi kiinteää sivutukea, jotka tukevat erinomaisesti jalkaa ja nilkkaa. Edessä ja takana olevat jäykät tuet sekä pehmuste nilkan ympärillä varmistavat immobilisoinnin. Walkerin sisällä on pehmeä, ilmava ja pestävä veluurikangas-pehmuste, joka suojaa iskuilta ja varmistaa mukavuuden. Ei sisällä lateksia. Toimitetaan kahdella ylimääräisellä kondyylyitynypehmusteella, jotka vähentävät painetta ja antavat lisämukavuutta. Rullaava pohja on anti-slip materiaalia ja sallii kävelyn koko liikeradalla. Säädettävä tarra-nauha takaa täyden immobilisoinnin. Helppo sovittaa. Säädettävissä kiilapohjallisilla.



Käyttöalueet: Stabiilit jalan ja nilkan murtumat, akuutti nilkan alueen venähdys, jännerepeämä, pehmytkudosvauriot ja postoperatiivinen immobilisointi.

Tuotenro.	Malli	Koko	Pituus	Kengän koko
47605	Walker Fixed, korkeavartinen	Small	35 cm	34-38
47605	Walker Fixed, korkeavartinen	Medium	42 cm	39-42
47605	Walker Fixed, korkeavartinen	Large	42 cm	43-45
47605	Walker Fixed, korkeavartinen	X-Large	42 cm	45-48
47613	Lisäpehmuste	Small		
47613	Lisäpehmuste	Medium		
47613	Lisäpehmuste	Large		

Post op kenkä

Post op hoitokenkä, joka on pehmustettu. Kengän päällinen on kestävää nailonia ja siinä on solkikiinnitys. Päällinen on suunniteltu sopimaan jalan ollessa turvotustilassa. Kengän takaosa on vahvistettu, jotta jalka pysyisi paikallaan. Ulkopohja on jäykkä, suora ja pyöristämätön. Suunnittelu parantamaan vakautta ja helpottaa kuntoutusta jalkaleikkauksen tai traumahoidon jälkeen. Sitä voidaan käyttää myös yhdessä kipsin kanssa.

Käyttöalueet: Siteet tai turvotus, jalkaleikkaus, murtuneen varpaan hoito, metatarsaalivammat, pehmytkudostoimenpiteet, diabeettisen jalkaterän hoito ja leikkauksen jälkeinen toipuminen.



Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik	Kengän koko	Sisäpohjallisen pituus
43207	Lasten malli	Yksi koko	Bilateraalinen	EU < 35	20 cm
43208	Naisten malli	Small	Bilateraalinen	EU 35-37	23,5 cm
43208	Naisten malli	Medium	Bilateraalinen	EU 37-40	24,5 cm
43208	Naisten malli	Large	Bilateraalinen	EU 40-43	26 cm
43209	Miesten malli	Small	Bilateraalinen	EU 41-42	26 cm
43209	Miesten malli	Medium	Bilateraalinen	EU 43-45	27,5 cm
43209	Miesten malli	Large	Bilateraalinen	EU 46-47	30 cm
43209	Miesten malli	X-Large	Bilateraalinen	EU 47 >	31 cm



Optima Diab

Optima Diab on korkeavartinen hoitojalkine, joka on pääasiallisesti tarkoitettu jalkaterän ja jalkapohjan diabetesjalkahaavan hoitamiseen. Jalkineessa on korkea stabiili kantaosa, joka voidaan uudelleenmuotoilla lämpöilmahuuhtelulla sekä ilmava ja pestävä jota. Jalkineessa on rullaava muovinen pohja ja koottava 3x3 kevennyspohjallissarja kohdistettuun plantaarihaavan keventämiseen. Kevennyspohjallissarja on 3-kerroksinen ja siinä on kolme eri jäykkyyttä (jäykkä, medium ja pehmeä). Tarranauha sekä muovinen kiinnitysnauha varmistavat jalkineen pysymisen jalassa. Amputoidun jalan Optima kevennyspohjallinen sopii Optima Diab jalkineeseen ja se on tilattavissa erikseen.

Käyttöalueet: Diabetes jalkahaava, jalkaterän ja jalkapohjan jalkahaava, jalan osittaisen amputaation jälkeinen kuntoutus (paitsi - Chopart amputaatio), jalan leikkauksen jälkeinen kuntoutus, Charcot jalan kuntoutus akuutista krooniseen vaiheeseen siirryttäessä.

Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik	Kengän koko
79000	Optima Diab	Small	Bilat.	34 - 36
79000	Optima Diab	Medium	Bilat.	37 - 39
79000	Optima Diab	Large	Bilat.	40 - 42
79000	Optima Diab	X-Large	Bilat.	43 - 45
79000	Optima Diab	XX-Large	Bilat.	46 - 48
79005	3x3 kevennyspohjallissarja	Small	Bilat.	34 - 36
79005	3x3 kevennyspohjallissarja	Medium	Bilat.	37 - 39
79005	3x3 kevennyspohjallissarja	Large	Bilat.	40 - 42
79005	3x3 kevennyspohjallissarja	X-Large	Bilat.	43 - 45
79005	3x3 kevennyspohjallissarja	XX-Large	Bilat.	46 - 48

Optima Clheel

Optima Clheel on korkeavartinen hoitojalkine, joka on pääasiallisesti tarkoitettu kantapään alueen diabetshaavaumien hoitamiseen. Jalkineessa on avoin kantapää. Jalkineessa on rullaava muovinen pohja ja koottava 3x3 kevennyspohjallissarja kohdistettuun plantaarihaavan keventämiseen. Kevennyspohjallissarja on 3-kerroksinen ja siinä on kolme eri jäykkyyssasoa (jäykkä, medium ja pehmeä). Tarranauha sekä muovinen kiinnitysnauha varmistavat jalkineen pysymisen jalassa.

Käyttöalueet: Kantapään ja jalkapohjan haavaumat tai muut kantapään vammat, nivelsiteiden vammat, painehaavat.

Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik	Kengän koko
79002	Optima Clheel	Small	Bilat.	34 - 36
79002	Optima Clheel	Medium	Bilat.	37 - 39
79002	Optima Clheel	Large	Bilat.	40 - 42
79002	Optima Clheel	X-Large	Bilat.	43 - 45
79002	Optima Clheel	XX-Large	Bilat.	46 - 48
79006	3x3 kevennyspohjallissarja	Small	Bilat.	34 - 36
79006	3x3 kevennyspohjallissarja	Medium	Bilat.	37 - 39
79006	3x3 kevennyspohjallissarja	Large	Bilat.	40 - 42
79006	3x3 kevennyspohjallissarja	X-Large	Bilat.	43 - 45
79006	3x3 kevennyspohjallissarja	XX-Large	Bilat.	46 - 48



Optima Postop

Optima Postop on matala keventävä hoitojalkine, joka on pääasiallisesti tarkoitettu iskeemisen haavan hoitamiseen. Jalkineessa on jäykkä kantaosa, joka voidaan muotoilla lämpöilmapuhaltimeella sekä ilmava ja pestävä vuoritus. Jalkineessa on rullaava muovinen pohja, pehmeä kevennyspohjallinen sekä tarranauhakiinnitys. Optima 3x3 kevennyspohjallissarja sekä amputoidun jalan Optima kevennyspohjallinen sopivat Optima Postop jalkineeseen.

Käyttöalueet: Iskeemisen haavan hoitamiseen (revaskularisaatiota ennen ja jälkeen), jalkapöydän murtumat, varpaanpoiston kuntoutus, leikkauksen jälkeinen tuenta, varvasmurtumat.

Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik	Kengän koko
79001	Optima Postop	XX-Large	Bilat.	46 - 48
79001	Optima Postop	Small	Bilat.	34 - 36
79001	Optima Postop	Medium	Bilat.	37 - 39
79001	Optima Postop	Large	Bilat.	40 - 42
79001	Optima Postop	X-Large	Bilat.	43 - 45





Optima Europa

Optima Europa on jalan kuntouttamiseen tarkoitettu hoitojalkine. Jalkineessa on jäykkä kantaosa, joka voidaan muotoilla lämpöilmapuuhaltimella sekä ilmava ja pestävä vuoritus. Jalkineessa on rullaava muovinen pohja, pehmeä kevennyspohjallinen sekä tarranauhakiinnitys. Optima 3x3 kevennyspohjallissarja sekä amputoidun jalan Optima kevennyspohjallinen sopivat Optima Europa jalkineeseen.

Käyttöalueet: Varpaiden välisten haavojen hoitamiseen, vaivaisenluunleikkauksen kuntoutus, koukkuvarvasleikkauksen kuntoutus, Mortonin neurooma-leikkauksen jälkeinen kuntoutus, kynnen poiston jälkeinen kuntoutus.

Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik	Kengän koko
79003	Optima Europa	Small	Bilat.	34 - 36
79003	Optima Europa	Medium	Bilat.	37 - 39
79003	Optima Europa	Large	Bilat.	40 - 42
79003	Optima Europa	X-Large	Bilat.	43 - 45
79003	Optima Europa	XX-Large	Bilat.	46 - 48



Optima Free

Optima Free on jalan kuntouttamiseen tarkoitettu hoitojalkine. Jalkineessa on jäykkä kantaosa, joka voidaan muotoilla lämpöilmapuuhaltimella sekä ilmava ja pestävä vuoritus. Jalkineessa on rullaava muovinen pohja, pehmeä kevennyspohjallinen sekä tarranauhakiinnitys. Optima 3x3 kevennyspohjallissarja sopii Optima Free jalkineeseen.

Käyttöalueet: Jalan dorsaalit vammat, vaivaisenluun leikkauksen jälkeinen kuntoutus.

Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik	Kengän koko
79004	Optima Free	Small	Bilat.	34 - 36
79004	Optima Free	Medium	Bilat.	37 - 39
79004	Optima Free	Large	Bilat.	40 - 42
79004	Optima Free	X-Large	Bilat.	43 - 45
79004	Optima Free	XX-Large	Bilat.	46 - 48

Optima 3x3 kevennyspohjallissarja

Optima 3x3 kevennyspohjallissarja on tarkoitettu kohdistettavan jalkahaavan keventämiseen. Pohjallissa on kolme kerrosta sekä kolme eri jäykkyyttä (jäykkä=sininen 40 Sh, medium=keltainen 25 Sh ja pehmeä=punainen 20 Sh), jotka voidaan yhdistää ja sovittaa jalkahaavaan sopivaksi. Optima 3x3 kevennyspohjallissarja kuuluu perusvarusteena Optima Diab ja Clheel jalkineeseen, mutta niitä voidaan myös käyttää Optima Postop, Europa ja Free jalkineissa. Tilattava erikseen näihin malleihin.

Muuta: HUOM! Ainoastaan ammattitaitoinen henkilö voi sovittaa Optima 3x3 kevennyspohjallissarjan potilaalle. Älä koskaan käytä pohjallisia tavallisten kenkien tai muiden ortopedisten jalkineiden kanssa. Sarjaa tulee aina käyttää kokonaisuudessaan osat Optima ortoosin sisällä toisiinsa hyvin liitettynä. Noudata Optima käyttöohjeita toimintatapoja koskien.



Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik	Kengän koko
79005	Optima 3x3 kevennyspohjallissarja	Small	Bilat.	34 - 36
79005	Optima 3x3 kevennyspohjallissarja	Medium	Bilat.	37-39
79005	Optima 3x3 kevennyspohjallissarja	Large	Bilat.	40-42
79005	Optima 3x3 kevennyspohjallissarja	X-Large	Bilat.	43-45
79005	Optima 3x3 kevennyspohjallissarja	XX-Large	Bilat.	46-48

Amputoidun jalan Optima kevennyspohjallinen

Amputoidun jalan Optima kevennyspohjallinen on EVA-materiaalista valmistettu pohjallinen, joka on tarkoitettu käytettäväksi Optima Diab, Postop ja Europa jalkineissa jalan osittaisen amputaation jälkeen.

Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik	Kengän koko
79007	Amputoidun jalan Optima kevennyspohjallinen	Small	Bilat.	34-36
79007	Amputoidun jalan Optima kevennyspohjallinen	Medium	Bilat.	37-39
79007	Amputoidun jalan Optima kevennyspohjallinen	Large	Bilat.	40-42
79007	Amputoidun jalan Optima kevennyspohjallinen	X-Large	Bilat.	43-45
79007	Amputoidun jalan Optima kevennyspohjallinen	XX-Large	Bilat.	46-48





Mitta: Tyngän pituus.

Body Armor Pro Term

Väliaikainen hoito Chopartin tai Lisfrancin amputaation jälkeen.

Vaihtoehtoinen hoitomenetelmä ensimmäisen kuntoutumisjakson aikana.

Kiilamainen ulko- ja sisäpohjallinen takaavat painon jakautumisen jalan ojennuksessa oikealla tavalla jalan takaosaan. Jalkineen stabiili rakenne pitää tyngän paikallaan sekä auttaa sitä säilyttämään muotonsa. Integroidulla pumpulla varustettu sisäpehmuste auttaa muodon säilymisessä kevyen kompression avulla. Jalkinetta on saatavana kahta eri kokoa - 16 tai 19 cm - riippuen tyngän pituudesta.

Tuotenro.	Malli	Koko	Mitta	Vas/Oik
79008	Body Armor Pro Term	Medium	16 cm	Bilat.
79008	Body Armor Pro Term	Large	19 cm	Bilat.



SBI Motus Diabetes Walker ortoosi

SBI Motus Diabetes Walker ortoosi on tarkoitettu haavaumien ja diabetesjalan haavojen hoitamiseen jalkaterän ja jalkapohjan alueella. Ortoosissa on stabiili muovikehikko, joka suojaa tibiaa sekä irrotettava sisäosa, jota voidaan muotoilla kuumailmapuhaltimen avulla. Irrotettava täydellisesti rullaava keinupohja soveltuu hyvin jalkapohjan haavaumien hoitoon. Lisävarusteena on tilattavissa myös stabiili keinupohja, joka helpottaa akuutista krooniseen hoitovaiheeseen siirtymistä. Ortoosin kiinnitysnauhojen kohtaa voidaan siirtää ja ne voidaan varmistaa "irrotuksen estävän" järjestelmän avulla. Säädetävät 3x3 kiinnityspohjalliset ovat tarkoitettu kohdistettuun plantaarihaavaumien keventämiseen. Kiinnityspohjalliset koostuvat kolmesta eri kerroksesta ja kolmesta eri jäykkyydestä (jäykkä, medium ja pehmeä), joita voidaan yhdistellä keskenään ja sovittaa yksittäisiin haavaumiin sopiviksi. SBI 3x3 kevennyspohjalliset toimitetaan SBI Motus Diabetes Walker ortoosin mukana.



Käyttöalueet: Haavaumien ja diabetesjalan haavojen hoitamiseen jalkaterän ja jalkapohjan alueella. Charcot jalan stabilisoimiseksi. Leikkauksen jälkeinen kuntoutus.

Muuta: Saumatonta sukkaa tulee aina käyttää SBI-ortoosin alla. Sukan sisäpuoli on valmistettu pehmeästä froteemateriaalista ja se toimitetaan ortoosin mukana.

Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik	Kengän koko
79015	SBI Motus Diabetes Walker	Small	Bilat.	34 - 36
79015	SBI Motus Diabetes Walker	Medium	Bilat.	37 - 39
79015	SBI Motus Diabetes Walker	Large	Bilat.	40 - 42
79015	SBI Motus Diabetes Walker	X-Large	Bilat.	43 - 45
79015	SBI Motus Diabetes Walker	XX-Large	Bilat.	46 - 48



SBI Frame Post-op Walker

Käyttövalmis, säädettävä Walker-ortoosi traumoihin. Kevyt ja erittäin mukavan tuntuinen toiminnalliseen kuntoutukseen. Stabiili muovikehikko, joka suojaa tibiaa sekä irrotettava sisäosa, jota voidaan muotoilla kuumailmapuhaltimen avulla. Kiinnitysnauhojen kohtaa voidaan siirtää. Irrotettava stabiili keinupohja ja SBI pohjallinen (79026) toimitetaan ortoosin mukana.

Käyttöalueet: Stabiilit jalka- ja/tai nilkkamurtumat. Vaikeat venähdykset. Postoperatiivinen kuntoutus.

Muuta: Saumatonta sukkaa tulee aina käyttää SBI-ortoosin alla. Sukan sisäpuoli on valmistettu pehmeästä froteemateriaalista ja se toimitetaan ortoosin mukana.

Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik	Kengän koko
79016	SBI Frame Post-op Walker	Small	Bilat.	34-36
79016	SBI Frame Post-op Walker	Medium	Bilat.	37-39
79016	SBI Frame Post-op Walker	Large	Bilat.	40-42
79016	SBI Frame Post-op Walker	X-Large	Bilat.	43-45
79016	SBI Frame Post-op Walker	XX-Large	Bilat.	46-48

SBI Wheel Walker ortoosi avoimella kantaosalla

SBI Walker ortoosi, joka on kehitetty toiminnalliseen kantapään alueen kuntoutukseen sekä keventämään kantapään alueen haavaumia avoimen kantaosan avulla. Ortoosi on kevyt ja erittäin mukavan tuntuinen. Avoimen kantaosan ansiosta kantapään haavaumat hengittävät ja niiden kuntoa voidaan myös tarvittaessa tarkastaa. Säädettyä stabiili muovikehikko suojaa tibiaa ja sen sisäosaa voidaan muotoilla kuumailmapuhaltimella. Irrotettava täydellisesti rullaava keinupohja plantaaristen haavaumien hoitamiseen ja säädettyvät 3x3 kevennyspohjalliset toimitetaan ortoosin mukana. Kiinnitysnauhojen kohtaa voidaan siirtää.



Käyttöalueet: Kantapään alueen vammojen hoito.

Muuta: Saumatonta sukkaa tulee aina käyttää SBI-ortoosin alla. Sukan sisäpuoli on valmistettu pehmeästä froteemateriaalista ja se toimitetaan ortoosin mukana.

Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik	Kengän koko
79017	SBI Wheel Walker ortoosi avoimella kantaosalla	Small	Bilat.	34-36
79017	SBI Wheel Walker ortoosi avoimella kantaosalla	Medium	Bilat.	37-39
79017	SBI Wheel Walker ortoosi avoimella kantaosalla	Large	Bilat.	40-42
79017	SBI Wheel Walker ortoosi avoimella kantaosalla	X-Large	Bilat.	43-45
79017	SBI Wheel Walker ortoosi avoimella kantaosalla	XX-Large	Bilat.	46-48



SBI päällinen

SBI päällinen on vettähylyvä päällinen, joka suojaa ja pitää SBI Walkerin puhtaana. Se on suunniteltu käytettäväksi yhdessä SBI Motuksen, SBI Framen ja SBI Wheelen kanssa. Materiaali on semi-elastista ja tuotteen takaosassa on vetoketju. Kumipohja antaa kävellessä lisätukea. Päällinen on pestävä.

Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik
79029	SBI Päällinen	Small	Bilateraalinen
79029	SBI Päällinen	Medium	Bilateraalinen
79029	SBI Päällinen	Large	Bilateraalinen
79029	SBI Päällinen	X-Large	Bilateraalinen
79029	SBI Päällinen	XX-Large	Bilateraalinen



SBI Walker kehikko suljetulla kantaosalla

Vaihdettava kehikko suljetulla kantaosalla. Sopii SBI Motus Diabetes Walker ortoosiin ja SBI Frame Post-op Walker ortoosiin.

Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik	Kengän koko
79018	SBI Walker kehikko suljetulla kantaosalla	Small	Bilat.	34 - 36
79018	SBI Walker kehikko suljetulla kantaosalla	Medium	Bilat.	37 - 39
79018	SBI Walker kehikko suljetulla kantaosalla	Large	Bilat.	40 - 42
79018	SBI Walker kehikko suljetulla kantaosalla	X-Large	Bilat.	43 - 45
79018	SBI Walker kehikko suljetulla kantaosalla	XX-Large	Bilat.	46 - 48

SBI Walker kehikko avoimella kantaosalla

Vaihdeettava kehikko avoimella kantaosalla SBI Wheel Walker ortoosiin.

Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik	Kengän koko
79019	SBI Walker kehikko avoimella kantaosalla	Small	Bilat.	34 - 36
79019	SBI Walker kehikko avoimella kantaosalla	Medium	Bilat.	37 - 39
79019	SBI Walker kehikko avoimella kantaosalla	Large	Bilat.	40 - 42
79019	SBI Walker kehikko avoimella kantaosalla	X-Large	Bilat.	43 - 45
79019	SBI Walker kehikko avoimella kantaosalla	XX-Large	Bilat.	46 - 48



Täydellinen sisäsosasarja SBI Walker ortoosiin

Vaihdeettava täydellinen sisäsosasarja SBI Walker ortooseihin tasaisesta muotoiltavasta EVA-materiaalista. Sisäosat ovat muotoiltu jalan muotoihin ja anatomiaan sopivaksi. Tibian suojaosassa on irrotettava vahvike.

Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik
79020	Täydellinen sisäsosasarja SBI Walker ortoosiin	Small	Bilat.
79020	Täydellinen sisäsosasarja SBI Walker ortoosiin	Medium	Bilat.
79020	Täydellinen sisäsosasarja SBI Walker ortoosiin	Large	Bilat.
79020	Täydellinen sisäsosasarja SBI Walker ortoosiin	X-Large	Bilat.
79020	Täydellinen sisäsosasarja SBI Walker ortoosiin	XX-Large	Bilat.





SBI Walkerin soljet ja nauhat

SBI Walker lisäosasarja, jossa 8 solkea ja 4 kiinnitysnauhaa.

Tuotenro.	Malli	Koko	Pakkaus
79021	SBI Walker soljet ja nauhat	Small/Medium	8 solkea, 4 nauhaa
79021	SBI Walker soljet ja nauhat	Large/X-Large/XX-Large	8 solkea, 4 nauhaa




SBI stabiili keinupohja

SBI ortoosien keinupohjat voidaan nopeasti ja helposti kiinnittää sekä irrottaa ja vaihtaa ortoosiin. Stabiili keinupohja rullaa vähemmän kuin täydellisesti rullaava keinupohja. Sitä käytetään kun siirrytään akuutista krooniseen hoitovaiheeseen. Stabiilia keinupohjaa ei toimiteta ortoosin mukana vaan se on tilattava erikseen.

Muuta: HUOM! Älä käytä SBI ortoosia koskaan ilman keinupohjaa. Lue SBI ortoosin käyttöohjeet koskien keinupohjan vaihtamista.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Vas/Oik
79022	SBI stabiili keinupohja	Harmaa	Small	Bilat.
79022	SBI stabiili keinupohja	Harmaa	Medium	Bilat.
79022	SBI stabiili keinupohja	Harmaa	Large	Bilat.
79022	SBI stabiili keinupohja	Harmaa	X-Large	Bilat.
79022	SBI stabiili keinupohja	Harmaa	XX-Large	Bilat.

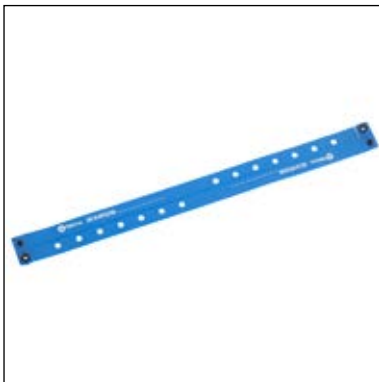

Lukitusnauha SBI Walker ortoosiin

Lukitusnauha, jonka avulla ortoosi varmistetaan "irrotuksen estäväksi" järjestelmäksi.

Tuotenro.	Malli	Koko	Pakkaus
79028	Lukitusnauha SBI Walker ortoosiin	Yksi koko	2

SBI täydellisesti rullaava keinupohja

SBI ortoosien keinupohjat voidaan nopeasti ja helposti kiinnittää sekä irrottaa ja vaihtaa ortoosiin. SBI täydellisesti rullaava keinupohja toimitetaan ortoosin mukana. Se on tarkoitettu käytettäväksi plantaaristen haavaumien akuutin hoitovaiheen aikana. SBI täydellisesti rullaava keinupohja on rullaavampi kuin stabiili keinupohja.

Muuta: HUOM! Älä käytä SBI ortoosia koskaan ilman keinupohjaa. Lue SBI ortoosin käyttöohjeet koskien keinupohjan vaihtamista.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Vas/Oik
79023	SBI täydellisesti rullaava keinupohja	Musta	Small	Bilat.
79023	SBI täydellisesti rullaava keinupohja	Musta	Medium	Bilat.
79023	SBI täydellisesti rullaava keinupohja	Musta	Large	Bilat.
79023	SBI täydellisesti rullaava keinupohja	Musta	X-Large	Bilat.
79023	SBI täydellisesti rullaava keinupohja	Musta	XX-Large	Bilat.



SBI 3x3 kevennyspohjallissarja

Koottava SBI 3x3 kevennyspohjallissarja on suunniteltu keventämään jalkapohjaan kohdistuvaa painetta sekä hoitamaan jalkaterän, päkiän ja kantapään alueen haavaumia. Sarja koostuu yhdeksästä osasta, jotka voidaan koota yhteen ja muodostaa kolme eri plantaaripohjallista. Pohjallissa on eri kolme eri jäykkyyttä (punainen=pehmeä 20 Sh, beige=medium 25 Sh ja sininen=jäykkä 40 Sh). Osien eri jäykkyyksiä voidaan yhdistää vaaka- ja pystysuunnittain. Jalkapohjaan kohdistuvaa painetta voidaan helposti keventää yhdistelemällä eri osia. Pohjallissarja on tarkoitettu käytettäväksi SBI Motus (sarja sis. ortoosiin), SBI Wheel (sarja sis. ortoosiin) ja SBI Frame (sarja tilattava erikseen) ortoosien kanssa.

Muuta: HUOM! Ainoastaan ammattitaitoinen henkilö voi sovittaa SBI 3x3 kevennyspohjallissarjan potilaalle. Älä koskaan käytä pohjallisia tavallisten kenkien tai muiden ortopedisten jalkineiden kanssa. Sarjaa tulee aina käyttää kokonaisuudessaan osat SBI ortoosin sisällä toisiinsa hyvin liitettyinä. Noudata SBI käyttöohjeita toimintatapoja koskien.

Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik
79024	SBI 3x3 kevennyspohjallissarja	Small	Bilat.
79024	SBI 3x3 kevennyspohjallissarja	Medium	Bilat.
79024	SBI 3x3 kevennyspohjallissarja	Large	Bilat.
79024	SBI 3x3 kevennyspohjallissarja	X-Large	Bilat.
79024	SBI 3x3 kevennyspohjallissarja	XX-Large	Bilat.





SBI pohjallinen amputoidulle jalalle

SBI pohjallinen amputoidulle jalalle on suunniteltu käytettäväksi postoperatiivisesti varpaan/varpaiden amputaation tai transmetatarsaalisen amputaation jälkeen. Pohjallinen on tarkoitettu käytettäväksi SBI Motus, SBI Wheel ja SBI Frame ortoosien kanssa. Pohjallinen tulee tilata erikseen.

Muuta: SBI pohjallisen amputoidulle jalalle saa määrätä käytettäväksi vain terveydenhoidon ammattilainen. Älä koskaan käytä pohjallista tavallisten kenkien tai muiden ortopedisten jalkineiden kanssa. Noudata SBI käyttöohjeita toimintatapoja koskien.

Tuotenro.	Malli	Koko
79025	SBI pohjallinen amputoidulle jalalle	Small
79025	SBI pohjallinen amputoidulle jalalle	Medium
79025	SBI pohjallinen amputoidulle jalalle	Large
79025	SBI pohjallinen amputoidulle jalalle	X-Large
79025	SBI pohjallinen amputoidulle jalalle	XX-Large



SBI pohjallinen

Vahva yksikerroksinen pohjallinen, joka toimitetaan SBI Frame Post-Op Walker ortoosin mukana, mutta se voidaan myös tilata erikseen.

Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik
79026	SBI pohjallinen	Small	Bilat.
79026	SBI pohjallinen	Medium	Bilat.
79026	SBI pohjallinen	Large	Bilat.
79026	SBI pohjallinen	X-Large	Bilat.
79026	SBI pohjallinen	XX-Large	Bilat.



SBI Saumaton sukka

Saumaton sukka, jota käytetään SBI ortoosin alla. Sukan sisäpuoli on valmistettu pehmeästä froteemateriaalista ja se toimitetaan kaikkien SBI-ortoosien mukana.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Vas/Oik
79027	SBI Saumaton sukka	Sininen	Yksi koko	Bilat.