

X-LITE® ortoosien sekä muiden matalalämpömuovista tehtyjen ortoosien puhdistus ja hoito.

Aikoina, jolloin on kiinnitettävä normaalia enemmän huomiota infektioiden estämiseen ja suosituksiin pestä kädet usein, on oltava myös tarkka ortoosien puhdistuksen kanssa. Suosittelemme, että peset ortoosisi kerran päivässä pitääksesi sen puhtaana ja hygieenisena.



Täytä vati haalealla vedellä ja lisää pari tippaa astianpesuainetta tai saippuaa. Sulje ortoosin tarranauhat.



Vaahdota vettä käsin ja aseta ortoosi veteen.



Harjaa ortoosia varovasti ½ - 1 minuutin ajan. Voit käyttää pehmeää harjaa, jotta ulotut kaikkiin materiaalin rei'ityksiin.



Huuhdo ortoosi hyvin kylmässä vedessä.



Kuivaa ortoosi käsipyyhettä vasten. Älä kuivaa hiustenkuivaajalla tai muullakaan lämpimällä laitteella. Tämä voi muuttaa muotoa ja aiheuttaa, että ortoosi ei istu enää oikein. Hiustenkuivaajan kylmällä ilmalla voi kuivata ortoosin nauhan tai X-LITE® Plus materiaalista valmistetun ortoosin, koska tekstiilimateriaali vaatii pidemmän kuivausajan.

Voit käyttää tavallisia alkoholipohjaisia desifointiaineita pyyhkiäksesi tuen pesujen välillä. Tuotteissa voi olla eri ainesosia, ja suosittelemmekin, että testaat ensin ainetta pienelle alueelle. Kun käytät ortoosia kodin ulkopuolella tai töissä voi olla hyvä käyttää hansikasta suojana ortoosin päällä. Mikäli käytät ei poistettavissa olevaa X-LITE®-kipsiä, suosittelemme että suojaat sen samalla lailla. Voit pyyhkiä sen päivittäin pehmeällä ja kostealla liinalla.