

# OACTIVE® 2

Unilateraalinen polviortoosi polviartroosin hoitoon. Joustava, yksinkertainen ja kevyt rakenne. Valmistettu alumiinista. Ortoosissa on innovatiivinen solkisysteemi, joka auttaa ortoosin pukemisessa ja riisumisessa. OACTIVE® 2 mallissa on vain yksi koko, joko oikeaan tai vasempaan jalkaan.

Ainutlaatuinen Q-nivel säädetään vasta- tai myötäpäivään keventämisen lisäämiseksi. Aloita neutraaliasennossa, polven ollessa koukistettuna 90°:ssa, ja kierrä 1/8 kierrosta kerrallaan. OACTIVE® 2 voidaan myös asettaa rajoittamaan extension ja fleksion liikelaajuutta toisistaan riippumatta. Ortoosi voidaan säätää myös vapaasti liikkuvaksi. Toimitettaessa ortoosissa on 5° ojennusrajoitus asennettuna. Ortoosi toimitetaan ohjein eri fleksio- ja extensiorajoittimille.

## Käyttöalueet

Lievästä vaikeaan toispuoleiseen polviartroosiin. Mediaalinen tai lateraalinen.

## Kontraindikaatiot

Katso käyttöohje.



Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik
550001000	OACTIVE 2	Yksi koko	Vasen
550002000	OACTIVE 2	Yksi koko	Oikea
550122000	Remmisetti (ilman solkea)	Yksi koko	Oikea
550121000	Remmisetti (ilman solkea)	Yksi koko	Vasen
550131000	Pehmustesetti	Yksi koko	Vasen
550132000	Pehmustesetti	Yksi koko	Oikea
550140061	Kiinnitysside	61 cm	-
550140081	Kiinnitysside	81 cm	-