

# SWASH<sup>®</sup> Steady

Tuotetta on jatkokehitetty niin, että sen rakennetta ja ulkonäköä on parannettu. SWASH:in tarkoitus on estää liiallinen lonkan adduktio istuessa, seisoessa ja kävellessä, joka on tyypillinen ongelma Cerebral pareesissa. Tuki sallii liikkeen kaikilla kolmella liikkumistasoilla. Tärkein SWASH<sup>®</sup>:n tarjoama hyöty on lonkan linjauksen ohjaaminen.

SWASH Steady tarjoaa maksimaalisen vartalonhallinnan. Kun potilas on pääasiassa liikuntakyvytön (GMFCS IV-V), tai potilaat, joilla on heikko keskivartalon lihaksisto tai rajoittunut keskivartalon stabiiliteetti hyötyvät mallin tarjoamasta lisääntyneestä posteriorisesta ja lateraalaisesta tuesta. Istuessa alustaa levennetään tuen saamiseksi, mikä auttaa potilasta saamaan pystyasennon ja tasapainoisen asennon ja samalla venyttämään adduktoreja.

Täydellinen SWASH-ortoosi koostuu kolmesta osasta: lantio-osasta, reisimanseteista ja pystytolpista. Tilaa jokainen osa erikseen.

SWASH Steady lantio-osa on polyetyyleeniä ja ulottuu L2/L3 tasolta häntäluun distaaliseen osaan antaen maksimaalisen tuen vartalolle ja lonkalle. Ortoosin osat tilataan erillisillä tuotenumeroilla.

Jalustoja on saatavana 2 eri versiota:

115° = kapea istuinalusta / 123° = leveä istuinalusta.

Reisitangon halkaisija on 6 mm koossa 1 ja 8mm koossa 2-4.

## Käyttöalueet

Cerebral pares ja saksaava käynti tai instabiiliteetti istuessa liiallisen adduktion vuoksi, lonkan subluksaatio.

Maksimaalisen hallinnan ollessa tarpeen; esim. potilas joka tarvitsee lihasvoimaa tai lisää keskivartalon hallintaa pystyäkseen istumaan suorassa.

Kun potilas on primäärisesti liikkumaton.

## Kontraindikaatiot

Dislokoitunut lonkka. Kun lonkan fleksiokontraktuura on suurempi kuin 20 astetta (dynaaminen tai jäykistynyt). Kun adduktorien voima estää ortoosin käytön. Kun adduktorit ovat liian lyhyet ja estävät SWASH:n käytön istuessa.

## Mitta

Tutustu SWASH Sovitus manuaaliin saadaksesi lisätietoja mitoista.



Tuotenro.	Malli	Koko	Ympärysmitta	Pituus	Halkaisija
288520001	STEADY Vyötäröosa	1, sopii tankoihin Ø 6 mm	40-46,5 cm	-	-
288520002	STEADY Vyötäröosa	2	46-55 cm	-	-
288520003	STEADY Vyötäröosa	3	54-63 cm	-	-
288520004	STEADY Vyötäröosa	4	62-72 cm	-	-
288540601	STEADY Reisiosa	1	21-25 cm	-	-
288540802	STEADY Reisiosa	2	25-29 cm	-	-
288540803	STEADY Reisiosa	3	29-33 cm	-	-
288540804	STEADY Reisiosa	4	33-38 cm	-	-
288540805	STEADY Reisiosa	5	38-44 cm	-	-
288540806	STEADY Reisiosa	6	44-50 cm	-	-
288550601	STEADY Reisitankosetti 115°	1	-	31 cm	6 mm
288550802	STEADY Reisitankosetti 115°	2	-	37,5 cm	8 mm
288550803	STEADY Reisitankosetti 115°	3	-	44 cm	8 mm
288550804	STEADY Reisitankosetti 115°	4	-	48 cm	8 mm
288550805	STEADY Reisitankosetti 115°	5	-	54 cm	8 mm
288550806	STEADY Reisitankosetti 115°	6	-	60 cm	8 mm
288560601	STEADY Reisitankosetti 123°	1	-	31 cm	6 mm
288560802	STEADY Reisitankosetti 123°	2	-	37,5 cm	8 mm
288560803	STEADY Reisitankosetti 123°	3	-	44 cm	8 mm
288560804	STEADY Reisitankosetti 123°	4	-	48 cm	8 mm
288560805	STEADY Reisitankosetti 123°	5	-	54 cm	8 mm
288560806	STEADY Reisitankosetti 123°	6	-	60 cm	8 mm