



Toiminnallinen ortoosiyhdistelmä



Semi-rigidi
Hyperekstensio-ortoosi



Allard AFO

Yhdistettävissä seuraavien
mallien kanssa:

- Ypsilon®
- ToeOFF®
- BlueROCKER®



Toiminnallinen polviortoosi polven yliojennukseen

- Tehokas yliojennuksen kontrolli sekä AFO:n kanssa että ilman
- Hyperekstensiopolviortoosi valmistettu käytettäväksi Allard AFO:n kanssa!



Anatomisesti muotoiltu patella-aukko silikoni-pehmusteella.

Tasku, joka suojaa ja pitää nivelen paikallaan.



Takaristikon nauhat voidaan säätää yhdellä kädellä.

Leveä nauha estää lastoja liukumasta taaksepäin kun hyperekstensionauhaa kiristetään.

Silikoni on asetettu strategisesti liukumisen estämiseksi

Säädettävä nivel:
Flexio: 45°, 60°, 75°, 90°
Ekstensio: 10°, 20°, 30°, 40°

Mukavuuden lisäämiseksi on ortoosi muotoiltu jalan linjojen mukaan.

Muotoiltu vahvistus, joka stabilisoi aukon ja keventää AFO:n painetta.

Mikä tekee CROSSista käyttäjäystävällisen?



Ohut, kevyt ja hengittävä materiaali, joka on miellyttävän tuntuinen.

- Tarkkaan suunnitellun yläosan vahvistuksen ansiosta ortoosi pysyy aina avoimena ja on siten helppo vetää jalkaterän yli ja säartä pitkin ylös myös silloin kun käden toiminta on rajoittunut.
- Reilu yläreunan vetotasku on apuna vedettäessä ortoosia säartä pitkin ylös ja asetettaessa patella-aukkoa oikeaan kohtaan polvessa.



Hyvin pehmeä sisäpuoli vähäisellä kitkalla ja ilman näkyviä ja hankaavia saumoja.

- Luo ”suojakerroksen” ortoosin ja ihon väliin.
- Vähentää ihoärsytystä
- Auttaa ortoosia liukumaan jalkaterän yli säartä pitkin ylös paikalleen.



Pue ortoosi yhdellä kädellä

Ainutlaatuinen mukana tuleva veto-koukku tekee yksinkertaisemmaksi:

- Pukea ortoosi istuvassa asennossa
- Pukea ortoosi omin käsin jopa rajoittuneella käden toiminnalla

Kuinka veto-koukku käytetään?

- Veto-koukku asennetaan harmaan merkin alle reisosan takana
- Kaikkien nauhojen ollessa auki vedetään ortoosi jalan yli ortoosin takaosan ollessa käännettynä eteen.
- Kun ortoosi on vedetty jalan yli, käännetään se oikein päin. Sileä vuori helpottaa ortoosin vetämistä jalkaan. Ortoosi vedetään ylös, kunnes patella-aukko on oikein asetettu polven yli.

CROSS™

Hyperekstensio-ortoosi



CROSS™ on tarkoitettu tukemaan polviniveltä, jossa on lievä tai keskivaikea yliojennusongelma neuromuskulaaristen sairauksien tai muiden vammojen seurauksena. Ortoosia voidaan käyttää yhdessä Allard AFOjen kanssa kun yliojennus polvinivelessä esiintyy yhdessä riippunilkan kanssa.



[www.youtube.com
Camp Scandinavia](http://www.youtube.com/CampScandinavia)

odottaa patenttia

Tuotenro.	Tuote	Koko	Ympärysmitta 15 cm patellan keski- kohdan alapuolelta	Polven-ympäryys patellan keski-kohdasta	Ympärysmitta 15 cm patellan keskikohdan yläpuolelta.
28715 0011	CROSS™ Polviortoosi	Small	32-37cm	32-37cm	39-44cm
28715 0012	CROSS™ Polviortoosi	Medium	36-41 cm	36-41 cm	43-48cm
28715 0013	CROSS™ Polviortoosi	Large	40-45cm	40-45cm	47-52cm
28715 0014	CROSS™ Polviortoosi	X-Large	44-49cm	44-49cm	51-57cm
28716 0000	Veto-koukku	Yksi koko			

Kokeile myös seuraavia ratkaisuja eri käyttäjien tarpeisiin polven yliojennuksessa:

CHECK™ Stainless Steel

Kun tarvitaan pidempää vipuvartta yliojennuksen hallintaan.



COMBO™ Hyperekstensio KAFO

Kun tarvitaan polvi-nilkaortoosi yliojennuksen hallintaan.

